

Geemarc

NO BRUGERVEJLEDNING  
Echo Loop Pad

Echo® Loop Pad™ er en kraftig og fleksibel stolslynge til bruk med høreapparat som har T-stilling. Stolslyngen kan brukes med:

- Echo® MegaLoop™
- EchoSL™
- Echo® MegaLoop DAC™

En elektrisk strøm ledes til stolslyngen via en forsterker som får signal fra en forbindelse med en lydkilde (f.eks. TV eller mikrofon). Strømmen i slyngen danner et magnetfelt. Dette magnetfeltet oppfanges hvis du sitter innenfor området til stolslyngen, og ditt høreapparat er innstilt på T.

Stolslyngen dekker et område på opptil 1,5 meter, stolslyngen kan brukes i stedet for trådbundet slynge, noe som gjør den lettere å tilpasse og mer bærbar i situasjoner som møter/intervjuer og i resepsjonsområder. Stolslyngen kan plasseres under en setepute eller under et skrivebord, helt uten ledninger.

Sett forsterkeren i en passende stilling, koble ledningen fra stolslyngen til klemmene bak på forsterkeren, og plasser slyngen i en posisjon som er passende for brukeren. Pass på at ledningen trekkes slik at den ikke er i veien for å hindre skader eller skape forhindringer.

Mål – 355 mm x 255 mm x 3 mm

Kabellengde – 10 m (kan forkortes)