

Bruksanvisning

AUDIOLINK SØYLEHØYTTALER HT4B

Artikkelnr. 1558

Høytaleren har fire elementer for rettet lyd
og er beregnet for bruk med AudioLink forsterkere.
Veggbrakett medfølger.



Dok. nr.: 2421A1
Dato: 2017-03-01

Virkemåte

Høytaleren er passiv, dvs. uten innebygd forsterker. Den må derfor kobles til høytalerutgangen på AudioLink systemet.

Montering

Høytaleren plasseres på ønsket sted. Den er forberedt for følgende plasseringer:

- På vegg med veggbrakett (medfølger)



- På gulvstativ (tilbehør, flere alternativer)
- På bord

Innstillinger

Det er ingen justeringsmuligheter på høytaleren.

Feilmelding

Høytaleren gir ingen feilmeldinger.

Enkel feilretting

Dersom høytaleren ikke virker, bør man kontrollere at den er koblet riktig i forhold til AudioLink systemet.

Produsent

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs.

Rengjøring utført av bruker

Høytaleren kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen