

Hearit/Hørat MT



bruksanvisning

besøk også www.phonicear.com

Innholdsfortegnelse

Hearit/Hørat	4
Funksjoner i Hearit/Hørat.	5
Tilbehør til Hearit/Hørat.	6
Hvordan bruke Hearit/Hørat	7
Lydinnstilling	10
Rengjøring av Hearit/Hørat	11
Feilsøking.	11-12
Garanti	13
Godkjenning	15

Alle Hearit/Hørat produktene er designet for å være lette å bruke, kraftige og robuste. Den kjente lyd kvaliteten og sikkerheten som Hearit/Hørat er kjent for følger alle modellene. De forskjellige produktene er designet for å fungere både med og uten høreapparater. Dette betyr at de er ideell for mennesker som bare trenger forsterkning i enkelte situasjoner, de som ikke kan bruke vanlige høreapparater og for de som er under medisinsk behandling. Hearit/Høraten er ment for å lytte til samtale i vanskelige omgivelser, til TV og i offentlige tilstelninger. I alle disse situasjonene kan mikrofon eller telespole, om det er teleslynge tilgjengelig, benyttes til å høre hva som blir sagt.

Hovedprodukter:

Hearit/Hørat M:	Mikrofon
Hearit/Hørat MT:	Mikrofon og Telespole
Hearit/Hørat T:	Telespole
Hearit/Hørat SE:	Spesial utgave

Funksjoner i Hearit/Hørat

1. på/av og volumkontroll

For å slå Hearit/Hørat på og av, og for å regulere lydstyrken

2. indikatorlys

Viser når Hørat er slått på og til å velge mellom mikrofon eller telespoleinnstilling (kun MT)

3. mikrofon

Fanger opp den lyden du ønsker å høre

4. AUX kontakt til tilbehør

For å koble forskjellig tilbehør til Hearit/Hørat. Tilbehøret kan kjøpes separat.

5. batterilukk

6. knapper til feste av bæresnoren

For å bære Hearit/Hørat på brystet


7. hodetelefonkontakt

For å koble til hodetelefon

8. lydinnstilling

(for avanserte brukere)

- * Bass kontroll
- * Gain kontroll
- * Telespole
- * Mikrofon

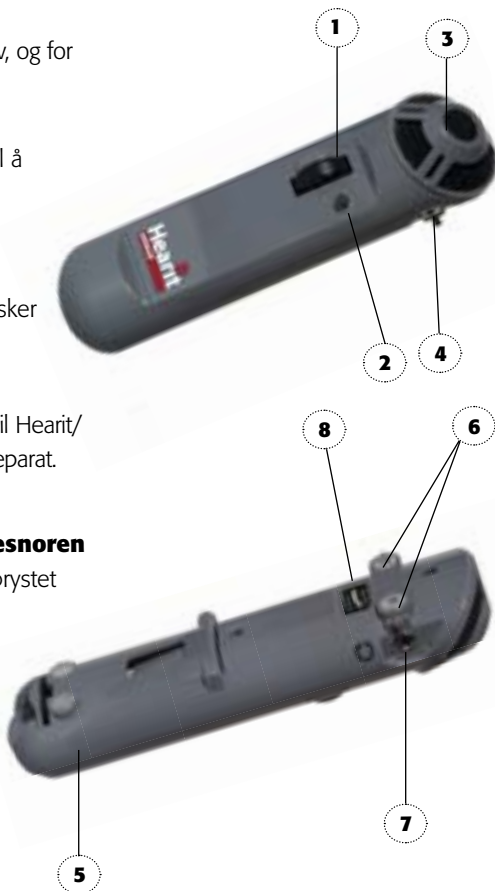

Tilbehør til Hearit/Hørat (inkludert)

10. standard hodetelefon

(Kan endres avhengig av tilgjengelighet)

10



11



11. bæresnor

12. to batterier

(LR6, AA, E91, Alkaline penlight)

12



13



13. veske

(Kan endres avhengig av tilgjengelighet)


Tilbehør til Hearit/Hørat (ikke inkludert, men kan kjøpes)




890-88-604-00
Halsslynge



890-88-602-00
Hodetelefon

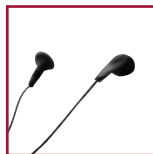

890-88-601-00
Øreplugger

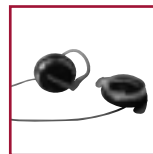

890-88-616-00
Hodetelefoner på øret



890-15-141-00
Konferansemikrofon



890-88-610-00
Ekstra puter til
hodetelefon



392-88-103-00
Scart kabel for å koble
til TV (8 m)



890-88-620-00
TV-box startpakke

Hvordan bruke Hearit/Hørat

1. sett i batteriene



Åpne batteridekselet og sett i batteriene.

Sett inn batteriene den veien som vises på tegningen i batterirommet. Lukk batterilokket og kontroller at indikatorlyset lyser når du slår på Hearit/Hørat.

2. koble til hodetelefonen



Koble hodetelefonen til i hodetelefonkontakten.

Advarsel: Ikke slå på Hearit/Hørat før høretelefonene er koblet til.

3. ta på hodetelefonen



Ta på deg hodetelefonen, og reguler bøylen slik at putene kommer midt på ørene.

For tilkopling til høreapparat, se punkt **8.**

Hvordan bruke Hearit/Hørat

4. slå på apparatet og regulere lydstyrken



Slå på Hearit/Hørat med volumkontrollen. Indikatorlyset vil lyse når Hearit/Hørat er slått på. Når du ønsker å slå av Hearit/Hørat dreies volumkontrollen helt til null og indikatorlyset slukker. Lydstyrken reguleres ved hjelp av volumkontrollen.

MERK: Hearit/Hørat må være slått av når du kobler til hodetelefonen.



Advarsel



For høy lydstyrkke kan skade hørselen, vær derfor sikker på at volumkontrollen er korrekt stilt inn i forhold til din hørsel.

5. brukes i hånden eller på bordet



Rett mikrofonen mot den personen du snakker med, og juster lydstyrken slik du ønsker. Du kan enten holde Hearit/Hørat i hånden eller legge den på bordet.

Når det er flere personer som snakker samtidig, hører du bedre hvis du flytter mikrofonen nærmere og peker med mikrofonen på den du vil lytte til.

Hvordan bruke Hearit/Hørat


6. bæresnor



Ved hjelp av bæresnoren kan du henge Hearit/Hørat rundt halsen.


I bilen kan du henge Hearit/Hørat rundt halsen på den du vil snakke med.

7. lytte til telespolen

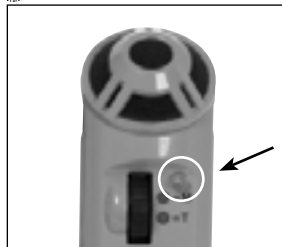

Når du ønsker å lytte til teleslyngeanlegg, kobles telespolen på ved å trykke på indikatorlyset og den vil lyse grønn. Mikrofonen er da koblet ut. Plasser Hørat vertikalt. Evt snu den rundt til til det sterkeste signalet er mottatt. For å koble tilbake til mikrofon, trykk på indikatorlyset igjen og den vil endre til rødt. Forsikre deg om at din Hørat er riktig stilt inn (trykkbryter 3 er AV og trykkbryter 4 er PÅ).

8. Koble til et høreapparat med telespole

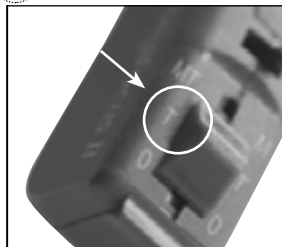

Når Hearit/Hørat er koblet til et høreapparat med "T"-innstilling, brukes halsslyngen i stedet for hodetelefon.

1. Ta halsslyngen rundt halsen.
2. Koble halsslyngen til hodetelefonkontakten i Hearit/Hørat.
3. Still høreapparatet i "T"-posisjon (telespole). Slå på Hearit/Hørat og reguler styrken.

Lydinnstilling

9. lydinnstilling



Gain- for mere forsterkning sett gainkontrollen (nr 1) opp til "På".

Bass boost- for mere forsterkning i bassen. Sett basskontrollen (nr 2) opp til "På".

Telespole- for å bruke telespolen, sett telespole bryteren (nr 3) opp til "På".

Mikrofon- for å bruke mikrofonen, sett telespolebryteren(nr 3) ned til "Av" og mikrofonbryteren (nr 4) opp til "På".

Mikrofon og telespolebryter- for å bytte mellom mikrofon og telespole, sett telespolebryteren(nr 3) ned til "Av" og mikrofonbryteren (nr 4) opp til "På".

Bryter 3	Bryter 4	
av	av	Mikrofon (M)
på	av/på	Telespole (T)
av	på	Mikrofon og telespole (M/T)

Bryter 1	Bryter 2	
av	av	Forsterkning av Bass boost av
på	av	Forsterkning på Bass boost av
på	på	Forsterkning på Bass boost på
av	på	Forsterkning av Bass boost på

Skifte batterier



Når indikatorlyset lyser svakt, er det på tide å skifte batterier. Pass på at Hearit/Hørat Original er slått av (volumkontrollen skal være på null). Åpne batterilokket, ta ut de brukte batteriene og sett inn de nye batteriene. Sett batteriene inn den riktige veien, slik det vises på tegningen i bunnen av batterirommet. Lukk batterilokket og kontroller at indikatorlyset lyser når du skruer på Hearit/Hørat.

Rengjøring av Hearit/Hørat

Hearit/Hørat må behandles forsiktig. Den kan rengjøres med en klut eller svamp som er fuktet med litt flytende oppvaskmiddel eller syntetisk vaskemiddel. Den må ikke dyppes i vann. Hvis nødvendig kan du ta av putene på hodetelefonen og vaske disse separat.

Feilsøking

Det er ikke lyd i Hearit/Hørat

- Kontroller at hodetelefonen er koblet til rett kontakt. Se punkt ②.
- Kontroller at lyden er slått på. Se punkt ④.
- Kontroller at batteriene er riktig satt i. Se punkt ①.
- Batteriene kan være utladet. Prøv med nye.

Hearit/Hørat „plystrer“

Samtaleforsterkeren kan begynne å pipe når mikrofonen kommer for nær hodetelefonen, øk avstanden mellom mikrofonen og hodetelefonen, eller skru ned lydstyrken.

Andre forstyrrelser

Andre forstyrrelser

Alt elektronisk utstyr, særlig lydforsterkere som radio/tv, båndopptakere og høreapparater kan påvirkes av radiobølger og magnetfelt.

Hearit/Hørat kan bli forstyrret av for eksempel mobiltelefoner (GSM og andre typer) som blir brukt i en avstand på 1-2 meter fra samtaleforsterkeren. Forstyrrelsene kan oppleves som en tone eller summelyd. Det er ikke skadelig, men kan gi dårligere taleforståelighet. For at Hearit/Hørat skal fungere optimalt bør den ikke brukes i nærheten av mobiltelefoner.

Hvis du fortsatt har problemer etter å ha prøvd tiltakene over, ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke eller med din lokale forhandler (se informasjonen på baksiden).

Garanti

En fem års garantiperiode er utstedt til opprinnelig bruker av dette Phonic Ear produktet.

garantiperiode

Denne garantiperioden vil vare fra den dato produktet er solgt til den opprinnelige brukeren og vil være gjeldende i fem år fremover så leneg produktet tilhører den opprinnelige brukeren.

hva garantien dekker

I garantiperioden vil elektroniske komponenter, som ikke fungerer korrekt ved normal bruk pga. produksjons eller designfeil, bli byttet eller reparert, hvis utstyret returneres til leverandøren uten kostnad for kunden, evt fraktkostnader betales av kunden.

Om reparasjon ikke er mulig kommer enheten til å erstattes med tilsvarende produkt etter gjensidig avtale.

hva garantien ikke dekker

- 1** Feil oppstått som følge av feilbetjening, forsømmelse eller hendelig uhell.
- 2** Tilbehør som spesifisert i produktbrosjyren, når disse returneres etter mer enn 90 dager etter kjøpsdato.
- 3** Batterier.
- 4** Apparater tilsluttet, installert, brukt eller justert på en annen måte enn angitt i instruksjonene til apparatet.
- 5** Følgeskader eller skader oppstått pga forsinkelser eller tap av produktet. Garantien er utelukkende begrenset til reparasjon eller utskiftning som angitt i denne bruksanvisning.
- 6** Produkter som er blitt skadet under forsendelse, med mindre mottageren av forsendelsen har gjort leverandør oppmerksom på dette og retunert produktet til leverandøren med undersøkelsesrapport.

Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta endringer i design eller konstruksjon i alle sine produkter uten å påta seg ansvar for å endre allerede utleverte og solgte produkter. Denne garantien erstatter alle andre garantier som er avgitt av fabrikanten. Ingen representant eller annen person er berettiget på fabrikantens vegne til å påta seg forpliktelser med salg og bruk av våre produkter utover de omfang nevnt ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheter, som er gjeldende under nasjonal lov for salg av forbruksvarer. Din leverandør har muligens utstedt garanti. Kontakt din lokale forhandler for ytterligere informasjon.

Service

Om du trenger service under garantiperioden , pakk apparatet godt for å unngå skade under sending, og send det til din forhandler (se informasjon på baksiden). Pass på å notere ned en detaljert beskrivelse av problemet, ditt fulle navn, adresse og telefonnummer.

Elektronisk utstyr (EEE) inneholder materiale, komponenter og stoffer som kan være farlige eller skadelige for menneskers helse og omgivelsene om ikke elektrisk avfall håndteres riktig(WEEE).

Produkter merket med en utkrysset avfallsdunk, som vist under, er elektronisk og elektrisk utstyr. Avfallsdunken viser at utstyr med dette merket på skal ikke håndteres som vanlig avfall fra husholdning men skal håndteres separat.

Under utvikling av ditt Phonic Ear produkt , bruker vi materialer av høy kvalitet som kan gjenvinnes. Når elektronisk utstyr skal kastes, må du benytte deg av avfallsortering beregnet for dette formål. Elektronisk avfall skal behandles i henhold til nasjonal lovgivning. Og i henhold til avfallsforskriften vil oticon AS gi nødvendig informasjon. Forespørsel om slike retningslinjer sendes på norsk til :

Oticon AS

Postboks 404, Sentrum

0103 Oslo

Hjemmeside:www.oticon.no



Godkjenning

Hearit/Hørat er godkjent og CE-merket i henhold til gjeldende direktiver.

Phonic Ear A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum, Denmark



mail@phonicear.com • www.phonicear.com

Manufactured by:  **Phonic Ear**®
Connected to life

internasjonal: + 45 3917 7101
nettside: www.phonicear.dk

Din forhandler:

Oticon AS

Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Postboks 404, 0103 Oslo

Tlf: 23 25 61 00 Faks: 23 25 61 10