

NO BRUGERVEJLEDNING
AmpliPower 40

Geemarc

Bruksanvisning

AmpliPower 40

tonax.dk

YOUR WORLD OF SOUND

[Side 1]

Bruksanvisning - les nøye før bruk!

VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet for personer med høreproblemer og er utstyrt med en volumkontroll i telefonrørets høyttaler for individuell tilpassing. Alle brukere må passe på å sette telefonens volumkontroll på det lavest mulige akseptable nivået for hver enkelt bruker. Man skal huske å sikre at en uerfaren bruker er klar over dette kravet.

[Side 2]

INNHALDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse	2
Beskrivelse	3
Tilkobling	6
1 - Tilkobling av telefonen	6
2 - Innstilling av alarm og ringestyrke	6
3 - Innstilling av ringetone.....	7
4 - Tone/Puls-vender (T/P)	7
5 - Tid for R-tast (270/100).....	7
6 - Ventebryter for hotellbeskjeder	8
7 - Veggmontering	8
Bruk av telefonen	9
8 - Svar på innkommende samtaler	9
9 - Regulering av lydstyrke og ringetone	9
10 - Ring opp.....	11
11 - Ring opp siste nummer igjen	12
12 - Ring opp, * & #-knapper	12
13 - Lydløs tilstand.....	12
14 - Lagring av telefonnumre	12

15 - Oppringning til lagret telefonnummer	13
Muligheter	14
16 - Direkte vibrerende telefonrør (Tilbehør)	14
17 - Putevibrator (Tilbehør)	14
18 - Headsett med mikrofon (Tilbehør)	15
Generelt	16

For produktstøtte og hjelp - besøk vår hjemmeside på www.geemarc.com

[Side 3]

BESKRIVELSE

3 nødkaldsnumre	3 nødnumre
Regulering af ringetone	Regulering av ringetone
Regulering af højtalerlydstyrke	Regulering av høyttalerlydstyrke
Klemme til vægmontering	Klemme for veggmontering
Udtag til telefonrørets ledning	Uttak til telefonrørets ledning
Genkald sidst opkaldte nummer	Oppringning til sist ringte nummer
Regulering af lydstyrke	Regulering av lydstyrke
Rødt lys for aktivering af tone/lydstyrke	Rødt lys for aktivering av tone/lydstyrke
Regulering af ekstra lyd og ringetone	Regulering av ekstra lyd og ringetone
Direkte memory	Direkte minne
Håndfri / Headsetknapp	Håndfri / Headsetknapp
Lydløs tilstand	Lydløs tilstand
R-tast	R-tast
Lagring i memory	Lagring i minne
Blinksignal for indkommende samtale	Blinksignal for innkommende samtale

[Side 4]

BESKRIVELSE

Huller til v�egmontering	Huller til veggmontering
Memokort	Indekskort
Opkaldsstatus for Puls/Tone	Ringestatus for puls/tone
Batterirum	Batterirom
Pulsvarighedskontakt	Pulsvarighetskontakt
Udtag til telefonr�rsledning	Uttak til telefonr�rsledning

[Side 5]

BESKRIVELSE

Indstilling af ringealarm	Innstilling av ringealarm
Kontakt for H�j/Lav/Fra af ringetone	Kontakt for H�j/Lav/Ingen ringetone
Udtag til headset	Uttak til headsett
Kontakt for hotelbeskeder	Kontakt for hotellbeskjeder
Udtag til adaptor	Uttak til adapter
Udtag til telefonlinje	Uttak til telefonlinje
Udtag til shaker	Uttak til putevibrator
Til/Fra kontakt til regulering af lydstyrke og ringetone	Av/P�a-bryter for regulering av lydstyrke og ringetone

[Side 6]

TILKOBLING

1 - Tilkobling av telefonen

- Koble ledningen til telefonr ret.
-  pne batteridekslet ved   skruer skruen som holder det ut.
Sett 4 x AAA alkaliske batterier i (f lger ikke med).
Trykk batteridekslet p  plass.
Ved str msvikt er batteriene n dvendige for   bruke telefonen.

- Koble til telefonledningen.
- Hvis putevibrator er anskaffet - sett ledning til den i uttaket.
- Hvis headsett er anskaffet - sett ledning til det i uttaket.
- Sett PTT-støpslet i telefonkontakten på veggen.
- Koble ledning til 12 V strømforsyning til telefonen.
- Koble 12 V strømforsyningen til kontakten i veggen (**).

(**) Klassifisert som "farlig spenning" ifølge EN60950 standarden.

2 - Innstilling av alarm og ringestyrke

En bryter med tre posisjoner på høyre side av telefonen gir mulighet for følgende innstillinger:

- Kun ringetone er aktivert.
- Ringetone og putevibrator er aktiverte.
- Ringetone og blinkende diode er aktiverte.

[Side 7]

TILKOBLING

3 - Innstilling av ringetone

En bryter på høyre side gjør det mulig å velge mellom ringetone HØY, LAV, AV:

Av, Lav, Høy

Din telefon leveres med ringetonen innstilt på «Høy»

og melodien innstilt på «6».

	Lav	Middels	Høy
Melodi 1	1	2	3
Melodi 2	4	5	6 (Fabrikkinnstilling)
Melodi 3	7	8	9

Hvis du ikke liker ringetonen, kan du velge en ny melodi ved å endre innstillingene på følgende måte:

- Løft telefonrøret.
- Trykk på ■-knappen.
- Trykk på #-knappen.
- Trykk på en av knappene 1-9.

Ringetonen blir aktivert ved neste oppringning.

4 - Tone/Puls-vender (T/P)

Tone/Puls-venderen er forvalgt fra fabrikken til toneposisjon (T). Hvis din telefon ikke ringer ut, er det sikkert fordi den blir brukt fra et eldre, privat sentralbord (PBX). I det tilfelle skal Tone/Puls-venderen flyttes til Puls.

5 - Tid for R-tast (270/100)

Fra fabrikken er PV-kontakten innstilt på 100 ms. Den kan omstilles til 270 ms for andre steder eller for PBX-er (private sentralbord).

[Side 8]

TILKOBLING

6 - Ventebryter for hotellbeskjeder

Disse brukes med den nye servicen, som gis til hotelnettverk. En bryter, ■ som sitter på baksiden av telefonen, gjør det mulig å tilkoble, **ON**, ventefunksjonen for hotellbeskjeder. Når bryteren står på **ON**, og når du mottar en beskjed, lyser det røde lyset for å informere om, at du har en beskjed på din telefon.

7 - Veggmontering

Bor 2 hull i veggen (80 mm fra hverandre). Sett i plugger og skruer, la ca. 6 mm av skruene stå ut fra veggen. La telefonen gli ned over skruhodene for å holde den fast.

[Side 9]

BRUK AV TELEFONEN

8 - Svar på innkommende samtaler

Uten headsett:

- Når det kommer en innkommende samtale, ringer telefonen. For å svare - løfter du telefonrøret og svarer.
- Når samtalen er ferdig, legger du telefonrøret omhyggelig på plass i holderen for å gjøre linjen ledig.

Med headsett (valgfritt):

- Når en innkommende samtale som du ønsker å besvare med headsettet, mottas, trykker du på ■-knappen og svarer.
- Når samtalen er ferdig, trykker du på ■-knappen igjen for å gjøre linjen ledig.

I håndfri status:

- Når det kommer en innkommende samtale, ringer telefonen. For å besvare oppringningen trykker du på ■-knappen.
- Når samtalen er ferdig, trykker du på ■-knappen for å gjøre linjen ledig.

9 - Regulering av lydstyrke og ringetone

Du kan øke lydstyrken og regulere den innkommende ringetonen etter eget behov. Knappen +40 dB gir deg muligheten for å aktivere ekstra mottakelse og tonefunksjoner under samtalen, hvis du ønsker dette.

Når funksjonen er aktivert, lyser det røde lyset for ekstra mottakelse og tonefunksjoner, som sitter nær +40 dB knappen. Reguler **TONE-** og **LYDSTYRKE-** knappene, slik at lydnivået passer til eget behov.

[Side 10]

BRUK AV TELEFONEN

AmpliPOWER40

AmpliPOWER50

Lydstyrke

Lydstyrke

0 dB

20 dB

0 dB

30 dB

20 dB*

40 dB*

30 dB*

60 dB**

* Trykk på knapp +40dB

** Trykk på knapp +60dB

Obs:

Når kontakten ■ på baksiden av telefonen er på **ON**, aktiveres ekstra mottakelse og tonefunksjoner automatisk hver gang du bruker telefonen. Når kontakten ■ er slått av (**OFF**), er du nødt til å aktivere funksjonen ved å trykke på knappen + 40dB (eller +60 dB for AmpliPOWER 50). Tone og lydstyrkeregulering (20 dB til 40 dB for AmpliPower 40 og 30 dB til 60 dB for AmpliPOWER 50) blir kun aktivert når knappen er innstilt på **ON**. Når knappen står på **OFF**, kan lydstyrken kun reguleres fra 0 dB til

20 dB (0 dB til 30 dB for AmpliPOWER 50).

[Side 11]

10 - Ring opp

Uten headsett:

- Løft telefonrøret.
- Vent på summetonen, og tast inn ønsket nummer.
- Når samtalen er ferdig, legger du telefonrøret omhyggelig på plass i holderen.

Med headsett (valgfritt):

- Trykk på ■-knappen.
- Vent på summetonen, og tast inn ønsket nummer.
- Når samtalen er ferdig, trykker du på ■-knappen for å gjøre linjen ledig igjen.

I håndfri tilstand

- Trykk på ■-knappen.
- Vent på summetonen, og tast inn ønsket nummer.
- Når samtalen er ferdig, trykker du på ■-knappen for å gjøre linjen ledig.
- Hvis det ikke blir svart på det ringte nummeret, trykker du på knappen igjen for å gjøre linjen ledig.

Obs:

- For å deaktivere den håndfrie funksjonen under en samtale, løfter du telefonrøret. For å aktivere den håndfrie funksjon under en samtale, trykker du på ■-knappen og legger på røret.
- Under en håndfri samtale kan du justere høyttalerlyden til ønsket styrke. Bare bruk glidekontrollen LYDSTYRKE, som sitter på venstre side av enheten.

BRUK AV TELEFONEN

11 - Ring opp siste nummer igjen

- Løft telefonrøret.
- Vent på summetonen, og trykk på ■-knappen.
- Det nummeret du ringte før, blir automatisk ringt opp igjen (gjelder ikke for minnenumre).

12 - Ring opp, * & #-knapper

Disse brukes med de nye servicefunksjonene som fås fra digitale sentraler. For detaljer, vennligst kontakt ditt teleselskap.

13 - Lydløs tilstand

Hvis du vil snakke privat med noen andre i lokalet uten at din samtalepartner hører hva som blir sagt, trykker og holder du på ■-knappen. Du kan fortsatt høre personen i telefonen, men personen kan ikke høre deg mens den er i lydløs tilstand. For å gå tilbake til normal samtale, slipper du ■-knappen.

14 - Lagring av telefonnumre

Minnet i din telefon kan lagre 12 telefonnumre, inkludert 3 prioriterte numre (maksimum 21 siffer for hvert nummer).

For eksempel kan de 3 prioriterte numre **P1, P2, P3** være:

- Lokal politistasjon
- Din lege
- Familie

[Side 13]

BRUK AV TELEFONEN

For å lagre et nummer følger du veiledningen nedenfor:

- Løft telefonrøret.
- Trykk på ■-knappen
- Trykk på **M1**, **M2**, eller **M9** eller et av de 3 prioriterte numrene for å lagre ønsket nummer.
- Tast nummeret.
- Trykk på ■-knappen igjen.

Numrene mistes etter noen timer hvis du tar din telefon ut av kontakten. Inntasting av et nytt nummer i minnet sletter automatisk det forrige nummeret.

15 - Oppringning til lagret telefonnummer

- Løft telefonrøret, og vent på summetonen.
- Trykk på den relevante knappen **M1**, **M2**, ..., eller **M9** eller et av de 3 prioriterte **P1**, **P2**, **P3**-numrene, og det lagrede nummeret ringes opp automatisk.

For å skrive ned det lagrede telefonnummeret bruker du indekskortet som finnes under basen.

[Side 14]

MULIGHETER

16 - Direkte vibrerende telefonrør (Tilbehør)

Hvis du lider av konduktiv hørselsnedsettelse, kan du bruke et direkte vibrerende telefonrør. Prøv å plasser det direkte vibrerende telefonrøret fra din telefon, foran og litt under øret ditt eller bak øret ditt, for å se hvilken posisjon som er best for deg.

Hvis du ikke lider av hørselsnedsettelse, kan du bruke telefonen normalt og sette mottakeren for øret.

Hvis du har bruk for et direkte vibrerende telefonrør, se: **CLA4**, kan du kjøpe det fra din forhandler eller din hørselsspesialist.

Hvis det ikke fungerer, besøk vår hjemmeside (www.qeemarc.com).

For å installere det direkte vibrerende telefonrøret må du koble standardtelefonrøret

fra den tvinnede ledningen og erstatte det med det direkte vibrerende telefonrøret.

17 -Putevibrator (Tilbehør)

Hvis du vil oppgradere din telefon ved å bruke en PUTEVIBRATOR, se: CLA2, stikk putevibratorpluggen i uttaket på ■, som finnes på baksiden av telefonen. Når du mottar en innkommende samtale, aktiveres putevibratoren når telefonen ringer.

Obs: Denne muligheten skal innstilles i ALARM OG RINGESTYRKE-punktet (side 6) for å bli aktivert. Vil du kjøpe en PUTEVIBRATOR, se punkt 1 ovenfor.

[Side 15]

MULIGHETER

18 - Headsett med mikrofon (Tilbehør)

Hvis du vil svare på oppringning eller ringe ut med et Geemarc headsett, se: CLA3, stikk headsettpluggen i uttaket på ■, som finnes på baksiden av telefonen.

Obs: Når du bruker headsett, aktiveres høyttaleren, og det anbefales å stille inn høyttaleren i laveste posisjon.