

# Bruksanvisning

## SYKESIGNALSENDER SKSe

Sykesignalsenderen SKSe er en del av FlexiBlink systemet. Med knappene kan man enkelt sende beskjeder til hjelpere som har FlexiBlink mottakere satt til samme huskode.

### Virkemåte

#### GENERELT

Sykesignal SKSe har fire knapper. Med dem kan man sende forskjellige signaler/meldinger til FlexiBlink mottakerne. Mottakeren IRIS med display viser symboler knyttet til den enkelte melding, samtidig som den varsler med lys og lyd. Andre FlexiBlink mottakere varsler med lys, lyd og vibrasjon, avhengig av produktfunksjoner.



Kom nå!  
Kom snart  
Avtalt melding  
Avtalt melding

### Plassering og montering

Sykesignalsenderen SKSe plasseres på ønsket sted slik at knappene er lett tilgjengelig, f.eks. ved en seng.

1. Vask bort støv og fett med spritservietten.
2. Vent noen minutter til flaten er blitt tørr.
3. Velg en kode. Se avsnittet *Koding* nedenfor.
4. Plugg på batteriet.
5. Fest Sykesignalsenderen med borrelåsen.

Nå er Sykesignalsenderen klar til bruk.

### Koding

Sykesignalsenderen bør kodes når det tas i bruk. Da unngår du at den starter mottakere i nabolaget. Kodebryteren er plassert under bunnlokket. Velg en tilfeldig kode. Husk imidlertid på at alle sendere og mottakere i boligen må stilles på samme kode for å virke sammen.

### Rekkevidde

Sykesignalsenderen dekker en normal leilighet eller enebolig. Rekkevidden kan utvides med FlexiBlink Repeater.

### Funksjonskontroll

På Sykesignalsenderen finner du en indikatorlampe. Den er vanligvis slukket. Når Sykesignalsenderen sender meldinger, blinker lampen grønt. Ved feil indikatorlampen blinke rødt.

Når det er på tide å bytte batteriet, vil indikatorlampen vedvarende veksle mellom rødt og grønt. Mottakeren IRIS vil med symbol og tekst fortelle at Sykesignalsenderen trenger nytt batteri. Andre FlexiBlink lampetter indikerer at en sender har svakt batteri ved å blinke to ganger i minuttet.

### Stopp av sender

Når du har aktivisert SKSe, vil den sende ønsket signal en bestemt tid. Dersom du ønsker å stoppe senderen, trykker du på rød og gul knapp nede *samtidig* til lysdioden lyser RØDT.

**Batteri**

Sykesignalsenderen drives av et 9 volt batteri. Batteriet kan vare i flere år. Ved batteribytte kan man bruke alle typer 9 volt batterier.

**Enkel feilretting**

Den innebygde funksjonskontrollen i Sykesignalsenderen SKSe melder fra om eventuelle driftsmessige feil. Se avsnittet om *Funksjonskontroll* ovenfor. Dersom Funksjonskontroll melder fra om dårlig batteri, bør brukeren snarest bytte batteriet i senderen.

Dersom Funksjonskontroll melder andre feil enn dårlig batteri i FlexiBlink, bør du søke teknisk assistanse.

**Enkel feilretting**

Ingen varslings	Riktig huskode? Bytt batteri.
Rødt/grønt blink	Bytt batteri.

**Dersom du trenger hjelp til feilretting**

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om.

**Produsent**

Vestfold Audio AS  
3241 Sandefjord

**Tekniske spesifikasjoner**

Bruksområde: Innendørs.  
Driftsspenning: 9 V høykapasitets litiumbatteri  
Frekvens: 142.475 MHz  
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

**Rengjøring utført av bruker**

Sykesignalsenderen SKSe kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

**Vedlikehold utført av bruker**

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsritt, bortsett fra batteriskift.

**Lagring når ikke i bruk**

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.