



Varenr. 1572
HMS-nr.: 233408

Armbåndssender med mottaker ARM



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2447 A1
Dato: 2017.04.19



Innholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------|----------|
| <u>1. Innledning</u> | 3 |
| Varslingsmåter | 4 |
| Rekkevidde | 4 |
| Batteri | 4 |
| <u>2. Oversikt</u> | 4 |
| I pakken | 4 |
| | 4 |
| <u>3. Komme i gang</u> | 5 |
| Armbåndsmottaker | 5 |
| Armbåndssender | 6 |
| <u>4. Viktig informasjon</u> | 7 |
| <u>5. Resirkulering</u> | 7 |
| <u>6. Tekniske data</u> | 7 |
| Armbåndsmottaker | 7 |
| Armbåndssender | 7 |

1. Innledning

ARMBÅNDSSENDER er en sender som vi har designet for å bæres på håndleddet. Ved et enkelt trykk på armbåndssender kan man aktivisere en varslingsystem som vises på varslingsystemet FlexiBlink.

ARMBÅNDSSENDER kan f.eks. brukes som sykesignal eller assistansealarm. Man kan selv bestemme hvilke type varslingsystem som skal vises på FlexiBlink ved konfigurering på ID-velgeren.

Funksjoner:

- Enkel å betjene.
- Sprutsikker.
- Signalrekkevidde innen normal husstand.
- Lavt strømforbruk
- Enkelt å tilpasse lengde på armbåndet.
- Enkel installasjon og bruk.
- Mulighet for opptil 48 armbåndssender til en armbåndsmottaker.

Produktet er sprutsikkert, og det kan derfor bæres mens man dusjer. Det kan derimot ikke senkes ned under vann som f.eks. i et badekar.

Armbåndssender



Armbåndsmottaker



Varslingsmåter

ARMBÅNDSSENDER aktiverer varsling ved å trykke på trykknappen på senderen. Signalet blir sendt til armbåndsmottakeren som videresender signal til Flexiblink systemet.



Rekkevidde

Armbåndssenderen og Armbåndsmottakeren dekker en vanlig enebolig eller leilighet.

Batteri

ARMBÅNDSSENDER har innebygd oppladbart batteri som lades ved hjelp en ladekontakt som følger med produktet.



Laderkontakt kobles til en standard USB lader (medfølger). Produktet bør lades minimum hver 14. dag.

Dok. nr.: 2447 A1
Dato: 2017.04.19

2. Oversikt

I pakken



Armbåndssender
HMS art.nr.: 233401




Armbåndsmottaker



Ladekontakt



USB-lader

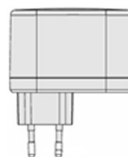

Strømadapter

Armbåndsmottaker



Forside



Bakside

3. Komme i gang

Armbåndsmottaker

Strømtilkobling

Koble strømadapter til enheten og til strømuttak i veggen

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter du har i boligen, må stilles inn med lik huskode. Skyv knappene i huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinnstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

Armbåndsmottaker kan varsle mange forskjellige typer hendelser. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

| ID | Varsling type | Signal-type |
|----|---------------------|-------------|
| 0 | Sykesignal | Alarm |
| 1 | Sykesignal Nr.1 | Alarm |
| 2 | Sykesignal Nr.2 | Alarm |
| 3 | Sykesignal Nr.3 | Alarm |
| 4 | Sykesignal Nr.4 | Alarm |
| 5 | Sykesignal Nr.5 | Alarm |
| 6 | Sykesignal Nr.6 | Alarm |
| 7 | Kom nå! | Alarm |
| 8 | Kom snart! | Alarm |
| 9 | Hjelp meg nå | Daglig |
| A | Assistanse ønskes | Daglig |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | Klokke Tale Iris | |
| F | Hjelp meg nå (nabo) | Alarm |


Montering

Armbåndsmottaker monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med skruer til veggen gjennom festehullet under batteriet.

Armbåndssender

Før du begynner å bruke armbåndet, bør du lade armbåndssender.

Du kan sjekke om det er strøm på enheten ved å trykke på knappen. Armbåndssender skal da gi et lysblink på lysdiode på armbåndet.

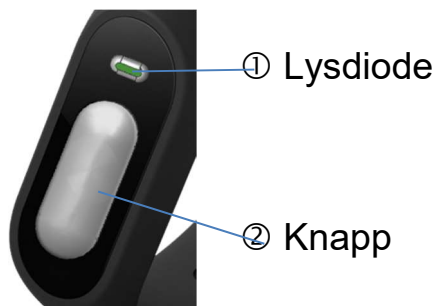

Sammenkobling

For å få produktet til å fungere, må du sammenkoble armbåndssender og armbåndsmottaker. Dette er en veldig enkel prosess.


1. Hold Testknapp② på armbåndsmottakeren inne i

6 sekunder, til lysdiode① begynner å blinke.

2. Trykk deretter på varslingsknapp på armbåndssenderen.

Når sammenkoblingsprosessen er ferdig, vil armbåndsmottaker indikere at sammenkobling er suksessfull ved å tenne lysdioden i 2 sekunder.

Du kan nå sjekk sammenkoblingen ved å aktivisere en varsling fra armbåndssenderen.

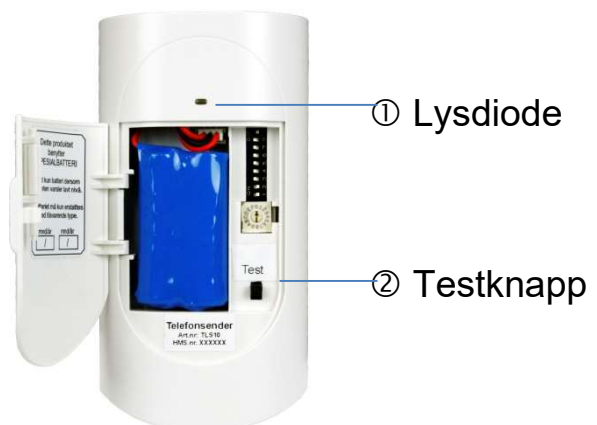

4. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Armbåndsmottakeren er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
- Armbåndsmottakeren vil varsle til FlexiBlink mottakere om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

5. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Tekniske data

Armbåndsmottaker

| | |
|------------------|-----------------|
| Dim. (bxhxd): | 69x133x27mm |
| Vekt m/ batteri: | 140 g |
| Batteri: | Litium 3V |
| Radiofrekvens: | 142,475 MHz |
| Sendereffekt: | 10 mW e.r.p. |
| Temperatur: | -10 °C - +40 °C |

Armbåndssender

| | |
|----------------------|-----------------|
| Dim. (lxb): | 235x10mm |
| Håndleddets omkrets: | 10,5-21 cm |
| Vekt m/ batteri: | 40 g |
| Batteri: | Litium 3V |
| Radiofrekvens: | 868 MHz |
| Sendereffekt: | 10 mW e.r.p. |
| Temperatur: | -10 °C - +40 °C |

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

