

# TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200



Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallings-system. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål, vennligst ta kontakt med ditt utleveringssted.

## VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER:

PG-200 mottaker og sender bruker radiobølger for å kommunisere med hverandre.

1. Unngå å bruke PG-200 i nærheten av elektroniske apparater som TV, radio, datamaskiner eller trådløse apparater som kan påvirke signalet.
2. Unngå å bruke PG-200 i nærheten av sendere som eksterne antenner eller mobiltelefonstasjoner.
3. Rekkevidden på PG-200 kan variere avhengig av omgivelser man befinner seg i.
4. Håndter PG-200 varsomt.
5. Ikke utsett PG-200 for støt.
6. Ikke sett PG-200 i vann og behold produktet tørt.
7. Ikke dra i ledningen for å koble PG-200 fra strømuttaket. Ta tak i pluggen som sitter i strømuttaket. Koble fra PG-200 før rengjøring eller service. Aldri bruk PG-200 hvis pluggen, ledningen eller produktet er skadet. Vennligst send PG-200 for reparasjon til din hjelpemiddelsentral.
8. Hvis batteriet må skiftes må produktet sendes inn til din hjelpemiddelsentral. Ikke forsøk å skifte batteriet selv.


## GJENNVINNING AV PG-200 ELLER AV BRUKTE BATTERIER:

PG-200 og batteriene kan ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. De må leveres til din nærmeste gjenvinningsstasjon eller til samlingspunkt for el-avfall.


## INNHold:

Et komplett sett PG-200 inneholder:


- En PG-200 Sender
- En PG-200 Mottaker
- En belteklips
- En håndsnor
- Ett oppladbart batteri (innebygd, ett batteri for sender og ett batteri for mottaker)
- En lader
- Denne bruksanvisningen

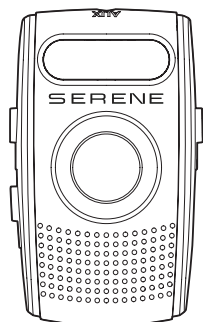

PG-200  
Sender

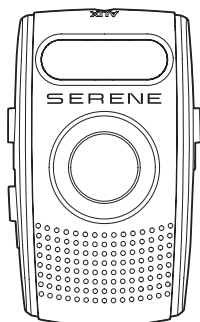


PG-200  
Mottaker

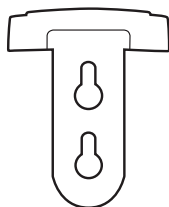


Belteklips



Håndsnor

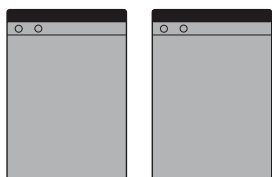


2 batterier  
(innebygdt)

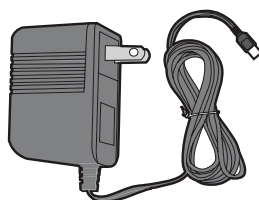

Lader

# BESKRIVELSE

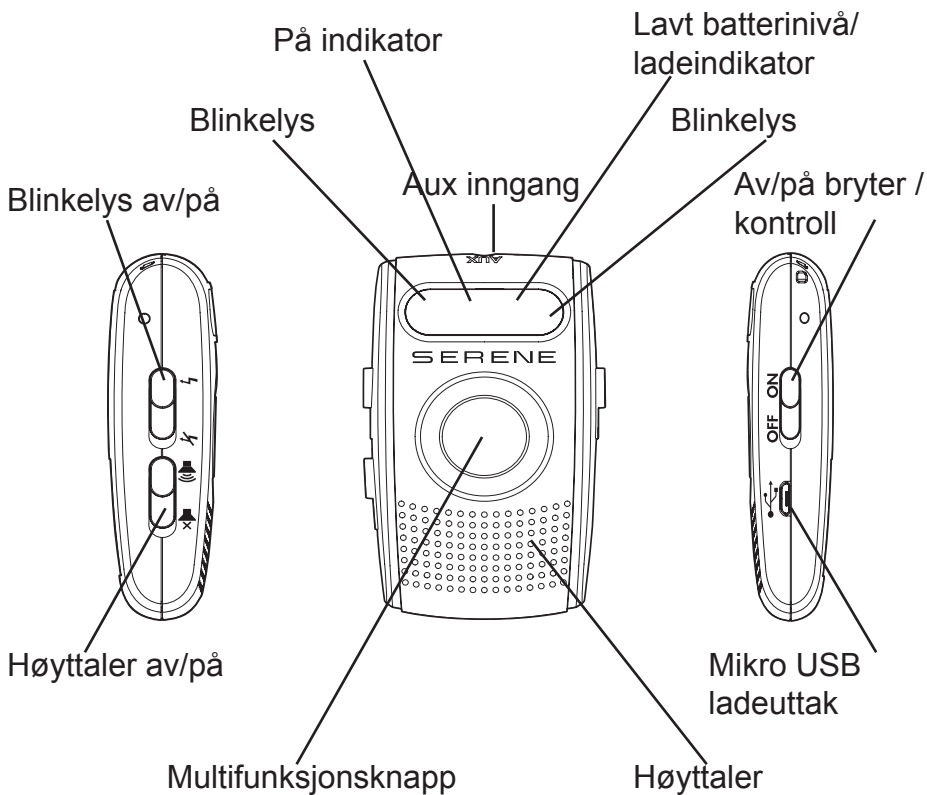

## HVORDAN FUNGERER PG-200

1. På indikator blinker hvert 10. sekund når enheten er på. På indikator og Lavt batterinivå indikator blinker vekselvis når senderen og mottakeren kobles sammen.
2. Lavt batterinivå/ ladeindikator blinker hvert 1,5 sekund når batterinivået er lavt. Den blinker to ganger pr. sekund når batteriet lades opp. Den er på hele tiden når batteriet er fulladet og PG-200 er koblet til strøm. Den blinker vekselvis sammen med På indikator under tilkobling mellom sender og mottaker.
3. Blinkelys (2) blinker når man mottar et signal fra den andre PG-200.
4. Aux inngang er for å koble til tilbehør (3,5 mm jack bryterinngang som kan aktivere PG-200 – ta kontakt med din hjelpemiddelsentral for utlån av ekstern bryter) og har samme funksjon som Multifunksjonsknappen.

## BATTERIER:

1. Hver enhet (sender og mottaker) har et innebygd oppladbart batteri.
2. Lad opp enhetene før bruk. Det tar omtrent 2 til 3 timer til enhetene er fulladet.
3. Når batterinivået er lavt vil Lavt batterinivå indikatoren blinke.
4. For å lade PG-200 koble den til et strømmuttak som vist på tegningen. Under lading vil Batterinivå indikatoren blinke to ganger pr. sekund.
5. Når enheten er fulladet vil Batterinivå indikator lyse konstant.
6. PG-200 må ikke være tilkoblet strøm i mer enn en uke (7 dager sammenhengende).

## BRUK:

PG-200 system består av 2 enheter som er blitt tilkoblet på for hånd og som kan tas i bruk med en gang.

For å koble til flere enheter (maksimal 4 enheter kan kobles til systemet):

1. Slå på en av enhetene som du allerede har og slå på den nye enheten.
2. Trykk og hold på Multifunksjonsknappen i 5 sekunder inntil den gir en liten vibrasjon og På indikator og Lavt batterinivå indikator blinker vekselvis. Tilkobling mellom enhetene tar ca. 30 sekunder.
3. Trykk og hold på Multifunksjonsknappen på den nye enheten i 5 sekunder inntil begge enhetene gir mange små vibrasjoner på ca. 0,5 sekunder hver. Da er tilkoblingen ferdig og den nye enheten vil slutte å blinke.
4. For å teste den nye enheten, trykk på Multifunksjonsknappen på den nye enheten for å varsle den andre enheten. Trykk på Multifunksjonsknappen på den andre enheten for å stoppe signalet og tilbake stille systemet. Hvis tilkoblingen ikke var vellykket, gjenta punkt 1 til 4.
5. For å tilkoble en ny enhet følg punkt 1 til 4 en gang til.

## SENDE OG MOTTA VARSLING

Hvilken som helst enhet kan brukes for å varsle de andre. Alle de andre enhetene vil fungere som mottakere.

Sende varsel

1. Trykk på Multifunksjonsknappen en gang.
2. Senderen vil generere en liten vibrasjon for ca. 0,5 sekunder for å bekrefte at man har trykt på knappen og at et signal er blitt sendt.

## Motta varsel

1. Mottakeren vil vibrere, blinke og gi en hørbar tone (blinking og høyttaler må være påslått).
2. Mottakerens varsel varer i ca. 30 sekunder.
3. Trykk på Multifunksjonsknappen en gang for å stoppe varslingen og for å sende bekreftelse på at signalet er mottatt og samtidig tilbake stille systemet.

## FEILSØKING

Hvis det oppstår problemer, vennligst sjekk følgende punkter før du sender PG-200 til service eller reparasjon.

På indikator lyser ikke	Lavt batterinivå. Lad opp enheten.
Lavt batterinivå indikator blinker	Lavt batterinivå. Lad opp enheten
Ladeindikator blinker ikke	Sjekk ladetilkoblinger
Ingen signal mottatt etter at Multifunksjonsknappen på senderen ble trykt for å sende et varsel	Sjekk at alle mottakere er påslått. Pass på at mottakerne er innenfor rekkevidde. Sjekk at både senderen og mottakeren er tilkoblet
Andre mottakere har mottatt et varsel men ikke min mottaker	Pass på at både blinking og høyttaleren er påslått. Sjekk batterinivå. Lad opp enheten. Bekreft av enhetene er tilkoblet

## RENGJØRING

Bruk kun en myk og tørr klut eller en lett fuktet klut med et skånsomt rengjøringsmiddel for å gjøre enheten rent. Ikke bruk etsende produkter, kjemikalier, alkohol eller andre rengjøringsmidler som inneholder klor, ammoniakk eller andre sterke midler.

## TEKNISKE DATA

Frekvensområde	868 MHz (USA & EU) / 315 MHz (Japan)
Rekkevidde	30 meter
Maksimalt antall enheter	4
Styrke på høyttaleren	78 dB
Batteri	3,7 V 300mAh Li-on, oppladbart
Batteriets brukstid	Fra 10 til 20 dager
Batteriets ladetid	Fra 2 til 3 timer
AC Adapter input	100-240 VAC, 50/60 Hz
AC Adapter output	5VDC 500mA micro USB
Driftstemperatur	0 til 45 grader
Mål	30 x 54 x 88 mm inkl. belteklips
Vekt	56 gram inkl. batteri

## GARANTI

2 års garanti fra leveringsdato.

Garantien omfatter fabrikkasjons- og materialfeil. Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet omfattes ikke av garantien. Det gjelder også hvis en har forsøkt å skifte batteri selv. Dette utføres kun av AurisMed AS.

FORHANDLER:

AurisMed AS

Postboks 294

3201 Sandefjord

Tel: 33 42 72 50

e-mail: [aurismed@aurismed.no](mailto:aurismed@aurismed.no)

Web site: [www.aurismed.no](http://www.aurismed.no)