

Bruksanvisning

Knop EPI 900 S Føler



Knop EPI 900 S:

Cantec art. nr.: 2223274

HMS art.nr.: 195075

Installasjon og idriftsettelse

Sykehus- og institusjonssenger som er bygget opp med fjærbunner egner seg fortrinnsvis til oppheng av EPI 900 under sengen uten bruk av ekstern føler. Oppheng under sengen kan derimot vanskeliggjøres på grunn av bevegelige deler. Da kan den eksterne føleren EP 1900-S, som plasseres over madrassen, benyttes (se nedenfor).

Føleren, EPI 900S legges med KNOP-logoen opp på oversiden av madrassen, men under overmadrassen nær personen. Føleren skal festes med et stykke plaster eller tape. Det finnes ikke noen generell regel for plassering, men det er flere ting å ta hensyn til. Det

finnes i dag mange forskjellige madrasser, som på grunn av sin oppbygning og bruk av materialer, demper rystelsene fra krampeanfallet, slik at man ikke kan registrere en sikker alarm.

Det må også tas hensyn til sengens størrelse i forhold til personens størrelse og vekt. En

liten person/barn kan flytte seg rundt i sengen og komme vekk fra føleren, noe som kan

resultere i at det ikke registreres noen rystelse.

Føleren forbindes til EPI 900, som kan henges på enden av sengen.

Etter endt installasjon, skal systemet testes ved å simulere et krampeanfall med hånden

på madrassen eller ved at en person legger seg i sengen og simulerer et anfall.

Juster om nødvendig PULS jfr. avsnittet "Innstilling av rystelser".

EPI 900 testes sammen med en trådløs mottaker fra KNOP Elektronik.

EPI 900 kan også kobles til visse typer av varslingsanlegg via dets reléutgang.

Cantec AS

Postadresse:

Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:

Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no