




ABILIA

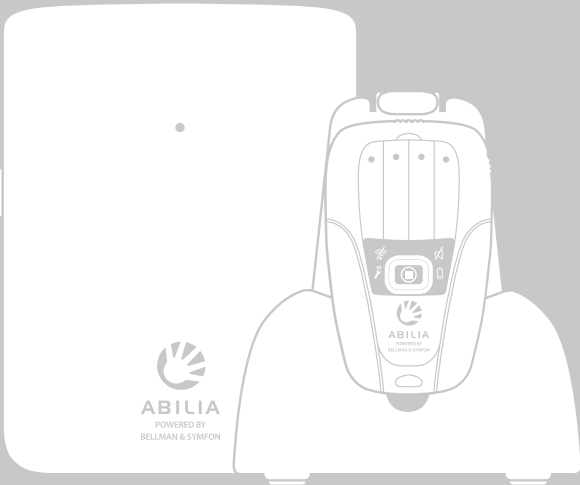

Innhold

Kapittel 1: Installere sender

- 32 Oversikt over sender
- 33 Installere SIM-kort
- 34 Koble sender til mobiltelefon
- 35 Tolke alarm på mobiltelefon
- 36 Koble til trådløs alarmenhet
- 38 Montere sender
- 39 Koble sensorer til sendere

Kapittel 2: Installere pager

- 40 Oversikt over pager
- 41 Installere pager
- 42 Koble sender til pager
- 43 Pagerens signalmønster

Kapittel 3: Vedlikehold

- 44 Systemtest og skifte batteri
- 45 Håndtering og rengjøring

Kapittel 4: Feilsøking og annen informasjon

- 46 Feilsøking
- 48 Teknisk informasjon
- 50 Tilpasse etikett i pageren
- 51 Viktig informasjon


Finn fram i brukerhåndboken

All In One kommer med tilbehør som krever forskjellige installasjoner. For å finne frem til riktig avsnitt i brukerhåndboken må du derfor ta alle produkter ut av forpakningen og sammenligne innholdet med beskrivelsene nedenfor.

NO


All In One i grunnutførelse

Gå til side 38

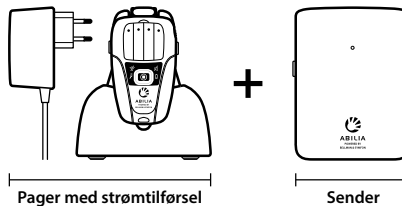


All In One med modul for trådløs alarmenhet

Gå til side 36

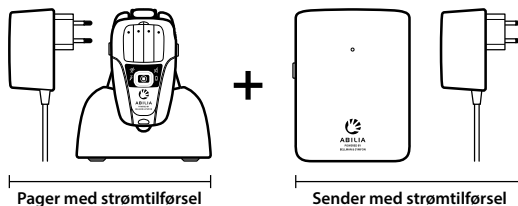


All In One med GSM-modul

Gå til side 33

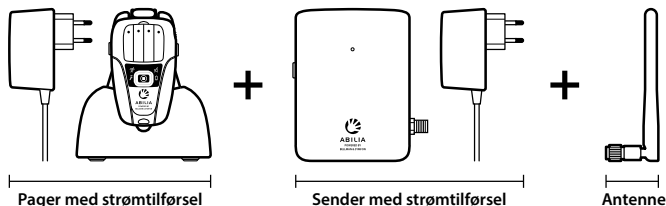

Oversikt over sender

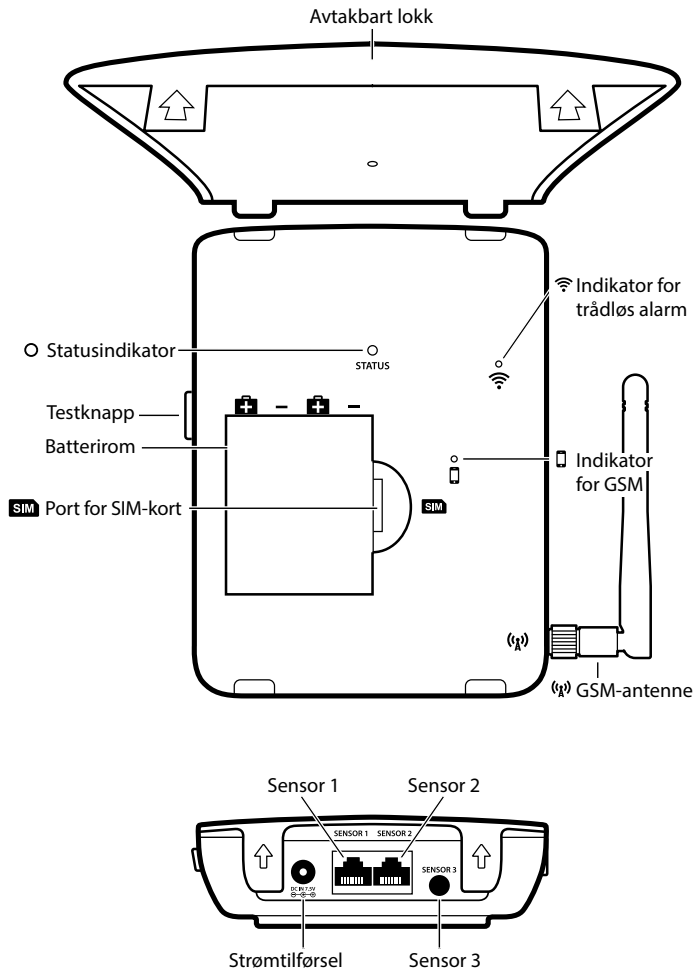

Installere SIM-kort

Med en GSM-modul kan du ta imot alarm også på mobiltelefonen, noe som er praktisk når du befinner deg utenfor huset eller leiligheten. Til senderen trenger du et kort av typen **Micro SIM** (ikke kontantkort). SIM-kortet skal ha **pinkode '0000'** eller være uten pinkode, se operatørens anvisninger for endring av pinkode.


NO

Slik installerer du et SIM-kort


Merk: Senderen må ikke være koblet til strøm ved installasjon av SIM-kort.

- 1 Skru fast GSM-antennen og trekk bort batterilappen på senderen.
- 2 Åpne lokket og ta ut batteriene. Sett SIM-kortet i holderen ved batterirommet som er merket med et **SIM**-symbol. Symbolet viser kortets retning.
- 3 Sett batteriene på plass og steng lokket. Koble strømtilførselen til senderen og sett kontakten i strømuttaket.

Når senderen er koblet til GSM-nettet, blinker statusindikatoren grønt hvert 15 sekund. Hvis den ikke blinker grønt innen 2 min, se **Feilsøking** på s. 46.

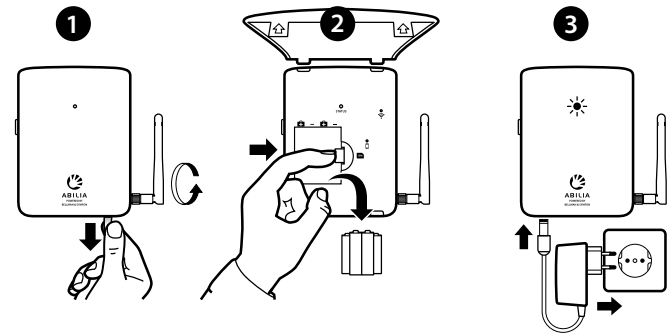

Indikator for GSM

Senderen har en indikator som viser aktuell GSM-status. Den er plassert innenfor lokket og er merket med et -symbol (se oversikt til venstre). Her kan du f.eks. se om senderen er koblet til GSM-nettet og når den sender en melding.

Hvis indikatoren	Betyr det at
Blinker hvert tredje sekund	• Senderen er koblet til GSM-nettet.
Lyser konstant	• Senderen sender sms og ringer til assistent.
Blinker hvert sekund	• Senderen har ikke kontakt med GSM-nettet.
Er slukket	• Senderen mangler GSM-modul/er ute av funksjon.

Koble sender til mobiltelefon

For å kunne motta alarm over GSM må du koble senderen til assistentens mobiltelefon. En sender kan håndtere opp til to assistenter. De tildeles profilene **Assistent 1** og **Assistent 2**.

Slik kobler du til en sender

- 1 Send en sms med Assistent 1's mobilnummer til senderens abonnement ifølge prinsippet nedenfor. Repeter fremgangsmåten for Assistent 2.
Merk: Mellomrom foran og etter mobilnummeret.

Assistent 1
ALERT 'MOBILNUMMER' A1


For eksempel:
ALERT 070123456789 A1

Assistent 2
ALERT 'MOBILNUMMER' A2

For eksempel:
ALERT 070123456789 A2

- 2 For å teste tilkoblingen, trykk på senderens testknapp. Senderen sender da sms og ringer opp assistentene i den rekkefølgen som beskrives på neste side. Hvis ingen sms eller samtale går gjennom, se **Feilsøking** på s. 46.


Repeater trinn 1-2 for å koble til en ny sender. Husk å sende sms med assistentenes mobilnummer til den **nye** senderens abonnement.

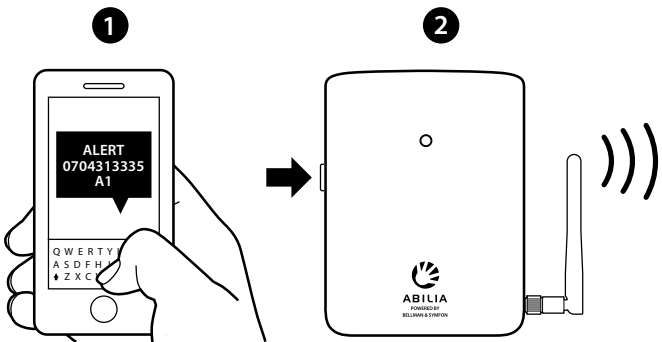

Merk: Du bytter enkelt ut en assistent ved å sms'e det nye nummeret til senderen ifølge prinsippet **ALERT 'NYTT MOBILNUMMER' A1**. For å fjerne alle assistenters nummer, sms'e **DELETE** til senderen. Handlingen kan ikke angres.

Slik fungerer det


- 1 Når en sensor aktiveres sender senderen en alarm via sms til **Assistent 1**. Som et sikkerhetstiltak ringer senderen også opp (kun toner høres hos mottakeren).
- 2 Assistent 1 har **20 sek** på seg til å svare på samtalen. For å forhindre forveksling med telefonsvarer må samtalen avsluttes innen **10 sek**.
- 3 Hvis Assistent 1 ikke svarer eller ikke legger på i tide, sendes sms'en og samtalen videre til **Assistent 2**.

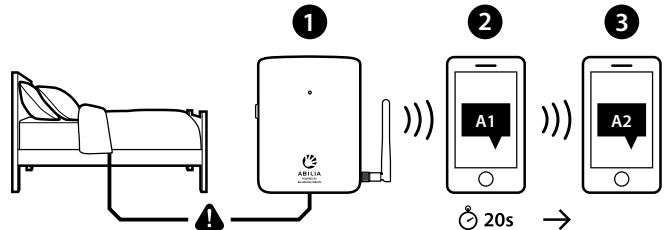

Slik leser du av alarmen

- 1 For at du enkelt skal se hvilken sender som sender alarm, må du opprette en kontakt i mobiltelefonens adressebok for hver sender i systemet.
Tips! Navngi senderen etter f.eks. personens navn eller romnummer.
- 2 Når en sensor aktiveres på en av senderne, får du en sms med følgende:
 - **Senderens navn** (eller mobilnummer hvis kontakten ikke finnes i adresseboken)
 - **Aktivert sensor nr. 1-3**

I eksempelet nedenfor ser du at sensor 1 i Ebbas rom er aktivert.

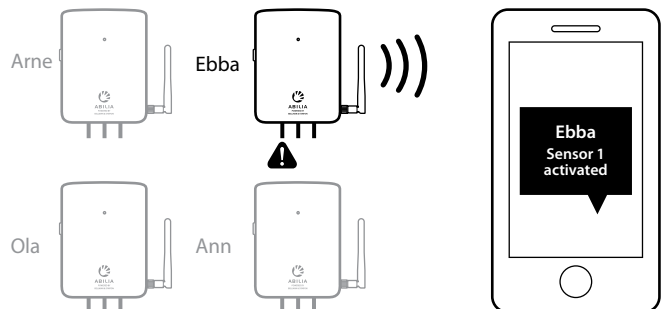


Koble til trådløs alarmerhet

En trådløs alarmerhet bæres ofte på håndledet eller rundt halsen, men finnes også i form av trådløse dør- og bevegelsessensorer. For at den trådløse alarmerheten skal fungere med systemet, må du koble den til senderen.


Slik kobler du til en trådløs alarmerhet

- 1 Trekk bort batterilappen for å starte senderen. Koble til strømtilførselen og sett kontakten i strømuttaket.
- 2 Trykk og hold inne senderens testknapp. Slipp knappen når senderens statusindikator begynner å blinke blått.
- 3 Aktiver alarmerheten innen 10 sek for å parkoble enhetene. Senderens statusindikator viser at det er klart ved å blinke grønt tre ganger.

Repetér trinn 2-3 for å koble til en ny alarmerhet. Du kan koble til maks. 4 stykker.

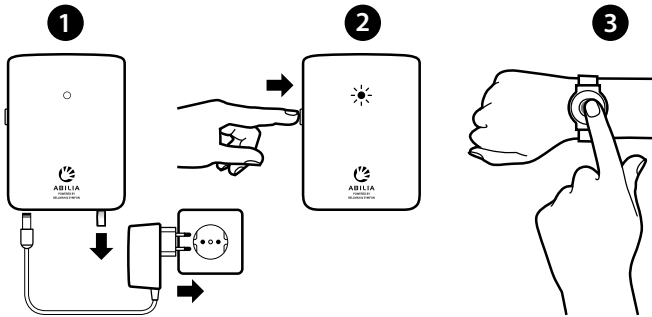

Indikator for trådløs alarmerhet

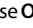
Senderen har en indikator som viser alarmerhetens status. Den er plassert innenfor lokket og er merket med et -symbol (se **Oversikt** på s. 32). Her kan du f.eks. se om alarmerheten er tilkoblet, og når senderen mottar en alarm.

Hvis indikatoren	Betyr det at
Lyser / blinker gult	• Senderen tar imot alarmsignal / kontrollerer status.
Lyser oransje	• Senderen er klar til å parkobles med alarmerheten.
Er slukket	• Senderen mangler modul for trådløs alarmerhet. • Modulen er ute av funksjon.

Slette trådløse alarmerheter

- 1 Trykk og hold inne senderens testknapp for å slette tilkoblede alarmerheter. Slipp knappen når senderens statusindikator begynner å blinke blått.
- 2 Trykk tre ganger i rask rekkefølge på senderens testknapp.
- 3 Senderens statusindikator viser at alle tilkoblede alarmerheter har blitt slettet ved å blinke grønt to ganger.

Merk: Handlingen sletter tilkoblingene permanent og kan ikke angres.

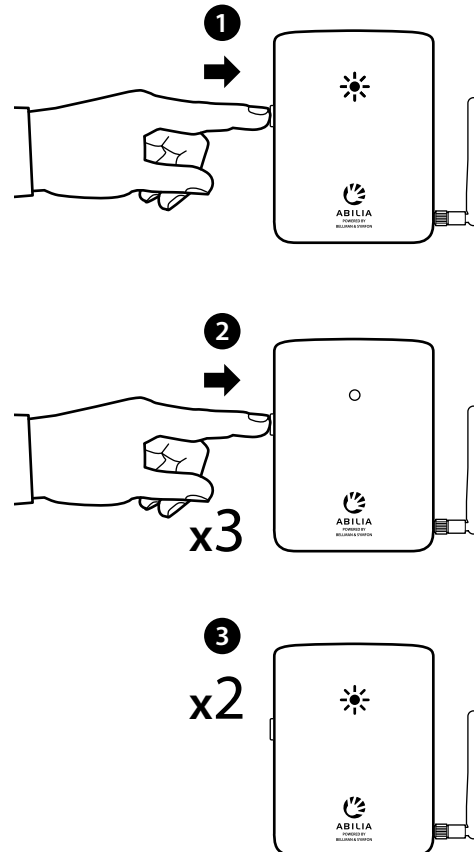

Montere sender


Merkt: Sender med modul for GSM eller trådløs alarmerhet krever en viss forhåndsinstallasjon før montering.

- For installasjon av sender med modul for **GSM**, les først sidene 33-35.
- For installasjon av sender med modul for **trådløs alarmerhet**, les først side 37.

Slik monterer du en sender

- 1 Trekk bort batterilappen for å starte senderen.
- 2 Marker borehull ved hjelp av den vedlagte boremalen og bor hull for medfølgende skrue og plugg.
- 3 La det være 2 mm avstand mellom skruehode og vegg når du strammer til skrueene. Heng senderen opp på veggen og kontroller at den sitter trygt på plass.

Repetér trinn 1-3 for å montere en ny sender.

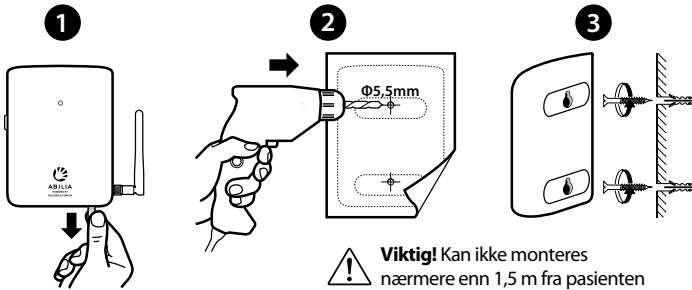

Viktig! Kan ikke monteres nærmere enn 1,5 m fra pasienten

Senderens statusindikator

Senderen har en indikator på forsiden som viser aktuell status (se **Oversikt** på s. 32). Her kan du se når senderen sender en alarm eller om det har oppstått en feil.

Tips! Hvis det oppstår en feil, løft lokket og se øvrige indikatorer for mer info.

Hvis indikatoren	Betyr det at
Blinker grønt	• Systemet fungerer som det skal.
Blinker gult	• Senderen aktiveres av en sensor og sender alarm.
Blinker rødt	• Senderen har lavt batteri, lad opp eller skift batterier, se s. 44.
Blinker lilla	• Batteriene er montert feil/av feil type, se Skifte batteri på s. 44.
Blinker hvitt	• GSM-modulen søker etter nett eller er ute av funksjon, se Feilsøking på s. 46.
Blinker blått	• Klar til å koble trådløse alarmerheten / feil alarm enhet, se Feilsøking på s. 46.

Koble sensorer til sendere

Du kan koble til opp til 3 forskjellige kablede sensorer til en sender, f.eks. epilepsialarm, inkontinensalarm og dørsensorer.

Slik kobler du til en sensor

- 1 Koble til sensoren på undersiden av senderen ifølge figuren nedenfor. Velg inngangen for SENSOR 1 eller SENSOR 2 hvis den har en RJ11-kontakt, og inngangen for SENSOR 3 hvis den har en 3,5 mm mono plugg. Kontroller at kontakten sitter sikkert på plass og at kabelen sitter godt fast.
- 2 Kontroller at tilkoblingen fungerer ved å aktivere sensoren. Statusindikatoren på senderen blinker da gult for å vise at en alarm sendes.


Repetér trinn 1-2 for å koble til en ny sensor.

Merkt: Hver sensor tildeles en egen lysdiode på pageren ifølge:


- SENSOR 1 - Oransje lysdiode
- SENSOR 2 - Grønn lysdiode
- SENSOR 3 - Gul lysdiode
- Rød lysdiode er reservert for trådløs alarmerhet og testknapp.

Hvis du har installert **FLERE** sendere, signaliserer pageren annerledes, se s. 43.

Tips! Detaljert informasjon om hvordan du installerer og bruker de forskjellige sensorene, finner du i den respektive sensors brukerhåndbok.

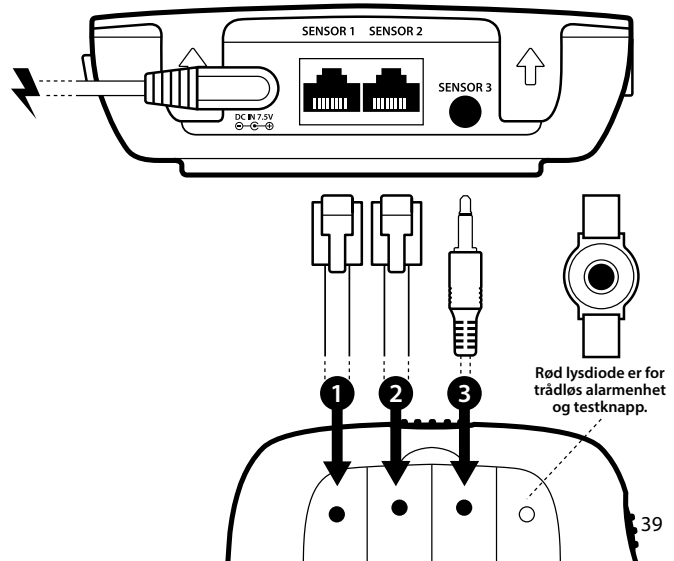


Oversikt over pager og lader

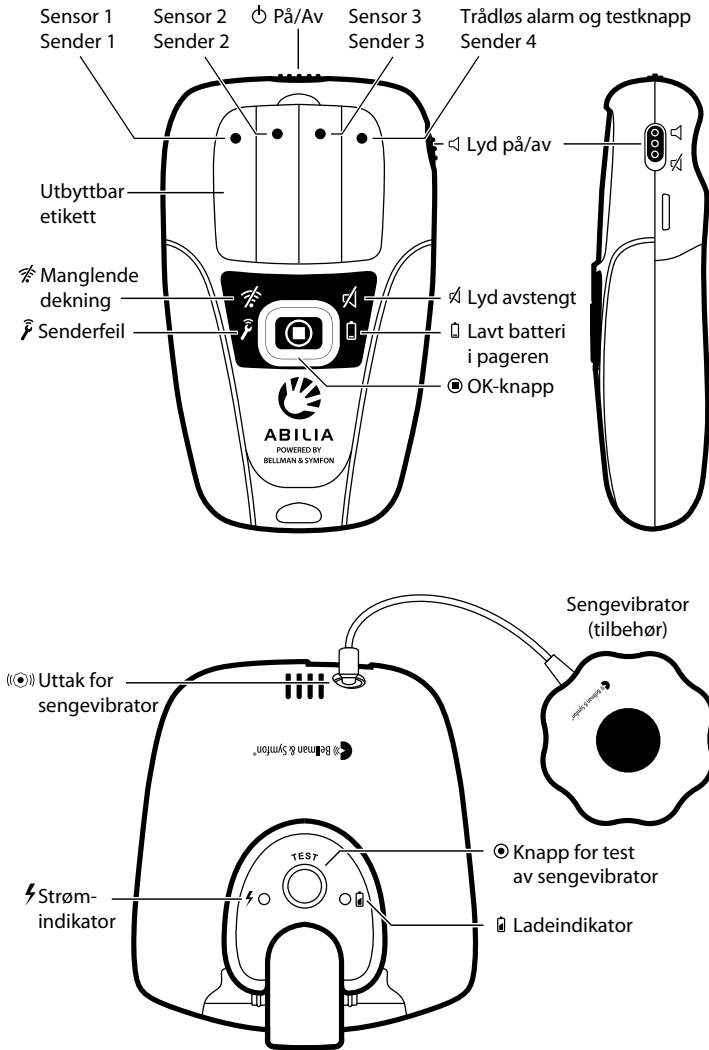

Installere pager

- 1 Trekk bort batterilappen på pageren og laderen for å starte enhetene.
- 2 Sett laderens kontakt inn i strømuttaket. Laderens ⚡-indikator tennes for å vise at den er koblet til strømtilførselen. Sett pageren i laderen og kontroller at den knepper fast. Laderens 📶-indikator blinker/tennes for å vise at pageren lades.

Merk: Før du bruker pageren første gang, må den lades i 6 timer. Når pageren er fulladet slukker laderens 📶-indikator.

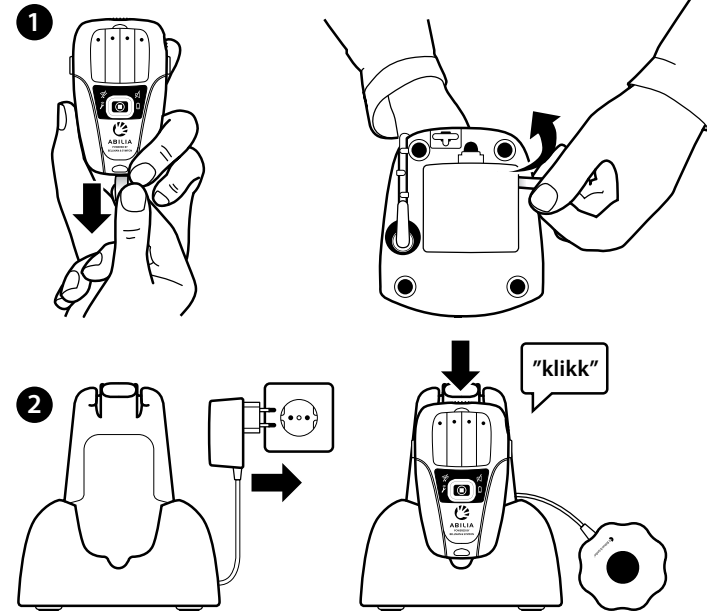


Slik bruker du pageren

Når en sensor aktiveres gir pageren alarm med lyd og vibrasjon. Pagerens diodefarger og blinkemønster viser hvilken sender eller sensor som er aktivert.

Hvis du ønsker det	Gjør følgende
Slå av pagerens alarm	• Trykk på pagerens OK-knapp .
Slå på/av lyden	• Skyv pagerens Lydregulering opp/ned.
Slå på/av pageren	• Skyv pagerens På/Av-bryter mot høyre/venstre.

Koble sender til pager


- 1 For å koble til en sender, trykk og hold inne pagerens OK-knapp. Slipp knappen når de to midterste lysdiødene begynner å blinke.
- 2 Trykk på senderens testknapp innen 10 sek for å parkoble.
- 3 En lysdiode på pageren tennes for å vise at senderen er tilkoblet ifølge:
 - Oransje lysdiode - Sender 1
 - Gul lysdiode - Sender 3
 - Grønn lysdiode - Sender 2
 - Rød lysdiode - Sender 4

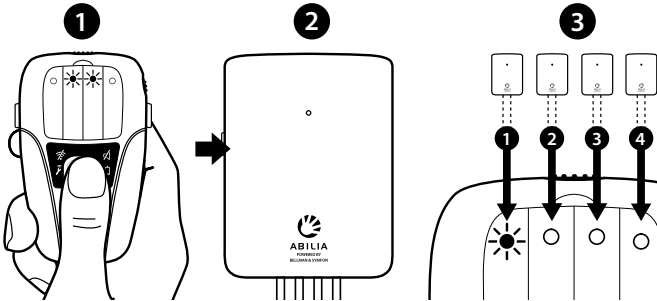

Repetér trinn 1-3 for å koble til en ny sender. Du kan koble til opp til 4 stykker.

Slette tilkoblede sendere

- 1 Trykk og hold inne pagerens OK-knapp inntil de to midterste lysdiødene begynner å blinke. Trykk deretter tre ganger på knappen i rask rekkefølge.
- 2 Alle lysdioder blinker 2 ganger for å vise at de tilkoblede senderne er slettet. Handlingen sletter alle tilkoblinger permanent og kan ikke angres.

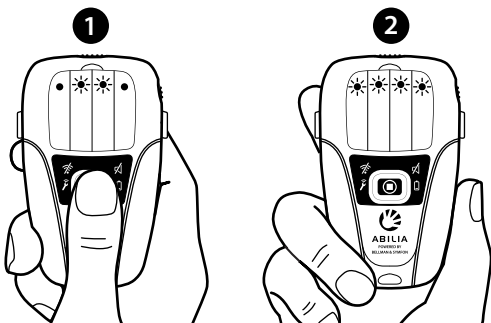

Pagerens signalmønster

Pageren viser hvilken sensor og sender som er aktivert ved å benytte ulike diodefarger og blinkemønstre.

Merk: Pagerens diodefarger og blinkemønstre er forskjellige avhengig av om du har **ÉN** eller **FLERE** sendere koblet til systemet.

System med ÉN sender - Hver sensor har egen diodefarge

Aktivert sender	Aktivert sensor	Farge og blinkemønster
Sender 1	Sensor 1	Oransje
Sender 1	Sensor 2	Grønn
Sender 1	Sensor 3	Gul
Sender 1	Trådløs alarmerhet	Rød
Sender 1	Testknapp	Rød

System med FLERE sendere

- Hver sender har en egen diodefarge
- Sensorene skilles fra hverandre med blinkemønstre

Aktivert sender	Aktivert sensor	Farge og blinkemønster
Sender 1	Sensor 1	Oransje
Sender 1	Sensor 2	Oransje
Sender 1	Sensor 3	Oransje
Sender 1	Trådløs alarmerhet	Oransje
Sender 1	Testknapp	Oransje
Sender 2	Sensor 1	Grønn
Sender 2	Sensor 2	Grønn
Sender 2	Sensor 3	Grønn
Sender 2	Trådløs alarmerhet	Grønn
Sender 2	Testknapp	Grønn
Sender 3	Sensor 1	Gul
Sender 3	Sensor 2	Gul
Sender 3	Sensor 3	Gul
Sender 3	Trådløs alarmerhet	Gul
Sender 3	Testknapp	Gul
Sender 4	Sensor 1	Rød
Sender 4	Sensor 2	Rød
Sender 4	Sensor 3	Rød
Sender 4	Trådløs alarmerhet	Rød
Sender 4	Testknapp	Rød

Systemtest

Det er viktig at du tester systemets funksjon minst en gang i uken. Du bør da gjennomføre en fullstendig systemtest der alle aktuelle sensorer aktiveres og der alle sendernes alarmfunksjoner testes.

Viktig!


- Tettere testintervall kan være påkrevd hvis sensorens brukerhåndbok anbefaler det.
- Tettere testintervall kan være påkrevd ved spesielle forhold i pleie-situasjoner, hvis systemet er endret eller om noen av enhetene har falt i gulvet.


Skifte batteri

For at systemet skal fungere pålitelig er det viktig at du regelmessig kontrollerer batterienes tilstand. Merk deg også at oppladbare NiMH-batterier må skiftes ut cirka hvert andre år. Når du skifter batterier skal du alltid sørge for at batteriene er utenfor rekkevidde for barn. Husk å levere brukte batterier til en returbeholder eller godkjent gjenvinningsmottak.

Slik skifter du batterier i senderen


Åpne lokket på senderen. Ta ut de gamle batteriene og sett inn nye. Du finner monteringsanvisning over batterirommet.

 **Viktig!** Hvis senderen er batteridrevet, skal du kun bruke alkaliske AAA-batterier. Hvis du har strømtilførsel, skal du kun bruke oppladbare NiMH AAA-batterier. Bland aldri NiMH-batterier med alkaliske fordi laderen og batteri da kan bli overopphetet.

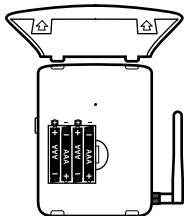

Slik skifter du batterier i pageren


Åpne batteridekselet på baksiden av pageren. Ta ut det gamle batteriet og sett inn et nytt, se monteringsanvisning i batterirommet.


 **Viktig!** Bruk kun oppladbare NiMH AAA-batterier i pageren.



Slik skifter du batterier i pagerladeren

Åpne batteridekselet på undersiden av pagerladeren. Ta ut de gamle batteriene og sett inn nye. Du finner monteringsanvisning i batterirommet.

 **Viktig!** Bruk kun oppladbare NiMH AAA-batterier i pagerladeren.

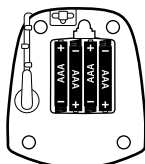

Håndtering og rengjøring

Advarsel! Hvis du ikke følger anvisningene for håndtering og rengjøring, kan produktene bli skadd og garantien bli ugyldig.

Bruk av kontakter og uttak

Tvinge aldri en kontakt inn i et uttak. Kontroller at uttaket ikke er blokkert på noen måte. Hvis kontakten er vanskelig å sette inn uten å bruke krefter, passer den sannsynligvis ikke i uttaket. Kontroller at kontakten passer i uttaket og at kontakten settes i riktig vei.

Bruke produktene

Produktene må ikke brukes eller oppbevares i nærheten av varmekilder, og skal kun brukes i tørre omgivelser der temperaturen ligger mellom 15 - 35 °C. Pageren må ikke brukes i bad eller dusj. Dersom pager eller senderen blir våt, eller er utsatt for fuktighet, bør det ikke lenger betraktes som pålitelig og bør skiftes ut. Hvis du ikke skal bruke produktene i en lengre periode, bør batteriene tas ut.

Rengjøring

Før du rengjør produktet må du koble fra eventuell strømtilførsel. Bruk deretter en myk og løfri klut. Sørg for at det ikke kommer fuktighet inn i åpningene. Ikke bruk vinduspussmidler, rengjøringsmidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller produkter som inneholder slipemidler.

Garanti og service

Hvis produktet ditt ser ut til å være skadd eller ikke fungerer, følg rådene i denne brukerhåndboken. Hvis produktet fremdeles ikke fungerer slik det skal, kontakt din forhandler for informasjon om garanti og service.



Annen viktig informasjon

Informasjon om hvordan du kasserer produktene og annen viktig informasjon om bestemmelser og sikkerhet finner du i avsnittet **Viktig informasjon** på s. 54-55.






Feilsøking

De fleste problemene med systemet kan du løse raskt ved å følge anvisningene nedenfor. Flere tips og feilsøkinginformasjon finnes på vår hjemmeside.




Sender

Hvis	Gjør følgende
Senderens status-indikator blinker rødt	<ul style="list-style-type: none">• Senderen har lavt batteri. Åpne dekelet og skift batterier eller lad batteriene hvis du har strømtilførsel. <p>Viktig</p> <p> Hvis senderen er batteridrevet, skal du kun bruke alkaliske AAA-batterier. Hvis den har strømtilførsel, skal du kun bruke oppladbare NiMH AAA-batterier. Bland aldri NiMH-batterier med alkaliske fordi laderen da kan bli overopphetet.</p>
Senderens status-indikator blinker lilla	<ul style="list-style-type: none">• Batteriene i senderen er av feil type eller feilmontert. Se punktet ovenfor for korrekt konfigurasjon og montering av batterier.
Senderens status-indikator blinker hvitt	<ul style="list-style-type: none">• GSM-modulen indikerer en feil. Åpne dekelet og kontroller GSM-indikatoren ovenfor -symbolet (se Oversikt over sender på s. 32).• Hvis lampen blinker hvert sekund finner ikke enheten et GSM-nett. Forsikre deg om at det finnes GSM-dekning i ditt område, og sørg for at SIM-kortet er korrekt montert, se avsnittet Installere SIM-kort på s. 33. <p>Når senderen finner GSM-nettet, går GSM-indikatoren over til å blinke hvert tredje sekund.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis problemet fortsetter, kontakt din operatør.• Hvis indikatoren er slukket, mangler enheten GSM-modul eller modulen er ute av funksjon. Kontakt din forhandler for service.
Senderens status-indikator blinker blått	<ul style="list-style-type: none">• Senderen er klar til å koble til den trådløse alarmerheten.• Hvis problemet fortsetter, kontakt din forhandler for service.

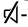Pager

Hvis	Gjør følgende
Pagerens  -symbol lyser samtidig som pageren vibrerer og piper	<ul style="list-style-type: none">• Pageren har mistet radiokontakten med en sender. Hvis du har flere enn én sender, indikerer lysdiodens posisjon hvilken sender det gjelder. Flytt deg til innenfor rekkevidde for senderen.
Pagerens  -symbol lyser samtidig som pageren vibrerer og piper	<ul style="list-style-type: none">• En sender i systemet indikerer en feil. Hvis du har flere enn én sender, indikerer lysdiodens posisjon hvilken sender det gjelder. Se Feilsøking sender på s. 46.
Pagerens  -symbol lyser hvitt samtidig som pageren vibrerer og piper	<ul style="list-style-type: none">• Pageren har mindre enn to timers batteritid igjen. Lad batteriene ved å plassere pageren i laderen. Pageren er fulladet i løpet av 6 timer.
Pagerens  -symbol lyser rødt samtidig som pageren vibrerer og piper	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet i pageren er av feil type, feilmontert eller oppbrukt. Kontroller monteringen og skift batteri, se Skifte batteri på s. 44.
Pageren gir ikke fra seg noen lyd når  -symbolet lyser	<ul style="list-style-type: none">• Pagerens lyd er slått av. Skyv lydreguleringen oppover for å gjenopprette lyden. Den sitter på høyre side av pageren (se oversikt).

Pagerlader

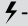Hvis	Gjør følgende
Det er ikke mulig å lade pageren	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at pageren er korrekt plassert i laderen. Lysdioden ved laderens -symbol blinker/tennes for å vise at pageren lades.• Kontroller at laderens strømtilførsel er korrekt tilkoblet. Laderens -symbol lyser med fast lys når laderen er koblet til strømtilførselen. Når symbolet blinker, benyttes batterireserven.
Reservebatteriet i laderen fungerer ikke og laderens  -symbol er slukket	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at batteriene er korrekt montert og oppladet. Lad opp eller skift batterier, se Skifte batteri på s. 44.

Teknisk informasjon

All In One Sender

Mål og vekt	h 140 mm x b 105 mm x d 30 mm, 210 g inkl. batterier
Nettdrift	Inngangsverdi: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A Utgangsverdi: 7,5 V = 1000 mA Bruk kun medfølgende nettadapter, SIL SSA-10W-12 EU 075100
Batteridrift	Med nettdrift: 4 x 1.2V AAA oppladbare NiMH-batterier. Bruk kun de medfølgende oppladbare batterier, Shenzen High Power Technology Co. Ltd. HFR AAA900 900 mAh eller 1000 mAh Varta 5703. Uten nettdrift: 4 x 1,5 V AAA alkaliske batterier
Driftstid	365 dager uten modul for GSM eller trådløs alarmerhet 4 timers reservedrift med modul for GSM eller trådløs alarmerhet
Strømforbruk	0,3 mA i basisversjon
Tilkoblinger	1 x 7,5V strømtilkobling 2 x RJ-11-innganger 1 x 3,5 mm stereoplugg 1 x SMA-kontakt for GSM-antenne
Aktivering	Via testknapp Via sensorer som er koblet til de tre sensorinngangene Via trådløs alarmerhet (modul BE9230 kreves)
Radiofrekvens	869,2375 MHz
Rekkevidde	Ca. 500 meter ved fri sikt. Rekkevidden reduseres av vegger og større gjenstander som skjermer for signalene. Spesielt tykke vegger av armert betong påvirker rekkevidden kraftig. Rekkevidden kan også påvirkes av radiosendere eller utstyr som f.eks. TV, datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett.
Omgivelser	Kun for innendørs bruk Arbeidstemperatur: 15 - 35 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 %, ikke-kondenserend Kan ikke monteres nærmere enn 1,5 m fra pasienten
Regulatoriske krav	Tilfredsstiller WEEE, CE, RoHS og R&TTE
Tilbehør	BE9220 Modul for GSM BE9230 Modul for trådløse alarmerheter

All In One Pager

Mål og vekt	h 91 mm x b 55 mm x d 23 mm, 60 g inkl. batteri
Batteridrift	1 x 1.2V AAA oppladbare NiMH-batteri. Bruk bare den medfølgende oppladbare batteriet, Shenzen High Power Technology Co. Ltd, HFR AAA900 900 mAh.
Driftstid	24 h
Ladetid	Opp til 6 h
Strømforbruk	20 mA
Aktivering	Via Ok-knappen
Radiofrekvens	869,2375 MHz
Rekkevidde	Ca. 500 meter ved fri sikt. Rekkevidden reduseres av vegger og større gjenstander, og kan også påvirkes av radiosendere eller utstyr som f.eks. TV, datamaskin eller mobiltelefon.
Omgivelser	Kun for innendørs bruk. Arbeidstemperatur: 15 - 35 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 %, ikke-kondenserende
Regulatoriske krav	Tilfredsstiller WEEE, CE, RoHS og R&TTE

All In One Pagerlader

Mål og vekt	h 110 mm x b 93 mm x d 110 mm, 195 g inkl. batterier
Nettdrift	Inngangsverdi: 100-240V~ 50/60Hz 0,5A, utgangsverdi: 7,5V = 1600mA. Bruk kun medfølgende nettadapter, Helms-Man SFP0751600P.
Batteridrift	4 x 1,2V AAA oppladbare NiMH-batterier. Bruk bare de medfølgende oppladbare batterier, GP 80AAAHC 800 mAh.
Strømforbruk	200 mA
Tilkoblinger	7,5V strømtilkobling 3,5 mm stereoplugg for sengevibrator
Aktivering	Testknapp som aktiverer tilkoblet sengevibrator
Omgivelser	Kun for innendørs bruk. Arbeidstemperatur: 15 - 35 °C Relativ luftfuktighet: 5 til 95 %, ikke-kondenserende
Regulatoriske krav	Tilfredsstiller WEEE, CE, RoHS og R&TTE
Tilbehør	BE1270 Sengevibrator



Advarsel! Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.


Tilpasse etikett i pageren

Med en tilpasset etikett blir det lettere å identifisere alarmen på din pager. Avhengig av konfigurasjon kan du f.eks. skrive navnene på personene eller de sensorene du har koblet til. En ekstra etikett medfølger i pakken.

Slik skifter du etikett i pageren

- 1 Fjern det gjennomsiktige plastlokket som beskytter panelet med fargede lysdioder. Vær nøye med at plasten ikke ripes opp.
- 2 Skift ut etiketten med en tilpasset etikett.
- 3 Knepp fast plastlokket.

Tips! Hvis du trenger etiketter, finner du en redigerbar PDF-versjon på vår hjemmeside som du kan skrive ut selv.

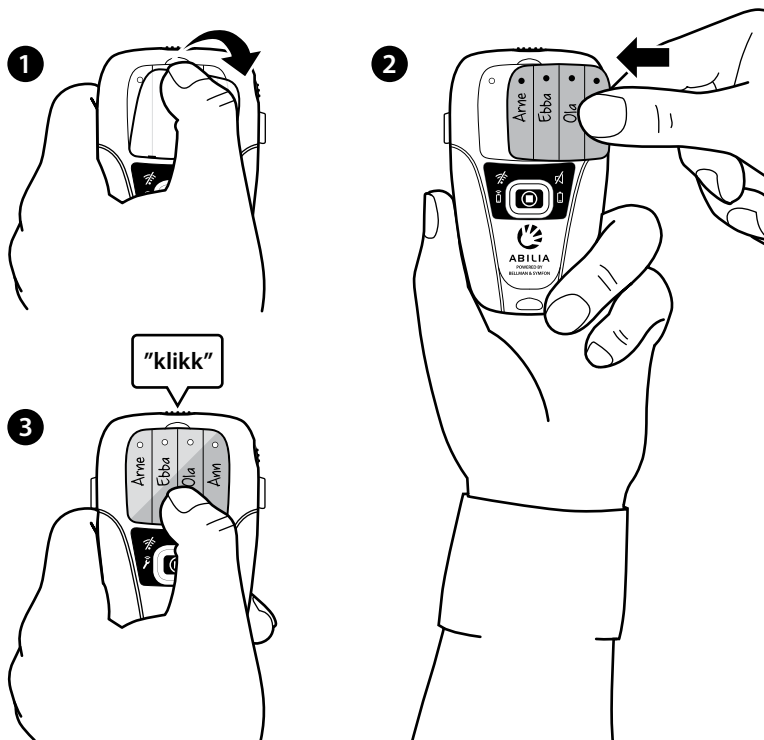

Viktig informasjon

Dette avsnitt inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering, gjenvinning og garanti.



Les bruksanvisningen og sikkerhetsinformasjonen før All In One tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

NO

Advarsel

- Hvis ikke sikkerhetsanvisningene følges kan det innebære mulig risiko for brann, elektriske støt eller andre skader på produktet.
- Beskytt ledningen strømtilførsel mot tråkk eller klemming.
- Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Strømtilførsel må kobles fra strømmettet ved tordenvær, eller når det ikke skal brukes i en lengre periode.
- Ikke bruk eller plasser produktet ved varmekilder eller åpen ild.
- Test alltid utstyret hvis det har falt i gulvet, eller på annen måte vært utsatt for mulig skade.
- Hvis man slår av lydvolume eller strømbryteren på pager, så kan dette medføre at varsling ikke registreres.
- Ved bruk av produktet må man være klar over at batterier kan bli utladet, at strømforsyning blir frakoblet eller det ikke er mobildekning så kan dette medføre at varsling ikke fungerer.
- Overlat alt servicearbeid til kvalifisert servicepersonale. Service er påkrevd når enheten har blitt skadd på en eller annen måte.
- Denne enheten har ingen strømbryter. For å bryte strømmen til apparatet må du trekke ut kontakten. Sørg for at kontakten alltid er lett å komme til.
- Ikke utfør noen reparasjoner på egenhånd, eller forsøke å demontere produktet. Det innebærer risiko for elektrisk støt, og garantien vil bli ugyldig. Produktet inneholder ingen deler som brukeren selv kan reparere.
- Produktet er beregnet for viderevarsling av alarm, men må ikke anvendes som eneste sikkerhet hvis det er fare for liv og helse. Personlig tilsyn av pasient/bruker er da nødvendig.
- Produktet er beregnet for innendørs bruk og må ikke utsettes for fukt eller væske.
- Beskytt produktet ved lagring og transport.

Modell, typebetegnelse og klassifisering

Information finns på baksiden av All In One sender, pager og lader.

Gjenvinning av kassert produkter



Symbolet betyr at produktet ifølge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Når produktet kasseres, må det bringes til en gjenvinningsstasjon som er godkjent av lokale myndigheter. Noen gjenvinningsstasjoner tar imot kasserte produkter uten betaling. Ved å sørge for at kasserte produkter leveres til gjenvinning, bidrar du til å spare naturressurser og beskytte helse og miljø.

Gjenvinning av brukte batterier



Symbolet betyr at produktet inneholder batterier som ifølge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Lever brukte batterier til en returbeholder eller godkjent gjenvinningsmottak.

EU-Samsvarserklæring


CE 0359 Herved bekrefter, Bellman & Symfon Europe AB, at dette produktet er i overensstemmelse med krav til egenskaper og andre relevante bestemmelser som fremgår av direktiven R&TTE 1999/5/EC, LVD 2006/95/EC, MDD 93/42/EEC og EMC 2004/108/EC. For kopi av samsvarserklæringen kontakt Bellman & Symfon Europé AB, Södra Långebergsgatan 30, 421 32 Västra Frölunda, Sweden.

Mine notater

Bruk illustrasjonen nedenfor for å dokumentere din installasjon av All In One-systemet.

Tips! Du kan for eksempel notere hvilke sensorer du har koblet til senderen, hvilke sendere du har koblet til pageren samt kontaktopplysninger til eventuelle assistenter.

Hvis du trenger flere ark, finner du **Mine notater** i PDF-versjon på vår hjemmeside.

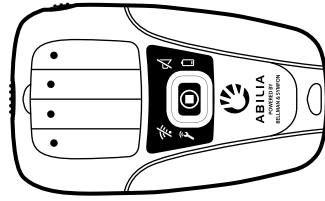


Pagere

Oransje lysdiode: _____

Grønn lysdiode: _____

Gul lysdiode: _____


Rød lysdiode: _____

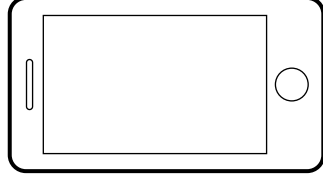

Assistent 1

Navn: _____


Mobilnr.: _____

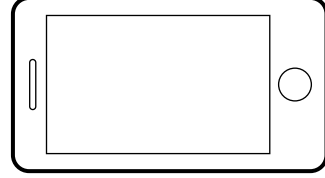

Assistent 2

Navn: _____

Mobilnr.: _____

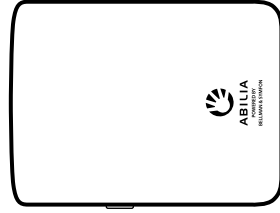

Sender 1


Mobilnr.: _____

Sensor 1: _____

Sensor 2: _____

Sensor 3: _____

Trådløs alarm: _____

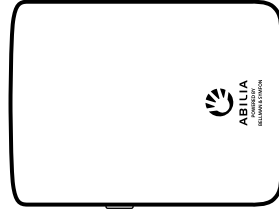

Sender 3


Mobilnr.: _____

Sensor 1: _____

Sensor 2: _____

Sensor 3: _____

Trådløs alarm: _____

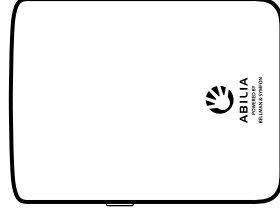

Sender 2


Mobilnr.: _____

Sensor 1: _____

Sensor 2: _____

Sensor 3: _____

Trådløs alarm: _____

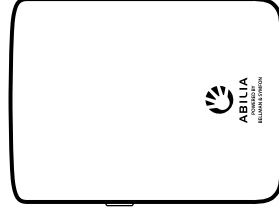

Sender 4

Mobilnr.: _____

Sensor 1: _____

Sensor 2: _____

Sensor 3: _____

Trådløs alarm: _____

Technical information

BE2310 Transmitter

Mains electricity Input: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.3A
Output: 7.5 V \equiv 1000 mA
Use the supplied adaptor model SSA-10W-12 EU 075100 by SIL

Battery power With mains electricity:
4 x 1.2 VAAA rechargeable NiMH batteries.
Use the supplied rechargeable batteries model HFR-AAA900 900 mAh by Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. or model 5703 1000 mAh by Varta.
Without mains electricity: 4 x 1.5V AAA alkaline batteries

Receiver category Wireless alarm receiver module (BE9230 accessory) is a category 2 receiver

BE2340 Pager

Battery power 1 x 1.2 V AAA rechargeable NiMH battery.
Use the supplied rechargeable battery model HFR-AAA900 900 mAh by Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.

Receiver category Pager is a category 2 receiver

BE1250 Pager charger

Mains electricity Input: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.5A
Output: 7.5 V \equiv 1600 mA
Use the supplied adaptor model SFP0751600P made by Helms-Man

Battery power 4 x 1.2 V AAA rechargeable NiMH battery
Use the supplied rechargeable batteries model 80AAAHC 800 mAh by GP



CAUTION: Explosion hazard if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions in the leaflet.

**POWERED BY
BELLMAN & SYMFON**

