


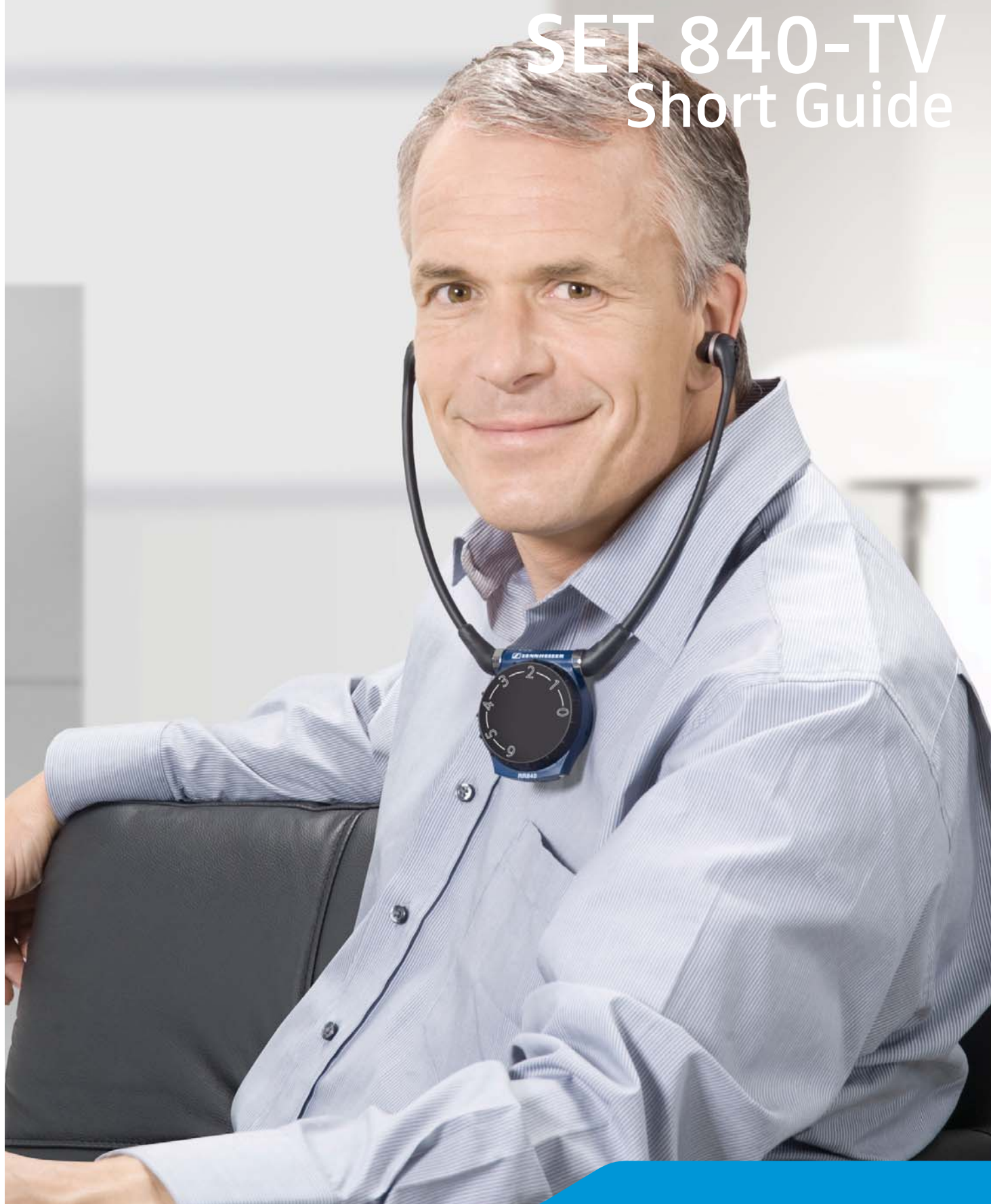

SET 840-TV

Short Guide



Gratulerer med din nye trådløse Set 840-TV fra Sennheiser

Denne hurtigguiden vil gjøre det enkelt for deg å komme i gang med å bruke ditt nye trådløse sett for TV.

Pakk opp alt utstyret og sett det foran deg. Leveransen omfatter en blå og svart sender-/laderenhet (som har integrert rom for ekstra batterilading på siden), en stetosett-mottaker (brukes på samme måte som stetoskop og henger fra ørene), diverse adaptere, tilkoblingskabler osv., to ulike sett med øreplugger (kan passe bedre til dine ører, enn de som er montert på stetosettet fra før). Du kan sjekke listen i vedlagte bruksanvisning "Wireless TV listening system **Set 840-TV**" side 4 "Delivery includes" (levering omfatter).

Dette systemet er basert på radioteknikk. Sender og mottaker behøver av den grunn ikke nødvendigvis å være i samme rom. Unngå å bruke systemet i nærheten av større metallkonstruksjoner, f.eks. metallvegger.

1. Koble Set 840-TV til nettspenning

- Sett først sammen strømadapteren til nettspenningen. Velg en egnet plugg, av den typen som brukes i stikkontakten i landet du bor. Før den inn på den lille svarte boksen merket "SWITCHING POWER SUPPLY NT-13" til den låses (og gir fra seg et hørbart klikk). Nå er strømadapteren klar.
- Koble adapteren til stikkontakten og - i den andre enden av kablen - koble den lille gule, runde pluggen, til den gule kontakten på baksiden av senderen merket "DC IN 13,5 V".
- Senderen er nå på og et grønt lys kommer på på fronten. Dersom senderen ikke brukes i løpet av 3 minutter, vil senderen og det grønne lyset slå seg av igjen.

2. Lade opp stetosett-mottakeren

- Plasser stetosettet i laderrommet på toppen av senderen. Dersom den er riktig plassert, vil ladekontaktene etablere full kontakt, batteriene vil lades og et rødt lys - rett under Sennheiser-logoen - på senderen slås på.
- Den første gangen må stetosettet lades i cirka 3 timer. Når batteriene er fulladet, skifter det røde lyset til grønt. Nå kan du bruke stetosettet i cirka 9 timer før du må lade den igjen. Du bør imidlertid alltid lagre stetosettet i laderrommet på senderen, for å sikre at den alltid er fulladet ved behov. Det er ikke mulig å overlade batteriet.

3. Koble Set 840-TV til TV eller annen lydkilde

- Dette kan gjøres på ulike måter, men husk alltid å slå av TV eller annen lydkilde før tilkobling.
- Koble den ene enden av audiokabelen med den blå minijacken til hodetelefonutgangen på TV-en. Den andre enden av kablen går inn på baksiden av senderen, i den blå kontakten merket "AUDIO".
- Dersom TV-ens kontakt er for stor, bruk adapteren (stereo-jack) som er større. Den lille jackpluggen går inn i enden på den større jackadapteren.
- Senderen kan kobles til TV-en også på andre måter, f.eks. ved å bruke phono-kontaktene eller SCART-kontakten (som ofte sitter på baksiden av TV-en). Det vil imidlertid ofte være enklere å bruke hodetelefonkontakten på TV-en.
- En bryter på baksiden av senderen, merket "ST/MO" (stereo eller mono), gir deg mulighet til å velge stereo. Set 840-TV må være tilkoblet en stereo TV og bryteren må stå i ST-stilling (mot den blå AUDIO-kontakten). Det er slik settet leveres fra fabrikken.
- En annen bryter, som er merket "CHANNEL" (kanal) lar deg velge mellom 3 ulike kanalinnstillinger. Normalt vil den kanalen som er valgt av fabrikken, fungere fint. Bare dersom det oppstår støy eller forstyrrelser, vil det være nødvendig å endre kanal.
- På baksiden av senderen er det en knapp som lar deg justere bass-/diskant-balanse, som kun benyttes sammen med funksjonen for økning av tale tydelighet (diskanthevning) som beskrevet nedenfor. Du

trenger en skruetrekker for å gjøre dette, men vanligvis er denne justeringen unødvendig.

- Skru TV-en på igjen, og juster volumet til middels lydnivå.


4. Bruk av system Set 840-TV

- Senderen slås automatisk på når TV-en forsyner den med signal.
- Sett på deg stetosettet (plasser det på ørene som om det var et stetoskop). Mottakeren vil automatisk slås på når du drar rørene fra hverandre. Mottakeren vil nå søke etter den kanalen som senderen bruker. Dersom du hører TV-lyd nå, er alt i orden. Hvis ikke, må du trykke på knappen merket "CHANNEL" (kanal) på baksiden av mottakeren. Mottakeren vil da igjen forsøke å finne kanalen som senderen bruker. Det kan hende at du må gjenta dette, inntil ønsket kanal er funnet.
- Lydnivået kan justeres (0-6) med volumhjulet, som befinner seg under haken, når du har på deg stetosettet.
- Dersom stetosettet ikke får noe signal fra senderen, vil du høre 6 korte pipesignaler. Sjekk at senderen er slått på, at du er innenfor senderens rekkevidde og at kabelen fra TV-en er riktig tilkoblet til senderen.
- 2 lange pipesignaler betyr at det oppladbare batteriet nesten er utladet.
- Ved behov kan taletydigheten økes ved bruk av den svarte knappen på senderen (foran på venstre side). Den har et lite symbol, som et øre. Trykk gjentatte ganger på knappen til lyden er slik du vil ha den:
 - 1: Kompresjon (svake partier i lyden blir forsterket)
 - 2: Forsterkning av diskanten
 - 3: Både kompresjon og forsterkning av diskanten samtidig
 - 4: Grunninnstilling (ikke noe lys)
- Til slutt justeres balanse venstre-høyre med det lille hjulet på baksiden av stetosettet.

5. Skru Set 840-TV av

- Plasser stetosettet i laderrommet på toppen av senderen, slik at batteriene kan lades opp igjen.
- Senderen vil slå seg av automatisk etter 3 minutter, når TV-en er avslått.

Hygg deg med din Sennheiser Set 840-TV. For mer utfyllende instruksjoner, vennligst les vedlagte bruksanvisning "*Wireless TV Listening System Set 840-TV*".

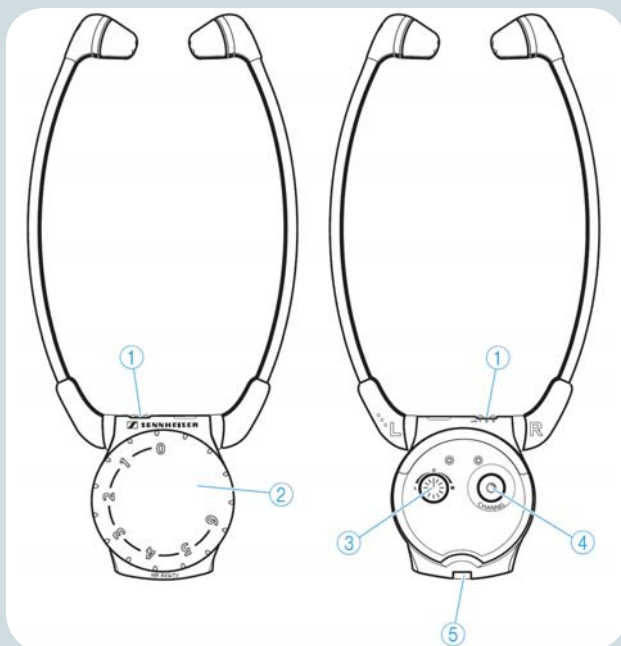

Stetosettmottaker

1. Kanalindikator
2. Volumkontroll
3. Balansekontroll
4. Kanalsøkeknapp
5. Rom for batteri

Sender

6. Laderrom for mottaker
7. Laderrom for oppladbart reservebatteri
8. Ladeindikator for oppladbart reservebatteri
9. Ladeindikator for mottakerens oppladbare batteri
10. Driftsindikator
11. Knapp for "speech intelligibility" (taletydelighet)
12. Indikator for valgt funksjon for taletydelighet
13. Kontakt (merket blå) for tilkobling til lydkilde eller ekstern mikrofon
14. Stereo/Mono-bryter
15. Kontroll for diskantjustering
16. Bryter for kanalvalg
17. DC-kontakt (merket gul) for tilkobling til nettspenningsenhet

