

# Bruksanvisning

## MEDIASENDER FM-S3

VAREN.R.: 1182

Mediasenderen benytter standard AudioLink trådløst overføringssystem i 823-832 MHz båndet for overføring av lyd til AudioLink Radiomottakere.

FM-S3 benyttes ofte som signalkilde for AudioLink Radius nærlyd-forsterker for optimal lydopfattelse.

**Spesielt godt egnet for hørselshemmede for lytting til TV.**




Dok.nr.: 0656A1  
Dato: 2012-10-08

## Virkemåte


Ved å koble mediasenderen til TV-apparatets lydutgang vil man "flytte" lyden til AudioLink mottakere.

## Betjening

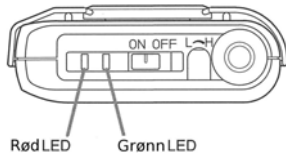

Mediasendern betjenes med av/på-bryteren (ON/OFF) på toppen. Når den er i bruk lyser den grønne indikatorlampen på toppen av senderen. Det medfølger batterieliminatør og det grønne lyset tenes når denne er plugget inn og senderen slått på. Senderen bør være avslått når den ikke er i bruk.


## Montering

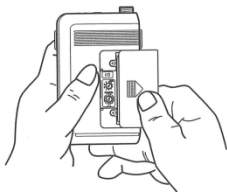

1. Åpne batteridekselet
2. Still inn kanal tilsvarende det du har på lydforsterkeren.

Se avsnitt *Kanalvalg*.

3. Signalkabelen kobles til kontakten på toppen av senderen.
4. Sett Mediasenderen fast med medfølgende borrelåstape.

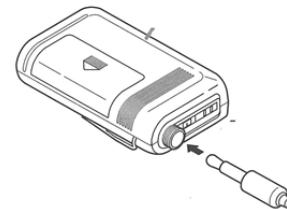

## Koble til lydkilden

Det medfølger ledninger og overganger slik at mediasenderen kan tilkobles de fleste apparater. For TV benyttes normalt phono-kontakter eller SCART-overgang. Alternative overganger og omformere finnes tilgjengelig ved henvendelse til Hjelpemiddelsentralen.



## Batterieliminatør

Mediasenderen drives av medfølgende batterieliminatør, som settes i nett-kontakten på veggen.

## Kanalvalg

1. Åpne batteridekselet

Slå av senderen. Ta av batteridekselet.

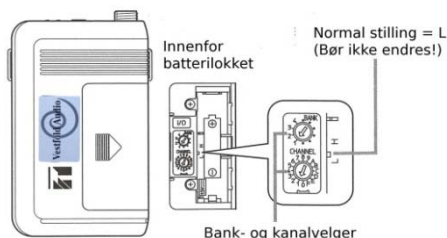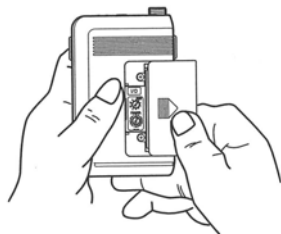

2. **Valg av kanal**

Med en liten flat skrutrekker dreier man kanalvelgeren til ønsket kanal.

3. **Bank**

Mikrofonsenderen er innstilt på samme kanalbank som lydforsterkeren og skal ikke endres.

4. **Lukk batteridekselet**

Sett batteridekselet på plass. Slå på senderen igjen.

### Linjeinngang (følsomhet)

Nivået på inngangen er fabrikkinnstilt, men det kan være behov for justering av følsomheten for å tilpasse til den enkelte lydkilde.

1. **Åpne gummileppen** (Se figur)
2. **Juster "Følsomhet"** til beste lyd kvalitet uten forvrenging.
3. **Lukk gummileppen**



### Kanaloversikt

Alle mikrofonene i AudioLink systemet er beregnet for 823-832 MHz båndet. Det er 37 tilgjengelige kanaler i dette området. Kanalene er fordelt på 3 banker med 16 + 16 + 5 kanaler slik:

#### Bank 11

Kanal	Frekvens		Kanal	Frekvens	
0	823,000		8	830,750	
1	829,750		9	823,500	
2	825,000		A	825,750	
3	826,750		B	831,250	
4	829,000		C	824,000	
5	832,000		D	828,250	
6	827,750		E	826,250	
7	824,500		F	830,250	

I tillegg til de 37 standard kanalene har mikrofonsenderen kanaler i området under 790 MHz (det såkalte white spots området). Disse kanalene er merket med x og grå bakgrunn i tabellene, og de skal bare benyttes i geografiske områder der kanalene er erklært ledige av Post- og Teletilsynet. Vestfold Audio kan på forespørsel levere AudioLink mottakere for bruk i ledige frekvenser i området under 790MHz.

#### Bank 12

Kanal	Frekvens		Kanal	Frekvens	
0	823,250		8	831,000	
1	830,000		9	823,750	
2	825,250		A	826,000	
3	827,000		B	831,500	
4	829,250		C	824,250	
5	825,500		D	828,500	
6	828,000		E	826,500	
7	824,750		F	830,500	

#### Bank 13

Kanal	Frekvens		Kanal	Frekvens	
0	829,500		8	788,750	x
1	827,500		9	786,250	x
2	831,750		A	788,250	x
3	827,250		B	786,750	x
4	828,750		C	789,000	x
5	789,500	x	D	787,250	x
6	787,750	x	E	789,250	x
7	785,750	x	F	786,000	x

#### Bank 14

Kanal	Frekvens		Kanal	Frekvens	
0	788,500	x	8	786,500	x
1	785,500	x	9	784,500	x
2	788,000	x	A	783,000	x
3	785,250	x	B	784,000	x
4	787,500	x	C	783,250	x
5	785,000	x	D	783,750	x
6	787,000	x	E	784,250	x
7	784,750	x	F	783,500	x

### Leverandør

Vestfold Audio AS  
3241 Sandefjord

### Tekniske spesifikasjoner

Frekvensområde, lyd: 150 – 15000 Hz  
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz  
Bruksområde: Innendørs / tørt  
Rekkevidde: ca. 100 meter i fri sikt  
Sendereffekt: 50 mW  
Driftspenning: 3VDC/240VAC  
batterieliminatør

### Enkel feilretting

Dersom mediasenderen ikke virker, bør du sjekke følgende:

1. Ikke lys i lampen når du slår på
  - a. Er batterieliminatøren plagget i kontakten på veggen?
  - b. Sjekk at det ikke er brudd på ledningen.
2. Ingen lyd i mottaker
  - a. Er mediasenderen på / grønt lys?
  - b. Er mottakeren på? Indikatorlampe i
  - c. Står sender og mottaker på samme kanal.
  - d. Kontroller at det er lyd i den utgangen som mediasenderen er tilkoblet til.

### Rengjøring utført av bruker

Stemmeforsterkeren kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann eller andre væsker.

### Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte Hjelpemiddelsentralen eller Vestfold Audio AS.