

# AudioLink

Varenr. 1562  
Artikkelnr. 863-SENDER  
HMS-nr.: 233379

## Sender for TV-lytting

863 – 865 MHz



## Brukerhåndbok

---

Dok. nr.: 2441A1  
Dato: 2017.04.20

## Innholdsfortegnelse

---

<b>1. Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2. Oversikt</b>	<b>3</b>
<b>3. Komme i gang</b>	<b>4</b>
Koble til strøm	4
Koble til lydinngangene	4
Stille inn mikrofonkanal	4
<b>4. Daglig bruk</b>	<b>4</b>
<b>5. Viktig informasjon</b>	<b>4</b>
<b>6. Resirkulering</b>	<b>4</b>
<b>7. Tekniske data</b>	<b>5</b>
<b>8. Feilsøking</b>	<b>5</b>

## 1. Innledning

Sender for TV-lytting benyttes for å "flytte" lyden fra TV, radio eller andre lydkilder ut til lokale høyttalersystemer.

Sender for TV-lytting kan benyttes sammen med AudioLink Lydpute (Varenr. 1560) og AudioLink UNO-863 (Varenr. 1561).

## 2. Oversikt



Figur 1 Framsiden



Figur 2 Bakside

### Index

1. Kanalvelger
2. Signalstyrkeindikator
3. Ute: Normal  
Inne: ved svakt inngangssignal
4. Ute: stereo  
Inne; Mono
5. Tilkobling for hodetelefon
6. Hodetelefon volumkontroll
7. På/Av
8. Rødt lys = PÅ
9. Strømforsyning inn  
13 - 15VDC
10. Linje inn venstre kanal  
(fra TV el.)
11. Linje Inn høyre kanal
12. Linje ut venstre kanal
13. Linje ut høyre kanal
14. Senderstyrke radiosignal  
(2 = normal)
15. Senderantenne

### 3. Komme i gang

---

#### Koble til strøm

Benytt den medfølgende strømforsyningen og koble den til i kontakten (9).

#### Koble til lydinngangene

De medfølgende kablene benyttes for å koble til lydutgangen på TV-apparatet, dekker eller lydanlegg.

Når strømforsyningen tilkobles, vil den røde lampen (2) lyse mens UNO lades. UNO er fullt oppladet når lampen (4) lyser.

Du kan bruke UNO normalt også når den er tilkoblet lading.

#### Stille inn mikrofonkanal

UNO må stilles inn til samme kanal som på mikrofonen du skal benytte.

Du kan enten stille inn kanal på UNO eller stille inn kanal på mikrofonen.

Se avsnitt 5. under



#### Tips

La knappen (4) være ute for bruk med LYDPUTTE2.

La knapp (4) være inne for bruk med UNO-863.

### 4. Daglig bruk

---

16. Slå på senderen med knappen (7). Lampen (8) lyser rødt.
17. Slå på mottakeren.
18. Slå TV og evt. annet lydutstyr.

### 5. Viktig informasjon

---

- Sendre-863 kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Sendre-863 skal ikke utsettes for regn / vannsøl.
- Temperatur: 0°C-+50°C
- Sendre-863 skal ikke benyttes eller lagres der det er kondenserende luft.

### 6. Resirkulering

---

Sendre-863 skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 7. Tekniske data

---

Frekvensområde:	40 – 14000 Hz
Radio båndbredde:	863 – 865 MHz
Bruksområde:	Innendørs
Strømforsyning/Lader:	14V DC / 230VAC
Sendereffekt:	Pos. 1: <10mW Pos. 3: <10mW
Dim (HxBxD):	50x205x150 mm

## 8. Feilsøking

---

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Ingen lyd og ikke rødt lys i (8).	Mangler strøm	Koble til strømforsyningen
Ingen lyd i mottakeren, men rødt lys i (8).	Lydkilden er ikke påslått	Slå på TV og annet utstyr.
	Senderen er satt til feil kanal.	Still inn riktig kanal (1).
Det er lite eller ikke signal i indikatorene (2).	Tilkoblet feil lydutgang	Sjekk tilkobling.
	For svakt signal inn.	Trykk inn knapp (3)
Dårlig/ingen lyd i mottakeren	Senderstyrken er stilt for lavt eller høyt.	Juster nivået med bryteren (14). Prøv opp og ned.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.







Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

