

SERENE®

**TV SoundBox®**  
Wireless TV Speaker

## Brukerveiledning

Model  
TV-SB



Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt utleveringsstedet.


### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Vennligst les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk TV SoundBox.


- Sørg for å holde anlegget tørt. Må ikke dypes i vann.
- For din egen sikkerhet, ikke forsøk å åpne enheten eller batterikammeret. Forsøker du å åpne batterikammeret, vil produktgarantien ikke lenger være gyldig.
- TV SoundBox bruker litium ion batterier. Vær oppmerksom på bruk og håndteringsregler for litium ion batterier. Vennligst kast enheten/brukte batterier i henholdt til lokale regler for spesialavfall. Kast ikke enheten/brukte batterier i husholdningsavfallet. Må heller ikke brennes. Ta utstyret med til nærmeste gjenvinningscenter.
- Ikke ta ut strømtilkoblingen ved å dra i ledningen, ta tak i støpselet. Strømtilkoblingen skal kobles fra når enheten ikke er i bruk og før vedlikehold eller rengjøring. Ikke bruk en enhet som har ødelagt ledning, støpsel, eller som ikke fungerer ordentlig. Lever enheten til utleveringsstedet for reparasjon eller retur.
- TV SoundBox er bare for hjem og personlig bruk.

## PAKKEN INNEHOLDER

- Senderenhet
- Trådløs mottagerenhet (høytaler)
- AC strømforsyning
- Audioledning
- Brukerveiledning

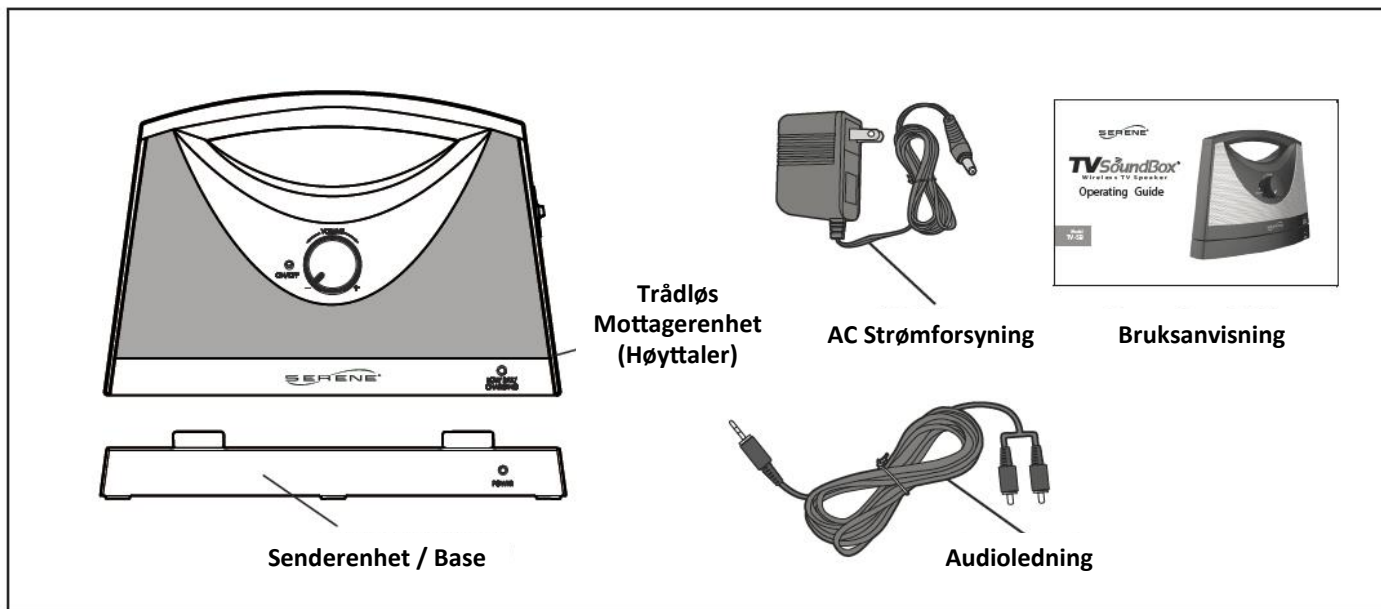


## HOVEDFUNKSJONER

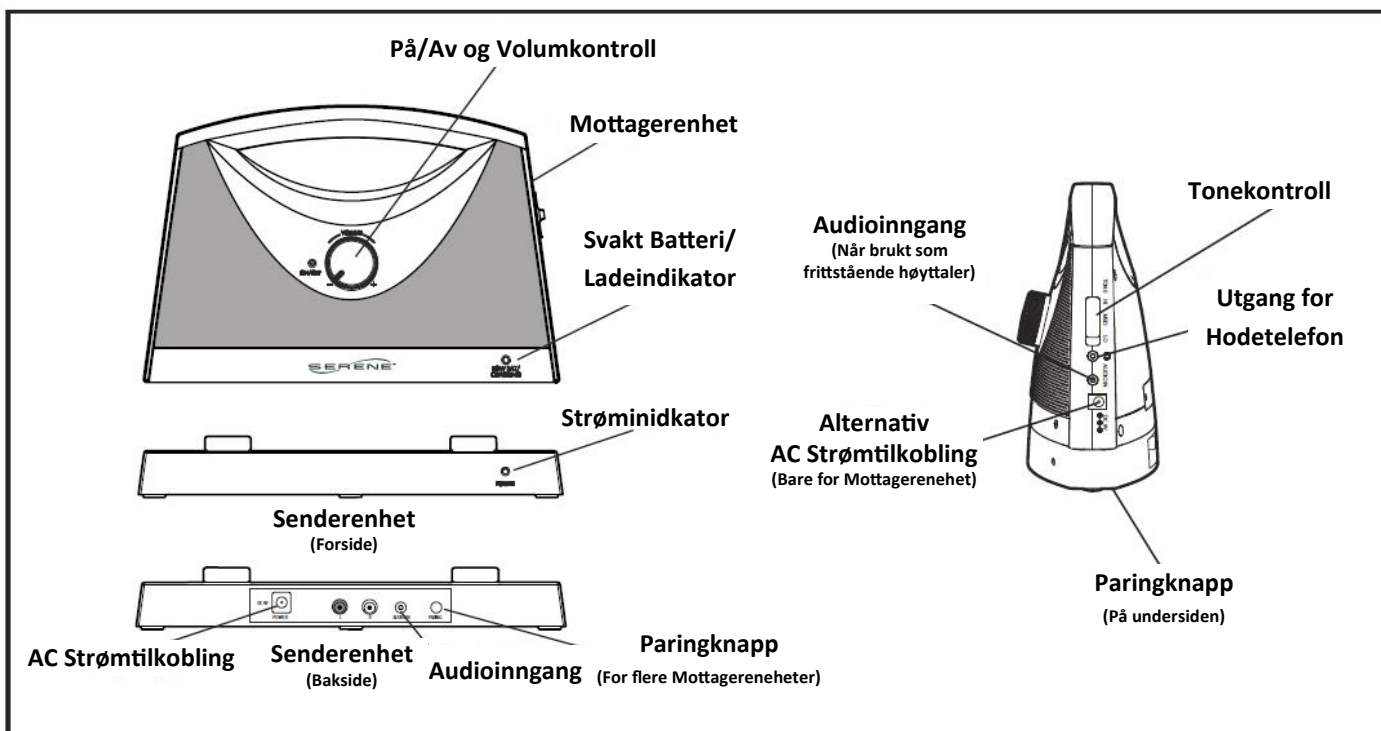

## TILKOBLINGER


### For TV med hodetelefonutgang

Hvis ditt TV har hodetelefonutgang, koble senderenheten til ditt TV som vist nedenfor.

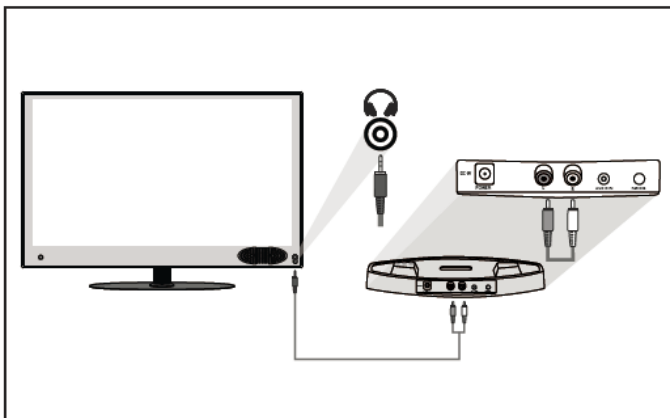


### For TV med audioutgang

Hvis ditt TV ikke har hodetelefonutgang men har audioutgang, (se på baksiden av TV), koble senderenheten til TV som vist nedenfor.

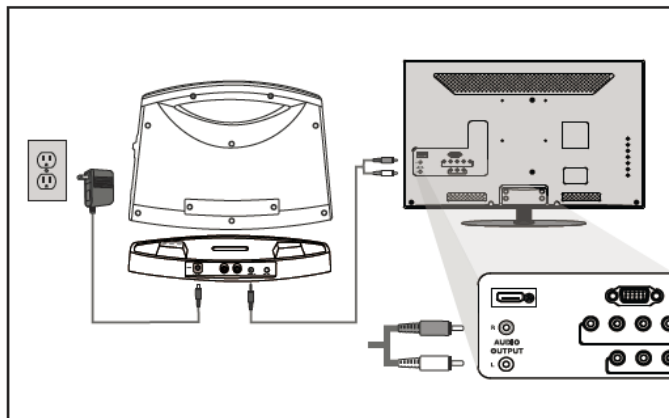


### For TV uten hodetelefon- og audioutgang

Hvis din TV har digitale optiske utgang, bruk denne via en omformer/adapter (selges separat), og koble til som vist på tegningen.

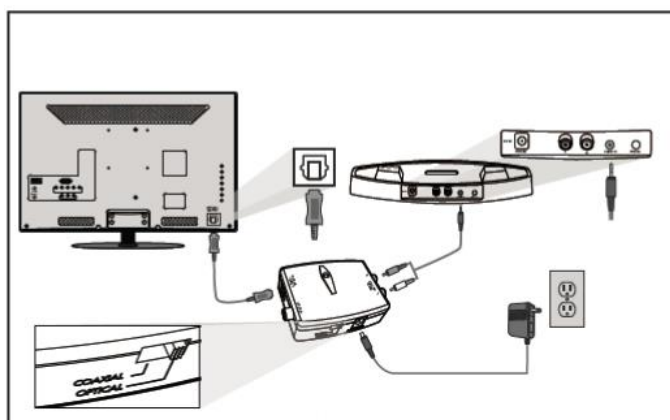

### Plassering av Senderenheten


Plasser senderenheten på toppen eller ved siden av TV.

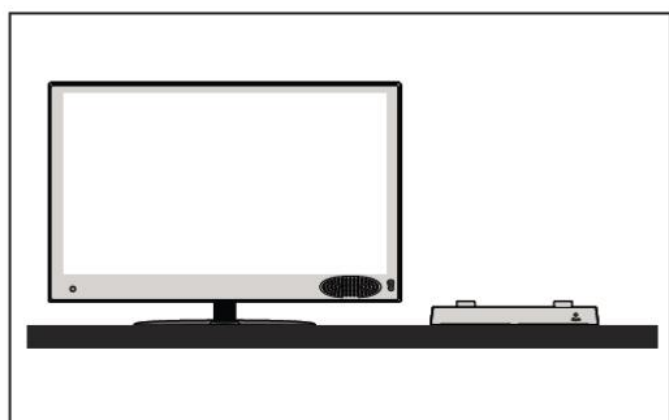

## LADING AV BATTERI

Plasser mottagerenheten på senderenheten som illustrert for ladning i minst 6 timer for første bruk. Under ladningen vil lavt batteri/ladeindikatoren blinke. Når full oppladet vil indikatoren stoppe å blinke og lyse konstant. Et fullt ladet batteri gir opptil 8 timer lyttetid.

Når mottageren ikke er i bruk, eller lavt batteri indikatoren blinker, plasser mottagerenheten på senderenheten for ladning

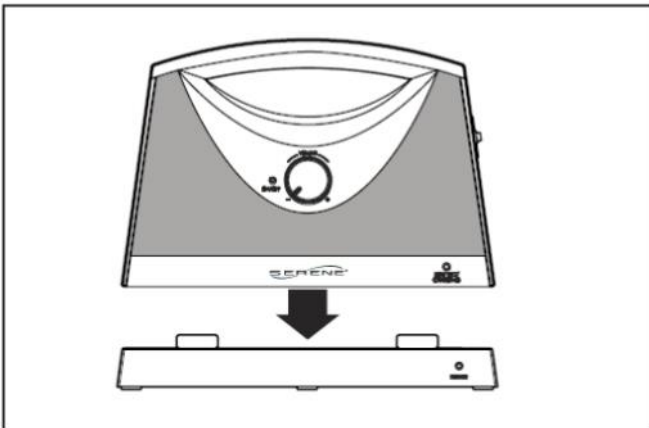

## EKSTRA MOTTAGERENHETER



Opptil 50 mottagerenheter kan kobles til samme senderenhet. Hver ny mottagerenhet må 'pares' med senderenheten på følgende måte:

1. Slå på senderenheten.
2. Trykk og hold inne paringknappen på baksiden av senderenheten i minst 2 sekunder. Strømindikatoren vil starte og blinke mens den leter etter en ny mottagerenhet.
3. Slå på mottagerenheten og trykk og hold inne paringknappen på undersiden av enheten. Når enhetene er parret vil det høres et pip og indikatoren på senderenheten slutter å blinke og går over til å lyse konstant.


## BRUK

### På/Av, Volum og Tonekontroll

1. Skru på knappen for å slå mottageren på eller av og for å justere lydstyrken.
2. Du kan skru lyden på TV lavt eller helt av. På noen TVer er det mulig at du må bruke fjernkontrollen for å gå til menyen for å velge innstillinger som gir optimal lyd/høytaler effekt. Vennligst sjekk bruksanvisningen for TV for mer informasjon.
3. For optimal batteribruk vil mottagerenheten automatisk skru seg av når den ikke har fått signaler fra baseenheten (etter at TV er skrudd av) for mer enn tre minutter. For å skru mottagerenheten på igjen, skru volumknappen til av og deretter på igjen. Senderenheten vil gå inn i hvilemodus når TV er slått av.
4. Juster tonekontrollen slik at du best hører og forstår tale.

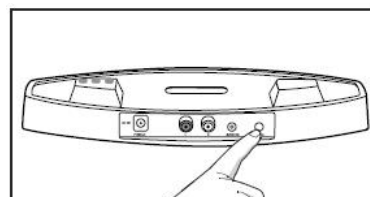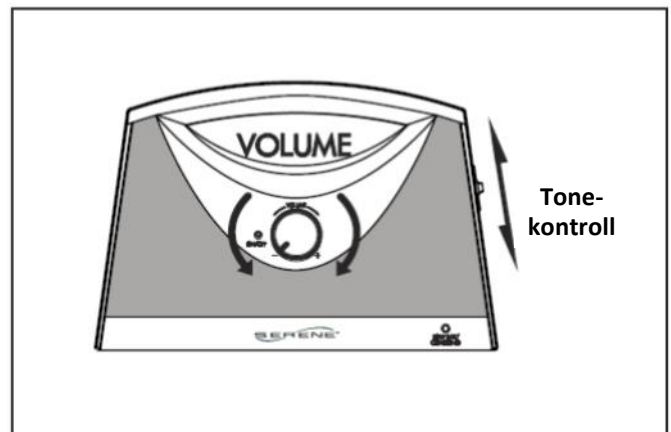


Baksiden av senderenheten

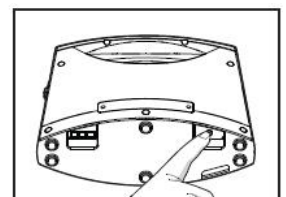

Undersiden av mottagerenheten


## BRUK AV HODETELEFON

Plugg inn hodetelefonen. Lyd vil nå ikke lenger komme via høyttaleren, bare hodetelefonen. Juster lydstyrken på hodetelefonen med volumkontrollen på mottagerenheten.

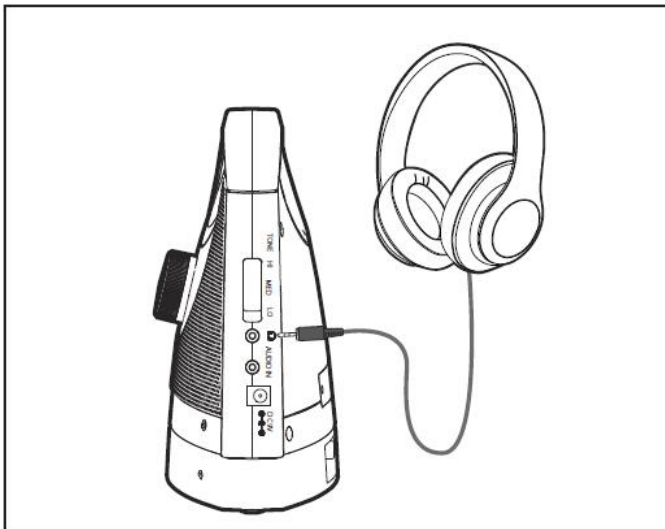


## BRUK AV MOTTAGER ENHETEN SOM FRITTSTÅENDE HØYTTALER

Plugg inn mobiltelefon, musikkspiller, radio eller annet via audioinngangen som vist på tegningen .

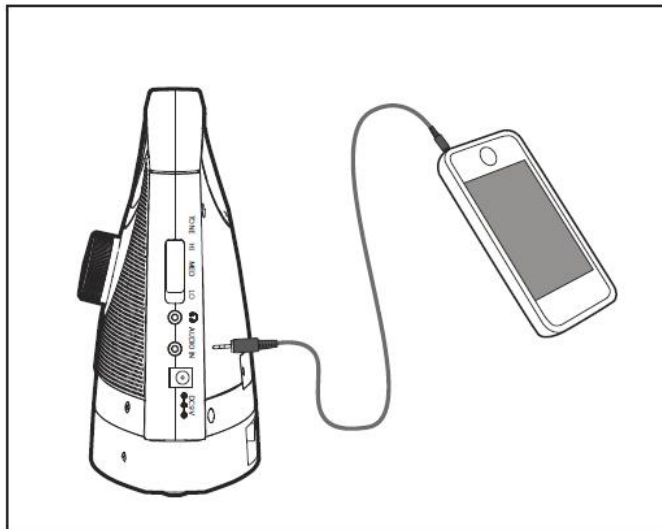

## ALTERNATIV STRØMFORSYNING FOR MOTTAGERENHETEN

Kjøp en ekstra AC strømforsyning (bruk bare strømforsyning laget for TV SoundBox) og plugg den inn som vist. Nå trenger du ikke lenger å flytte mottagerenheten for ladning.

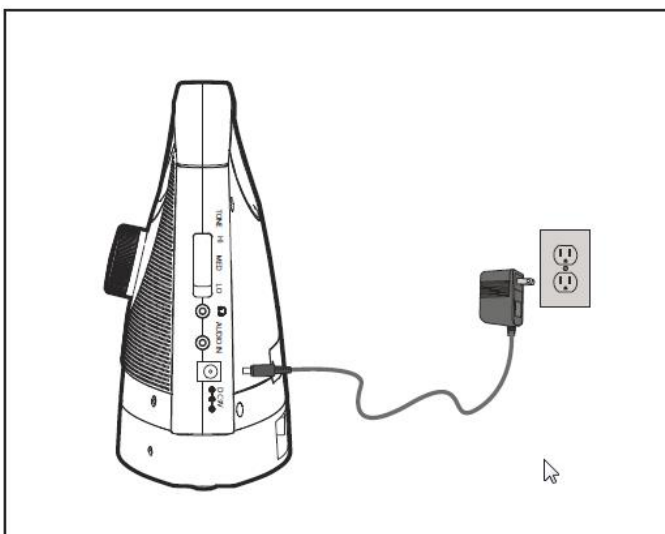

## FEILSØKING OG TILTAK

**Det kommer ikke lyd fra mottagerenheten**—Sjekk at all ledninger og tilkoblinger på senderenheten og TV. Pass også på at mottagerenheten ikke er mer enn 30 meter fra senderenheten.

**Det kommer lyd fra TV høyttaleren men ikke fra mottagerenheten**—Sjekk lydinnstillingen på TV via menyen ved å bruke fjernkontrollen. Påse at innstillingene er slik at TV sender lydsignaler til senderenheten.

**Svakt batteri/ladeindikatoren på mottagerenheten blinker**—Dette betyr at batteriet må lades. Plasser enheten på senderenheten for ladning. Etter 3 timer er enheten fullt ladet og blinkingen skal stoppe. Hvis blinkingen ikke stopper, sjekk om mottagerenheten står riktig plassert på senderenheten.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Ta ut AC strømforsyningen fra kontakten. Bruk så en tørr, myk klut til å fjerne støv fra enhetene. TV SoundBox må ikke dyppes i vann.

## GARANTI OG SERVICE

Det gis 2 års garanti på tekniske feil fra kjøpsdatoen.

Ta kontakt med utleveringsstedet ved feil og servicebehov.

## SPESIFIKASJONER

Sender	: 2.4 GHz Radiofrekvens
Høytaler	: 2x5W Klasse D
Høytalerbatteri	: Innebygget Lithium Ion batteri
Rekkevidde	: 30 meter i åpent område
AC Strømforsyning	: Inn 100-240VAC/50-60Hz, Ut 9VDC 1.5A
Lyttetid	: Opptil 8 timer ved 50% lydstyrke og fullt oppladet
Mål	: 24 x 17 x 8 cm
Vekt	: 800 gram



### **AurisMed AS**

Postboks 294, 3201 Sandefjord, Norge

Tel: +47 33 42 72 50, Faks: +47 33 42 72 51

Epost: [info@aurismed.no](mailto:info@aurismed.no), Web: [www.aurismed.no](http://www.aurismed.no)