



Micro Voice

Brukerveiledning

Art. nr: 462230

NO 10.0

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Om Micro Voice	3
Tiltentkt bruksformål	3
Om dette dokumentet	3
Oversikt over Micro Voice	4
Kom i gang med Micro Voice	5
Lade Micro Voice	5
Plasser Micro Voice	5
Bruk Micro Voice	6
Slå Micro Voice på og av	6
Snakk med Micro Voice	6
Endre volumet	6
Bytt til Demp (Hvilemodus)	6
Vedlikehold	7
Rengjør Micro Voice	7
Lad Micro Voice-batteriet	7
Feilsøking	8
Oppbevaring og kassering	8
Produktspesifikasjoner	8
Viktig informasjon	9
Kontaktinformasjon	11

Innledning

Om Micro Voice

Micro Voice er en stemmeforsterker. Hvis du nettopp har hatt en operasjon eller har mer varige skader på stemmebåndene, hjelper Micro Voice deg med å snakke høyt uten at stemmen anstreges eller skades ytterligere.

Tiltenkt bruksformål

Micro Voice stemmeforsterker er ment å brukes av personer som har en svak eller anstrengt stemme, eller som regelmessig bruker stemmen intensivt, for å få frem budskapet sitt høyt og tydelig uten å belaste eller forårsake ytterligere skade på stemmen. Produktet er til innendørs bruk, hjemme, på skolen, på arbeidsplassen eller på farten.


Om dette dokumentet



Les all viktig informasjon på side 9 før du tar produktet i bruk.

Denne brukermanualen er ment for deg som bruker Micro Voice. I dette dokumentet lærer du hvordan du trygt bruker Micro Voice.

Oversikt over Micro Voice

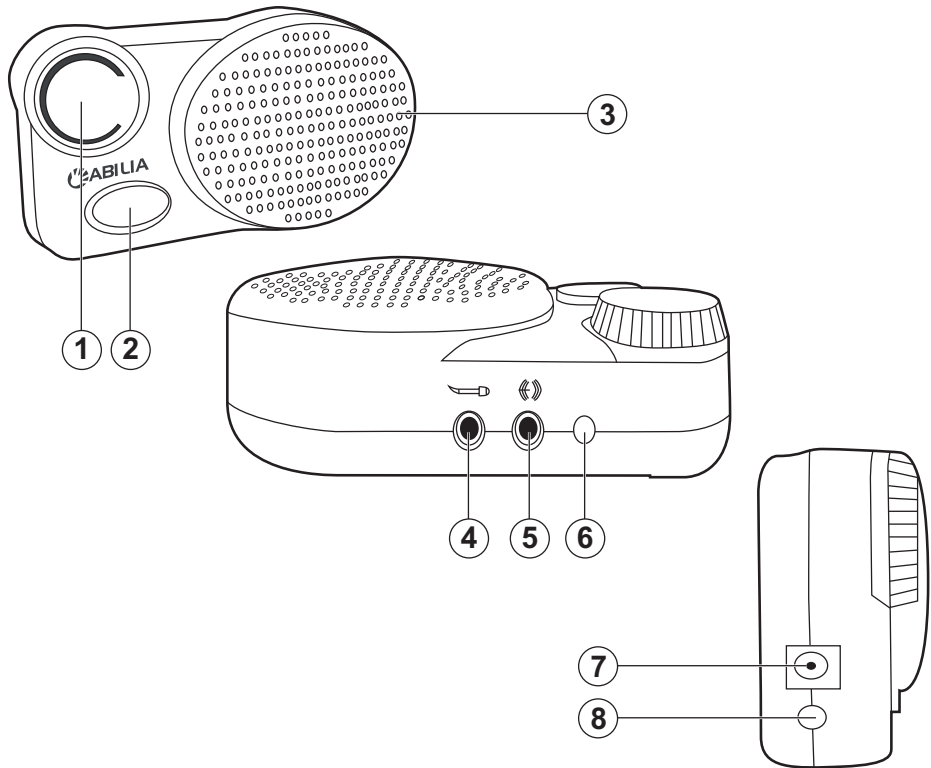

1. Volumkontroll
2. Kontrollknapp
3. Høytaler
4. Mikrofoninngang
5. Lydutgang
6. LED-indikator
7. Ladeport
8. LED-indikator for lading

Medfølgende deler

- Micro Voice
- Lader for Micro Voice
- Midjereim
- Headset

Medfølgende dokumenter

- Brukerveiledning (dette dokumentet)

Kom i gang med Micro Voice

Lade Micro Voice

Lade Micro Voice opp fullstendig før du bruker den for første gang, se *Lad Micro Voice-batteriet* på side 7.


Plasser Micro Voice

⚠ ADVARSEL: ADVARSEL: Ikke legg mikrofonen og forsterkeren tett sammen. Dette gir en akustisk tilbakekobling som, når den er satt til høyt volum, kan forårsake hørselshemming.


1. Bestemme deg for hvordan du vil bære den. Du kan feste den til midjen ved hjelp av belteklipsen eller midjereimen.
2. Koble mikrofonen til inngangen.
3. Plasser mikrofonen:
 - a. Hvis du har Headset-mikrofon: Fest den rundt bakhodet, med bøyelene over ørene, og flytt mikrofonen nær munnen.
 - b. Hvis du har Myggmikrofon: Fest den til klærne nær munnen.
 - c. Hvis du har Strupemikrofon: Påse at den er festet flatt mot huden øverst på halsen (over kragen).



Headset

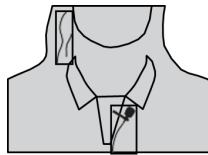

Myggmikrofon

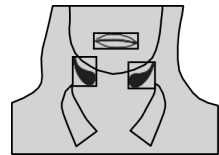

Strupemikrofon



TIPS: Strupemikrofon: Hvis du har en slank hals, kan du legge et tøyestykke imellom bak i nakken for å få bedre passform. Den bør ikke føles så stram at det er ubehagelig eller ubekvem.

Bruk Micro Voice

Slå Micro Voice på og av

- For å slå på Micro Voice **med Strømsparingsmodus**, trykk på Kontrollknappen.
LED-indikatoren forblir grønn mens Micro Voice er slått på. Etter 15 minutters inaktivitet slås Micro Voice av for å spare energi.
- For å slå på Micro Voice **uten Strømsparingsmodus**, hold Kontrollknappen nedtrykt.

 **MERK:** Denne funksjonen gjelder bare enheter med serienummer 02969 / VAMP, eller nyere.

LED-indikatoren blinker grønt og oransje noen få ganger og blir deretter rød. Etter det lyser LED-indikatoren konstant grønt. Micro Voice forblir på til den er slått av manuelt.

- For å slå av Micro Voice, trykk og hold inne Kontrollknappen til LED-indikatoren blir rød.

Snakk med Micro Voice

1. Når Micro Voice er på, begynn å snakke i mikrofonen.
Micro Voice-høytaleren forsterker stemmen din.

Endre volumet

1. For å øke volumet, dreier Volumkontrollen med klokken.
2. For å senke volumet, dreier Volumkontrollen mot klokken.

Bytt til Demp (Hvilemodus)

Hvis du vil ha en personlig samtale, kan du sette Micro Voice i hvilemodus:


1. Trykk én gang på Kontrollknappen.
LED-indikatoren blinker oransje for å indikere at Demp er aktivert.
2. Du går tilbake til normal modus ved å trykke én gang på Kontrollknappen.
LED-indikatoren blir grønn.

Vedlikehold

Rengjør Micro Voice

Rengjør Micro Voice med en litt fuktig klut. Rengjør produktet når det er skittent eller når du forbereder for gjenbruk.

Lad Micro Voice-batteriet

 **FORSIKTIGHET:** Bare den tilhørende laderen, levert av Abilia, kan brukes til å lade Micro Voice. Hvis en annen lader brukes, kan produktet bli alvorlig skadet.

Det tar seks timer å lade batteriet. Batteriet varer i omtrent én uke med åtte timers daglig bruk.

1. Koble laderen til Ladeporten.
2. Kontroller at LED-indikatoren blinker grønt for å påse at den lader riktig.

LED-indikatoren viser batteristatus med forskjellige farger:

- Grønt, konstant: Batteriet er fulladet.
- Grønt, blinker: Batteriet lades.
- Oransje, blinker: Batterinivået er lav.
- Rødt, blinker: Du har kort tid før batteriet går tomt.

Feilsøking

Hvis du har spørsmål angående funksjonene eller innstillingene i produktet, snakk med produktleverandøren eller forhandleren.

Hvis Micro Voice ikke fungerer som det skal, kan du kontakte Abilia's support, se *Kontaktinformasjon* på siste side i denne brukerveiledningen.

Oppbevaring og kassering

Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur. Må ikke oppbevares i fuktige omgivelser.



Produktet inneholder elektriske komponenter som skal resirkuleres. Kasser produktet på et egnet sted.

Produktspesifikasjoner

Mål, H x B x D	67 x 122 x 32 mm
Vekt	0.210 kg
Batteri	Integrert ladbart NiMH batteri
Batteritid	200t (Hvilemodus) 40t (aktivmodus)
Audio inngang og utgang	3.5 mm, stereo og mono
Estimert levetid	5 år

Tilbehør

Det er mulig å bruke alternative mikrofoner for Micro Voice. De tilgjengelige mikrofonene er oppført som tilbehør til Micro Voice.

For mer informasjon om Micro Voice, tilgjengelig tilbehør og de nyeste brukerveiledningene, gå til www.abilia.no eller skann QR-koden.




Skann meg!

Viktig informasjon

Før du tar i bruk produktet, må du lese og sørge for å forstå innholdet i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsdefinisjoner

 **ADVARSEL:** Risiko for personskade eller dødsfall dersom instruksjonene ikke følges.

 **FORSIKTIGHET:** Risiko for skade på produktet dersom instruksjonene ikke følges.

 **MERK:** Nødvendig informasjon i en gitt situasjon.

Sikkerhetsinstruksjoner som må leses før du tar i bruk Micro Voice

 Les følgende advarsler før du tar i bruk produktet.

- Bare den tilhørende laderen, levert av Abilia, kan brukes til å lade Micro Voice. Hvis en annen lader brukes, kan produktet bli alvorlig skadet.
- Ikke legg mikrofonen og forsterkeren tett sammen. Dette gir en akustisk tilbakekobling som, når den er satt til høyt volum, kan forårsake hørselshemming.

Alvorlige hendelser

Dersom det oppstår en alvorlig uønsket hendelse i tilknytning til produktet, skal dette rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter. En uønsket hendelse anses som alvorlig dersom den direkte eller indirekte kan ha ført til eller kan føre til dødsfall hos en pasient, bruker eller annen person, til midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av personer, brukerens eller andres helsetilstand eller til en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Samsvar med krav til medisinsk utstyr

Micro Voice markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med funksjonshemninger – og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinsk utstyr.

Produktansvar

Produktet er utviklet og risikovurdert i henhold til ISO 14971.

Bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene er utformet i samsvar med sikkerhetsvurderingen i risikoanalysen. Bruk alltid produktet sikkert. Abilia AB tar ikke ansvar for konsekvenser av feil bruk eller installasjon av produktet. Enhver form for manipulering av produktet ugyldiggjør garantien og vil medføre at produsenten fraskriver seg ethvert ansvar. Estimert levetid for produktet gjelder når det brukes i samsvar med relevante bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Kontaktinformasjon

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannia

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannia
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internasjonal

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

