


CANTEC

- helping people

Brukerhåndbok



RUBY

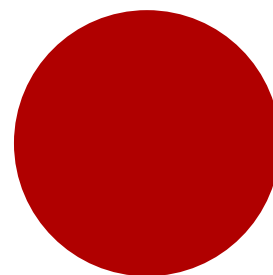

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no

Innholdsfortegnelse


RUBY	1
Innholdsfortegnelse	3
Komme i gang	5
Batteri LED Indikator	5
Oversikt	6
Hva inneholder esken?	6
Sett inn og lad batteriene	7
Sette inn batterier	7
Lade batteriene	8
Slå RUBY På/Av.....	8
Bruke RUBY	9
Lese med RUBY.....	9
Forstørre et bilde	9
Forstørrelse med håndtaket lukket.....	10
Forstørrelse når du holder RUBY i håndtaket	10
Forstørrelse liggende på dokumentet med håndtaket ute.....	10
Velge Fargemodus	11
Frys bilde	11
Slå LED kameralysene av	11
Fysisk beskrivelse	12
1 – På/Av tast (grønn-gul)	12
2 – Fargevalg tast (Blå)	12
3 – Forstørrelse tast (gul)	13
4 – Frys Bilde tasten (rød)	13
5 – LCD skjerm.....	13
6 – Strømtilkobling.....	13
7 – Batteri Indikator lys LED	13

8 – Håndtak og Batteri rom	13
9 – LED Lys	13
10 – Kamera Vindu.....	13
11 – Feste for Håndledds rem	13
Bære RUBY	15
Service og Support.....	16
Problemløsning	17

Komme i gang

Merk: Før du begynner å bruke RUBY må du lade batteriene. Batteriene lades raskere når enheten er slått av. Lad enheten i minst 2 timer før du begynner å bruke den.

De følgende figurene viser oversiden og toppen av enheten, hvor strømtilkoblingen er angitt med 6 og Batteri LED Indikatoren med 7.

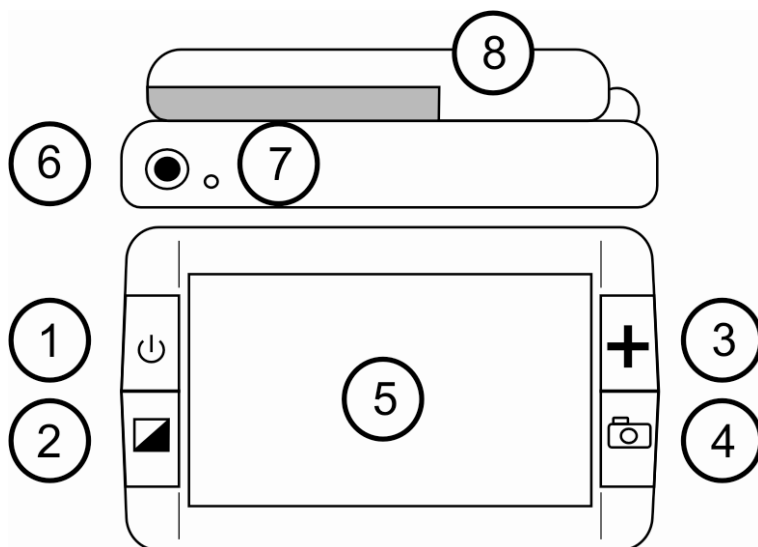



Batteri LED Indikator

LED Lys	Beskrivelse
Grønt – Fast lys	Batteriet full-ladet - koblet til strømnettet
Grønt – Blinkende	Batteriet lades – koblet til strømnettet
Rødt – Blinkende	Lavt batterinivå
Rødt – Fast lys	Feil – koble fra strømnettet, vent noen sekunder, og koble til igjen.
Intet lys	Batteriets ladenivå er OK. Strømadapteren er ikke koblet til, eller enheten er slått av.

Oversikt

Gratulerer med din nye RUBY. Denne elektroniske lupen lar deg forstørre tekst 2 til 14 ganger opprinnelig størrelse. RUBY har en 4,3" LCD skjerm og oppladbare batterier.

RUBY er meget enkel å bruke, selv for personer som aldri tidligere har brukt hjelpemidler. Du trykker den grønne **På/Av** tasten  for å slå enheten på, holder eller legger RUBY over det du ønsker å se på, og justerer forstørrelsen med den gule **Forstørrelse** tasten . Det forstørrede bildet vises på skjermen.

Hva inneholder esken?

Før du begynner å bruke RUBY bør du kontrollere at alt innhold er med i esken:

- RUBY elektronisk lupe
- AC strøadapter og ledning
- 4 AAA NiMH oppladbare batterier
- Bæreveske, skulder-rem og håndledds-rem.
- Pusseklut for rensing av skjermen
- RUBY User's Guide (Engelsk)
- RUBY Brukerhåndbok (norsk kortversjon)

Sett inn og lad batteriene

Merk: Før du bruker RUBY første gang må du lade de 4 AAA NiMH batteriene.

Fire AAA NiMH oppladbare batterier leveres sammen med RUBY. Du kan også bruke fire AAA alkaline batterier..

Merk: Ikke bland NiMH og alkaline batterier. Bytt ut alle fire batterier samtidig. Ikke bland gamle og nye batterier.


ADVARSEL:

Enheten kan eksplodere dersom feil batteritype benyttes.


Sette inn batterier

For å sette inn batteriene, gjør følgende:

1. Hold RUBY med en hånd, og sving håndtaket helt ut i åpen posisjon.
2. Med skjermen pekende fra deg skyver du batteri dekslet i den retningen som er angitt på dekslet, og vist på tegningen nedenfor.

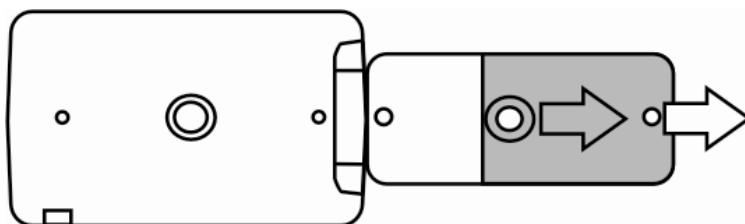

3. Sett inn batteriene som vist i følgende illustrasjon, og sett dekslet tilbake på plass.

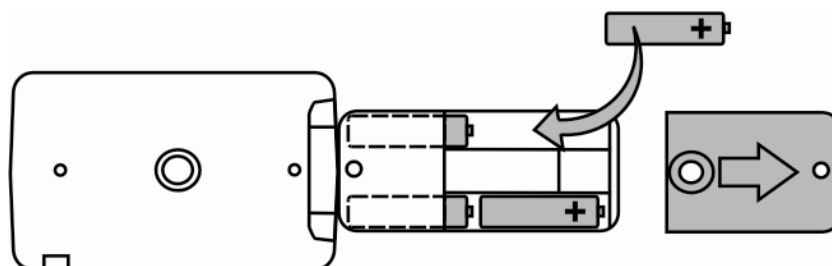


4. Lukk håndtaket etter at batteriene er satt inn.

Lade batteriene


For å lade NiMH batteriene, gjør følgende:

1. Koble den lille enden av strømlader kabelen til strøm porten (Power Port) som du finner på toppen til venstre, ved siden av Batteri Indikator (Battery LED) lyset.

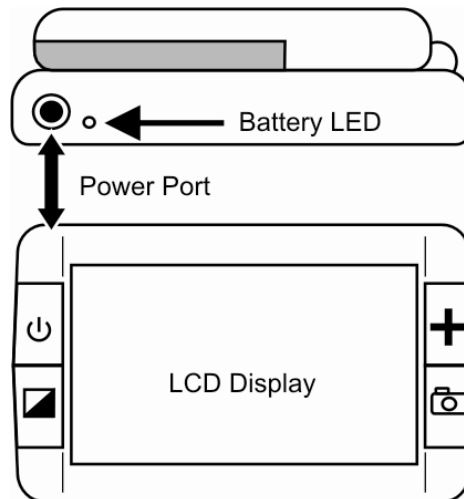

2. Koble den andre enden av strømlader kabelen til et strømuttak
3. Batteri Indikator lyset ved siden av strøm porten begynner å blinke grønt, for å vise at batteriene lades.
4. Så snart batteriene er fullt ladet slutter lyset å blinke, og lyser fast grønt. Koble fra strømladeren. Batteri Indikator lyset slukker.
5. Du kan nå bruke RUBY i minst to timer kontinuerlig. Når ladenivået på batteriene begynner å bli lavt, begynner Batteri Indikator lyset å blinke rødt. Koble til strømladeren for å lade batteriene på nytt.

Slå RUBY På/Av

1. Kontroller at batteriene er ladet som beskrevet tidligere.
2. Trykk og hold den grønne På/Av tasten  på venstre side av enheten.
3. Etter noen få sekunder vises det kameraet ser på skjermen.

Bruke RUBY

Etter at batteriene er ladet er RUBY klar til bruk. Med den kraftige forstørrelsen kan du lese tidsskrifter, brev, menyer, tidstabeller etc. etc.



Lese med RUBY

For å lese med RUBY, gjør følgende:

1. Trykk den grønne **På/Av** tasten  for å slå RUBY på
2. Dersom du skal lese en bok, et brev eller et trykt dokument, plasser det på en flat overflate.
3. Du kan enten holde RUBY i håndtaket, på samme måte som du holder et vanlig forstørrelsesglass, eller du kan brette håndtaket inn under enheten og plassere RUBY direkte på det du ønsker å lese eller se på. Alt som er under kameraet forstørres og vises på skjermen.
4. Juster forstørrelsen ved å trykke på den gule **Forstørrelse** tasten , plassert på høyre side av LCD skjermen, og velg fargemodus ved å trykke på den blå **Fargevalg** tasten , plassert på venstre side av skjermen.
5. Dra eller skyv enheten mot høyre for å lese til slutten av linjen. Flytt en linje ned, og tilbake til venstre for å lese den neste linjen fra venstre mot høyre. Fortsett lesingen på denne måten inntil du føler at du er komfortabel med bruken av RUBY.

Forstørre et bilde

RUBY har tre forstørrelsesnivåer, og avhengig av hvordan du plasserer enheten kan forstørrelsen varieres fra 2X til 14X.

1. For å øke forstørrelsen, trykk den gule **Forstørrelse** .
2. For å gå til neste forstørrelsesnivå, trykk den gule **Forstørrelse** tasten igjen .
3. Et tredje trykk på tasten bringer deg tilbake til den opprinnelige forstørrelsen.

Forstørrelse med håndtaket lukket


Når du bruker RUBY i denne posisjonen, plassert direkte på et dokument, starter forstørrelsen på **5X**.



- Trykk på den gule **Forstørrelse** tasten **+** en gang for å øke forstørrelsen til **7,5X**.
- Trykk på den gule **Forstørrelse** tasten **+** en gang til for å øke forstørrelsen til **10X**.
- Trykk på tasten igjen for å gå tilbake til den opprinnelige forstørrelsen **5X**.

Forstørrelse når du holder RUBY i håndtaket

Når du bruker RUBY i denne posisjonen, holdt 7,6 cm over et dokument, starter forstørrelsen på **2X**.

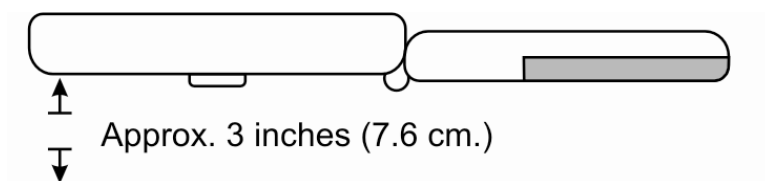

- Trykk på den gule **Forstørrelse** tasten **+** en gang for å øke forstørrelsen til **3X**.
- Trykk på den gule **Forstørrelse** tasten **+** en gang til for å øke forstørrelsen til **4X**.
- Trykk på tasten igjen for å gå tilbake til den opprinnelige forstørrelsen **2X**.

Forstørrelse liggende på dokumentet med håndtaket ute


Når du bruker RUBY i denne posisjonen, holdt 1,3 cm over et dokument, starter forstørrelsen på **7X**.



- Trykk på den gule **Forstørrelse** tasten **+** en gang for å øke forstørrelsen til **10,5X**.
- Trykk på den gule **Forstørrelse** tasten **+** en gang til for å øke forstørrelsen til **14X**.
- Trykk på tasten igjen for å gå tilbake til den opprinnelige forstørrelsen **7X**.

Velge Fargemodus




Fargemodus er et utvalg av forhåndsdefinerte fargeinnstillinger (for eksempel gul tekst på blå bakgrunn) som du kan velge når du bruker RUBY. Fem ulike fargekombinasjoner er tilgjengelige: Normal (full farge), Sort på hvitt, Hvitt på Sort, Gul på Blå og Gul på Sort.

1. Trykk på **Fargevalg** tasten  for å bytte fargevalg.
2. Fortsett å trykke på tasten inntil du finner den fargekombinasjonen som passer best for deg.

Frys bilde


Frys Bilde er en meget nyttig funksjon for og blant annet å lese vare-etiketter på en varehylle. Hold RUBY nærme etiketten, ta bildet, og hold RUBY så nært du behøver for å kunne lese teksten.

For å fryse et bilde, gjør følgende:



1. Trykk den røde **Frys Bilde** tasten  på høyre side av skjermen
2. Dersom du har behov for det kan du endre forstørrelsen ved å trykke **Forstørrelse**  tasten.
3. Trykk den røde **Frys Bilde** tasten  en gang til for å gå tilbake til vanlig visning.

Slå LED kameranlysene av


De to LED kameranlysene slås automatisk på når du slår på RUBY. For å slå dem av, hvis du for eksempel skal se på en skinnende overflate, gjør følgende:

1. Trykk og hold den grønne **På/Av** tasten  , og trykk kort på den røde **Frys Bilde** tasten  . LED lysene slås av .
2. For å slå lysene på igjen, Trykk og hold den grønne **På/Av** tasten  , og trykk kort på den røde **Frys Bilde** tasten  .

Fysisk beskrivelse

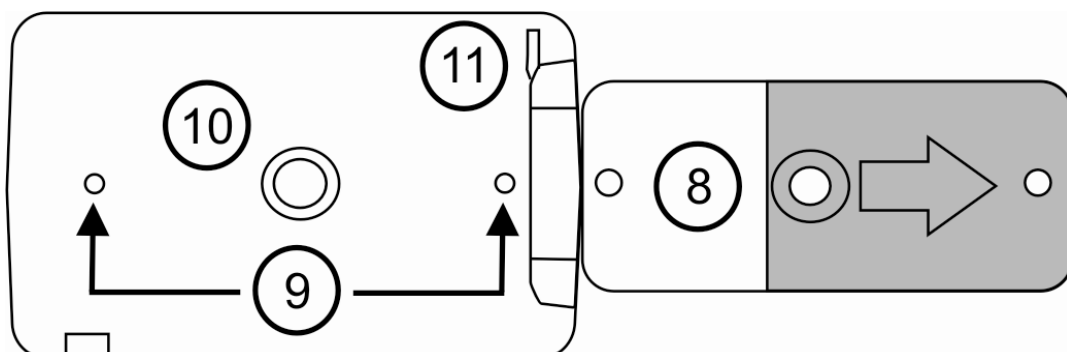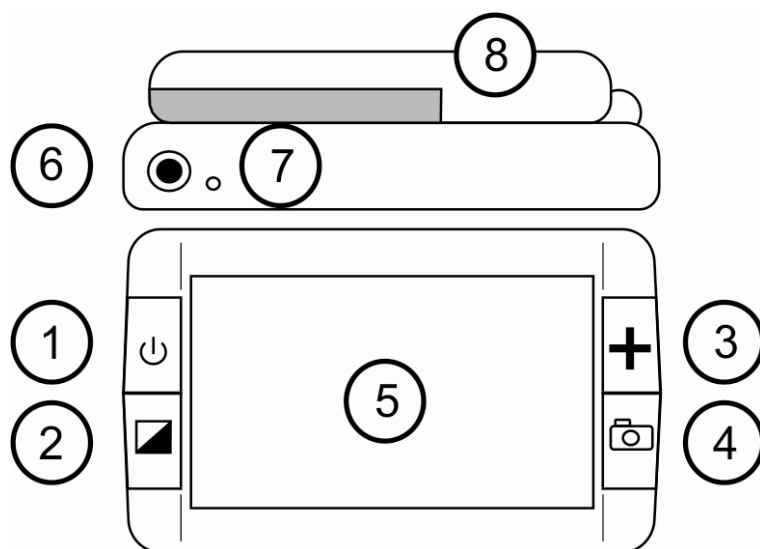


1 – På/Av tast (grønn-gul)


Trykk **På/Av** tasten  for å slå enheten på. For å slå RUBY av trykker du **På/Av** tasten en gang til.

2 – Fargevalg tast (Blå)


Velg den fargekombinasjonen som du føler passer best for å lese tekst.

Trykk den blå **Fargevalg** tasten  for å gå igjennom de tilgjengelige alternativene. Det finnes 5 standard valg: Normal, Sort på Hvitt, Hvitt på Sort, Gult på Blått, og Gult på Sort.

3 – Forstørrelse tast (gul)

Trykk den gule **Forstørrelse** tasten , plassert på høyre side av skjermen, for å gå fra et forstørrelsesnivå til neste. Stor forstørrelse gjør det mulig å lese liten skrift, mens lav forstørrelse gir deg mer informasjon på skjermen.

4 – Frys Bilde tasten (rød)

Trykk den røde **Frys Bilde** tasten , plassert på høyre side av skjermen, for å fryse og fange bildet som vises på skjermen. Trykk tasten en gang til for å slå av Frys Bilde.

5 – LCD skjerm

RUBY har en flat, 4,3" LCD skjerm i formatet 16:9.

6 – Strømtilkobling

Koble den medfølgende strømlader kablet til denne inngangen, plassert oppe til venstre på enheten. Du kan bare bruke den strømladeren som følger med enheten.


7 – Batteri Indikator lys LED

Batteri Indikator lyset finner du rett til høyre for Strømtilkoblingen. Når batterienes ladenivå er lavt blinker lyset rødt. Når batteriene lades blinker lyset grønt, og når batteriene er ferdig ladet slutter lyset å blinke.

8 – Håndtak og Batteri rom

Håndtaket kan foldes ut slik at du kan holde RUBY som et vanlig forstørrelsesglass. Håndtaket inneholder også fire AAA NiMH oppladbare batterier (følger med) eller fire AAA alkaline batterier (følger ikke med). Ikke bland NiMH og alkaline batterier.

9 – LED Lys

RUBY har to små LED lys på undersiden som hjelper til med å lyse opp teksten eller gjenstanden du ser på. Lysene slås på automatisk. For å slå lysene av, for eksempel når du ser på en sterkt reflekterende gjenstand, trykker og holder du nede den grønne **På/Av** tasten , trykk så kort på den røde **Frys Bilde**

tasten 

10 – Kamera Vindu


Dette vinduet beskytter kameranlinen.

11 – Feste for Håndledds rem

Her kan du feste den medfølgende håndledds remmen.

Bære RUBY

RUBY leveres med en håndledds rem som du kan bruke for å unngå å miste den mens den er i bruk. For å feste remmen gjør du som vist på tegningen.

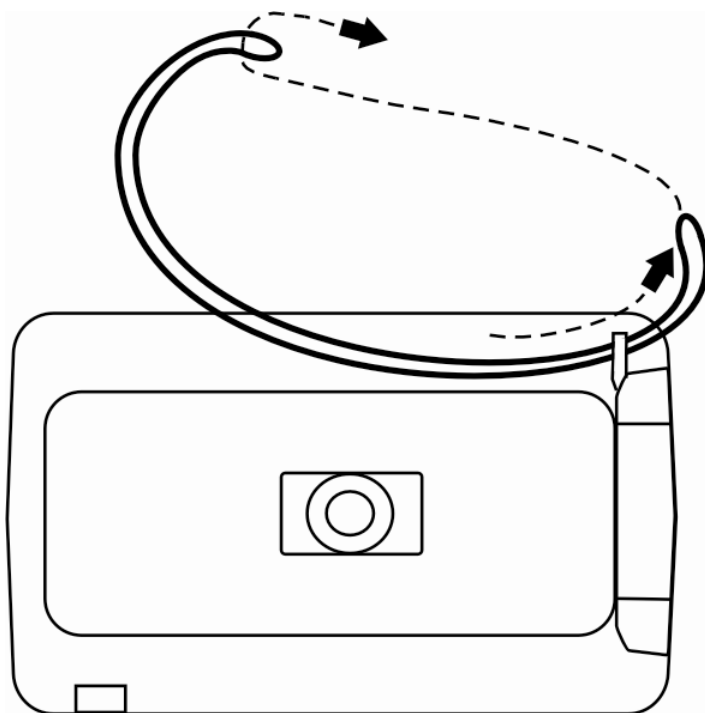

Service og Support

Merk: Enheten har ingen deler som kan repareres av brukeren. Alle forsøk på å reparere enheten opphever produsentens garanti.

Ved levetidens utløp skal produktet behandles som ee-avfall.

Det skal ikke kastes i restavfall, men leveres til et eget innsamlingspunkt. Om du har fått produktet ifra hjelpemiddelsentralen så skal de ha det tilbake. Er det kjøpt privat så kan du benytte en kommunal avfallsstasjon, eller en forhandler av tilsvarende elektronisk utstyr.



Dersom du har behov for service eller support kontakter du:

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no

Problemløsning

Problem	Løsning
Skjermen er sort	Kontroller at RUBY er slått på Kontroller at det du ønsker å se på er riktig posisjonert under kamera vinduet. Reduser forstørrelsen. Lad NiMH batteriene. Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt dem ut. (Ikke bland alkaline og NiMH batterier).
Enheten slår seg ikke på.	Lad NiMH batteriene. Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt dem ut. (Ikke bland alkaline og NiMH batterier).
Bildet på skjermen er mørkt og forvrent.	Kontroller at RUBY ligger flatt på underlaget du ser på.
Batteri Indikator lyser blinker rødt.	Lad NiMH batteriene. Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt dem ut. (Ikke bland alkaline og NiMH batterier).
Batteri Indikator lyset lyser rødt mens strømladeren er koblet til.	Det har oppstått en batterifeil. Koble fra strømladeren, og koble den til igjen. Lad NiMH batteriene i minst 2 timer. Dersom du bruker AAA alkaline batterier, bytt dem ut. Kontakt Cantec AS dersom problemet fortsetter.
Batteri Indikator lyset blinker ikke grønt, selv om strømladeren er koblet til enheten og strømnettet.	Kontroller at strømkabelen er korrekt koblet til enhetens strøm inngang. Kontroller at strømladeren er korrekt koblet til veggkontakten, og at det er strøm i kontakten.
NiMH batteriene lader ikke.	Kontroller at strømkabelen er korrekt koblet til enhetens strøm inngang. Kontroller at strømladeren er korrekt koblet til veggkontakten, og at det er strøm i kontakten.
Det er fettflekker og merker på skjermen.	Rens skjermen og kamera vinduet forsiktig
Teksten på skjermen er for liten.	Trykk den gule Forstørrelse tasten for å øke forstørrelsen.
Teksten på skjermen er for stor.	Trykk den gule Forstørrelse tasten gjentatte ganger for å finne en passende forstørrelse.
LED lysene gir reflekser.	Trykk og hold den blå Fargevalg tasten og den røde Frys Bilde tasten samtidig i minst 3 sekunder for å slå av LED lysene.