

MFK Multifunktionstast:

Denne bruges til at besvare og afslutte telefonopkald. Den pauser og spiller musik. Tryk to gange for at aktivere stemmestyring for den anden enhed.

Lydstyrke- og rulleberøringstaster:

Disse taster bruges til at skrue op eller ned for lyden, eller hoppe fremad og tilbage, når der lyttes til musik.



MFB Basis multifunktionsknap:

Denne knap bruges til at påbegynde og besvare opkald, slukke og tænde for Quattro 4L, parre Quattro 4L med Bluetooth-enheder (f.eks. mobiltelefon), skifte mellem opkald og aktivere Siri eller S-Voice til stemmeaktivering.



8-lednings halssløjfe: Med denne ledning hænger Quattro 4L omkring din hals som en halskæde. Det er en 8-ledningers sløjfe, der kan tilsluttes høreapparater eller CI med telespole, der leverer lyden direkte gennem høreapparaterne eller CI, når de er i telespolemode.


Høretelefoner: Dette stik tager alle headsetts med 3,5 mm minijack. (Vi foreslår, at vores patenterede SmartSound Earbuds bruges).

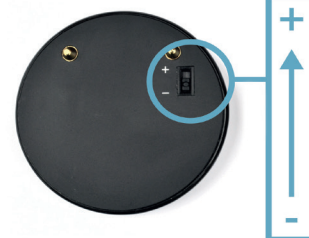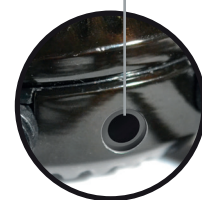

Batterikontakter: Der er en batterikontakt på Quattro 4L-enheden. Denne kontakt SKAL være i + position på Quattro 4L, for at enheden kan fungere. Når der skiftes - position, frigøres batteriet fra kredsløbet. Denne kontakt skal IKKE sættes i - position. Formålet med den er at beskytte batteriet under opbevaring.

BRUG AF QUATTRO 4L

1. OPLADNING AF QUATTRO 4L

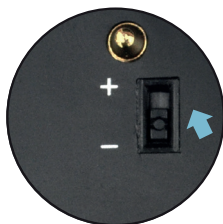

TRIN 1:

Brug spidsen af en pen til at flytte batterirummet +/- kontakt til + position på Quattro 4L.
Sluk IKKE!



TRIN 2:

Sæt opladeren ind i Quattro 4L.



TRIN 3:

Sæt opladeren i stikket for at oplade Quattro 4L helt.



TRIN 4:

Rødt lys er på QT4L.



TRIN 5:


Quattro 4L er opladet, når det røde lys bliver blå.

TIP: Oplad Quattro 4L hver nat for optimal ydelse. Batteriikonet vil fortælle, når batteriniveauet er lavt.

2.

PARRING AF QUATTRO 4L MED EN BLUETOOTH-ENHED

- Sørg for, at andre tilsluttede Bluetooth-enheder er **slukket**, når en ny Bluetooth-enhed synkroniseres.

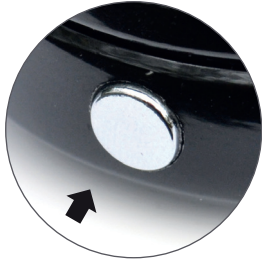

TRIN 1:

Sørg for, at Quattro 4L er slukket, tryk og hold derefter MFB i cirka seks sekunder.



TRIN 2:

Efter omkring seks sekunder, siger Quattro 4L "Pairing".



TRIN 3:

Tænd for Bluetooth-enheden og sæt den i Bluetooth-parringstilstand. Ofte kræver det valg på enhedens menu som f.eks. Settings > Bluetooth > ON. Vælg Quattro 4L.



TRIN 4:

Når Quattro 4L siger "Paired", derefter "Device one connected", er du klar til at bruge Quattro 4L.

3.

BESVAR ET OPKALD




TRIN 1:

Besvarelse af et opkald: Tryk to gange på multifunktions-tasten.



TRIN 2:

Afvisning af et opkald: Tryk og hold MFB.

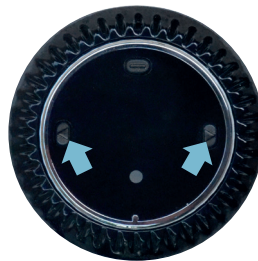

TRIN 3:

Justering af lydstyrke: Tryk på < (volume -) eller > (volume +).



TRIN 4:

For at afslutte opkaldet, tryk og hold multifunktionsnøglen. Quattro 4L siger "call terminated".

BEMÆRK: Du kan foretage et opkald direkte fra din telefon med lyden leveret gennem din Quattro 4L, hvis "Headset" eller "Quattro 4L" er valgt på telefonen.