

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite Heelboot

Bruksområde

StimuLITE Heelboot er en hæl og malleol beskyttelse produsert for å forebygge og behandle trykksår og smerter rundt foten. Hvis du opplever ubehag ved bruk av produktet, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.

Bruksanvisning

Din StimuLITE Heelboot kommer i ett stykke. Ta av emballasjen, åpne borrelås og sett produktet rundt foten. Juster ved behov.

Anvendelsesinstruksjon

Kan brukes døgnet rundt i en liggende eller sittende stilling. Produktet er ikke ment å bli brukt som utendørs sko, men det er ok å ta noen skritt innendørs. Anti-slip materiale under foten for å forebygge risikoen for å falle hvis du går, for eksempel fra sengen til toalettet. Vask regelmessig for å holde den frisk. Selges enkeltvis eller i par

Vaskeinstruksjoner

Stimulite Heelboot kan vaskes i vanlig maskin 60 grader og tørketromles. Ved sterkere tilsmussing tåler hælbeskyttelsen 85 grader i 10 minutter. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel. Tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på madrasseskjernen, alternativt legg hele madrasseskjernen i et kar i 10 minutter med fortennet løsning. Skyll etter med vann.

Rekondisjonering / Klargjøring for lager

Overflatedesinfeksjon (type Virkon) kan brukes for å ta bort uønskede bakterier. Legg produktet i et kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

Flammesikkerhet

Overtrekket og tryckavlastande materialet i Stimulite Heelboot oppfyller brannstandard EN 597-1, EN 597-2. Beskyttelsens polstermateriale er behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige StimuLITE-produkter er branntestet og godkjente i henhold til ISO 7176-16 og SS-EN 1021-1 og SS-EN 1021-2.

Garanti

Alle StimuLITE-produkter er CE-merket og har 2 (to) års garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke normal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

Tekniske data

Materiale:

Fyllmaterialer: 100% Termoplastisk Polyuretan TPU i bikubestruktur. Naturligt antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask. Egnert til bruk for allergikere

Ytre foring: Cordura polyester

	Small	Medium	Large
Artikkelnr stykk	HEEL-S	HEEL-M	HEEL-L
Artikkelnr par	HEEL-SP	HEEL-MP	HEEL-LP
Vekt, stykk	200 g	350 g	500 g
Høyde	27 cm	33 cm	36 cm
Skostørrelse	35-41	35-45	40-48
Omkrets forfot	20-32 cm	25-38 cm	30-38 cm
Omkrets kalf	> 40 cm	40-45 cm	45-50 cm

Lykke til med ditt StimuLITE-produkt!

Göran & Brigitte Sjöden



Göran Sjödens Rehabshop Norge AS
Postboks 157 1378 Nesbru
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru
Tlf. 48 50 32 97
www.rehabshop.com, goran@rehabshop.com