

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite barnemadrass

Bruksområde

StimuLITE barnemadrasser er produsert for å forebygge og behandle trykksår. Hvis du opplever ubehag ved bruk av madrassen, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.

Bruksanvisning

Din StimuLITE barnemadrass kommer i ett stykke. Ta av emballasjen og legg madrassen på sengebunnen, alternativt oppå den vanlige madrassen. Cellene i madrassen skal ha den åpne siden opp. Fest ved behov madrassbåndene rundt sengebunnen med medfølgende gummibånd. Juster ved behov.

Anvendelsesinstruksjon

For beste behandlingseffekt bruk kun et løst spent laken over madrasskjernen. For å beskytte madrassbunnen mot fuktighet bruk en inkontinensbeskyttelse (INMATT) som da plasseres under madrassen. Alternativt bruker du medfølgende dampgjennomtrengelig og vanntett hygienertrekk. Hvis man har behov for ytterligere komfort, for eksempel øm hud, finnes et komforttrekk i bomull å kjøpe til. Det slipper gjennom luft og holder huden tørr.

Vaskeinstruksjoner

Hygienertrekkene og fuktbeskyttelsen kan vaskes i vanlig maskin 95 grader, alternativt autoklaveres og tørketromles. Komforttrekkene kan vaskes på 60 grader og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel.

Ta ut madrassen av trekket. Hvis madrasskjernen er støvete, går det fint å støvsuge eller blåse den ren med trykkluft. Når man senere vasker, begynner med å legge madrassen i vaskeposen og seng trekkjeden. Bruk litt (ca. 2 spiseskjeer) vaskemiddel uten blekemiddel. Vask maskinen alene i maskin på lav temperatur, 40 grader. Ved sterkere tilsmussing tåler madrassen 85 grader i 10

minutter, alt 60 grader i 30 minutter. Kan også vaskes i badekaret, dusjes eller vaskes med slange. Tørk: Bruk håndduker, hårtørker, element, tørkeskap eller tørketrommel, ca. 30 minutter. Tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på madrasskjernen, alternativt legg hele madrasskjernen i et kar i 10 minutter med fortennet løsning. Skyll etter med vann.

Rekondisjonering / Klargjøring for lager

Overtrekk og madrass er utstyrt med artikkelnummer. Vask i henhold til instruksjonene ovenfor. Overflatedesinfeksjon (type Virkon) kan brukes for å ta bort uønskede bakterier. Legg madrassen i et kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

Flammesikkerhet

Overtrekket og madrasskjernen er branntestet i henhold til brannstandard EN 597-1 og EN 597-2. Kjernen i overmadrassen og madrassen er behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige StimuLITE-produkter er dessuten branntestet og godkjente i henhold til ISO 7176-16.

Garanti

Alle StimuLITE-produkter er CE-merket og har 2 (to) års garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke normal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

Materiale:

Madrasskjerne: 100% Termoplastisk Polyuretan TPU
TPU i bikubestruktur. Naturlig antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask. Egnert til bruk for allergikere
Hygienetrekk: 58 % polyuretan, 42 % polyester
Komforttrekk: 91 % bomull, 9 % elastan
INMATT: 68 % Polyester, 30 % bomull, 2 % polyolefin
Brukervekt: 0-50kg, Egenvekt: ca 2kg

Størrelse	Art.nr	Hygiene-trekk	Komfort-trekk	Extra fukt/inkobeskyttelse
39x80x5 cm	BASSINET	COVINBASSINET	COVSTBASSINET	INMATT3227 (80x200 cm)
60x120x5 cm	CRIBMATT2448	COVINCRIB2448	COVSTCRIB2448	INMATT3227 (80x200 cm)
60x140x5 cm	CRIBMATT2456	COVINCRIB2456	COVSTCRIB2456	INMATT3227 (80x200 cm)
68x130x5 cm	CRIBMATT2752	COVINCRIB2752	COVSTCRIB2752	INMATT3227 (80x200 cm)
70x140x5 cm	CRIBMATT2856	COVINCRIB2856	COVSTCRIB2856	INMATT3227 (80x200 cm)
70x160x5 cm	CRIBMATT2863	COVINCRIB2863	COVSTCRIB2863	INMATT3227 (80x200 cm)



Göran Sjädens Rehabshop Norge A/S
Postboks 157 1378 Nesbru
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru
Tlf. 48 50 32 97
www.rehabshop.com, goran@rehabshop.com

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite barnemadrass
