


Bruksanvisning

Zitzi Sharky Pro

NO

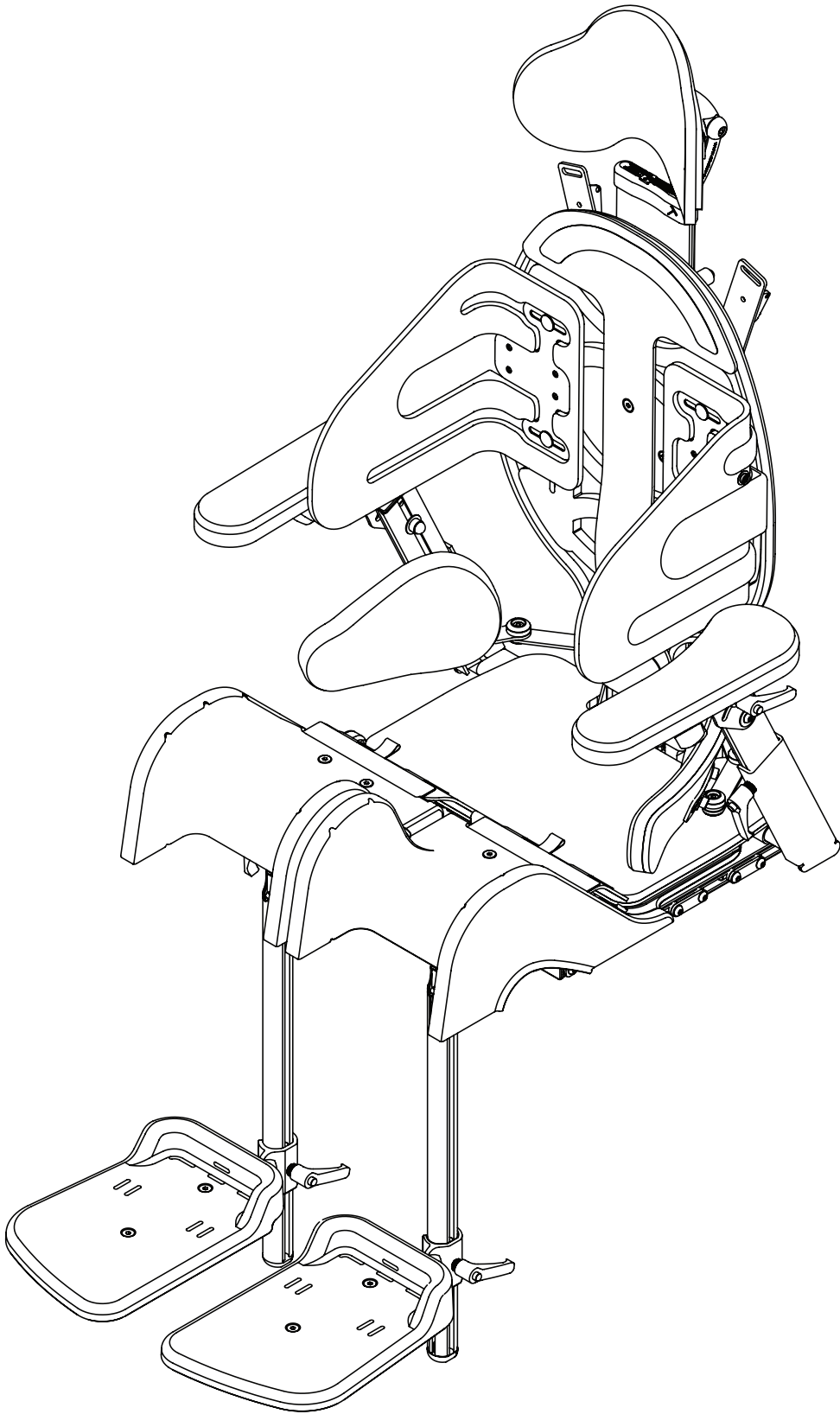


Innholdsfortegnelse


Forhåndsregler for sikkerhet	5	Armstøtte fra sits	23
Innledning	5	Montering av armstøtte fra sits	23
Hodestøtten	7	Breddejustering	23
Montering av hodestøttefeste	7	Høydejustering	23
Montering av hodestøtte	7	Vinkeljustering opp/ned	23
Høydejustering av hodestøttefeste	7	Vinkeljustering av sideledd	23
Justering av hodestøtten	7	Polstring	23
Montering av pannebåndfeste	7	Armstøtte fra rygg, fast	25
Oversikt over rygginnstillinger	9	Montering av armstøtte fra rygg	25
Montering av rygg	9	Høydejustering	25
Justering av ryggghøyden	9	Breddejustering	25
Justering av ryggvinkelen	9	Vinkeljustering opp/ned	25
Justering av bolstøtte	9	Vinkeljustering i sideledd	25
Justering av korsryggstøtte	9	Polstring	25
Bolstøtte	11	Armstøtte fra rygg, oppfellbar	27
Montering av bolstøtte	11	Montering av vikbara armstöd från rygg	27
Leddete bolstøtter	11	Høydejustering	27
Forsterket bolstøtte	11	Breddejustering	27
Sittedel	13	Vinkeljustering opp/ned	27
Justering av sittedel	13	Vinkeljustering i sideledd	27
Setebreddejustering	13	Den vinklingsbare funksjonen	27
Benlengdeforskjell	15	Posisjoneringssele	29
Setegropjustering	15	Montering av nedre beslag	29
Abduksjon, adduksjon og windswept	15	Justering av nedre beslag	29
Varmepolster	16	Montering av øvre beslag	29
Varmepolster	16	Justering av øvre beslag	29
Montering av varmpolster	16	Montering av alternativt nedre beslag	29
Varmepute	16	Kjørebøyle	31
Batteri	16	Montering av kjørebøyle	31
Lading av batteri	17	Høydejustering av kjørebøyle	31
Bekkestøtte	19	Overarmsstøtte	33
Montering av bekkenstøtte	19	Montering av overarmsstøtte	33
Justering av bekkenstøtten	19	Høydejustering av overarmsstøtte	33
Hoftebelte	21	Breddejustering av overarmsstøtte	33
Justering av hoftebeltebeslag	21	Polstring	33
Montering av hoftebelte	21		

Bord, fast	35	Vedlikeholdsanvisning	54
Montering av bord	35	Vedlikeholdsintervallet	54
Bytte av monteringshull	35	Rengjøring og vask	54
Bord, oppfellbart	37	Gassfjæren må aktiveres regelmessig	54
Montering av bord, oppfellbart	37	Verktøy	54
Anvendelse av den oppfellbare funksjonen	37	Garanti	55
Bord, forsterket monteringsbeslag	39	Kombinasjoner.....	55
Montering av forsterket bord	39	Reservedeler	55
Breddejustering av forsterket bord	39	Resirkulering	55
Leggstøtte	41	Merking.....	55
Montering av leggstøtte	41	Gjennvinning	55
Høydejustering av leggstøtte	41	Sammenfatning og etterkontroll	56
Breddejustering av leggstøtte	41	Tilpasning og spesialtilpasning	57
Fotstøtte	43	Anbefalinger.....	57
Montering av fotstøtte	43	Tilpasninger som gjøres på Sharky Pro	57
Alternativ montering av fotstøtte	43	Salgsvilkår	58
Sikkerhetsstopp	43	Garanti	58
Justering av vinkelen ved kneleddet	43	Reklamasjon	58
Justering av vinkel ved fotleddet	43	Returer	58
Fotstøttebeslag	45	Tekniske data	59
Fast fotstøttebeslag	45	Brukerdata	59
Fjærende fotstøtteadapter	45	Produktdata	59
Oppfellbart fotstøttebeslag	45		
Kuleleddsadapter	45		
Plansete	47		
Montering av plansete	47		
Montering av sittesystem på understell	49		
Fast montering	49		
Montering med adaptersystem	51		
Transport i bil	52		
Anvisning for transport i bil	52		
Krasjtestet og godkjent	52		
Kundeservice	53		

Vanlige detaljer

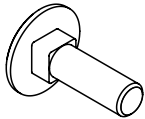


Låsebolt

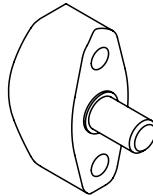


Fingerskrue
Utvendige gjenger




Fingerskrue
Innvendige gjenger

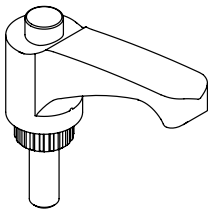

Ganteregrep

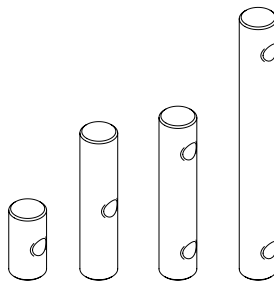

Tønnemutter
Forskjellige størrelser

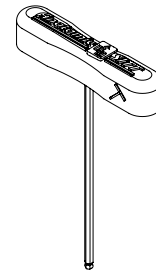

Justeringsnøkkel
Integrert i ryggprofilen

Justeringsnøkkel

Verktøyet (4 mm umbrakonøkkel) du skal utføre justeringene med er integrert i toppen av ryggprofilen.

Forhåndsregler for sikkerhet

Innledning

For å hjelpe deg med å utnytte Zitzi Sharky Pro fullt ut, er det viktig at du leser gjennom denne bruksanvisningen nøye. Dette gjelder for alle personer som er i nærheten brukeren. Produktet er beregnet for brukere med sittproblematik og egner seg til mange forskjellige typer diagnoser. Tilpasning/utprøving av Zitzi Sharky Pro bør alltid være utført av medisinsk kvalifisert person.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, er du velkommen til å kontakte Bardum AS.

Tiltenkt bruk

Produktet er ment å bli brukt som et sittesystem med chassis produsert av Anatomic SITT AB. Ved forespørsler for andre bruksområder, vennligst kontakt Bardum AS.

Korrespondanse

Zitzi Sharky Pro med tilbehøret er et produkt som er CE-merket. Et unikt serienummer ligger på et klistremerke plassert under leddhuset. Dette serienummeret bør angis i all korrespondanse om ditt produkt.

Krasjtest

Sittesystemet er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 16840-4. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 52.

Produktet er produsert av Anatomic SITT AB

Postadresse Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping


Besøksadresse Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Distribuert av Bardum AS

Besøks- og postadresse Håndverksveien 8, N-1405 Langhus

Telefon +47 64 91 80 60, **Faks** +47 64 91 80 66



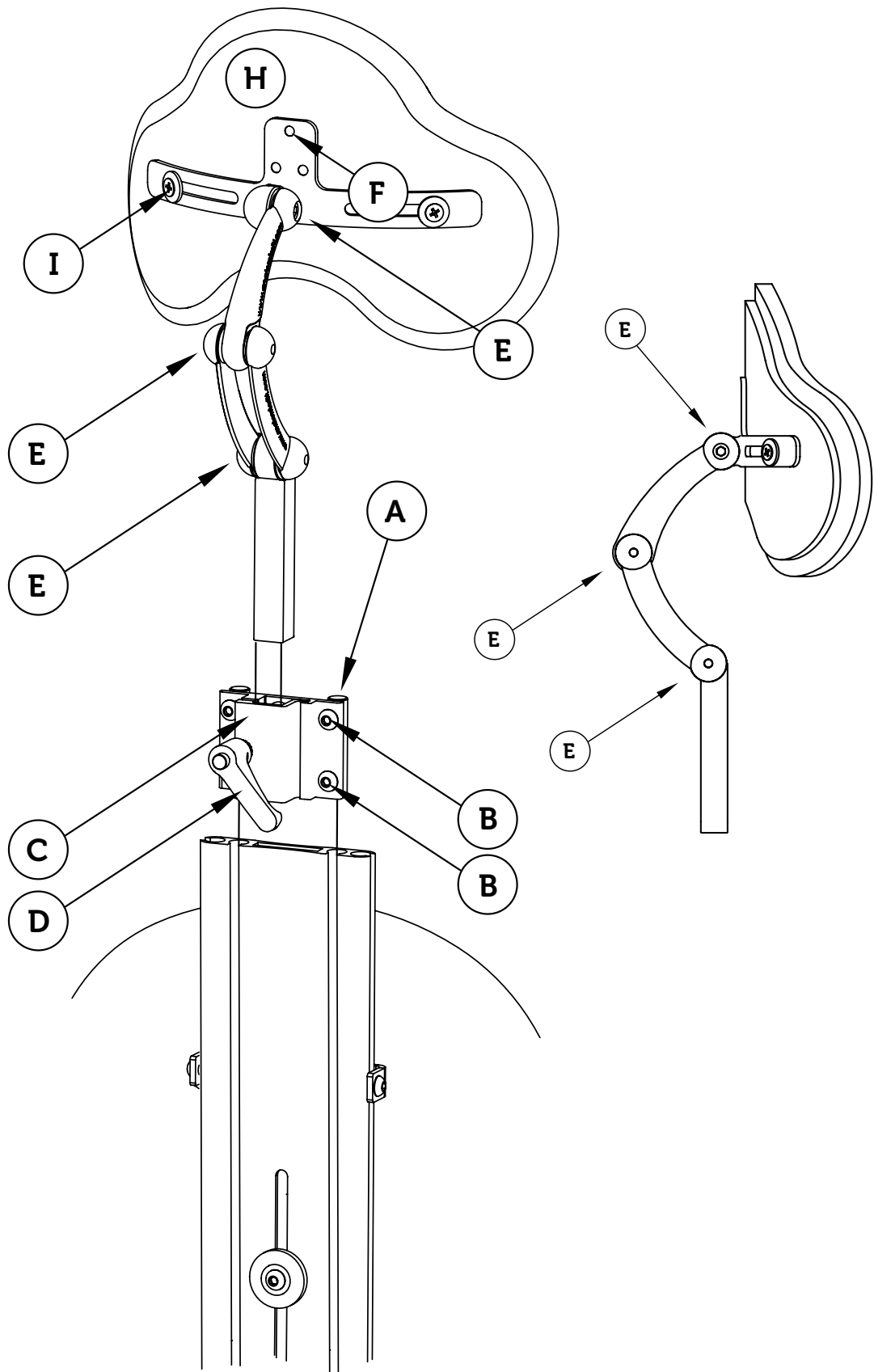

Hodestøtten

Montering av hodestøttefeste

Før montering hodestøtten kan utføres, må du først fjerne justeringsnøkkelen og muligens andre detaljer som kan være i veien.

Skyv hodestøttefestets tønne-muttere (A) i ryggprofilens spor. Når du har nådd ønsket posisjon dra til de fire skruene (B).

Montering av hodestøtte

Skyv hodestøttestaget i hodestøttefestet (C) og dra siden til gantergrepet (D) når du har nådd ønsket posisjon.

Høydejustering av hodestøttefeste

For å høydejustere løsner du skruene (B) litt, og flytt deretter hodestøttefeste til ønsket posisjon. Dra deretter til skruene (B).

Justering av hodestøtten


Ved justering av den treleddede hodestøtten løsner du skruen (E) i det leddet du ønsker å justere. Når du har nådd ønsket posisjon dra festeskruen (E) til igjen.

For å høydejuster hodestøtten løsner du gantergrepet (D) og flytte hodestøtten til ønsket plassering. Deretter drar du til gantergrepet (D).

Montering av pannebåndfeste

Før montering pannebåndfestet kan utføres, må hodestøtteplaten (H) demontert. For å demontere hodestøtteplaten løsner du begge skruene (I).

Monter så pannebåndsfeste i hull (F) med tilhørende monteringsdetaljer. Se egen anvisning for ettermontering av pannebåndet.

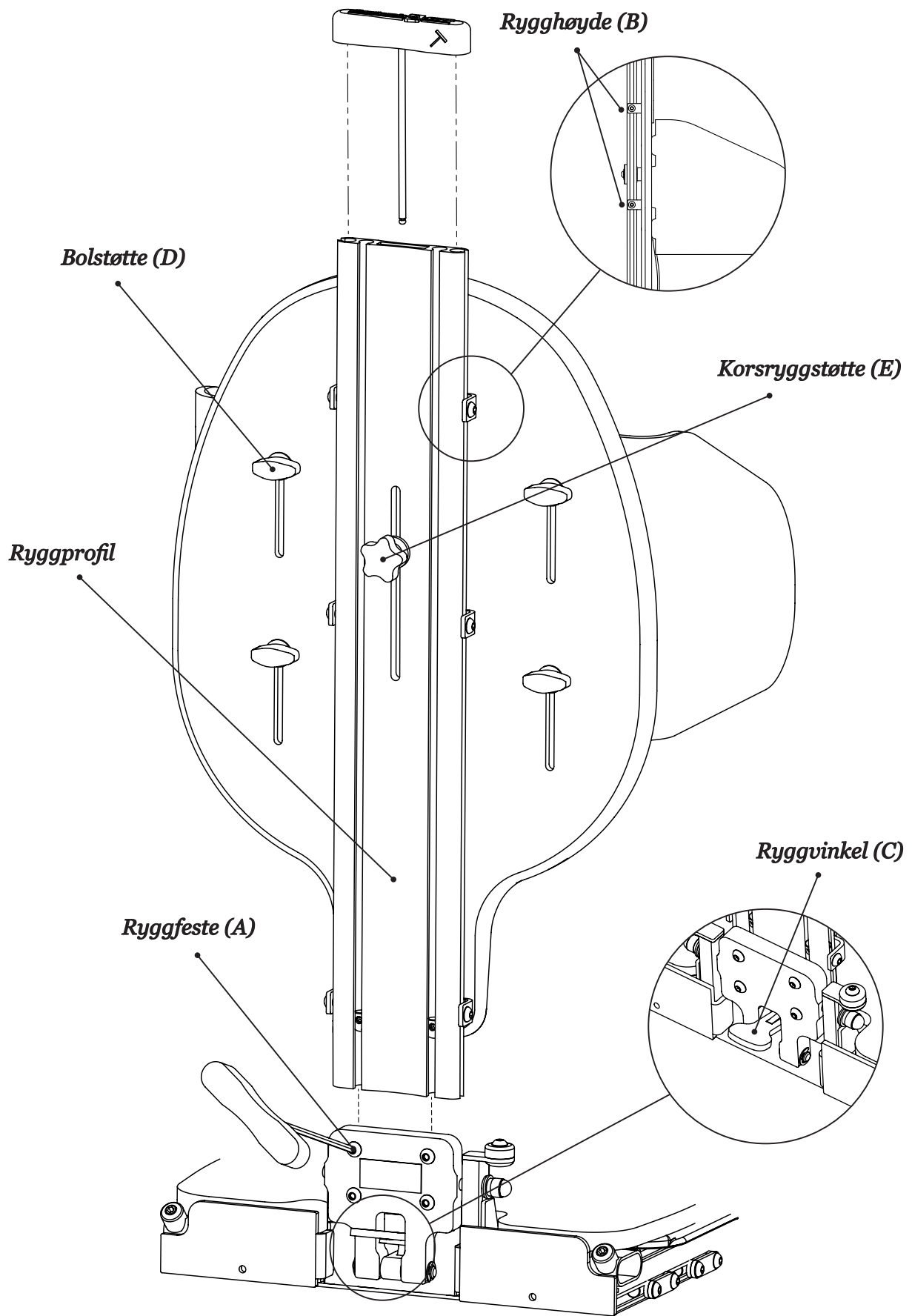

Oversikt over rygginnstillinger

Montering av rygg

Ryggens innfesting består av fire (4) skruer (A) og to (2) tønnemuttere. Tilpass og før ryggprofilen ned på tønnemutterene som sitter på aktiveringshuset, og skru til de fire (4) skruene (A) ved hjelp av umbrakonøkkelen.

Ryggen, stilles automatisk til riktig posisjon ved hjelp av de for monterte stopperen i ryggprofilen.

Justering av rygg høyden

For å justere rygg høyden, løsner du skruene (B) på begge sider av ryggprofilen med umbrakonøkkelen, og justerer deretter inn ønsket høyde. Når du er fornøyd med innstillingen, kan du dra til skruene (B) igjen.

Justering av rygg vinkelen

Plasser låsknappen (C) i aktivisering-posisjon ved å løfte det og deretter slippe den i sporet sitt.

For å justere vinkelen på rygg, trykk spaken ned. Dette frigjør ryggen slik at du kan sette den i ønsket posisjon. Når du har nådd ønsket vinkel slipper du spaken igjen, og du beholder den innstillingen som er gjort på ryggvinkelen.



OBS!

Tenk alltid på å holde i ryggen når du aktiverer gassfjæren.

Justering av bolstøtte

For å bredde- og høydejustere bolstøtten, løsner du fingerskruen (D) og justerer deretter til ønsket høyde og bredde. Dra til fingerskruen (D) når du har oppnådd ønsket posisjon.

Justering av korsryggstøtte

Løsne gantergrepet (E) og trykk på toppen av korsryggstøtten, som er plassert bak ryggpolsteret, til ønsket korsryggstøtte er oppnådd. Hold korsryggstøtten i posisjon og dra deretter til gantergrepet (E).



OBS!

Rygg høyden kan behøve justering for at korsryggstøtten skal ende opp i riktig posisjon.

Tips!

Ta bort ryggposlsteret for å se korsryggstøtten bedre under justering.

Ryggjør
 Ved forsterkning av rygg

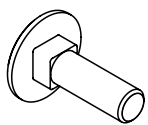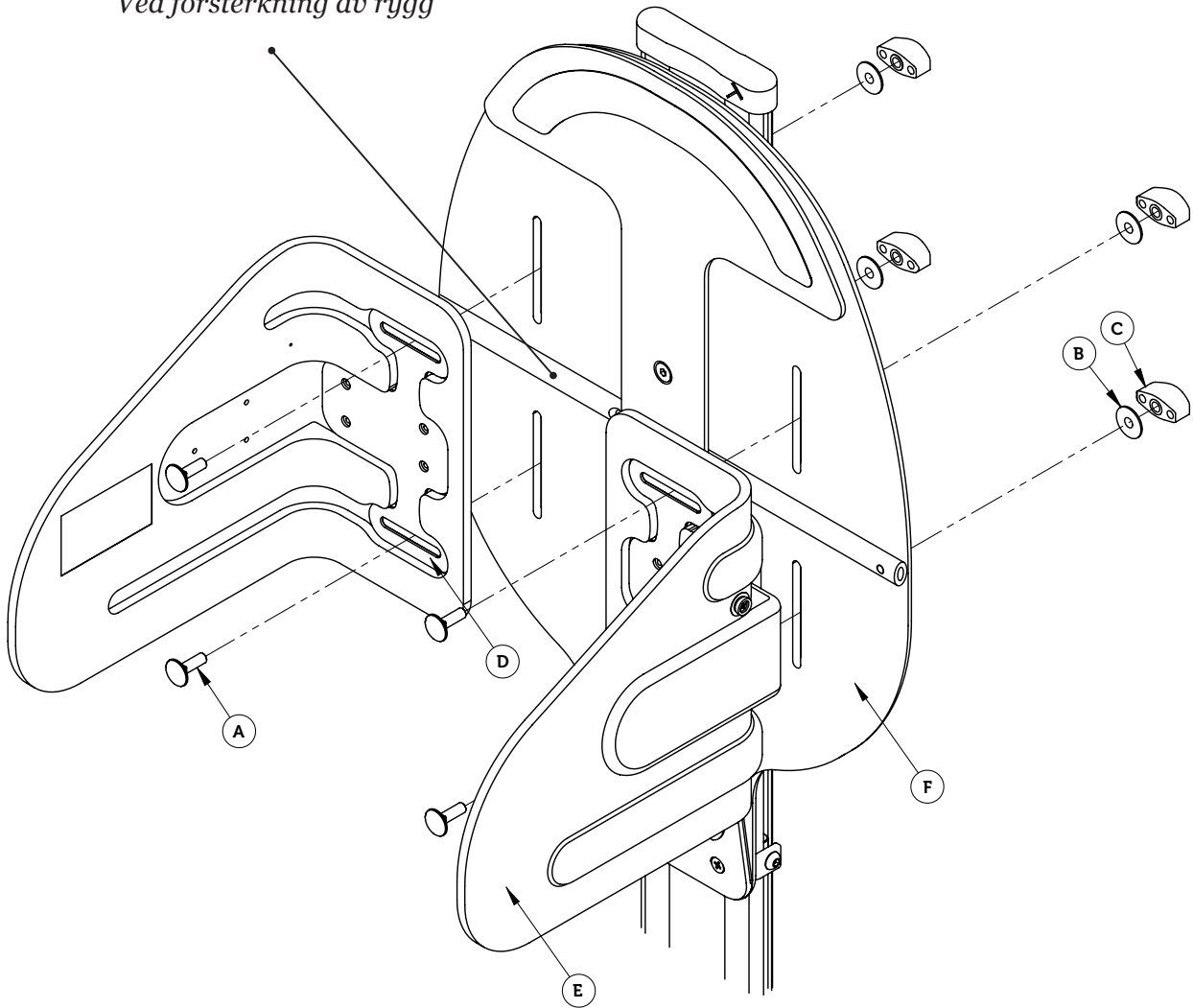

Låsebolt (A)
 4 st



Skive (B)
 4 st



Fingerskrue (C)
 4 st



Ryggskive (D)
 2 st

Bolstøtte

Montering av bolstøtte

Monter bolstøtten ved hjelp av låsebolt (A) skive (B) fingerskrue (C) og ryggskive (D). Ryggskiven (D) forhindrer låsebolten (A) fra å snurre fritt.

Stikk igjennom låsebolten (A) gjennom ryggskiven (D) bolstøttesvingen (E) og sporet i ryggplaten (F). Møt låsebolten på andre siden av ryggplaten (F) med skive (B) og fingerskruer (C).

Tips!


Se side 8-9 i denne bruksanvisning for informasjon om justering av bolstøtte.

Alternative bolstøtter

Som alternativ til de faste bolstøttene finnes også leddede bolstøtter og forsterkede bolstøtter. Montering av disse skjer på samme måte som beskrevet ovenfor.

Forsterkningspakken består av forsterkede bolstøtter og ryggjør.


Se separat monteringsanvisning ved ettermontering av forsterkningspakken.

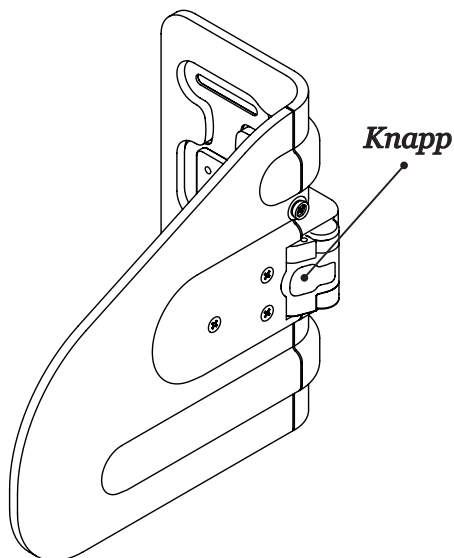

Leddete bolstøtter



Åpne leddet bolstøtte ved å trykke på den røde knappen.

Forsterkningsplate

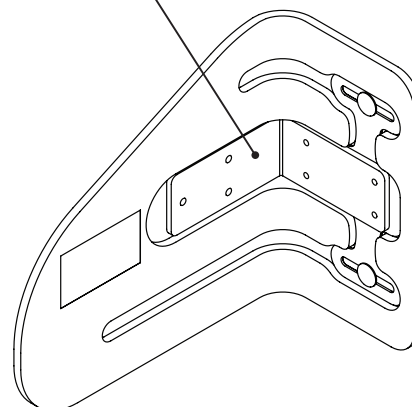

Forsterket bolstøtte

Forsterkningspakken består av forsterkede bolstøtter og ryggjør.

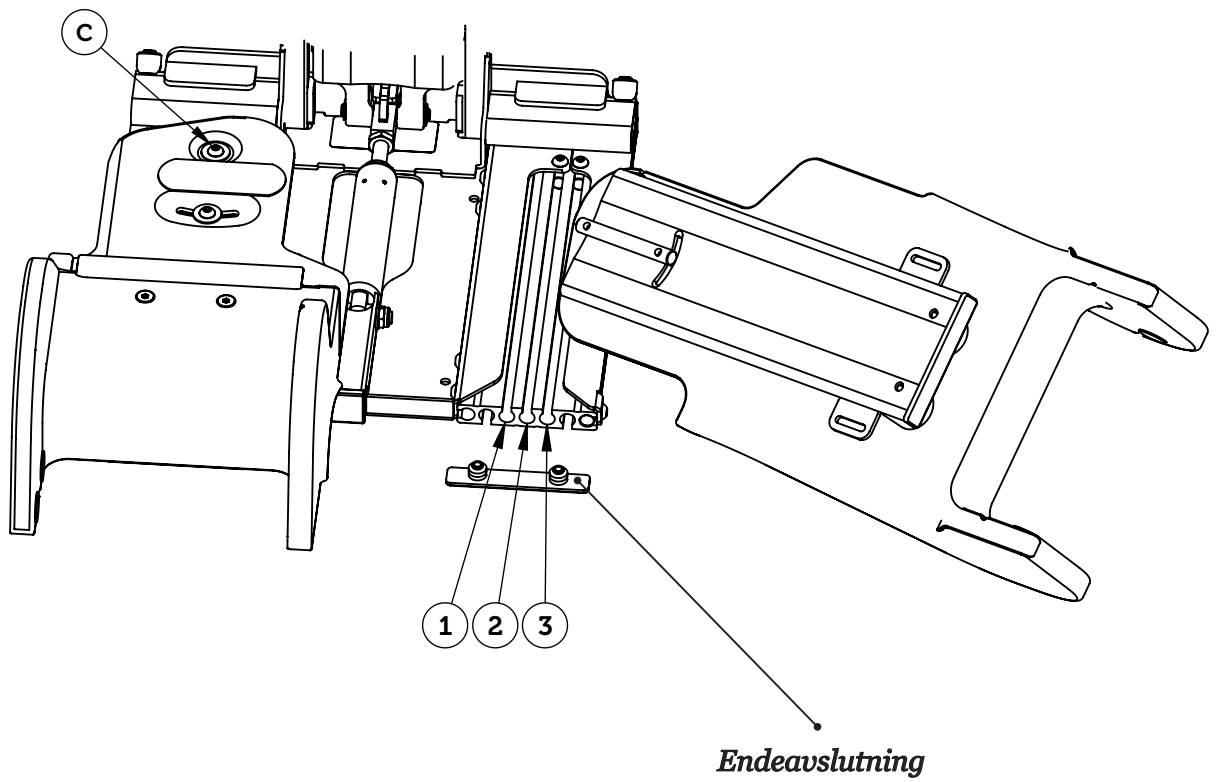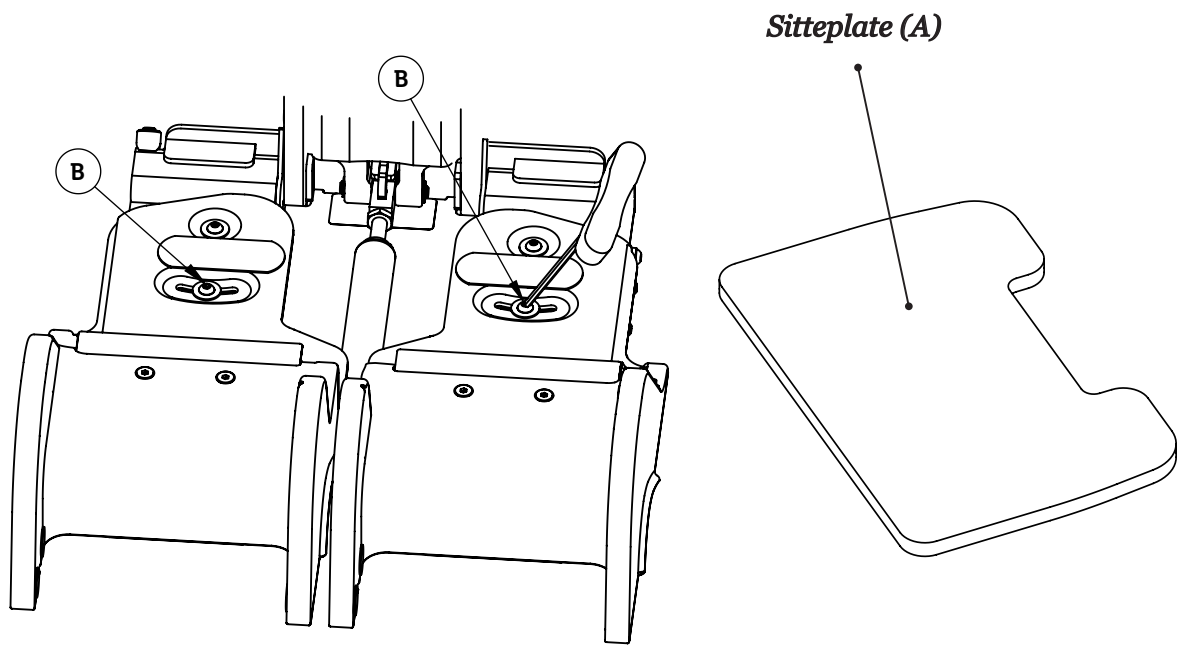

Sittedel

Justering av sittedel

Sittedybde, benlengdeforskjell og eventuell abduksjon/adduksjon av bendelerene justeres enkelt. Begynn med å fjerne setepolsteret, samt ta bort den bakre sittedeplaten (A) for å komme til justeringsskruene (B).

Obs!

Vær klar over at du ikke behøver å skru ut skruene helt for å justere bendelerene, det holder med å løsne dem.

Setebreddejustering


For å øke eller redusere setebredden, skal bendelerenes posisjonering på profilen endres. For å få ut bendeleren fra seteprofilen, må du først ta bort endeavslutningen som sitter i seteprofilen. Deretter løsne skruen (B) på bendelen ved hjelp av umbrakonokkelen. Når du har løsnet skruen (B) noe, drar du ut hele bendelen fra seteprofilen, flytter den så til ønsket spor.

For maksimal setebredde, setter du inn tønnemutteren i spor 3 og for minimal setebredde, sett inn tønnemutteren i spor 1. Bendeleren leveres grunninnstilt i spor 1.

Skru til skruen (B) når du har nådd ønsket posisjon. Den bakre skruen på bendeleren kan i noen tilfeller kanskje løsnes litt (C).

Tips!

Se målspesifikasjoner av setedel på side 59 i denne bruksanvisning.

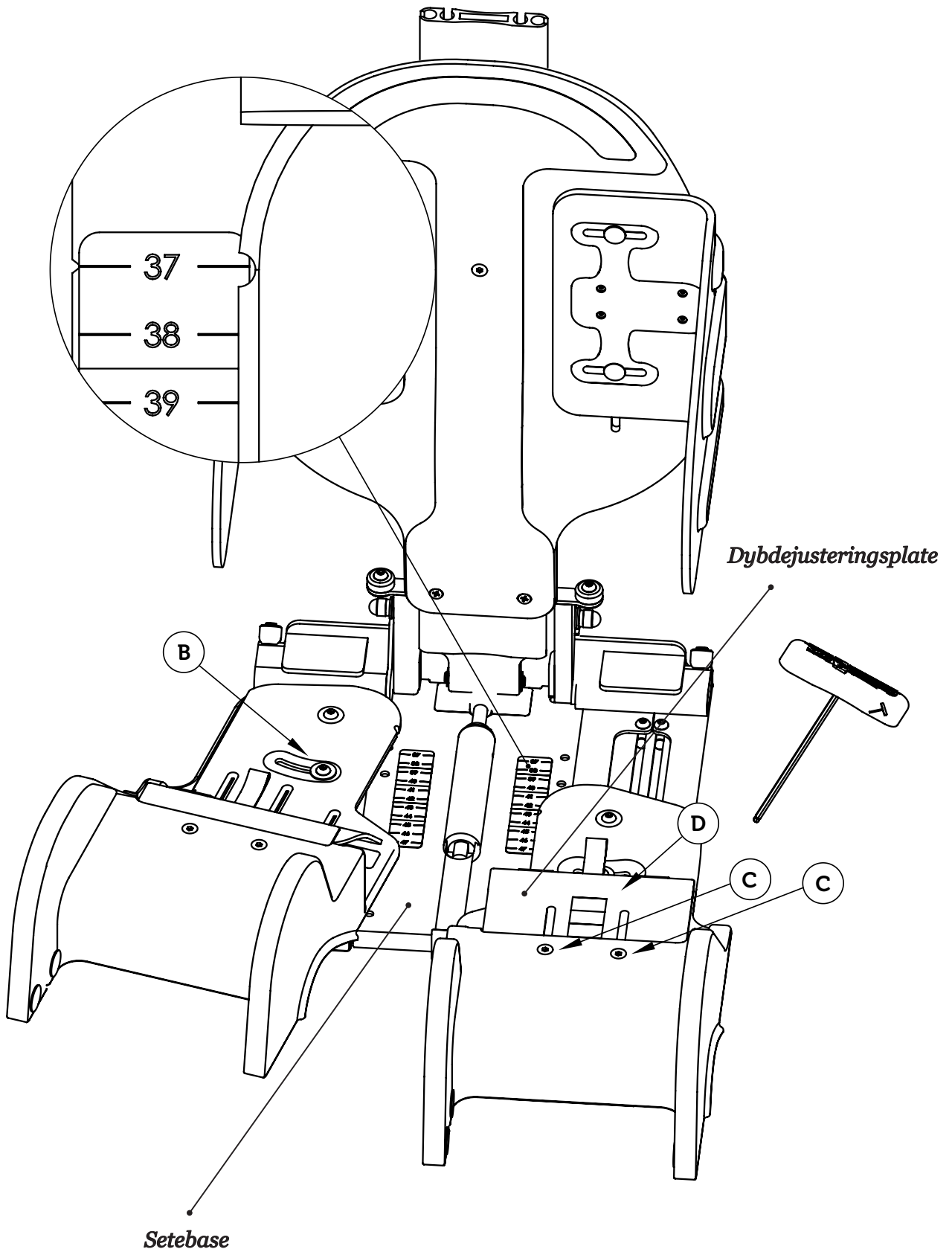

Setedel

Benlengdeforskjell

For å justere benlengden, løsner du skruen (B) på bendelersiden ved hjelp av umbrakonøkkelen, og justerer siden til ønsket benlengde. Deretter drar du til skruen (B) igjen.

Setegropjustering

Ved justering av setedybde bør også setegropen justeres. Løsne da bendelens fremre skrue (C) med hjelp av umbrakonøkkelen og dra setegropen til ønsket posisjon. Dra så til skruene igjen.

Tips!

For å få en bra utgangsstilling ved innstilling av setedybde kan fargeskalaen på setedelsbasen og dybdejusteringsplaten brukes som hjelp.

Dersom sittedybden er justert til foreksempel 43 cm (grått felt) bør også setegropjusteringen skyves ut til grått felt, da blir setegropens størrelse riktig.

Abduksjon, adduksjon og windswept

For å justere bendelen til noen av disse funksjoner, løsner du skrue (B) med hjelp av umbrakonøkkelen og fører bendelen i ønsket posisjon. Dra deretter til skruene.

Obs!

Vær oppmerksom på at du ikke behøver å løsne skruene helt for å justere, men det holdet med å løsne litt.

Varmepolster

Varmepolster

Varmepolsterpakken holder kroppstemperaturen automatisk, og forhindrer varmetap ved minusgrader. Når kroppstemperaturen er "normal" slår varmekpakken seg av for å spare energi. Om temperaturen synker igjen, aktiveres det igjen og varmer opp på nytt til kroppstemperatur er nådd.

Kontaktene som sitter montert er nøye utvalgt slik at det ikke skal gå ann å koble feil. Man må aldri utsette kontakter, batteri, eller lader for vann eller fukt.

Montering av varmpolster

Varmepolsteret monteres under sete- og rygg polsteret med borrelås (Velcro).

Varmepute

De innmonterte varmeputene har innebygd temperaturregulering med et temperaturområde fra +27 til + 32 grader.

Isoleringgen tåler både lav og høy temperatur, og påvirkes ikke av sollys, fuktighet eller kjemikalier. Materialet i puten er flammehemmende (FMVSS 302). Varmeputen er av ventilerende materiale for å unngå kondens.

Batteri

Batteriet er oppladbart (Ni-MH) og skal bare lades med den medfølgende laderen. Da batteriet er defekt/gammelt skal dette leveres til din lokale miljøstasjon.



Obs!

Da batteriet er defekt/gammelt skal dette leveres til din lokale miljøstasjon.



Lading av batteri

Følg det etterfølgende steg for å lade batteriet på en korrekt måte. For ytterligere informasjon og anvisninger vedrørende varmepolster, se separat bruksanvisning.

- 1) Koble laderen til et vegguttak på 230V, 50 Hz.
- 2) Koble laderkontakten til manøverboksen.
- 3) Når batteriet kobles til blinker laderen langsomt gult for å starte en langsom lading. Etter en stund går laderen over til hurtiglading, hvilket indikeres med et hurtig blinkende grønt lys.
- 4) La batteriet være tilkoblet til det lyser konstant grønt lys.
- 5) Ta ladekabelen ut av vegguttaket.
- 6) Koble bort ladekontakten fra manøverboksen.

Batteriet blinker gult

Dersom batteriet er ødelagt blinker lampen på laderen hurig med et gult skinn.

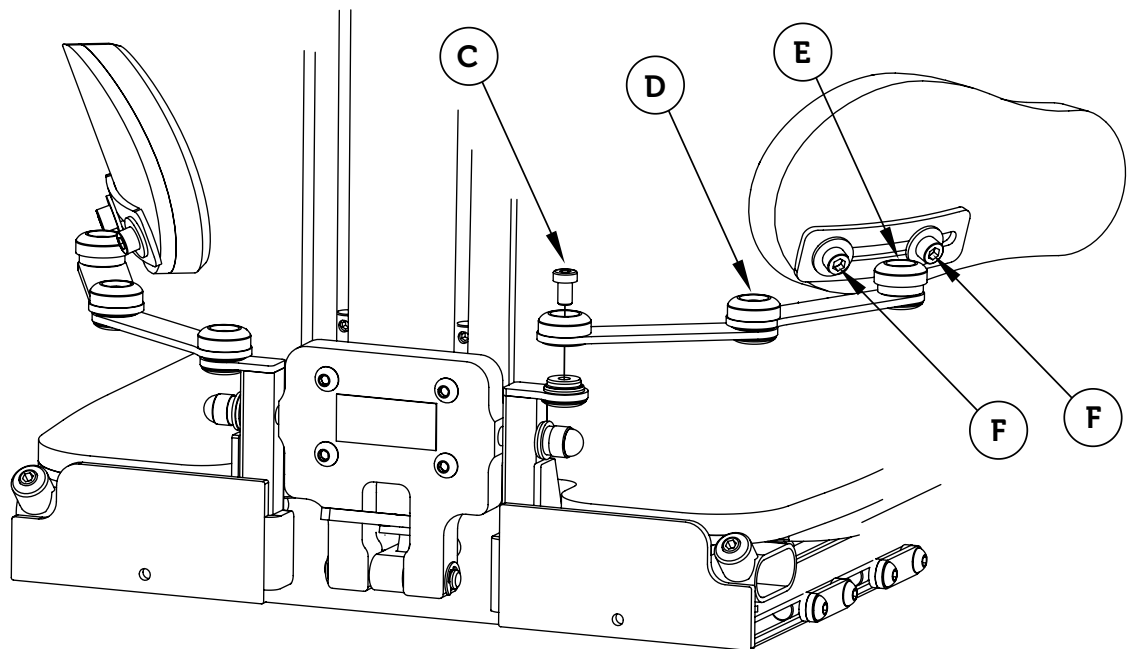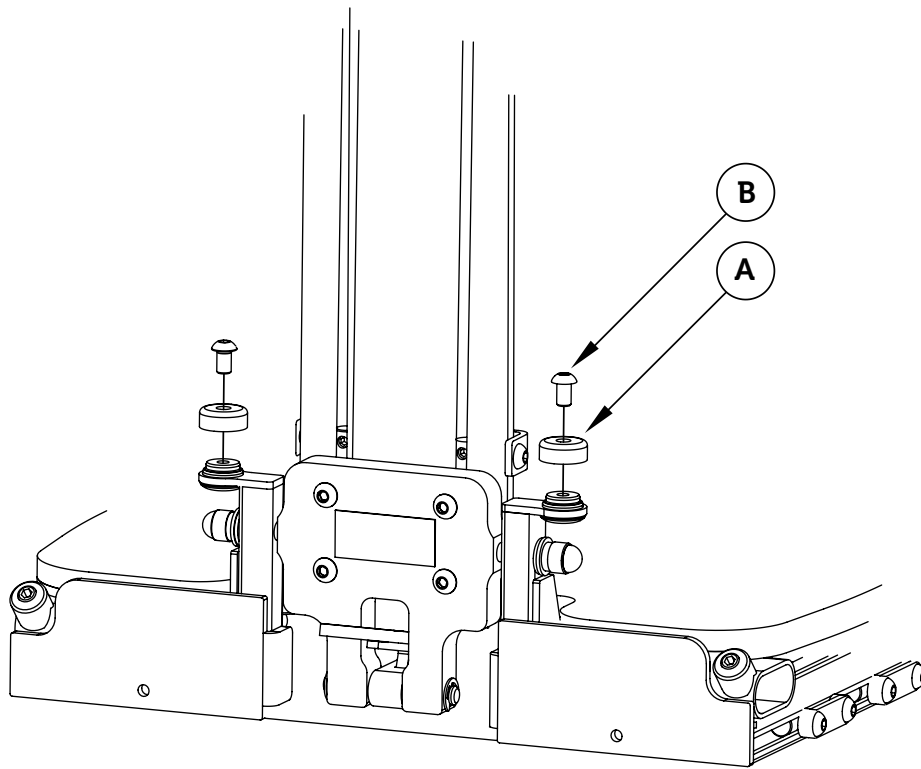

Bekkestøtte


Montering av bekkenstøtte

Før du kan montere bekkenstøtten må du ta av beskyttelsesplaten (A). Skru ut skruen (B) og løft bort platen. Denne skruen (B) erstattes av en annen type skruer (C).


Monter bekkenstøtten der beskyttelsesplaten (A) satt, og fest skruen (C).

Justering av bekkenstøtten


For å vinkeljustere bekkenstøtten, løsner du skruer (C), (D) eller (E) avhengi av hvilke innstillinger du vil gjøre. For å høydejustere bekkenstøtteplaten skrur du ut skruene (F) og flytter platen til ønsket posisjon. Skru deretter inn skruene (F) igjen.

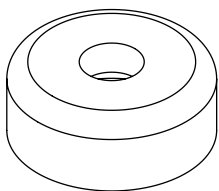


Beskyttelsesplate (A)
Tas bort

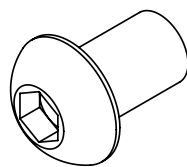

M6 Skruer (B)
Tas bort

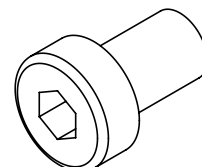

Skruer (C)
Erstatter tidligere skruer

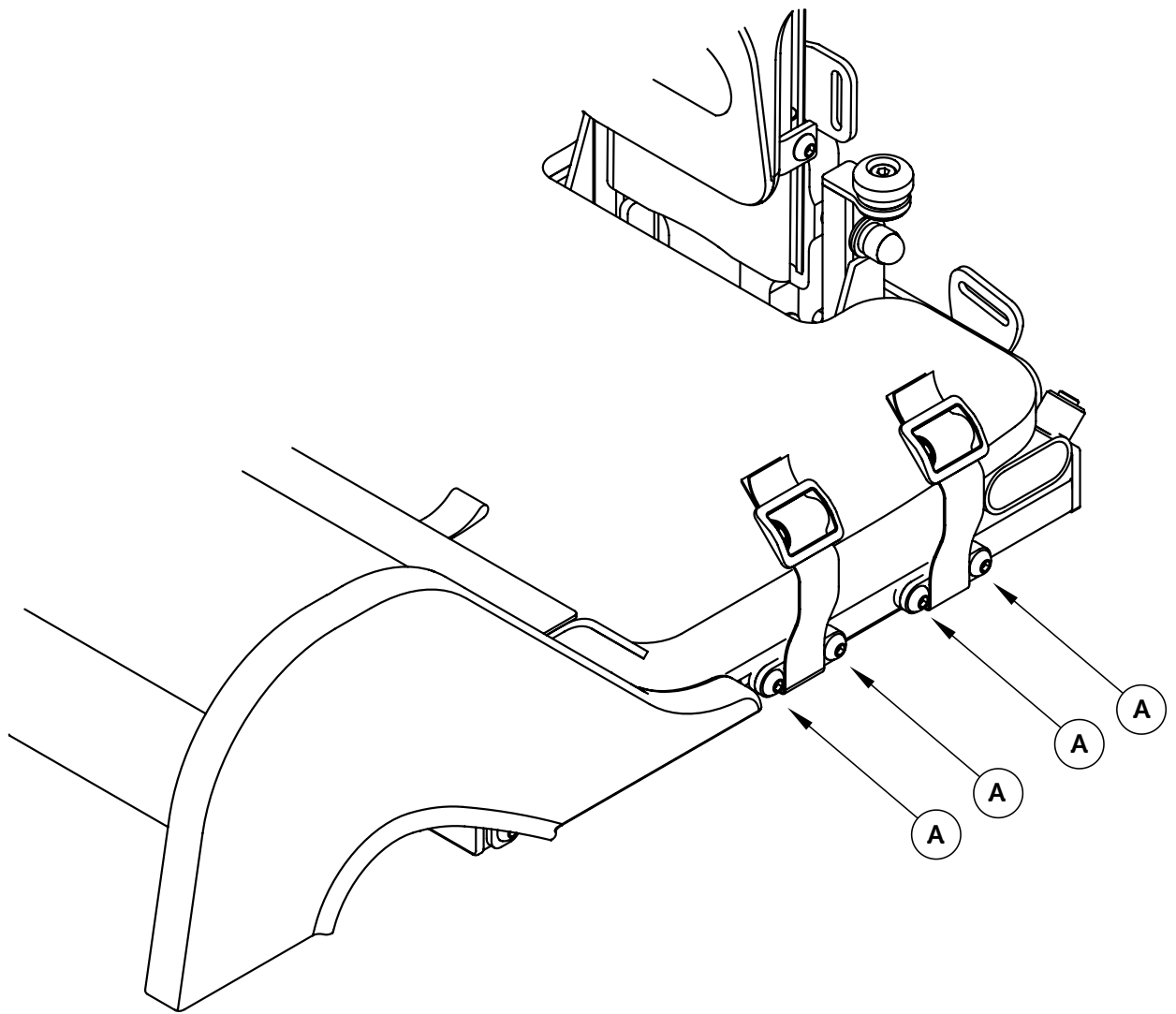

Hoftebelte


Justering av hoftebeltebeslag



For å flytte posisjon på hoftebelteinnefestningen løsner du skruene (A) noe og justerer til ønsket posisjon. Dra så til skruene (A).

Montering av hoftebelte

Når hoftebelte skal monteres i hoftebeltebeslagene, benytter du deg av et tri-glidespenne. For montering etter tri-glidemetoden, gjør som bildene viser.

Tri-glidemetoden

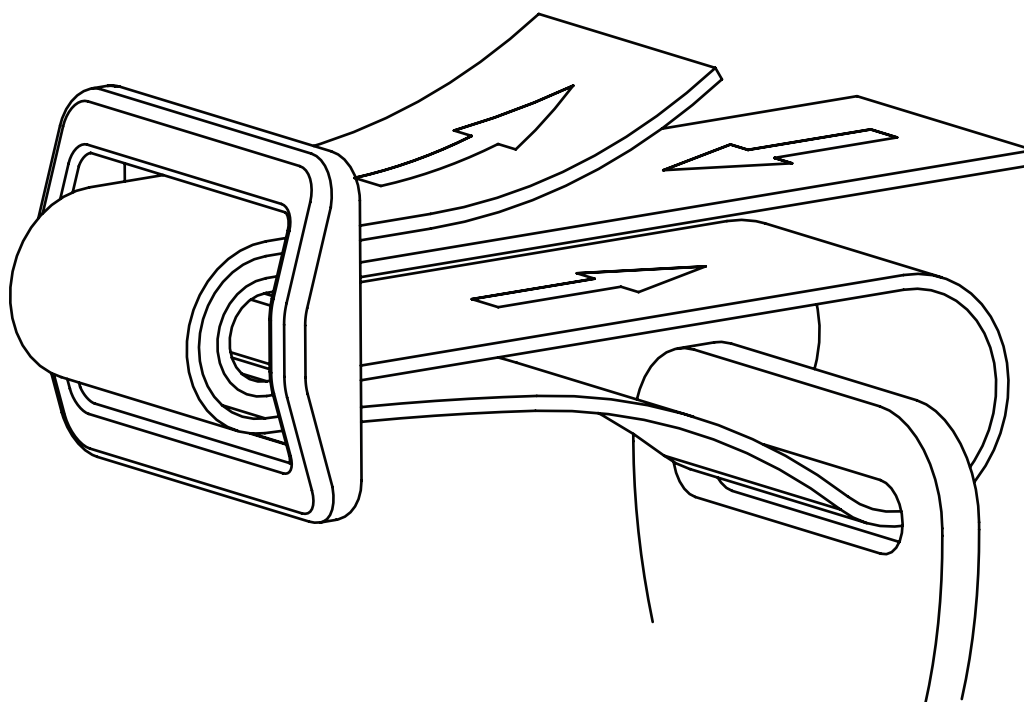

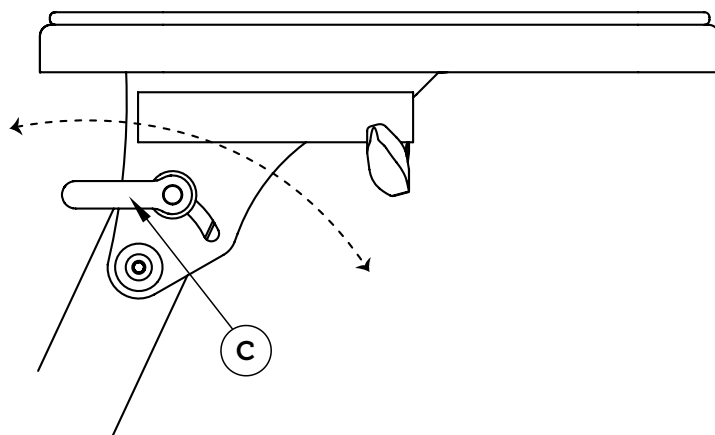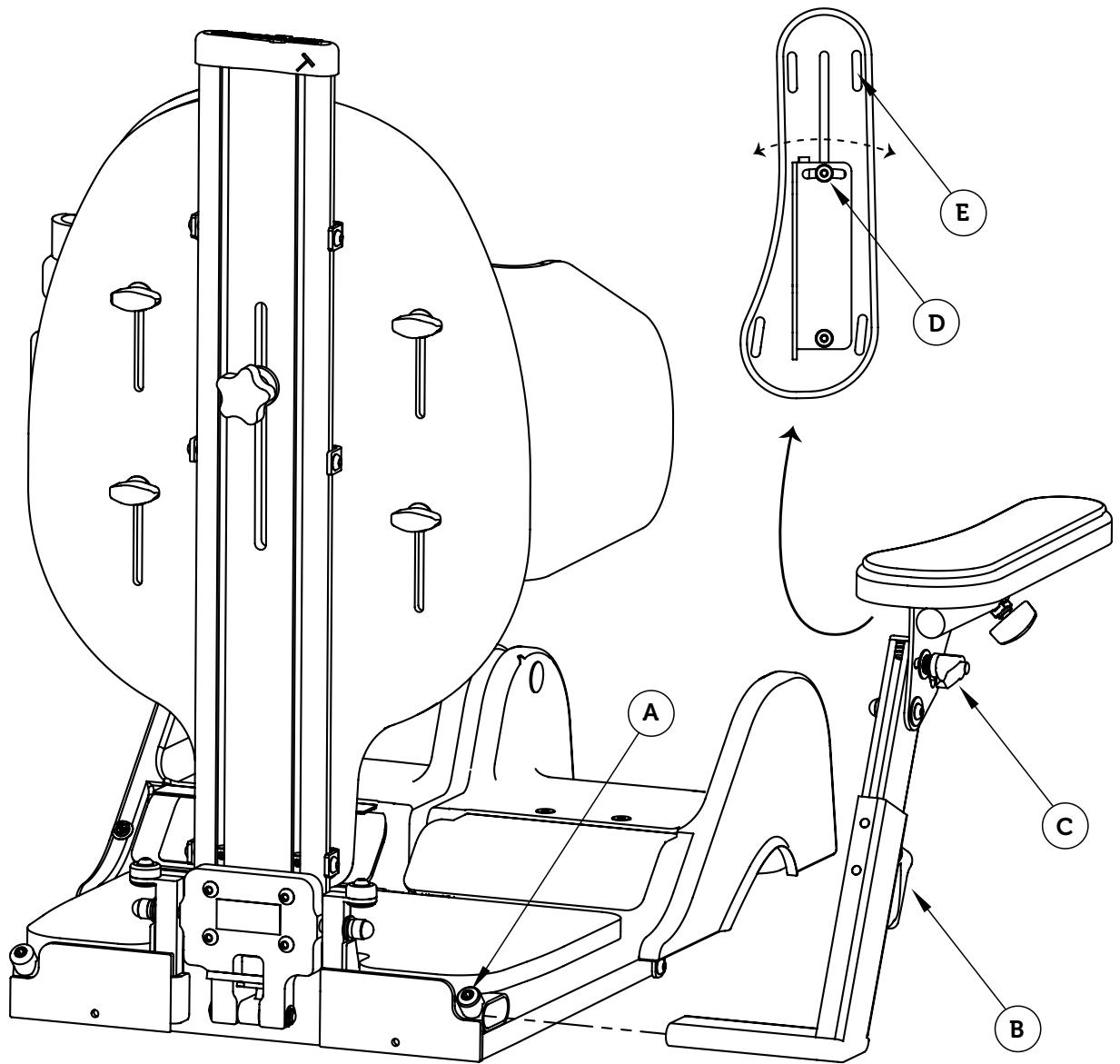

Armstøtte fra sits

Montering av armstøtte fra sits

Skyv inn armstøtteni røret på sittedelens side. Når du har oppnådd ønsket breddeposisjon, drar du til låseskruen (A).

Breddejustering

For å forandre bredde på armstøtten, løsner du skruen (A) og flytter siden armstøtten i ønsket posisjon. Dra så til skruen (A).

Høydejustering

Dersom du vil justere høyden på armstøtten, løsner du gantergrepet (B) og flytter så armstøtten i ønsket høyde. Dra så til gantergrepet (B).

Vinkeljustering opp/ned




Dersom du vil justere vinkelen på armstøtten, løsner du gantergrepet (C) og flytter så armstøtten i den ønskede vinkel. Dra så til gantergrepet (C).

Vinkeljustering av sideledd

Dersom du vil justere sidevinkel på armstøtten, løsner du skruen (D) og flytter så armstøtten til ønsket vinkel. Dra så til skruene (D).

Polstring

Fest polstringen på armstøtteplaten ved å tre velcrobåndet gjennom de fire sporene (E) og fastgjør dem på armstøtteplaten underside.

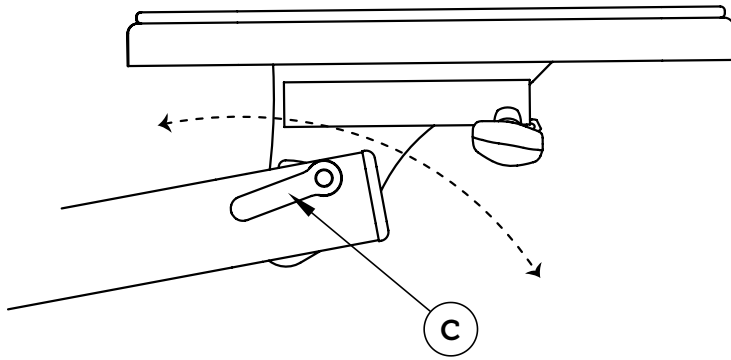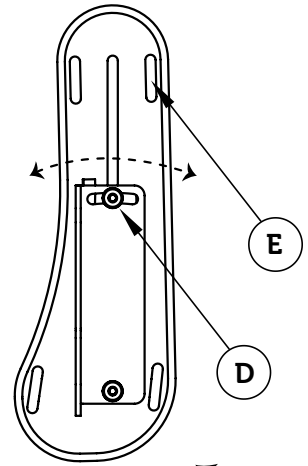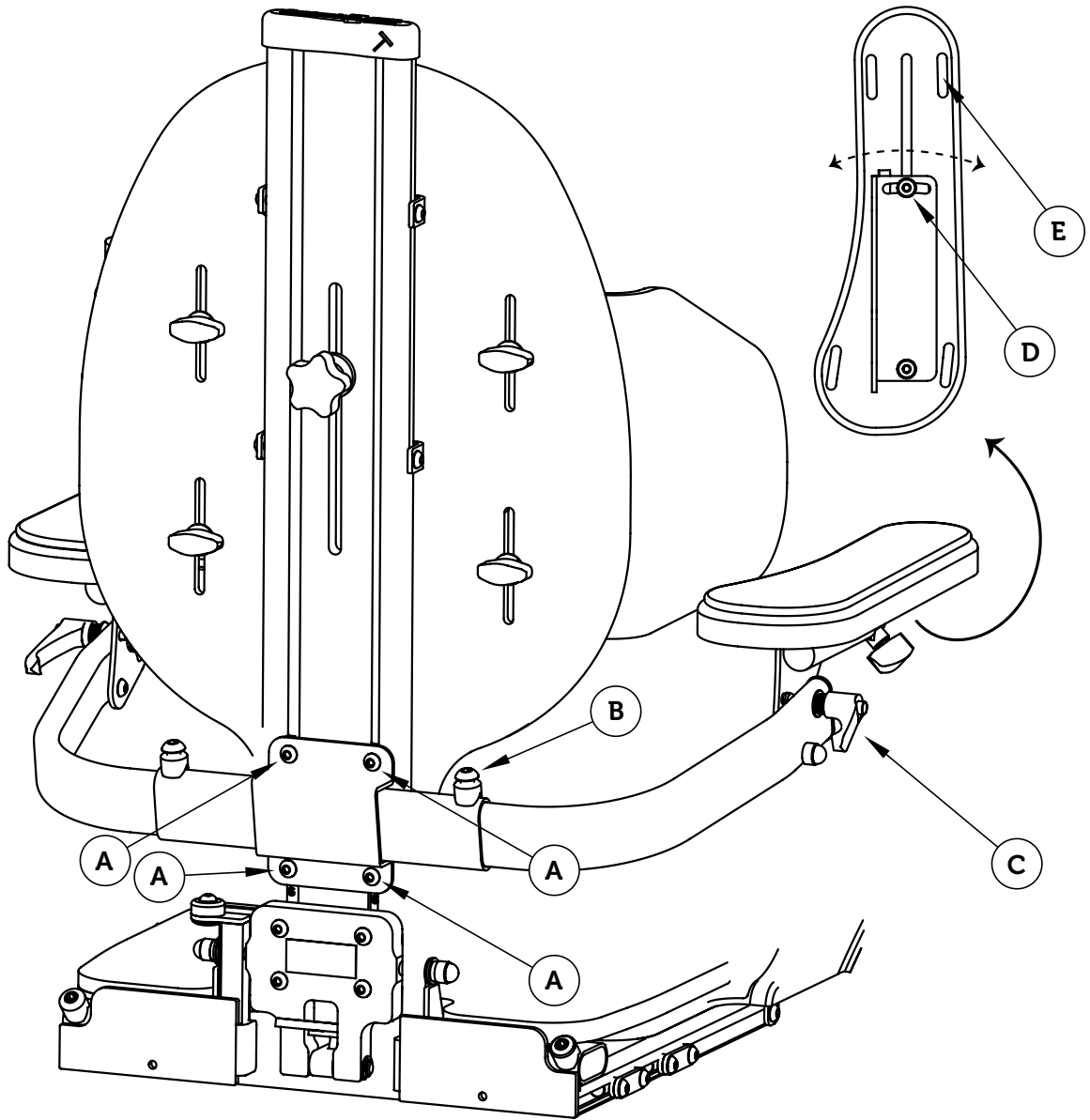

Armstøtte fra rygg, fast

Montering av armstøtte fra rygg

Før monterin av armstøtten fra rygg kan gjøres, må du først ta bort justeinsnøkkelen og eventuelt endre detaljer som kan sitte i ve-gen. Disse detaljer kan ekempelvis være hodestøtte, øvre monterinsbeslag og kjørebøyle.

Skyv inn armstøttebeslagets tønnemuttere i ryggprofilens spor. Når du har oppnådd ønsket posisjon drar du til skruene (A). Monter eventuelt tilbake de detaljer du plok-ket bort for å kunne montere armstøttebeslaget.

Høydejustering

For å høydejustere armstøtten, løsner du skruene (A) noe og flytter så armstøtten til ønsket posisjon. Dra så til skruene (A).

Breddejustering

Hvis du vil endre bredden på armstøtten, løsner du skruen (B), og deretter flytte armstøtten til ønsket posisjon. Dra deretter til skruen (B).

Vinkeljustering opp/ned


Hvis du vil justere vinkelen på armstøtten løsner du gantergrepet (C), og flytt deretter armstøtten til ønsket vinkel. Deretter drar du gantergrepet (C) til.

Vinkeljustering i sideledd

Hvis du vil justere sidevinkelen på armlenet du løsne skruen (D) og deretter flytte armstøtten til ønsket vinkel. Dra deretter til festeskruen (D).

Polstring

Fest polstringen på armleneplaten ved å tre gjennom velcrobåndene i de fire sporene (E) og fest til hverandre på armleneplatens underside.

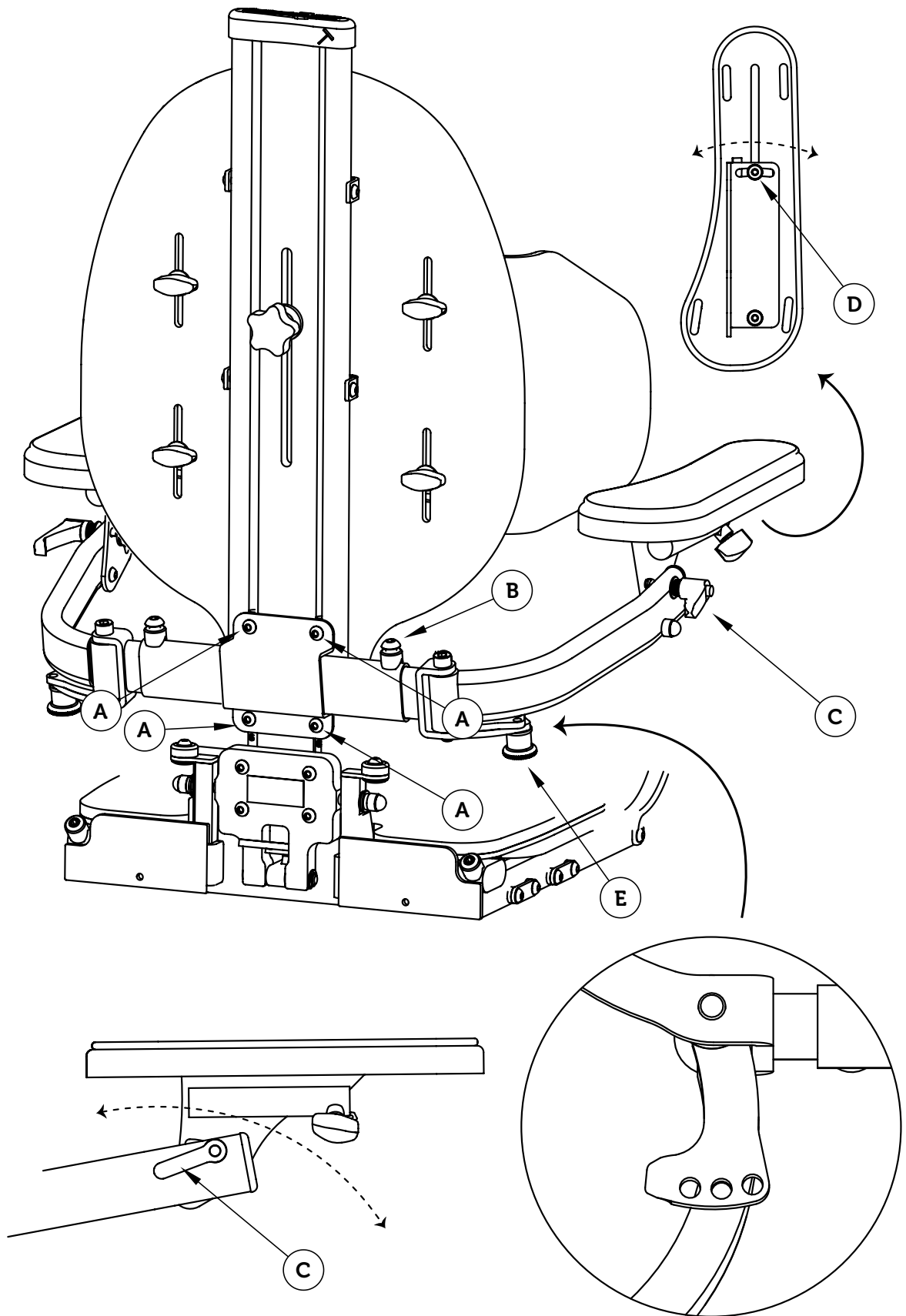

Trehullsposition
 For å vinkelstille armstøtter

Armstøtte fra rygg, oppfellbar

Montering av vikbara armstöd från rygg

Før montering av armstøtten fra rygg kan skje, må du først fjerne umbrella-konøkkelen og muligens andre detaljer som kan være i veien. Disse detaljer kan foreksempel være hodestøtte, øvre monteringsbeslag og kjørebøyle.

Skiv armstøttebeslagets tønnemutter i ryggprofilens spor. Når du har nådd ønsket posisjon dra til skruene (A). Monter tilbake de detaljer du plukket bort for å montere armstøttebeslaget.

Høydejustering

For å høydejustere armstøtten løsner du skruene (A) litt og deretter flytter armstøtten til ønsket posisjon. Dra deretter til skruene (A).

Breddejustering

Hvis du vil endre bredden på armstøtten, løsnerav du skruen (B), og flytt deretter armstøtten til ønsket posisjon. Dra deretter til festeskruen.

Vinkeljustering opp/ned


Hvis du vil justere vinkelen på armstøtten løsner du gantergrepet (C), og flytt deretter armstøtten til ønsket vinkel. Deretter drar du til gantergrepet (C).
Se side 24-25.

Vinkeljustering i sideledd


Hvis du vil justere sidenevinklingen av armlenet løsner du skruen (D) og deretter flytter armstøtten mot ønsket side. Dra deretter til festeskruen (D).

Den vinklingsbare funksjonen


For vinklingsbare armstøtter, dra låsebolten (E) ned, og deretter vend bort armlene. Sørg for at en klikkelyd høres når du vendt tilbake armlene. Muligheten til å vinkelstille gis gjennom trehullspositionen for låsebolten.

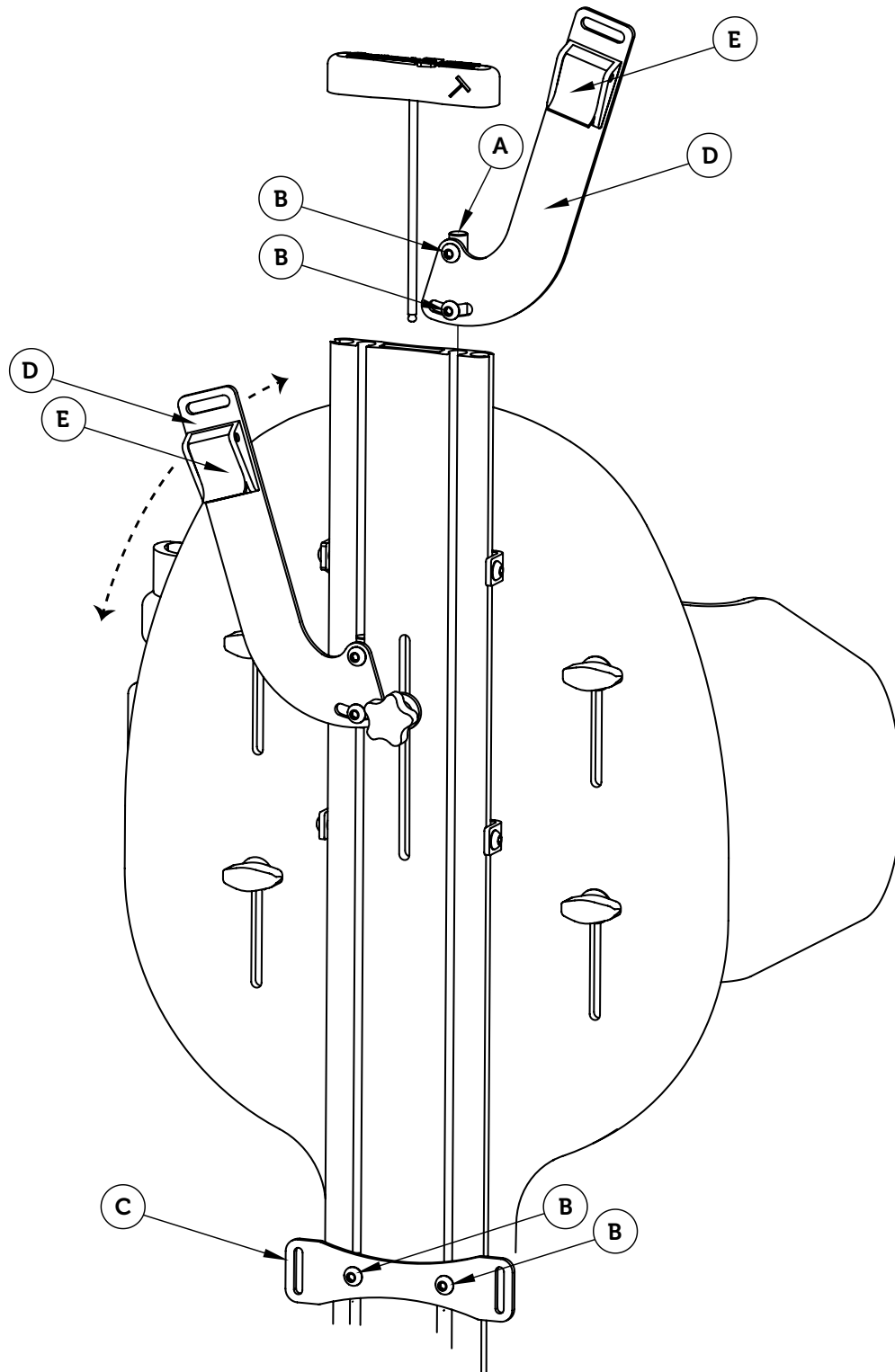

Tønnemutter (A)
4 st

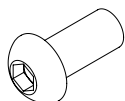

M6 Skruer (B)
6 st

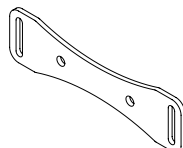

Nedre beslag (C)
Inngår som standard



Nedre beslag (F)
Alternativt 2 st

Posisjoneringsseler

Montering av nedre beslag

Før montering av nedre beslag (C) kan utføres, må du først fjerne umbrakonøkkelen og muligens andre detaljer som kan være i veien. Dette kan være for eksempel hodestøtte, øvremonteringsbeslag og kjørebøyle.

Skyv innedre beslagets tønnemuttere i ryggprofilens spor. Når du har nådd ønsket posisjon dra du til skruene (B). Monter tilbake detaljene du plukket bort for å kunne montere nederst beslag.

Justering av nedre beslag

For å høydejustere nederste beslag løsner du skruene (B) litt og deretter flytter beslaget til ønsket plassering. Dra deretter til skruene (B).

Montering av øvre beslag


Løft bort umbrakonøkkelen, og skyv inn tønnemutteren (A) på det øvre monteringsbeslaget (D) i ryggprofilen. Når du har nådd ønsket høyde på beslaget, skru til skruene (B). Sett umbrakonøkkelen inn ryggprofilen.


Justering av øvre beslag

For høyde og vinkeljustere det øvre beslaget, løsner du skruene (B) litt og deretter flytter beslaget til ønsket plassering. Dra deretter til skruene (B).

Montering av alternativt nedre beslag

For en lavere innfesting av selen, kan et alternativt nedre beslag (F) brukes. Dette er montert med vedlagte skruen i de eksisterende hullene på setebasen.

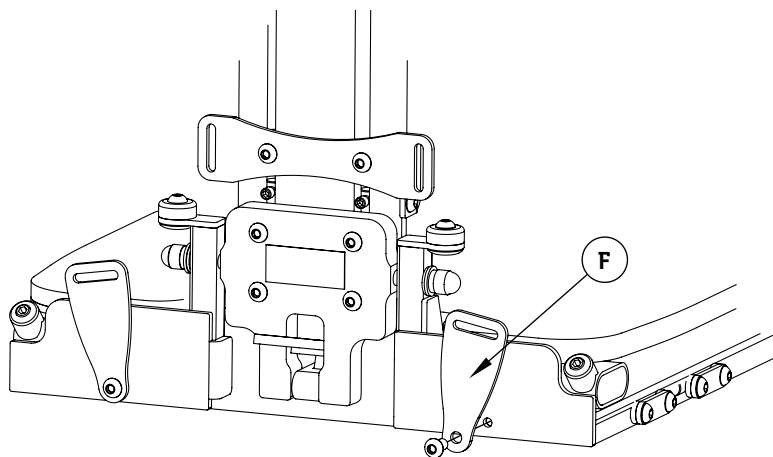

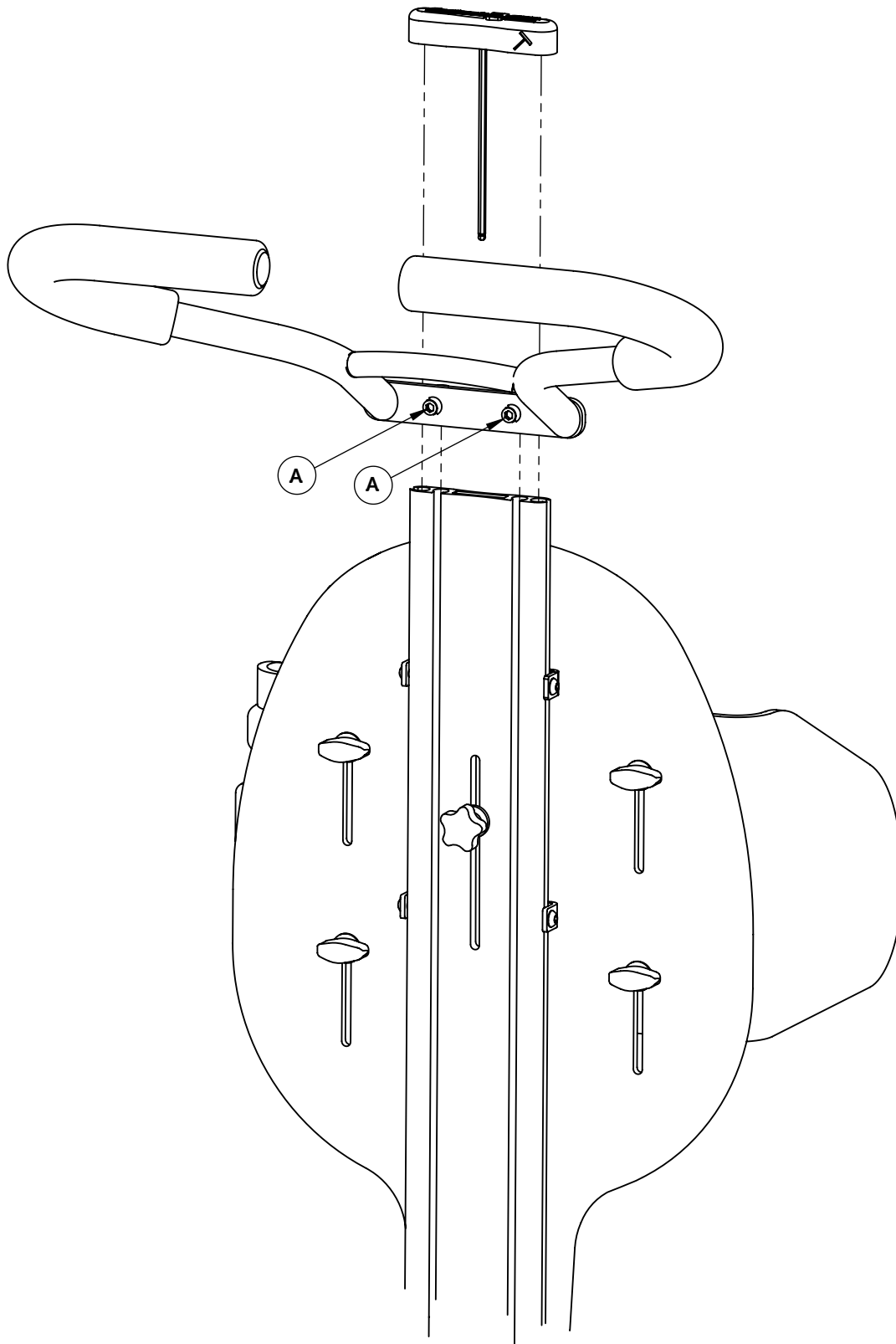

Kjørebøyle

Montering av kjørebøyle

Før montering av kjørebøylen kan skje, må du først fjerne umbrakonøkkelen, og muligens andre detaljer som kan være i veien. Dette kan være for eksempel hodestøtte, og det øvre monteringsbeslag.



Skv inn kjørebøylens tønnemuttere i ryggprofilens spor. Når du har nådd ønsket posisjon dra tilskruene (A). Monter tilbake detaljene du plukket bort for å montere kjørebøylen.

Høydejustering av kjørebøyle

For å høydejustere kjørebøylen løsner du skruene (A) litt og deretter flytter kjørebøylen til ønsket høyde. Husk å stramme til skruene (A) når ønsket høyde er nådd.

Obs!


Merk at du aldri trenger å løsne skruer helt for å høydejustere kjørebøylen, det er nok til å løsne dem litt.

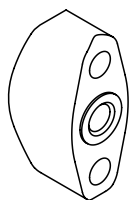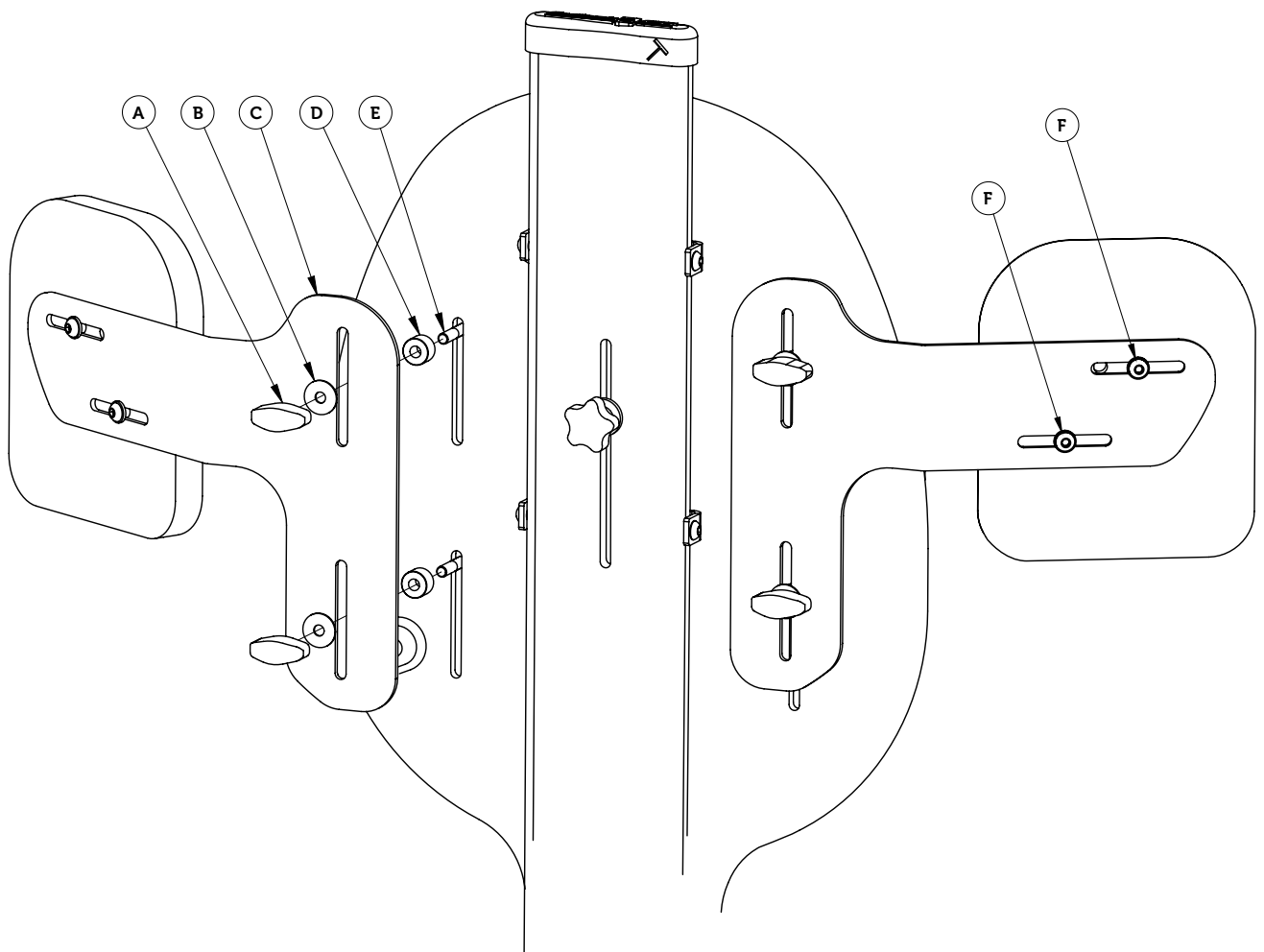


Fingerskrue (A)
4 st



Skive (B)
4 st

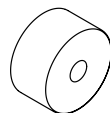

Distanse (D)
4 st

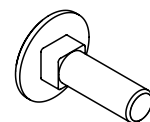

Låsebolt (E)
4 st

Overarmsstøtte

Montering av overarmsstøtte

Monter overarmsstøtte ved hjelp av fingerskrue (A), skive (B), distanse (D) og låsebolt (E). Legg merke til at låsebolten i sidestøtten må erstattes med medfølgende lengre låsebolt. For detaljert beskrivelse om hvordan å montere sidestøtte, kan du se side 6 i denne håndboken.

Stikk gjennom låsebolten (E) gjennom sidestøtten og ryggplaten. Møt på baksiden med distansen (D), overarmstøttebeslag (C), skive (B), og til slutt fingerskrue (A).

Obs!

Husk at låsebolten i sidestøtten må erstattes med medfølgende lengre låsebolt når du monterer overarmstøtte.

Høydejustering av overarmsstøtte

For å høydejustere overarmsstøtten løsner du fingerskruen (A) og juster til ønsket høyde. Stram fingerskruen (A) når du har nådd ønsket posisjon.

Breddejustering av overarmsstøtte

For å breddejustere vil overarmsstøtten løsner du skruene (F) og juster til ønsket bredde. Husk å stramme til skruene (F) som du har nådd ønsket posisjon.


Obs!

Ved justering av overarmsstøtten, løsne også sidestøtten før justering.


Polstring

Når polstringen må vaskes, kan du bare trekke dette fra overarmstøttesplaten, ved å strekke strikken på baksiden av polstringen.

For å ettermontere polstringen, tre polstringen over overarmstøtteplaten og sørg for at den sitter midtstilt på overarmstøtteplaten.

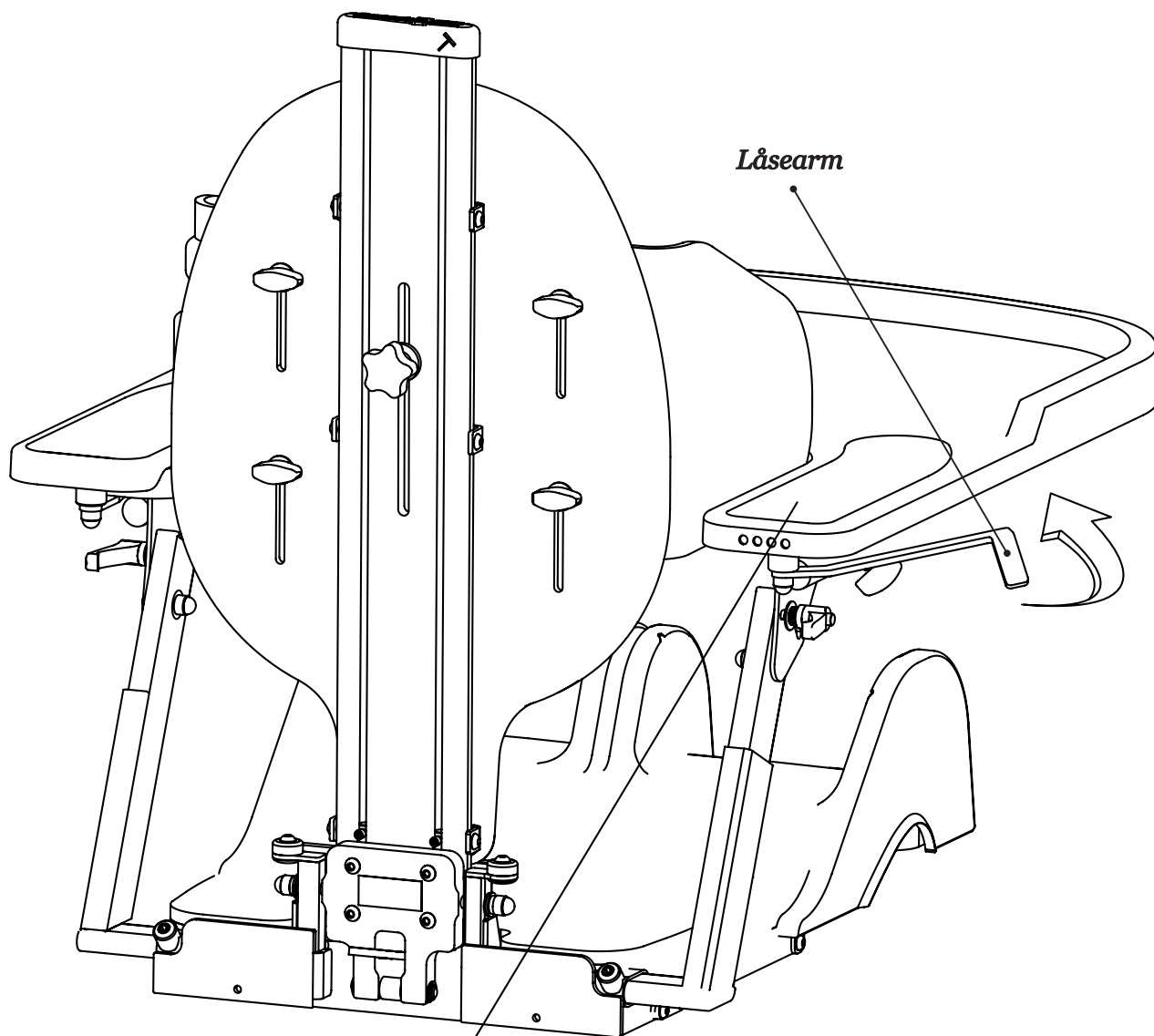

Låsearm

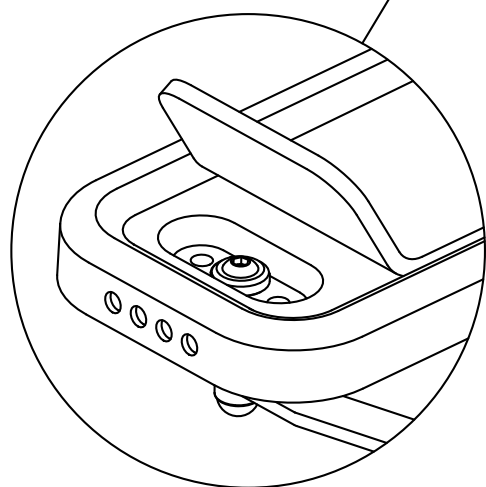

Innfestningsbredder

Velg mellom tre ulike monteringshull

Bord, fast

Montering av bord

Legg bordet på armstøtteplatene, og vri deretter bordets låsarm under armstøtteplaten. Låsarmen skal vris til den havner under opphøyningen under armstøtteplaten.

Bytte av monteringshull



Det finnes tre innfestningsbredder å velge mellom. Hvis du vil endre bredden brukes valgfritt monteringshull i armstøttepolstringen i bordets bakkant. I grunnstilling er låsarmen innfestet i midtre hullet.

For å bytte monteringshull, må du først løfte på polstringen i bakkant. Merkene i bordets ytre bakkant viser hvilken størrelse det er på bordet.




Obs!


Vær nøye med å ikke løfte bordet i framkant.

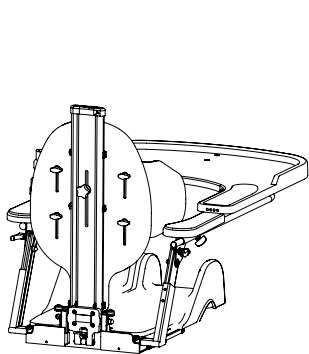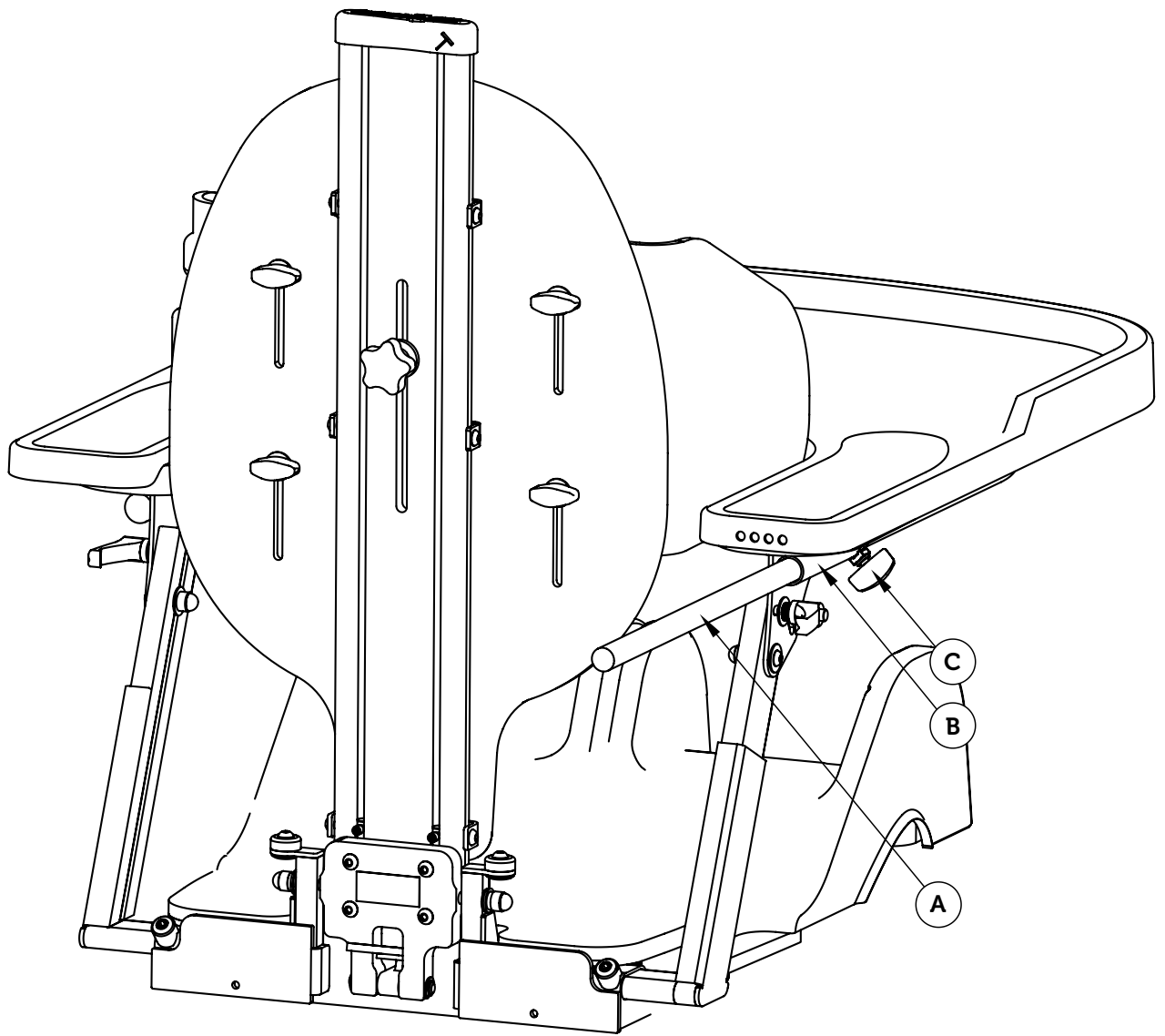

Posisjon 1

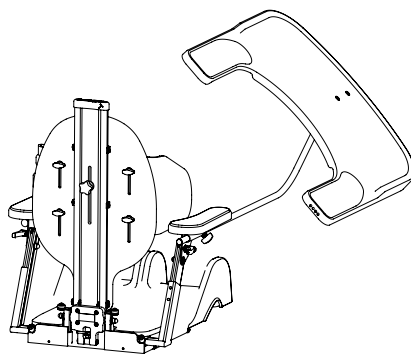

Posisjon 2

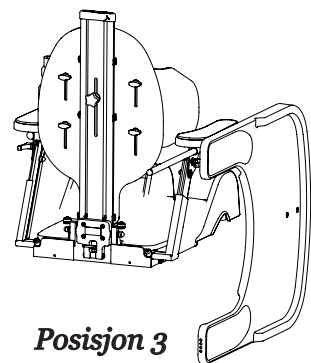

Posisjon 3

Bord, oppfellbart

Montering av bord, oppfellbart

For å montere det oppfellbare bordet, trer du inn bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B) som er under armstøtteplaten. Skyv inn bordet til ønsket posisjon og la de hvile på armstøtteplatene. Dra til fingerskruen (C) for å låse fast bordet.

Anvendelse av den oppfellbare funksjonen

For å felle opp bordet til siden, løsne først fingerskruen (C) litt. Løft så bordet noe og dra det fremover. Løft bordet ytterligere og fell det ned til siden. Når bordet er i sin nederste stilling, skuver du det tilbake igjen og skrur til fingerskruen.

- 1) Trekk fra bordet.
- 2) Løft og dra ut til siden.
- 3) Slipp bordet ned, slik at det henger ned langs siden. Skyv bordet tilbake til bakre stilling.


Obs!

Påse at bordet er dratt tilstrekkelig framved nedfelling til siden, slik at ikke bruker skades. Ikke glem å skru til fingerskruen (C) ved nedfelling av bordet. Dersom det benyttes låsearm, skal disse vries under armstøtteplaten som beskrevet på side 34-35.

Husk!

Påse at bordet trekkes tilstrekkelig frem ved nedfelling, slik at ikke brukeren skades.

Forsterket bordt
Undenfra

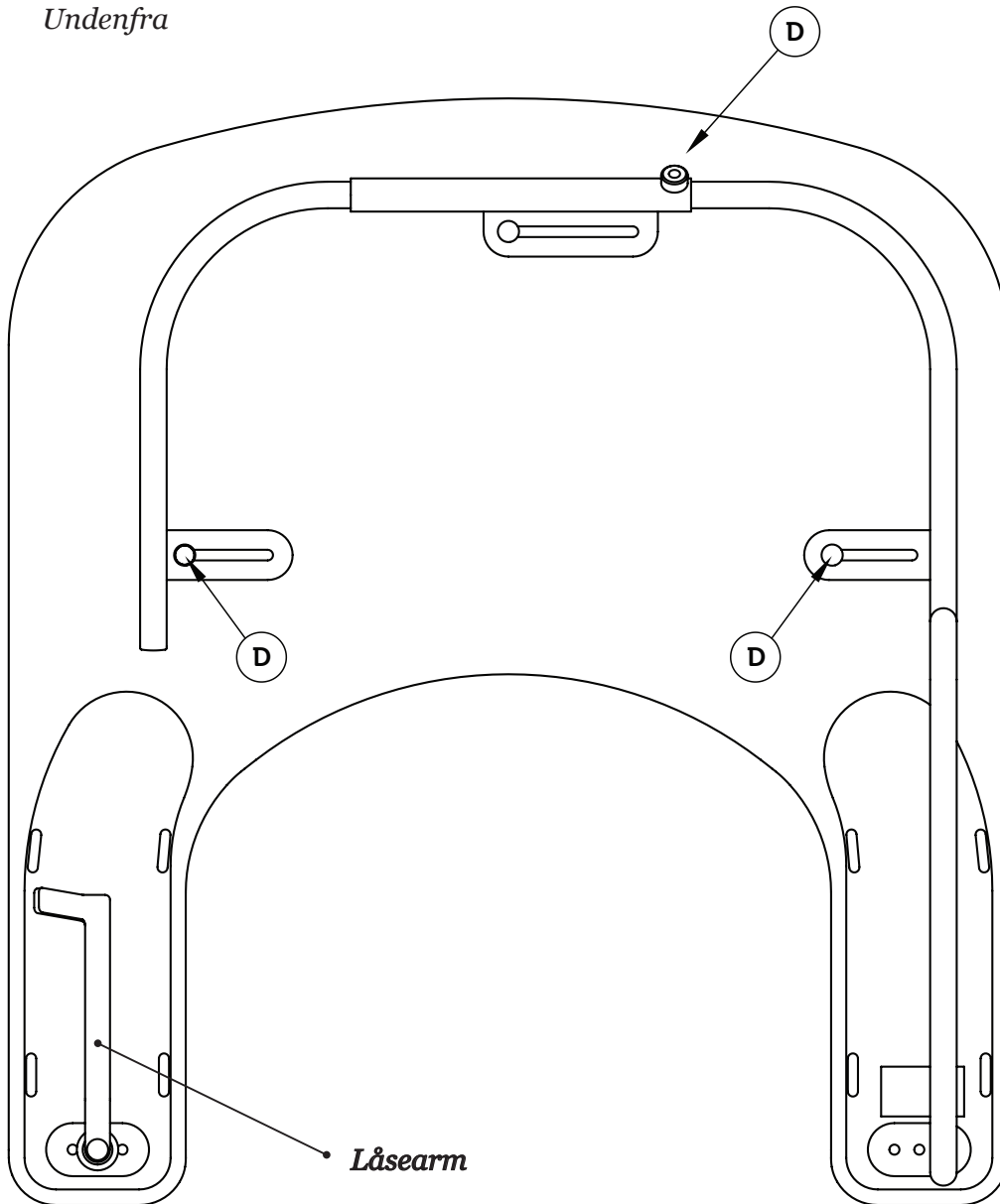

Bord, forsterket monteringsbeslag

Montering av forsterket bord

For å kunne montere det forsterkede bordet, trer du inn bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B) som er under armstøtteplaten. Skyv så inn bordet til ønsket posisjon, og la det hvile på armstøtteplatene.


Skru til fingerskruen (C) for å låse fast bordet. Vri så inn låsearmen til den havner innenfor opphøyningen under armstøttepaten.


Breddejustering av forsterket bord

Istede for å breddejustere armstøtten, kan du velge å breddejustere bordets innfestningsbeslag slik at det passer mot innfestningsrøret i armstøttebeslaget. For å breddejustere bordet løsner du skruene (D) litt, og justerer til ønsket posisjon. Skru deretter til skruene (D).

Obs!

Dersom ikke breddejusteringen i bordets innfestningsbeslag er nok, kan eventuelt justering av armstøttebredden behøves å gjøres. Se side 22-23.

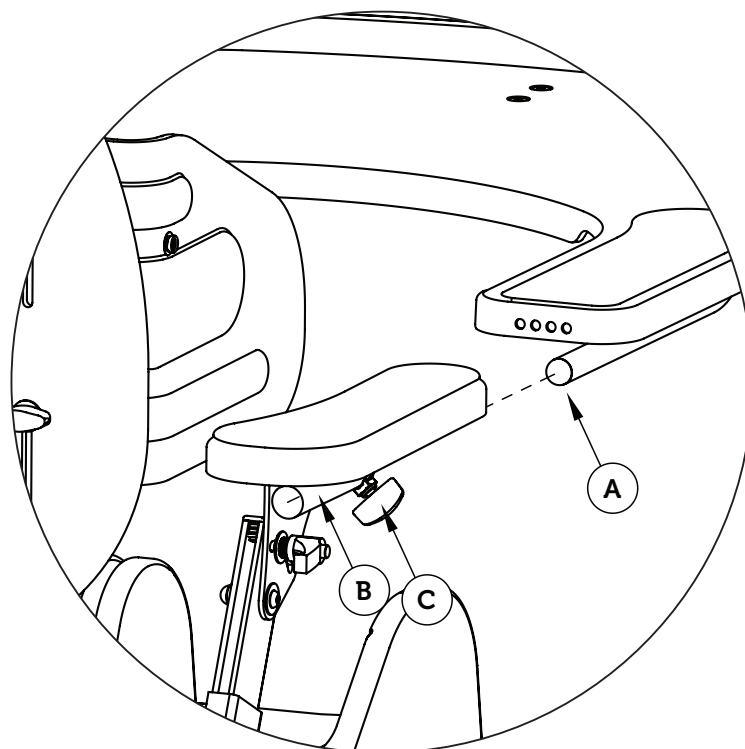

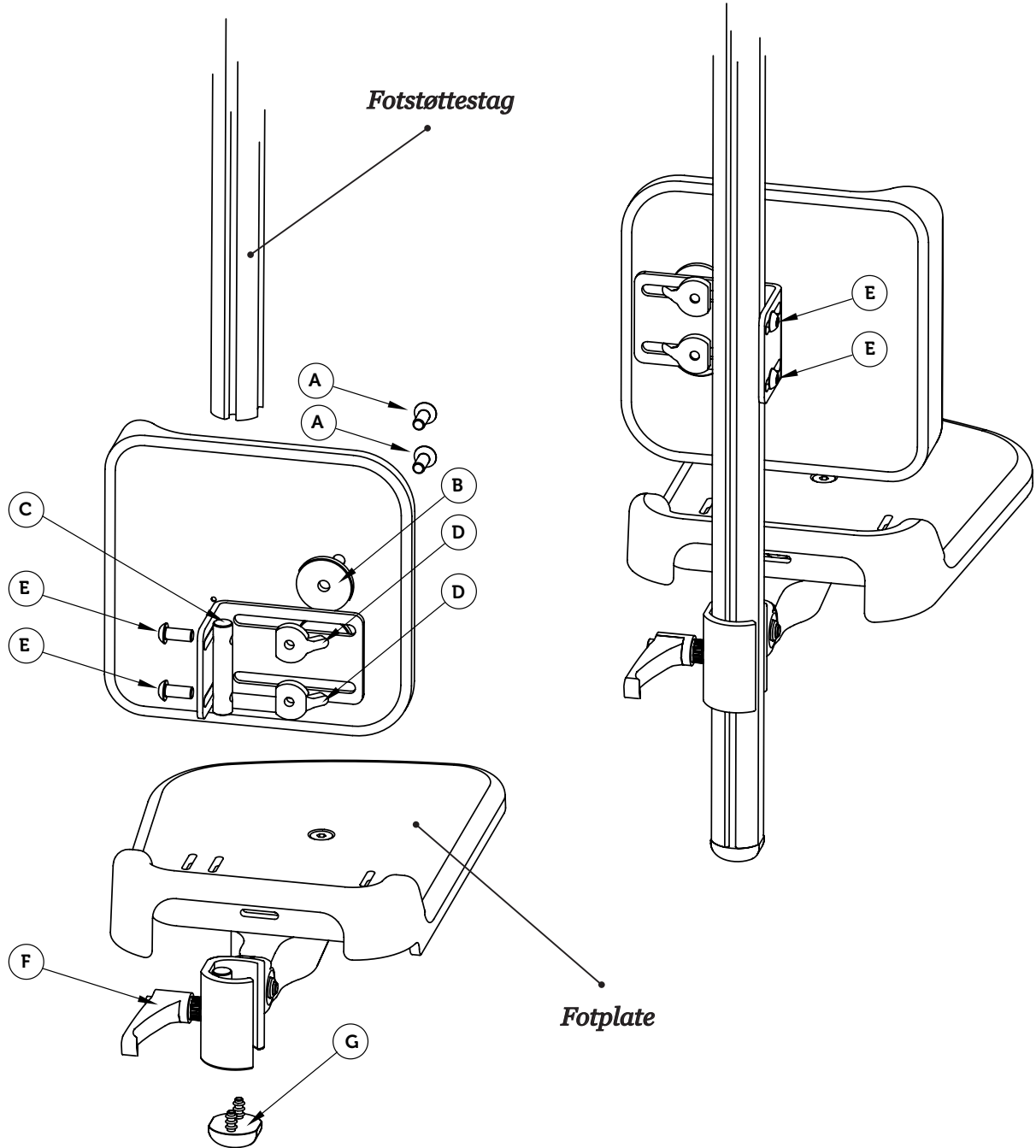

- | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | |
| M6 Forsetket (A) | Distance (B) | Tønnemutter (C) | Spornmutter (D) | M6 Skruer (E) |
| 4 st | 4 st | 2 st | 4 st | 4 st |

Leggstøtte

Montering av leggstøtte

Før man kan montere leggstøttene, må du først ta bort eventuelle fotstøtter. Begynn med å ta bort endeavslutningen (G) og løsne gantergrepet (F) som holder fotstøtten på plass i fotstøttestaget. Trekk så fotstøtteplaten med beslag ned.

Monter leggstøtten ved å skyve tønnemutteren (C) i fotstøttestaget, juster til ønsket høyde, og skru til skruene. Monter deretter tilbake fotstøttene og endeavslutningen.

Tips!

For tilbakemontering av fotstøtte, se side 42-43 i denne bruksanvisning.

Høydejustering av leggstøtte


For å høydejustere leggstøtten løsner du skruene (E) litt for så å justere til ønsket høyde. Skru så til skruene (E).

Breddejustering av leggstøtte

For å kunne breddejustere leggstøttene løsner du skruene (A) noe for så å justere til ønsket bredde. Skru så til skruene (A).

Obs!

Ikke glem å sette tilbake fotstøtte og endeavslutning etter montering av leggstøtte.

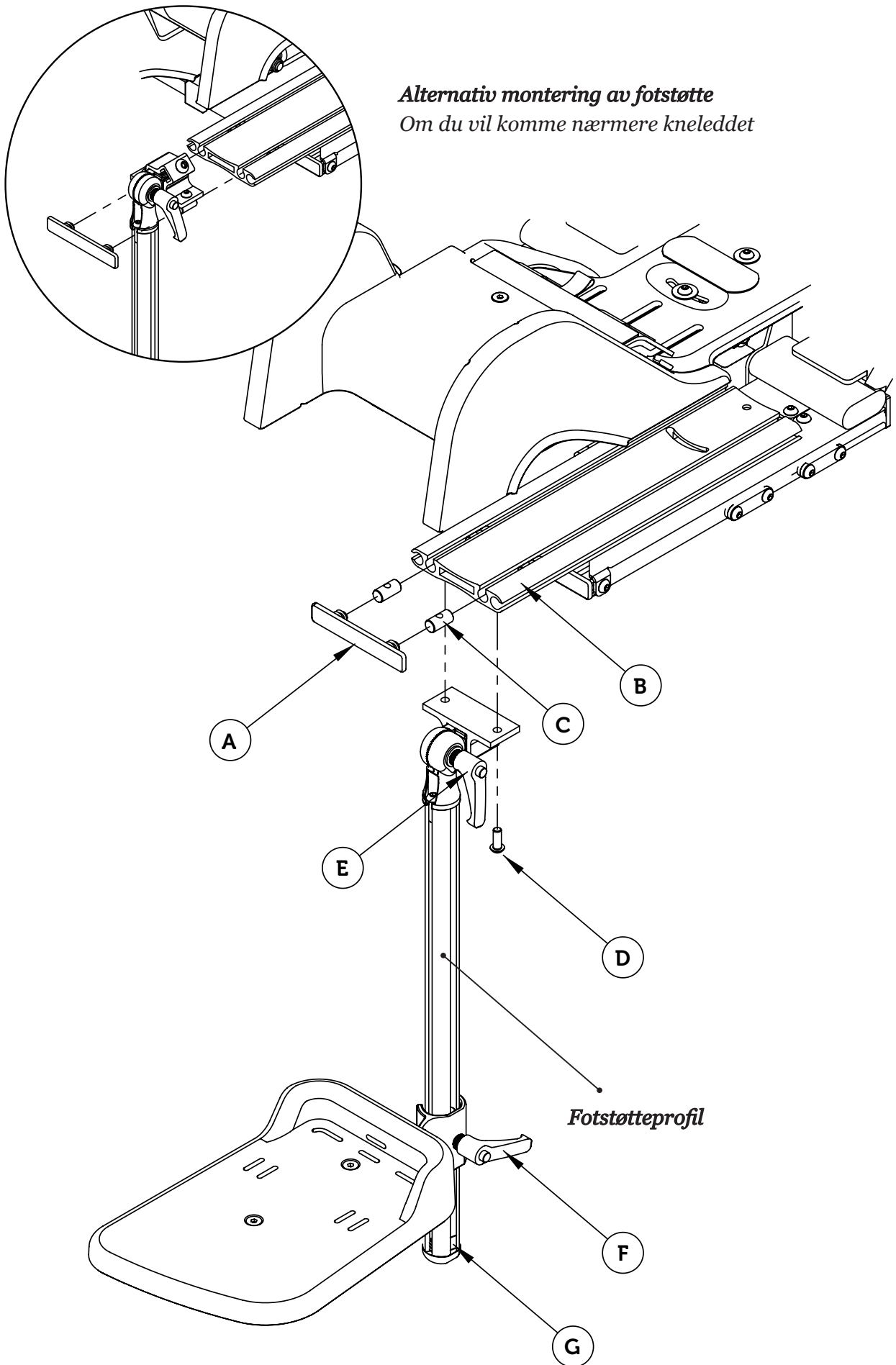

Fotstøtte

Montering av fotstøtte

Uavhengi av variant på fotstøtte skjer montering på samme måte. Begynn med å ta bort endeavslutningen (A) fra bendelsprofilen (B) og før så inn tønnemutteren (C) slik at de ligger midt i de eksisterende hullene i bendelsprofilen (B).

Fest så fotstøtten ved å skru fast skruene (D) i tønnemutterene (C) gjennom hullene i bendelsprofilen (B).

Alternativ montering av fotstøtte

Om du vil komme nærmere kneleddet finnes det et alternativt monteringssett der du monterer fotstøttefestet på motsatt side av bendelsprofilen (B).

Obs!

Du behøver ikke demontere bedeleren fra profilen for å montere fotstøtten.

Sikkerhetsstopp

Sikkerhetsstopp (G) i form av en tønnemutter er montert i bunnen av fotstøtteprofilen innenfor endeavslutningen. Sikkerhetsstoppen kan også benyttes for å finne tilbake til forinnstilt høydeposisjon.

Tips!




Monter en ekstra sikkerhetsstopp ovenfor fotstøtten i fotstøtteprofilens spor for å enkelt finne tilbake til en alternativ høydeposisjon (eksempel med eller uten sko).

Justering av vinkelen ved kneleddet

Når fotstøtten er montert i bendelsprofilen, finnes det mulighet for å vinkeljustere fotstøtten i kneleddet. Løsne gantergrepet (E) litt, og juster til ønsket vinkel. Skru så til gantergrepet.

Justering av vinkel ved fotleddet

Når fotstøtten er montert i bendelsprofilen, finnes det mulighet for å vinkeljustere fotstøtten ved fotleddet. Løsne gantergrepet (F) litt og juster til ønsket vinkel. Skru så til gantergrepet.

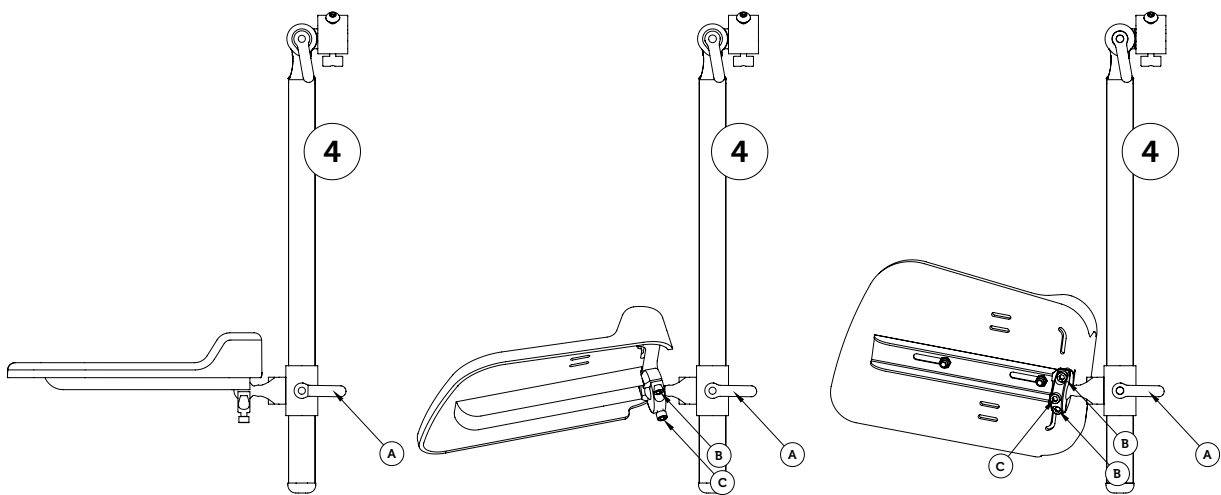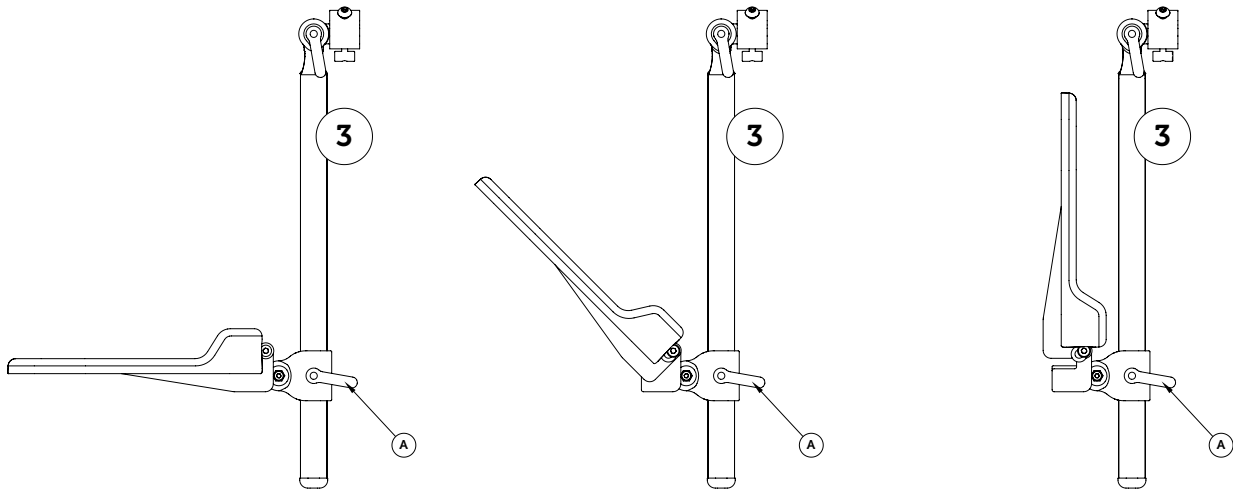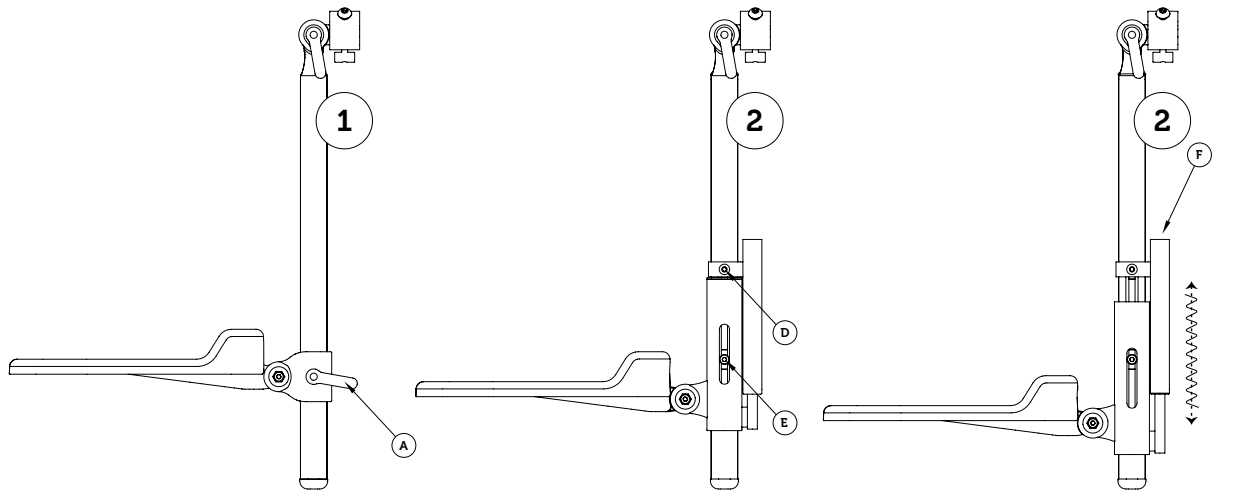

Fotstøttebeslag

Fast fotstøttebeslag (1)

For å høydejustere fotstøtten, løsner du gantergrepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Skru så til gantergrepet.

Fjærende fotstøtteadapter (2)

For å høydejustere fotstøtten, løsner du skruen (D) og eventuelt skruen (E) litt for så å justere til ønsket høyde. Skru så til skruen (D). Velg lengde på fjærgangen ved å justere skruen (E) til ønsket posisjon og skru den til.

Tips!

Fjærens motstand kan justeres med en skrutrekker ved å skru på skruen i fjærhuset (F).


Oppfellbart fotstøttebeslag (3)

For å høydejustere fotstøtten, løsner du gantergrepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Skru så til gantergrepet. For å benytte den oppfellbare funksjonen, løft fotstøtteplaten i framkant.

Kuleleddsadapter (4)

For å høydejustere fotstøtten, løsner du gantergrepet (A) litt for å justere til ønsket høyde. Skru så til gantergrepet.

For å benytte kuleleddsfunksjonen, løsner du først skruene (B) og (C) og justerer til ønsket posisjon. Skru til skruene (B) og sikkerhetslås posisjonen med skruen (C).

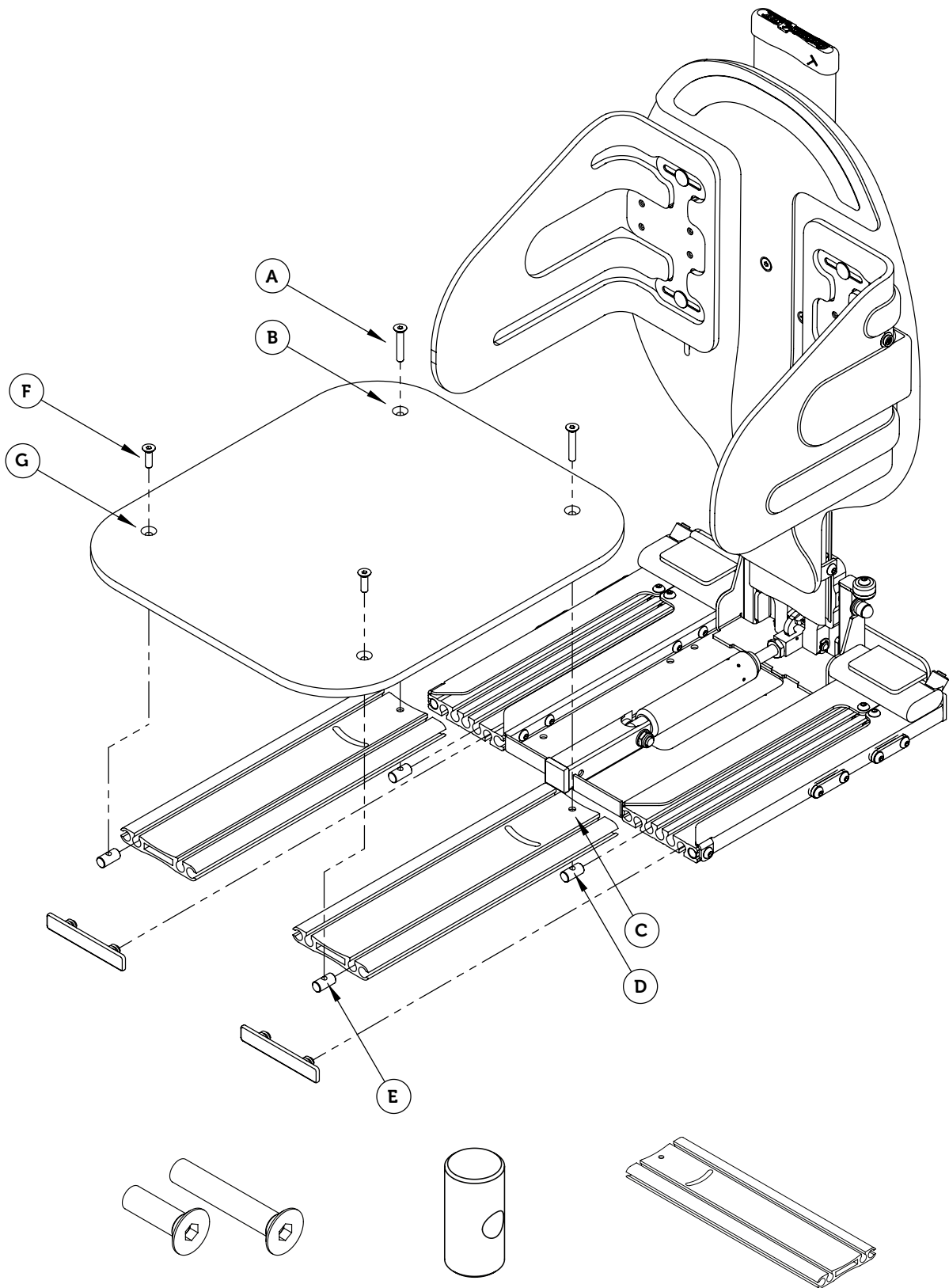

M6 Forsenket
2+2 st

Tønnemutter
4 st

Profil
2 st

Plansete

Montering av plansete

Montering av plansete er å erstatte delen med en flat plate. Montering med denne metoden, må gjøres med medfølgende monteringssett, som beskrevet nedenfor.

Ved ettermontering av plansete fører du de lengre skruer (A) gjennom de bakre hullene (B) i plansetet og hullene (C) i profilen.


Møt på motsatt side skruene med tønnemutterene (D). Skru ikke hardt til. Før inn tønnemutterene (E) i profilens ytre spor og fest skruene (F) i disse hullene (G) i plansetet.

Skyv deretter opp plansetet i setebasen i spor 1 (se side 12) til ønsket plassering, og stram skruene (A).



Obs!

Bruk aldri noen annen form for skruer enn de medfølgende. Dette er sikkerhetsdetaljer. Om andre dimensjoner er ønsket, kontakt Anatomic SITT Hjelpemiddelspesialisten AS.

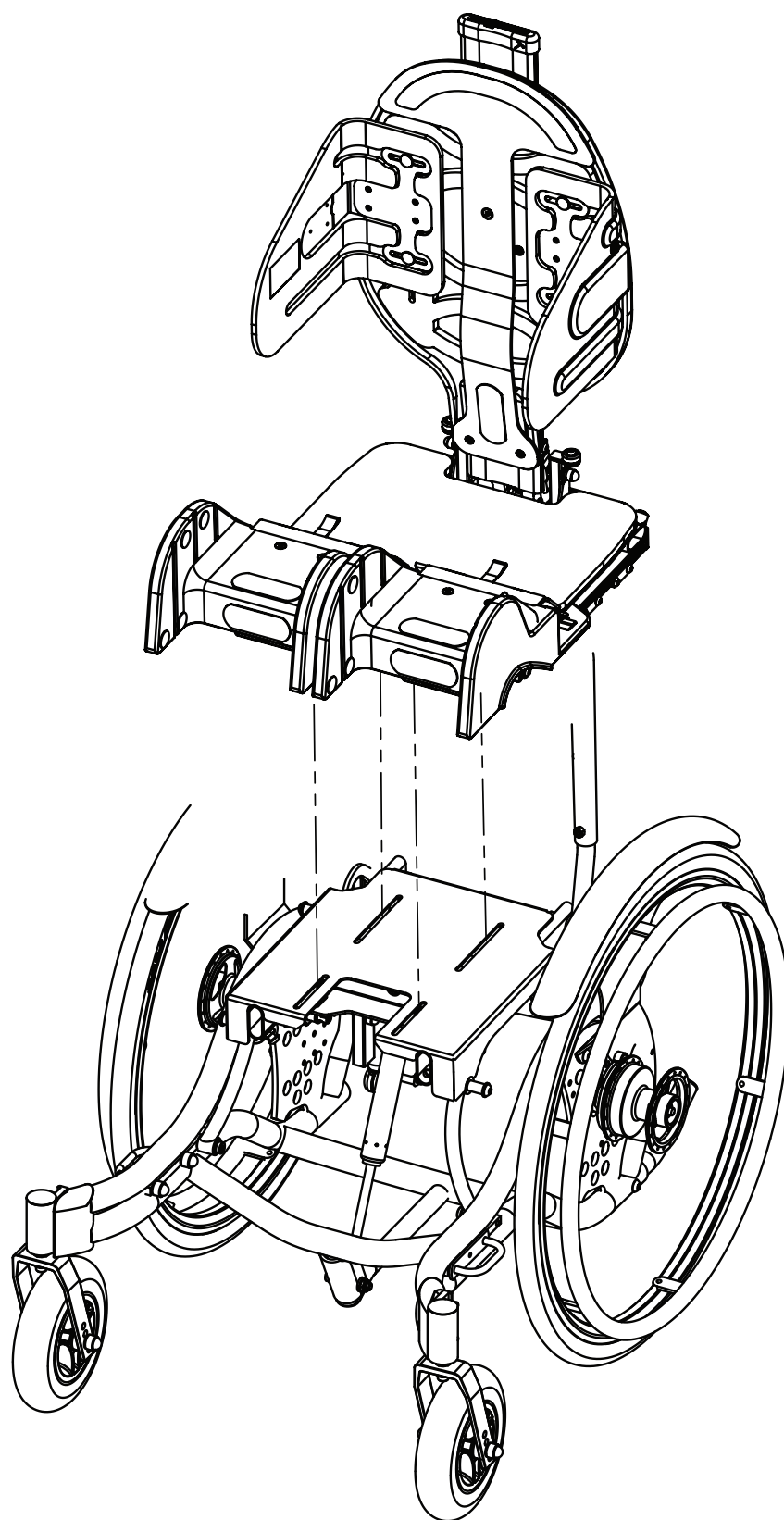

Montering av sittesystem på understell

Montering på understell

Det finnes forskjellige måter å montere sittesystemet på et understell. Under forklares de forskjellige alternativene. Velg den måten som passer deg best.

Fast montering

Fast montering innebærer at man fester sittesystemet direkte mot understellet. Montering på denne måten må skje med medfølgende monteringsatts.

I bunnen på sittesystemet finnes to forskjellige hullbilder for fast montering på understellet. Velg det bildet som er mest passende for en montering med best balanse.




Obs!


Bruk aldri noen annen form for skruer enn de medfølgende. Dette er sikkerhetsdetaljer. Om andre dimensjoner er ønsket, kontakt Bardum AS.

Obs!


Før montering av sittesystem på understell, må plansettet demonteres.

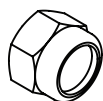


M6 Låsemutter (C)
4 st

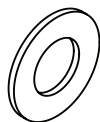

M6 Skive (B)
4 st

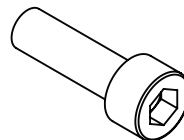

M6 Skrue (A)
4 st

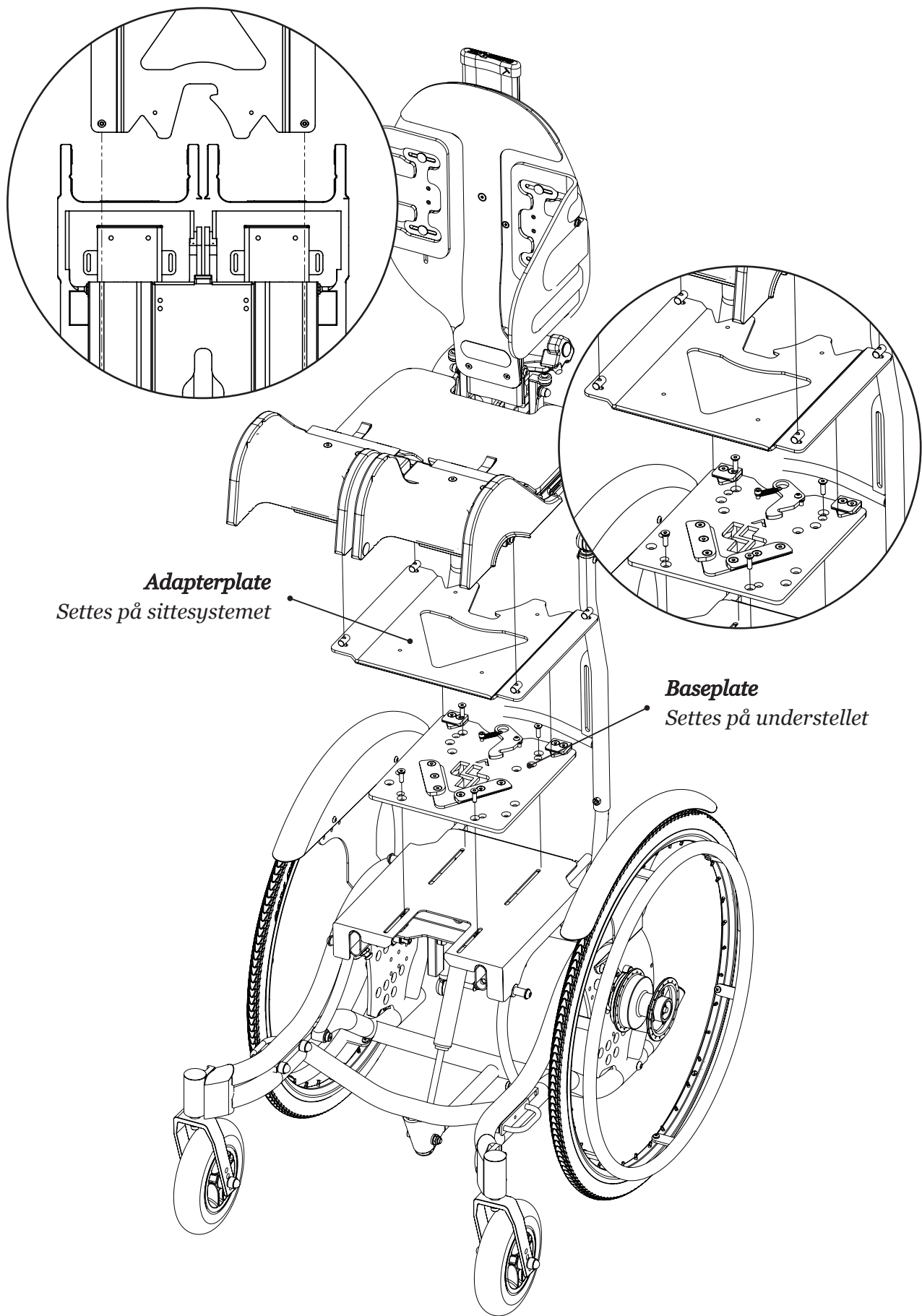

Adapterplate
Settes på sittesystemet

Baseplate
Settes på understellet

Montering av sittesystemet på understellet

Montering på understellet

Det finnes forskjellige måter å montere sittesystemet på understellet. Under forklares de forskjellige alternativene. Velg det som passer deg best.

Montering med adaptersystem

Adaptersystem muliggjør enkel forflytning av sittesystemet mellom ulike understell. Ett adaptersystem består av en adapterplate på sittesystemet, og en baseplate på respektive understell.

Begynn med å montere baseplaten på understellet ved å skru fast den med medfølgende skruer, skiver og muttere.


Monter så adapterplaten ved å skyve tønne-mutterene (A) i de ytterste sporene på sittesystemets underside. Skru til skruene (B) når ønsket posisjon er oppnådd.

Når adapterplate og baseplate er montert på sittesystem og understell, kan de settes sammen. Sittesystemet er korrekt satt sammen når man hører en klikk lyd.




Obs!

Sjekk at sittesystemet sitter skikkelig fast på understellet før det tas i bruk.

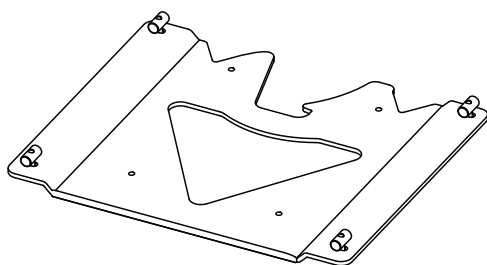

Adapterplate

Monteras på sittesystemet

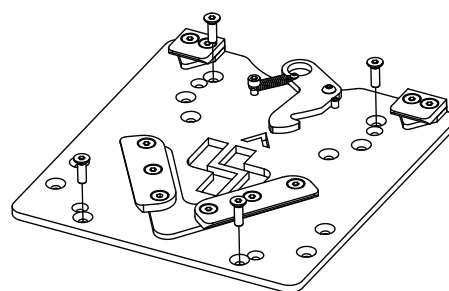

Baseplate

Monteras på understell

Transport i bil

Anvisning for transport i bil


Ved transport i bil med Sharky Pro montert på understell skal anvisninger fra produsenten av understellet følges.

Da Sharky Pro er montert på Seabass Pro skal infestning skje med lastestropper i egne transportfester som vist på bildet nedenfor.



Obs!

Det er viktig og bare strekke lastestroppene, og ikke spenna dem for hardt. For hard spenning av lastestroppene kan forårsake at understellet blir skjevt.

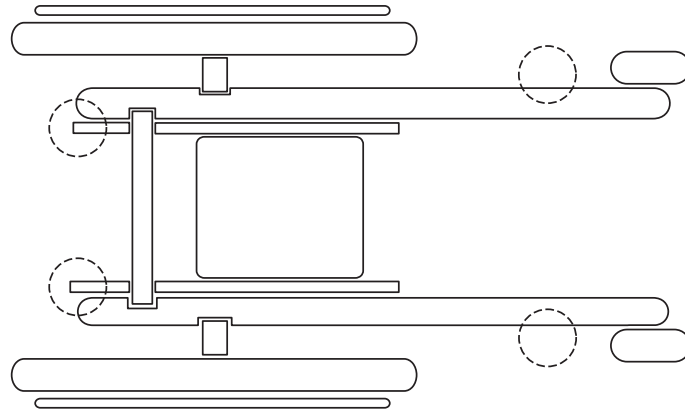

Krasjtestet og godkjent

Sharky Pro er krasjtestet og godkjent etter ISO 16840-4. Denne standard innebærer at sattesystem får monteres på samtlige understell som er godkjent etter ISO 7176-19, med bibeholdt godkjennelse for kombinasjonen.

Obs!

Krasjtestgodkjenningen gjelder brukervekt opp til 75 kg.



Kundeservice

Scandinavia

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicsitt.com

SE

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

DK

Bardum AS

Håndverksveien 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64 91 80 60, Fax +47 64 91 80 66
Email post@bardum.no

NO

Handico Finland OY

Turkkirata 28, FIN-33960 Pirkkala
Tel. +358 331 222 700, Fax +358 331 222 710
Email handico@handico.fi

FI

Europe

Anatomic SITT Nederland BV

Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomicsitt.com

NL

Be Independent Ltd

St Luke's Road G'Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

MLT

Consolor Ltd Unit A3

The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

GBR

Cubro Rehab

PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827

NZL

HandiTech Scandinavian Reha Aids Center

11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

GR

Invaru Ltd

Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

EST

MMS Medical Ltd

51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099

IRL

Mobilitec

Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

PRT

OX Orthopédix

27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789

FR

Ortopedia Castagna Centro Tecnico

Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

IT

Rehatec AG

Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

CH

Stod Hf Stoaekjadmídn

Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjordur
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423

IS

Scan Ideal

28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151

GR

Team Nova Reha

Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

SVN

Via Libre Fundosa Accesibilidad

Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

ES

Asia Pacific and Middle East

Al Safwa Mobility LLC (ASM)

Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

UAE

Paediatric Mobility Equipment

Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010
Email sales@paedmobility.com.au

AUS

Special needs for Special children

48 Mordey Hageatot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

ISR

The Gym & Care

1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

MYS

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsintervallet

For at hjelpemidlet skal fungere trygt og sikkert bør regelmessig service og kontroll utføres. Behovet for service endres, og må bedømmes fra tilfelle til tilfelle helt avhengi av bruk og slittasje. Kontroller bevegelige deler og festedeler med tanke på slittasje. Arbeidet skal alltid utføres fagmessig og av kvalifisert personell. Dersom du kjenner deg usikker er du alltid velkommen til å kontakte Bardum AS.

Rengjøring og vask

Plast og metaldeler kan tørkes av med en fuktig klut, alternativt vaskes med antibakteriell væske eller lignende. Tenk grønt, tenk på miljøet! Benytt gjerne biologisk nedbrytbart vaskemiddel.

Puter, polster og beltepolster vaskes i 60° grader finvask, men får ikke tørketromles. Følg anvisningene på de respektive vaskeetikettene. Samme vaskeregler gjelder for posisjoneringsseler og hoftebelter fra Anatomic SITT AB.

Kontroller hjelpemidlets funksjoner regelmessig og utfør vedlikehold ved behov.

Gassfjæren må aktiveres regelmessig

Gassfjæren må anvendes regelmessig for å beholde sin funksjon. Når produktet ikke benyttes må gassfjæren mins aktiveres en gang pr. sjette måned. Den bør også lagres slik at gassfjæren peker nedover, ellers kan gassfjærens pakninger gå i stykker å fjæren slutter å fungere.

Verktøy

Verktøy (4 mm umbrakonøkkel) er det du behøver for å utføre justeringer. Den finnes i toppen på ryggprofilen.

Garanti

1 år mot fabrikkfeil. For mer informasjon rundt garantien vi gir, se side 58 i denne bruksanvisning.

Kombinasjoner

Zitzi Sharky Pro og dens tilbehør er et CE-merket produkt som kan kombineres med samtlige tilbehør som beskrives i denne bruksanvisning.

Zitzi Sharky Pro passer bl.a. sammen med understell som Zitzi Flipper Pro, Zitzi Seabass Pro, Mika og Flizzy. For øvrige kombinasjoner kontakt Bardum AS.

Reservedeler

For at Zitzi Sharky Pro skal beholde sin CE merking, får hjelpemidlet kun utstyres med reservedeler levert av Anatomic SITT AB.

Resirkulering

Resirkulering av hjelpemidlet får kun gjøres med originaldeler fra Anatomic SITT AB.



Obs!

Kontroller alltid at hjelpemidlet ikke er spesialtilpasset ved resirkulering, før det sendes ut til ny bruker.

Merking

Zitzi Sharky Pro med dens tilbehør er et CE-merket produkt. Et unikt serienummer er plassert på en etikett som sitter under leddhuset. Dette serienummer skal angis ved all korespondanse vedr. produktet.

Gjenvinning

En ødelagt del eller produkt demonteres og kastes. Delene skal skilles etter materialtype, metall, plast og brennbart (tekstiler). Gassfjær sorteres som farlig avfall.

Sammenfatning og etterkontroll

Etterkontroll

Fortsett kontinuerlig å utføre etterkontroll som angis under de respektive punkter. Du bør kontrollere punktene under hver gang brukeren skal benytte produktet.

- Kontroller regelmessig at alle skruer er forsvarlig skrudd til.
- Kontroller regelmessig slitasje på belter og beltepolster.
- Kontroller at balansepunktet på understellet er korrekt.
- Kontroller innstilling på tilbehør, slik at brukeren har en korrekt sitteposisjon.
- Sett ikke brukeren i sittesystemet før du hører en klikk lyd ved montering av sittesystemet på et understell med adaptersystem.

Tilpasning og spesialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang Sharky Pro forandres på noe vis må det gjøres en bedømming på om det er en tilpasning eller en spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innen for rammene for produktets CE-merke. alt annet er spesialtilpassning. Tilpassninger får bare gjøres av den som er kvalifisert for oppgaven, og skal alltid utføres på et faglig sett. At produktet er CE-merket innebærer at det oppfyller alle relevante europeiske sikkerhetskrav.

Observer at en risikobedømming alltid bør gjøres, såvel ved tilpasning som ved spesialtilpassning, av ett hjelpemiddel. Produktet må aldri bli farlig å bruke for brukeren etter tilpasning.

Produktet bør utrustes med opplysning om at det er tilpasset til en spesifikk bruker, slik at den ikke kan sammenblandes med et produkt i standardutførelse.

Tilpassninger som gjøres på Sharky Pro

Observer at en riskikobedømming alltid bør gjøres, såvel ved tilpasning som ved spesialtilpassning, av ett hjelpemiddel. Produktet må aldri bli farlig for brukeren å bruke etter tilpasning.

Kapping av fotstøtteprofiler

Fotstøtteprofilens lengde kan kuttes i for å bedre tilpasses brukeren.

Kapping av armstøtteprofiler (armstøtte fra sits)

Armstøtteprofilens lengde får kuttes ned. Profilen får bare kuttes i nedkant (mot sitsen) og hull for sikkerhetsstopp må borres og gjenges M5.

Disse hull borres slik at sikkerhetsstoppet kan monteres i profilens spor, minst 10 mm fra profilkanten.

Kapping av ryggstøtteprofilen

Ryggstøtteprofilens lengde får kuttes ned. Profilen får aldri være kortere enn at samtlige fester til ryggplaten går an å montere på denne. Spor for korsryggsjustering må alltid ha minst 10 mm til profilkanten.

Salgsvilkår

Garanti

Garanti gjelder ett (1) år mot fabrikkasjonsfeil fr.o.m. leveransdato.
Garantien gjelder ikke for ytre påvirkninger eller unormal håndtering.
For garantibehandling kreves feilaktig vare i retur. Vedlegg alltid følgeseddel.

Reklamation

Beskriv feilen samt årsak så inngående som mulig. Gjelder forespørselen
garantireparasjon eller eventuelt garantiutbytte. Vedlegg en kopi av fakturaen
og angi at produktet skal tilbake til deg etter reparasjon.
Angi leveranseadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Pakk produktet vel for og beskytte det mot eventuelle støt ved transport.
Glem ikke og notere sendingsnummer eller lignende på dine dokumenter.
Dette er for at du skal kunne spore sendningen om noe skulle hende under
transporten.

Returer

Feilbestilte eller feillevererte varer skal returneres innem 20 dager fra
leveransdato. Vedlegg alltid en kopi på både følgeseddel og faktura.
Angi årsak til retur av dine varer.

Glem ikke og notere sendingsnummer eller lignende på dine dokumenter.
Dette er for at du skal kunne spore sendningen om noe skulle hende under
transporten.

Ved retur senere enn 20 dager fra leveransdato

Gjøres ett returavdrag på 80 % av fakturaverdien

Ved retur senere enn 60 dager fra leveransdato

Gjøres ett returavdrag på 60 % av fakturaverdien

Ved retur senere enn 150 dager fra leveransdato


Gjøres ett returavdrag på 40 % av fakturaverdien

Senere enn 360 dager fra leveransdato

Varene tas ikke i retur.

▲ **Spesialtilpassede produkter tas ikke i retur**

Tekniske data

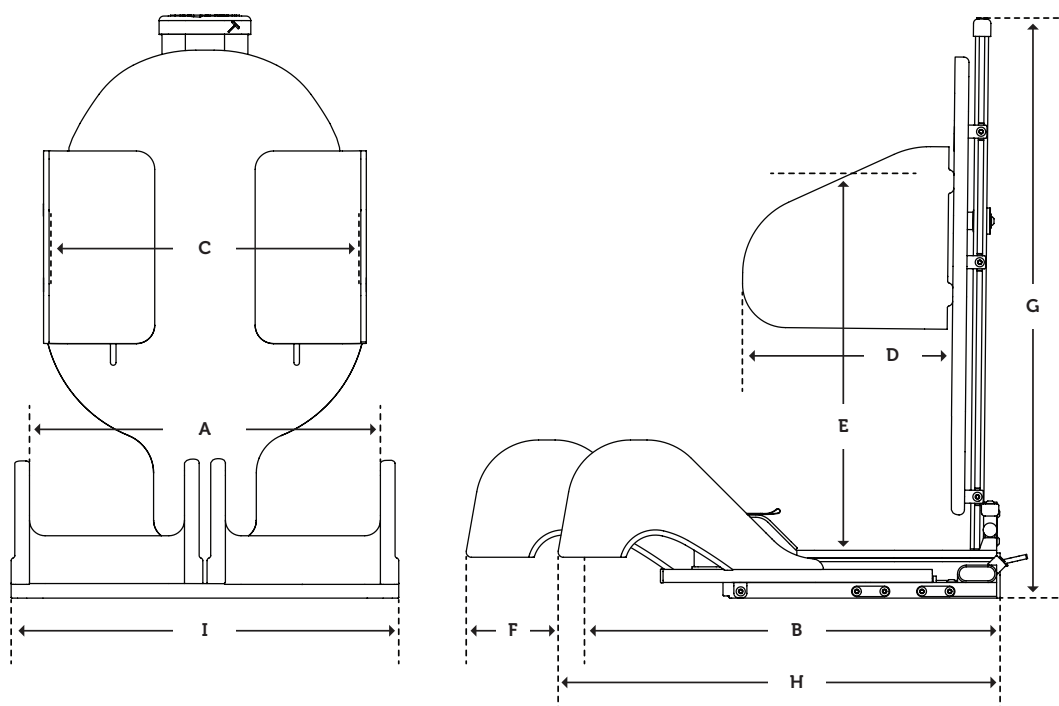

Brukerdata	Størrelse 1	Størrelse 2
Brukerlengde	150–180 cm	170–195 cm
Setebredde (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 49 cm
Sittedybde (B)	37–47 cm	45–55 cm
Bolbredde (C)	27–35 cm	30–38 cm
Boldybde (D)	21 cm	25 cm
Axillehøyde (E)	35–50 cm	40–55 cm
Benlengdeforskjell (F)	10 cm	10 cm
Abduksjon/Aduksjon	18° / 9°	18° / 9°
Produktdata	Storlek 1	Storlek 2
Brukervekt	130 kg*	130 kg*
Høyde (G)	67 cm	77 cm
Lengde (H)	52–62 cm	62–72 cm
Bredde (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Vektt	14 kg	
Ryggvinkel	-10° / +25°	-10° / +25°

* Krasjtesten er gjort på brukervekt opp til 75 kg.

SE

Anatomic SITT AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Besøksadresse

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

NO

Bardum AS

Håndverksveien 8, N-1405 Langhus, Norway

Tel +47 64 91 80 60

Faks +47 64 91 80 66

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt



Bardum

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus