


Bruksanvisning

Zitzi Guppy

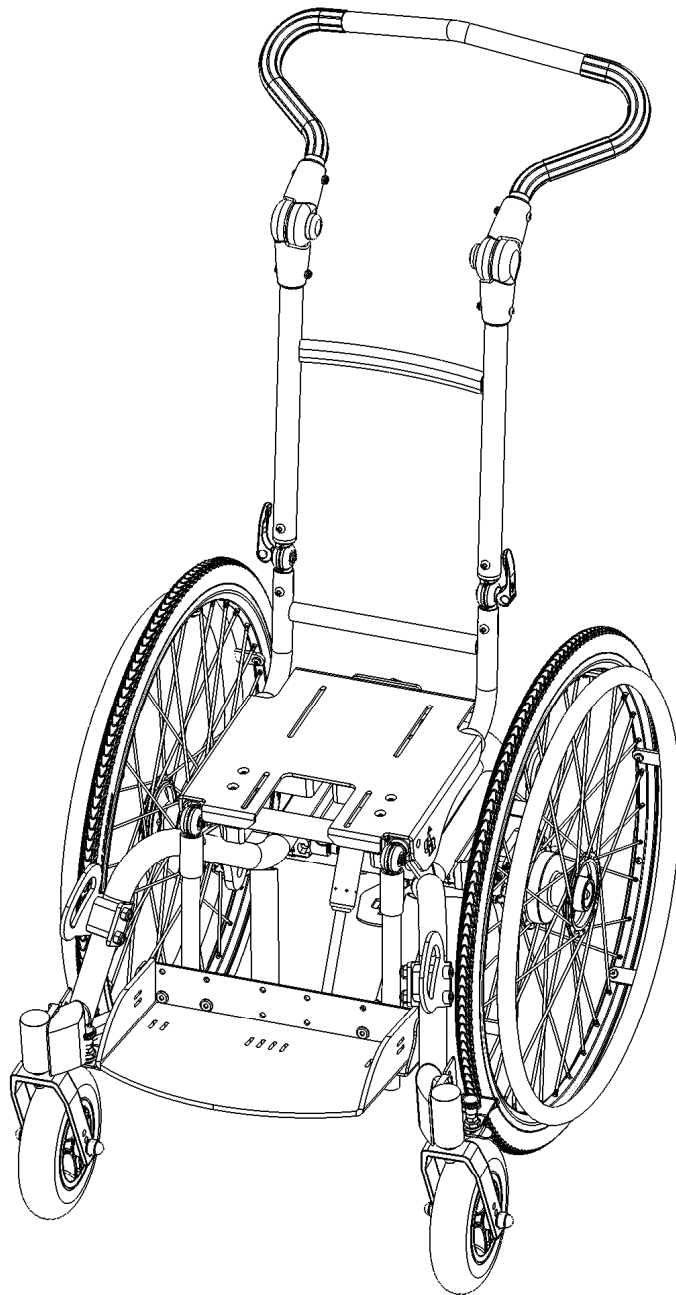

Bruksanvisning

ZITZI GUPPY



Obs!

Kryssa i rutan ovan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen *upphör* att gälla vid specialanpassad produkt.



Produkten är endast avsedd att användas som ett *underrede* tillsammans med *sittsystem* producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om *annan användning* finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Bardum

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus

Säkerhetsföreskrifter

Inledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Guppy till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Anpassning/inprovning av Zitzi Guppy ska alltid utföras av medicinskt behörig person. Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som ett underrede tillsammans med sittsystem producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Korrespondens

Zitzi Guppy med dess tillbehör är en CE-märkt produkt. Ett unikt serienummer är placerat på en etikett som sitter på underredets rörarm. Detta serienummer skall anges vid all korrespondens gällande produkten.

Krocktestad & godkänd

Zitzi Guppy är krocktestad och godkänd enligt 7176-19 för 70 kg i bil.



Obs!

Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.

Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Telefon 011-161800

Fax 011-162005

E-post info@anatomicsitt.com

Web anatomicsitt.com

Instruktionsfilmer youtube.com/anatomicsitt

Följ oss på facebook.com/anatomicsitt

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	3	Frigöring hjul.....	17
Inledning	3	Felsökning av trumbroms.....	17
Sittdel	6	Montering av trumbroms.....	19
Montering av fästplatta.....	6	Parkeringsbroms	20
Tilt	7	Montering av parkeringsbroms.....	20
Sitstiltning	7	Att använda parkeringsbroms.....	20
Armstöd från ryggrör	9	Fotstöd	21
Höjdjustering	9	Montering av fotstöd.....	21
Breddjustering	9	Säkerhetsstopp.....	21
Vinkeljustering uppåt/nedåt	9	Justering av vinkel vid knäleden.....	21
Körbåge	11	Justering av fotstödet höjd.....	21
Montering av körbåge	11	Vadstöd	22
Höjdjustering av körbåge	11	Montering av vadstöd	22
Djupjustering av körbåge	11	Höjdjustering av vadstöd.....	22
Vinkeljustering av körbåge.....	11	Breddjustering av vadstöd	22
Vinkeljustering av körbågshandtag	11	Tippskydd	23
Fällning av körbåge	11	Montering av tippskydd.....	23
Hjul	12	Att använda tippskydd.....	23
Montering av drivhjul med quick-release	12	Tramprör	24
Demontering av drivhjul med quick-release... 12		Montering av tramprör.....	24
Drivhjul	13	Att använda tramprör.....	24
Drivhjulspacering	13	Transportfästen	26
Länkhjul	14	Montering av främre transportfästen.....	26
Montering av länkhjul på rullstolsram	14	Montering av bakre transportfästen.....	26
Montering av länkhjul på länkhjulsgaffel.....	14	Montering av säkerhetsbygel	26
Länkhjulspaceringar.....	14	Att använda transportfästen	26
Injustering av länkhjulsgaffel	15	Färdriktningsspärr	28
Vinkeljustering av länkhjulsgaffel	15	Montering av färdriktningsspärr	28
Broms	17	Aktivering av färdriktningsspärr	28
Användning av trumbroms.....	17	Frigöring av färdriktningsspärr.....	28
Låsning av hjul	17		

Stänkskärm	29	Lack	34
Montering av stänkskärm	29	Stabilitet	35
Justering av stänkskärm	29	Rörstomme och detaljer	35
Transport i bil	31	Framgafflar.....	35
Anvisningar för transport i bil	31	Körbåge och körhandtag	35
Krocktestad och godkänd	31	Bromsar.....	35
Underhåll och skötselanvisningar	32	Ihopfällningsmekanism och tilt.....	35
Serviceintervall	32	Funktionskontroll	35
Rengöring och tvätt	32	Anpassning och specialanpassning	36
Gaskolv.....	32	Rekommendationer.....	36
Garanti	33	Riskanalys.....	36
Kombinationer.....	33	Märkning.....	36
Reservdelar	33	Försäljningsvillkor	37
Märkning.....	33	Garanti	37
Återvinning	33	Reklamation	37
Rekonditionering	34	Returer	37
Inledning	34	Kundservice	38
Rengöring.....	34	Tekniska data	39
Efterbehandling.....	34		
Märkning.....	34		
Hjul.....	34		

Sittdel

Montering av fästplatta


Sittsystemets fästplatta monteras enkelt på underredet genom fyra (4) skruvar, brickor och muttrar i markerade spår (A) på underredets sittplatta.

Placera sittsystemets fästplatta (B) på underredets sittplatta (C) och stick igenom medföljande skruv (D). Möt sedan upp med bricka och mutter (F) på undersidan av underredets sittplatta. Dra åt skruvarna (D) ordenligt.



Tips!

Bilden visar endast en typ av fästplattas monteringsanvisning. För ytterligare information kring fästplattor, se respektive bruksanvisning för valt sittsystem.

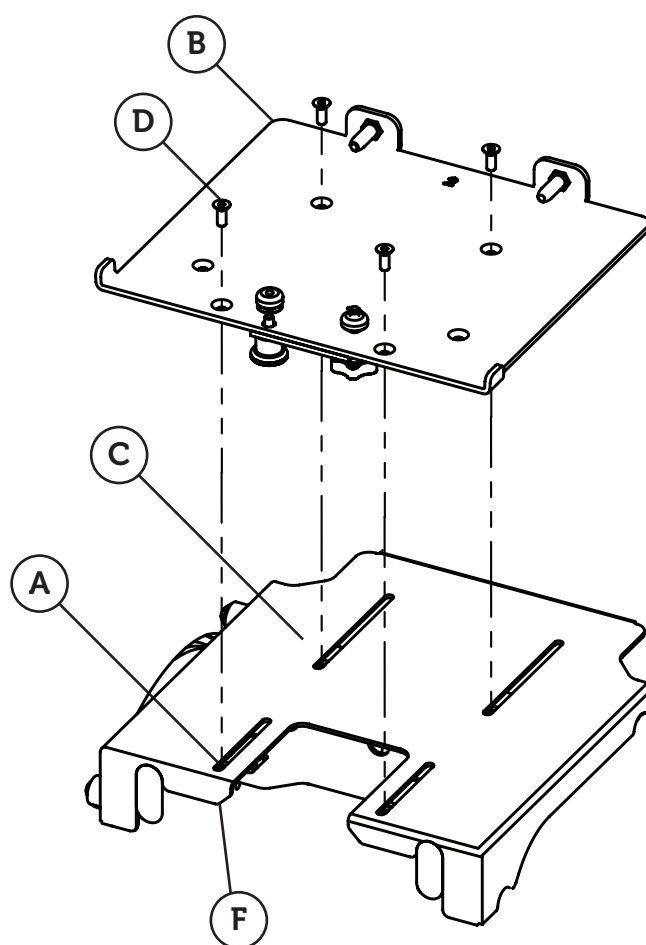

Tilt

Sitstillning

Sittplattans vinkel är reglerar mellan 0–32°. För att tilta underredet trycker du in reglaget (A) samtidigt som du håller i körbågen med ena handen och trycker nedåt/framåt. Släpp sedan reglaget (A) när du uppnått önskad tilt.

För att återställa sitsvinkeln till ursprungsläge, tryck in reglaget (A) och dra körbågen uppåt och bakåt genom att hålla i körbågens/körhandtagens handtag.




Obs!



Var uppmärksam på eventuell klämrisk vid tiltning av sitsen.



Obs!

Var uppmärksam på eventuell ökad tipprisk vid tiltning.

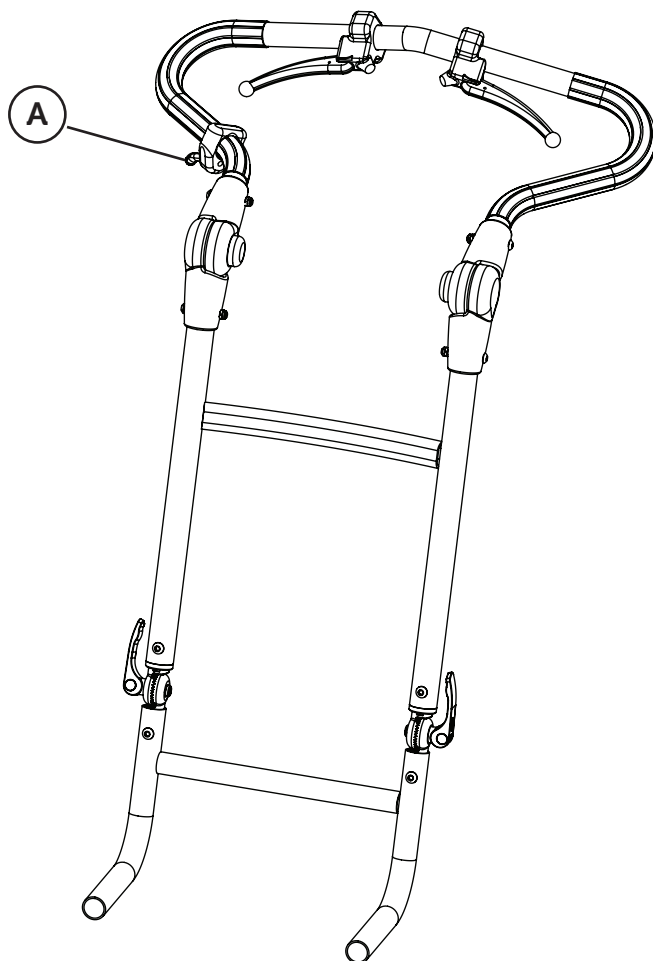

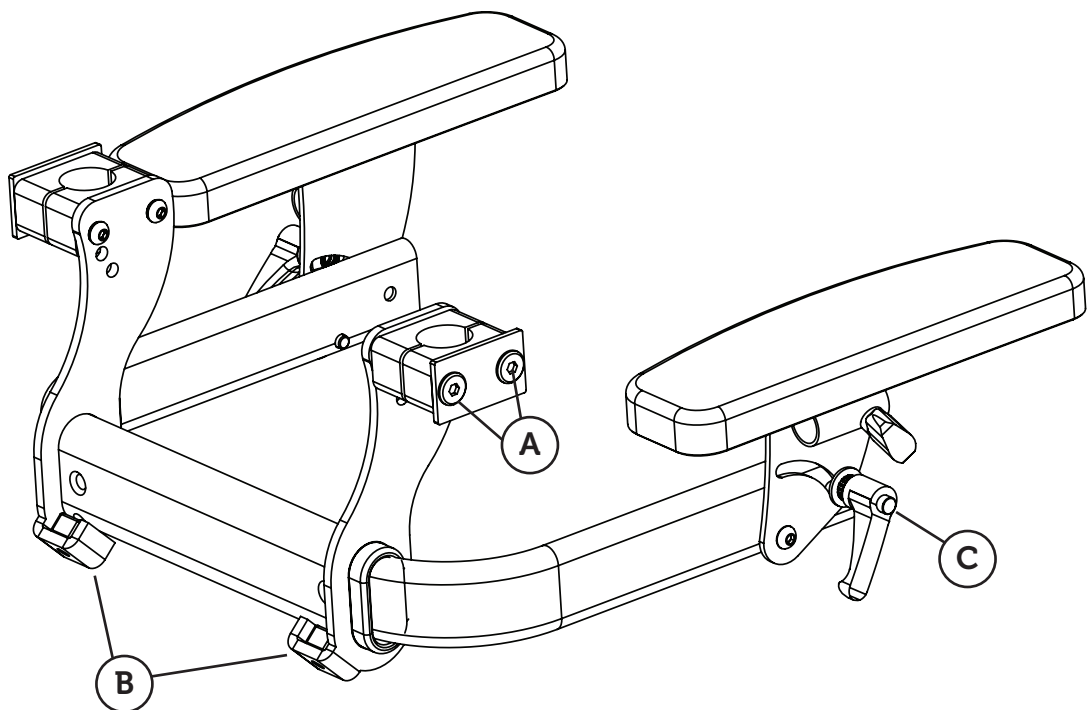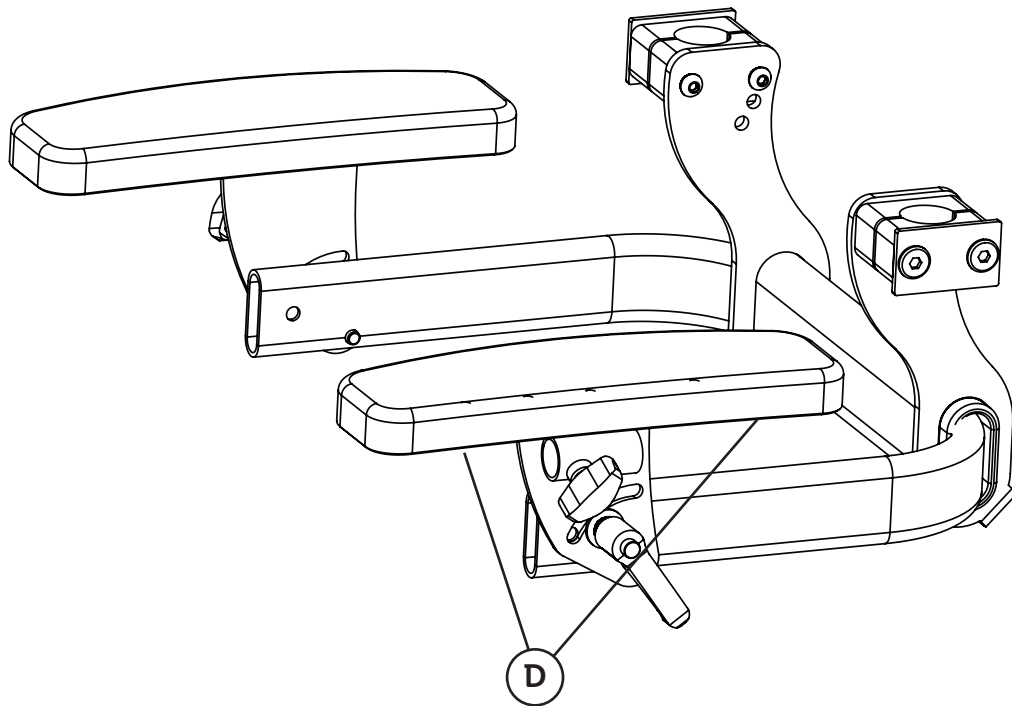

Armstöd från ryggrör

Montering på underrede

Skruva ut skruvarna (A) helt på båda sidor. Montera klämfästet runt körbågen. Sätt tillbaka skruvarna (A) och dra åt.

Höjdjustering

Lossa skruvarna (A) lite och justera till önskad höjd. Dra åt skruvarna.

Breddjustering


Lossa skruvarna (B) lite och justera till önskad bredd. Dra åt skruvarna.

Vinkeljustering uppåt/nedåt

För vinkeljustering av armstödsplattan, lossa vred (C) lite och justera till önskad vinkel. För att kompensera vid vinkel på körbågen kan man också ställa vinkeln i fästet. Lossa den bakre av skruvarna (A) helt och justera vinkeln med hjälp av de 3 hålen i fästet.

Djupjustering av armstödsplatta

Lossa skruvarna (D) under armstödsplattan och flytta till önskat djup med hjälp av hålen under plattan.

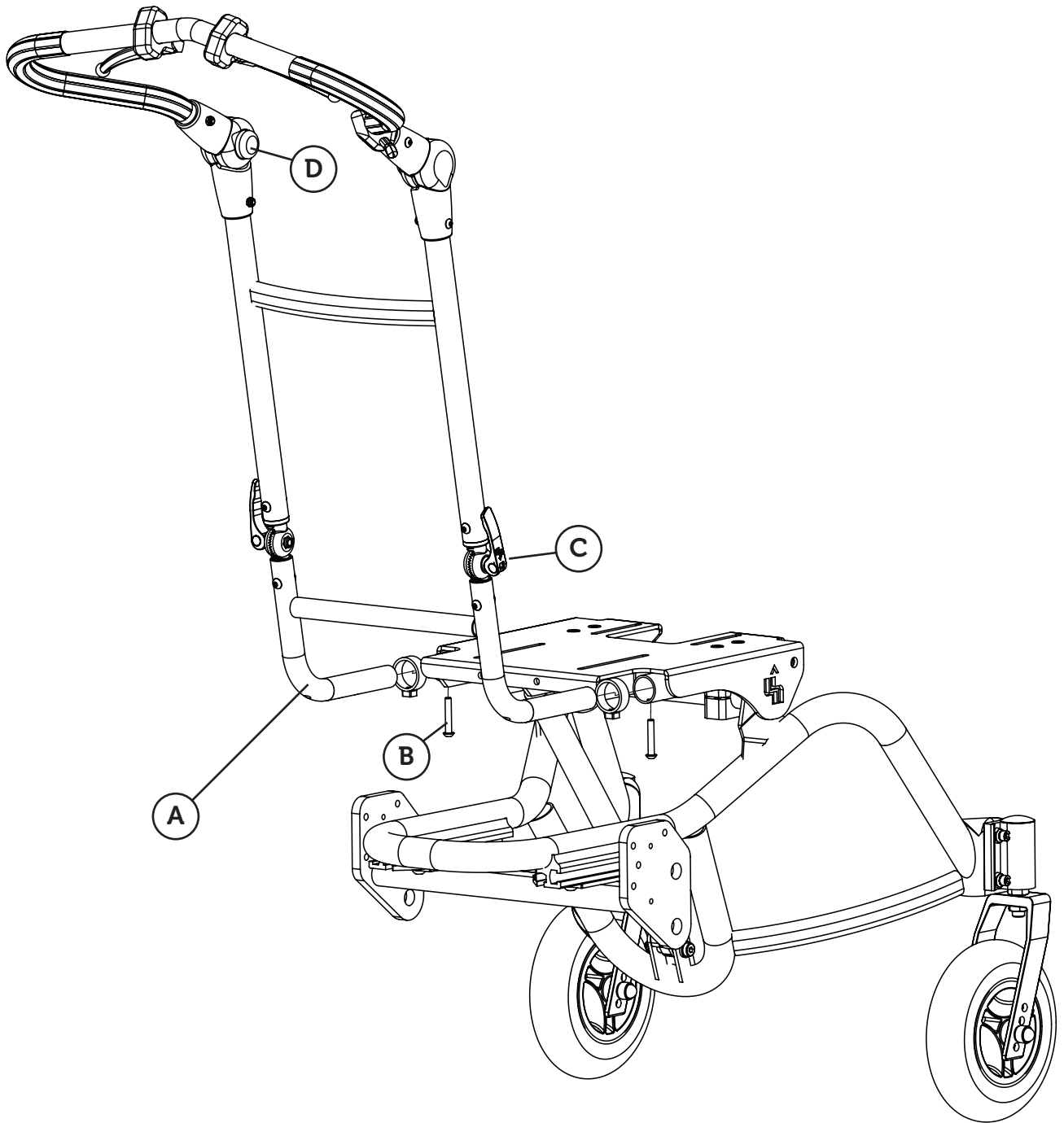

Körbåge

Montering av körbåge

För in körbågsinfästningen (A) i avsedda hål under sittdelsplattans bakre del på underredet och dra sedan åt skruvarna (B). Det finns fyra fasta lägen att välja på.

Djupjustering av körbåge

För att djupjustera körbågen (förlänga sittdjupet) lossar du skruvarna (B), under sittplattans bakre del och flyttar sedan körbågen till önskat djup. Dra sedan åt skruvarna (B).



Notera!

Skruven ska passa in i ett av de fyra fasta lägen som finns på körbågen.

Vinkeljustering av körbåge

Körbågen kan vinkeljusteras efter typ av sittsystem. Frigör låsningen av körbågen genom att lossa båda spakarna (C) och justera sedan till önskad vinkel. Dra sedan åt spakarna (C).



Obs!

Körbågen ska alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid transport i fordon.

Vinkeljustering av körbågshandtag

För att vinkeljustera körbågens körhandtag trycker du in knapparna (D) på insidan av körbågsledningarna och justerar sedan till önskad vinkel.

Fällning av körbåge

Lossa båda spakarna (C) och fäll körbågen framåt. Dra sedan åt spakarna (C) igen.

Hjul

Montering av drivhjul med quick-release

Drivhjulen kan enkelt monteras på och av genom dess quick-releasefunktion. Detta kan vara användbart vid exempelvis transport av underredet.

För att montera drivhjulen (A) håller du in tryckknappen (B) som är centrerad i navet på quick-release axeln och skjuter in drivhjulet (A) till det tar stopp. Nu kan du släppa tryckknappen (B). Säkerställ att drivhjulet hamnat i låst läge genom att dra försiktigt i drivhjulet utan att hålla in tryckknappen (B).




Obs!

Säkerställ att hjulen är i låst läge efter användning av quick-releasefunktionen.

Demontering av drivhjul med quick-release

För att montera av drivhjulen från underredet håller du in tryckknappen (B) som är centrerad i navet och drar sedan ut hjulet.

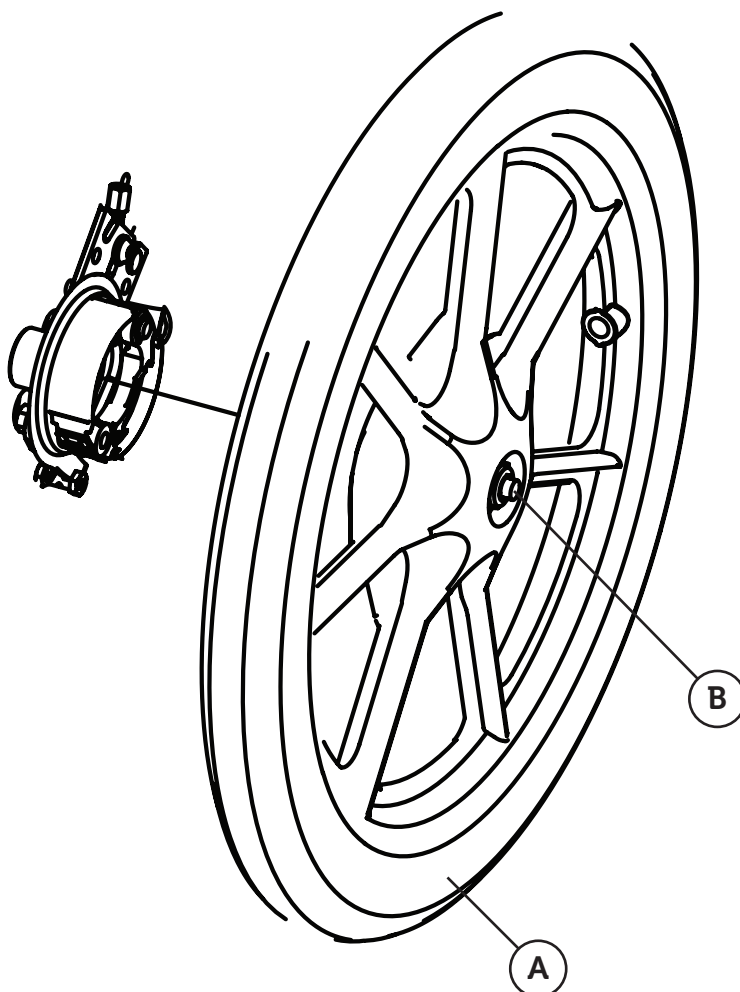

Drivhjul

Drivhjulsplacering

För att erhålla korrekt tyngdpunkt kan drivhjulet justeras steglöst i djupled beroende på sittsystemets placering på underredets sittplatta.

För att justera hjulet i djupled så släpper du på fyra stycken skruvar (A) på undersidan av hjulaxeln och justera till önskat djup. Kontrollera med tex. linjal eller tumstock att hjulaxeln sitter på samma djup på båda sidor.

16" hjul monteras i hål B + C.

20", 22" och 24" monteras i hål D + E.




Obs!

Tänk på att förändring av drivhjulsplacering kan öka tipprisken.



Obs!

Skruvorna ska inte skruvas ut helt utan bara släppas lite på.

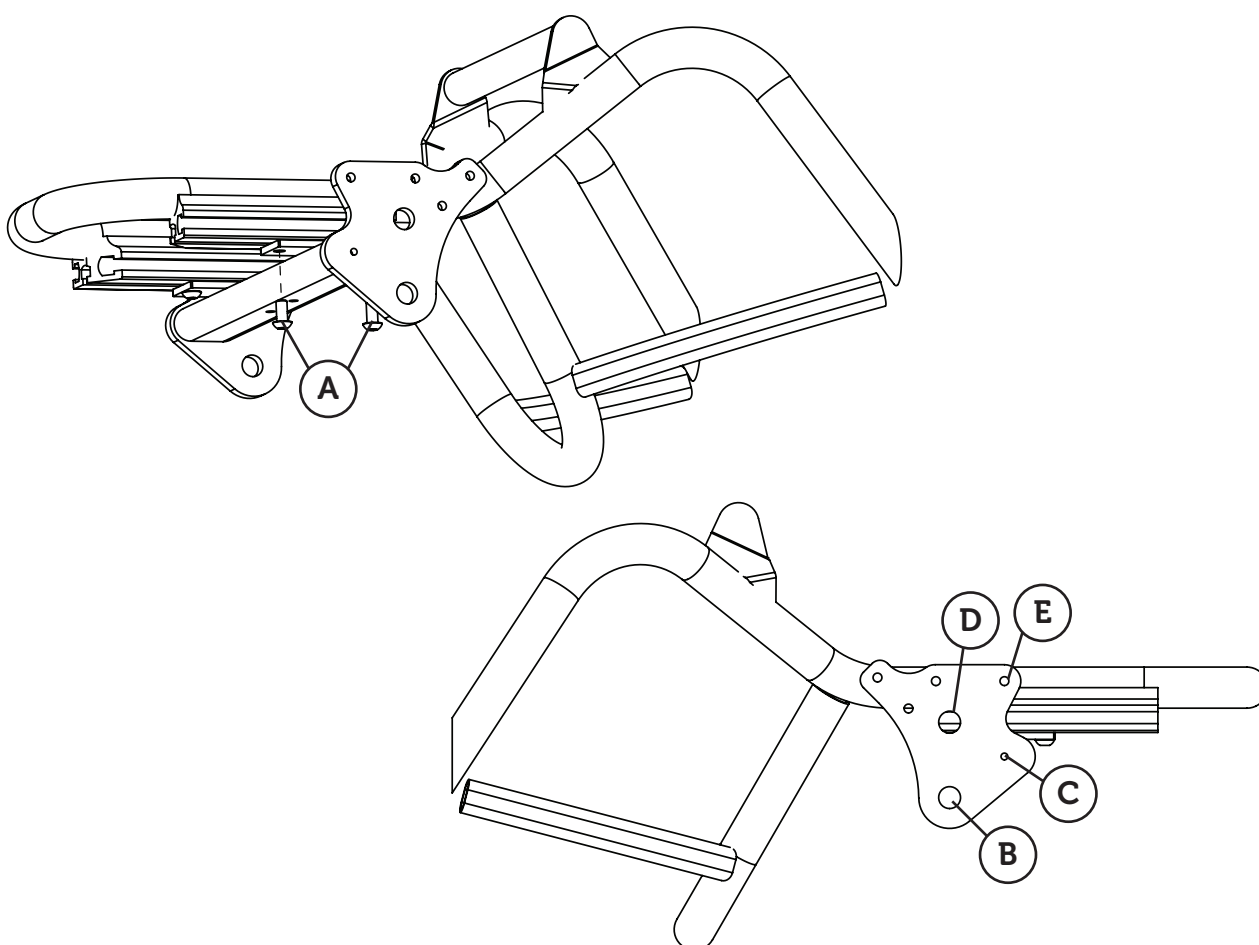

Länkhjul

Montering av länkhjul på rullstolsram

För in sargsprinten (A) i avsett hål på undersidan av rullstolsramen i länkhjulskutsen enligt bild. Montera sedan länkhjulet med hjälp av skruv (B), bricka (C) och excentermutter (D) och dra åt.

Montering av länkhjul på länkhjulsgaffel

Välj mellan fem (5) olika länkhjulsplaceringar och montera sedan länkhjulet (F) med hjälp av medföljande hjulaxel (G), bricka (H) och låsmutter (I) i önskat infästningshål på länkhjulsgaffeln (K).

För upp länkhjulet (F) i länkhjulsgaffeln (K) enligt bildbeskrivning. Sätt en bricka på hjulaxeln (G) och stick sedan igenom den i önskat hål på länkhjulsgaffeln. Möt sedan upp på motsatt sida med bricka (H) och låsmutter (I). Dra åt muttern. Avsluta sedan med att sätta dit mutterkåporna (J) över låsmuttern.

Länkhjulsplaceringar


Länkhjulet kan placeras i fem (5) olika höjdpositioner.

Detta gör att du kan justera länkhjulens höjd efter val av drivhjulspacering.



Obs!

Tänk på att dra åt skruvarna ordentligt efter justering av länkhjulsplacering.

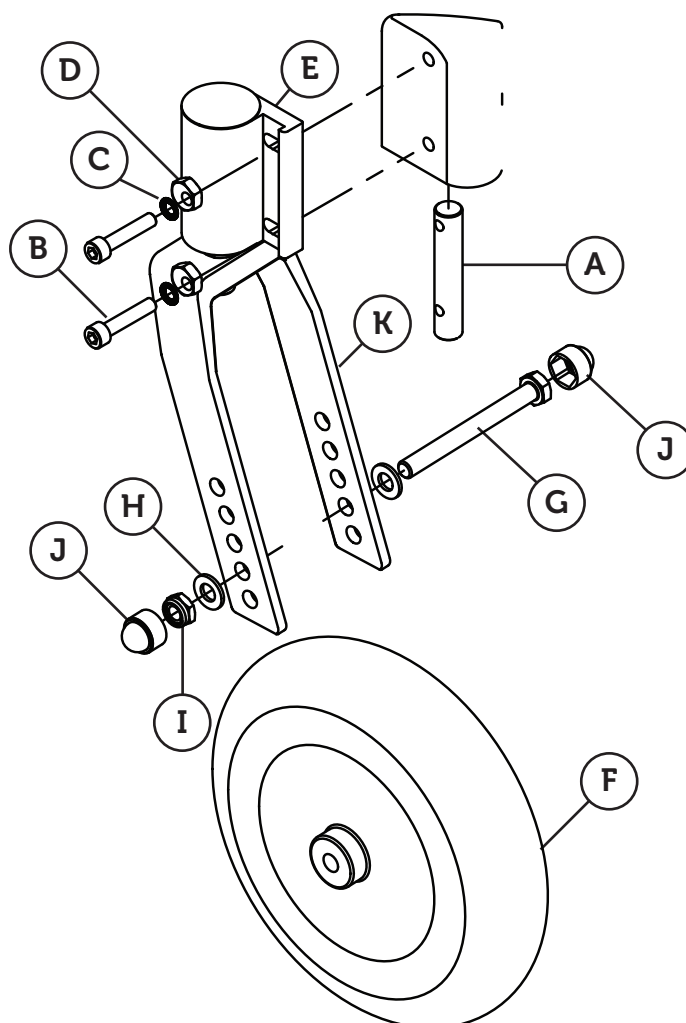

Länkhjul

Injustering av länkhjulsgaffel

Om rullstolen inte rullar som den ska kan du behöva justera länkhjulsgaffeln (A). Detta kan uppstå om man justerat länkhjulsposition utan att justerat in länkhjulsgaffeln (A).

Det streckade området på bilden visar att länkhjulsinfästningsens (B) position ska vara 90° i förhållande till markytan.

Vinkeljustering av länkhjulsgaffel


För att vinkeljustera länkhjulsgaffeln lossar du och roterar de excentriska muttrarna (C) på länkhjulsinfästningen (B) tills korrekt vinkel erhålls.



Var noga med ett dra åt muttrarna när injustering av länkhjulsgaffeln är uppnådd.



Obs!

Tänk på att dra åt muttrarna ordentligt efter injustering av länkhjulsgaffeln.

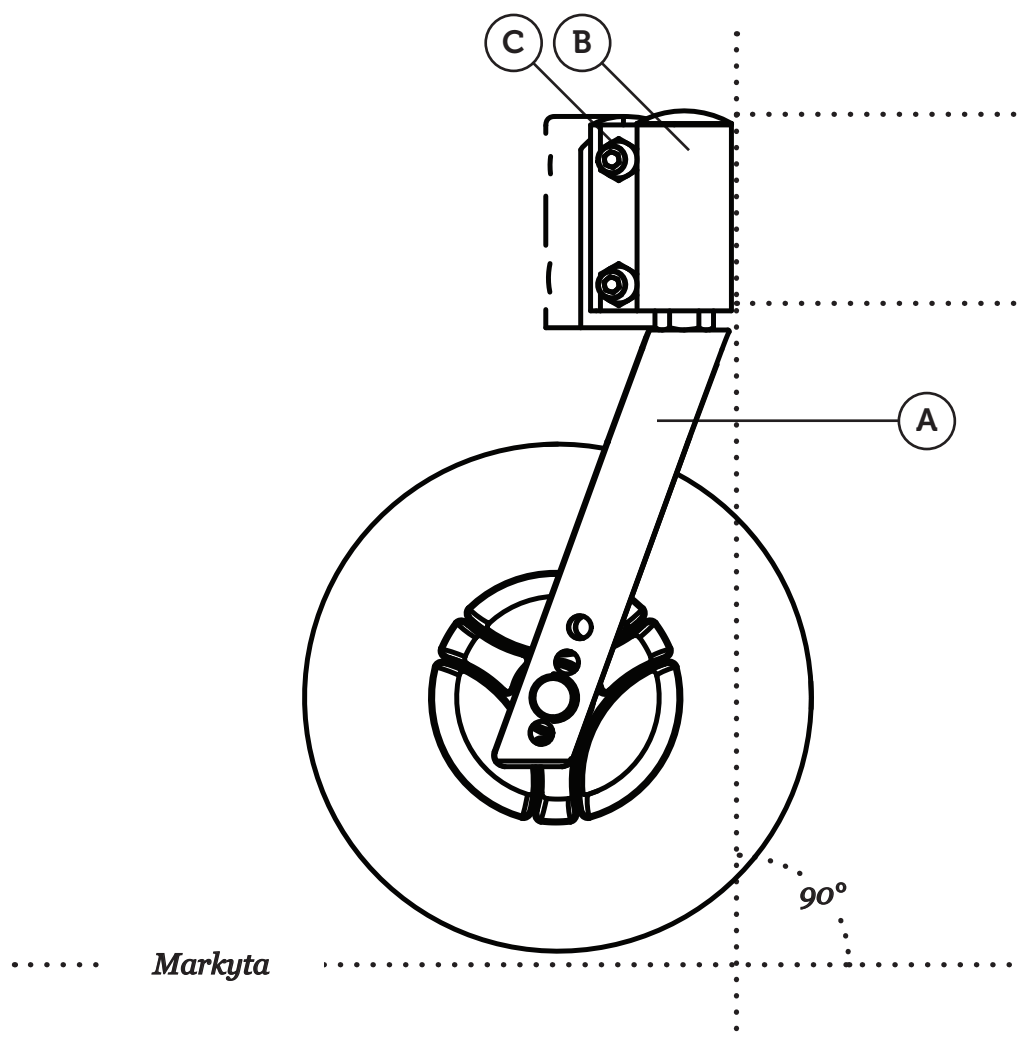

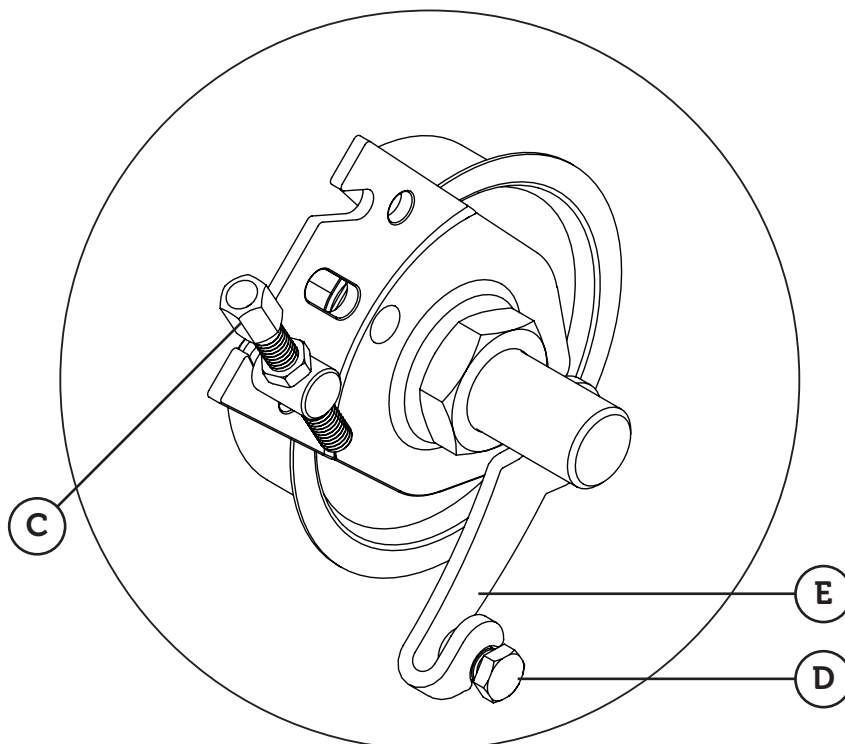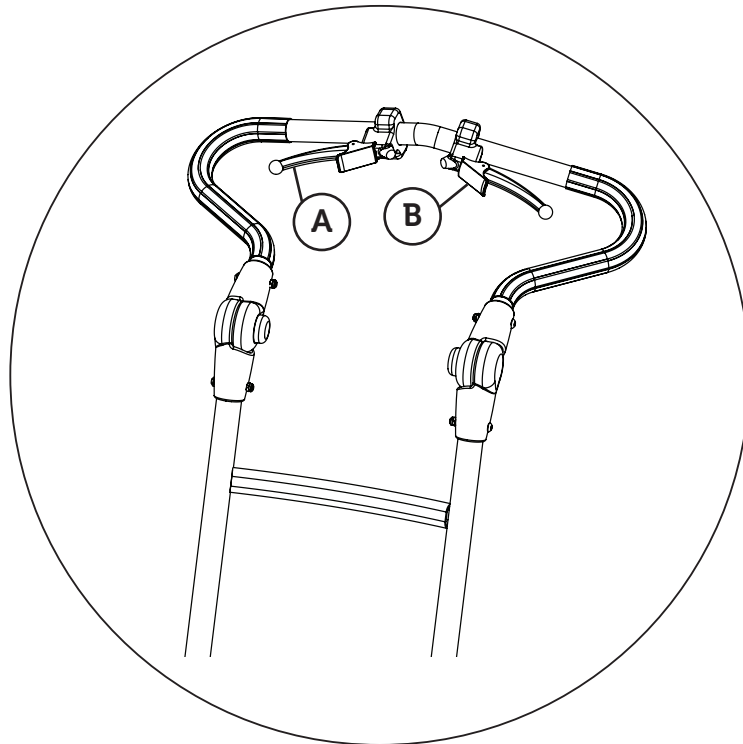

Detaljvy trumbroms

Broms

Användning av trumbroms

Underredet är utrustat med trumbroms som manövreras av vårdaren. Kontrollera alltid att bromsarna fungerar innan användning.

Tryck in höger bromshandtag (A) samtidigt som du för underredet framåt. Bakhjulet ska då bromsa och ej rulla. Bromshandtaget (A) ska ej gå att pressa ända in mot körhandtaget, utan det ska vara ett glapp på 5–10 mm mellanrum.

Upprepa sedan ovanstående procedur fast med vänster bromshandtag.

Låsning av hjul

För att aktivera låsning av hjul trycker du in bromshandtaget (A) och skjuter fram den röda låsspaken (B) till önskat läge.


Frigöring hjul

För att frigöra låsning av hjul trycker du in bromshandtaget (A) och den röda låsspaken (B) släpps automatiskt. Släpp sedan bromshandtaget (A).

Felsökning av trumbroms

Om bromsarna inte fungerar ska du först kontrollera att bromsvajern har korrekt spänning. Om vajern har en låg spänning, kan det räcka med att spänna den igen genom att skruva upp skruv (C). Om justering av skruv (C) inte räcker kan du prova nedanstående snabbguide för ompänning av bromsvajer.

- 1)** *Skruva in skruv (C) i bottenläge*
- 2)** *Lossa mutter (D)*
- 3)** *Pressa ihop bromsen genom att lyfta trumbromsarmen (E) och flytta mutter (D) något längre upp på vajern*
- 4)** *Lås mutter (D) och finjustera sedan spänningen med skruv (C)*

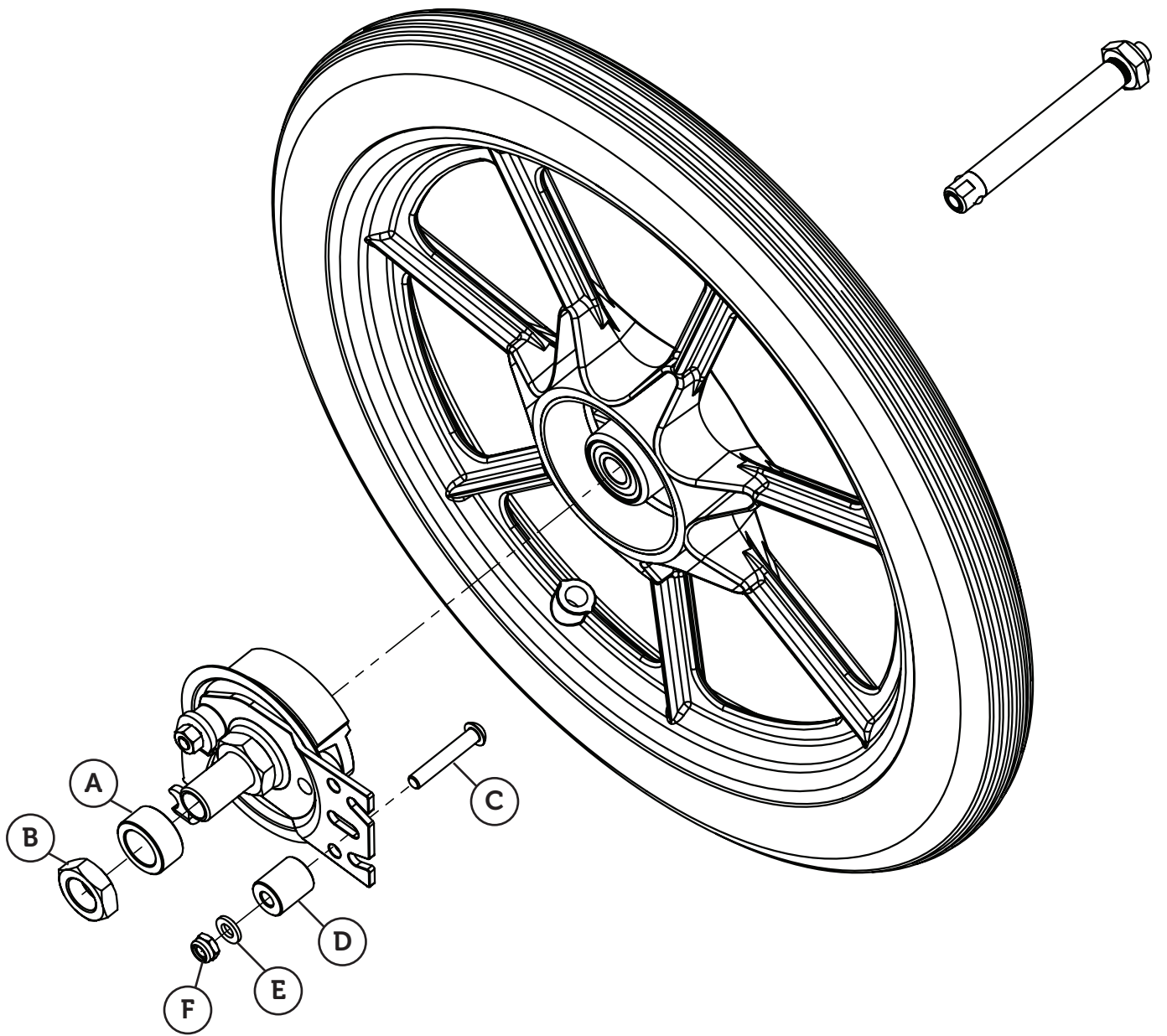

Broms

Montering av trumbroms

För att montera trumbromsen behöver du ta loss drivhjulet från rullstolen genom att trycka in knappen på quick-releaseaxeln och dra hjul och axel ut från trumbromsen.

Montera sedan trumbromsen på rullstolsramen genom att trä den stora distansen (A) över trumbromsens gänga och stick sedan in gängan genom avsett hål i den position du önskar. Fäst med den stora muttern (B) på insidan av ramens sidoplåt och dra åt något. Det är viktigt att du inte drar åt fullt ut.

Ta sedan skruven (C) och stick den genom det avlånga hålet för rotationsspärr i bromstrumman, in genom den lilla distansen (D) och genom hål i ramsidan.

Fäst med bricka (E) och mutter (F) på insidan av ramens sidoplåt. Dra åt båda muttrarna (B) och (F) så att bromstrumman sitter fast ordentligt.

Stick sedan tillbaka quick-releaseaxeln med hjulet och tryck in tills hjulet fäster. Testa genom att dra hjulet lätt utåt (utan att trycka på quick-releaseknappen).



Notera!

Vid val av 16" drivhjul så gängas skruven (C) direkt i plåten.



Obs!

Mutter (B) (och skruv C vid val av 16") ska fästas med gänglåsning tex. Loctite 243 eller motsvarande.



Notera!

För ytterligare information kring hur du använder quick-release, se sida 14-15.



Notera!

Monteringsprincipen av trumbroms är den samma oavsett hjulstorlek.

Parkeringsbroms


Montering av parkeringsbroms

Parkeringsbromsfästet monteras enligt bild i avsedd hålbild på rullstolsramens sidostycke med medföljande skruvar (A), brickor (B) och muttrar (C).

Justera in parkeringsbromsen (D) vid behov genom att lossa skruvarna (E) och flytta sedan parkeringsbromsen (D) framåt eller bakåt i spåret. Dra sedan åt skruvarna (E) när önskad position är uppnådd.

Att använda parkeringsbroms

Lås parkeringsbromsen (D) genom att trycka parkeringsbromsarmen framåt. Dra parkeringsbromsarmen bakåt för att frigöra parkeringsbromsen.

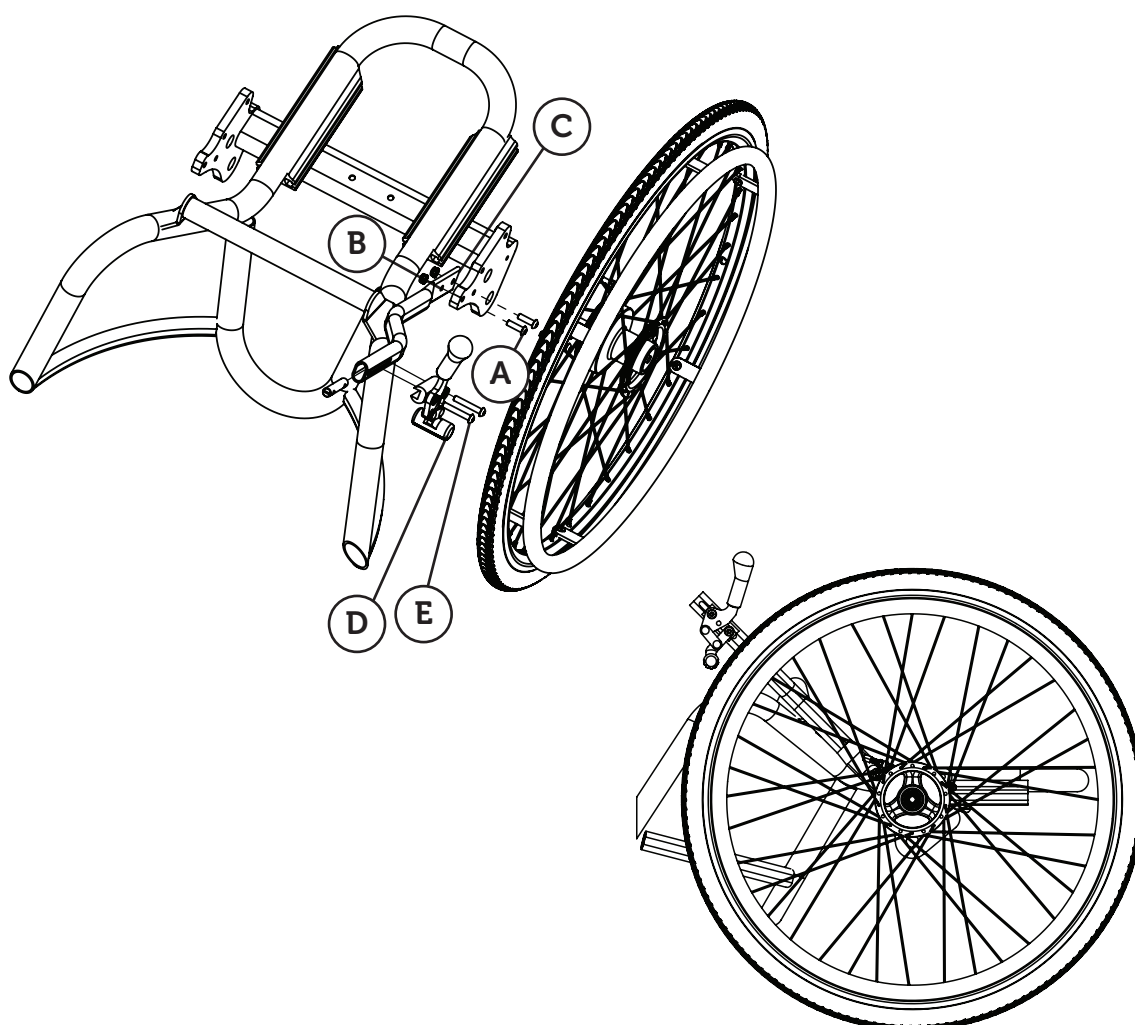

Fotstöd

Montering av fotstöd

För in fotstödsinfästningen (A) i avsedda hål under sittdelsplattans främre del på underredet och dra sedan åt skruvarna (B) på båda sidor med mutter och bricka (C). Det finns två lägen för djupjustering på fotstödsinfästningen.



Notera!

Du behöver avlägsna ändavslutet från fotstödsinfästningen på underredets sittplattans främre del innan montering av fotstöd sker.

Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp (D) i form av en sargsprint finns monterad i botten av fotstödsprofilen. Säkerhetsstoppet (C) kan även användas för att hitta tillbaka till en förinställd höjdposition.

Tips!


Montera ett extra säkerhetsstopp ovanför fotstödet i fotstödsprofilens spår för att enkelt hitta tillbaka till en alternativ höjdposition (exempelvis med eller utan skor).

Justering av vinkel vid knäleden

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid knäleden. Lossa skruven (E) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt skruven.

Justering av fotstödet höjd

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att höjdjustera fotstödet vid fotleden. Lossa vreden (F) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt vreden.

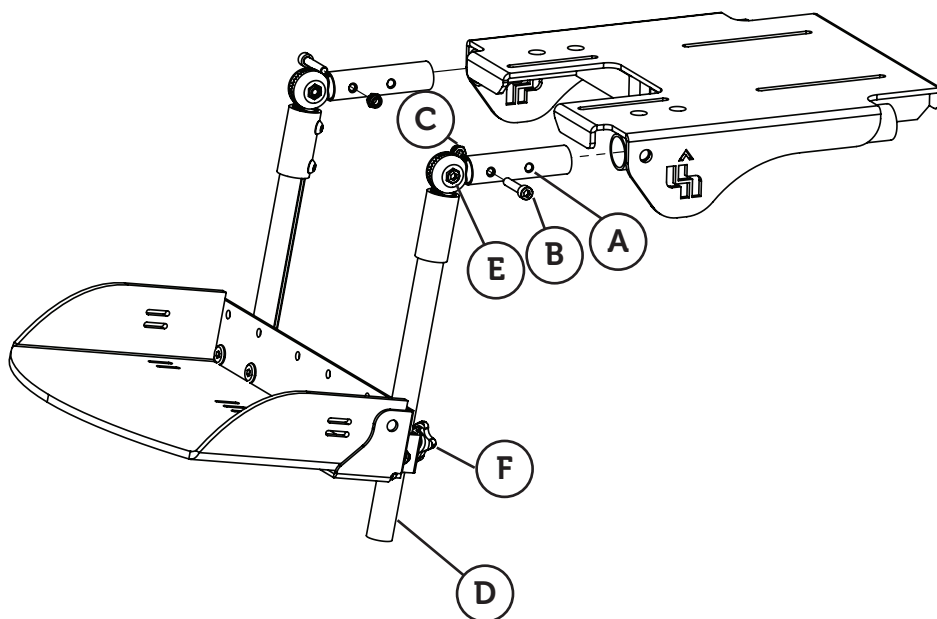

Vadstöd

Montering av vadstöd


Montera vadstödet med medföljande skruvar och sargsprintar i hålen i fotstödsbeslaget enligt bild.

Höjdjustering av vadstöd

För att höjdjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (A).

Breddjustering av vadstöd

För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (B) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (B).

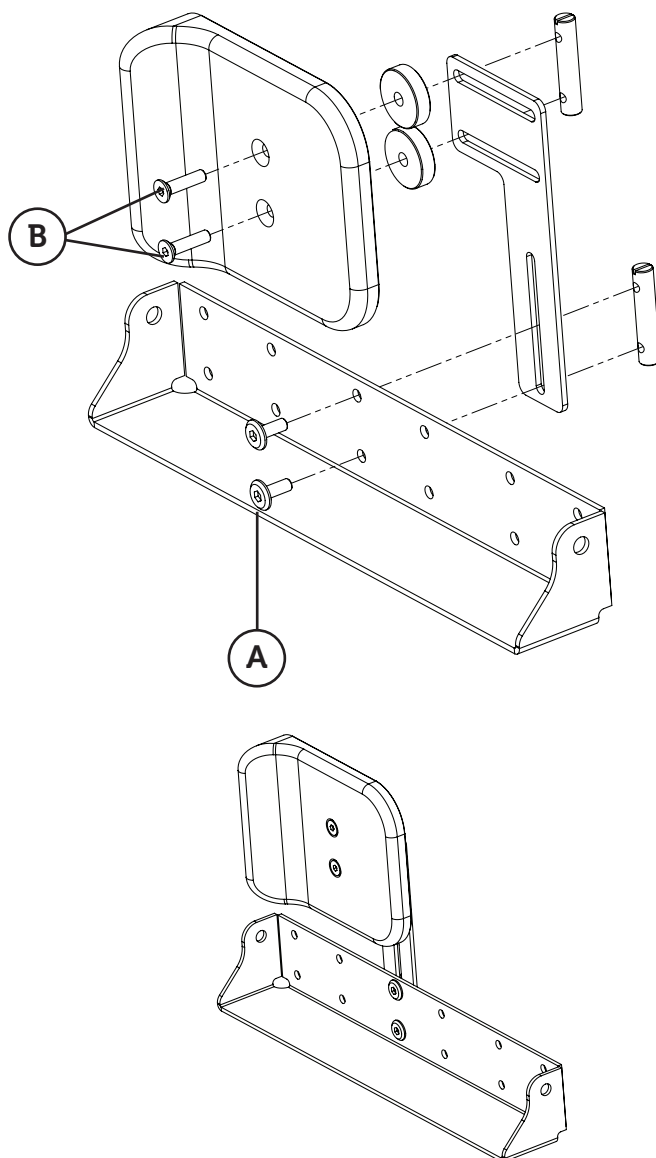

Tippskydd

Montering av tipskydd

Tippskyddet monteras på hjulaxeln enligt bild med medföljande skruvar (A), brickor (B), muttrar (C) och mutterkåpor (D).

Stick igenom skruv (A) i avsedda hål på tipskyddsfastet och genom rullstolsramen. Möt sedan upp på motsatt sida med bricka (B), mutter (C) och dra åt skruvarna.

Avsluta sedan med att sätta på mutterkåpor (D).




Notera!

Guppy bör alltid utrustas med tipskydd med tanke på dess många inställningsmöjligheter.

Att använda tipskydd

Tippskydd används för säker och trygg användning av underredet och kan enkelt vikas undan för att inte vara i vägen när det inte används. Trampa försiktigt ned tipskyddet med foten och vrid det åt sidan. Försök att trampa så nära tipskyddsstaget som möjligt vid deaktivering av tipskyddet.

Se till att vrida tipskyddet ända tills du hör ett klick, vilket indikerar att tipskyddet hamnat på plats.

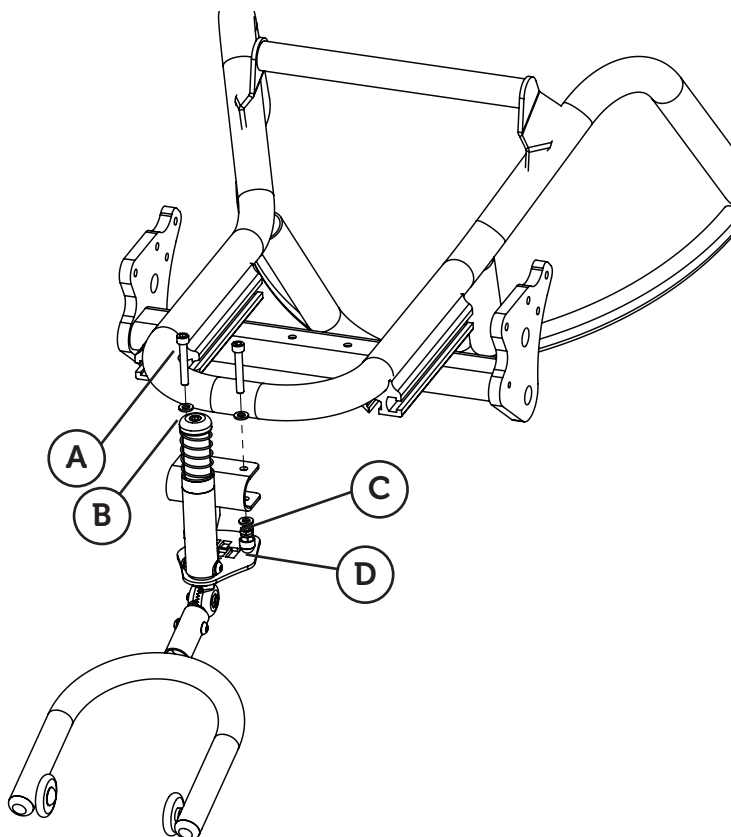

Tramprör

Montering av tramprör

Montera trampröret (A) på insidan av profilen vid bakre delen av rullstolsramen, genom att trä in muttrarna i spåret och lås dess placering med en av skruvarna (B) från utsidan.



Notera!

Trampröret sitter monterat på höger sida som standard.


Att använda tramprör

Tramprör används för att underlätta uppresning av underredet, exempelvis vid trottoarkanter. Tryck med foten på trampröret samtidigt som du håller i körbågen, och drar lätt bakåt, för att frigöra utrymme under länkhjulen.



Obs!

Vid användning av trampröret är det viktigt att du håller i körbåge eller körhandtag ordentligt.

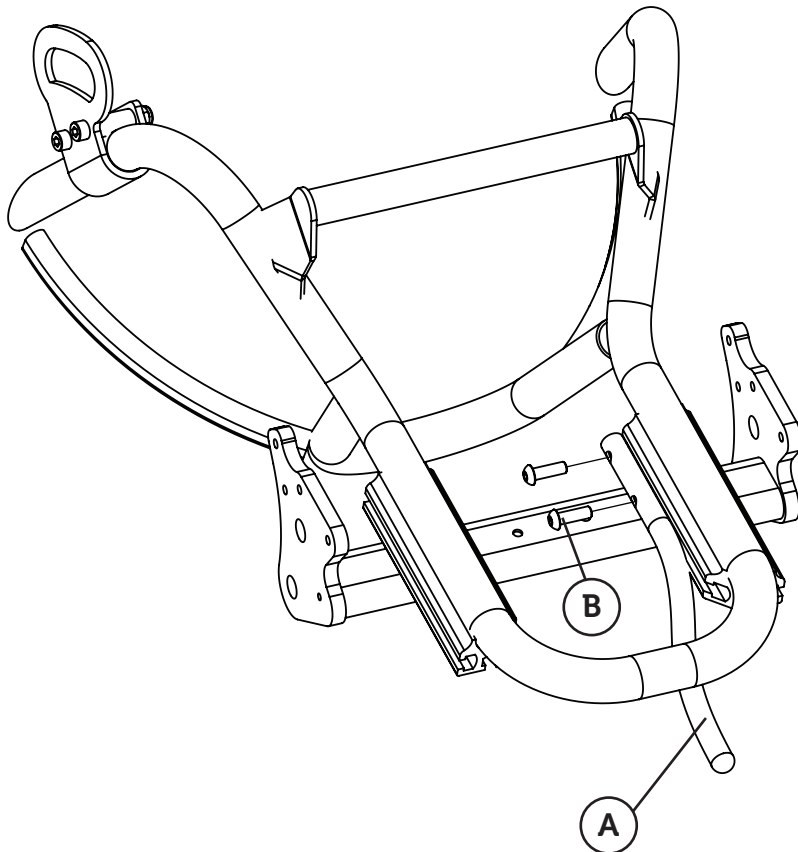

Transportfästen

Montering av främre transportfästen

Montera fästet runt rörramen. Fäst med skruv (A) och mutter (B). Observera att distansen (C) ska monteras i fästet.

Montering av bakre transportfästen

Det bakre transportfästet monteras på utsidan av profilen vid bakre delen av ramen med hjälp av medföljande skruvar (D), brickor (E) och muttrar (F) enligt bildbeskrivning.

Att använda transportfästen

Se avsnittet "Transport i bil" för ytterligare information och rekommendationer av hur du på ett säkert sätt använder transportfästen.



Obs!



Körbågen ska alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid transport i fordon.



Krocktestad och godkänd!

Guppy är krocktestad och godkänd enligt 7176-19 för 70 kg i bil.

Transportfästen

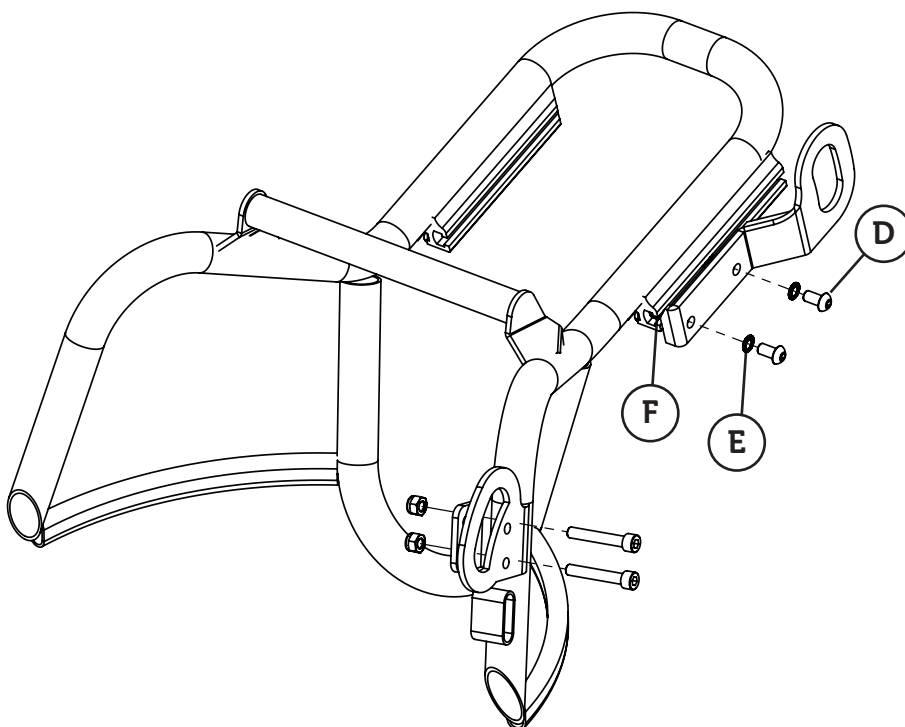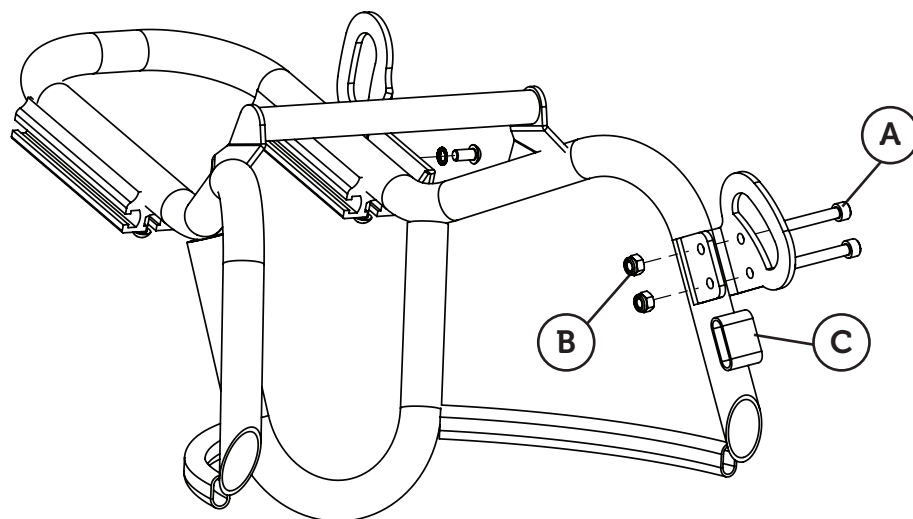

Färdriktningsspärr

Montering av färdriktningsspärr

Montera färdriktningsspärren på länkhjulsinfästningen med hjälp av medföljande monteringsdetaljer.

Börja med att ta loss länkhjulsinfästningen (A) från rullstolsramens länkhjulskuts (B) genom att skruva ur skruvarna (C). Lyft sedan bort ändavslutet (D) från länkhjulsinfästningens (A) topp och skruva ur centerbulten (E).

Montera sedan färdriktningsspärrensbeslagen (F) mellan länkhjulsinfästningen (A) och rullstolsramens länkhjulskuts (B) och mellan länkhjulsinfästning (A) och länkhjulsgaffeln (G) med monteringsdetaljer enligt bildbeskrivning.

När montering av färdriktningsspärren är slutförd monterar du tillbaka länkhjulet på rullstolsramen igen. Finjustera sedan länkhjulens färdriktning genom att justera något på skruv (J).

Tips!

Se sida 18-21 i denna bruksanvisning för ytterligare information kring hur du monterar länkhjul på rullstolsramen.

Aktivering av färdriktningsspärr

För att aktivera färdriktningsspärren drar du låsbulten (H) rakt upp och vrider den sedan 90° och släpper ner spärren i hålet på den rörliga delen. Säkerställ att färdriktningen är låst.

Frigöring av färdriktningsspärr


För att frigöra färdriktningsspärren drar du låsbulten (H) rakt så att spärren (I) dras upp ur hålet på den rörliga delen. Vrid sedan spärren 90° och släpp ner den försiktigt.



Notera!

Färdriktningsspärr passar enbart vid val av 7" länkhjul.

Färdriktningsspärr

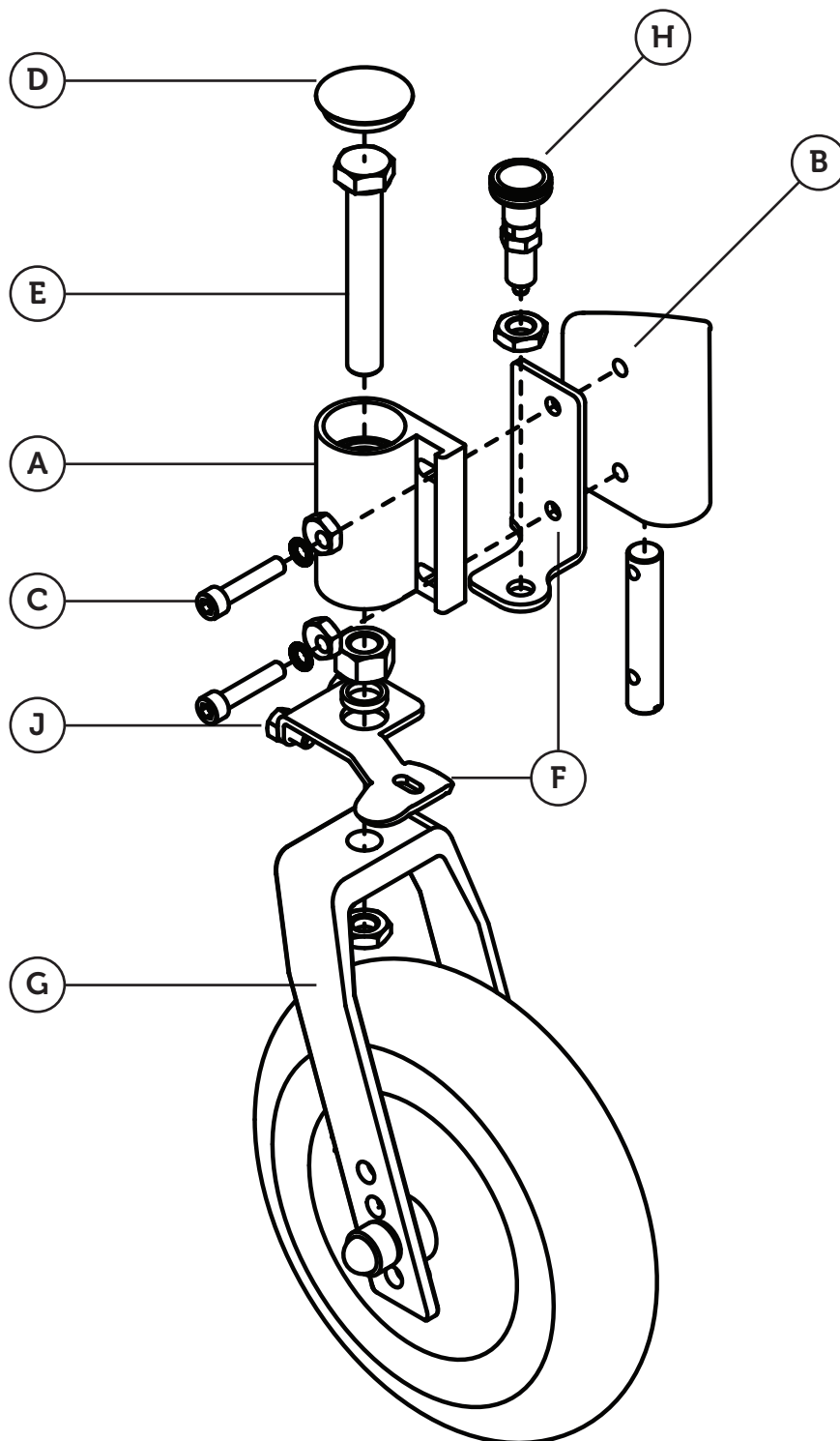

Stänkskärm

Montering av stänkskärm

Stänkskärmen monteras med hjälp av medföljande skruvar (A), distanser (B), och muttrar (C).

För att montera stänkskärmen behöver du först lossa drivhjulet från dess drivhjulsaxel med hjälp av quick-release funktionen och lägga det åt sidan så länge. Lossa skruven som håller rotationsspärren på trumbromsen och ta bort distansen.


Montera stänkskärmen med medföljande skruv. Distansen vid trumbromsen byts ut till en kortare för att ge plats åt stänkskärmsplåten.


Justering av stänkskärm

Stänkskärmen kan justeras i höjddled genom att lossa skruvarna (D). Justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (D) när önskad höjdposition är uppnådd.

Tips!

Du behöver inte skruva ur skruvarna (D) helt, det räcker med att lossa dem.

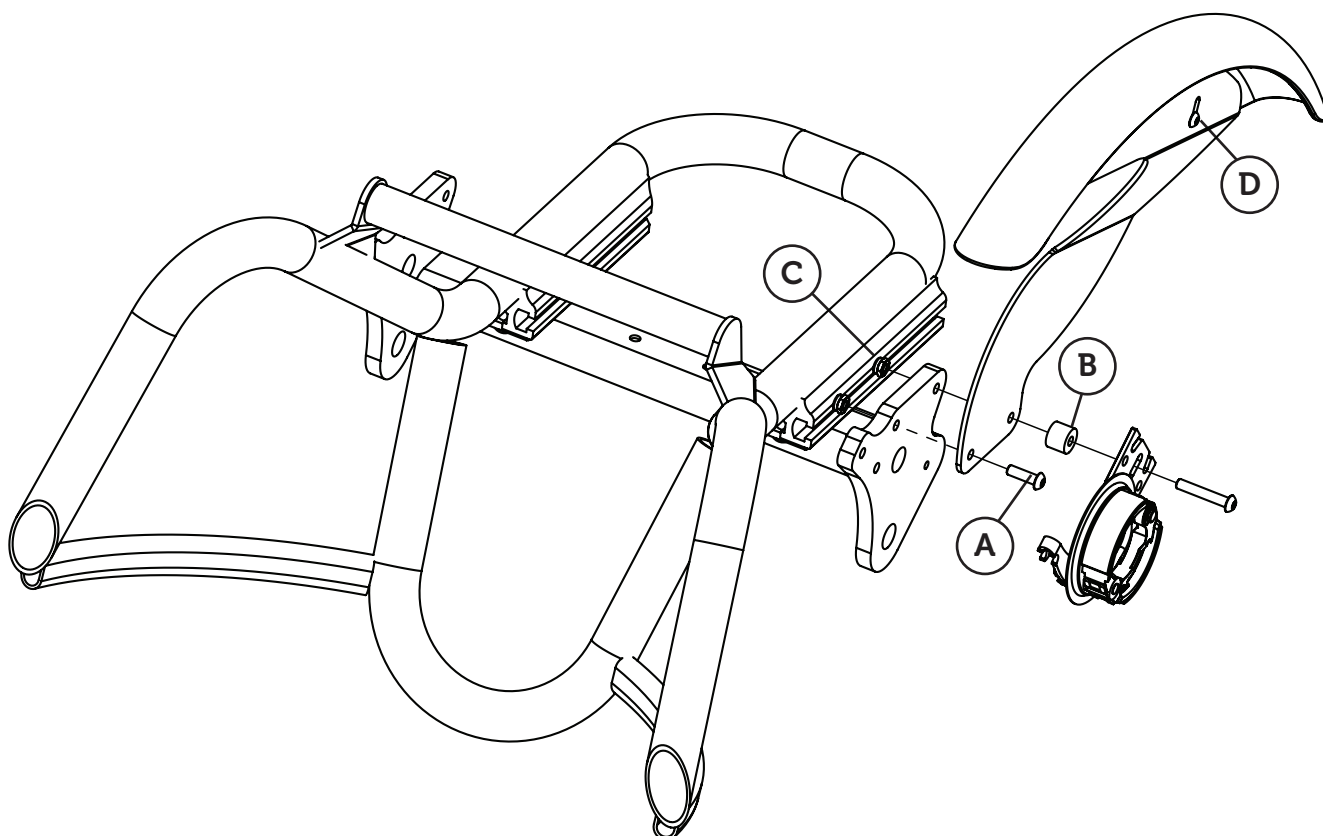

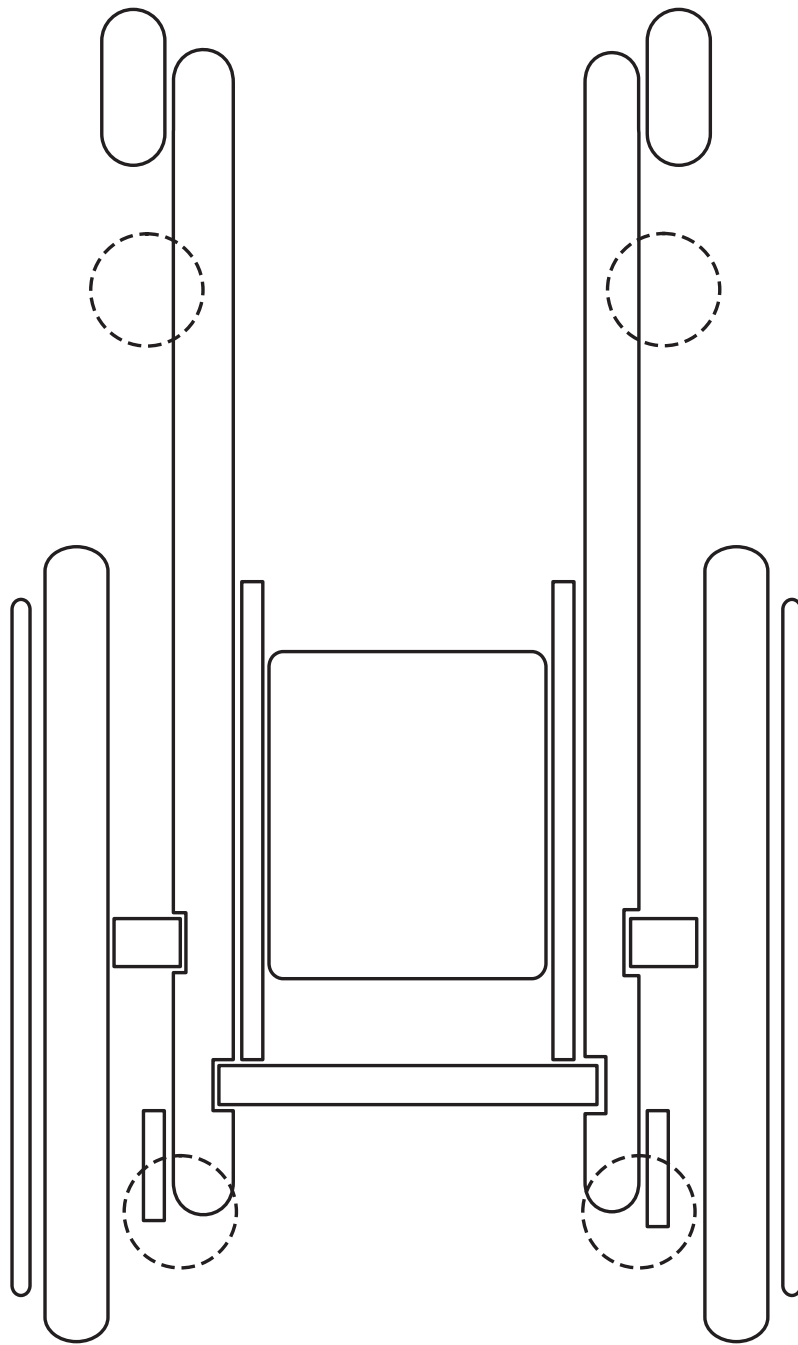

Markering för transportfästen

*Guppy ovanifrån med drivhjulen
närmast sidfoten*

Transport i bil

Anvisningar för transport i bil

Infästning ska ske med spännband, godkända enligt ISO 10542, i avsedda transportfästen enligt markeringar på bildbeskrivning.



Obs!

Det är viktigt att endast sträcka banden, och inte spänna dem för hårt. För hård spänning av banden kan orsaka att underredet blir skevt.



Krocktestad och godkänd

Guppy är krocktestad och godkänd enligt ISO 7176-19 för 70 kg.

Notera!

Krockgodkännande gäller belastningsvikter upp till 70 kg.

Underhåll och skötsel­anvisningar

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fäst­detaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Rengöring och tvätt

Plast- och metall­delar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön! Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel.

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Gaskolv

Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera.



Obs!

Gaskolven måste aktiveras regelbundet

Garanti

12 månader mot fabriktionsfel. För utförligare information kring den garanti vi lämnar, se sida 49 i denna bruksanvisning.

Kombinationer

Zitzi Guppy och dess tillbehör är en CE-märkt produkt som kan kombineras med samtliga tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning. Zitzi Guppy passar bl.a. ihop med sittsystem som Zitzi Delfi Pro och Anatomic Sits.

För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Reservdelar

För att Zitzi Guppy ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast föras med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB.

Märkning

Guppy med dess tillbehör är en CE-märkt produkt. Ett unikt serienummer är placerat på en etikett som sitter på rörramen. Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska sedan separeras efter materialtyp, metall, plast och brännbart (textilier). Gaskolv sorteras som farligt avfall.



Obs!

Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

Rekonditionering

Inledning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Rekonditionering av hjälpmedlet får endast ske med originaldelar från Anatomic SITT AB.

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Behovet av rekonditionering varierar och måste bedömas utifrån fall till fall. Samtliga punkter bör utföras minst en gång per år eller vid behov och funktionskontrollen bör utföras inför varje gång underredet ska användas.

Rengöring

Lackerade ytor, drivhjul, länkhjul och handtag rengörs med rengöringsmedel utan lösningsmedel. Använd absolut inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Efterbehandling

Efter tvätt ska alla leder, trånga utrymmen och dräneringshål blåsas torra och spraysmörjas med tunnflytande olja.

Märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att tyda. På Guppy sitter denna märkning på rörramen.

Hjul

Kontrollera att både länkhjul och drivhjul inte är slitna och att de snurrar lätt utan missljud. Se sida 14–21 i denna bruksanvisning för ytterligare information kring drivhjul- och länkhjulsjustering.

Lack

Kontrollera skador i lacken genom att syna av underredet. För att förhindra korrosionsskador och bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Anatomic SITT AB.

Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att inte finns någon skevhet i chassit. Se sida 14–21 i denna bruksanvisning för ytterligare information kring drivhjul- och länkhjulsjustering.

Rörstomme och detaljer

Svets och skruvförband kontrolleras. Grindbussningar och gångjärn ska fungera utan missljud. Smörj vid behov. Kontrollera även vred, skruvar och övriga monteringsdetaljer. Byt dessa vid behov.

Framgafflar

Kontrollera att infästningar och lager inte glappar och att de snurrar lätt. Smörj framgafflar vid behov.

Körbåge och körhandtag

Kontrollera att polstring och handtag sitter fast ordentligt och att körbåge/ körhandtag går att justera i höjded. Kontrollera även skicket på vred och skruv.

Bromsar

Kontrollera att vårdarbroms och eventuell parkeringsbroms fungerar korrekt. Ytterligare information kring bromsar, se sida 22–27 i denna bruksanvisning.

Ihopfällningsmekanism och tilt

Kontrollera att man enkelt kan fälla ryggrör och körbåge och att man enkelt kan tilta sättenheten. Se sida 8–9 för ytterligare information kring tilt.

Funktionskontroll

Funktionskontroll innebär att du går igenom *Hjul, Stabilitet, Bromsar* och *Körbåge och körhandtag*.



Obs!

Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång Zitzi Guppy ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Risikanalys

Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Märkning

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.



Obs!

CE-märkningen upphör att gälla vid specialanpassad produkt

Försäljningsvillkor

Garanti

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Reklamation

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Senare än 360 dagar från leveransdatum

Varorna återtages ej

▲ Specialanpassade produkter återtages ej

Kundservice

Scandinavia

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicsitt.com

SE

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

DK

Bardum A/S

Håndverksvein 8, N-1405 Langus
Tel. +47 64 91 80 60, Fax +47 64 91 80 66

NO

Handico Finland OY

Asemanaukio 7, FIN-04200 Kerava
Tel. +358 331 222 700, Fax +358 331 222 710
Email handico@handico.fi

FI

Europe

Anatomic SITT Nederland BV

Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomicsitt.com

NL

Be Independent Ltd

St Luke's Road G'Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

MLT

Consolor Ltd Unit A3

The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

GBR

HandiTech Scandinavian Reha Aids Center

11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

GR

Invaru Ltd

Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

EST

MMS Medical Ltd

51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099

IRL

Mobilitec

Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

PRT

FR

OX Orthopédix

27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789

IT

Ortopedia Castagna Centro Tecnico

Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

CH

Rehatec AG

Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

IS

Stod Hf Stoaekjadmídn

Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjordur
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423

GR

Scan Ideal

28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151

SVN

Team Nova Reha

Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

ES

Via Libre Fundosa Accesibilidad

Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

Asia Pacific and Middle East

UAE

Al Safwa Mobility LLC (ASM)

Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

AUS

Paediatric Mobility Equipment

Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010
Email sales@paedmobility.com.au

NZL

Cubro Rehab

PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827

ISR

Special needs for Special children


48 Mordey Hageat St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

MYS

The Gym & Care

1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

Tekniska data

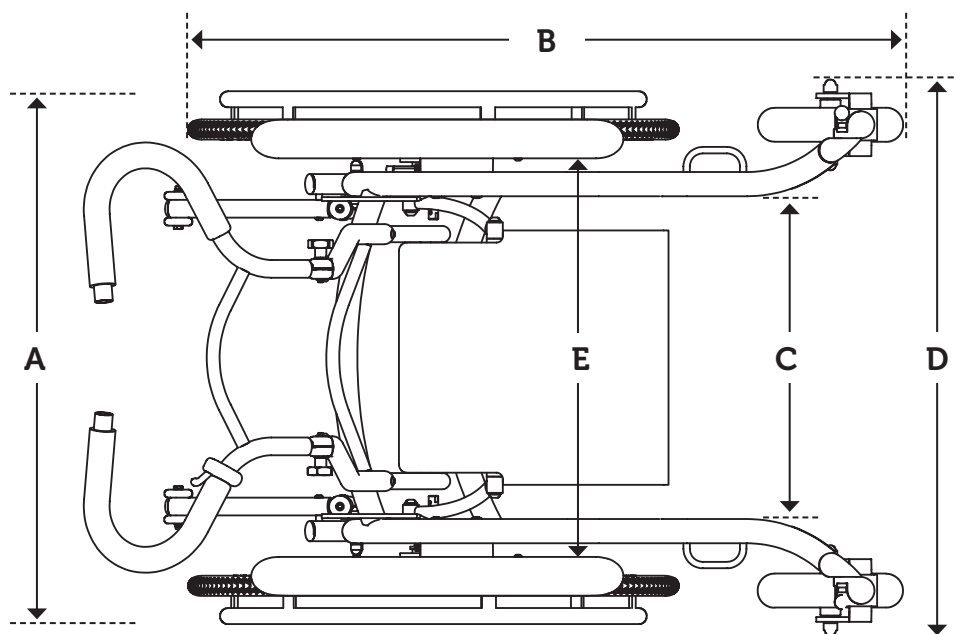

med 16" hjul (6" länkhjul)

Storlek	Tilt	Sitthöjd	Vikt	A	B	C	D	E
Storlek 1	0-32°	46 cm	14 kg	51 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	41 cm
Storlek 2	0-32°	46 cm	14 kg	56 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	46 cm

med 20" / 22" / 24" hjul (6" länkhjul)

Storlek	Tilt	Sitthöjd	Vikt	A	B	C	D	E	E med stänkskärm
Storlek 1	0-32°	46 cm	15kg	57 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	43,5 cm	39,5 cm
Storlek 2	0-32°	46 cm	15 kg	62 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	48,5cm	44,5 cm

Den totala längden av underredet förändras beroende på läge och hjul.
C-mättet är taget i höjd med länkhjulshus.

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping

Tel 011-16 18 00

Fax 011-16 20 05

Support 011-16 18 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Danmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

NL

Anatomic SITT Nederland B.V.

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Nederländerna

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

