

MEMOday

Art.nr 508260



Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3
2.	Komme i gang	3
3.	Talestøtte.....	4
4.	Skifte bakgrunnsfarge	4
5.	Tidsintervaller	4
6.	Batteribackup.....	4
7.	Slå MEMOday på/av	5
8.	Skjerm	5
9.	Vedlikehold/renhold	5
10.	Miljø.....	6
11.	Tekniske spesifikasjoner	6
12.	Medfølgende deler.....	6
13.	Oppbevaring	6
14.	Tilbakestilling til fabrikkinnstilling.....	7
15.	Overensstemmelse med det medisintekniske direktivet.....	7
16.	Sikkerhet og ansvar	7

1. Innledning

MEMOday minner deg på hvilken dag og klokkeslett det er. På en tydelig skjerm vises klokkeslett, ukedag, dato samt hvilken del av døgnet det er. Man kan også få teksten lest opp.

Ved å vise om det er natt eller dag, kan MEMOday hindre at brukeren ved en misforståelse ringer slektninger eller går ut midt på natten.

MEMOday bør plasseres på en sentral plass i hjemmet. Den kobles til en stikkontakt i veggen via den medfølgende laderen.

MEMOday er enkel å stille inn for å passe til brukerens behov.

Ved strømbrudd forsvinner teksten, men MEMOday fungerer som vanlig når strømmen er tilbake.

MEMOday stilles automatisk om til sommer- og vintertid.

2. Komme i gang


1. Velg hvordan MEMOday skal introduseres. En del mennesker vil ikke bruke «hjelpemidler», og det kan da fungere å bare gi den som en «gave».
2. Bestem hvor i boligen MEMOday skal plasseres. Det bør være et sted der det er lett å legge merke til den, f.eks. ved telefonen eller på kjøkkenbenken. Pass på at lamper eller vinduslys ikke reflekteres på skjermen.
3. Koble den medfølgende laderen til en stikkontakt samt til uttaket på siden av MEMOday.
4. Hold *På/Av*-knappen på baksiden av MEMOday inne til skjermen tennes.
5. Følg instruksjonene som vises for å stille inn språk, land, tid og dato samt hvilken informasjon som skal vises på skjermen. Se kapittel 8. *Skjerm* for mer informasjon.
6. Pass på at laderen alltid er koblet til. Skjermen lyser kun dersom MEMOday er koblet til en stikkontakt i veggen.

OBS! Bruk kun den medfølgende laderen til MEMOday. Kontakt leverandøren dersom du trenger en ny.

3. Talestøtte

Trykk lett på skjermen for at MEMOday skal lese opp det man trykker på. Pass på at innstillingen for talestøtte er på, se kapittel 8. *Skjerm*.

4. Skifte bakgrunnsfarge

Når man trykker på knappen , endres bakgrunnsfargen på MEMOday fra lys til mørk eller omvendt.

5. Tidsintervaller

MEMOday viser hvilken del på døgnet det er med tekst.

Tidsintervallene for dette er forhåndsprogrammert, og følgende tider gjelder:

- morgen: 06:00 – 09:00
- formiddag: 09:00 – 12:00
- ettermiddag: 12:00 – 18:00
- kveld: 18:00 – 23:00
- natt: 23:00 – 06:00

Om natten reduseres lysstyrken på skjermen automatisk.

6. Batteribackup

Dersom laderen ikke er tilkoblet, eller ved et strømavbrudd, vises en melding om at man skal koble til laderen. Etter ett minutt uten strøm slukker skjermen.

Når MEMOday igjen får strøm (laderen kobles til eller at strømmen kommer tilbake etter et strømavbrudd), tennes skjermen og riktig tid, ukedag, dato og tid på døgnet vises igjen. Innstillingene lagres av et innebygd batteri.


Dersom MEMOday ikke har vært tilkoblet på lang tid (flere uker), kan det hende man må stille inn språk, land, tid og dato samt hva som skal vises på skjermen på nytt.

7. Slå MEMOday på/av

Ved normal bruk skal MEMOday alltid være på, ettersom brukeren alltid bør kunne se informasjonen på skjermen.

Man kan slukke skjermen ved å trykke kort på *På/Av*-knappen.

Dersom MEMOday ikke skal brukes i en lengre periode, kan den slås helt av ved å holde inne *På/Av*-knappen til to valg vises på skjermen.

Trykk på  for å slå av.




8. Skjerm

Det kan stilles inn hvilken informasjon som skal vises på skjermen.

Gå til innstillingsguiden ved å holde *På/Av*-knappen til to valg vises.

Trykk på  for å starte innstillingsguiden.

Innstillingsguiden har fire trinn:

- **Velg språk.** Språk med symbolet  har talestøtte. Når språket er valgt, er symbolet grønt  når talestøtten er på og rødt  når den er av. Trykk på symbolet for å endre.
- **Velg land** for hvor MEMOday skal brukes. Dette bestemmer hvordan tiden skal vises og omstilling for sommer- og vintertid.
- **Angi tid og dato.** Still inn aktuell tid, år, måned og dato.
- **Angi skjerminnstillinger**, velg hva som skal vises på skjermen:



9. Vedlikehold/renhold

Rengjør MEMOday med en lett fuktet klut med mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk sterke løsemidler til rengjøring. Produktet må ikke senkes i vann.

10. Miljø

Emballasjen kan gjenvinnes og skal sorteres som papiravfall.

Når produktet eller batteriet skal avhendes, skal det behandles som elektronisk avfall eller sendes tilbake til leverandøren.

11. Tekniske spesifikasjoner

Mål (h x b x d):	140 x 185 x 95 mm
Vekt:	0,35 kg
Batteri:	Innebygd, oppladbart litium-ion, 3,7 V
Lader:	5,0 V, 1500 mA (senter = positiv). Bruk kun medfølgende lader. Ved bestilling av ny, bruk artikkelnummer <i>508258 Power Supply MEMOday</i> .
Skjerm:	7 tommer
Tilgjengelige språk:	Svensk, norsk, dansk, finsk, islandsk*, engelsk, tysk, nederlandsk, flamsk, fransk, spansk, italiensk, slovensk*, bosnisk*, kroatisk*, serbisk*, tsjekkisk, polsk, albansk*, arabisk, persisk*, tyrkisk, somalisk*, ungarsk*, russisk, gresk, (språk med * mangler talestøtte)

12. Medfølgende deler

MEMOday	1 stk.
Lader til MEMOday, art.nr. 508258	1 stk.
Brukerveiledning	1 stk.

13. Oppbevaring

Når MEMOday ikke er i bruk, bør den oppbevares innendørs i romtemperatur.

14. Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

For å tilbakestille MEMOday til fabrikkinnstilling, må man gå til innstillinger og stille inn ønsket språk og land, se kapittel 8. *Skjerm*. Rengjør i henhold til instruksjonene i kapittel 9. *Vedlikehold/renhold*, og sørg for at den tilhørende laderen ikke er skadet. Dersom laderen er skadet, kontakt leverandøren for å bestille en ny.

15. Overensstemmelse med det medisintekniske direktivet

MEMOday markedsføres som et medisinteknisk produkt klasse I for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne og oppfyller kravene i det medisintekniske direktivet 93/42/EEC.

16. Sikkerhet og ansvar

Abilia AS har analysert risikoene med produktet i henhold til SS-EN 14971.

Ved igangsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er ikke mulig å beskrive alt man ikke kan bruke produktet til i en bruksanvisning. Dersom du er usikker på om du har stilt inn eller bruker produktet korrekt, anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følger av feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil tilkobling eller lignende. Abilia AS' økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.



Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 15, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Toby Churchill Ltd (Abilia), Toby Churchill House,
Norman Way Industrial Estate, Over, Cambridge CB24 5QE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.com

