

# Brukermanual Omega 5



## Kontaktinformasjon

Adresse: ProVista  
Nils Hansens vei 20  
0667 Oslo

Telefon: 22 69 61 00

Hjemmeside: [www.provista.no](http://www.provista.no)

**PROVISTA**  
spesialoptikk

## **OPPSETT**

1. Fjern all emballasje rundt lampen før bruk.
2. Fest den medfølgende klemmen på kanten av et bord eller arbeidsbenk. MERK: Det er viktig at klemmen er sikker FØR du fester lampen. Hvis den medfølgende klemmen ikke oppfyller dine eksakte krav, det er en valgfri bordfot (D52060) eller gulvstående (D53060 og D53070) tilgjengelig hos din lokale forhandler.
3. Sett stammen på lampearmen inn i hullet i klemmen og koble strømadapteren til en stikkontakt - lampen er nå klar til bruk.
4. Trykk på bryteren i midten av hodet, og lampen vil slå seg på med 100% lysstyrke. Trykk igjen for å redusere lysstyrken og slå den av.

### **Bytte mellom 3D og 5D linsen.**

- Sett lampehodet i en horisontal posisjon.
- Ta tak i lampehodet i begge hender og roter linseringen mot klokken. Løft linseringen ut av hodet.
- Fjern linsen ved å skyve den fra undersiden. FORSIKTIG: HODET VIL BEVEGE SEG MED EN GANG LINSENS VEKT ER FJERNET.
- Plasser den nye linsen og følg beskrivelsen i motsatt rekkefølge. Sørg for at linseringen er riktig plassert i hodet og roter det deretter med klokken til den klikker tilbake på plass. Sørg for at de trekantede indikatorene stemmer overens. IKKE BRUK LAMPEN TIL LINSERINGEN ER LÅST I POSISJON ELLER KAN LINSEN FALLTE UT OG FØRE TIL SKADE.

### **VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING**

Lampen er utstyrt med 42 lysdioder. Lampen må frakobles det elektriske strømmettet før rengjøring og vedlikehold. Lupelampa krever ikke spesiell vedlikehold. Hvis det blir tungt tilsmusset kan den tørkes med en fuktet klut som inneholder en mild såpeløsning. Ikke bruk store mengder veske da dette kan trekke inn i lampehodet og påvirke de elektriske kretsene.