

MONTERINGSMANUAL

SPIDER

FORORD S 2

BASEMODUL, SVINGHJULSRØR, VERTIKALRØR S 3

BREMSER, AKSLING, AKSLINGFESTER S 4

KABLER, TIPPESEKRING, BLACKBOX, MM S 5

LISTE OVER DELER, NØDVENDIG VERKTØY S 8



1 . LISTE OVER DELER

Basemodulen er festet i midten av spideren og holder sammen vertikallrør og svinghjulsrør

BASEMODUL, SVINGHJULSRØR, VERTIKALRØR

1 . BASEMODUL

Montering av Spider understell begynner med basemodulen. Hvis mulig, benytt et horisontalt Orthos rør festet til en arbeidsbenk for å tjene som et stativ. Begynn med å feste basemodulen BS600 til arbeidsbenken.

2 . SVINGHJULSRØR

Still inn svinghjulsrørene til ca 30° utover. Dette kan justeres i etterkant.


Den flate siden av rørene skal peke bakover.

Tre de 2 x M8 x 80 @ 20Nm fra undersiden igjennom basemodulen og opp i den gjengete siden av vertikallørene.

3 . VERTIKALRØR

Vertikalrørene sitter på toppen av basemodulen. disse har en side som er gjenget opp. Denne siden skal ned på de 2 x M8 x 80 @ 20Nm skruene som ble montert i pkt.2

Pass på at vertikallørene passer nedi sporet som er i basemodulen. stram deretter til med 20Nm.

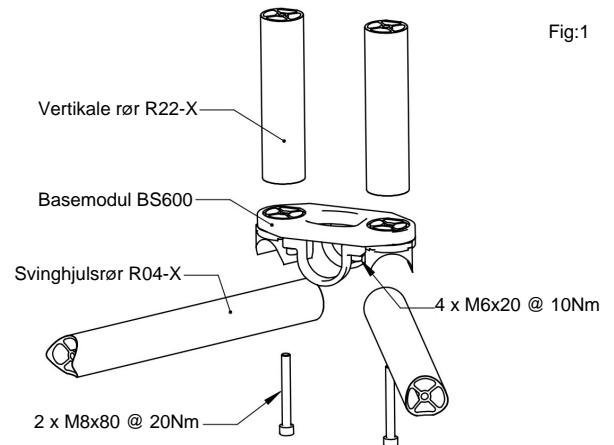

BREMSER, AKSLING, AKSLINGFESTER

1 . AKSLINGFESTER

Ta to akslingfester og fest dem lett på de vertikale rørene på samme nivå.

Sørg for at boltene peker innover, og at teksten peker oppover.

Avstanden mellom basemodul og akslingfester er 2,5Cm ved 24" hjul og 0cm ved 20" hjul.

2 . AKSLING

Deretter monteres akslinge R04-X. Den har fire store hull på toppen, og fire mindre hull på undersiden. Monter akslingen som angitt i fig.2 med fire M6x35 bolter og stram med 12Nm. Høyden på sklingen kan justeres i senere. Løsne de to M6x22 Boltene som vist fig.2

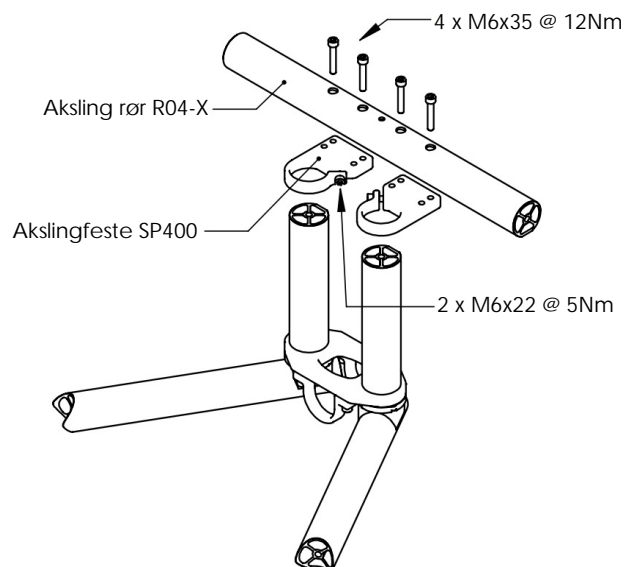


Fig.2




BREMSEMODUL

1. BREMSEMODUL

finn ønsket grad° 0,3,6 på bremsemodul. Roter bremseeskiven slik at hullet for montering blir synlig. Ta M8x30 bolter og plasser i hullet med locktight.

skru de inn i gjengene i akslingen. se fig.3

Pass på at bremsemodulen passer riktig i sporet på akslingen. Eventuelt bruk en gummihammer den forsiktig inn i sporet. påse å stramme med 20Nm

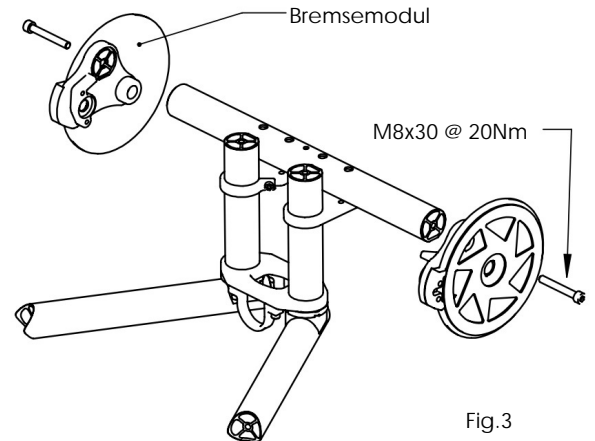


SVINGHJUL

1. SVINGHJUL

Bruk M8x30 boltene som ligger i posen med Hjulgaffelene til å først feste innfestningen for hjulgaffelen (øvre del) bruk locktight og stram til med 20Nm.


Tre deretter hjulgaffelen opp i innfestningen og stram mutteren på toppen så hjulet fortsatt kan svinge fint uten motstand. Plasser gummiproppen tilslutt.

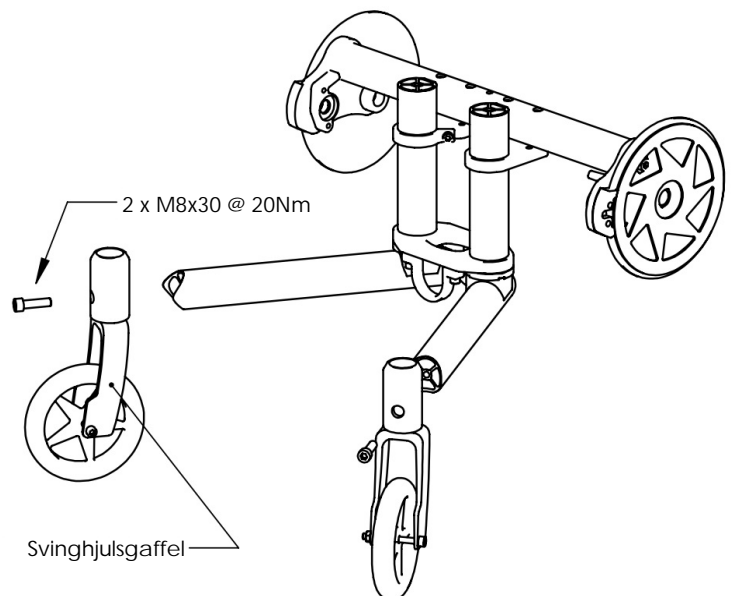

TILT

1. TILT

Tilten monteres ved å tre den over de to vertikale rørene og helt ned på akselinnefestningen. Stram så til de to M6x22 boltene med max 5Nm.

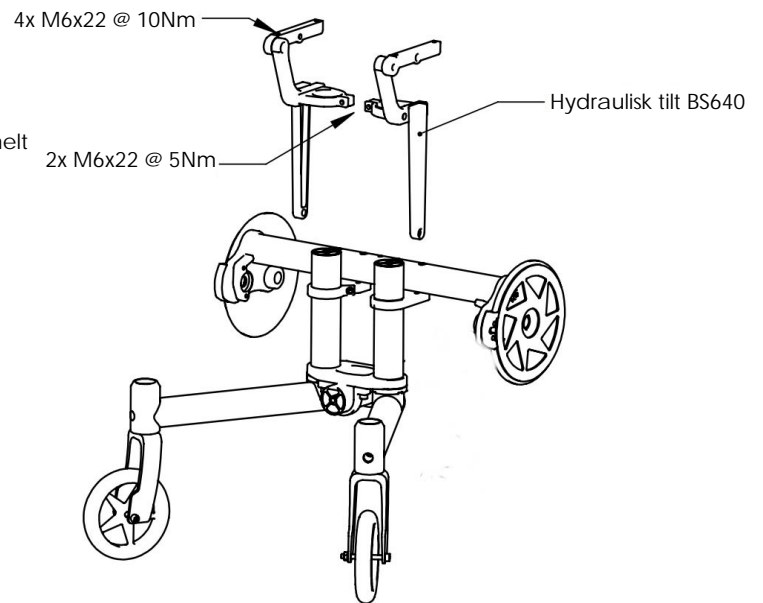

Ergoseat AS
Kokstadvegen 46F
5257 KOKSTAD
Tlf : 55 10 16 00
Fax : 55 10 16 01



ERGOSEAT