


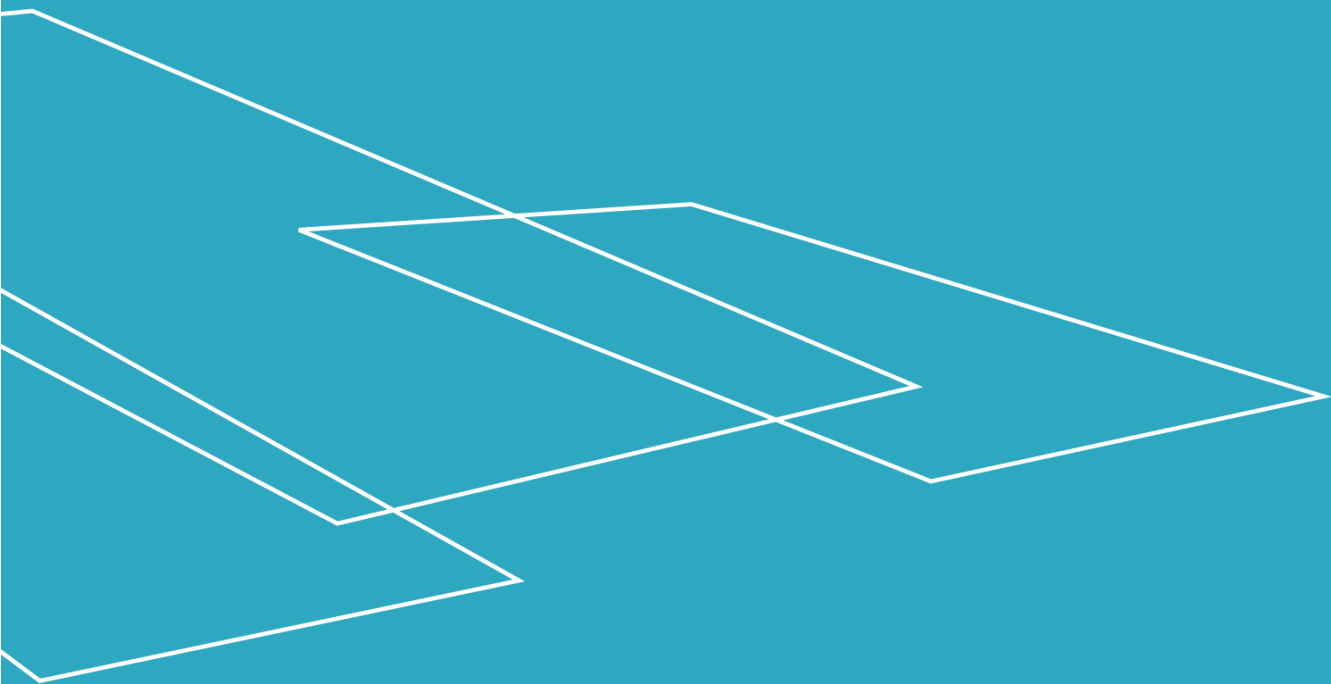

Brukerhåndbok RAIZER®

BRUKERHÅNDBOK – RAIZER® – NO VERSJON 1.4



Innholdsfortegnelse

1. Forord.....	3
1.1 Quick Guide.....	3
2. EF-overensstemmelseserklæring.....	4
3. Typesertifikat.....	5
4. Bruksbetingelser	6
5. Tekniske spesifikasjoner	7
6. Sikkerhetsanvisninger	8
6.1 Montering.....	8
6.2 Unngå personskade.....	8
6.3 Overbelastning.....	9
7. Personikkerhet.....	9
7.1 Unngå personskade.....	9
7.2 Sikkerhetssele	9
7.3 Håndtering.....	10
8. Funksjonsbeskrivelse	11
9. Før løftestolen tas i bruk.....	11
10. Bruk.....	12
10.1 Montering og bruk av Raizer®.....	12
10.2 Montering av venstre side.....	13
10.3 Montering av høyre side.....	14
10.4 Løft av person.....	16
10.5 Betjening av Raizer® via trykknapper på setet	18
10.6 Betjening av Raizer® via fjernkontroll.....	20
10.7 Slik parer du sender og mottaker for fjernkontroll.....	21
11. Demontering	22
12. Lading av Raizer®	23
13. Vedlikehold	24
13.1 Rengjøring.....	24
13.2 Mekanisk vedlikehold	24
13.3 Fjernkontroll*.....	24
14. Sjekkliste for vedlikehold.....	25
15. Servicehefte	27
16. Reservedeler.....	28
17. Feilsøking	34
18. Elektrisk diagram	35
19. Kassasjon	36
20. Reklamasjonsrett	36

1. Forord

Gratulerer med din nye Raizer.

Dette er en original brukerhåndbok for din nye Raizer.

OBS: Det er viktig at du leser gjennom håndboken før du begynner å bruke Raizer.

Raizer er en batteridrevet, mobil løftestol som på få minutter hjelper en liggende person opp til nesten stående stilling. Raizer kan betjenes av kun én hjelper og krever ingen fysisk innsats fra hjelper utover en støttende hånd.

Raizer betjenes enkelt via betjeningspanelet som er montert på siden av setet eller via en fjernkontroll*.

*Ekstrautstyr



1.1 Quick Guide



Det finnes en supplerende Quick Guide i lommen på transportvesken.
Brukerhåndboken kan oppbevares i den samme lommen.



Scan for å hente ekstra Quick Guide

2. EF-overensstemmelseserklæring

Produsent: Liftup A/S
Adresse: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danmark
Telefon: +45 9686 3020
Reg. no. 523867 - Lægemedelstyrelsen (det danske Legemiddelverket)

erklærer herved at:

Utstyr: **RAIZER®** Batteridrevet mobil løftestol

Raizer samsvarer med:

Direktivet for medisinsk utstyr MDD 93/42/EEC. Medisinsk utstyr i klasse I (i henhold til regel I i vedlegg IX i rådsdirektivet MDD 93/42/EEC). Samsvarsvurdering ble utført i henhold til Vedlegg VII.

EMC-direktivet 2014/30/EU.

ROHS-direktivet: 2011/65/EU.

RED 2014/53/EU, Radioutstyrsdirektivet.

Raizer oppfyller relevante krav innenfor følgende standarder:

EN/ISO 10535:2006 Personløftere til forflytning av funksjonshemmede
Bekreftet av Dansk teknologisk institutt, sertifikat nr. 222

EN 12182:2012 Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede – generelle krav og prøvingsmetoder.

EN 300 440 Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker (ERM)

Ovenfor nevnte produkter er produsert i henhold til følgende styringssystem:

EN ISO 9001: 2008 Kvalitetsstyring, sertifikat nr. 44 100 117583

EN 14971: 2012 Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr

Direktør
Tittel

Flemming Eriksen
Navn

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danmark
Selskap

15-09-2016
Dato

Underskrift

3. Typesertifikat

KOPI AV CE-MERKET
SETTES INN HER

4. Bruksbetingelser

Raizer bør kun benyttes til å reise en opp en person som ligger på gulvet og som ikke kan reise seg ved egen hjelp, men trenger å komme opp i sittende eller nesten stående stilling. Personen kan ha behov for videre forflytning herfra.

Maks. belastning av Raizer er 150 kg med maks.1 person på løftestolen.
Maks. belastning fremgår også av CE-merket som er montert bak på setet. Med full last kan Raizer brukes ca. 40 ganger på en full oppladning. Det følger med lader til løftestolen.



Les nøye gjennom brukerhåndboken før apparatet tas i bruk.
Eieren av stolen er forpliktet til å følge vedlikeholdsveiledningen i punkt 13.



Løftekapasitet: Maks. 150 kg.



Løftestolen skal ikke skyves eller transporteres mens personen sitter i den.



Ikke stå på løftestolen.



Ikke bruk løftestolen i eller i nærheten av vann. Se 13.1



Les nøye gjennom brukerveiledningen før løftestolen tas i bruk.




Fest sikkerhetssele før løft.



Avbryt og fjern lader før bruk.

5. Tekniske spesifikasjoner

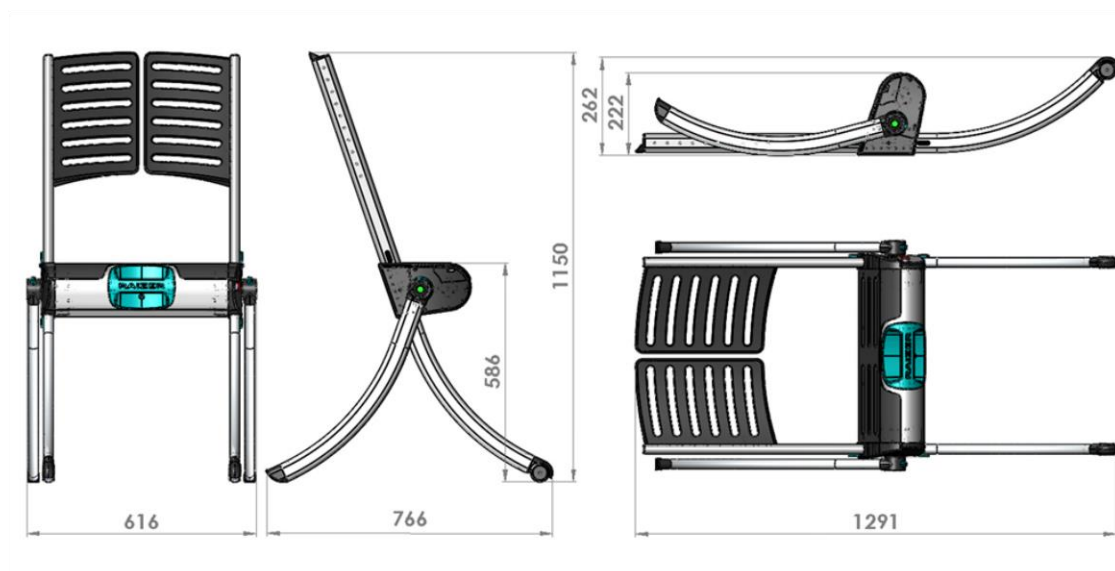

Tekniske spesifikasjoner:


Lader (2 stk.):	Soniel 12V. 100-240V. 12V Biladapter
Batteri:	LiFePo4
Antall løft ved full oppladning:	40 løft ved maks. last. ca. 100 løft ved gjennomsnittlig last.
Ladetid:	Maks. 6 timer (230V lader)
Lading av tomt batteri:	10–15 min = 1 løft
Duty Cycle:	1 min. 5 min.
Mål (L x B x H):	Stående 766 x 616 x 1150 mm Liggende 1291 x 616 x 262 mm
Egenvekt:	Sete 9 kg. + ben og ryggene 4 kg. – totalt 13 kg.
Løftekapasitet:	Maks. 150 kg.
Løftetid:	20–30 sek.
Støynivå:	< 70 dB A
Driftstemperatur:	+5 °C til + 40 °C
Oppbevaringstemperatur:	- 25 °C til + 70 °C
Vann og støv:	OS 42
Forventet levetid:	> 5 år

Forbehold om tekniske modifikasjoner

6. Sikkerhetsanvisninger

6.1 Montering


Korrekt montering

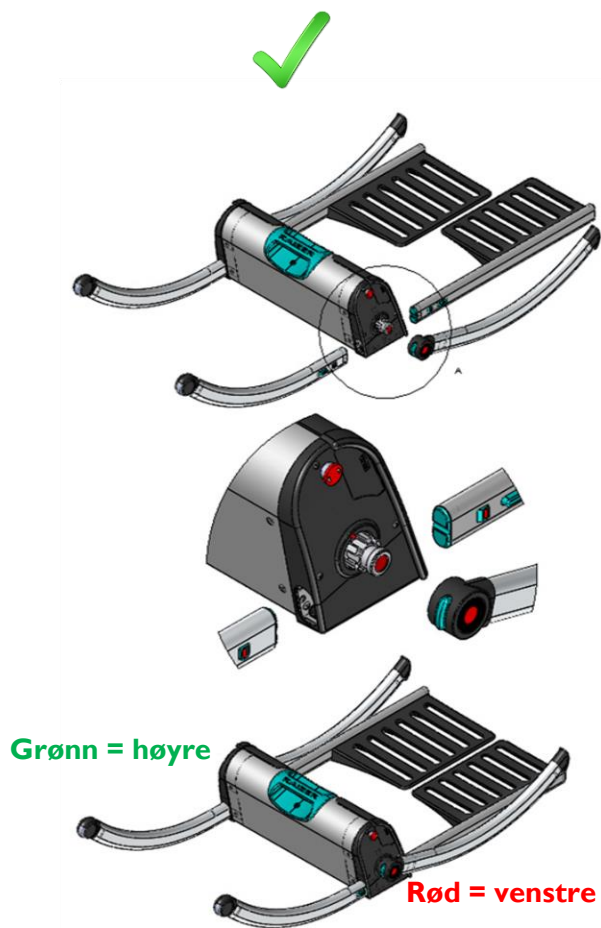

Korrekt montering av ben og ryggene.

Merk: røde merker i venstre side
Merk: grønne merker i høyre side

Feil montering

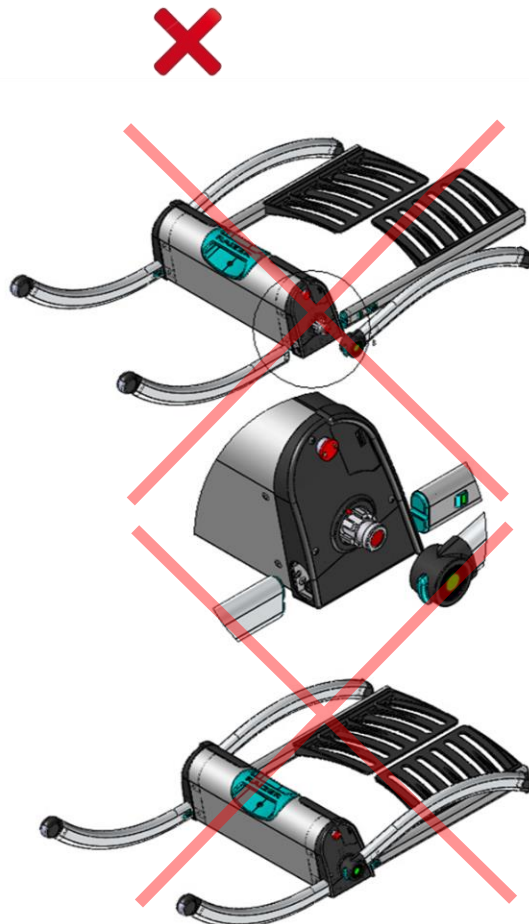

Feil montering av ben og ryggene.

6.2 Unngå personskade



Selv om Raizer er utstyrt med diverse sikkerhetsforanstaltninger, så skal løftestolen aldri brukes hvis personer eller dyr utilsiktet oppholder seg i nærheten, slik at klemfare oppstår. **La aldri barn leke med Raizer.**

6.3 Overbelastning.

For å unngå materiell skade i forbindelse med overbelastning (maks. 150 kg) er Raizer utstyrt med en sikringsmekanisme som ved overbelastning stopper løftestolen og utløser en akustisk alarm. Hvis dette skjer, kjør løftestolen ned i vannrett posisjon/gulvnivå.

Hvis Raizer utsettes for tung belastning når stolen ikke er drift, kan den synke langsomt. Dette er helt normalt. Av sikkerhetsmessige årsaker er Raizer konstruert slik at den synker langsomt når den utsettes for tung belastning. Dette er gjort for å unngå mekanisk brudd ved ev. overlast.

7. Personsikkerhet



7.1 Unngå personskade

- For å unngå personskade skal løftestolen IKKE brukes dersom noen eller noe kan komme til skade på grunn av klem- eller kuttfare, fall, snubling eller lignende.
- Det er viktig at hjelperen sørger for at løftestolen kan bevege seg uten å utsette noen eller noe for risiko.
- Pass ekstra godt på barn eller personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming som befinner seg på eller i nærheten av løftestolen. Det kan ikke forventes at disse gruppene kan forutse mulige konsekvenser av løftestolens bevegelser.
- Last aldri mer på løftestolen enn de 150 kg som er angitt som maksimal last på skiltet på stolen.
- Bruk IKKE løftestolen uten at personen er sikret med sikkerhetssele som er montert på setet.

7.2 Sikkerhetssele

- For å ivareta personens sikkerhet er setet utstyrt med en sikkerhetssele.
- Bruk IKKE løftestolen uten at personen er fastspennet med sikkerhetssele rundt hoften.



Etter at Raizer er montert under den liggende personen, klikkes sikkerhetssele på rundt hoftene.

7.3 Håndtering

Raizer leveres som regel av forhandleren. Løftestolen er klar til bruk ved levering.

Raizer kan transporteres i de to veskene som følger med. Den ene er et trekk til selve setet. Setet bæres i det turkise håndtaket.

Rygg og ben transporteres i vesken ved hjelp av bærestropper til hånd eller rygg (lang stropp til skulder eller to stropper som ryggsekk).



Raizer må ikke utsettes for kraftige støt eller slag som kan gå utover produktets funksjonalitet.

Den medfølgende fjernkontrollen* skal oppbevares tørt og må ikke utsettes for kraftige støt eller slag ved f.eks. å falle i gulvet, bli kastet eller lignende. Til rengjøring brukes kun en godt oppvridd klut.

Bruk aldri høytrykksspyler eller rennende vann til å spyle stolen. Det kan medføre defekter i produktet.

* Ekstraustyr

8. Funksjonsbeskrivelse

Raizer er en batteridrevet, mobil løftestol som på få minutter hjelper en liggende person opp til nesten stående stilling. Raizer kan betjenes av kun én hjelper og krever ingen fysisk innsats fra hjelper utover en støttende hånd.

Løftestolen fungerer ved at hjelperen setter stolen sammen rundt personen som har falt, og deretter betjener den via trykknappene på setet eller fjernkontrollen*. Hjelperen kan få den liggende personen opp i sittende eller nesten stående stilling for videre forflytning.

Raizer betjenes ved å aktivere trykknappen under hele løftet. Når trykknappen slippes, stopper løftet.

9. Før løftestolen tas i bruk

OBS: Sørg for at løftestolen alltid er oppladet. Det følger med to ladere, og det anbefales at Raizer alltid står til lading når den ikke er i bruk. Se for øvrig punkt 12.


Løftestolen kan oppbevares der man ønsker. Løftehastigheten vil imidlertid være redusert når temperaturen på batteriet er under 0 °C. Men i praksis vil en oppladet Raizer alltid gjøre jobben, også etter å ha vært oppbevart i bil i sterk kulde (-15 °C)

* Ekstraustyr

10. Bruk

10.1 Montering og bruk av Raizer®

1

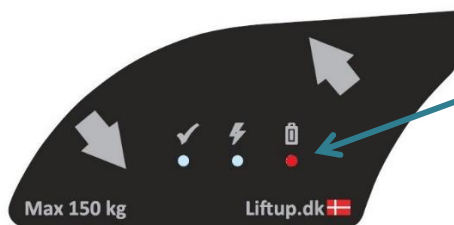


- Kontroller at stolen er oppladet før bruk. For å slå på Raizer, trykk på opp- eller nedknappen på siden av stolen. LED lyser grønt når batteriet er fullt oppladet

2



- Ankomst til liggende person

3

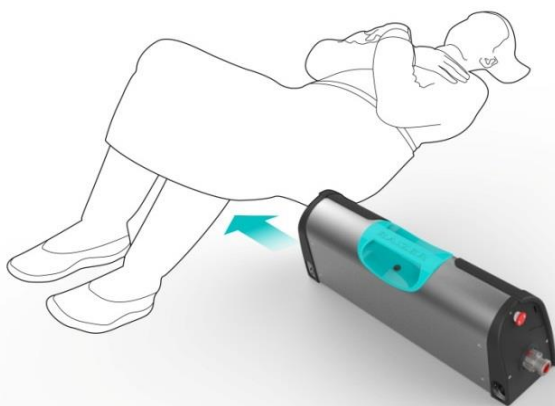


- Plasser setet på gulvet ved siden av den liggende personen.
- Løft bena slik at de står i vinkel.
- Skyv setet forsiktig inn under bena.

10.2 Montering av venstre side


Elementer for venstre side er markert med **rød** sirkel.

1

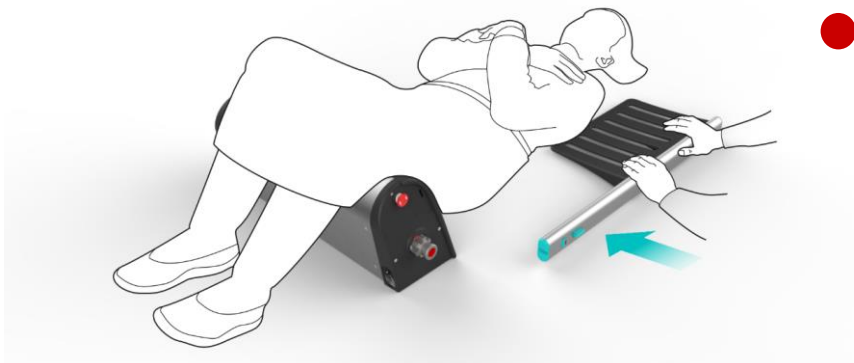


- Drei personens skulder forsiktig ved å skyve albuen.
- Skyv ryggenet (med **rød** markering for venstre side) forsiktig inn under skulderen til personen.

2

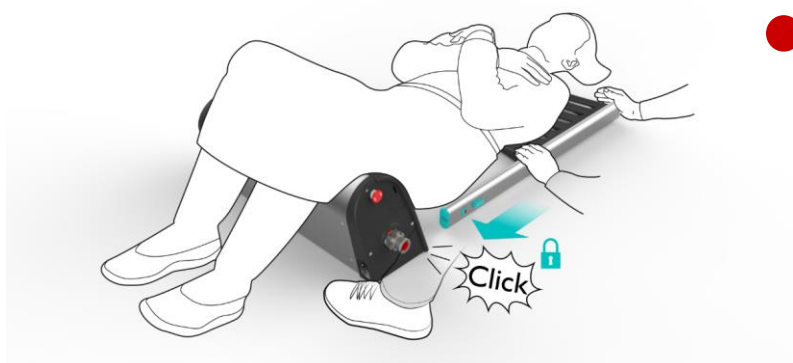

- La ryggenet gli forsiktig inn og klikkes på plass i setet.
- Plasser eventuelt foten foran setedelen for å hindre at denne glir frem.

3

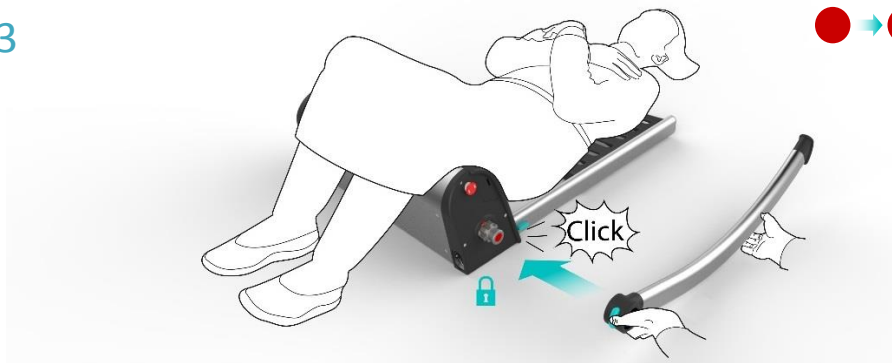

- Skyv bakbena, med **rød** markering for venstre side, inn på akslingen og klikk fast.


4




- La forbena, med **rød** markering for venstre side, gli inn og klikkes på plass i setet.
- Merk at klikklåsen skal vende utover.

10.3 Montering av høyre side

Elementer for høyre side er markert med **grønn** sirkel.

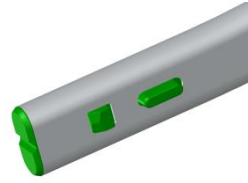


1

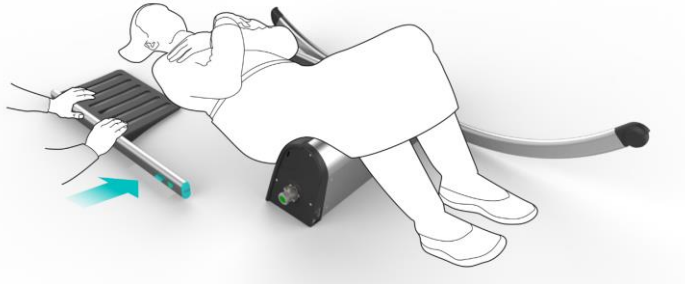


- Drei personens skulder forsiktig ved å skyve albuen.
- Skyv ryggenet (med **grønn** markering for høyre side) forsiktig inn under skulderen til personen.

2

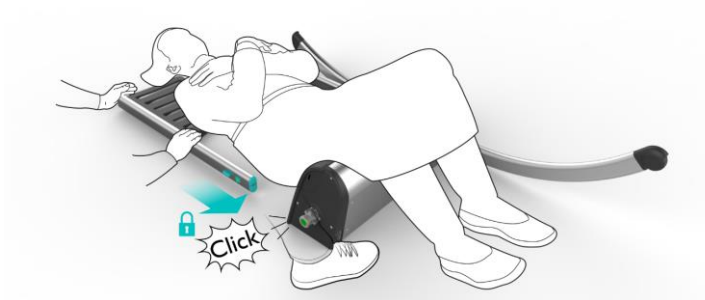


- La ryggenet gli forsiktig inn og klikkes på plass i setet.
- Plasser eventuelt foten foran setedelen for å hindre at denne glir frem.

3

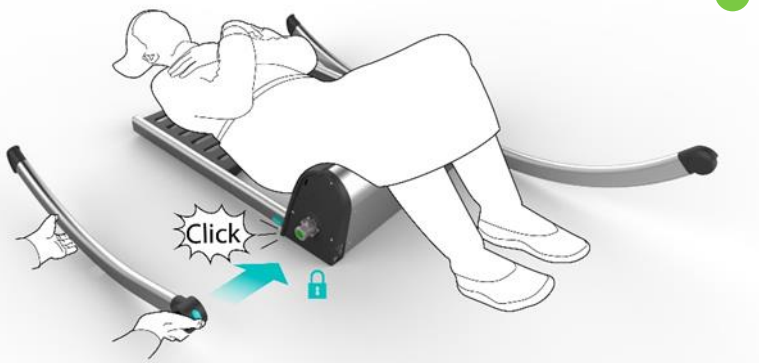

- Skyv bakbena, med **grønn** markering for høyre side, inn på akslingen og klikk fast.
- Merk: Høyre og venstre bakben monteres på drivakselen, slik at de er parallelle, dvs. samme posisjon som motsatte side.


4

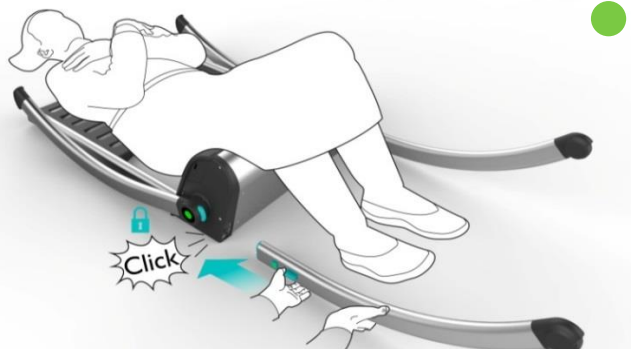

- La forbena, med **grønn** markering for høyre side, gli inn og klikkes på plass i setet.
- Merk at klikklåsen skal vende utover.



Ikke kjør stolen opp før du er sikker på at det ikke er fare for at personens føtter, armer, hender eller andre kroppsdeler kan komme i klem når løftestolen heves!

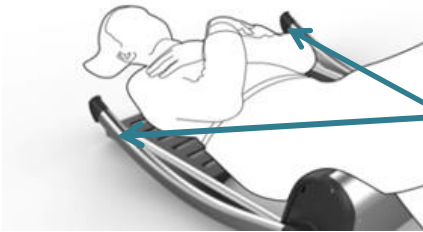


BAKBENA

Bakbena monteres vannrett og parallelt over gulvet langs skulderen (som på bildet). Hvis dette ikke er tilfellet, pass på å montere begge bakbena parallelt.



Sørg for at personens armer holdes samlet på brystet. Så snart man trykker på «pil opp», vil bakbena kjøre ned mot gulvet og kan treffe personen dersom skuldre/armer ligger i veien.

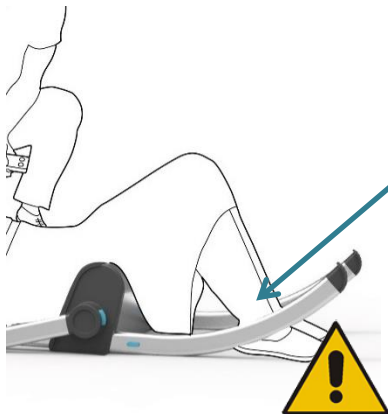


FORBENA

Pass på at personens ben holdes samlet, slik at føtter/ben ikke kommer inn under et forben når stolen kjøres opp, siden forbena beveger seg ned mot gulvet før stolen begynner å løfte personen.

10.4 Løft av person


1

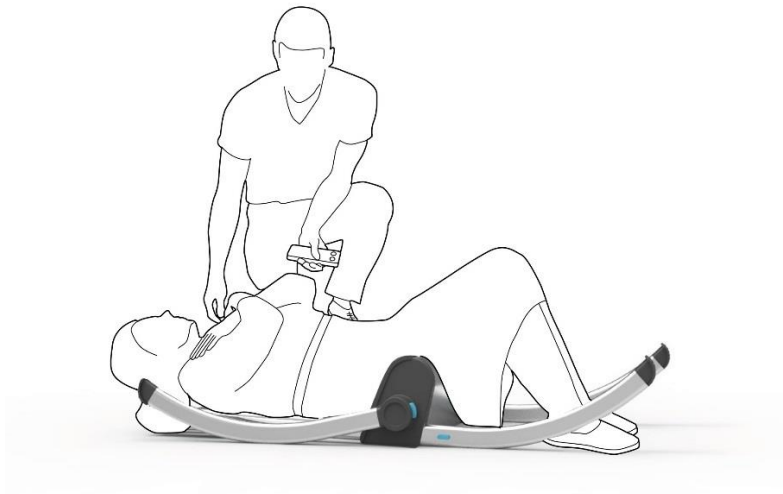

- Etter at Raizer er montert under den liggende personen klikkes sikkerhetssele på hoften.
- Raizer er nå klar til å løfte personen.


2



- Støtt med en hånd under personens nakke.
- Trykk på «pil opp» på sidepanelet eller fjernkontrollen* 
- Raizer kan betjenes fra begge sider.

3



- Hold trykket på
 «pil opp»
 helt til
 personen er i
 ønsket posisjon.

4



- Raizer stopper
 automatisk når
 personen er
 kommet opp i
 sittende stilling.


OBS: Raizer er sikret mot å kjøre for langt opp og stopper automatisk i øverste posisjon samtidig som det høres et langt biiiiip.

5




- Kjør løftestolen
 ned i vannrett
 posisjon og ta den
 fra hverandre.

10.5 Betjening av Raizer® via trykknapper på setet

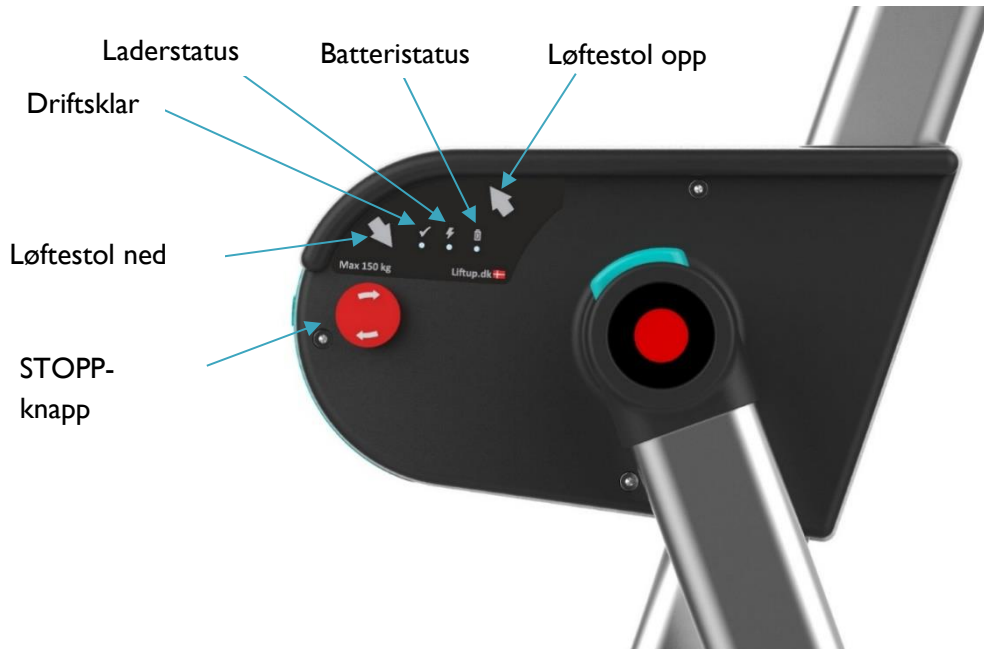


1

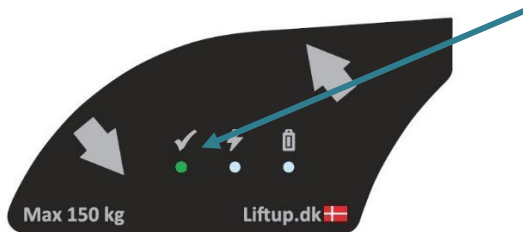


- De roterende bena skal være montert korrekt før Raizer kan settes i gang. Grønn LED lyser når Raizer er driftsklar. (se punkt 10.2 og 10.3)
- Raizer aktiveres ved å trykke kort på «pil opp» eller «pil ned».
- Raizer slås automatisk av etter 10 minutter uten aktivitet (det høres et langt biiiiip før den slår seg av).
- For å aktivere Raizer trykk på én av opp- eller nedpilene på siden av stolen.

2

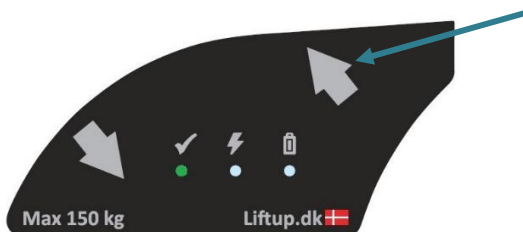

- Trykk her for å kjøre løftestolen opp.
- Kjører kun så lenge knappen er trykket inn.

3

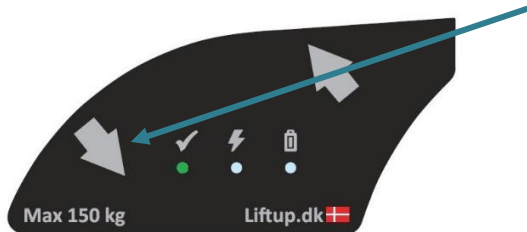


- Trykk her for å kjøre løftestolen ned.
- Kjører kun så lenge knappen er trykket inn.

4



- Trykk på stoppknappen for å deaktivere Raizer. Alle kjørefunksjoner blir avbrutt.
- Drei stoppknappen i pilens retning for å aktivere Raizer igjen.


5

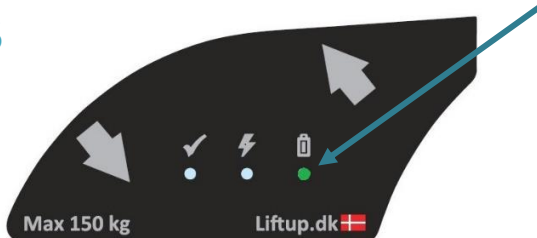

- LED lyser grønt når batteriet er mer enn 20 % oppladet.

OBS: Ved kjøring med last kan LED skifte til rødt – dette er normalt.

6

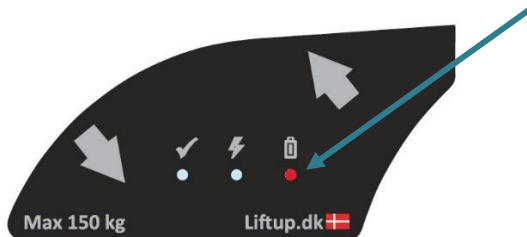

- LED lyser rødt når batterikapasiteten er under 10 %.
- Når LED lyser rødt, er det maks. 0–5 løft igjen på batteriet. Stolen bør/skal settes til lading (se punkt 12 lading).

10.6 Betjening av Raizer® via fjernkontroll

1



- Trykk her for løftestol opp.
 - Kjører kun så lenge knappen er trykket inn.
- OBS: Raizer må være slått på for at fjernkontrollen* skal virke (ved lett trykk på «pil opp»/«pil ned» på siden av stolen).

2



- Trykk her for løftestol ned.
- Kjører kun så lenge knappen er trykket inn.

* Ekstraustyr

10.7 Slik parer du sender og mottaker for fjernkontroll

Slik nullstiller du sender og mottaker:

For å nullstille en fjernkontroll*, slik at den ikke er koblet til Raizer, følg punktene under:

1. Trykk samtidig på OPP(↑) og NED (↓)-knappene på fjernkontrollen* og hold dem inne i ca. 5 sekunder helt til kontrolldioden i fjernkontrollen* begynner å blinke langsomt. Fjernkontrollen* er nå i installasjonsmodus i to minutter.
2. I løpet av de to minuttene utføres følgende sekvens:

Trykk på: OPP(↑), OPP(↑), NED (↓), NED (↓), OPP(↑), NED (↓), OPP(↑), NED (↓)
--

Når kontrolldioden begynner å blinke raskt, er fjernkontrollen* ikke lenger koblet til Raizer.

Paring av ekstra fjernkontroll*

1. Sørg for at Raizer har strøm.
2. Raizer skal være avslått.
Raizer slås automatisk av etter 10 minutter uten aktivitet (det høres et langt biiiip før den slår seg av).
3. Trykk samtidig på OPP(↑) og NED (↓)-knappene på fjernkontrollen* og hold dem inne i ca. 5 sekunder helt til kontrolldioden i fjernkontrollen begynner å blinke langsomt. Fjernkontrollen* er nå i installasjonsmodus i to min.
4. I løpet av disse to minuttene slår man på den løftestolen som man ønsker å koble til fjernkontrollen*. Trykk på «pil opp» / «pil ned» på siden av stolen.
5. Når kontrolldioden på fjernkontrollen* stopper å blinke, er den koblet til løftestolen.
6. Prøv systemet for å sikre at paringen er gjennomført korrekt. Hvis ikke, gjenta punkt 1–5.

* Ekstraustyr

II. Demontering

1



- Kjør løftestolen ned i vannrett posisjon og ta den fra hverandre.


2



- Legg alle delene i transportvesken.

I2. Lading av Raizer®


1

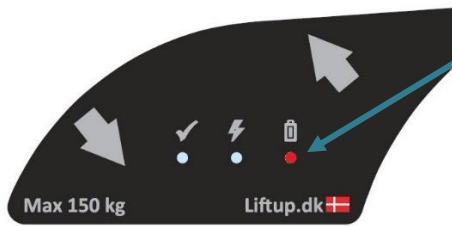

- LED lyser rødt når batterikapasiteten er under 10 %.

OBS: Lyser bare når stolen er slått på.

2

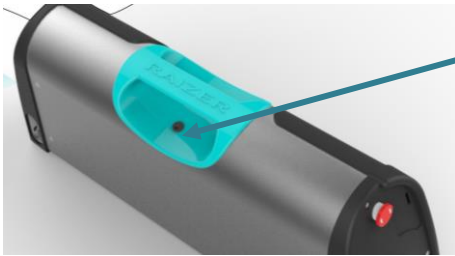

- Støpsel til lader er plassert på setets løftehandtak.

3




- Koble 220 VAC-lader til inngang på Raizer.

4




- Eller koble til 12 VDC-lader til inngang på Raizer.

5

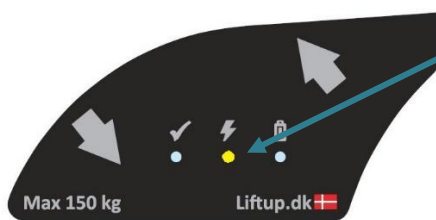

- LED lyser gult når lading pågår.

6

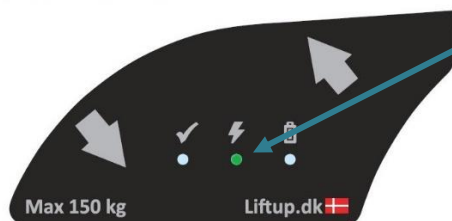

- LED lyser grønt når batteriet er fullt oppladet.

13. Vedlikehold

13.1 Rengjøring

Raizer er ikke vanntett.

OBS: Vanlig rengjøring utføres kun med en godt oppvridd klut. IKKE bruk rennende vann, høytrykksspyler eller spyl direkte på løftestolen.

Du kan desinfisere Raizer ved å bruke alkoholbaserte desinfeksjonsprodukter med en konsentrasjon på 70–85 v/v %.



13.2 Mekanisk vedlikehold

Mekanisk vedlikehold av løftestolen skal normalt kun utføres i forbindelse med regelmessige serviceettersyn som gjøres av en autorisert servicetekniker i henhold til sjekkliste i punkt 14.

Skulle det oppstå utilsiktede feil eller skurrende lyder, kontakt straks forhandleren for å få utbedret feilen. Se www.raizer.dk.

13.3 Fjernkontroll*

Et CR2032-batteri er installert i fjernkontrollen*. NB! For å sikre stabil funksjon må batteriet skiftes ut hvert 2. år. For å skifte batteri, gjør som følger:

1. Løsne skruen bak på fjernkontrollen*
2. Fjern bakpanelet
3. Skift batteriet
4. Monter bakpanelet igjen og test



* Ekstraustyr

14. Sjekkliste for vedlikehold


I tillegg til det generelle vedlikeholdet som er beskrevet i punkt 13, anbefales rutinemessig ettersyn én gang per år av en autorisert servicetekniker. Forhandleren du har kjøpt produktet av vil tilby denne servicen. Ønsker du imidlertid å bruke en annen serviceleverandør, er det eieren av løftestolen som er ansvarlig for at den valgte serviceteknikeren har de nødvendige kvalifikasjoner med hensyn til det aktuelle produktet.

<https://www.liftup.dk/en/distributors/>

Av sikkerhetsmessige årsaker er det svært viktig at disse ettersynene overholdes, siden manglende eller feil utførte kontroller kan medføre personskade.

Alle serviceettersyn skal registreres i serviceheftet, se punkt 15.

15. Servicehefte




Service log

This form shall be filled in after every inspection

Customer	
Address	
Postcode	
Telephone No:	Serial no.:
Contact person:	Product type No:

No.	Date:	Remarks.	Signature
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

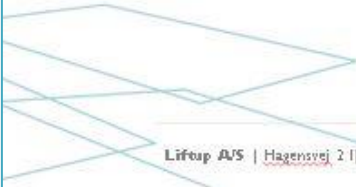












Liftup A/S | Hagensvej 2 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk

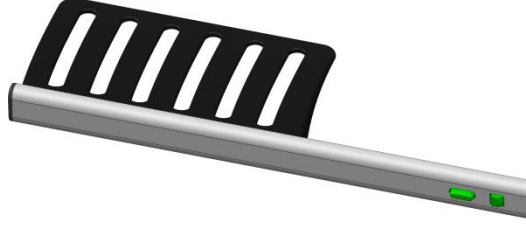


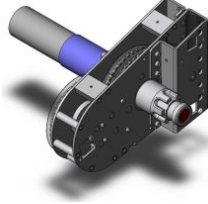
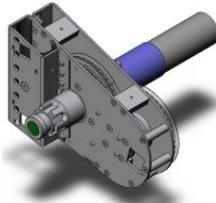


16. Reservedeler

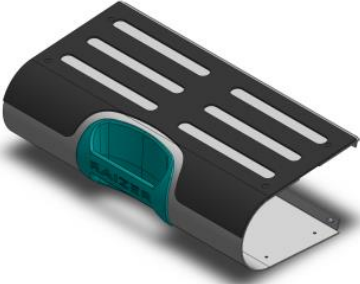OBS: Det er viktig at det alltid brukes originale reservedeler. Utskifting av deler skal kun foretas av autorisert servicetekniker.

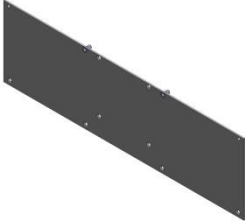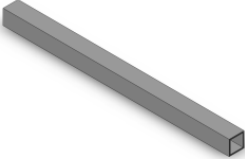Dersom det likevel brukes uoriginale reservedeler, kan reklamasjonsretten falle bort. Videre kan sikkerheten til produktet bli dårligere, og personfare kan oppstå.


Part no.	Description	Photo/illustration
102962	Front leg complete, left hand side / red (incl wheel)	
102963	Front leg complete, right hand side / green (incl wheel)	
102964	Back rest complete, left hand side, red	
102965	Back rest complete, right hand side / green	
102966	Rear leg complete, left hand side / red	
102967	Rear leg complete, right hand side /green	

I02971 Cover complete, Raizer	
I03207 Handle complete, Raizer	
I03535 Seat cover, silicone	
I03210 Rear cover complete, Raizer	
I02864 Connecting rod for drive units	
I02885 Control Board, Raizer	

<p>I02890 Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer</p>	
<p>I02984 Side cover complete, left hand side (stop-button side)</p>	
<p>I02985 Side cover complete, right hand side</p>	
<p>I02969 Motor unit, complete left hand side / red</p>	
<p>I02970 Motor unit, complete, right hand side / green</p>	
<p>I02888 Raizer side PCB with RF Reciever,</p>	
<p>I02889 Raizer side PCB without.RF Reciever</p>	

I03270 Screw kit, Raizer	
I02927 Color buttons, Raizer	
I02980 Micromatch Cable 12 pol, for Raizer	
I03421 Socket tool for Raizer	
I02921 Battery charger I205 SRP	
I02641 Cigarette lighter plug w .fuse for Raizer	
I03728 Seatbelt for Raizer complete	

<p>I02956 Carry case for Raizer</p>	
<p>I01604 Remote control – transmitter unit (Supplementary equipment)</p>	
<p>I03311 Trolley, Raizer (Supplementary equipment)</p>	
<p>I03314 Triple Wheel, 2pcs. Trolley, Raizer (Supplementary equipment)</p>	
<p>I03313 Bike bracket kit, Trolley, Raizer (Supplementary equipment)</p>	
<p>I03741 Disposable hygiene cover (10 pcs.) (Supplementary equipment)</p>	

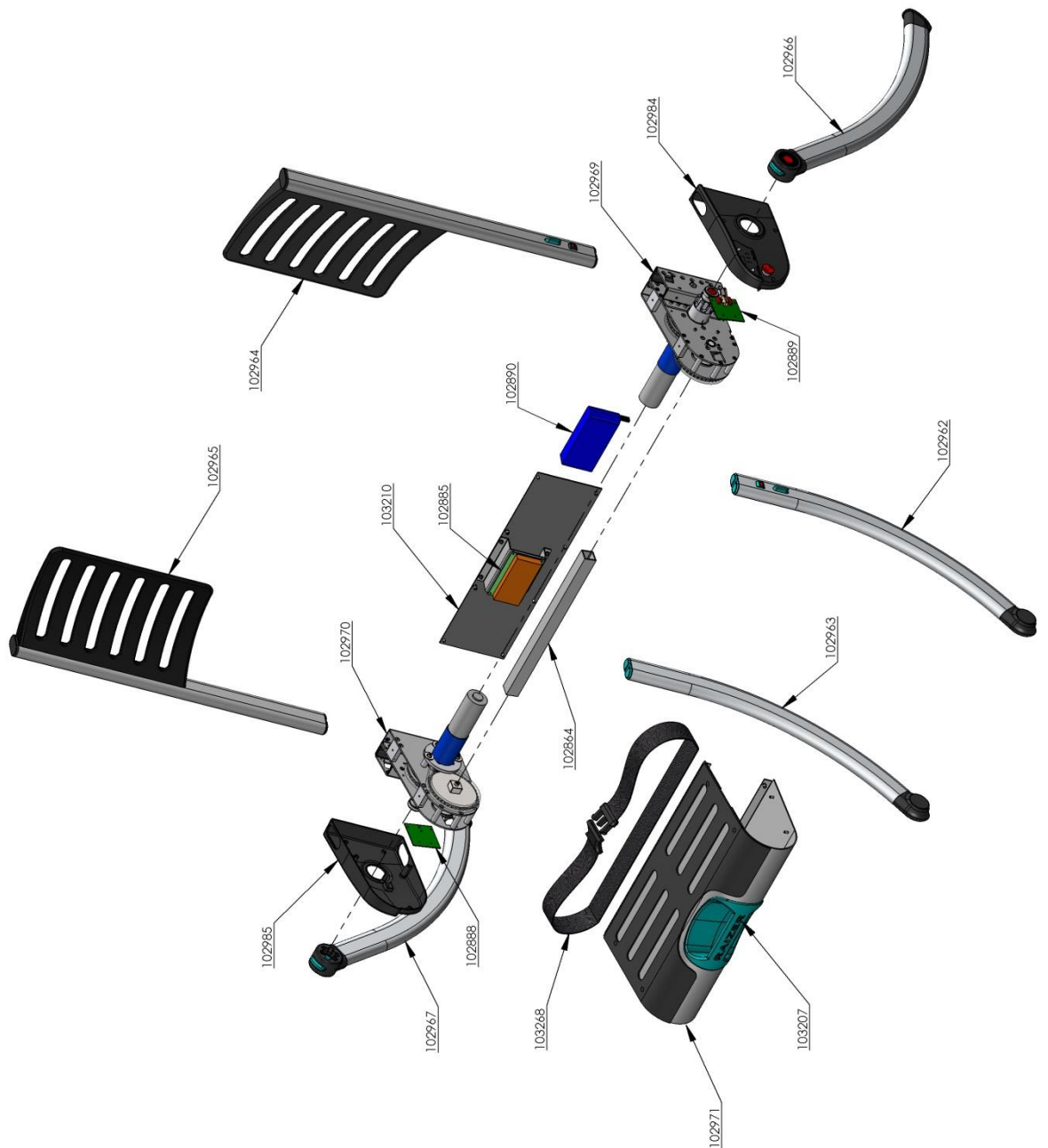

17. Feilsøking

Feil	Årsak	Løsning
Raizer kjører ikke, selv om man trykker på «pil opp»/«pil ned».	Stoppknapp er aktivert. 2-tonet alarm.	Drei stoppknappen i pilens retning til den klikker ut. Se punkt 10.2. Sjekk at LED for driftsklar lyser grønt.
	Bakbena er ikke korrekt montert. 2-tonet alarm.	Sjekk at LED for driftsklar lyser grønt. Hvis ikke: Monter bakbena slik at de klikker helt på akslingen. Se punkt 10.1.
	Raizer er overbelastet. 2-tonet alarm.	Fjern belastning fra Raizer. Se punkt 6.3
	Batteri er utladet. Se LED	Sett Raizer til lading. Se punkt 12.
Raizer kjører skjevt når man trykker på «pil opp» / «pil ned».	Bena er ikke montert parallelt.	Monter høyre og venstre bakben slik at de er parallelle. Se punkt 10.1
Raizer stopper i øverste posisjon.	Løftestolen når maks. høyde. Langt biiiiip.	Helt normalt. Løftestolen når maks. høyde.
Fjernkontrollen* virker ikke	Raizer er ikke slått på/aktivert	Aktiver opp- eller nedknappen på siden av Raizer med et kort trykk.
	Fjernkontrollen* er ikke korrekt parett med Raizer.	Se punkt 10.7

*Ekstrautstyr

19. Kassasjon

Det er eierens plikt å bortskaffe produktet i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. Kontakt ev. forhandleren for råd i forbindelse med bortskaffing.

Vær spesielt oppmerksom på at det er montert batterier i motorenheten. Disse må bortskaffes separat.

20. Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten er gyldig i henhold til de til enhver tid gjeldende regler vedr. reklamasjonsrett. Ytterligere opplysninger om dette finnes i salgs- og leveringsbetingelsene. <http://www.liftup.dk/da/om-liftup/salgsbetingelser/>

OBS: Reklamasjonsretten kan falle bort dersom de foreskrevne serviceettersynene ikke overholdes.

Hvis de foreskrevne serviceettersynene ikke overholdes, kan det få alvorlige konsekvenser for produktets sikkerhet. Det er kundens ansvar at Raizer® til enhver tid overholder de foreskrevne serviceettersyn. Jf. AT Bekjentgjøring I 109 § 14.

Lykke til med din nye Raizer®

Mvh. Liftup