



ZITZI™
STARFISH PRO



Bruksanvisning

Zitzi Starfish Pro

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	3	Supportbeslag	17
Inledning	3	Montering/Justering/Efterkontroll.....	17
Användningsområde	3	Fotstöd	18
Korrespondens	3	Påtagning/Avtagning/Vinkeljustering.....	18
Chassi.....	4	Fast fotstödsbeslag	18
Manuellt chassi	4	Fjädrande fotstödsadapter	19
Höj-/sänkbart chassi - hydraulik	4	Uppfällbart fotstödsbeslag.....	19
Höj-/sänkbart chassi - ställdon.....	5	Kulledsadapter	19
Sittdel	6	Vadstöd	20
Justering sittdel	6	Montering.....	20
Justering sittdjup/abduktion.....	6	Höjdjustering	20
Hjul	6	Breddjustering	20
Låsning av hjul.....	6	Potta	21
Abduktions-/adduktionsstöd.....	7	Montering.....	21
Montering.....	7	Kisskydd	22
Justering.....	7	Underhåll och skötselanvisningar	23
Höftbälte.....	8	Serviceintervall.....	23
Montering.....	8	Skötsel i hemmet.....	23
Justering.....	8	Gaskolven.....	23
Rygg.....	9	Verktyg.....	23
Höftvinkel	10	Garanti	23
Tilt av sittenhet	11	Kombinationer	23
Höftstöd	12	Batteriskötsel	23
Armstöd	13	Reservdelar	24
Montering.....	13	Rekonditionering.....	24
Justering.....	13	Märkning.....	24
Djupjustering.....	13	Återvinning.....	24
Avtagning/påtagning.....	13	Sammanfattning och efterkontroll ...	24
Armstöd, chassi.....	14	Anpassning och specialanpassning..	25
Montering på manuellt chassi	14	Rekommendationer	25
Montering på hydraul/el chassi	14	Anpassningar som får göras.....	25
Fällning av armstöd.....	14	Försäljningsvillkor.....	26
Körbåge.....	15	Garanti	26
Huvudstöd	16	Reklamation.....	26
Montering/Justering	16	Returer.....	26
		Tekniska data	27

Säkerhetsföreskrifter

Inledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Starfish Pro till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Produkten är avsedd för brukare med sittproblematik och passar många olika typer av diagnoser.

Anpassning/inprovning av Zitzi Starfish Pro ska alltid utföras av medicinskt behörig person.

Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som hygienestol. Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Korrespondens

Zitzi Starfish Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.

Ett unikt serienummer är placerat på det bakre mellanröret

Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 602 29 Norrköping

Telefon 011-161800

Fax 011-162005

E-post info@anatomicsitt.com

Web anatomicsitt.com, youtube.com/anatomicsitt

Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.


CE-märkningen **upphör** att gälla vid specialanpassad produkt.

Plats för etikett

Chassi

Manuellt chassi

Sittenheten kan justeras till önskad höjd innan patienten sätts i sitsen. Lossa spak (A) på båda sidor (position B är inte helt åtdragen, men hjälper till att styra vaggan i spåren). Lyft sitsen ur spåren och för in sitsen i spåren på önskad höjd. Se till att trycka ned sitsen ordentligt i spåren. Avsluta med att dra åt spak (A).

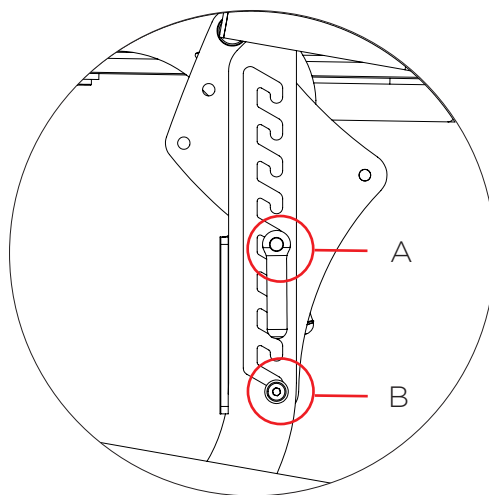


Höj-/sänkbart chassi - gaskolv

Sittenheten kan höjas eller sänkas till önskad höjd. Detta görs genom att pumpa på pedalen (C). Se till att pumpa med mjuka rörelser för att höjningen ska bli behaglig för patienten. För att sänka enheten så placeras en fot under pedalen och trycker den uppåt.



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk!

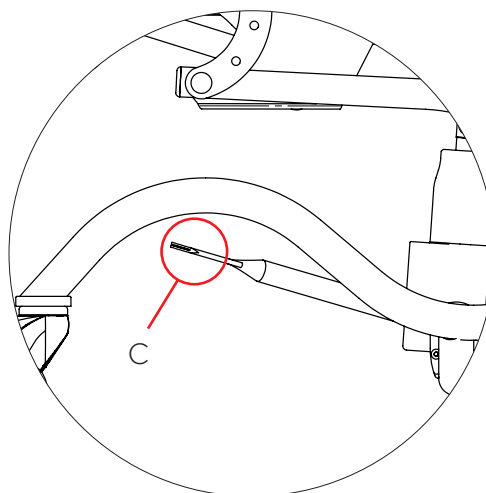

Höj-/sänkbart chassi - ställdon

Sitthöjden är reglerbar och justeras med en elektrisk handkontroll (D):



- Uppåtpil höjer sittplattan
- Nedåtpil sänker sittplattan



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk!



Kopplingar

Handkontrollen (D1) ansluts i kopplingsdosan.


Batterikabeln (H1) ansluts i kopplingsdosan och batteriet (H2).

Styrkabeln (L1) ansluts i kopplingsdosan och (L2) i ställdonet (F).

Anslutningskabeln (J1) kopplas i kontakten på kopplingsdosan. Fäst upp anslutningskabeln med buntband i ramen så att kontakt (J2) är riktad nedåt för att undvika vattensamling.


Ingående komponenter

- D - Handkontroll
- E - Batteri
- F - Ställdon
- G - Kopplingdosa
- H - Batterikabel
- J - Anslutningskabel
- K - Laddningskabel
- L - Styrkabel

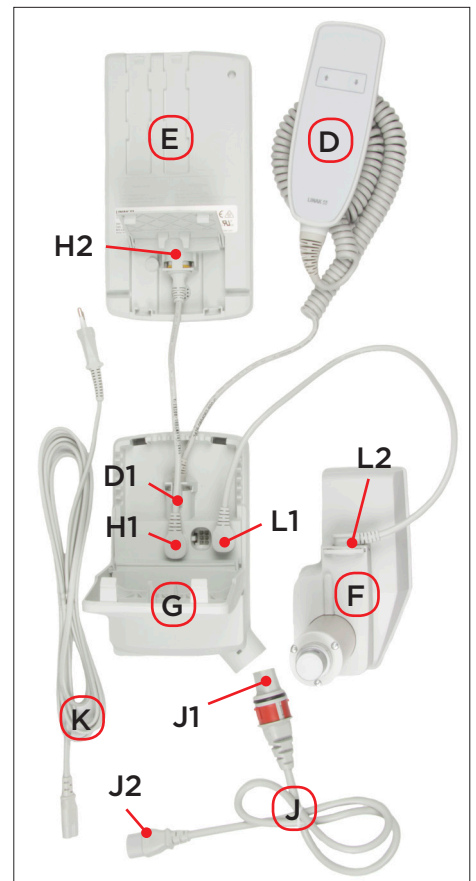

Kopplingsdosans anslutningar för:

- Anslutningskabel
- Ställdon
- Batteri
- Handkontroll

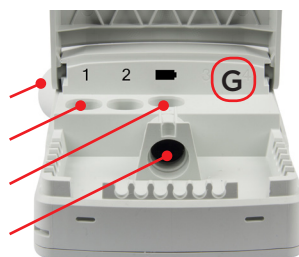

Laddning av batteri

Anslut laddningskabeln (K) till anslutningskabel (J2) och till ett vägguttag (220 V). Första gången du laddar batteriet måste det ske i minst 24 timmar. Det är mycket viktigt att batteriet aldrig laddas ur helt, eftersom att det då kan förstöras.

Sittdel

Justering sittdel

Sittdjup, benlängdsskillnad och abduktion av benen justeras enkelt. Ta bort fodret för att komma åt skruvarna.


Justering sittdjup/abduktion:

Lossa skruvarna (A) så att sittdelarna kan justeras för hand.

Justera sittdelarna. Lås skruvarna (A).



OBS! Var noga så att du inte skruvar ur skruvarna helt!

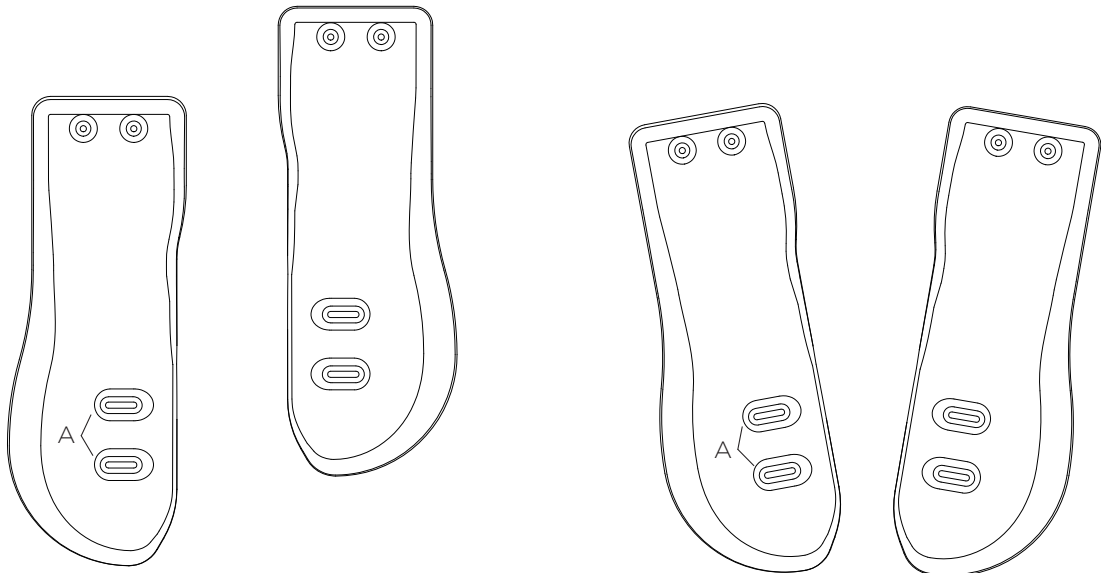


Hjul

Låsning av hjul

Tryck ned bromsreglaget (A) med foten för att låsa hjulen (se bild).

Drag upp reglaget för att frigöra hjulet.

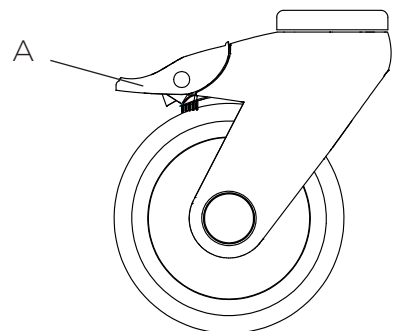


Abduktions-/adduktionsstöd

Montering

Skruva loss skruvarna (A) och sätt dit stöden så att du ser hålen genom spåren på stöden. Skruva sedan in skruvarna genom spåren och in i hålen för att fästa stöden.

Justering

Lossa lite på skruvarna (A) så att du kan skjuta stöden i sidled. Justera dem till önskat läge och dra sedan åt skruvarna.

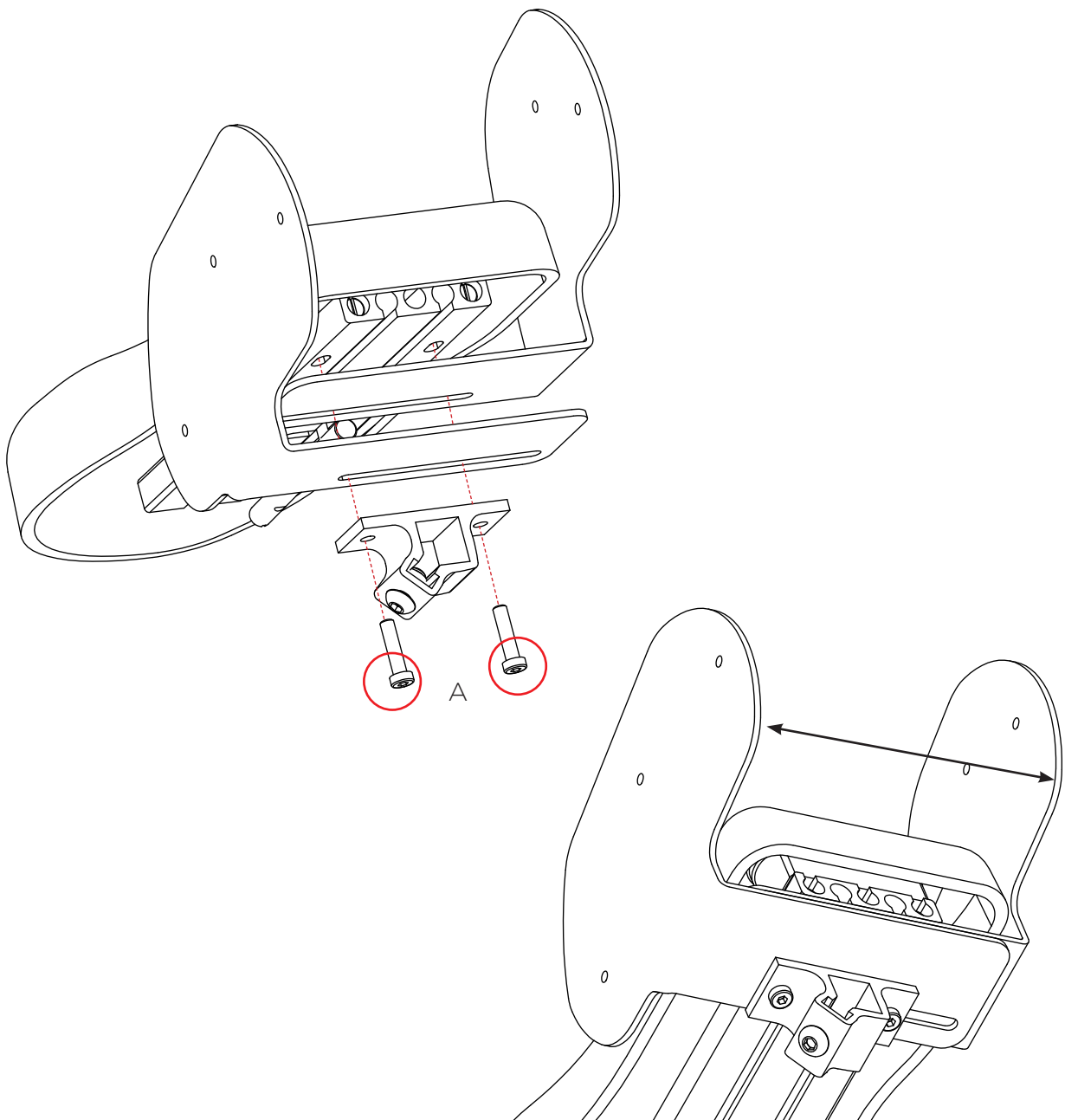


Höftbälte

Montering:

Montera fästbanden i respektive ögla.

Justering:

- * Drag åt bältet på båda sidor om spännet för att få det centrerat.
- * Justera bälteskuddarna för att ge optimal tryckavlastning.
- * Om banden är för långa, klipp av överflödigt band och bränn änden.

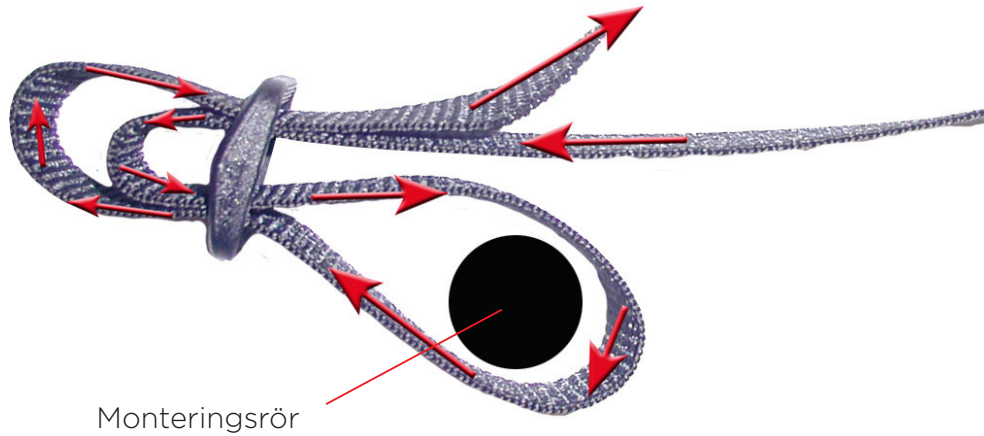


Rygg

För att justera ryggpelaren (A), lätta på de fyra skruvarna (B) som fäster pelaren på rygprofilen. Justera pelaren till önskad höjd och dra åt skruvarna (B).


Grovjustera höjd för bålbeslag genom att lätta på de fyra skruvarna (C) som fäster beslaget på rygprofilen. Justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (C).

Bålstöden kan nu finjusteras genom att lätta på spakvreden (D). Justera bålstöden till önskad position och dra åt vreden (D).

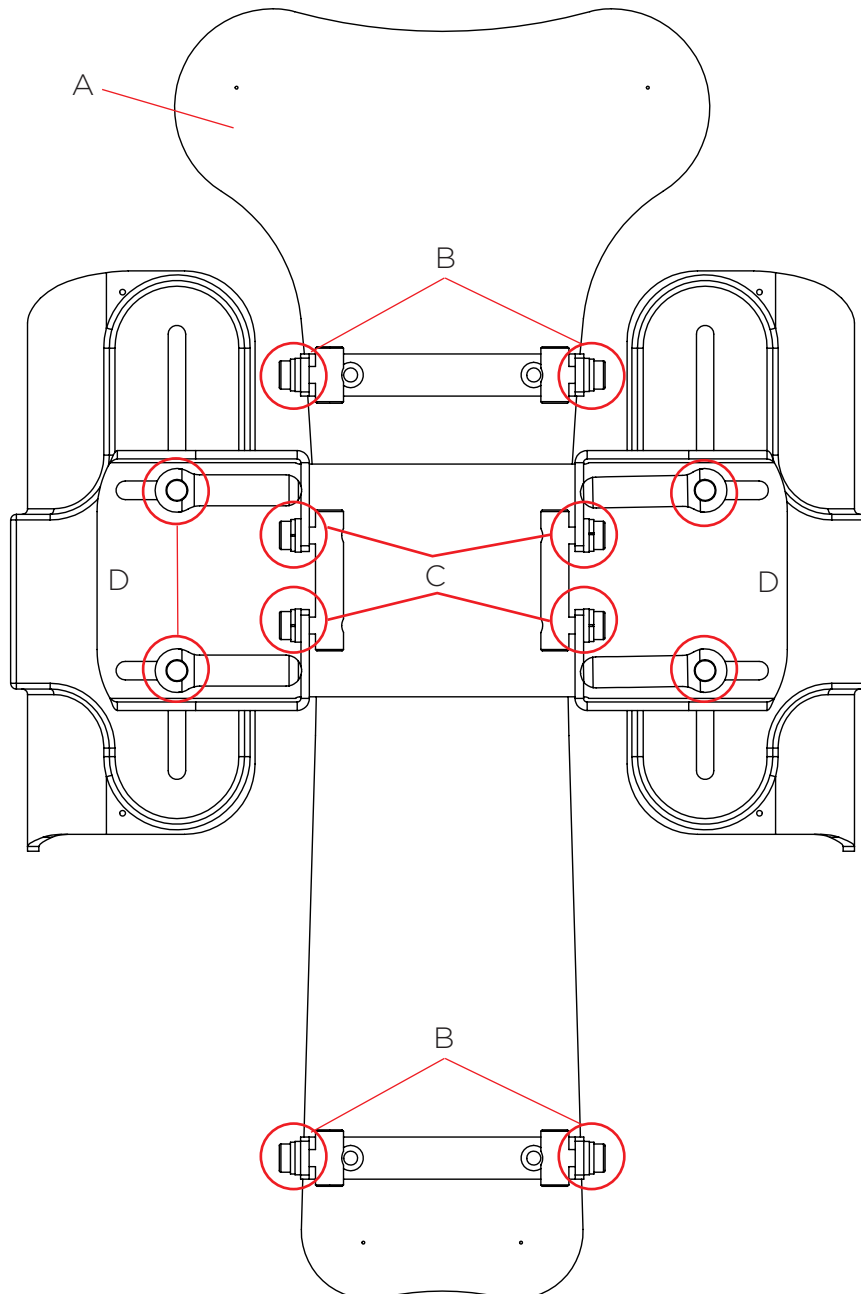

Höftvinkel


När höftvinkel ska justeras: börja med att lätta på säkerhetsvredet (A). Se till att ha ett stabilt grepp om körbågen samtidigt som utlösaren för gaskolven (B) trycks in. Justera ryggen till önskad vinkel och släpp utlösaren (B). Avsluta med att dra åt säkerhetsvredet (A).

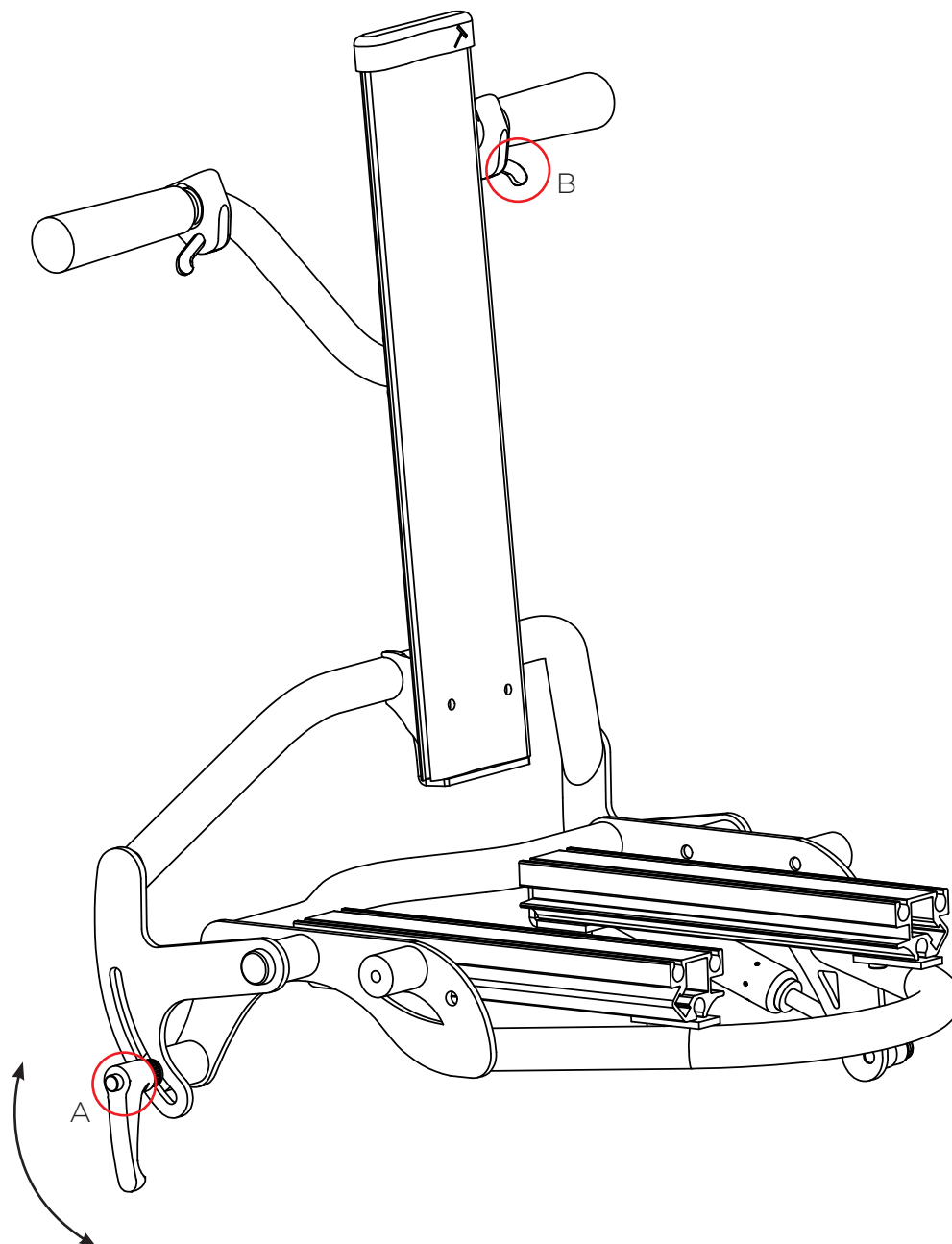

OBS! Se till att vajrar till utlösaren för gaskolven alltid löper fritt efter justering och kom ihåg att dra åt säkerhetsvredet!

Tilt av sittenhet


När sitsvinkel ska justeras, se till att ha ett stabilt grepp om körbågen samtidigt som utlösaren för gaskolven (A) trycks in. Justera sits till önskad vinkel och släpp utlösaren (A). Ha uppsikt över patienten och se till att inget riskerar att klämmas eller på annat sätt ta skada.

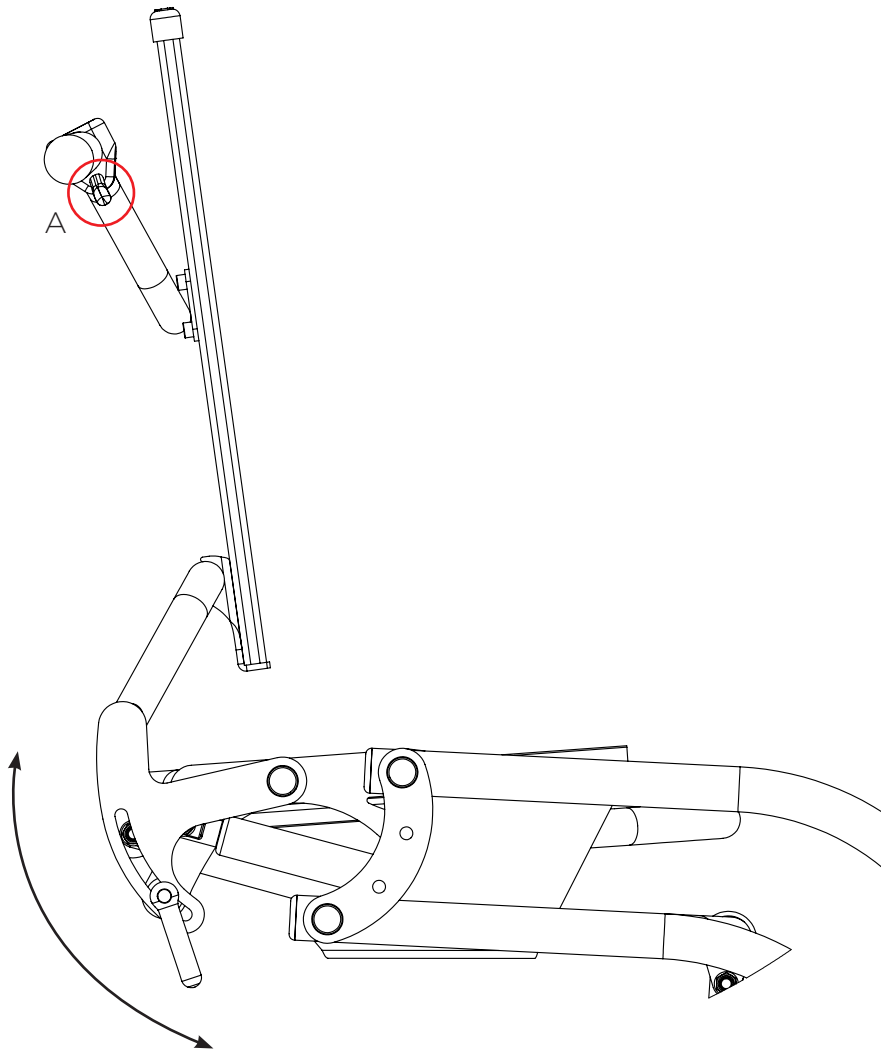

OBS! Se till att vajrar till utlösaren för gaskolven alltid löper fritt efter justering!

Höftstöd

Höftstödet monteras in i nederkant av ryggprofilen. För in sargsprint (A) och skjut upp höftstödet till önskad höjd. Drag åt skruvarna (B). Justera vinkelbeslaget till önskad position i sidled. Drag åt vred (C). Justera höftbeslag till önskat djup, drag åt vred (D).

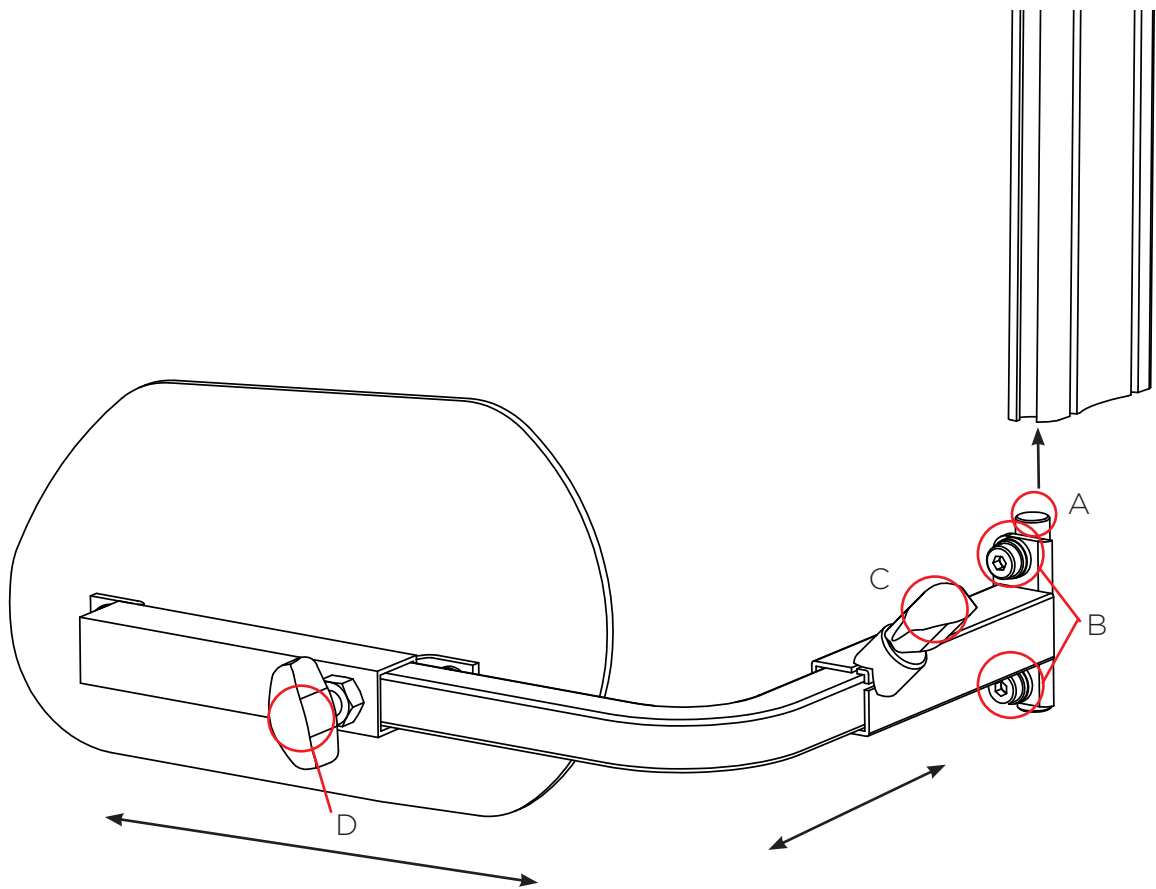

Armstöd

Montering, armstöd

Armstöden ska monteras på ryggstaget. Montera armstödsfästet enl. bild. Justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (A)

Justering av armstödsbredd


Lossa fingervredet (B). Justera till önskad bredd. Dra sedan åt fingervredet.

Djupjustering, armstöd

Lossa fingervredet (C). Justera till önskad position. Dra sedan åt fingervredet.

Avtagning/påtagning av armstödet


Lossa fingervredet (B). Dra ut armstödet i sidled. Påtagning sker omvänt.

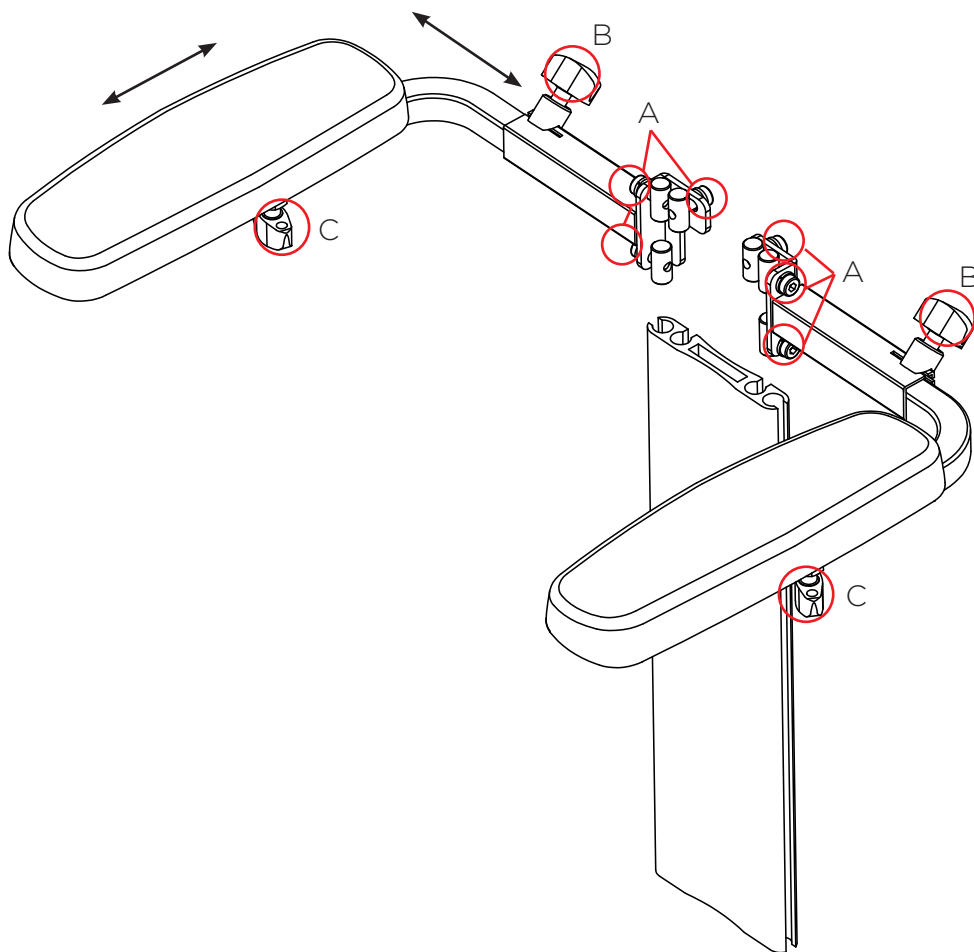

Armstöd, chassi

Montering på manuellt chassi

Armstöden ska monteras på sidoblecket (A).
Montera skruvarna (B) genom de försänkta hålen på blecket, genom distansplattan (C) och in i de gängade hålen på armstödet.

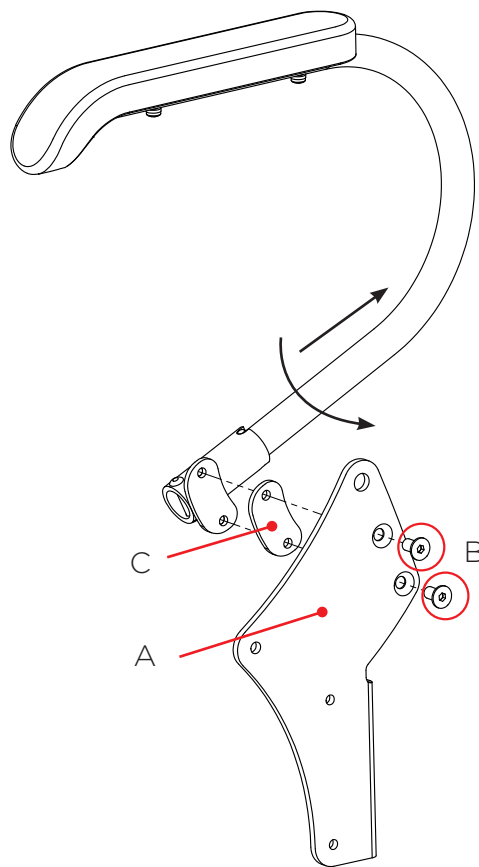


Fällning av armstöd

Armstöden är undansvängbara. Dra armstödet snett uppåt och bakåt. Vrid sedan stödet bort från chassit tills stödet hakar i nästa fälla.

Montering på hydraul/el chassi

Armstöden ska monteras på det yttre sidoblecket (A). Montera skruvarna (B) genom de centrala hålen på blecket och in i de gängade hålen på armstödet.

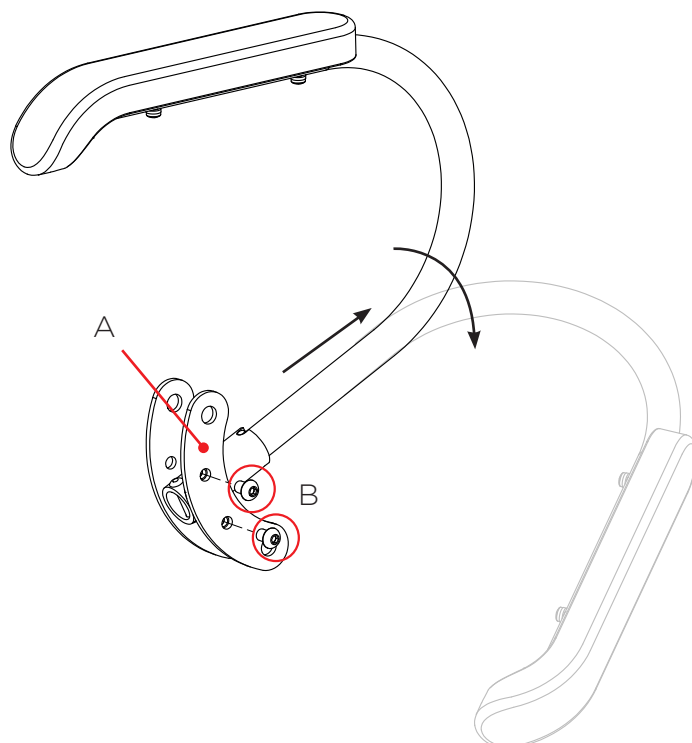


Fällning av armstöd

Armstöden är undansvängbara. Dra armstödet snett uppåt och bakåt. Vrid sedan stödet bort från chassit tills stödet hakar i nästa fälla.

Körbåge

Lossa skruvar (A) tillräckligt för att kunna trä in sargsprintarna (B) i profilen (C).
Justera till önskad höjd och dra sedan åt skruvarna (A).

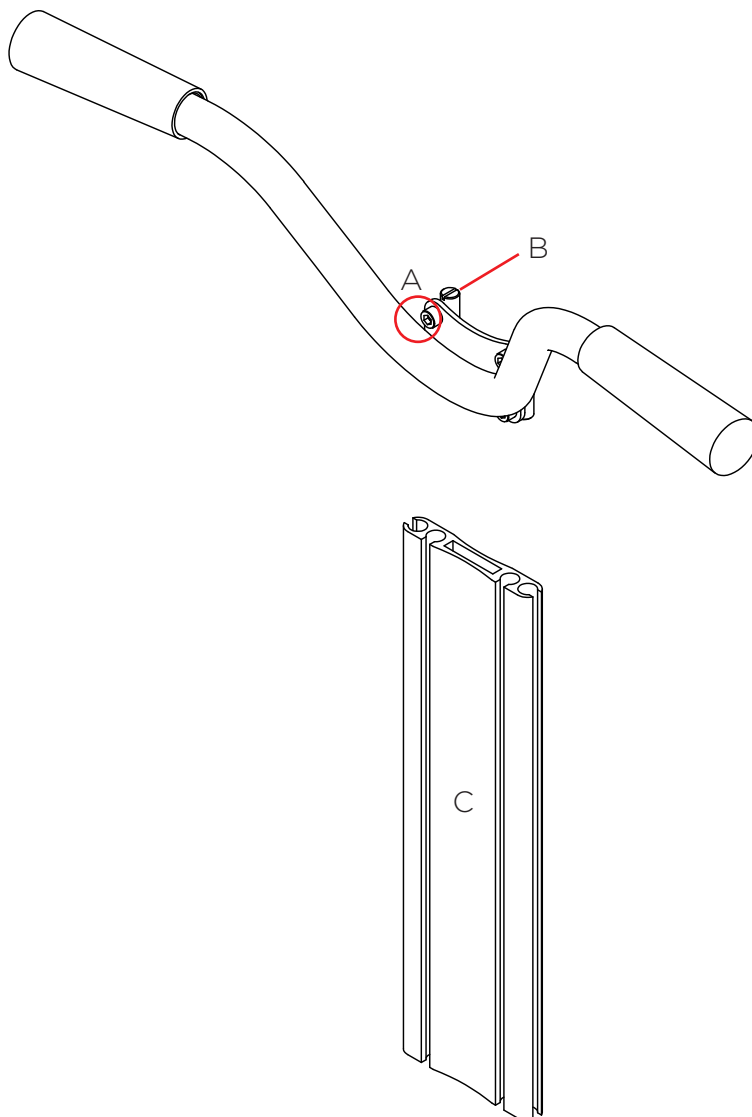

OBS! Se till att vajrar till utlösaren för gaskolven alltid löper fritt efter justering!



Huvudstöd

Montering / justering av huvudstöd

- * Ta bort skyddskåpan på ryggstaget.
- * Montera huvudstödsfästet (B) på ryggstaget.
- * Lossa skruvarna (A) lagom mycket för att det ska gå att justera med handen.
- * Sätt brukaren i sitsen och justera till önskad position.
- * Drag åt samtliga skruvar samt fingervreden och sätt tillbaka skyddskåpan.

Huvudstödet är enkelt att ta bort:

- * Lossa fingervredet (C) för att ta bort huvudstödet.

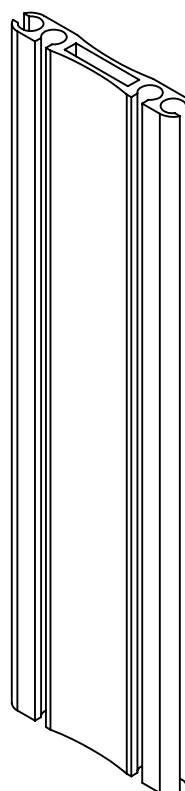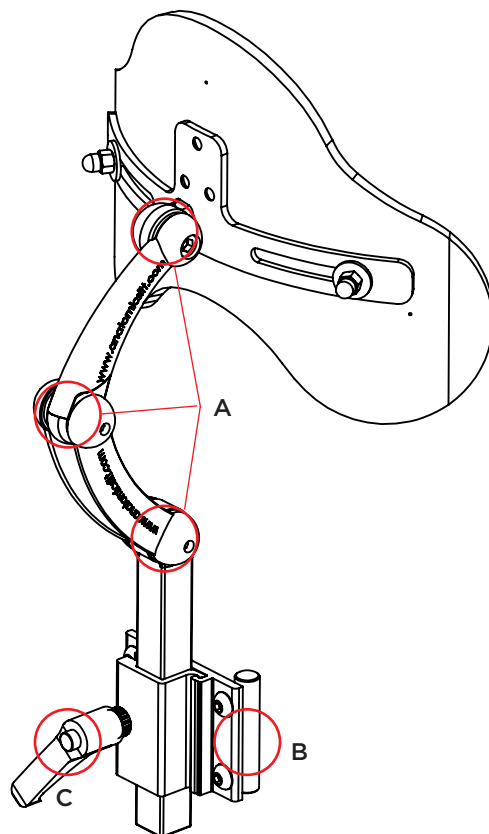


Supportbeslag

Montering / Justering av selar (Sternumstöd, H-sele)

Montering:

Övre fäste: (Bild 1)

- * Ta bort skyddskåpan på ryggstaget.
- * Montera övre fäststag enl. bild 1.
- * Öppna spännet (A), trä in fästbanden genom hålet i beslaget och genom spännet och lås spännet.

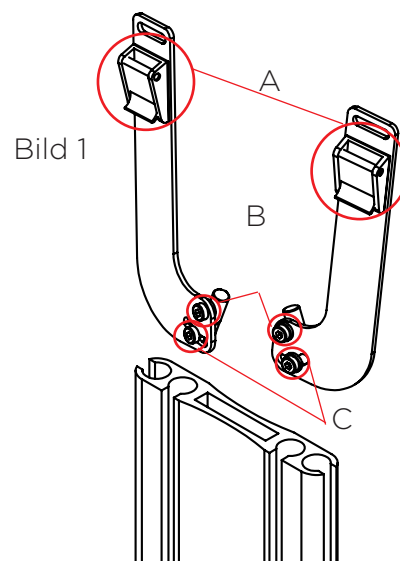

Nedre fäste till H-sele, Sternumstöd: (Bild 2)

Nedre fästet kommer förmonterat och ingår i stolen.
Lås bandet med hjälp av "Tri-glide" spännet enl. bild 3.


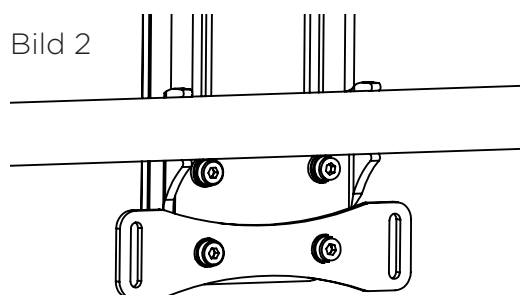


Bild 3 Montering med Tri-glide spänne.

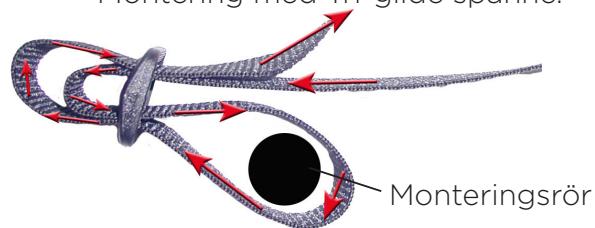

Justering:

Sätt brukaren i sitsen och lossa insexskruven enl. pos. B & C, bild 1.

Justera armarna så att dragriktningen för de övre fästpunkterna hamnar i samma höjd som axelpartiet.

- Skruva dit skruven enl. pos. B, bild 1.
- Justera till önskad bredd genom att vinkla staget till höger eller vänster. (Se till att det finns tillräckligt med utrymme för halsen.)
- Lås skruven enl. pos. C, bild 1.
- Justera bälteskuddarna i höjddled för att ge optimal tryckavlastning.

Efterkontroll:

- Se till att det finns tillräckligt utrymme för halsen.
- Trycket på bandet.
- Placeringen av bälteskuddarna.




OBS! Se till att det finns tillräckligt utrymme för halsen!

Fotstöd

Påtagning / Avtagning av fotstöd

- Skjut in fotstödet enl. bild.
- Dra åt vredet (A). Önskas en mer permanent fastsättning så kan vreden bytas mot skruvar (C) (som bifogas stolen vid leverans).
- Avtagning sker genom att vredet (A) lossas och benstödet dras ur.

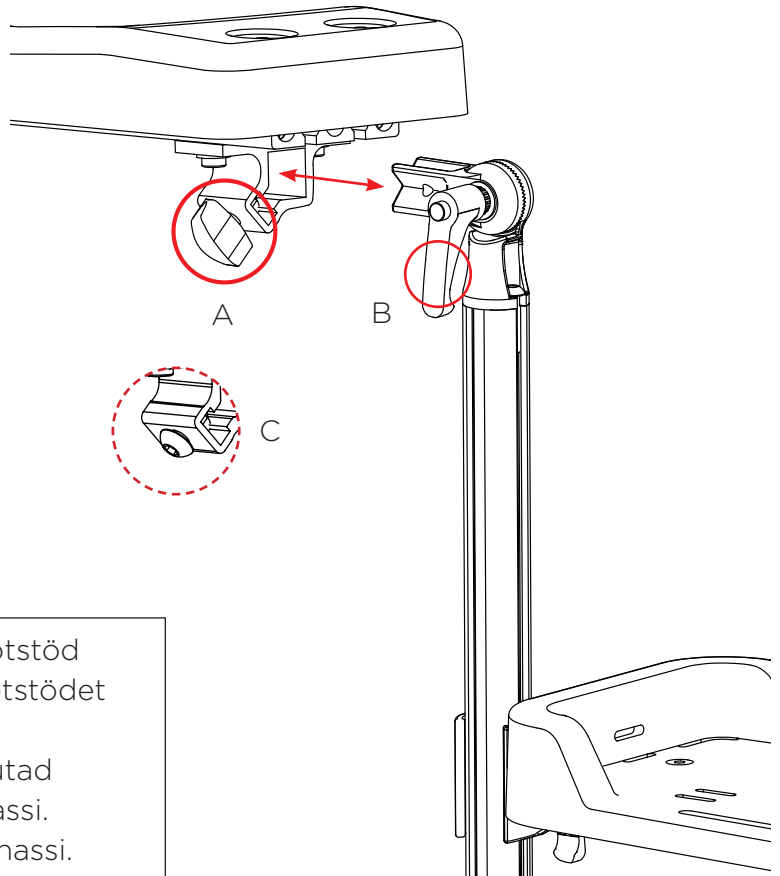


Vinkeljustering vid knäled

- Lossa spakvredet (B).
- Justera till önskad vinkel.
- Dra sedan åt spakvredet.

Fast fotstödsbeslag

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (B) något. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt skruven (B).

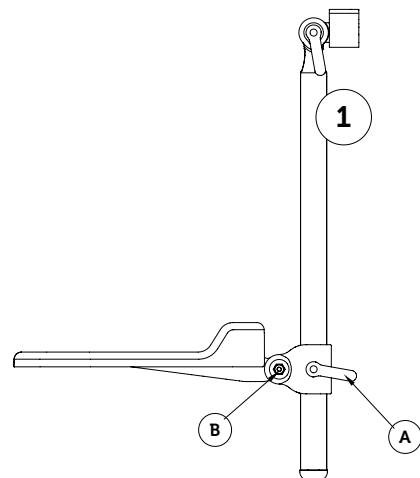


Fjädrande fotstödsadapter

För att höjjustera fotstödet lossar du skruven (D) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra åt skruven (D).

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (C) något. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt skruven (C).



Tips! Fjädringens motstånd kan justeras med en spårmejsel genom att skruva på skruven i fjäderpaketet (E).

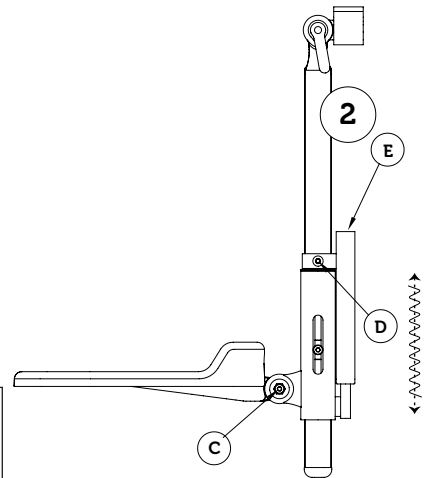


Uppfällbart fotstödsbeslag

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att använda den uppfällbara funktionen, lyft fotstödsplattan i framkant.

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (B) något. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt skruven (B).

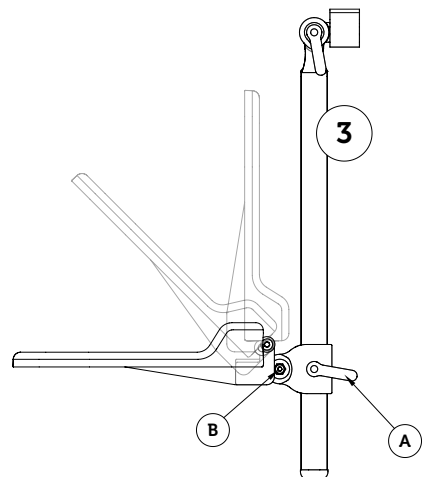


Kulleadapter

För att höjjustera fotstödet lossa spakvredet (A) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att använda kullefunktionen lossa först skruvarna (B) och (C) och justera till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B) och säkerhetslåset positionen med skruven (C).

För justering av fotplatta i djupled lossa skruvarna (D) något. Justera till önskad position och dra sedan åt skruvarna (D).

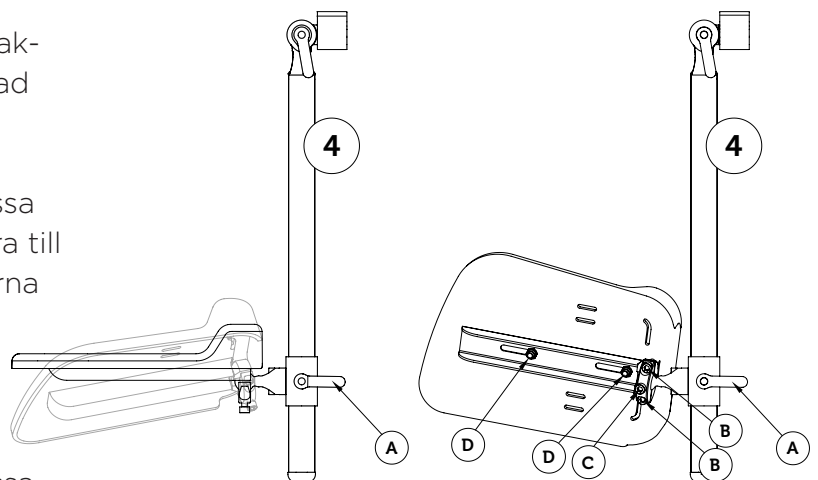

Vadstöd

Montering

Innan montering av vadstöd kan utföras måste du först ta bort eventuella fotstöd. Lossa på spakvredet (F) som håller fotstödet på plats på fotstödsstaget. Dra sedan fotstödsplattan och dess beslag nedåt.


Montera vadstödet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fotstödet.

Höjdjustering

För att höjdjustera vadstödet lossar du skruvarna (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (E).

Breddjustering

För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (A).

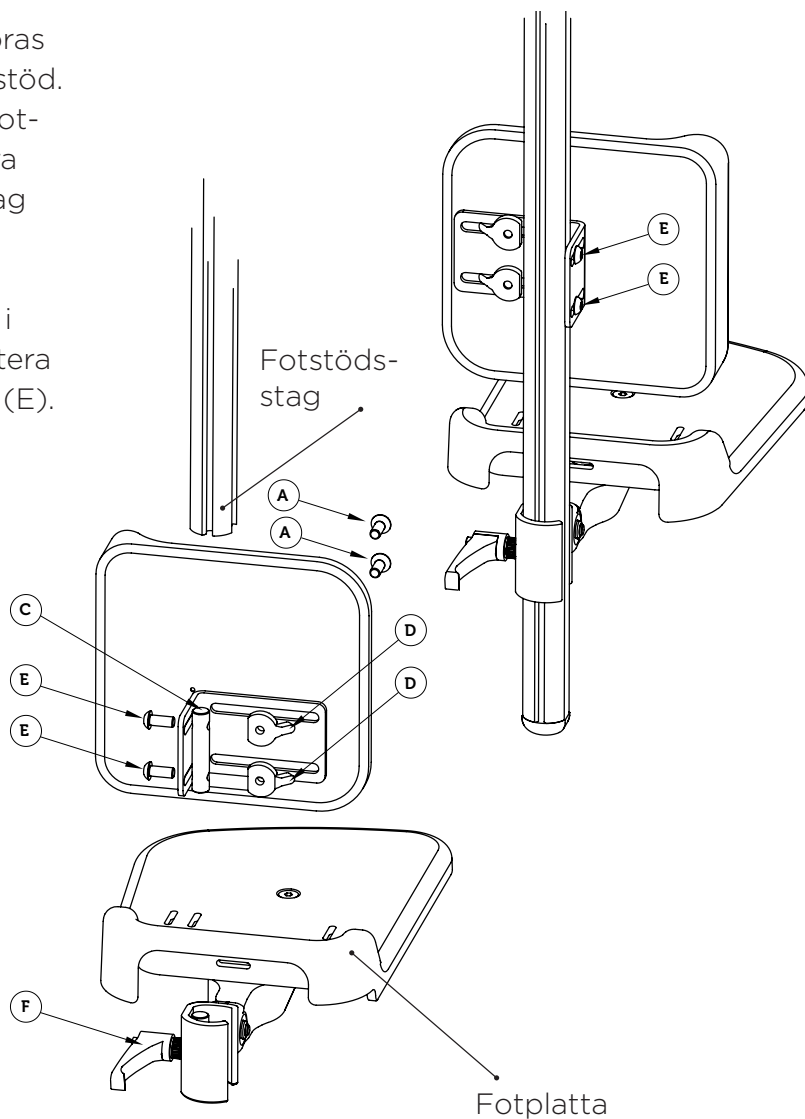


Potta

Montering

Montera pottan genom att skjuta in dess kanter i spåren (A) baktill på vaggan. Skjut pottan tills den tar emot röret i framkant.




OBS! Tilta ej stolen bakåt när pottan används!

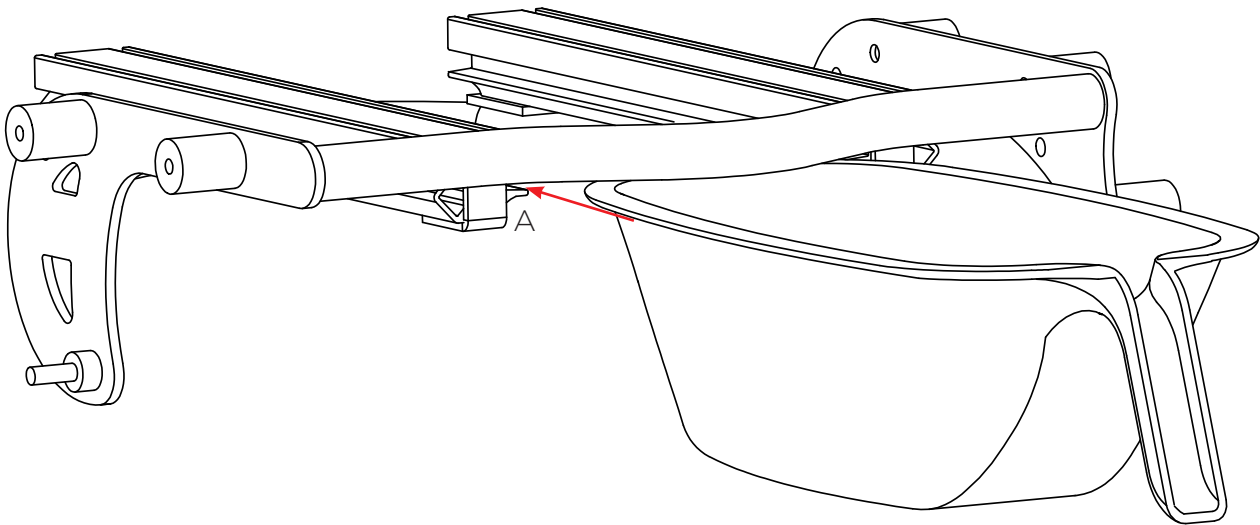

Kisskydd

Montera kisskyddet genom att kila ner det mellan bendelarna. Måtta av höjd på kisskyddet så att det passar patienten. Om potta används; kapa överflödigt material nedtill på skyddet så att nederkant vilar mot pottans botten.

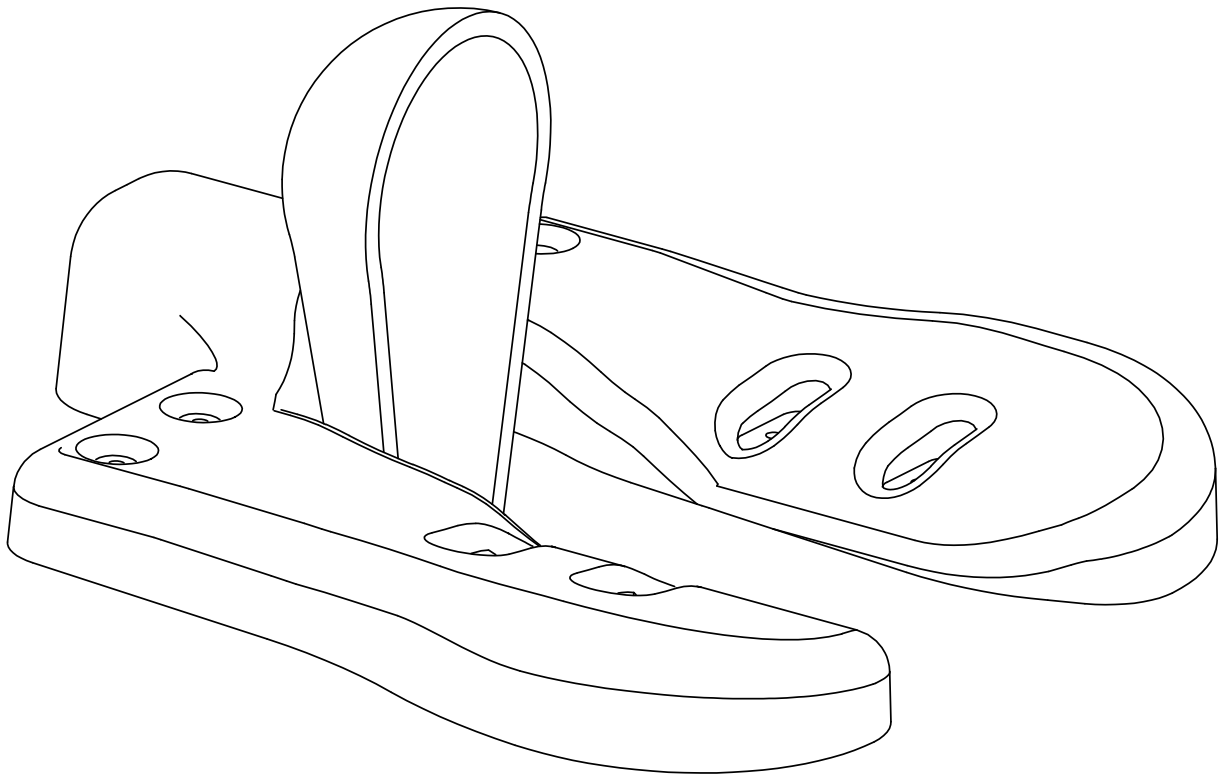

Underhåll och skötselanvisningar

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Regelbunden skötsel i hemmet

Efter bad/dusch, lossa samtliga foder för kortare torktid och längre livslängd. Vid rengöring av hygienstolen använd svamp och schampo eller antibakteriella milda rengöringsmedel. Foder är förbrukningsvaror och ska bytas ut vid behov. Bälten och selar kan tvättas i 60°C fintvätt men får ej torktumlas eller torkas i torkskåp. Använd tvättpåse.

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Gaskolven måste aktiveras regelbundet

Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstängens riktning är nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera.

Batteriskötsel

Första laddningen måste vara i 24 timmar. Batteriet får aldrig laddas ur helt, vilket kan innebära att batteriet slutar att fungera.

Verktyg

Verktyget (4 mm insexnyckel) du behöver för att utföra justeringar finns integrerad i toppen av ryggprofilen.

Garanti

1 år mot fabrikationsfel.

Kombinationer

Zitzi Starfish Pro är en CE-märkt produkt som kan kombineras med samtliga tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning. För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Reservdelar

För att Zitzi Starfish Pro ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB.

Rekonditionering

Rengör hygienstolen med svamp och schampo, antibakteriella milda rengöringsmedel.

Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller frätande ämnen.

Zitzi Starfish Pro kan med fördel rengöras i tvättkabinett eller tvättas i vatten enligt:

Starfish Pro Manuell: max 85°C i 3 minuter

Starfish Pro Hydraulisk/El: max 85°C i 3 minuter

Undvik att spola vatten direkt på el-don/hydraulik

Avlägsna foder och bälten. Foder är förbrukningsvara och ska bytas ut vid behov. Bälten och selar kan tvättas i 60° fintvätt men får ej torktumlas eller torkas i torkskåp. Använd tvättpåse.

Efter torkning kontrolleras produkten på skador och slitage.

Trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut. Använd bara originaldelar från Anatomic Sitt AB.

Funktionstesta och smörj alla rörliga delar som leder, vajrar, handtag, hjul, vred mm. Använd lämplig olja eller smörjmedel (t.ex. CRC 5-56, teflonspray etc.)

Vid behov av nya dekaler, kontakta Anatomic SITT.



OBS! Kontrollera alltid att hjälpmedlet inte är specialanpassat vid rekonditionering, innan det skickas till ny brukare.

Märkning

Zitzi Starfish Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.

Ett unikt serienummer är placerat på det bakre mellanröret.

Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska sedan separeras efter materialtyp, metall (ram, mellanrör, stag, sitt-/rygggram, körbåge m.m), plast (sitt-/ryggdel, bord, potta m.m) och brännbart (polstring, bälten, selar m.m). Gaskolv sorteras som farligt avfall.

Sammanfattning och efterkontroll

Efterkontroll

Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Du bör kontrollera nedanstående punkter varje gång brukaren ska använda hjälpmedlet.

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera regelbundet slitage på band och tryckavlastande bälteskuddar.
- Kontrollera att balansering på underredet är korrekt.
- Kontrollera inställningar på tillbehör så att brukaren har en korrekt sittposition.
- Vinkla ej sitsen för långt framåt när brukaren sitter i sitsen.

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång Zitzi Starfish Pro ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav. Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

Anpassningar som får göras på Zitzi Starfish Pro:

Kapa fotstödsprofiler

Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Kapa armstödsprofiler

Armstödsprofilens längd får kortas ned, för att bättre passa brukaren.

Kapa ryggstödsprofil

Ryggstödsprofilens längd får kortas ned. Profilen får aldrig vara kortare än att samtliga fästen till ryggplattan går att montera på denna.

Kapa urinskyddet

Urinskyddet får kapas till önskad längd.

Försäljningsvillkor

Garanti

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller "onormal" hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Reklamation

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Senare än 360 dagar från leveransdatum

Varorna återtages ej





Specialanpassade produkter återtages ej

Tekniska data Starfish Pro

	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Passar brukarlängd	ca. 120-145 cm	140-175 cm	170-200 cm
Chassi med hel sittdel	Sittdel hel stl. 1	Sittdel hel stl. 2	Sittdel hel stl. 3
Sittdjup (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sittbredd (med foder) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Storlek hygienuttag (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
Chassi med delad sittdel	Sittdel delad stl. 1	Sittdel delad stl. 2	Sittdel delad stl. 3
Sittdjup (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sittbredd (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredd bändel m foder (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Storlek hygienuttag (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Frigång toalett, Man. chassi	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Frigång toalett, Hydraulisk/EI	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Sitthöjd, Man. chassi**	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Sitthöjd, Hydraulisk/EI**	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tilt	-5-30 grader	-5-30 grader	-5-30 grader
Höft-/ryggvinkel	-10-35 grader	-10-35 grader	-10-30 grader
Chassi, bredd (H)	540 mm	540 mm	590 mm
Chassi, längd (I)	690 mm	690 mm	790 mm
Hjul	100 mm	100 mm	100 mm
Frigång	65 mm	65 mm	65 mm
Ca. vikt inkl. huvudstöd, fotstöd, armstöd	31 kg	33 kg	35 kg

Max brukarvikt Man. chassi:	150 kg	150 kg	150 kg
Max brukarvikt Hydraulisk/EI:	150 kg	150 kg	150 kg


* Max sittbredd fås när sittdelarna är monterade i ytterspår på sittplattan
 ** exkl. foder

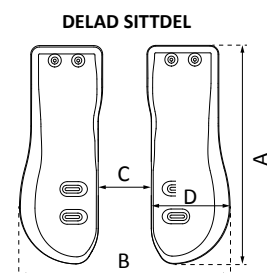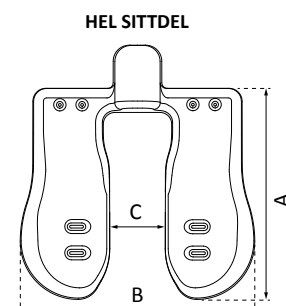

FOTSTÖD	mått B x D
Helt stl. 1	345 x 225 mm
Helt stl. 2	380 x 255 mm
Helt stl. 3	380 x 310 mm
Delat stl. 1	160 x 220 mm
Delat stl. 2	180 x 255 mm
Delat stl. 3	180 x 305 mm

RYGG	BÅLSTÖD	
	Höjd (E)	Bredd (F) Djup (G)
Stl. 1	460 mm	210-300 mm 140 mm
Stl. 2	560 mm	240-340 mm 170 mm
Stl. 3	660 mm	300-400 mm 200 mm

Bålstödsjustering +/- 85 mm

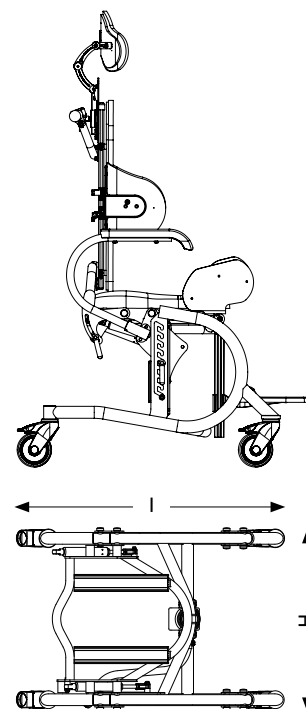

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt



NO

Bardum AS

Håndverksveien 8, N-1405 Langhus, Norge

Tel +47 64 91 80 60

Faks +47 64 91 80 66

e-post post@bardum.no

Webb www.bardum.no

Bardum