

## KRYCKKÄPP FLEX

Artikelnummer: 127000, 127004, 127005, 127009

### Säkerhetsanvisningar:

Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.

- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskon kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskon skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk. Tre år efter produktionsdatum (anges som LOT nr) skall kryckan kasseras.
- Max brukarvikt 140 kg.(Max brukarvikt 140kg gäller även vid användning av två kryckkäppar.)

**Avsedd användning:** Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.

Max 140 kg



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Tillverkningsdatum anges som LOT och därefter datum: dag, månad, år. Exemplet ovan är tillverkad 30 maj 2012.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

Art nr:127000 grå	Art nr: 127004 röd	Art nr: 127005 blå	Art nr: 127009 vit
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ställbar höjd: 75-97 cm



Vikt: 0,48 kg

Material: Aluminiumrör, PP (överdel), naturgummi (stödfötter)

Tillverkad av:  
**Karo Pharma Sverige AB**  
 Nybrokajen 7  
 SE-111 48 Stockholm  
 Tel: +46 (0) 10 3302310  
[www.swereco.se](http://www.swereco.se)  
[info@karopharma.se](mailto:info@karopharma.se)

## Användning:

1. Justera höjden för kryckkäppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
2. Kontrollera tryckknappen för höjdstyret regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av kryckkäppen genast avbrytas.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

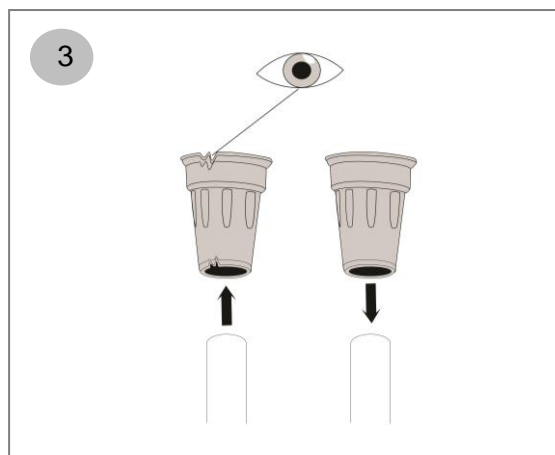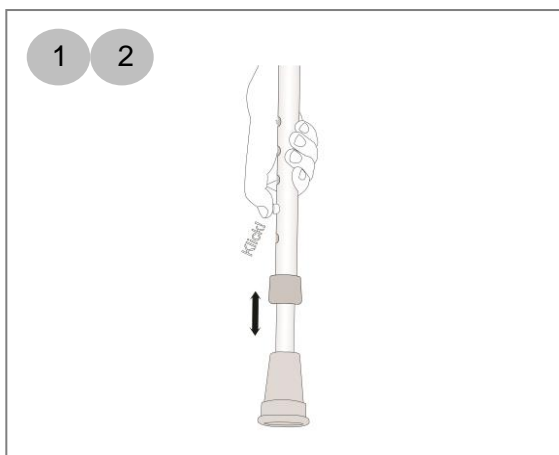

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

**LCC=** Life Cycle Cost är 3 år vid kontinuerlig rengöring. Produkten har längre hållbarhet vid noggrann och regelbunden rekonditionering.

## Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets  
Art. nr 123350, Isdubb kronan  
Art. nr 123360, Isdubb med 4 piggar  
Art. nr 124700, Kryckpolstring  
Art. nr 124885, Kryckkäpphållare FLEX  
Art. nr 124889, Gummifot Stabil

## Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko