

KRYCKKÄPP FLEX ROBUST

Artikelnummer: 127700, 127702

Avsedd användning: Kryckkäppen är avsedd att användas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion. Kryckkäppen är lämplig för tunga brukare. Längden justeras genom att kapa röret.

 **Säkerhetsanvisningar:**

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskon kan innebära ett försämrat grepp och ska bytas ut.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttas.
- Max brukarvikt 200 kg. (Max brukarvikt 200 kg gäller även vid användning av två kryckkäppar.)



Teknisk specifikation

Art nr: 127700
rak

Art nr: 127702
rak, lång

Höjd (upp till handtaget): 104 cm, lång 115 cm
Vikt: 1,28 kg, lång 1,36 kg
Material: Stålrör, PP (armbygel), PP (handtag rakt)

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 200 kg

Max säker brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Visuell kontroll




Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG and 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:
Swereco Group AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se

Användning:

1. Kryckans höjd kan justeras genom att ta bort doppskon och kapa stålröret med en bågfil eller en rörkap. Höjden ska bedömas av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan person med förskrivningsrätt).
2. Kontrollera doppskon före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

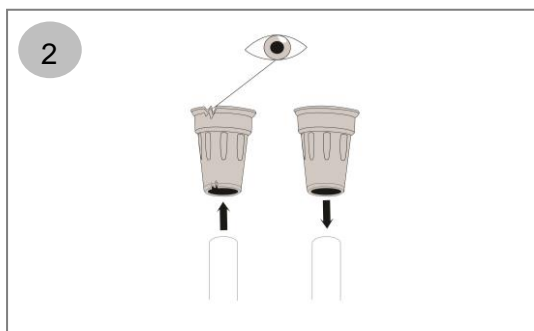

Skötselansvisningar: Rengör produkten regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Kontrollera doppskon regelbundet och byt till en ny när den är skadad eller utsliten.

Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets
Art. nr 123350, Isdubb kronan
Art. nr 123360, Isdubb med 4 piggar
Art. nr 124881, Fixclip kryckhållare

Reservdelar:

Art. nr 120760, Doppsko