

# TWIN-Lux MP

Gratulerer med din nye lupe fra SCHWEIZER, et tysk kvalitetsprodukt. Lupen er produsert etter gjeldende standarder og forskrifter.

Før du tar i bruk lupen din, vær vennlig å lese gjennom bruksanvisningen. Her finner du også informasjon om sikker bruk og rengjøring av lupen.

## Generell informasjon

Linsen i din nye lupe fra SCHWEIZER er laget av glass eller spesialplast. Den optiske kvaliteten i begge materialene er av prima kvalitet med polert og herdet overflate på begge sider. Lupene har asfæriske linser som gir et klart bilde i hele linsen.

## Rengjøring og bruk

Tar du godt vare på lupen din, varer den i årevis. Bruk en tørr mikrofiberklut til å pusse linsen. Ved behov, kan du bruke en lett fuktet mikrofiberklut. Ikke bruk alkohol, eller vaskemidler som kan skade overflaten på linsen. Bruk etui hvis du pakker ned lupen for frakt.

## Sikkerhet

**Fare for brann:** Du må aldri legge lupen fra deg, uten å dekke til linsen. Hvis sollys treffer linsen, kan det starte en brann.

**Fare for skade:** Ikke bruk lupen til å se på solen. Ikke se direkte på lupens lyskilde. Unngå mekaniske støt mot lupen. Unngå fuktighet, og oppbevaring i høye temperaturer.

Informere andre om disse faktorene, spesielt barn som kan få tak i lupen.

Se eget punkt om avhending av batterier nedenfor.

## Strømtilførsel

Twin-Lux MP, bruker 3 standard AA alkaliske batterier (1.5 V, LR6, AM3).

LED-lysdiodene som brukes er valgt ut fra strenge kriterier, og har en forventet varighet på ca. 50.000 timers kontinuerlig bruk.


## Sikker avhending av batterier

For å unngå skader på miljø og helse, må brukte batterier leveres til gjenvinningsentre, eller returneres til salgsstedet. Batteriene skal bare returneres i utladet tilstand. Batteripolene må isoleres med klebende tape. Batteriene kan enkelt tas ut av lupen. Symbolet med kryss over en avfallsdunk betyr at det er ulovlig å kaste brukte batterier sammen med vanlig søppel. Den ekstra spesifikasjonen av de kjemiske symbolene for bly (Pb), kadmium (Cd) og kvikksølv (Hg) betyr at batteriene inneholder disse stoffene, i lovlig tillatt mengde.




# TWIN-Lux MP


6 D + 8 D	14 D	4,4 x	100x50 mm / 6 D	100x75 mm / 8 D	2700 K, 4500 K, 6500 K
-----------	------	-------	-----------------	-----------------	------------------------

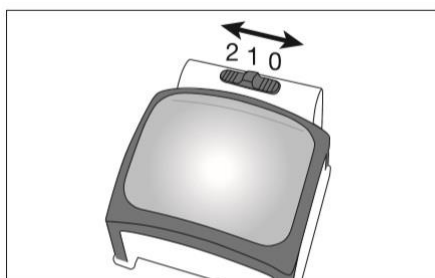

- 0: Av
- 1: På
- 2: På (sterkeste lysnivå)

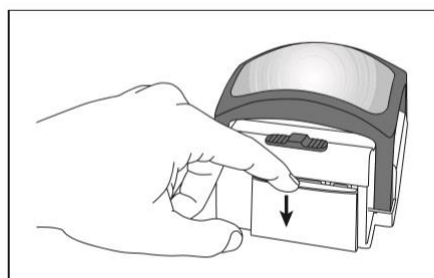

Åpne batteriluke

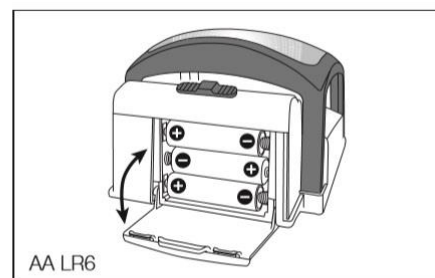

Sett inn batterier



**MULTIOPTIKK AS**

Haslevollen 3 C, 0579 Oslo  
Telefon: 22 65 50 70  
[post@multioptikk.no](mailto:post@multioptikk.no)