

Timeflex

- en veileder for bruk og innstillinger



Innhold

01	Kom i gang	3
02	Innstillinger	4
	Vibrasjon	4
	Aktivitetsknapper	4
	Tidsintervall	4
	Volum	5

01

Kom i gang

Timeflex har 5 ulike aktivitetsknapper hvor man kan stille inn et tidsintervall, 1-999 minutter.

Cognita leverer den innstilt med 5 min (rød knapp), 10 min (gul knapp), 20 min (grønn knapp), 30 min (blå knapp) og 60 min (sort knapp).


Disse kan programmeres om.

Grønne lys teller ned tiden som er igjen av valgt tidsintervall.

Oransj lys viser hvilken alarm/tidsintervall som er valgt.

Displayet øverst viser hvor mange minutter som er igjen samt batterinivå.

Til høyre for de fargede aktivitetsknappene er det mulighet for sette på etikett/symbol for aktivitetene o.l.

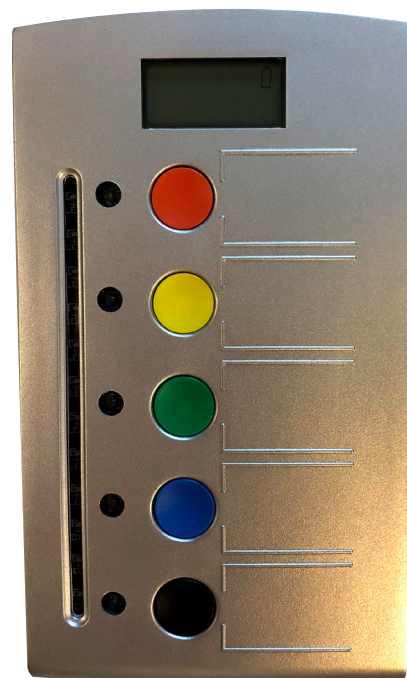


02

Innstillinger

Vibrasjon

Innstilling for vibrasjon på/av (on/off), samt uttak for medfølgende 3,5 mm høretelefoner finner du på høyre siden av Timeflex (Se bildet)

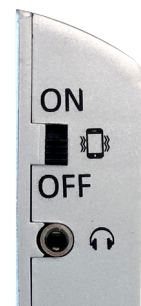

Aktivitetsknapper

Baksiden har 5 ulike innstillingsknapper.

For å stille inn, gjør følgende:

1. Hold inne både pil opp og ned knappen i noen sekunder. Oransje lysblinker.
2. Velg en av aktivitetsknappene.
3. Velg tidsinnstilling ved å trykke på pil opp eller ned for å få riktig nedtelling.
4. Bekreft valgt nedtelling ved å trykke OK. Alle lys blinker og displayet nullstilles, man kan nå fortsette å stille inn de andre aktivitetsknappene. Man kan kontrollere innstilt tid ved å trykke på valgt aktivitetsknapp.
5. Når du vil avslutte og låse innstillingen hold nede både pil opp og ned knappen i noen sekunder. Display og lysene slukkes.



Tidsintervall

1. Trykk en gang for å se at riktig tidsintervall er valgt.
2. Trykk en gang til for å bekrefte at riktig tidsintervall er valgt. De grønne lysene tennes.
3. 10 sekunder før nedtelling/aktiviteten er slutt begynner alle lys å blinke, og man kan få en alarm. Alarmen kan være med eller uten vibrasjon.
4. Ønsker man å avslutte en nedtelling/aktivitet trykker man på aktuell aktivitetsknapp i 5 sek.

Volum

For å stille volum, gjør følgende:

1. Hold nede både + og – i 5 sek. for å stille volum.
2. Trykk + eller – for å stille inn volum. Displayet foran viser hvor høy volumet er, 5 er høyest og 0 er lydløs.
3. Trykk + og – i ca 5 sek for å låse valgt volum. Volumet låses automatisk hvis man ikke gjør noen ting på 60 sek.

Timeflex har utfellbart stativ, og fire magneter for å feste Timeflex på f. eks en kjøleskapsdør. Det er mulighet for å feste medfølgende halsreim.

Timeflex drives av 3 stk AA standard batterier.

Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Support

Tlf: 22 12 14 50
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse

Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo

Postadresse

Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru