

# IRIS MÅNE

## Elektronisk talende klokke med dag/døgn-visning



# Brukerhåndbok

---

## Innholdsfortegnelse

---

<b>1. Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2. Oversikt</b>	<b>3</b>
I pakken	3
Kontakter i siden	4
Framsiden	4
Baksiden	4
<b>3. Komme i gang</b>	<b>5</b>
Plassering	5
Tilkobling	5
<b>4. Daglig bruk</b>	<b>5</b>
Klokken	5
Lydstyrke	5
<b>5. Innstillingsmeny</b>	<b>6</b>
Tilgang	6
Klokke	6
Utseende (klokkeutseende)	7
Visning	7
Lysstyrke	8
System	8
<b>6. Grunninnstillinger</b>	<b>9</b>
Åpne for volumkontroll og innstillinger	9
Stille inn huskode	9
<b>7. Viktig informasjon</b>	<b>10</b>
Sikkerhet	10
Rengjøring	10
Resirkulering	10
Bruksbegrensninger:	10
<b>8. Samsvarserklæring</b>	<b>10</b>
<b>9. Tekniske data</b>	<b>10</b>
<b>10. Feilsøking</b>	<b>11</b>
<b>11. Tilbehør</b>	<b>12</b>
Fjernstyrt opplest tale	12
Automatisk opplest tale	12

## 1. Innledning

---

MÅNE er en elektronisk talende klokke med valgbar visning av informasjon som dag, dato og tid på døgnet.

MÅNE har også valgbare skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner.

MÅNE kommer ferdig til bruk, og man trenger kun å koble den til strømmen med den medfølgende strømforsyningen.

Ved oppstart, hvis klokken ikke er satt, vil skjermen gå rett til siden for justering av tid og dato.

Alle innstillinger er låst for brukeren, og man må låse opp innstillingsmenyen (bryter nr. 5) for å komme til menyer for innstillinger. Se kapittel 6.

MÅNE har innebygget batteri som holder på innstillingene hvis strømmen blir borte.

MÅNE kan også fungere med utvalgte Vestfold Audio FlexiBlink produkter for: fjernstyrt start av oppløst klokkeslett og brannvarsling på MÅNE.

For mer informasjon se kap. 11.

## 2. Oversikt

---

### I pakken




MÅNE  
Med avtakbar fot og  
festebrakett for vegg




Strømforsyning

## Kontakter i siden

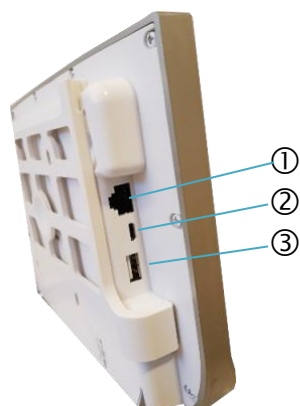

- ① Ethernet (for tilkobling til ruter)
- ② Ikke i bruk
- ③ USB (for minne-pinne)


## Framsiden

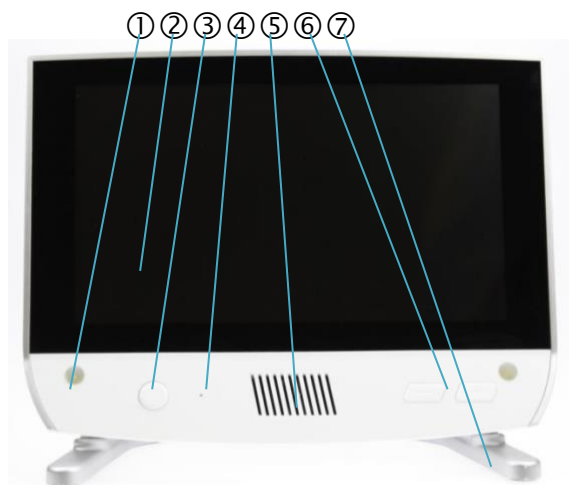

Figur 1 Framsiden

- ① Lys (ikke i bruk)
- ② Skjerm med touch
- ③ HJEM knapp
- ④ Mikrofon (ikke i bruk)
- ⑤ Høytaler
- ⑥ Volum opp/ned
- ⑦ Avtakbar fot

## Baksiden

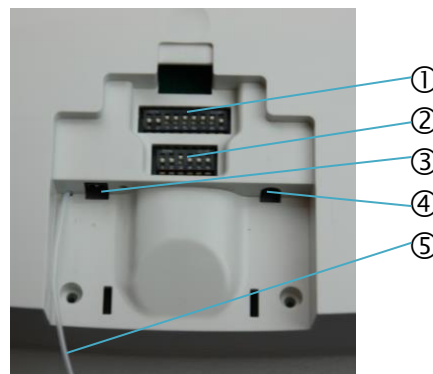

Figur 2 Baksiden

- ① Huskodebryter
- ② Funksjonsbryter
- ③ Tilkobling strømforsyning
- ④ Lydutgang for teleslynge/streamer
- ⑤ Antenne

### 3. Komme i gang

---

#### Plassering

MÅNE kan stå på et bord i den medfølgende foten, eller skrues opp på vegg med den medfølgende veggbraketten.



#### Tips

Ikke monter veggbraketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok

#### Tilkobling

Sett strømforsyningen i stikkkontakten på veggen og plugg ledningen inn på baksiden av MÅNE (Figur 2, ③). Du vil nå se at skjermen starter.

MÅNE er nå klar til bruk, men det kan være nødvendig å stille klokke og dato, eller tilpasse produktet til brukeren. Se kapittel 5 og 6.

### 4. Daglig bruk

---

#### Klokken

Brukeren trenger ikke å gjøre noe med produktet selv.

Hvis man tar på skjermen, vil klokkeinformasjon (tid/dato/tid på døgnet) leses opp.

Alternativt kan man benytte fjernbetjening - se kap. 11.

#### Lydstyrke

For å justere lydstyrken, må man først slå av låsebryteren. Se kapittel 6. Skyv skjermlåsen bryter 5 ned.

Når bryteren er i stilling ned, vil volumknappene (pluss/minus) på høyre fremside fungere.

Når riktig nivå er oppnådd, bør man låse funksjonen igjen.

## 5. Innstillingsmeny


### Tilgang

MÅNE har innstillingsmenyer som er låst for brukeren med låsebryteren som beskrevet i kapittel 6.


Skyv bryter 5 **ned** for å åpne for innstillinger.



Trykk på HJEM-knappen så kommer det fram et ikon med teksten Innstillinger i nedre venstre hjørne på skjermen.

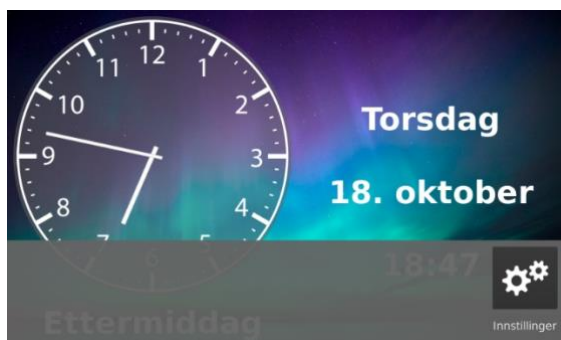

Trykk på ikonet og innstillingsmenyene vil nå vises som ikoner på skjermen.

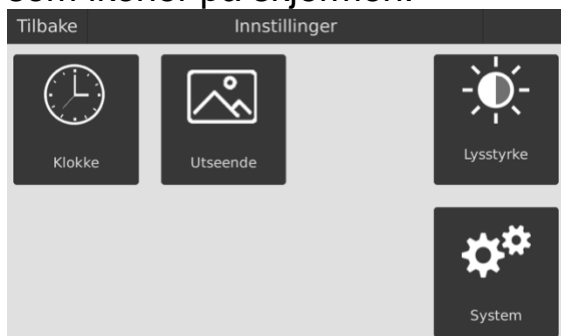


### Klokke



På denne siden finner man innstillinger av klokke, dato og relaterte funksjoner

### Stille klokke

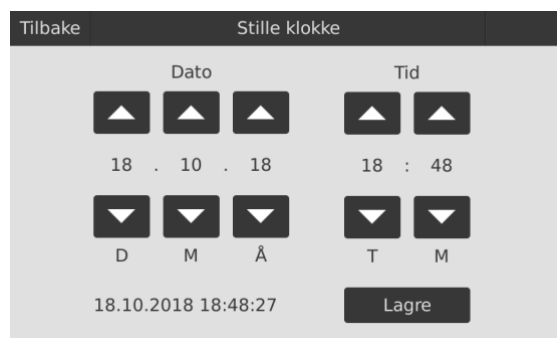


Bruk pilknappene for å endre. Trykk på *Lagre* for å lagre innstillingen eller *Tilbake* for å avbryte.

### Klokketale

Her kan man velge om funksjonen med talende klokke skal være på eller av, og man kan begrense mengden informasjon i talemeldingen.

## Sommertid

MÅNE skifter automatisk mellom sommer- og vintertid.

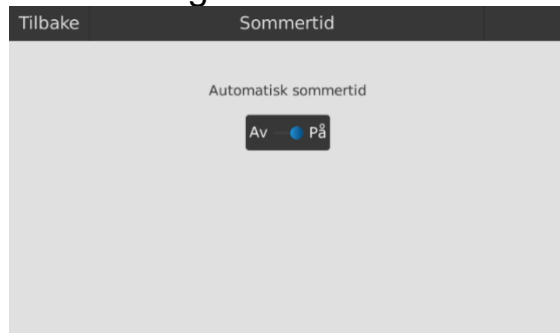

For å være klar til et forventet internasjonalt opphør av skifte mellom sommer- og vintertid, er det her en bryter for å slå av denne funksjonen.

## Utseende (klokkeutseende)



På denne siden finner man innstillinger av skjermbildet.

## Bakgrunn



Her velges utseendet til klokken.


Hvert utseende består av en bakgrunn og tekst/klokke i utvalgte farger for best mulig kontrast.

Klokkeskiven har to valg.

Det utseendet som velges markeres med en blå prikk.

Innstillingen lagres automatisk når du trykker på *Tilbake*.

## Visning

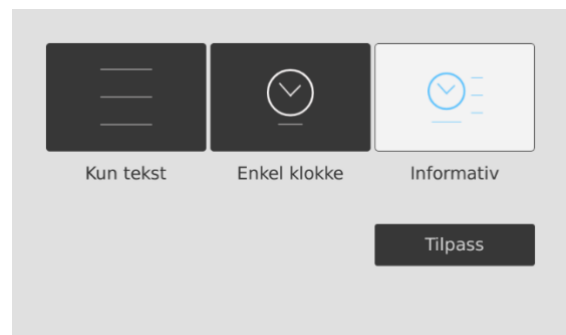

Man kan velge mellom 3 oppsett for hvordan klokken skal framstå:

1. Kun tekst

Her vises tiden bare i form av informativ tekst.

2. Enkel Klokke

Her vises en stor klokke med valgbare informasjon i underkant.

### 3. Informativ

Her vises klokken med valgbare informasjon i 4 felt.

Alle 3 oppsettene kan tilpasses spesielt.

Velg først oppsettet og trykk så på *Tilpass*.

Nå vises forsidebildet med blå «penn-ikoner» på de plasseringen som kan justeres.



Når du trykker på et «penn-ikon» vises en liste over hva som kan vises i denne posisjonen på skjermen. Valgene inntreffer umiddelbart, slik at man kan prøve seg fram til det bildet som passer brukeren best.

Trykk *Lagre* for å lagre innstillingene.

Alle oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt. Trykk på de hvite pilene øverst på skjermen for å bla mellom hva som skal vises på dagtid og nattestid.


## Lysstyrke



Her velges skjermens lysstyrke og varsling av påminnelser med blinkende LED.

Innstillingen lagres automatisk.

## System

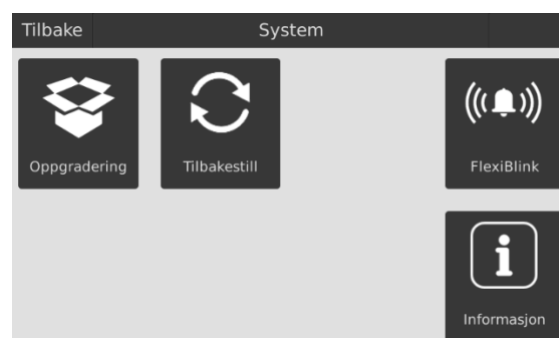

MÅNE er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, og det er ingen lisenser el. som må fornyes. Programvaren (software) er lagt fast i produktet.

I tilfelle det finnes ny versjon av programvaren fra Vestfold Audio AS som man ønsker å ta i bruk, kan denne fritt lastes ned via Internett.

Hvis man har fått spesialtilpasset programvare, kan denne legges inn via USB minnepinne som beskrevet under.



## Oppgradering

Programvaren (SW) kan oppdateres herfra. Enten via kabel til internett-ruter eller via USB.

Kontakt Vestfold Audio AS ved behov for hjelp.

## Tilbakestill

MÅNE kan tilbakestilles til fabrikkinnstilling her.

## FlexiBlink

Her kan man velge om MÅNE skal kobles til FlexiBlink i boligen.



Når mottak står på, vil SOL motta fjernstyrt oppløsing av klokken samt at den vil varsle brannalarm fra røykvarslere og brannsendere i FlexiBlink-serien.

## Informasjon

Her vises informasjon om programvareversjon med mer. Dette er informasjon som kun benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.

## 6. Grunninnstillinger

---


### Åpne for volumkontroll og innstillinger



#### Skjermlås – bryter 5

Bryter 5 er for låsing av volum og menyer. Ved å skyve *bryter 5* opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strømbrudd, og ved forsøk på volumjustering eller systeminnstillinger vil det komme beskjed på skjermen at funksjonene er låst.

### Stille inn huskode

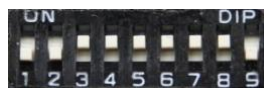

Huskodebryter  
(fabrikkinnstilling)

Hvis du ønsker å benytte MÅNE sammen med varslingsprodukter i FlexiBlink serien, må du sette Huskoden likt med de andre produktene.

## 7. Viktig informasjon

---

### Sikkerhet

Unngå å eksponere produktet for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre. Produktet må ikke nedsenkes i vann eller utsettes for vannsprut/regn.

### Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.

### Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

### Bruksbegrensninger:



Produktet er kun godkjent for bruk i NORGE.

## 8. Samsvarserklæring

---

Vestfold Audio AS erklærer at MÅNE er i overensstemmelse med direktiv (RED) 2014/53/EU og (RoHS 2) 2011/65/EC.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

## 9. Tekniske data

---

Dim. (bxhxd): 220x165x40mm  
(uten veggfeste og fot)

Effektforbruk: 5W

Spenning inn: 15VDC

Radiofrekvens: 142,475 MHz

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: 0°C – 40°C -

ikke kondenserende

Innendørs bruk

## 10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
<b>Klokken viser feil tidspunkt eller dato</b>	Klokke eller dato er ikke justert	Still klokken. Se kapittel 5
<b>Klokken viser feil tidspunkt etter strøbrudd</b>	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen
<b>Enheten virker ikke</b>	Strømforsyningen er ikke tilkoblet	Kontrollerer om strømforsyningen står i en kontakt som har strøm og at den er plagget helt inn i enheten.
<b>Kommer ikke inn i Innstillings-menyen.</b>	Bryter nr. 5 i den lille bryterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
<b>Kan ikke still lydstyrken</b>	Bryter nr. 5 i den lille bryterrekken på baksiden står i posisjon OPP.	Skyv bryteren NED.
<b>Talende klokke virker ikke</b>	Funksjonen er slått av i innstillinger.	Se kap. 5 og Klokketale.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

## 11. Tilbehør

---

MÅNE kan samvirke med produkter i FlexiBlink-serien for å gi brukeren ekstra betjeningshjelp.

### Fjernstyrt opplest tale

For brukere som har begrenset motorikk eller bevegelseshemming, kan det være nyttig å få opplest klokke uten å måtte ta på skjermen.

Følgende alternativer kan benyttes:

#### **ARM**

Armbåndssender for fjernstyrt opplesing av klokke,  
HMS nr. 233408



#### **FLEXIKNAPP**

Trykknapp for fjernstyrt opplesing av klokke,  
HMS nr. 233425



### Automatisk opplest tale

Brukere som har problemer med tid på døgnet, og som kanskje har en tendens til utilsiktet vandring om natten, kan få klokken lest opp automatisk ved hjelp av en sender med bevegelsessensor.

#### **PASSAKTIV**

Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIR for fjernstyrt  
automatisk opplesing av klokke  
HMS nr. 233419



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

Tlf.: +47 33 47 33 47

