



Lightwriter SL50

Brukerveiledning

Art. nr: 1740200

Innhold

Innhold	2	Bytte fingerguide	29
Velkommen til din Lightwriter	3	Rengjøring av tastaturet	32
Tiltent bruk.....	3	Tastatur-layout	33
Produktoversikt.....	3	Endre tastatur-layout	34
Innholdet i esken	5	Fjernoppdateringer	35
Lading	7	Innstillinger	36
Slå på Lightwriter.....	8	Finne frem i Innstillinger	36
Tilpass din veske med displayåpning ..	8	Avanserte innstillinger	36
Tale	9	Mer informasjon om innstillinger	38
Introduksjon til skriv og snakk.....	9	Import og eksport av data	47
Tastefunksjoner	10	Ta sikkerhetskopi av og gjenopprett din Lightwriter.....	47
Statussymboler	13	Sikkerhetskopi og gjenoppretting av enkelt innstillinger.....	48
Menyer	14	Import av Acapela-stemmer.....	49
Brukermeny	14	Vedlikehold	49
Avansert brukermeny	14	Lagring og kassering	49
Avanserte skrivefunksjoner	15	Feilsøking	50
Brukerordbok.....	15	Generelle problemer.....	50
Nye ord	15	Problemer med Mobiltelefon.....	51
Taleunntak	16	Problemer med USB-penner	52
Notater	17	Snarveier	53
Hurtigfraser	19	Teknisk informasjon	54
Forkortelser	20	Spesifikasjoner	54
Vokale 'Smileys'	21	Viktig informasjon	54
Mobiltelefon	22	Sikkerhetsdefinisjoner	54
Koble sammen med din mobiltelefon.	22	Alvorlige hendelser	54
Fa tilgang til kontaktene dine	23	Samsvar med kravene til medisinskteknisk utstyr.....	54
Telefonsamtaler.....	23	Produktansvar	54
Tekstmeldinger.....	25	Kontaktinformasjon	55
Skanning	27		
Tilgangsmetoder.....	27		
Velge et Skannemønster	28		
Tastaturet	29		

Velkommen til din Lightwriter

Lightwriter SL50 er en rask og enkel måte å kommunisere på. Den er utformet spesifikt for kommunikasjon, og har en rekke nyttige funksjoner som hjelper deg med å ytre din tekst så effektivt som mulig:

- Rask oppstart og brukervennlig menygrensesnitt.
- Skreddersydd ordforråd for raskere kommunikasjon.
- Koble til en mobiltelefon ved bruk av Bluetooth.
- Høykvalitets Acapela-stemmer.
- Enkel 'plug and play' 1-switch- eller 2-switch-skanning.
- Lang batteritid.
- To skjermer og utover vendt høyttaler.
- Fjernoppdatering av programvare.
- Skjermer med baklys og taster som automatisk justerer seg etter ulike lysnivåer.

Tiltenkt bruk

Bærbar, dedikert kommunikasjonsenhet for lese- og skriveføre brukere som ikke klarer å kommunisere effektivt gjennom tale. Det muliggjør ansikt-til-ansikt kommunikasjon samt SMS og mobiltelefon kommunikasjon.

Beregnet for innendørs bruk, og med tastaturdeksel, utendørs bruk.

Produktoversikt





TIPS: Lightwriter leveres kanskje med beskyttelsesfilm på skjermene. Du bør fjerne dem før du bruker Lightwriter.

Innholdet i esken

Kontroller at alt er med når du åpner esken:

Lightwriter SL50 –



Brukerveiledning & Hurtigguide –

denne praktiske guiden vil hjelpe deg med å komme i gang med din Lightwriter.

TIPS: Du finner de nyeste versjonene av brukerveiledningen og hurtigguiden på nettsiden vår

www.abilia.no



Fingerguide-sett – Din Lightwriter leveres med ulike fingerguider, som kan heve området rundt tastene til forskjellig høyde for å hjelpe deg med å skrive riktig. Se **Ditt tastatur** for mer informasjon.



Verktøysett – Verktøysettet inneholder **nøkkelring**, **skrujern** og **verktøy for å løse fingerguiden**. Du vil trenge disse for å fjerne eller bytte fingerguide.



Minnepinne – Denne inneholder hele brukerveiledningen. Se også **Import og eksport av data**.



Reservetaster – Disse trenger du kanskje hvis du ønsker å bytte språk på din Lightwriter.



Ethernet-kabel –

Med denne kan du oppdatere programvaren på din Lightwriter via en standard ethernet-port (krever tilgang til internett).



Lader – denne brukes for å lade batteriet på Lightwriteren. Du bør lade Lightwriter i 3-4 timer for at batteriet skal ha kapasitet til en hel dag. Det er best å gjøre dette over natten.



Veske med displayåpning – designet for at det skal være enkelt å bære Lightwriter, samtidig som du fortsatt kan bruke den uten å ta den ut av vesken. Se **Tilpass din veske med displayåpning**.



Ytterligere ekstrautstyr

Bryter-sett – Plugg inn i **Bryterport 1** og **Bryterport 2**, og de er klare til å skanne.



Billader – når du er ute og farter er det ikke sikkert at du har tilgang til en stikkontakt. Da er det er veldig praktisk å ha en lader i bilen til bruk i nødstilfelle hvis enheten har lavt batteri.



Hurtigutløsende plate – designet for å være kompatibel med flere monteringsystemer på markedet, og gjør det lettere å feste og løsne Lightwriter til og fra din foretrukne monteringsløsning.



Bærevekke – i bærevekken er din Lightwriter trygg når du er på reise. Med plass til notisblokk eller telefon.



Sett med bærehåndtak og nakkereim – En enkel og effektiv måte å feste ulike reimer til din Lightwriter. Lar deg enkelt bære Lightwriter i hånden eller rundt nakken.



Lading

Lightwriter bør **lades regelmessig i 3-4 timer** for at batteriet skal ha kapasitet til en hel dag. Det er best å gjøre dette over natten. Sett i laderen på venstre side av Lightwriter.

Bruk bare ladere som leveres med Lightwriter.


Batterilyset ved siden av ladeinngangen indikerer at enheten lader.



Grønt – Full ladet - du kan koble ut laderen.

Rødt – Lader tilkoblet og lading pågår.

Du kan se hvor mange % som gjenstår øverst til høyre på skjermen på symbolinjen.

Du kan også se batteristatussymbolet øverst til høyre på skjermen din, symbolet vil endre seg ettersom batteritiden øker/minker. Hvis batteriet lader, vil du se et el-symbol inne i batterisymbolet 



Lyset foran på din Lightwriter vil også indikere batteristatus:



Gult – lavt batteri – lad enheten så snart som mulig.

Rødt – batteriet er neste utladet – lad umiddelbart.

Dersom batteriet har for lite strøm, vil enheten lage en lyd og slå seg av, og det vil kun være mulig å bruke enheten med laderen koblet til. Hvis du ikke klarer å slå på Lightwriter, må du sette i laderen.

TIPS: Hvis du vil, kan du bruke Lightwriter hele dagen med laderen koblet til – det vil ikke skade batteriet.

Slå på Lightwriter



For å slå på Lightwriter trykk på **Av-og-på-knappen** 

Det tar noen sekunder før Lightwriter starter.

Hvis du ikke bruker Lightwriter på en stund eller trykker på en vilkårlig tast, vil displayet slå seg av og gå inn i **Hvilemodus**. Dette gjør at batteriet varer lenger. Du kan endre tiden det tar før enheten går inn i **Hvilemodus**, se **Innstillinger**.


Tilpass din veske med displayåpning

For å tilpasse vesken til din Lightwriter:

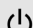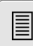1. Sørg for at Lightwriter er slått av – Hold ned **Av-og-på-knappen**  i 3 sekunder til du hører et pip eller velg **Meny**  **System>Slå Av**.
2. Legg Lightwriter opp-ned på et bord eller en annen flat overflate slik at tastaturet vender ned og displayene vender bort fra deg. Merk deg de 4 gullfargede skruehullene.
5. Skru de 4 plastskruene løst inn for hånd og forsikre deg om at alt er på plass før du strammer skruene med skrujernet. Ikke stram for mye siden det kan skade skruene.
6. Snu Lightwriter, lukk glidelåsen på klaffen og du er klar til å gå.



3. Åpne glidelåsen på hovedrommet i vesken og snu den opp ned med klaffen lengst borte fra deg – logoen skal være riktig vei.
4. Plasser vesken over Lightwriter og plasser de 4 hullene på linje med de gullfargede skruehullene.

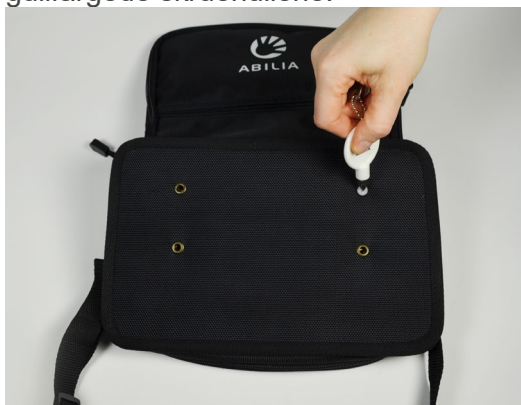


7. Ta bæremeinen over skuldrene og bær Lightwriter foran deg, klar til å åpne glidelåsen ved behov.



Tale

Når du slår på Lightwriter, er den første skjermen du ser **Taleskjermen**.

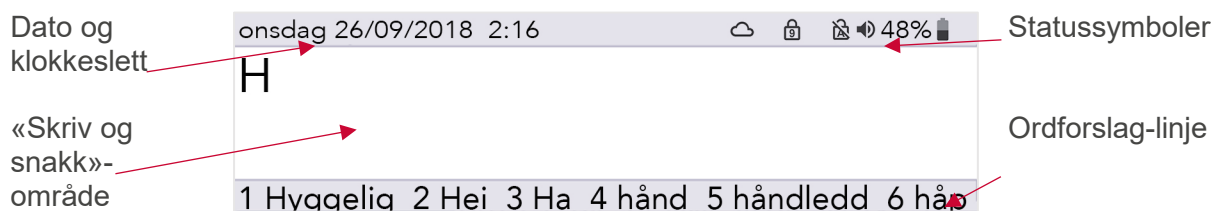

Du merker kanskje at lysstyrken på displayene automatisk endrer seg i ulike omgivelser. Lysstyrken blir sterkere i solfylte utendørsomgivelser, og svakere i et mørkt rom. Dette er for å hjelpe deg til å se skjermen best mulig. Tastene på tastaturet vil også ha baklys i mørke omgivelser. Du kan justere dette i **Innstillinger**. På denne måten sparer du også batteri.


Introduksjon til skriv og snakk

Det viktigste Lightwriter gjør er å uttale ordene du skriver inn.

Alt du skriver vil vises på skjermen foran deg.

Hoveddisplay:



Trykk **Enter**  og Lightwriter sier ordene du har skrevet høyt, i tillegg til å vise dem på **Partnerdisplayet**.

Hvert ord på partnerdisplayet blir uthevet etter hvert som det uttales:


Partnerdisplay:

Hyggelig å **treffe** deg

Dersom den du kommuniserer med ikke kan lese ordene på Partnerdisplayet, kan du øke tekststørrelsen, se **Innstillinger**.

Når du trykker **Enter** for at Lightwriter skal lese opp dine ord, så vil de forsvinne fra Taleskjermen. Dette gjør at du kan fortsette å skrive din neste setning uten å måtte vente på at Lightwriter skal stoppe å snakke.

Du kan trykke **Venstre Piltast** for å hente den siste setningen som ble lest opp tilbake til Taleskjermen. Du kan så gjenta eller redigere setningen som du vil.


TIPS: Hvis du raskt må få Lightwriter til å være stille mens den holder på å snakke, trenger du bare å trykke på **Lyd-tasten**  for å dempe den (mute).

Lightwriter-tastaturet brukes stort sett på samme måten som et vanlig tastatur for å skrive ord og setninger.

Du kan bruke vanlige skriveredskaper som Caps lock og Shift, tegnsetting, tall og symboler. Se **Tastefunksjoner** for ytterligere detaljer.

For å redigere tekst kan du bruke **Venstre** og **Høyre piltast** for å flytte markøren til venstre og høyre i teksten. Herfra kan du redigere teksten på vanlig måte, ved å skrive og slette.

Ettersom du skriver vil du merke at det dukker opp ordforslag nederst på skjermen.

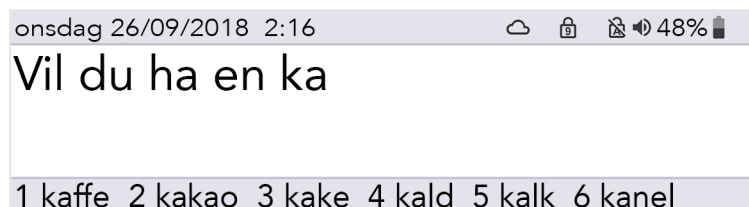

Du kan velge et ordforslag ved å trykke på den aktuelle **Tall**-tasten.

TIPS: Dersom Tallmodus er slått av, kan ikke ordforslag velges.

Hvis du har behov for det, kan du stille inn Lightwriter slik at den leser opp hver setning, hvert ord eller hver bokstav etter hvert som du skriver dem, før du trykker på **Enter**. For å slå dette av og på, se **Innstillinger**.

Du kan også lagre hele setninger for å kunne kommunisere raskere, se **Hurtigfraser**.

Tastefunksjoner

I tillegg til de vanlige tastene for skrijving og snakking har Lightwriter noen andre nyttige taster.

For informasjon om hvordan du endrer **Tastatur-layouten** eller justerer **Tasteforsinkelsen**, se **Innstillinger**.

Av-og-på-knappen –

Denne tasten vil **vekke** Lightwriter umiddelbart hvis den er i **Hvilemodus**, eller **slå den på** hvis enheten er helt slått av.

For å sette Lightwriter i **Hvilemodus**, hold **Av-og-på-knappen** nede i 1,5 sekund. Trykk på **hvilken som helst tast** for å vekke den igjen.

For å **slå av** Lightwriter, hold **Av-og-på-knappen** nede i 3 sekunder, Lightwriter spiller av et pip for å indikere at den slår seg av. Du kan ta en **omstart** ved å trykke på **Av-og-på-knappen** for å starte om igjen.

Hvis du har behov for en **tvungen omstart** (for eksempel ved programvarekrasj), hold **Av-og-på-knappen** nede i 10 sekunder – til displayet slår seg av, og så blinker og slår seg på igjen.

I **menyene** vil **Av-og-på-knappen** avbryte eller ta deg tilbake til det foregående skjermbildet. Fortsett å trykke på **Av-og-på-knappen** til du er tilbake på **Taleskjermen**.

På **Taleskjermen** vil **Av-og-på-knappen** tømme hele tekstlinjen.

Bokstav- og mellomromstaster –

Vanligvis brukes bokstav- og mellomromstastene for å skrive inn tekst til tale.

For å skrive en stor bokstav, trykk på **Shift** før du trykker på den valgte **Bokstav**-tasten.

Enter-tasten –

På **Taleskjermen** vil det å trykke **Enter** gjøre at teksten du nettopp har skrevet blir uttalt.

Ved å trykke på **Enter** i **menyen** velger eller lagrer du et uthevet objekt eller innstilling.

Fra en tom **Taleskjerm**, trykk på **Enter** etterfulgt av en forhåndsbestemt **Bokstav**- eller **Symbol**-tast for å skrive ut en lagret **Hurtigfrase**. Se **Hurtigfraser** for mer informasjon.

Venstre og høyre piltast –

Trykk på **Venstre** og **Høyre** piltast i **menyen** for å flytte på menyer og lister. Du kan også bruke dem til å redusere eller øke innstillinger som for eksempel volum.


I **Taleskjermen** kan du bevege markøren gjennom bokstavene du har skrevet for å redigere teksten.

Etter at enheten har uttalt en setning kan du trykke på **Venstre piltast** for å laste den uttalte setningen opp igjen på **Taleskjermen** for videre redigering eller bruk.

Bruk **Shift-Venstre** og **Shift-Høyre** for å merke av og redigere store tekstblokker.

Shift-tasten –

For å skrive store bokstaver, trykk på **Shift** og deretter **Bokstaven** du ønsker å skrive med store bokstaver. Du kan **holde Shift-tasten nede** dersom du ønsker å skrive flere store bokstaver.

Hvis du har behov for å bruke **Caps Lock**, trykk på **Shift to ganger**. Alt du skriver vil være med store bokstaver helt til du trykker på **Shift to ganger** igjen. Et symbol  øverst til høyre på skjermen indikerer om Caps Lock er på eller av.

Hvis du trykker på **Shift** og deretter en bokstavnast når Caps Lock allerede er på, vil bokstaven skrives med små bokstaver.

Du kan også bruke **Shift** for å skrive symbolene som står med rødt øverst på noen av tastene.

Menytast –

Trykker du på **Meny**-tasten kommer du til **Brukermenyen**.

Trykker du på **Shift-Meny** kommer du til **Avansert Bruker-meny**.

Se **Menyer** for mer informasjon.

Tall og tallmodustasten (Num Lock) –

For å bruke tall mens du skriver må du sørge for at **Tallmodus** er på. Trykk på **Tallmodustasten** og du vil se at symbolet  i øverste høyre hjørne på skjermen endrer seg.


I tillegg til å bruke tallene mens du skriver, kan du bruke **Tall**-tastene til å velge **Ordforslag** for å skrive raskere. Du kan bare bruke ordforslag hvis **Tallmodus** er av.

Slettetast–

Når du skriver vil **Slettetasten** fjerne tegnet til venstre for markøren. Hvis ordet som er skrevet var et **Ordforslag**, vil det å trykke på **Slett** fjerne hele ordet.

Du kan også bruke denne tasten til å slette ord fra din **Brukerordbok**. Se **Avansert Skrivning** for mer informasjon.

Lydtast –




Trykk på **Lyd**-tasten for å skru lyden av og på. Høytalersymbolet  øverst til høyre på skjermen viser om lyden er av eller på. Dette er nyttig hvis du ønsker å midlertidig skru av alle lyder og stemmer på Lightwriter. Trykk på **Lyd** igjen for å skru på lydene igjen.

Trykk og hold nede **Lyd** kombinert med **Venstre** eller **Høyre piltast** for å regulere **Volumet** opp og ned.

Union-tasten (ALARM) -

Dette er en 'treg tast' denne er nyttig hvis du ikke kan holde ned mer enn en tast av gangen.

Når du trykker på **Union**, vil den neste tasten du trykker på oppføre seg som om den blir 'holdt inne', til du trykker på en annen tast. Du kan kansellere Union-tastens 'treg tast' funksjon ved å trykke på **Av-og-på-knappen** eller vente noen sekunder til den avsluttes av seg selv.

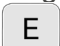Union-tasten kan også brukes som snarvei til flere bokstaver og symboler, for eksempel, trykk    for å skrive 'Æ'.

I tillegg kan den settes opp som en Alarmtast i **Shift-Meny > Alarmtast > Alarmtast Bruk**. Dette er nyttig i en nødsituasjon eller når du vil påkalle noens oppmerksomhet.

Etter at den er satt opp, kan du aktivere den innebygde alarmen ved å holde inne **Union**-tasten.

Symboler og Symboltasten –

Enkelte nyttige symboler er trykket i rødt på noen taster. Alt som er trykket i rødt kan brukes ved å trykke på **Shift** etterfulgt av valgt tast. Tegnsetting som brukes på slutten av en setning, som for eksempel . ? og ! følges automatisk av et mellomrom.

Valutasymbol:

For din lokale valuta (for eksempel **kr**) trykk **Shift** og deretter **3** ().


Trykk og **hold Shift** nede, samtidig som du trykker på **3** gjentatte ganger for å bla gjennom andre valutasymboler.

Symboltast:

For å skrive bokstaver med aksent og diakritiske tegn – Trykk på **Symboltasten** og trykk på den aktuelle **Bokstavtasten** flere ganger til du ser ønsket bokstav. For eksempel trykk på **Symbol** og trykk gjentatte ganger på 'E' for å bla gjennom e, è, é, ê, ë. Du stanser bare ved ønsket bokstav og fortsetter å skrive som vanlig.

Symbolvelger:

For å finne flere symboler, tegnsetting og aksenter (for eksempel !, ?, £) – Trykk på **Shift** etterfulgt av **Symbol**-tasten. Her finner du **Symbolvelgeren**:

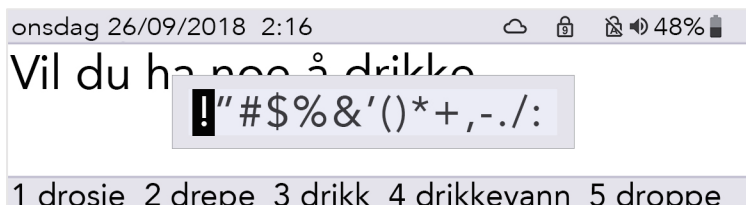

Mens du er i Symbolvelgeren, trykk på **Symbol**-tasten flere ganger for å bla gjennom flere sider med symboler.

Bruk **Venstre** og **Høyre piltast** for å velge, og trykk deretter på **Enter** for å skrive det valgte symbolet.

For å avbryte Symbolvelgeren kan du enten vente til den lukker seg automatisk eller trykke på **Av-og-på-knappen**.

Statussymboler

Når du slår av og på enkelte funksjoner (som Tallmodus), vil et stort bilde av symbolet vises midt på skjermen i noen sekunder for å bekrefte handlingen:



Symbolene i øverste høyre hjørne på skjermen indikerer alltid nåværende status:



Tallmodus (Num Lock) på/av



Store bokstaver (Caps Lock) på/av



Lyd på/av (mute)



Bluetooth-status (Se **Mobiltelefon** for mer informasjon)



Shift



Batteristatus



Internettforbindelse (se **Fjernoppdateringer** for mer informasjon)



Union-tast på/av


Menyer

Få tilgang til ytterligere funksjoner og innstillinger i **Menyene**.

Se **Innstillinger** for mer informasjon om hvordan du endrer oppsett og preferanser for din Lightwriter.

Brukermeny

Trykk på **Meny**  for å se **Brukermeny**-skjermen:

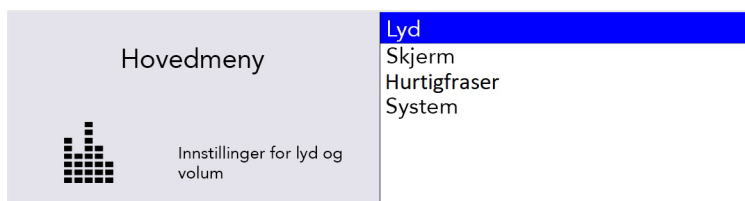

Menyen vises på høyre side av skjermen. En kort beskrivelse av menyalternativet som er uthevet på tidspunktet vises på venstre side på skjermen.

Bruk **Venstre** og **Høyre piltast** for å utforske menyalternativene. Trykk **Enter** for å velge et alternativ.

Trykk på **Av-og-på-knappen** for å komme tilbake til det foregående skjermbildet.

Etter en kort stund, hvis det ikke trykkes på noen taster, vil det bli et 'tidsavbrudd' og du vil gå tilbake til det foregående skjermbildet.

Avansert brukermeny

Trykk på **Shift-Meny** for å se **Avansert brukermeny**-skjermen:



TIPS: Avhengig av hvordan din Lightwriter er satt opp, vil du se flere eller færre alternativer på Meny-skjermen.

Avanserte skrivefunksjoner

I tillegg til å uttale den teksten du ønsker å kommunisere, tilbyr Lightwriter flere funksjoner som kan hjelpe deg med å gjøre kommunikasjonen din raskere.

Brukerordbok

Nye ord

Hvis du bruker uvanlige navn og ord som du ikke finner i hovedordboken, vil Lightwriter raskt lære dem for deg. Hvis du skriver et ord fem ganger (dette kan endres i **Innstillinger**), vil det automatisk bli lagt til din **Brukerordbok**. Et ord vil ikke vises som forslag med mindre det ligger i en av ordbøkene dine.

Legg til, Rediger og Slett ord

Du kan legge til dine egne ord, redigere feilstavede ord eller slette ord.

Gå til **Shift-Meny > Ordbok > Brukerordbok > Legg til ord**. Skriv inn ordet og trykk på **Enter** for å lagre.



For å redigere et ord, gå til **Shift-Meny > Ordbok > Brukerordbok > Bla gjennom**. Du kan bruke **Piltastene** til å bla opp og ned på listen og **Enter** for å velge.

TIPS: Hvis du har en lang liste med ord, kan du begynne å skrive ordet du leter etter og du vil bli ført direkte til det.

Uthev det valgte ordet og trykk på **Enter** for å redigere det eller **Slett** for å slette det. Hvis du velger å slette, vil du få opp et bekreftelsesvindu:



Hvis det er mange ord du ønsker å legge til, kan du **laste opp** din egen Brukerordbok til Lightwriter. Se **Import og Eksport av Data** for mer informasjon.



Taleunntak

Det kan være du ønsker å endre måten Lightwriter uttaler enkelte ord på. For å gjøre det må du lage et **Taleunntak**:

Gå til Shift-Meny > Ordbok > Taleunntak > Legg til ord.

Skriv ordet som Lightwriter ikke uttaler riktig i boksen øverst til høyre.

I boksen nederst til høyre skriver du inn ordet slik du ønsker at det skal uttales. Forsøk å skrive det inn fonetisk eller legg til bindestreker eller mellomrom for å dele ordet inn i segmenter:

Legg til ord i unntak		Stavemåte:
	Trykk  for å teste	<input type="text" value="Trondheim"/>
		Uttale:
		<input type="text" value="Trån-hjem"/>

Det kan for eksempel være at **Trondheim** vil høres bedre ut hvis du skriver **Trån-hjem**.

Du kan teste resultatet ved å trykke på **Lyd** 

Så snart du er ferdig, trykker du på **Enter** for å lagre å gå ut.

Neste gang du skriver **Trondheim** vil det bli uttalt korrekt.

Redigere eller slette et taleunntak

For å redigere et taleunntak, gå til **Shift-Meny > Ordbok > Taleunntak > Bla gjennom**.

Uthev det valgte ordet og trykk på **Enter** for å redigere det eller **Slett** for å slette det.






Ordforslag

Lightwriter husker automatisk og lærer ordene du bruker. Disse blir presentert for deg som **Forslag**.

Lightwriter er allerede lastet med en omfattende ordbok, men jo mer du skriver og snakker, dess mer nøyaktig vil disse ordforslagene være, siden enheten fortsetter å legge til ord i din **Brukerordbok**.

Din liste over Ordforslag vises nederst på **Taleskjermen** samtidig som du skriver. Dersom du ser ordet du ønsker å bruke, trykk på den aktuelle **Tall**-tasten for å velge Ordforslag (sørg for at Tallmodus er slått av).

For å velge 'kaffe' for eksempel, trykker du på **tallet 1**.

onsdag 26/09/2018 2:16     48% 
Vil du ha en ka
1 kaffe 2 kakao 3 kake 4 kald 5 kalk 6 kanel

Etter at du har valgt ordforslag, vil ordet vises i **uthevet kursiv** på skjermen:



Ordforslag fungerer bare på det til enhver tid siste ordet i setningen du skriver. Så hvis du går tilbake og redigerer tekst, fungerer ikke ordforslag midt i en setning.

Du kan slette hele det foreslåtte ordet ved å trykke på **Slett** når markøren er hvor som helst i eller på slutten av ordet.

Hvis du ikke ønsker å bli vist Ordforslag, kan du slå dem av, se **Innstillinger**.

Notater

Du kan bruke **Notater** til å lagre, redigere og si lengre tekster. Lagringskapasiteten er stor og kan lett holde en hel roman.

Den beste måten å legge inn nye Notater på din Lightwriter er å skrive dem på en PC og så importere dem fra en USB-minnepenn.

Du kan også skrive inne å lagre større tekster direkte på din Lightwriter.

TIPS: Notater er nyttige hvis du vil forberede deg på en legetime, eller en presentasjon på skole eller jobb. Det kan også være nyttig å forberede en tekst før en telefonsamtale hvis du vet hva du skal snakke om.

Import av notater

Skriv inn teksten din på en datamaskin med for eksempel Windows Notisblokk eller Microsoft Word. Husk å bruke riktig tegnsetting som komma og punktum, slik at teksten får mening når den blir lest opp. Unngå spesialkarakterer da disse kan gjøre at filen ikke lar seg laste opp korrekt til Lightwriter.

Lagre din Notat som en ren tekst .txt-fil. Kopier Notatet fra din datamaskin til en USB-minnepenn. Navnet du gir filen vil bli navnet til notatet på din Lightwriter, så pass på å gi det et navn du vil gjenkjenne.

Sett inn USB-minnepennen i USB-porten på siden av din Lightwriter.

Gå til Shift-Meny > Ordbok > Notater > Importer.

Y Din Lightwriter vil lese fra USB-minnepennen, og vise en liste over alle filer som er kompatible for import:



Merk filen du vil importere ved å bruke **Venstre** og **Høyre piltast** og trykk **Enter** for å importere den.

Rediger ditt notat (eller lage et nytt)

For å redigere (eller lage et nytt) notat på din Lightwriter, gå til **Shift-Meny > Ordbok > Notater > Bla gjennom**.

Marker **filen** du vil redigere (eller velg **Ny**) og trykk **Enter**.

> **Rediger Navn:** Gi Notatet et navn som hjelper deg å huske hva det inneholder. Bruk kun bokstaver og tall i navnet (unngå spesialkarakterer og tegnsetting).


> **Bruksmodus:** For å føre en mer naturlig samtale, kan du velge hvordan Notatet ditt skal leses opp av din Lightwriter. Du kan bryte opp teksten som skal leses opp i deler – opplesingen vil stoppe, så kan du trykke **Enter** for å fortsette opplesningen (flere detaljer under).

- Ord for Ord – opplesningen stopper etter hvert ord.
- Setning for Setning – opplesningen stopper etter punktum, spørsmålsteget og utropsteget.
- Seksjon for Seksjon – opplesningen stopper etter hver ny linje med tekst.
- Hele notatet – hele notatet blir lest opp fra start til slutt (med naturlige pauser ved tegnsetting).

> **Rediger Notat:** Skriv inn teksten du vil lagre. Pass på at du bruker tegnsetting som komma slik at teksten gir mening når den blir lest opp.

Snakke med notater


Gå til **Shift-Meny > Ordbok > Notater > Velg**. Marker Notatet du vil bruke for å snakke og trykk **Enter**.

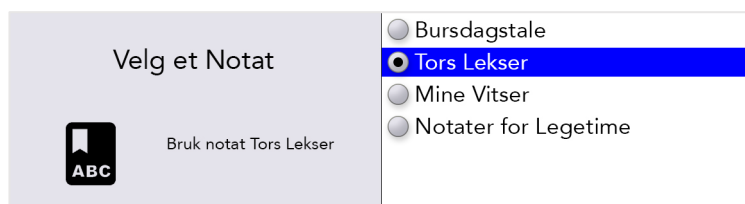


TIPS: Før du bruker ditt Notat, vil du kanskje sette opp Bruksmodus, se **Rediger ditt Notat**.

Du kan nå bruke ditt valgte Notat når du har lyst. Fra Taleskjermen trykk **Shift-Mellomrom** og innholdet av notatet blir vist på skjermen.

Ut ifra din valgte Bruksmodus, så vil den første delen av teksten bli markert med **fet kursiv**:

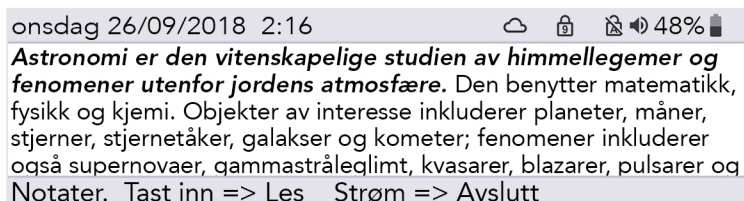

Trykk **Enter**, og din Lightwriter vil lese opp den første delen av teksten og stoppe. Neste del av teksten vil nå være markert med **fet kursiv**:

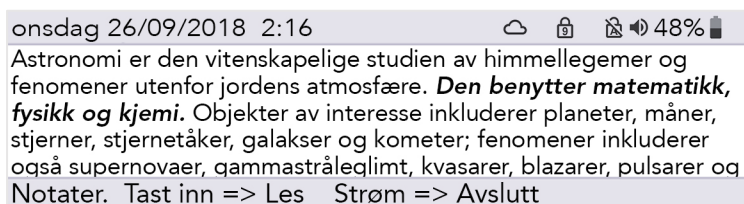

Trykk **Enter** for å fortsette opplesningen.

Hvis opplesningen ikke går helt etter planen eller du må tilpasse deg til ditt publikum, kan du bruke **Venstre** og **Høyre piltast** for å bevege deg mellom de forskjellige delene av Notatet ditt. På denne måten kan du gjenta eller hoppe over deler av teksten.

Hvis du må stoppe opplesningen etter at den har startet, trykk på **Av-og-på-knappen** og din Lightwriter vil avslutte opplesningen ved slutten av setningen. Trykk på **Av-og-på-knappen** igjen for å gå ut av Notat modus og gå tilbake til den vanlige Taleskjermen.

Eksport av notater

Sett inn USB-minnepennen i USB-porten på siden av din Lightwriter.

Gå til Shift-Meny > Ordbok > Notater > Eksporter.

En liste over dine Notater vil vises. Velg den du vil eksportere ved å bruke **Venstre** og **Høyre piltast** trykk **Enter** for å kopiere den til USB-minnepennen.

Du kan nå overføre filen til din datamaskin for redigering, om det er ønskelig.

MERK: Hvis du importerer eller eksporterer en fil med samme navn som en fil som allerede eksisterer på USB-minnepennen, kan den bli overskrevet.

Hurtigfraser


Du kan også lagre og bruke korte tekstsnutter som **Hurtigfraser**.

Det er veldig nyttig å ha lagrede setninger klare når du ikke har tid til å skrive. Det kan være nyttig å lagre en rask introduksjon til for eksempel telefonsamtaler til legekantor, særlig hvis resepsjonisten ikke forventer å snakke med en Lightwriter-bruker. For eksempel «Hei, jeg bruker et talesynteseprogram siden jeg ikke er i stand til å snakke. Vær så snill å ikke legg på. Jeg har behov for å bestille en time.»


For å lage (eller redigere) en hurtigfrase

For å lagre (eller redigere) en frase, trykk på **Meny-tasten** og velg **Hurtigfraser > Bla gjennom**.

Bruk **Venstre** og **Høyre piltast** for å bla opp og ned i listen og velg en bokstav (for eksempel 'k') som du ønsker å lagre Hurtigfrasen til:

<p>Bla gjennom hurtigfraser</p>  <p>Rediger hurtigfrase for tast k</p>	<p>h Kan jeg gå ut i hagen? i Legen min heter Dr. Isaksen j Vær tålmodig er du snill, jeg kan ikke k Jeg vil gjerne ha svart kaffe med sukker l Tanten min har lagret dørkoden på m Mitt favorittdyr er elefanten n Hyggelig å treffe deg, hva heter du?</p>
---	---

Trykk på **Enter** og skriv deretter inn (eller rediger) ønsket frase og trykk **Enter** for å lagre.

<p>Rediger hurtigfraser</p>  <p>Rediger hurtigfrase for a trykk så på Enter for å godta eller Av-og-på-knappen for å avbryte.</p>	<p>Jeg vil gjerne ha svart kaffe med en sukkerbit</p>
--	---


TIPS: Hvis du velger en bokstav som er relevant for den enkelte frase, er det lettere å huske hvilke fraser som er lagret til den enkelte bokstav. «Jeg vil gjerne ha svart kaffe» kan for eksempel lagres under 'k' for kaffe.

Bruk av hurtigfraser

Sørg for at Taleskjermeren er tom og trykk på **Enter** etterfulgt av den tilknyttede **Bokstaven**.

Trykk deretter på **Enter** for å uttale frasen umiddelbart, eller fortsett å skrive for å justere frasen før du snakker.

For eksempel trykk på **Enter** og deretter **K** for å bruke den lagrede Hurtigfrasen:

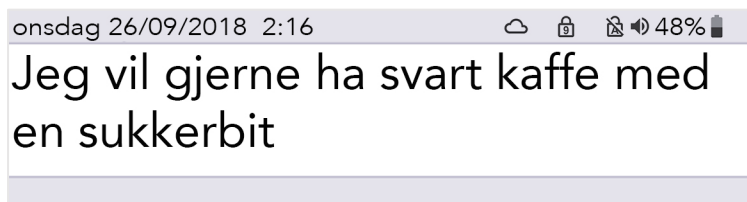

Forkortelser


For å kommunisere hurtigere, kan du sette opp **Forkortelser** med utvidelser for lengre ord og korte fraser.

Gå til Shift-Meny > Ordbok > Forkortelsesordbok > Bla igjennom > Ny.

I boksen øverst til høyre, skriv inn din forkortelse (eksempel **ntnu**). Trykk **Enter**, og så skriver du inn forkortelsesutvidelsen (eksempel, **Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet**). Trykk **Enter** for å lagre.



Når du taster inn din forkortelse på Taleskjermeren, vil forkortelsesutvidelsen vises i Prediksjonsfeltet:

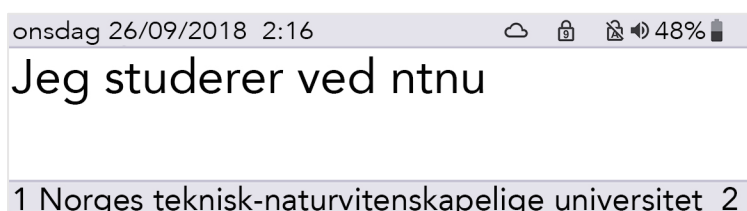

Bare trykk på den korresponderende **Talltasten** akkurat som du ville ha gjort ved valg av en vanlig Prediksjon.

TIPS: Unngå å lage forkortelser som er lik begynnelsen på ord som er ofte brukt. Eksempelvis, hvis forkortelsen din var **gje**, kan forkortelsen din skyve andre viktige Prediksjoner som **gjennom**, **gjenta**, **gjenkjenne** etc.

Vokale 'Smileys'

Acapela-stemmer blir vanligvis registrert med noen ekstra **lyder** og **utrop**.

Når du har Taleskjermen åpen, skriv teksten (se forslag under) og trykk deretter på **Enter** – Lightwriter vil gjøre resten.

Disse lydene kan være svært nyttige, og det er en svært god idé å lagre favorittlydene dine i Hurtigfraser.

Lydeffekter starter og slutter alltid med '#'. Utrop blir alltid etterfulgt av '!'.

Her er noen vanlige eksempler som du kan teste ut på din Lightwriter (disse skiller mellom små og store bokstaver):

Lyder #WHISTLE02# #LAUGH03# #YAWN02# #COUGH02# #MMM01#

Utrop Aha! Haha! Idiot! Må! Bravo!

MERK: Dette er registrerte stemmer, så de vil endre seg avhengig av hvilken Lightwriter-stemme du har valgt.

Gå inn på <http://www.acapela-group.com/voice-smileys/> for en fullstendig liste over lyder og utrop.

TIPS: Sørg for at Talemodus er slått på hvis du vil bruke tall!

Mobiltelefon

Du kan kommunisere med venner og familie gjennom din egen mobiltelefon ved hjelp av Lightwriter. Du kan både ringe og lese/sende tekstmeldinger med Lightwriter.

TIPS: Før du starter, sørg for at telefonen har tilstrekkelig batteri, at du har god nok dekning og at et eventuelt kontantkort er fylt opp.

Bluetooth symboltaster:



Bluetooth på, men ikke tilkoblet



Bluetooth innkommende




Bluetooth tilkoblet




Bluetooth utgående

Koble sammen med din mobiltelefon

1. På **Lightwriter**, gå til Shift-Meny > Mobiltelefon > Bluetooth aktivering og forsikre deg om at Bluetooth er På.
2. På **telefonen**, sørg for at Bluetooth er aktivert og se deretter listen over tilgjengelige enheter for å være sikker på at du ser din Lightwriter.
3. På **Lightwriter**, gå til **Shift-Meny > Mobiltelefon > Bluetooth-paring**. Etter en kort stund vil en liste over Bluetooth-enheter i nærheten vises på Lightwriter-skjermen:

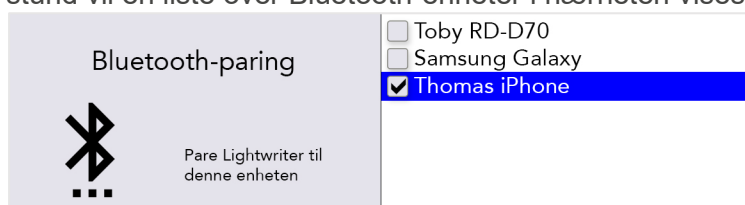

4. Velg telefonen du ønsker å koble til (du bør bare koble til én telefon om gangen).
5. Sjekk **Telefonen** din for å kontrollere tilkoblingen. Avhengig av hvilken telefon du har kan du være du må bekrefte **Tilkoblingen** og deretter **Tillate** at Lightwriter synkroniserer med kontaktene dine:

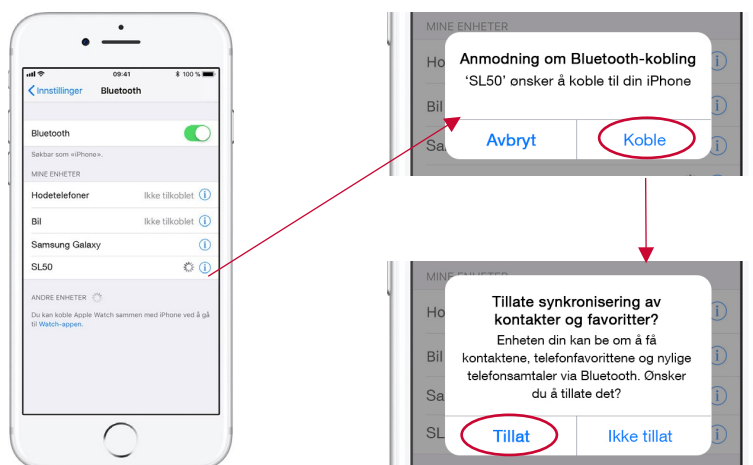

MERK: Skjermbildet vil se forskjellige ut avhengig av telefonmodell.

TIPS: Etter tilkoblingen kan det ta noen minutter å synkronisere med telefonen før du kan begynne å bruke telefonen og SMS-funksjonene.

Fa tilgang til kontaktene dine


Så snart du har tilkoblet telefonen, vil du kunne bla gjennom kontaktene dine.

Gå til Shift-Meny > Mobiltelefon > Telefonoppringning eller Send SMS.

I den øverste boksen bruker du **Venstre** og **Høyre piltast** for å bla gjennom kontaktene dine, eller du kan taste inn hele telefonnummeret.

Søk i kontakter

Du har sannsynligvis en lang liste med kontakter. For å søke etter en konkret kontakt, begynn å skrive navnet til kontakten for å forenkle søket:

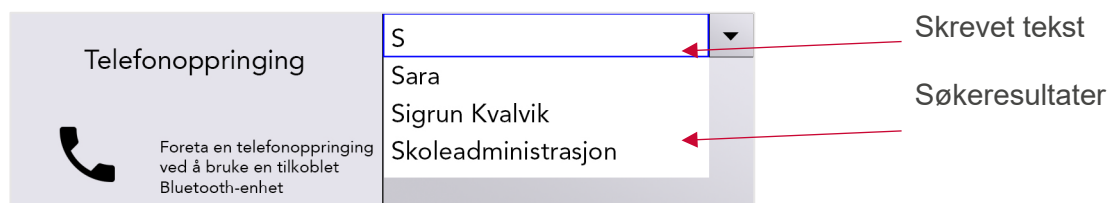

Du kan bla opp og ned i søkeresultatene ved å bruke **Venstre** og **Høyre piltast**. Trykk på **Enter** for å velge kontakt eller **Slett** for å fjerne bokstavene du har skrevet.

Ved å trykke på **Av-og-på-knappen** kommer du tilbake til den foregående menyen.

Du er nå klar til å ringe og sende tekstmeldinger!

TIPS: Du kan ikke redigere kontakter på telefonen din fra Lightwriter.

Telefonsamtaler

Svare på et anrop

Dersom du har koblet til telefonen din og noen ringer deg, vil telefonen ringe som normalt.

For å gjøre det lettere å kjenne igjen, vil Lightwriter også spille nøyaktig samme ringetone som telefonen din og vise et skjermbilde for innkommende samtale:



For å svare på en samtale, bruk **Venstre** og **Høyre piltast** for å velge 'Godta' eller 'Avvise' og trykk **Enter** for å bekrefte.

For å avslutte en samtale, trykk på **Meny** > **Legg på**


TIPS: Etter tilkobling trenger du ikke nødvendigvis alltid å bruke Lightwriter! Du kan velge å enten svare ved å bruke telefonen som normalt, eller du kan svare ved hjelp av Lightwriter.

Foreta et anrop

For å ringe fra Lightwriter, gå til **Shift-Meny > Mobiltelefon > Telefonoppringning**.

Begynn å skrive navnet for å bla gjennom telefonboken (eller skriv et nytt nummer).

Bruk **Venstre** og **Høyre piltast** for å bla gjennom kontaktene.

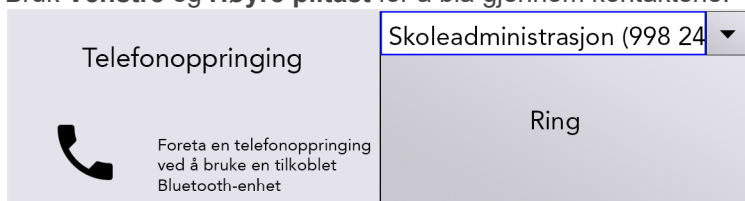

Trykk på **Enter** for å bekrefte nummeret, deretter **Enter** for å ringe.

TIPS: Lagre noen Hurtigfraser som kan være til nytte i telefonsamtaler, med tanke på personer som ikke forventer å snakke med en Lightwriter-bruker. For eksempel «Hei, jeg bruker et talesynteseprogram siden jeg ikke er i stand til å snakke. Vær så snill å ikke legg på. Jeg har behov for å bestille en time.»

For å avslutte en samtale, trykk på **Meny > Legg på**

Ting du kan gjøre i løpet av samtalen


Lightwriter har en innebygget mikrofon slik at du kan snakke og lage lyder i løpet av samtalen, i tillegg til å bruke skriv og snakk-funksjonene på Lightwriteren.

Du kan også bruke Menyene som normalt mens du snakker i telefonen. Husk at det finnes en snarvei til hovedvolumknappen fra hvilket som helst skjermbilde: trykk og hold **Lyd** nede samtidig som du bruker **Venstre** og **Høyre piltast** for å skru volumet opp eller ned.

TIPS: Du kan også justere volumet på innkommende og utgående samtaler separat i **Avanserte Innstillinger**.


Bytt mellom telefonen og Lightwriter

Før eller under en vanlig telefonsamtale på din tilkoblede enhet kan du velge å kommunisere gjennom Lightwriter. Bruk Bluetooth-symbolet når som helst under en samtale:

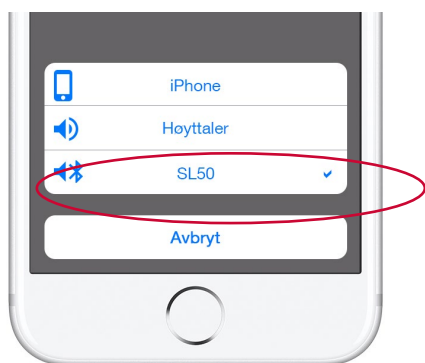

Alternativer for innkommende og utgående samtaler.


MERK:
Skjermbildet vil se forskjellige ut avhengig av telefonmodell.

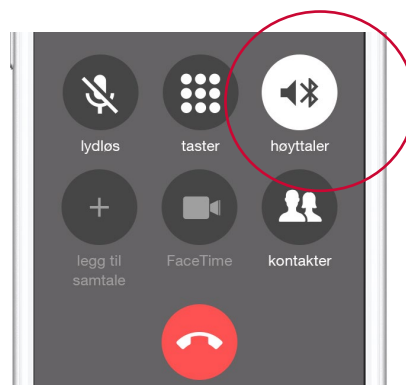

Alternativer under en samtale.

For å avslutte samtalen

For å legge på fra Lightwriter, trykk på **Meny > Legg på**.

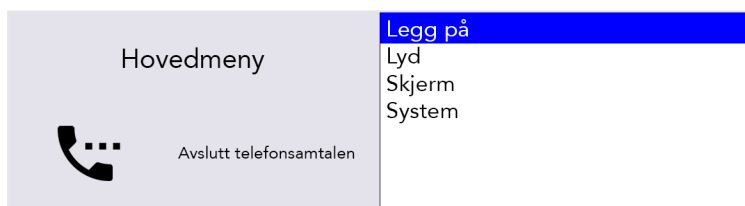

Du kan også velge å legge på fra telefonen – bare avslutt samtalen på vanlig måte.

TIPS: Dersom du beveger deg for langt fra telefonen, vil Lightwriter miste Bluetooth-tilkoblingen og samtalen vil gå tilbake til telefonen.

Tekstmeldinger

MERK: Denne funksjonen er per dags dato bare tilgjengelig sammen med Android telefoner (ikke iPhone).

Et varsel vises på skjermen når du mottar en ny tekstmelding.

Herfra kan du **Lese**, **Svare** eller **Avvise** meldingen ved å bruke **Venstre** eller **Høyre piltast**, og deretter **Enter**.

Hvis du ikke ønsker å lese meldingen med en gang kan du **Avvise**, og lese den senere.

Velg **Svar** og trykk **Enter** for å åpne et vindu hvor du kan skrive et svar på meldingen. Trykker du **Enter** her, blir meldingen din sendt med en gang.



Meldingshistorikk

For å finne dine sendte og mottatte meldinger, trykk på **Shift-Meny > Mobiltelefon > Tekstmeldinger**.

Her vil du se en liste over nummer og kontakter du har utvekslet meldinger med.

Bruk **piltastene** og **Enter** for å velge en kontakt og se meldinger du har sendt til eller mottatt fra denne.

Listen er sortert med nyeste melding øverst, men uleste meldinger vil alltid ligge først. Disse er merket med en stjerne.

Velg en melding på samme måte for å se hele teksten, og følg instruksjonene på skjermen for å sende et svar.

Sende en ny tekstmelding

For å sende en tekstmelding går du bare til **Shift-Meny > Mobiltelefon > Send SMS**.

Skriv inn beskjeden og trykk deretter på **Enter**. Du vil da komme til kontaktlisten.

Begynn å skrive navnet for å bla gjennom telefonboken (eller skriv et nytt nummer). Du kan også bruke **piltastene** for å navigere i listen.

Enter tar deg til en ny skjerm med kontaktens informasjon og meldingen din.

Trykk på **Enter** for å bekrefte og sende meldingen.

TIPS: Hvis du beveger LW inn og ut av rekkevidden til telefonen mens du sender en melding, kan du miste tilkoblingen, og det kan være at meldingen ikke blir sendt.

Skanning

For å bruke skanningsfunksjonen, plugg inn to brytere og du er klar til å starte (se mer informasjon under).

Tastene vil lyse opp i en sløyfe og kan velges ved å trykke på en **bryter** eller en **tast på tastaturet**.

Bryterne kan aktiveres på flere måter, enten ved å trykke på en bryter med hånden, foten eller hodet, eller ved å bruke puste/suge-styring med munnen. Bryterne kan også ha ulik trykksensitivitet, størrelse og tekstur for å tilpasses den enkeltes behov.



Tilgangsmetoder

Ulike tilgangsmetoder gjør at du kan bruke Lightwriter på best mulig måte, tilpasset dine behov.

På høyre side av Lightwriter finner du to bryter-porter:



Port 1 Port 2



Det er 3 tilgangsmetoder tilgjengelig:

1-bryter-skanning



Plugg en bryter inn i **Port 1**. Trykk på **bryteren**. Skanning vil automatisk starte å gå i sløyfe. Trykk på **bryteren** for å velge den markerte tasten/gruppen av taster.

Trykk på **en tast** for å gå tilbake til vanlig tastatur.

2-bryter-skanning



Plugg de to bryterne inn i **Port 1 og 2**. Trykk på **bryteren i Port 2** for å bevege deg gjennom de uthevede radene eller tastene. Trykk på **bryteren i Port 1** for å velge den markerte tasten/gruppen av taster.

Trykk på **en tast** for å gå tilbake til vanlig tastatur.

Skanning med hvilken som helst tast



Du må aktivere **Skanning med hvilken som helst tast** (se **Innstillinger**). Så snart dette er aktivert vil skanningen starte automatisk. Trykk på **hvilken som helst tast** for å velge den markerte tasten/gruppen av taster.

For å deaktivere Skanning med hvilken som helst tast, **sett inn og trykk på en bryter**, eller endre innstillingene.

Velge et Skannemønster


Skanning fungerer ved å utheve forskjellige grupper av taster på tastaturet i et mønster. Når tastegruppen du ønsker lyser, kan du trykke på 'bryteren' for å kjøre en mindre skanning innenfor denne gruppen av taster.

Sånn fortsetter det til du til slutt kan trykke på 'bryteren' for å bruke den valgte tasten.

Å velge et passende skannemønster vil hjelpe deg med å skanne tastaturet på en måte som passer for deg:


Rad/kolonne

Skann én rad på tastaturet om gangen, etterfulgt av 'tast for tast' på den valgte raden:

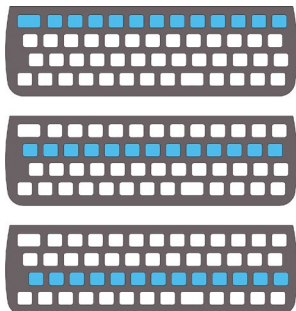


Tast for tast

Skann én tast om gangen, fra øverst til venstre til nederst til høyre på tastaturet:

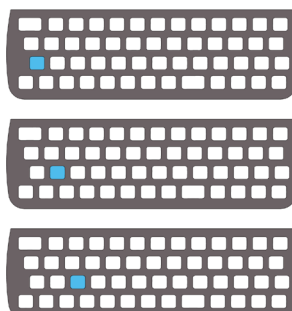

Halvt om halvt (Splitt)

Skann mellom to halvdelar av tastaturet, deretter halvparten av de utvalgte til bare den ønskede tasten står igjen:

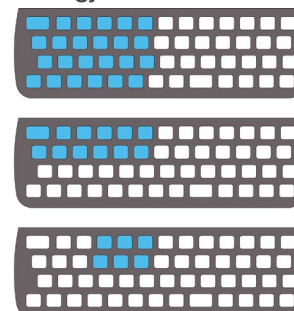

TIPS: Du kan også endre skannehastigheten, lydene og tidsavbrudd for søk i sløyfe. Se **Innstillinger**.

Tastaturet

Det er viktig at du er komfortabel med å bruke tastaturet, siden det er slik du kontrollerer Lightwriter. Du kan bruke en annen fingerguide, eller til og med velge en annen layout for å gjøre det enklere å bruke.

Det er også viktig at du holder tastaturet rent. Hvis ikke, kan tastene bli klissete eller ikke respondere på berøring over tid.

Tastaturet vil automatisk lyse opp under dempede lysforhold for å hjelpe deg med å se tastene. For å justere dette, se **Innstillinger**.

Du kan også endre Minimum tastetrykk og Repetisjonsforsinkelse, se Innstillinger.



Bytte fingerguide


Fingerguidene hever området rundt tastene for å guide fingrene dine til de rette tastene når du skriver.

Lightwriter leveres med tre fingerguides med forskjellig dybde.

Standard fingerguide



Flat fingerguide

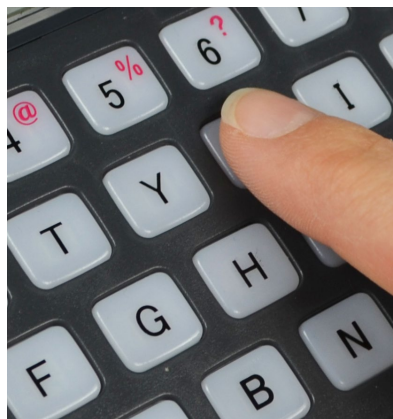



Dyp fingerguide



Standard fingerguide er allerede tilpasset din Lightwriter.

Dersom du har behov for å endre fingerguide, tar det kun noen få minutter. Det kan være du trenger hjelp til dette hvis det er vanskelig for deg å utøve presise håndbevegelser. Du vil trenge **Verktøysettet** som fulgte med Lightwriteren.

Fjerne en fingerguide

1. Plasser Lightwriter på et bord eller en flat overflate, og slå den av ved å hold ned **Av-og-på-knappen**  i 3 sekunder til du hører et pip eller velg **Meny**  **System>Slå Av.**
Ved hjelp av skrujernet som leveres sammen med Lightwriter, skru løs de to skruene på hver side av tastaturet. Oppbevar disse på et trygt sted. Du vil trenge dem senere.



2. Så snart du har tatt ut skruene, sett verktøyet for å løsne fingerguiden inn i justeringspunktet på høyre side nederst på fingerguiden. Den buede delen på verktøyet skal være vendt mot deg slik at det passer inn i den buede delen på justeringspunktet. Trykk verktøyet forsiktig nedover slik at fingerguiden løftes av Lightwriteren. Du vil høre eller kjenne et svakt klikk når guiden løsner.



3. Gjenta trinn 2 med justeringspunktene på venstre side og i midten helt til fronten på fingerguiden har løsnet fra Lightwriter. Hvis det fortsatt kjennes litt stivt, bruk verktøyet i hvert av justeringspunktene en gang til.



4. Så snart det har løsnet, hold den nedre delen av fingerguiden forsiktig og trekk den opp og fremover, vekk fra Lightwriter. Dersom noen av tastene løsner mens du tar av fingerguiden, trykker du dem bare tilbake på plass på gummimatten. Sørg for at de sitter godt på plass.



Feste en fingerguide

5. Velg en ny fingerguide og plasser det på linje med tastaturet på Lightwriter. Du kan se hvilken vei fingerguiden skal festes siden åpningen for den brede Av-og-på-knappen skal plasseres øverst til venstre på tastaturet. Skyv den øverste delen av fingerguiden forsiktig inn under hoveddisplayet mens du holder den nederste delen av fingerguiden.



6. Når den øverste delen av fingerguiden er på plass, trykk forsiktig ned foran på fingerguiden rundt justeringspunktene. Du vil høre eller kjenne et svakt klikk når fingerguiden faller på plass. Sørg for at ingen av tastene sitter fast under fingerguiden og at alle hjørnene er trykket helt ned.



TIPS: Hvis det er åpent langs fronten på fingerguiden, må du trykke guiden ned til den klikker på plass.

7. Skru til de to skruene på hver side av tastaturet ved hjelp av skrujernet som leveres sammen med Lightwriter. Ikke stram disse skruene for mye, det kan skade fingerguiden eller rammen til Lightwriter. Den nye fingerguiden er nå satt på.



Rengjøring av tastaturet

Dersom tastene blir klissete eller ikke responderer, kan det være at tastaturet må rengjøres. Dette er enkelt, og tar ca. 15 minutter.

Sørg for at du har kontrollert hvilket tastatur-layout du har før du fjerner tastene. **Tastatur-layoutene** finner du på neste side, og disse fungerer som praktiske guider når du skal sette alle tastene tilbake igjen!

1. Ta av fingerguiden ved å følge trinn 1 til 4 i **Bytte fingerguide**. Husk å oppbevare skruene på et trygt sted. Du vil trenge dem senere.



2. Etter at du har fjernet fingerguiden, skal du forsiktig ta av alle tastene fra gummimatten og legge dem i varmt såpevann sammen med fingerguiden. La dem ligge i noen minutter for å sørge for at skitt og eventuelle rester blir fjernet. Vær forsiktig så du ikke mister noen av tastene.



3. Rengjør gummimatten forsiktig ved hjelp av en fuktig tannbørste eller bomullspinne mens fingerguiden og tastene ligger i vann. Ikke gni for hardt på matten da det kan ødelegge gummien. Sørg for at eventuelt vann som ligger igjen på matten blir fjernet med en klut.

MERK: Bruk så lite vann som mulig. Hvis det kommer vann under gummimatten, kan det skade Lightwriter .



4. Ta tastene opp fra vannet og tørk dem med en klut. Sett dem tilbake på gummimatten i henhold til bildet av tastatur-layouten. Tastene må festes slik at de sitter godt fast og er i flukt med hverandre. Det kan hjelpe hvis de fortsatt er litt fuktige under.



5. Etter at alle tastene er på plass, sett på en ny fingerguide ved å følge trinn 5 til 7 i **Bytte fingerguide**. Den nye fingerguiden er nå klar til bruk.



Tastatur-layout

QWERTY:



ABC:



Du kan finne bilder av andre tastatur-layouter på nettsiden vår: www.abilia.no.

Endre tastatur-layout

For å endre tastenes layout må du første bytte Tastatur-layout i **Shift-Menu > Tastatur**. Du kan velge mellom flere forskjellige språkoppsett.

Når du har valgt et layout, trenger Lightwriter en omstart. Du må også flytte tastene rundt på tastaturet med en gang:

1. Ta av fingerguiden ved å følge trinn 1 til 4 i **Bytte fingerguide**. Husk å oppbevare skruene på et trygt sted. Du vil trenge dem senere.



3. Plasser tastene på gummmatten i henhold til det nye oppsettet ved å bruke bildet av tastatur-layouten du har valgt i **Tastatur-layout** (se forrige side). Tastene må festes slik at de sitter godt fast og er i flukt med hverandre. Det kan hjelpe om gummmatten er litt fuktig når du setter tastene på plass.



2. Etter at du har tatt av fingerguiden kan du enkelt fjerne de tastene du vil flytte eller bytte fra tastaturet. Vær forsiktig så du ikke mister noen av tastene.



4. Etter at alle tastene er på plass, sett på en ny fingerguide ved å følge trinn 5 til 7 i **Bytte fingerguide**. Den nye fingerguiden er nå klar til bruk.




Fjernoppdateringer


Det er viktig å holde Lightwriter-programvaren oppdatert slik at enheten fungerer sikkert og godt. Oppdateringer kan inneholde viktige feilrettinger (bug fixes), sikkerhetsoppdateringer og forbedrede funksjoner.

Du kan oppdatere programvaren når som helst, så lenge du har internettforbindelse.

1. Bruk ethernet-kabelen som ble levert med Lightwriter. Plugg den ene enden inn i Lightwriter og den andre enden inn i en ethernet-port på ruterens din.
2. Skysymbolet viser status for Lightwriter som følger:

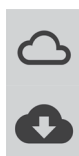

Ingen internettforbindelse

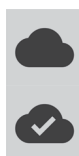

Koblet til internett, ingen aktivitet



Laster ned oppdateringer



Ferdig nedlastet

3. Etter nedlasting, hvis oppdateringene er klare, vil Lightwriter spørre om du ønsker å starte på ny - 'Nei' eller 'Ja'. Hvis du velger 'Nei', vil nedlastingene bli installert neste gang du starter maskinen på ny:




4. Etter nedlastingen kan du koble fra ethernet-kabelen og fortsette å bruke Lightwriter på vanlig måte.

Innstillinger

Det finnes flere innstillinger som lar deg tilpasse Lightwriteren.

For å gjøre det enklere vises kun de enkle innstillingene i **Brukermenyen**.


Trykk på **Meny**-tasten for å se Brukermenyen.

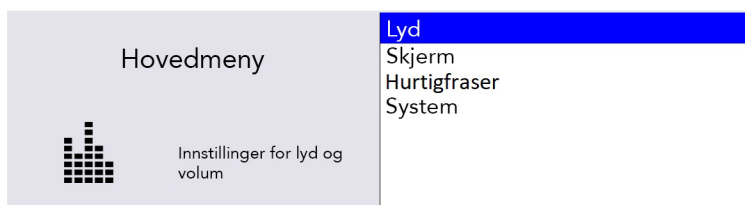

Finne frem i Innstillinger

Bruk **Venstre** og **Høyre piltast** for å utforske menyalternativene. Trykk **Enter** for å velge et menyalternativ.

Bruk **Pil-tastene** for å justere verdier som for eksempel volum opp og ned, og trykk deretter på **Enter** for å lagre valget ditt.

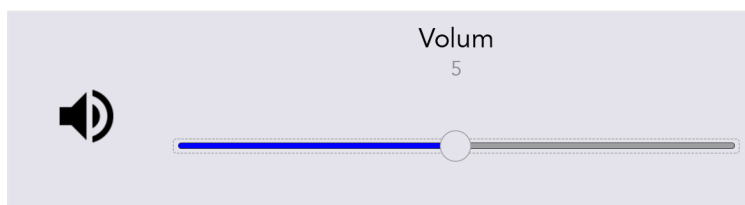

Trykk på **Av-og-på-knappen** for å avbryte eller komme tilbake til det foregående skjermbildet.

Etter en kort stund, hvis det ikke trykkes på noen taster, vil det bli et 'tidsavbrudd' og du vil automatisk gå tilbake til den foregående skjermen.

Avanserte innstillinger

Avansert brukermeny

Du kan finne mer detaljerte Innstillinger i **Avansert Brukermeny**.


Trykk på **Shift-Meny** for å se Avansert Brukermeny.



Du vil få mange flere alternativer i menylisten.

Tilbakestill dine Lightwriter innstillinger

Merk – Du kan tilbakestille hele maskinen til fabrikkinnstillinger (Standard) i: **Shift-Meny > System > Tilbake til fabrikkinnstilling**.

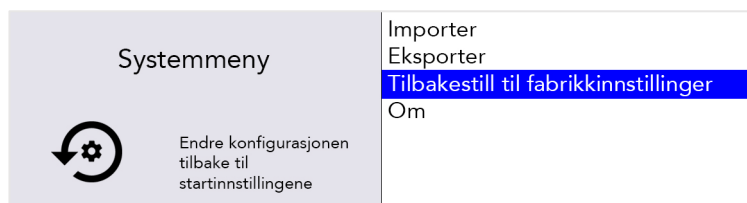

TIPS: Du vil kanskje ta en sikkerhetskopi av noen av dine innstillinger før du utfører en fullstendig tilbakestilling. Se **Import og Eksport av Data**.

Etter tilbakestillingen, må du kanskje velge riktig språk, tid og dato (se **Mer Informasjon om Innstillinger**).

Endre meny-layout

Hvis du vil flytte menyalternativer mellom Avansert Brukermeny og Brukermeny, lar dette seg lett gjøre:


For eksempel, for å legge til '**Alarmtast**' innstillinger til din **Brukermeny**, bla ned til **Alarmtast** i den **Avanserte Brukermenyen**.

Trykk engang på **bokstaven 'U'** på tastaturet for å vise 'Bruker' boksen, og engang til for å huke av i boksen:



Alarmtasten vil nå vises under Bruker Meny. Du må gjenta denne prosessen for hvert alternativ i undermenyen du vil kopiere til Brukermeny.

For eksempel, i '**Avansert Brukermeny**', marker undermenyen **Alarmtast bruk**. Trykk engang på **bokstavtasten 'U'** på tastaturet for å vise 'Bruker' boksen, og engang til for å huke av i boksen:

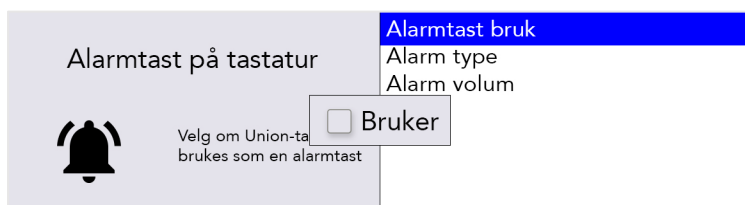

Mer informasjon om innstillinger

Standardverdier vises i **UTHEVET SKRIFT** i følgende tabeller.

Ulike menyinnstillinger vises avhengig av brukernivået du er på:

Brukernivå	Taster	Fargekode
Brukermeny	Meny	Brukermeny
Avansert Brukermeny	Shift-Meny	Avansert

TIPS: Fra den **Avanserte Brukermenyen** er det mulig å legge til eller fjerne menyalternativer i **Brukermenyen**. Derfor er det ikke sikkert at brukernivåene vil være nøyaktig som standardinnstillingene i denne brukerveiledningen. Se **Bytte av meny-layout** for ytterligere instruksjoner.

Dato og klokkeslett

Her kan du velge hvordan/om Lightwriter skal vise dato og klokkeslett.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Velg dato	Velg dagens dato.	Dag Måned År	Avansert
Velg klokkeslett	Velg klokkeslett.	timer minutter sekunder	Avansert
Datoformat	Endre måten dato blir vist på.	Dag Måned Ar , Måned Dag Ar, Ar Måned Dag	Avansert
Klokkeslettformat	Velg 12- eller 24-timersklokke. Endre måten klokkeslett blir vist på.	12/24-timersklokke, Vis sekunder, Skilletegn for timer/minutter, Skilletegn for minutter/sekunder (tt:mm)	Avansert
Vis klokke	Innstillinger for visning av klokke på brukerens skjerm.	Kun klokkeslett, Klokkeslett og dato , Kun dato, Av	Avansert
Tidssone	Velg din aktuelle tidssone.	TIPS: Når du søker gjennom listen, begynn å skrive navnet på landet ditt for å gå direkte til ønsket tidssone.	Avansert

Lyd

Her kan du stille inn volumer, lydeffekter og meldinger for alle funksjonene i Lightwriter.

TIPS: Du kan justere volumet opp og ned fra hvilket som helst skjermbilde: trykk og hold **Lyd** nede samtidig som du bruker **Venstre** og **Høyre piltast** for å endre volumet.

Volum

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Volum	Still inn mastervolumnivå.	1-10 (5)	Brukermeny

Mikser

Her kan du justere volumet for ulike lyder, som for eksempel hodetelefoner, tastetrykk, høyttalere, meldinger, skanning og varsler.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Hodetelefonnivå	Juster volumet på hodetelefonene.	1-10 (5)	Avansert
Intern mikrofon	Juster volumet på den interne mikrofonen.	1-10 (5)	Avansert
Bluetooth inn	Juster volumet på enheten som er tilkoblet via Bluetooth-inngang (Jeg kan ikke høre den som ringer eller det er mye støy på linjen).	1-10 (5)	Avansert
Bluetooth ut	Juster volumet på enheten som er tilkoblet via Bluetooth-utgang (Den som ringer kan ikke høre meg).	1-10 (5)	Avansert
Talevolum	Juster volumet på talestemmen.	1-10 (5)	Brukermeny
Meldingsvolum	Volumet på stemmen som brukes for å lese opp menyene, uttale viktige navn under skanning og andre meldinger fra enheten til brukeren.	1-10 (5)	Brukermeny
Tastetrykk	Juster volumet på tastetrykk-lyden.	1-10 (5)	Brukermeny
Skann klikk-/tonevolum	Juster volumet på skannelyden.	1-10 (5)	Avansert

Skannelyder

Her kan du velge lyd for å indikere skannefremdrift

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Skannelyder	Konfigurasjon av lyd som brukes for å indikere skanning.	Uttale, Pip, Klikk, Stigende toner , Synkende toner, Ingen	Avansert

Tastaturlyder

Her kan du velge hvilken lyd tastaturet skal avgi når tastene trykkes på.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Tastaturlyder	Typen lyd som brukes når en tast holdes nede.	Uttale, Pip, Klikk , Ingen	Avansert

Veiledninger

Her kan du slå av og på veiledningsstemmen for menyer, skrevne setninger, ord og bokstaver.

Veiledningsstemmen er 'stemmen' til Lightwriter når den snakker til deg, og det er vanligvis en annen stemme enn den du bruker når du snakker gjennom Lightwriter. Veilederen kan være til god hjelp hvis brukere ikke kan se/lese menyene eller tastaturet så godt.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Les opp bokstaver	Les opp hver bokstav slik den er skrevet på tastaturet.	På, Av	Avansert
Les opp ord	Les opp hvert ord slik det er skrevet på tastaturet.	På, Av	Avansert
Les opp setninger	Les opp hver setning samtidig som den skrives på tastaturet.	På, Av	Avansert
Les opp menyer	Les opp navn på meny og menyvalg.	På, Av	Avansert

Stemme

Bytt stemme på Lightwriter slik at den passer til din personlighet og dine preferanser.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Velg stemme	Velg stemmen du ønsker at Lightwriter skal bruke når ordene dine uttales.	For tilgjengelige stemmer, se www.acapela-group.com/voices/repertoire/	Avansert
Talehastighet	Sett talehastigheten du ønsker at Lightwriter skal bruke når ordene dine leses opp.	30-200 (100)	Avansert
Veilederstemme	Velg stemmen du ønsker at Lightwriter skal bruke når den snakker til deg.	For tilgjengelige stemmer, se www.acapela-group.com/voices/repertoire/	Avansert
Talehastighet veilederstemme	Sett talehastigheten du ønsker at Lightwriter skal bruke når den snakker til deg.	30-200 (100)	Avansert
Importer ny stemme	Last inn et nytt stemme alternativ fra USB-penn.	-	
Taleunntak	Endre uttalen av utvalgte ord (se Taleunntak).	-	Avansert

Tastatur

Det er viktig at du føler deg komfortabel med å bruke Lightwriter-tastaturet. Med disse innstillingene kan du justere hvordan tastene er organisert, hvilke taster du har og hvordan de fungerer.

Tastatur-layout

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Tastatur-layout	Velg en ferdig oppsatt tastatur-layout. Se Endre Tastatur-layout for detaljer.	Norwegian QWERTY, Norwegian ABC, Spanish QWERTY, Spanish ABC, Italian QWERTY, Italian ABC, Dutch QWERTY, Dutch ABC, English QWERTY , English ABC, Swedish QWERTY, Swedish ABC, French AZERTY, French ABC, German QWERTZ, German ABC, Danish QWERTY, Danish ABC, Finnish QWERTY, Finnish ABC	Avansert

Tastaturinnstillinger

Hvis du har problemer med å treffe tastene eller holde hånden din stødig, kan **Skjelvefilter** og **Repetisjonsforsinkelse** være til hjelp, slik at det blir enklere for deg å bruke Lightwriter. Det kan også være at det å bytte fingerguide vil hjelpe. Se **Ditt tastatur** for mer informasjon.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Skjelvefilter	Behandle gjentatte tastetrykk på en og samme tast innenfor dette antallet millisekunder som ett tastetrykk. MERK: Denne verdien skal være lavere enn Minimum Tastetrykk.	0-1000 ms (30 ms)	Avansert
Repetisjonsforsinkelse	Antall millisekunder som en tast må holdes nede for å få tilgang til sekundærfunksjonen til den aktuelle tasten.	0-1000 ms (600 ms)	Avansert
Minimum tastetrykk	Velg hvor lang tid (i ms) du må holde en tast nede for at Lightwriter skal registrere det som et tastetrykk.	0-1000 ms (10 ms)	Avansert
Tastaturlyder	Typen lyd som brukes når en tast holdes nede.	Uttale, Pip, Klikk, Ingen	Avansert
Importer innstillinger	Importer innstillinger fra en USB-penn.	-	Avansert
Eksporter innstillinger	Eksporter innstillinger til en USB-penn.	-	Avansert

Bakgrunnslys

Still inn lysstyrke, terskler og tidsavbrudd for det bakgrunnsbelyste tastaturet.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Modus for bakgrunnslys	Tastaturet vil automatisk lyse opp under dempede lysforhold for å hjelpe deg med å se tastene.	På, Av, Automatisk	Avansert
Nivå	Velg lysstyrke på bakgrunnslyset på tastaturet.	1-8 (2)	Avansert
Tidsavbrudd	Velg hvor lang tid enhet skal være inaktiv (i sek.) før bakgrunnslyset automatisk blir slått av.	1-100 s (30 s)	Avansert
Terskel	Nivået av omgivelseslys som er nødvendig for å aktivere bakgrunnslys på tastaturet, i 'automatisk' modus.	1-100 (10)	Avansert

Skjerm

Disse innstillingene hjelper deg med å endre hvordan de enkelte skjermbildene vises på de to Lightwriter-displayene.

Hoveddisplay

Dette er hovedbrukerdisplayet som du ser når du bruker Lightwriter.



Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Vis klokke	Velg om dato, klokkeslett eller begge skal vises øverst på skjermen.	Kun klokkeslett, Klokkeslett og dato , Kun dato, Av	Avansert
Fontstørrelser	Innstillinger for tekststørrelse på brukerskjermen.	Hovedfontstørrelse: 5-55 (28) Prediksjon: 5-22 (16) Ikonstørrelse: 5-22 (16)	Avansert
Fontstørrelser for meny	Innstillinger for tekststørrelse i menyene.	Hovednavnstørrelse: 5-18 (18) Menypunkter: 5-18 (12) Hjelpetekst: 5-12 (10)	Avansert
Tidsavbrudd for meny	Velg hvor lenge enheten skal være inaktiv før den automatisk går ut av menymodus.	5s, 15s , 30s, 1 min, 2 min, 5 min	Avansert
Innstillinger for bakgrunnslys	Konfigurasjon for innstillinger for bakgrunnslys for hoveddisplayet.	Modus for bakgrunnslys: På , Av, Automatisk	Avansert
	Lyse lysforhold	Terskel: 1-100 (20) Nivå: 1-100 (60)	Avansert
	Normale forhold	Nivå: 1-100 (30)	Avansert
	Dempede lysforhold	Terskel: 1-100 (10) Nivå: 1-100 (7)	Avansert

Partnerdisplay



Dette er displayet som din samtalepartner ser. Du kan endre størrelse og lysstyrke på teksten for å få plass til mer på skjermen, eller for å gjøre det lettere for din samtalepartner å lese den skrevne teksten.



Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Tidsavbrudd	Velg hvor lang tid enheten kan være inaktiv før samtalepartnerens display skrur seg av.	5s, 15s, 30s, 1 min , 2 min, 5 min	Avansert
Fontstørrelse	Velg tekststørrelse på samtalepartnerens display.	1-100 (96)	Avansert
Innstillinger for bakgrunnslys	Konfigurasjon for innstillinger for bakgrunnslys på samtalepartnerens display.	Modus for bakgrunnslys: På, Av, Automatisk	Avansert
	Lyse lysforhold	Terskel: 1-100 (20) Nivå: 1-100 (90)	Avansert
	Normale forhold	Nivå: 1-100 (40)	Avansert
	Dempede lysforhold	Terskel: 1-100 (10) Nivå: 1-100 (5)	Avansert
Bruksmodus	Velg hva partnerdisplayer skal vise mens du skriver.	Vis hvert avsnitt , Vis hvert ord, Vis hver bokstav, Vis ingenting	Avansert

Fargeskjema

Det kan være du ønsker andre farger på skjermen for at det skal være mer behagelig å lese displayet.

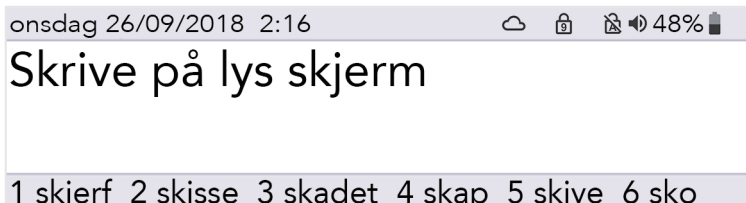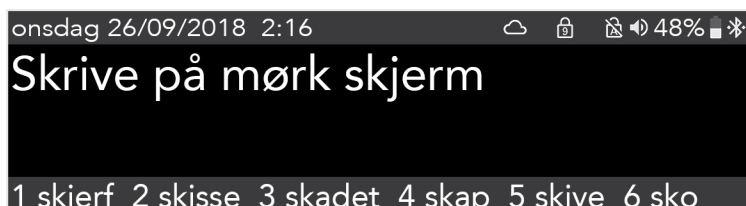

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Fargeskjema	Velg et forhåndsinnstilt tema for menyvisning.	Lys, Mørk	Brukermeny

Tidsavbrudd for hvilemodus

I **Hvilemodus** slår Lightwriter displayene av og går inn i modus for lavere strømforbruk for å forlenge batteritiden. Du kan trykke på **Av-og-på-knappen** for å vekke Lightwriter opp fra Hvilemodus.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Avbryt tidsavbrudd	Velg hvor lenge Lightwriter skal være inaktiv før avbrudd.	15s, 30s, 1 min, 2 min, 5 min , 15 min	Avansert

Alarmtast

Opprett alarm ved å bruke Union-tasten. Dette er nyttig i en nødssituasjon eller når du vil påkalle noens oppmerksomhet.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Alarmtast bruk	Hvor mange sekunder du må holde alarmtasten inne før alarmen utløses.	Av, 1-5s (1s)	Avansert
Alarm type	Hvilken type alarm som skal brukes.	Ding-Dong x2 , Ding-Dong x4	Avansert
Alarm volum	Sett alarmens volum.	1-10 (8)	Avansert

Hurtigfraser

Konfigurasjon av hurtigfraser for hver tast. Hurtigfraser som kan åpnes med en snarvei på tastaturet. Se **Hurtigfraser**.

Bla gjennom	Bla gjennom listen over hurtigfraser.		Avansert
Importer	Importer hurtigfraser fra en USB minnepenn.		
Eksporter	Eksporter hurtigfraser til en USB minnepenn.		

Ordbok

Her kan du se og endre oppslag i ordboken. Du kan kontrollere hvilke ordforslag du ser, og hvordan enkelte ord skal uttales.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Brukerordbok	Konfigurer brukerordbok (tilpasset). Still inn hvor mange ganger et nytt ord skal skrives inn før det blir automatisk lagret i brukerordboken. Se eller rediger brukerordboken.	Autolæringsnivå: 1-100 (5)	Avansert
Taleunntak	Endre uttalen av utvalgte ord. Se Taleunntak .	-	Avansert
Ordprediksjon	Konfigurasjon av ordprediksjon. Velg hvilke ordbøker som skal brukes for oppslag i ordprediksjon.	Aktiver: På , Av Rekkefølge av ordbøker: Bruker , Norsk	Avansert
Notater	Importer og bruk store tekst mengder, som kan leses opp som taler for mer avansert kommunikasjon. Se Notater for detaljer.	-	Avansert
Forkortelsesordbok	Konfigurer 'forkortelse utvidelsene' som vises i ditt Prediksjonsfelt. Se Forkortelser for detaljer.	-	Avansert

Skanning

Her kan du konfigurere hvordan skanning av tastaturet skal fungere.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Skannemønster	Konfigurer sekvens for skanning av tastatur (se Skanning).	Rad/kolonne , Tast for tast, Halvt om halvt (Splitt)	Avansert
Skannelyd	Konfigurasjon av lyd som brukes for å indikere skanning.	Uttale, Pip, Klikk, Stigende toner , Synkende toner, Ingen	Avansert
Skannevolum	Justering av volumet på skannelyden.	Tone-/klikkvolum: 0-10 (5)	Avansert
Skanning med hvilken som helst tast	Skrue av/på funksjon for å bruke enhver tast til valg av skanning.	På, Av	Avansert
Skannehastighet	Velg hastighet for skanning av taster.	0.2–3.0s (0.6s)	Avansert
Tidsavbrudd for skanning	Velg hvor mange ganger skanningen skal gjentas før den går tilbake til tidligere skanning-'nivå'.	1-10 ganger (4)	Avansert

Telefon

Her kan du koble til din mobiltelefon via Bluetooth for å bruke SMS-teksting og ringe.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Bluetooth aktivering	Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonalitet.	På, Av	Avansert
Bluetooth-kobling	Koble din Lightwriter med en Bluetooth-enhet.	-	Avansert
Send SMS	Send en SMS ved å bruke en tilkoblet Bluetooth-enhet.	-	Avansert
Telefonoppringing	Foreta en telefonoppringing ved å bruke en tilkoblet Bluetooth-enhet.	-	Avansert
Utboks	Nylig mottatte tekstmeldinger.	-	Avansert
Innboks	Nylig sendte tekstmeldinger.	-	Avansert

Strøm

Velg på hvilket batterinivå du skal få en påminnelse om å lade Lightwriter.

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Alarmnivå (varsling)	Velg på hvilket strømnivå enheten skal vise et varselssignal.	0-100 (10%)	Avansert
Alarmnivå (pip)	Velg på hvilket strømnivå enheten skal lage en lyd.	0-100 (5%)	Avansert
Aksjonsnivå	Velg på hvilket strømnivå enheten skal slå seg av.	0-100 (3%)	Avansert

Språk

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Språk	Velg språk for din Lightwriter. Når språket settes, vil følgende endres automatisk: <ul style="list-style-type: none">• Meny språk.• Standard ordbok/prediksjoner.• Utvalg av stemmer.• Tastatur-layout.• MERK: taster må kanskje flyttes/byttes.• Tidssone.• Tid & klokkeformat.	English (UK), Deutsch, Norsk (Bokmål) , Svenska	Avansert

System

Innstillinger	Beskrivelse	Verdier	Brukernivå
Importer	Last konfigurasjon fra fil.	-	Avansert
Eksporter	Lagre konfigurasjon til fil.	-	Avansert
Tilbakestill Batteristatistikk	Tilbakestiller batteristatistikk etter batteri bytte. Batteriet må bare byttes av en tekniker.		Avansert
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	Endre konfigurasjonen tilbake til startinnstillingene.	-	Avansert
Slå av	Slå av enheten	-	Brukermeny
Om	Se informasjon om denne enheten.	-	Brukermeny

Import og eksport av data

Du kan sette en USB-penn i Lightwriter for å importere og eksportere data som for eksempel din egen ordbok, Tastatur-layout og sikkerhetskopier.

Du kan bruke USB-pennen som følger med Lightwriter eller du kan bruke din egen.

Lightwriter skal være kompatibel med de fleste USB-penner, men enkelte USB-penner kan ha et tykkere hylster og vil ikke passe inn i porten uten en overgang. Se **Feilsøking** hvis du trenger mer hjelp om hvordan du bruker en USB-penn.



TIPS: Du kan tilpasse din kommunikasjon ytterligere ved å importere lange fraser og til og med taler. Se **Notater** og **Hurtigfraser** for mer informasjon.

Ta sikkerhetskopi av og gjenopprett din Lightwriter

Det er en god ide å ha en sikkerhetskopi av alle dine systeminnstillinger, spesielt hvis du har et oppsett som du har brukt mye tid på å konfigurere.

Dette er også nyttig hvis du har et bestemt 'profil' oppsett du vil installere for en bestemt bruker/brukergruppe. Den lagrer alt fra dine talepreferanser til dine voluminnstillinger.

Ta sikkerhetskopi av dine systeminnstillinger

Gå til Shift-Meny > System > Eksporter > Ta Sikkerhetskopi.



Skriv inn et navn for din sikkerhetskopifil og trykk **Enter**.



Din Lightwriter lager nå en kopi av filen til din USB-penn. Filen vil ha navnet dittfilnavn.allsettings

Rediger din eksporterte fil

Eksporterte filer kan redigeres i de fleste tekstbehandlingsprogrammer (Windows Notisblokk er et godt valg). Åpne filen og du vil se listen over innstillinger med nåværende verdier for hver enkelt innstilling.

Alt du trenger å gjøre er å skrive inn de nye verdiene ved å bruke eksisterende tekst som mal. Lagre filen på USB-pennen som en ren tekstfil (.txt). Endre filnavnendelsen manuelt til .allsettings

MERK: Denne filen inneholder ord som er svartelistet fra din Prediksjonsstrøm, det kan hende at du finner noen av disse ordene støtende.

TIPS: For å se en liste over alle mulige verdier for hver innstilling, se **Innstillinger i Detalj**.

Importer og gjenopprett dine nye innstillinger

For å importere dine systemfiler, sett inn USB-pennen i din Lightwriter. Gå til **Shift-Meny > System > Importer > Gjenopprett system**. Velg systemfilen du vil bruke og trykk **Enter**. Dine systemfiler vil bli lastet inn på din Lightwriter.

Sikkerhetskopi og gjenoppretting av enkelt innstillinger

Du kan også importere et utvalg av enkelt innstillinger hvis du ikke trenger en full systemgjenoppretting.

Prosessen for redigering, import og eksport er de samme som ovenfor, bortsett fra at filnavnendelsen som brukes skal være følgende:

Innstillinger	Beskrivelse	Filnavnendelse for import/eksport
Brukerordbok	En liste over dine mest brukte ord.	.userdict
Forkortelser	En liste over tilpassede Utvidelsesforkortelser.	.abbreviations
Skanningsparametere	Oppsett som Skannehastighet og Skannelyd.	.scanningsettings
Tastatur-layout	Tastenes posisjon på tastaturet.	.kbmapping
Tastaturinnstillinger	Innstillinger som Skjelvefilter og Repetisjonsforsinkelse.	.kbsettings
Lydinnstillinger	Volum, Mikrofon og Lydinnstillinger.	.soundsettings
Hurtigfraser	Din liste over tilpassede hurtigfraser.	.fastphrases

TIPS: For flere detaljer om alle innstillinger, sjekk det relevante kapittelet i denne brukerveiledningen.

Import av Acapela-stemmer

Din Lightwriter blir levert med et forhåndsinstallert utvalg av kvinne- og mannsstemmer. Det er også mulig å laste inn en alternativ Acapela-stemme, som kan kjøpes, ved å bruke en USB-minnepenn.

Importer stemmefilen

For å importere den nye stemmen, kopier hele stemme-mappen (for eksempel «hqm-ref-Norwegian-Bente-22khz») fra din datamaskin til en USB-minnepenn.

Sett inn USB-minnepennen i USB-inngangen på din Lightwriter.


Gå til **Shift-Meny > Stemme > Importer Ny Stemme**. Din Lightwriter vil lese USB-minnepennen, og vise en liste over alle filer som er kompatible for import.

Marker filen du vil importere ved å bruke **Venstre** og **Høyre Piltast** trykk så **Enter** for å importere.

Bruk din nye stemme

Etter at mappen har blitt lastet opp, gå til **Shift-Meny > Stemme > Velg Stemme**.

Din nye stemme vil vises i listen. Bruk **Venstre** og **Høyre Piltast** for å markere stemmen, og trykk **Enter** for å velge den.

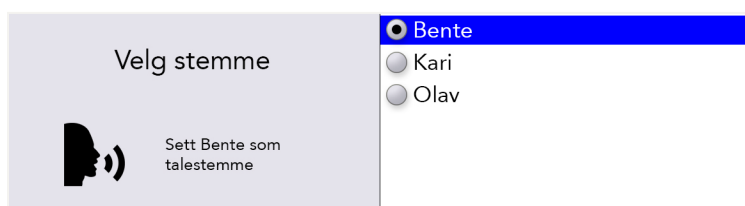

TIPS: Det anbefales at du bruker en stemme som er designet for bruk med ditt valgte språk, slik at ordene blir uttalt korrekt.

Vedlikehold

Rengjøre Lightwriter med en mikrofiberklut og litt vann.

Send enheten for service og reparasjon.

Lagring og kassering





Produktet inneholder elektriske komponenter som må resirkuleres. Kasser produktet på et egnet sted.

Feilsøking

Hvis du får problemer med Lightwriter, kan denne Feilsøkingsguiden være til hjelp. Hvis du fortsatt har problemer, ta kontakt med din leverandør eller Abilia kundeservice.

Generelle problemer

Problem	Årsak	Løsning
Lightwriter henger seg opp eller responderer ikke på tastetrykk.	Mulig systemfeil.	Hold nede Av-og-på-knappen til displayet slår seg av og slipp for å tilbakestille Lightwriteren.
Lightwriter fungerer ikke og displayene er tomme.	Tomt batteri.	Lad Lightwriter i 3-4 timer – du kan bruke Lightwriter mens den lader.
	I Hvilemodus.	Trykk på hvilken som helst tast .
	Avslått	Trykk på Av-og-på-knappen .
	Trenger nye batterier.	Kontakt leverandøren eller Abilia.
Lightwriter-batteriet lader ikke når laderen står i. MERK: Hvis laderen fungerer, skal det grønne LED-lyset ved siden av laderen være tent, og batterisymbolet på skjermen skal vise et elektrisk symbol 	Strømmen er ikke slått på.	Kontroller at stikkontakten fungerer.
	Feil på lader.	Kontakt leverandøren eller Abilia.
Tastene må alltid holdes nede lenge før de virker.	Minimum Tastetrykk er innstilt på for lang responstid.	Still inn Minimum tastetrykk til kortere tid i Innstillinger .
Tastene er klissete eller responderer ikke.	Tastaturet må rengjøres.	Se Rengjøring av tastaturet for mer informasjon.
Lightwriter taler ikke.	Talevolumet er for lavt.	Øk Talevolumet i Innstillinger .
	Mute (dempet lyd) er på.	Slå av Mute ved å trykke på Lyd .
Noe har blitt sølt på Lightwriter.	Ikke få panikk.	Slå av Lightwriter. Hold ned Av/på-knappen  i 3 sekunder til du hører et pip eller

		velg Meny  System>Slå Av. Snu den opp ned (tastene ned) og legg den på et håndkle slik at eventuell væske blir sugd opp. Tørk opp så mye som mulig av det som er sølt. La Lightwriter tørke. Hvis sølet er klissete eller sølete, se Rengjøring av tastaturet.
Batteriet tappes for strøm fortere enn normalt, selv om Lightwriter ikke er i bruk.	Bluetooth er aktivert.	Deaktiver Bluetooth-tilkoblingen når du ikke trenger å bruke mobilfunksjonen. Gå til Shift-Meny > Mobiltelefon > Bluetooth Aktivering > Bluetooth av

Problemer med Mobiltelefon

Problem	Årsak	Løsning
Jeg kan ikke sende eller motta tekstmeldinger eller ringe.	Telefonen virker ikke.	Kontroller at mobiltelefonen din virker, og at du kan ringe og sende tekstmeldinger. Dette kan ha mange årsaker, som for eksempel lavt batteri, manglende dekning eller tomt kontantkort.
Jeg kan ikke finne telefonen min i Bluetooth Pairing (kobling).	Telefonen er utenfor rekkevidde.	Sørg for at telefonen er innenfor rekkevidde av Lightwriter.
	Bluetooth avslått.	Sjekk telefoninnstillingene for å være sikker på at Bluetooth er på.
Jeg kan se telefonen min, men klarer ikke å koble til Bluetooth.	Bluetooth-innstillingene på telefonen.	Finn Lightwriter ved hjelp av telefonens Bluetooth-meny. Sørg for at 'Vis notifikasjoner' og 'Synkroniser kontakter' er aktivert.
	Kobling ikke fullført.	Telefonen vil kanskje be deg om å bekrefte tillatelse til å få tilgang til telefonen og til å synkronisere med kontaktene dine – sørg for at du velger 'Tillat'.
Telefonsamtalen min ble brutt.	Flatt batteri – telefon eller Lightwriter.	Lad opp Lightwriter eller telefon – du kan fortsette samtalen under lading.
	Tap av signal.	Det kan være du mister signalet under telefonsamtalen – spesielt hvis du beveger deg rundt.














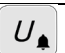
	Telefonen er utenfor rekkevidde.	Det kan være du har beveget deg utenfor rekkevidde under samtalen.
	Andre telefonproblemer .	Hvis du snakker lenge i telefonen, kan det være at mobilen din har en maksimal samtaleid. Hvis telefonen din har kontantkort, kan det være at du har brukt opp kortet i løpet av samtalen.
Jeg kan ikke høre den som ringer eller det er mye støy på linjen.	Bluetooth inngangsvolum er for lavt.	Øk inngangsvolumet for Bluetooth i Shift-Meny > Lyd > Mikser > Bluetooth Inn . Du kan også øke/senke Hovedvolumnivået på Lightwriter (Holde nede Lyd og Høyre piltast).
	Dårlig nettverksforbindelse.	Flytt deg til et område med sterkere signal eller forsøk igjen senere.
Den som ringer kan ikke høre meg.	Bluetooth-volumet er lavt.	Øk volumet i Shift-Meny > Lyd > Mikser > Bluetooth ut
	Blokkert mikrofon	Sørg for at det ikke er noe som dekker til mikrofonen (det lille, smarthullet over LED-lysene på hovedskjermen).

Problemer med USB-penner

Problem	Årsak	Løsning
USB-pennen passer ikke inn i porten.	USB-hylsteret er for stort.	Bruk USB-pennen som ble levert sammen med Lightwriter.
		Du kan kjøpe en overgang til USB-pennen din.
USB-pennen min fungerer ikke sammen med Lightwriter.	USB-pennen er full.	Slett noen av de gamle filene fra USB-pennen.
	USB-pennen er ødelagt.	Forsøk å reformatere som FAT32, eller bruk USB-pennen som ble levert sammen med Lightwriter.
	Ikke formatert korrekt.	MERK: Formatering vil slette alt på USB-pennen.
Jeg klarer ikke å laste brukerordboken min opp til Lightwriter.	Fil ble ikke lagret i korrekt format.	Brukerordboken din må lagres som ren tekstfil med filnavnendelsen .userdict

Mitt importerte Notat ser tomt ut.	Teksten har ikke blitt lagret i det korrekte formatet.	Notatet ditt må lagres som ren tekst og ikke inneholde spesialkarakterer (som paragraf markeringer).
Når jeg prøver å importere, så viser ikke min Lightwriter filen på min USB-minnepenn.	Filen er lagret i en mappe.	Sjekk at filen er lagret direkte på roten av din USB-minnepenn og ikke inne i en mappestruktur.
	Filen er ikke lagret i korrekt format.	Filen må lagres som en ren tekstfil med filnavnendelsen endret manuelt. For å finne den riktige filnavnendelsen, se Import og Eksport av Data .

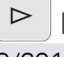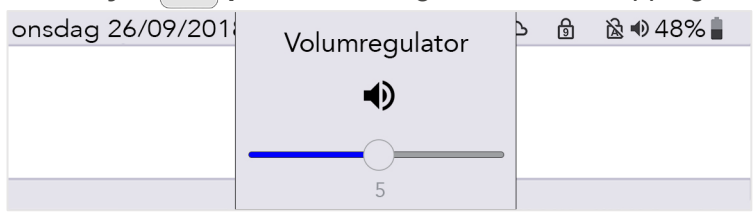Snarveier

AV	Hold ned Av-og-på-knappen  i 3 sekunder (til du hører et pip)
PÅ	Trykk på Av-og-på-knappen 
HVILEMODUS	Hold Av-og-på-knappen  nede i 1,5 sekund. Trykk på hvilken som helst tast for å vekke den opp igjen.
VELG MENYELEMENT	Trykk Enter 
FORLAT MENYSKJERMEN	Trykk på Av-og-på-knappen 
SLETT TEKST	Når du skriver tekst, vil Av-og-på-knappen  tømme hele tekstlinjen.
VOLUM	Trykk og hold nede Lyd-tasten  kombinert med Venstre  eller Høyre  piltast for å regulere volumet opp og ned. 
MUTE	Trykk på Lyd-tasten  hvis du trenger å dempe (mute) Lightwriter, selv når den holder på å snakke. Trykk på Lyd  igjen for å slå av mute.
TVUNGEN OMSTART	Hvis du har behov for en tvungen omstart, hold Av-og-på-knappen  nede i 10 sekunder – til displayet slår seg av og så blinker og slår seg på igjen.
ALARM*	Hold inne Union  til alarmen utløses.

*Må aktiveres i Innstillinger.

Teknisk informasjon

Spesifikasjoner

Fysiske mål (H x B x D)	240mm x 140mm x 55mm
Vekt	740g
Batteri	Li-ion oppladbart, 3,63V, 7000mAh, 25,4Wh
Omgivelsestemperaturområde	0°C til 30°C
Anslått levetid	5 år

MERK: Vær oppmerksom på at batteriet må lades opp til full kapasitet før langtids lagring.

Viktig informasjon

Les og forstå innholdet i denne håndboken før du bruker produktet.

Sikkerhetsdefinisjoner

⚠ ADVARSEL: Risiko for personskade eller dødsfall hvis instruksjonene ikke følges.

⚠ FORSIKTIGHET: Risiko for skade på produktet hvis instruksjonene ikke følges.

MERK: Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

TIPS: Ytterligere informasjon som kan forbedre bruken av produktet.

Alvorlige hendelser

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til produsenten og myndighetene i ditt land. En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller indirekte kan ha ført til, eller kan føre til dødsfall til en pasient, bruker eller annen person, midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av pasientens, brukerens eller andres helsetilstand eller en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Samsvar med kravene til medisinskteknisk utstyr

Lightwriter SL50 markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med funksjonshemninger, og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinskteknisk utstyr.

Produktansvar

Produktet er utviklet og risikovurdert i samsvar med ISO 14971. Bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene er utformet i samsvar med sikkerhetsvurderingen i risikoanalysen. Vær alltid sikker på når du bruker produktet. Abilia AB tar ikke ansvar for konsekvenser etter feil bruk eller installasjon av produktet. Enhver form for manipulering av produktet ugyldiggjør garantien og fraskriver seg produsentens ansvar. Anslått levetid for produktet gjelder når det brukes i samsvar med den tiltenkte bruks- og vedlikeholdsinstruksjonen.

Kontaktinformasjon

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannia

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannia
Telefon +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

Internasjonal

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

april 2022

1740200_Brukerveiledning_Lightwriter SL50_NO

