

Turn MASTER[®]

Brukerveiledning Dreieputer
ISO 12 30 06 01

Art-nr. MC 001-9040
Hmi-nr. 39010
Turn MASTER-Small
Dreieskive
Størrelse: Diam 40 cm



Art-nr. MC 001-9050
Hmi-nr. 39011
Turn MASTER-Medium
Dreieskive
Størrelse: Diam 45 cm



Art-nr. MC 001-9060
Hmi-nr. 39012
Turn MASTER-Large
Dreieskive
Størrelse: Diam 50 cm



Art-nr. MC 001-9070
Hmi-nr. 45925
Turn MASTER-X, large
Dreieskive
Størrelse: Diam 60 cm



Art-nr. MC 001-9080
Hmi-nr. 45926
Turn MASTER-XX, large
Dreieskive
Størrelse: Diam 70 cm



Når mobiliteten forringes ...

Plassere

Dreie sittende

Ta bort

Sikkerhet

Dreie stående



The Original Scandinavian Human Handling System

... forbedrer vi livskvaliteten



Produsent:
Master CARE
Højvænget 1
DK-8330 Århus/Beder
Danmark

Norge:
Arcus Vita AS
Pb 213
5591 Etne
Tlf. 53 75 77 50
post@arcus-vita.no
www.arcus-vita.no


*Arcus
Vita as*

Turn MASTER


The Original Scandinavian Human Handling System



Master-CARE.dk®

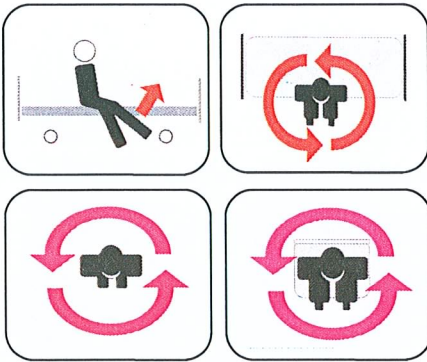

SIKKERHET

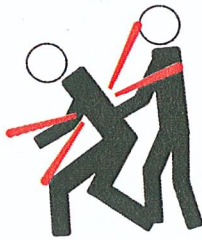

- Master BELT Gå- og støttebelte skal alltid benyttes for å veilede og støtte brukeren når Turn MASTER brukes som dreieskive på gulvet. Dette for å unngå fallulykker med alvorlige personskader til følge.



- Forlat aldri brukeren sittende på Turn MASTER for langt ute på stolkant eller sengekant. Dette for å unngå ulykker med alvorlige personskader til følge.

Viktig

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjelpemiddelet er intakt ved jevnlig kontroll av sømmer og håndtak.
- Hvis dette hjelpemiddel har en kritisk slitasje eller har andre skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvil om bruken av dette hjelpemiddel, skal du omgående kontakte leverandør.

Ansvar

- Brukes dette hjelpemiddel feil eller u hensiktsmessig, påtar Master CARE seg ikke ansvaret for ulykker som medfører alvorlige personskader.

Turn MASTER er en regulerbar dreiepute der 2 glatte flater glir mot hverandre. Turn MASTER er behagelig polstret og leveres med elastisk nett med cellestruktur. Dette fører til at den øverste delen av Turn MASTER er luftventilerende og blir dermed ikke for varm å sitte på. Turn MASTER legges på sengekanten / sitteunderlaget når brukeren skal avlastes for å dreie inn i seng eller inn på sitteunderlag. Turn MASTER kan også brukes på gulvet, når brukeren i stående posisjon skal dreies fra f.eks. rullestol og over på sengekanten. Turn MASTER leveres med HLF (Hyper Low Friction) varemerke med garanti for unike glideegenskaper med lang holdbarhet. Turn MASTER leveres i størrelse: Small, Medium, Large, X,large og XX, Large.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER




Varemerke for et Master CARE produkt med unike glideegenskaper og lang holdbarhet

Nett med cellestruktur:	Vevet nett med cellstruktur 100 % polyester
Bånd:	100 % Polyesterbånd
Velchrolås:	100 % polyester
Glidemateriale:	HLF (Hyper Low Friction) Spesialfremstilt PU belagt nylon
Anti Skli underside:	PU belagt polyester. DIN EN ISO 12952 1-4. BS 7175 Class 5.
Avstivet innvendig plate:	Miljøvennlig fleksibelt 1 mm polyetylen plastplate
Max. brukervekt :	200 kg



VASKEANVISNING

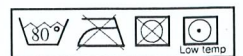

Alle Master CARE produkter i denne brukerveiledning kan vaskes ved 80 grader C.



Skyllemiddel

Det må ikke brukes skyllemiddel. Dette forringer glidekvaliteten på Master CARE produktet.


Turn MASTER

The Original Scandinavian Human Handling System



Master-CARE.dk®


A. Innstilling av Turn MASTER

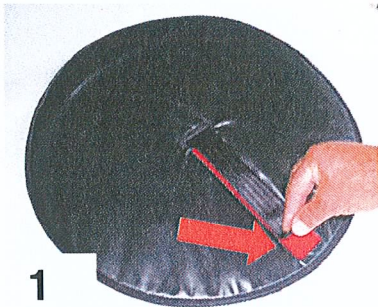

1



2

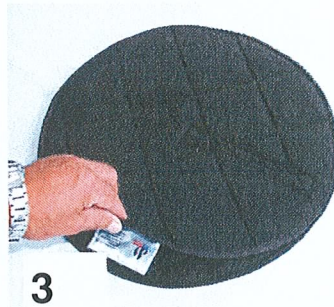


3

Ønsker man at Turn MASTER kun skal dreie, skal båndet med velchrolåsen være strammet helt opp og låst ytterst mot den myke velchrolås på den nederste glidedel. Denne innstilling SKAL alltid brukes når Turn MASTER anvendes på gulvet.

Skal Turn MASTER kunne dreie og samtidig anvendes til sideveis forflytning, skal båndets harde velchro være festet innerst på den myke velchrolås på den nederste glidedel.

Turn MASTER plasseres alltid slik at den siden med sklisikkert belegg vender ned mot underlaget. Glidedelen med sort vatteret nett med cellestruktur vender opp mot brukers sitteflate.

B. Dreie inn i seng

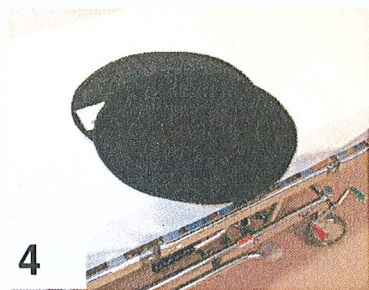

4



5



6



7

Still inn Turn MASTER som illustrert i Punkt. 2. Plasser den nederste glidedel midt i sengen. Den øverste glidedel plasseres ut mot sengekant.

Brukeren setter seg på den øverste glidedel og glir bakover ved hjelp av Turn MASTER inn mot midten av sengen.

Brukeren dreier bena inn og roterer inn i sengen ved hjelp av Turn MASTER.

Brukeren legger seg ned og ruller over på siden. Turn MASTER trekkes ut.

C. Dreie ut av seng og reise seg fra sittende til stående



8



9



10



11

Brukeren ruller over på siden. Turn MASTER plasseres inn under brukers seteparti.

Brukeren ruller tilbake på Turn MASTER. Sengen heises fra liggende til sittende.

Brukeren svinger bena ut mot kanten. Her kan MC 003-3021 Mini MASTER med fordel brukes av hjelperen. Brukeren dreier nå ved hjelp av Turn MASTER.


En MC 003-3021 Mini MASTER eller et MC 003-1125 Master BELT må gjerne brukes for å hjelpe brukeren opp i stående, hvis dette kan være en fordel for både bruker og hjelper.

E. Dreie sittende til og fra bordkant



12

Still inn Turn MASTER slik, at den kun dreier. Se veiledning Punkt. A 1.

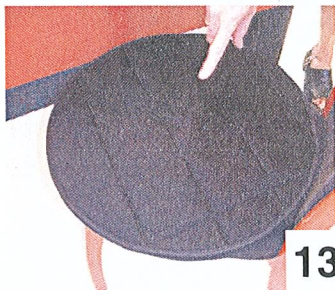

13

Plasser Turn MASTER på stolen. Still deretter stolen diagonalt inn mot bordflaten.



14


Brukeren setter seg på Turn MASTER



15

Brukeren dreier seg på plass i stolen.

F. Dreie stående

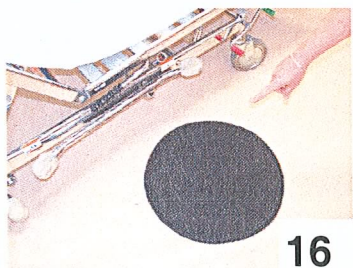

16

Turn MASTER plasseres på gulvet.



17

Brukeren plasserer føttene på Turn MASTER



18

Hvis brukeren er ustabil anser vi det som en øket sikkerhet, at hjelperen bruker et MC 003-1125 Master BELT for å holde og dreie brukeren med.



19

Hjelperen griper i håndtak på Master BELT og støtter brukeren med ett ben. Plasserer samtidig foten på Turn MASTER. Trykker mot Turn MASTER med denne, for å dreie brukeren f.eks. fra sengekant til stol.

Norge:
Arcus Vita AS
Pb 213
5591 Etne

Arcus
Vita as

Tel. +47 53 75 77 50
Fax. +47 53 75 77 50
E-mail: post@arcus-vita.no
Web: www.arcus-vita.no

Master CARE
Højvænget 1
DK-8330 Århus / Beder
Danmark



Master-CARE.dk ®

Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk