

Rejen

Dækskinne

BRUGERVEJLEDNING



Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 001-5005	30752	Rejen Dækskinne	Small	25 mm	L	140 g
	MC 001-5010	30753	Rejen Dækskinne	Medium	31 mm	L	140 g
	MC 001-5015	30754	Rejen Dækskinne	Large	33 mm	L	140 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Rejen


Dækskinne



A. Anvendelse af Rejen



1A) Brugeren sidder i kørestol og skal selvstændigt flytte sig fra stol til f.eks. seng.

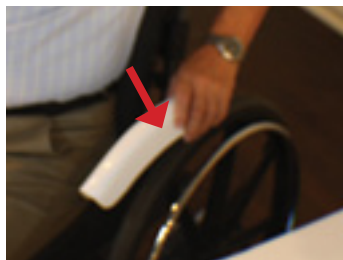

2A) Rejen placeres på kørestol hjul.



3A) Brugeren kan nu forflytte sig ugeneret af hjulets gummibelægning og ind i sengen.

Rengøring

Rejen tåler rengøring med desinficeringsmidler f.eks. hospitalssprit eller opløsning med kloring

VIGTIGT

- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Rejen er en formstøbt kappe i hård plast. Formen gør, at den dækker kørestolens hjul.

Anvendelse

Rejen placeres på kørestolens hjul og forhindrer derved brugeren i at hænge fast på hjulets gummibelægning ved forflytninger mellem kørestol og andet leje.

Rejen anvendes til forflytninger fra kørestol til seng, kørestol til toilet og kørestol til bilsæde mm.

Fordele

- Beskytter bruger mod kørestolens hjul i forbindelse med forflytninger
- Nem at placere
- lav vægt
- Nem at rengøre