



NO

BA No.: 02.07.085/2016-12



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telephone: +49(0)5431/9416-0
Telefax: +49(0)5431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
E-mail: info@rebotec.de



Brukermanual

Augsburg dusj/toalett stol til barn

Dusj/toalettstol
"Augsburg"
Maks brukervekt 80 kg

RT-1001 med 3" hjul
RT-1002 med 4" hjul
RT-1003 med 5" hjul

Serie Nummer

Dusj/toalettstol med 24"
hjul med drivringer
"Augsburg"
Maks brukervekt 80 kg


RT-1004 med 24" hjul

Serie Nummer



Viktige råd!

- Les denne brukerveiledningen før første bruk av stolen, og ha den tilgjengelig.
- Hold denne brukerhåndboken tilgjengelig for fremtidig bruk og eventuelt videresalg.
- Brukermanualen kan lastes ned på vår hjemmeside.

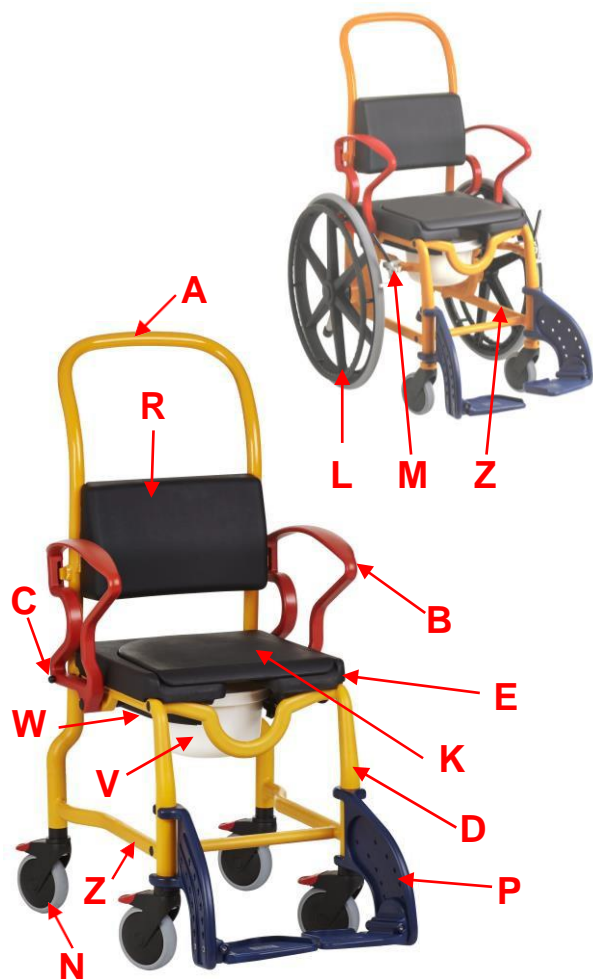**Produktbeskrivelse****Chair picture shows:**

A	Ryggbøyle
B	Armlener oppfellbare
C	Lås armlener
D	Stol ramme
E	PUR-sete med hygieneåpning
K	PUR-setepute (avtagbar)
L	24" Drivhjul til brukerdrevet fredmdrift
N	Hjul komplett med bremse
M	Lås for 24" drivhjul
P	Fotstøtter med fotplater (justerbar)
R	PUR ryggpute
V	Bekken med lokk
W	Bekkenholdere (venstre / høyre)
Z	Navneskilt for produkt

Emballasje

Vi anbefaler, om mulig, å beholde emballasjen til transport. Dette vil sikre trygg pakking i tilfelle returtransport.

**Innholdsfortegnelse**

1.	Generelt	3
1.1	Introduksjon	3
1.2	Symboler	3
1.3	Tiltenkt bruk	3
1.4	Bruk og lagring	4
1.5	Egenskaper	4
2.	Garanti	4
3.	Merkeskilt bestilling reservedeler	4
4.	Gjenbruk, levetid	4
5.	Deponering	4
6.	Sikkerhetsadvarsel for bruk	5
7.	Produktspesifikasjoner	5
7.1	Leveringsomfang	5
7.2	Tekniske spesifikasjoner	5
8.	Reservedeler	6
9.	Sette opp stolen til bruk	6
9.1	Montere Augsburg 24" stol	6
9.2	Montere Augsburg 3" 4" 5" stol	7
10.	Bruk stolen	7
10.1	Sitte ned	7
10.2	Reise seg opp	8
10.3	Låse armlene utover	8
10.4	Juster fotstøttene	8
10.5	Juster fotstøttens høyde	8
10.6	Folding av fotstøttene	8
10.7	Fjern fotstøttene	8
10.8	Fjerne setet	8
10.9	Justering av ryggpute	8
10.10	Bruk av bekken	8
10.11	Hjullås 3" / 4" / 5"	8
10.12	Bruk av bremser 24"	9
10.13	Innstilling av bremser 24"	9
10.14	Installere høydeadapteren til fotbrett	9
10.15	Tippesikring 24"	9
11.	Feilsøking	10
12.	Rengjøring	10
13.	Vedlikehold, Reparasjon	10
14.	Konverteringssett / bekkenholder	11
15.	Tilbehør	11

1. Generelt**1.1 Innledning**

I denne håndboken finner du informasjon om sikker og forsvarlig installasjon, bruk, drift, renhold og vedlikehold av stolene. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene og følg deretter.

1.2 Symboler

Les brukerhåndboken!



Produktet er godkjent av Medical Products Directive 93/42/EEC

**Forsiktighetsregler!****Informasjon!****Fare - Følg sikkerhetsinstruksjonene!**

Rengjøring



Vedlikehold

1.3 Tiltenkt bruk

Toalett/dusjstolen er til innendørs bruk. Stolen skal kun brukes til assistanse under dusjing, bading, toalettbesøk eller forflytting innendørs.

Dusj/toalettstolen er ikke designet for å sitte på i lange perioder.

Personer med begrenset oppfattelse, skader på begge armene og manglende evne til å sitte, må ikke bruke stolen med drivhjul.

1.4 Bruk og lagring

**Pass på! Fare for skade**

Driftstemperaturen til produktet skal være mellom +5 grader og +40 grader (Celsius). Oppbevar produktet på et tørt sted ved en temperatur mellom 0 og +40 grader (Celsius) og luftfuktighet på 30-55%. Utenfor disse forholdene kan produktet bare brukes kort tid. Ikke oppbevar stolen i nærheten av varmekilder. Unngå direkte sollys på stolen.

Stolen er ikke egnet for bruk i våte områder (f.eks. for badstuer, områder med svømmebassenglignende forhold), da overflatefarging og slitasje på bevegelige deler kan oppstå.

1.5 Egenskaper

Stolene er laget av en korrosjonsbestandig ramme i rør og fire gummi hjul med låsebremser på bakhjulene. Den brukerdrevne stolen har to svinghjul foran og to drivhjul på siden med låsebremser. Begge forhjulene er høydejusterbare. Armlenene kan svinges delvis utover. Fotstøttene er høydejusterbare og kan fjernes og brettes bort. Seteområdet inneholder et toalett som åpning der en kommodepanne kan skyves inn. Stolene kan ruller over et vanlig badetoalett.

(Kjørehøyde H / B se: 7.2 / G.)

Setebredde og dybdejustering samt hodestøtteenhet er tilbehør som kan monteres med tilbakemelding.

1. Garanti


Produktet har en garanti på 2 år. Garantien er betinget bruk i samsvar med kravene beskrevet i dette dokumentet, samt regelmessig vedlikehold. Ved uautoriserte endringer i produktet, uten tillatelse fra produsenten vil garantien ugyldiggjøres.



Leveringsdato skrevet på Mainmove Living AS -følgeseddel gjelder som gyldig startdato for garantiperioden.

3. Merkeskilt ved bestilling av reservedeler

På merkeskiltet finner du viktig informasjon

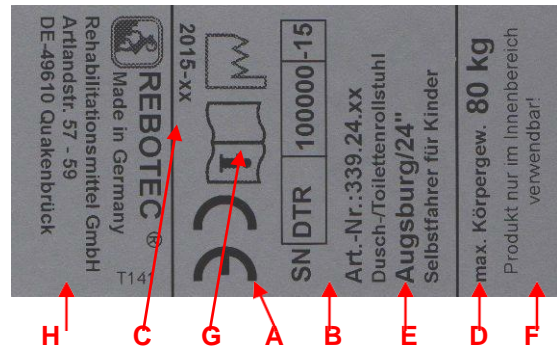

A	Merking av samsvar (CE)
B	Serienummer-produkt
C	Produksjonsår
D	Maks. brukervekt
E	Produktnavn
F	Merking (bruk)
G	Les brukerhåndboken
H	Produsentdetaljer

Merkeskiltet er svært viktig for produktidentifikasjon, og må derfor ikke fjernes.



For å unngå feil reservedeler og for å lette håndtering av kundeklager, er det nødvendig å oppgi produktnavn, serienummer (SN) og produktets produksjonsår.

4. Gjenbruk, levetid

Produktet er egnet for gjenbruk. Varigheten på egnethet for gjenbruk avhenger av hyppigheten av bruk og bruken av produktet. Før gjenbruk må produktet være hygienisk rengjort, og om nødvendig må slitte deler byttes ut for å påse at produktet er forsvarlig å gjenbruke.

Hvis produktet brukes som beregnet, i henhold til brukermanualen, er levetiden på produktet 5 år. Den effektive levetiden avhenger av frekvensen og intensiteten av bruken.

5. Deponering

Produkter som ikke lenger kan brukes, må avhendes på en forsvarlig måte separat fra vanlig husholdningsavfall. Dette må gjøres i henhold til lokale og nasjonale forskrifter for miljøvern og gjenvinning av råmaterialer. Ta kontakt med ditt lokale avfallsdeponi, NAV Hjelpemiddelsentral eller oss for ytterligere informasjon.



6. Sikkerhets advarsel for bruk



Ved bruk av dusj/toalettstolen må følgende sikkerhetsanvisninger følges.

Fare for å skli!

- Før bruk av stolen må det kontrolleres at setet er trygt festet i seterammen.
- Før bruk av stolen, må alltid hjulbremsene på bakhjulene eller låsebremsene på hjulene låses for å unngå at stolen ruller.
- Når bruker setter deg ned i stolen, må brukeren ikke sitte på framsiden av setet eller seteputen. Pass på at brukeren sitter helt tilbake i setet.

Fare for å tippel!

- Armlenene må være låst i festet når bruker sitter stille og når bruker triller eller blir trillet.
- Stolen kan bare skyves ved bruk av ryggbøylen.
- Fotstøttene må svinges bort eller brettes opp når brukeren setter seg ned eller står opp. Brukeren må aldri forsøke å stå på fotstøttene.
- Stolen må ikke støte på dørkarmer, terskler eller overflateutspring.
- Bruk stolen bare innendørs og på faste, jevne, glatte overflater.
- Stolen kan bare skyves med ganghastighet eller mindre (med eller uten pasient).
- Ikke len deg ut av stolen (når stolen er stille eller i bevegelse). Hvis svinghjulene svinges innover, blir stolens stabilitet redusert.
- Når du stiller stolens høyde, må du alltid følge de gjeldende instruksjonene.

Fare for ødeleggelse!

- **Stolen er kun egnet for transport av personer. Pass på å ikke overskride maks tillatt kroppsvekt. (Spesifisert på produktmerking)**
- **Forsøk aldri å bære eller løfte stolen mens en person sitter på den.**
- Aldri hold eller dra i festede objekter, som armlener

Fare for klemming!

- For å hindre at kroppsdel eller gjenstander blir klemt, må du aldri komme inn i hengselområdet når du setter armlene opp eller ned. Pass på å kontrollere at hengselområdene er uhindret før du beveger armlene!
- For å hindre at kroppsdelene klemmes, må du ikke ha noe mellom setet og rammen når du trykker på setet i seterammen.
- Pass på at andre deler ikke klemmes ved folding og utfolding av fotstøttene.

Fare for å falle!

- Ved forflytning inn og ut av stolen, og når man triller, bør brukeren være under oppsyn av en kvalifisert omsorgsperson.
- Bruk av stolen av pasienter som ikke har full fysisk kontroll og normal bevegelse, må ikke gjøres uten tilsyn.
- Rulling av stolen på en skrånende overflate kan bare gjøres med hjelp fra en omsorgsperson.

Advarsel! Fare for skade!

- Ved overflatetemperaturer over 40 ° C er det fare for skade. Utsett derfor ikke stolen for noen varmekilde (eksponering for solen, lagring i nærheten av en varmeapparat, rengjøring med varmt vann) like før stolen blir brukt. Før du bruker stolen, la den avkjøles.
- Før du bruker stolen til pasienter med ufølsom hud (personer som ikke føler økt temperatur og /eller med skader på huden), må omsorgspersonen foreta en termisk kontroll (med håndens bakside). Følg bruksanvisningen (se 1.4).

7. Produkt spesifikasjoner

7.1 Levering

Produktet er nøye inspisert på fabrikken for feil og for mangler. Etter at du har mottatt det, må du kontrollere produktet for eventuelle transportskader og for mangler.

- 1 Dusj/toalettstol
- 1 ryggstøtte
- 1 Pute med lokk
- 1 tilbehørspose eller boks
- 1 Brukermanual

7.2. Tekniske spesifikasjoner

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske utviklinger og forbedringer med hensyn til utformingen som er vist i brukerhåndboken.

Produksjonstoleranse av dimensjoner: +/- 5 mm

Dimensjoner (Ca)	3" /3" Hjul	4" /4" Hjul
A. Høyde	1080 mm	1110 mm
B. Bredde	520 mm	520 mm
C. Dybde	870 mm	870 mm
D. Setehøyde	510 mm	540 mm
E. Seterbredde	400 mm	400 mm
F. Sete dybde	400 mm	400 mm
G. Klaring under	G/H=400 mm	G/H=430 mm
	G/B=330 mm	G/B=330 mm
J. Bakhøyde	230 og 310 mm	230 og 310 mm
H. Fothøyde ca.	85-225 mm	95-235 mm
H. Fothøyde * ca.	105-245 mm	115-255 mm
I. Hjul	75 mm	100 mm
Kroppsvekt	Max. 80 kg	Max. 80 kg
Produktvekt **	17.2 kg	17.4 kg



Dimensjoner (ca.)	5"/5" Hjul	5"/24" Hjul
A. Høyde	1130 mm	1145 mm
B. Bredder	530 mm	655 mm
C. Dybde	870 mm	970 mm
D. Setehøyde	560 mm	550 mm
E. Seterbredde	400 mm	400 mm
F. Sete dybde	400 mm	350 mm
G. Klaring under	H=450 mm B=330 mm	H=440 mm B=320 mm
J. Bak høyde	23 og 310 mm	230 og 310 mm
H. Fothøyde ca	110-250 mm	110-250 mm
H. Fothøyde ca *	130-270 mm	130-270
I Hjul	125 mm	125 / 605 mm
Sving radius	-----	1310 mm
Kroppsvekt	Max. 80 kg	Max. 80 kg
Produktvekt **	17.9 kg	24.9 kg

å kjøre over et toalett er bare mulig med forbehold.

* Minimum fothøyde med høydeadapter (se: 10.14)

** Figur: Produktvekt uten tilbehør

Diagram: Dusj/toalettstol 3-5" Augsburg


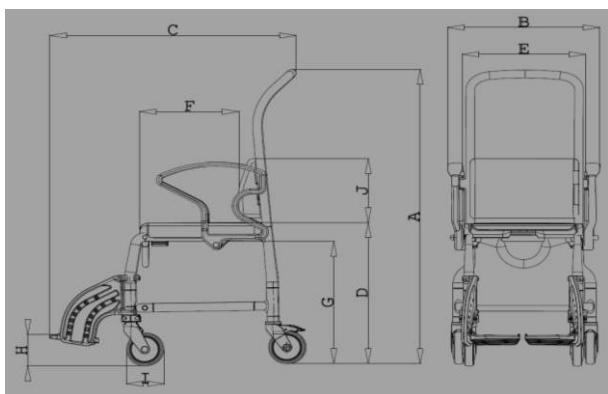


Diagram: Dusj/toalettstol 24" Augsburg

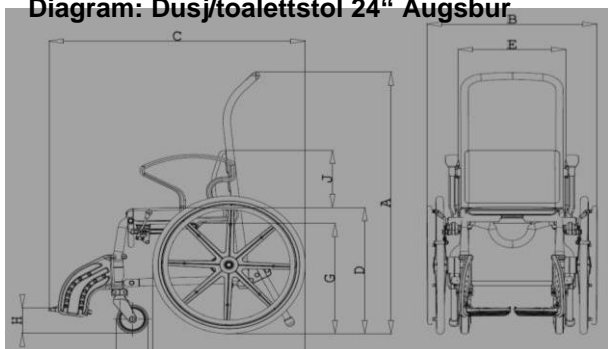

8. Reservedeler

Article no.	Name
330.44	Bekken bøtte med lokk
409.10.20	Bekkenholder (venstre / høyre)
409.10.25	Helt sett med bekkenbøtte og holdere
440.10.01	PUR setepute - svart
440.10.02	PUR ryggpute - svart
440.10.03	PUR-sete med åpning - svart
440.40.89	Låsebrems-høyre
440.40.90	Låsebrems venstre
02.07.085	Brukermanual
02.11.150	Vedlikeholdsinstruksjoner

9. Sette opp stolen til bruk


Produktet leveres delvis ferdigmontert.

Følgende monteringsanvisninger må utføres før bruk for første gang:

9.1 Montering Augsburg 24"


1. Installer ryggstøtten

Legg grunnrammen på en flat overflate og drei de to armene (1) bakover til den stopper. Legg nå ryggstøtten (2) på de to rørene på stolen, og skyv den helt til bunnen. Vri de to armlenene (3) tilbake til forsiden, til ryggstøttens flik (A) arbeider i sporet av armene, og boltens (B) armlås låses inn i

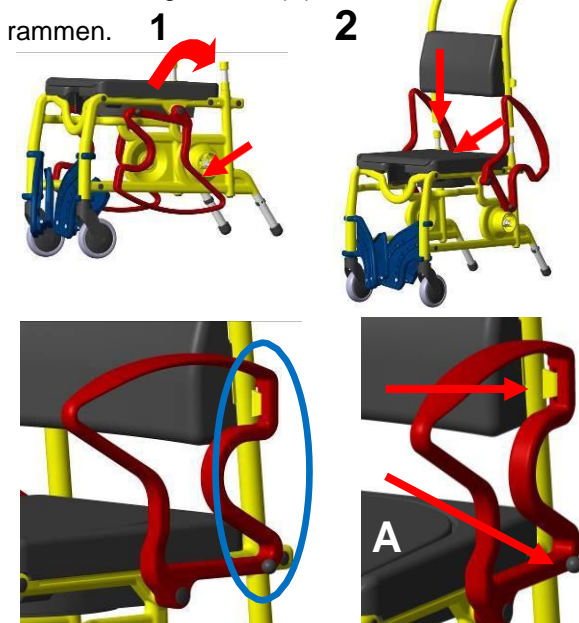

2. Montere 24" hjul

- Plasser skiven på skruen.
- Sett inn skruen (1) fra utsiden gjennom 24 "hjulet
- Plasser skive på skruen.
- Hold 24-tommers hjul inntil stolrammen og sett inn skruen gjennom begge deler.
- Sett på skive.
- Skru på sikkerhetsmutteren.
- Trekk mutteren til med to SW 19 ringnøkkel.
- Trekk til mutteren til hjulet fortsatt triller.
- Tilslutt sett på sorte hetter.

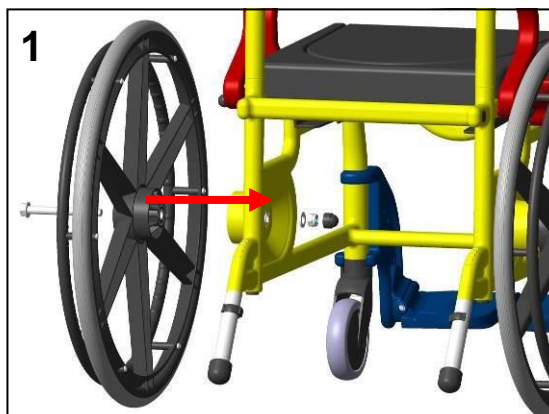




2. Montere låse bremser 24"

Løs de to skruene fra bremseholderen (1) og løsne den fra stolen. Flytt deretter bremseholderen til den stopper (2) og stram de to boltene. Skyv bremsespaken (3) inn i bremseholderens åpning. Vær oppmerksom på at den er rett.


Vær oppmerksom på venstre / høyre!

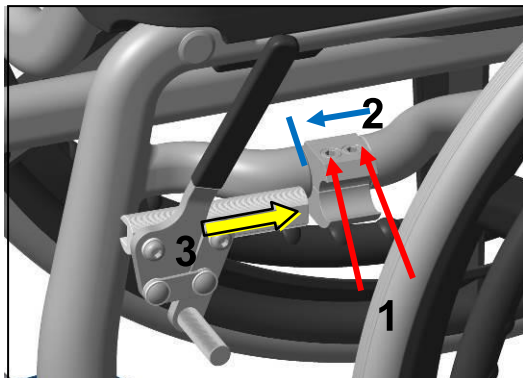


3. Justering av bremsen (se: 10.12)
4. Stille inn parkeringsbremsen (se: 10.13)
5. Juster fotstøttene (se: 10.4)
6. Juster fotstøtتهøyden (se: 10.5 og 10.14)

9.2 Montere Augsburg 3" 4" 5"

1. Dreie armlenene (A) bakover, sett ryggstøtten (B) inn i stangrørene i stolrammen og skyv den ned til den treffer streken på underrammen.

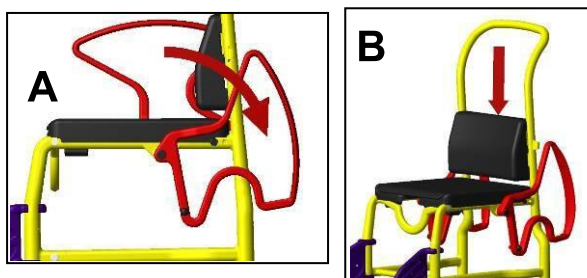


Deretter dreies armlenene fremover til de når ryggstøttens spalte og klikker inn i låsestiften på underrammen.

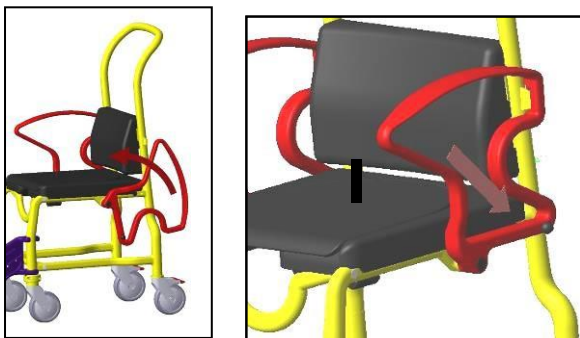

2. Bruk av hjullåser 3" 4" 5" (se 10.11)
3. Justere fotbrettet (se 10.4)
4. Montere høydeadapteren til fotbrett (se 10.5)


10. Bruk av stolen

Ved bruk av stolen må følgende punkter overholdes:

 Før bruk må det sikres at stolen er i god stand for sikker bruk. Avhengig av brukerens fysiske og styrkebegrensninger (brukerens evne til å bevege seg og muskelstyrke), sitte ned og stå opp må ikke gjøres uten hjelp fra en omsorgsperson. Stolen kan ikke brukes til lang transport av brukeren.

10.1 Sette seg

Før du setter deg ned i stolen, må du sørge for at den er sikret fra å skli bort eller tippe over, at armlenene er låst. Stolen er riktig montert og fotstøttene er vekk til siden eller foldet opp.

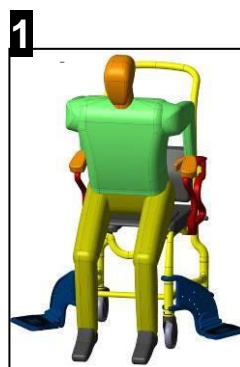

Brukeren må stå så tett som mulig nær stolen. Deretter må han sette seg sakte på setet mens han støtter seg på begge armlener.

Hvis dette ikke er mulig på grunn av hans fysiske begrensninger, må en omsorgsperson hjelpe ham. Om nødvendig må en pasientløfter muligens bli brukt.



Fare- Fare for å falle!

For å forhindre at brukeren faller ut av stolen, pass på at brukeren sitter helt inne i stolen, og ikke bare på kanten.

For å transportere brukeren, må du være sikker på at man lener seg tilbake mot sete rygg og sørg for at man bruker fotstøttene.

10.2 Reise seg

Før du reiser opp, vær sikker på at stolen er stabil og sikret mot å skli bort (se: 10.11 eller 10.12) og tippe over, at armlene er låst på plass, og fotstøttene er bort til siden eller foldet opp.

Pasienten må da bevege kroppen fremover til føttene er flate på gulvet.



3



Brukeren må ta tak i begge armlenene, og sakte løfte seg opp. Brukeren må ikke lene seg for langt fremover, for da kan man falle.


4



Fare- Fare for å falle!
Brukeren må ikke stå på fotbrettet når man sitter, reiser seg eller forlater stolen.

10.3 Sving armlene utover

Ved å trekke ut låsestiften løsnes låsemekanismen og armlene kan svinges tilbake. Når du svinger armlenene opp, må du kontrollere at armlenene er riktig plassert i låsestillingen på ryggstøtten og låst av låsestiften.

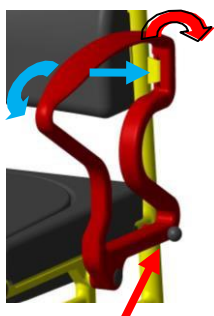

i *Kontroller låsemekanismen regelmessig for skader og feil som skyldes kalsiumavsetninger, noe som kan forringe bevegelsen.*


10.4 Juster fotstøttene

Vri fotstøttene fremover til de klikker på plass. Fell deretter fotstøttene nedover. Endre juster høyden på fotstøttene (se: 10.5).



10.5 Justere fotstøttens høyde

Fotstøttene er høydejusterbare på 7 trinn. For å gjøre dette, skru skruene på fotstøttene på siden med en SW 5 unbrakonøkkel. Velg riktig høyde og stram skruene på fotstøtten. Pass på at skruen sitter ordentlig.

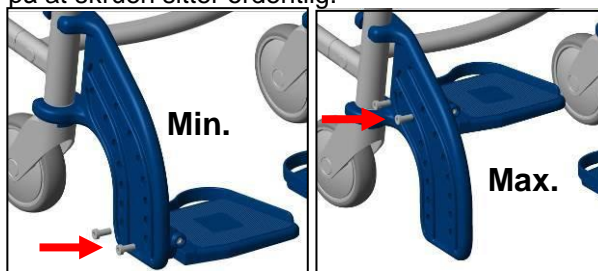

10.6 Folding av fotstøttene

Fold fotplaten oppover og løft fotstøttene. Fotstøttene kan nå svinges tilbake til siden.

10.7 Fjerne fotbrett

Løft fotstøttene ca. 100 mm og skru dem utover 90 °. Nå kan du løfte fotstøttene opp og fjerne dem.

10.8 Fjerne dusj/toalett sete

Setet kan fjernes fra beholderne med det formål å rengjøre eller bytte ut ved å ta det opp.

10.9 Justering av ryggpute

Ryggeputen er festet til ryggstøttens tverrsnitt. 2 monteringshøyder kan velges. Ved å løsne skruene kan ryggputen justeres 80 mm.



10.10 Håndtering av bekkenbøtten

Skyv kommodepannen under setet bak stolen. For å fjerne pannen, løft den litt opp og trekk den ut.


10.7 Bruke hjullåsene 3 "/ 4" / 5 "

For å låse hjulene, trykk låsespakene ned med foten. Frigjøring av hjulene er gjort ved å løfte opp låsehåndtakene med foten.




10.12 Bruk av bremses 24"

Ved å dra spaken, ved den sorte hendelen, bakover går bremsen av.

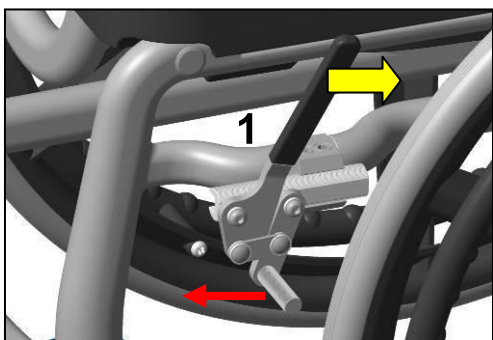


Ved å trykke spaken fremover, ved det sorte håndtaket, er hjulet låst. Trykk helt frem.

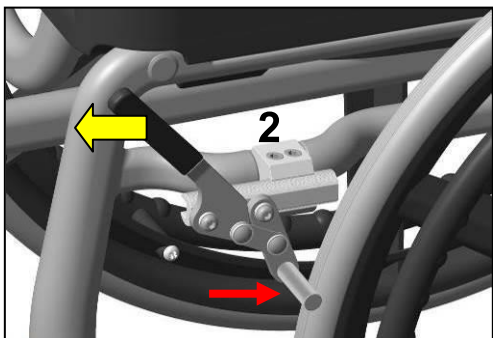

Hvis bremseeffekten ikke er tilstrekkelig, eller det reduseres over tid på grunn av slitasje, så er det nødvendig for å justere bremsene.

10.13 Innstilling av bremses

Trykk spaken (1) helt tilbake. Løse bremseskruene (2) på parkeringsbremsen med en skiftenøkkel (A / F 5 mm). Skyv parkeringsbremsen til ca. 25 mm foranhjulprofilen og stram skruene.

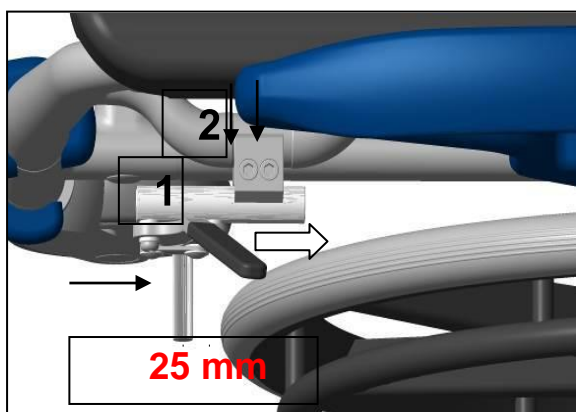

Kontroller bremsen ved å trykke spaken fremover. Hvis bremseeffekten ikke er tilstrekkelig, må du justere (redusere eller forstørre avstanden).




Den individuelle innstillingen og omjusteringen av parkeringsbremsen må utføres av kvalifisert forhandler. Dette gjelder også forandring, renovering eller reparasjon av bremses.

10.14 Installere høydeadapteren - fotstøtte


For å redusere avstanden mellom fotplaten og setet, kan ekstra høydeadaptere monteres mellom hjulet og svingarmen på fotstøtten.

Eksempel: Augsburg 24"

Når du monterer adapteren, må du sørge for at utskjæringen (1) er opp, slik at fotlåsemekanismen kan virke på riktig måte.

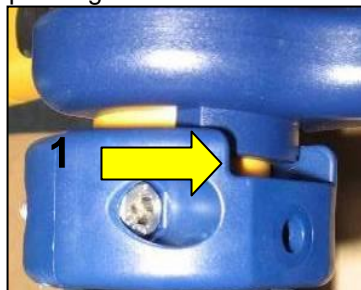

Høydeadapteren kan monteres under og litt over rammens tverrsnitt.


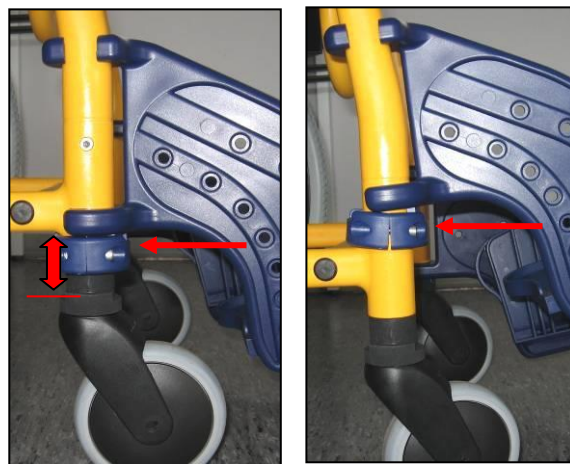


i Augsburg stoler med 3 "hjul, er høydeadaptere til fotstøttene allerede installert. For de andre modellene er begge høydeadapterene inkludert i posen med tilbehør og kan installeres etter behov.

10.15 Tippetisering

For å komme over hinder kan 24" tippes bakover da det er tippesikringer bak. Pass på å få hjelp av omsorgsperson. Ta begge hender på ryggstøtten. Vipp bakover til støtten er nesten i gulvet.


For å ta bort tippetisering drar du ut klipsen, og røret kann tas bort.

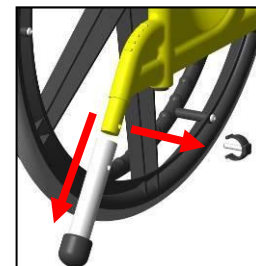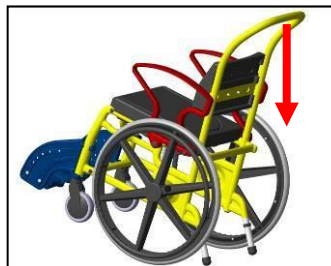



11. Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Korreksjon
Armlenene svinger ikke riktig	Låsestifter er fulle av kalk eller avfall.	Rengjør, kontroller med jevne mellomrom
Låsestifter kan ikke trekkes ut	Full av avfall, spenningsfjære sitter fast eller defekt	Rengjør, bytt låsepinn
Fotplaten kan ikke vendes	Avfall oppbygging i hengslet, eller sitter fast	Rengjør, kontroller skrueforbindelse n
Bremselåsen bremses ikke	Generelt defekt	Se avsnitt vedlikehold!
Hjulet svinger med vanskeligheter	Avfall oppbygging	Rengjør
Hjulet snur ikke	Generelt defekt	Se avsnittet vedlikehold!
Hjulet er ikke lenger rundt	Hjulet er ujevnt slitt	Se avsnittet vedlikehold!
Stolens ramme er ustabil	Skruene er løs	Trekk til rammeskrue og hjulet.
Småhjul er bøyd	Krasjet inn i hinder	Se avsnittet vedlikehold!

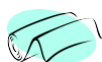

12. Rengjøring

Generelt kan stolen rengjøres ved hjelp av en mild rengjøring og desinfiseringsmiddel. Bare tørk stolen med rent vann og klut, og tørk deretter tørr med en ren klut.

Ikke bruk et slipemiddel eller rengjøringsmiddel (les produktinstruksjonene!) Som inneholder aggressive løsningsmidler (syrer, fortynningsmidler). Ikke bruk stive rengjøringsbørster, da disse vil skade plastflatene eller forårsake avsetninger å bygge seg opp på plastdelene og andre materialer.



Vennligst rengjør produktet og rengjør det med jevne mellomrom. I de følsomme områdene er hygiene veldig viktig.

13. Vedlikehold, Reparasjon

Årsaken til ulykker eller skader kan skyldes sen påvisning av slitasje og/eller feil bruk, samt uregelmessig eller ingen vedlikehold.



Av sikkerhetshensyn og for å hindre ulykker må stolen gjennomgå en full service minst en gang i året. (Se medisinske loven).



Vedlikehold

Periodiske sikkerhetsrelaterte kontroller er nødvendig:

- Kontroller for tilsynelatende skade: (Sprekker, brudd, løse deler)
- Alle skruede tilkoblinger for tetthet (Spesielt hjulhjulene og rammen).
- Funksjon av armlene og låsestifter.
- Fotstøttens funksjon (Bytt ut defekte fotstøtter).
- Rullende evne, sjekk funksjon av hjulene (Bytt defekte hjul).
- Kontroller tilbehør for feil



Reparere

- Hvis du har spørsmål angående vedlikehold og reparasjon til stolen, må du kontakte en autorisert forhandler eller et medisinsk utstyrsforsyningsuttak.
- Ved reparasjoner, bruk bare originale reservedeler fra REBOTEC. Følg alle råd vedrørende garanti.
- Gjør aldri uautoriserte modifikasjoner eller konverteringer til stolen. Disse vil bare ha en negativ innvirkning på stolens sikkerhet og funksjon. I slike tilfeller påtar REBOTEC intet ansvar!
- Følg alle instruksjonene når du bestiller reservedeler, gjenbruk og produktets levetid på stolen.
- Etter at et fullstendig vedlikehold eller reparasjon av stolen er gjort, anbefaler vi en komplett rengjøring for å sikre hygiene. Følg rengjøringsinstruksjonene.




For dokumentert vedlikehold, leverer Mainmove Living AS en vedlikeholdsrapport - Stoler.

Her finner du informasjon om vedlikehold og skjemaer for dokumentasjon. Du kan bestille brukerhåndboken og vedlikeholdsrapporten eller se via vår hjemmeside på www.mmliving.no Det er mulig å skrive ut informasjonen og lese den etter behov.

14. Konverseringsset/bøtte holder

Demonter gammel versjon av bøttheolderen Skru begge bøttebraketter (A) under setet. Deretter skru boltene (B) løs fra begge armene ..

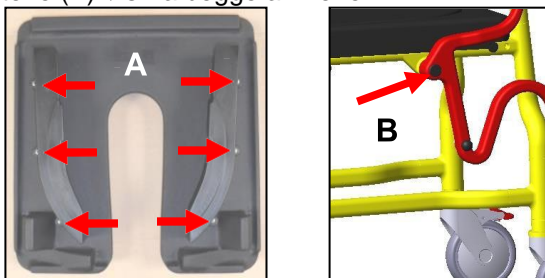

Monter den nye bøttheolderen. Monter bøttebrakettene (venstre / høyre) på innsiden av stolrammen med armene. Bruk skruene M12x60, M12-sekskantmutrene og de svarte dekselplugger for bolting.

Monteringspakke-bøttheolder (409.10.25)



15. Tilbehør

Varenummer: RT-1005

Setebredde / dybdejustering (A)
Inkludert sikkerhetsbelte (B) og monteringsinstruksjon
Vekt: 2,2 kg

Varenummer: RT-1006

Hodestøttenhet (C) og monteringsanvisning
Vekt: 1,7 kg





Notater:

Leverandør i Norge:
Mainmove Living AS
Raveien 425d
3239 Sandefjord

Web: <http://www.mmliving.no>
E-post: post@mmliving.no
Telefon: 951 08 102

