

Barnevakt

BARN10-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	4
Utvendig	4
Under lokket	4
Batteriet	4
<u>3. Komme i gang</u>	5
Sette inn batteriet	5
Sammenkoble enheter	5
Sammenkoble første gang	5
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	6
Sammenkobling mislykkes	6
Avbryte sammenkobling	6
Montering	6
Tilkobling av sensor	7
<u>4. I daglig bruk</u>	7
Lysdiodene	7
På/Av-bryter	7
Hvor høyt gråter barnet?	7
Hvor mye gråt må til?	7
Flere barn?	8
<u>5. Viktig informasjon</u>	8
Bruksbegrensninger:	8
<u>6. Resirkulering</u>	9
<u>7. Sikkerhet</u>	9
<u>8. Tekniske data</u>	9
<u>9. Samsvarserklæring</u>	9
<u>10. Feilsøking</u>	10

1. Innledning

Barnevakt BARN10-L er en praktisk batteridrevet sensor som oppfatter når et barn gråter og viderevarsler til FlexiBlink LIFE mottakere i hjemmet.

Det er innstillinger for lydnivå og tidsforsinkelser, slik at du kan tilpasse den til ditt barn.

BARN10-L har inngang for tilkobling av trykknapp, matsebryter eller bevegelsessensor. (Dette er tilbehør og må bestilles separat.)

Trykknapp benyttes for at eldre barn selv skal kunne tilkalle foreldre (uten å gråte), og matsebryter eller bevegelsessensor benyttes for å detektere at barnet har stått opp.

BARN10-L benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.




Advarsel!

BARN10-L inneholder små deler som kan skade barn hvis de får leke med produktet.

Sørg ALLTID for at BARN10-L holdes utenfor rekkevidde for barnet. Skru eventuelt fast lokket med medfølgende skrue slik at batteriet ikke kan lekes med.

2. Oversikt

Utvendig

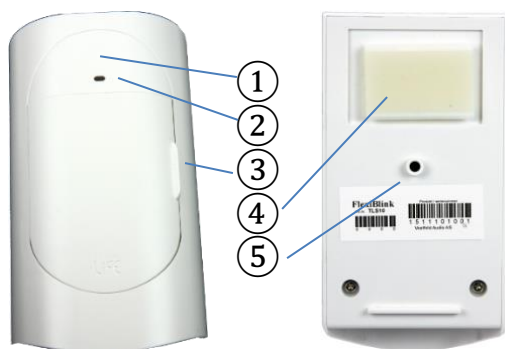

Figur 1 Framside


Figur 2 Bakside



Figur 3 Bunn med inngang

- ① Innebygd mikrofon
- ② Lysindikator
- ③ Løkk
- ④ Borrelås-tape
- ⑤ Hull for skruefeste
- ⑥ På/Av-bryter
- ⑦ Signalinngang for tilkobling av trykknapp, mattebryter eller annen FlexiBlink sensor.

Under lokket

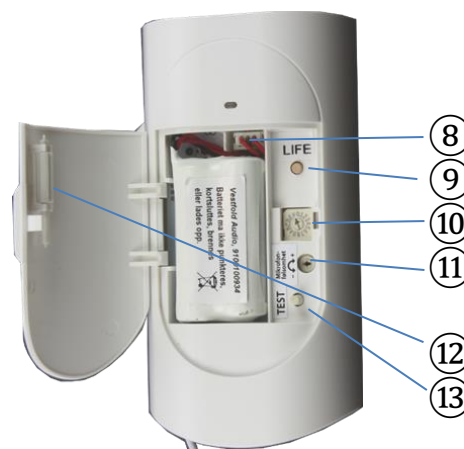

Figur 4 Under lokket

- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ LIFE-knapp
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Følsomhetsjustering
- ⑫ Verktøy for innstillinger
- ⑬ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



Advarsel

Dersom man får svelget et Litium-batteri, eller deler av det, må man oppsøke lege umiddelbart.

3. Komme i gang

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre.

Ved tilkobling av batteri kan BARN10-L blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket foran på BARN10-L. Se figur 4 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

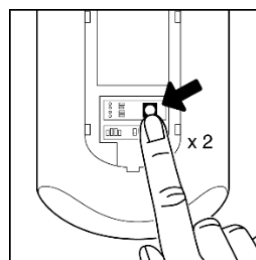

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

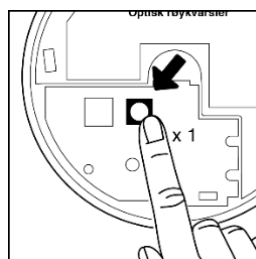

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

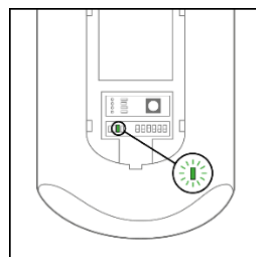

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

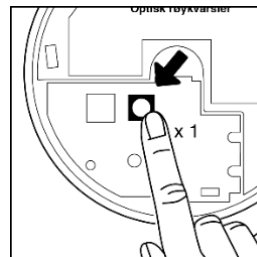

Montering

Barnevakten plasseres så nært barnet som praktisk mulig, helst med mikrofonen rettet mot barnet. Mikrofonen er innebygd og ligger like over lysindikatoren. Sørg for at barnet ikke får lekt med BARN10-L.

Senderen kan monteres med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen og trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til veggen gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Tilkobling av sensor

Signalinngangen kan kobles til en trykknapp slik at barnet selv kan tilkalle foreldre (uten å gråte). Alternativt kan det kobles til en bevegelsessensor eller en mattebryter for varsling når barnet forlater senga eller rommet sitt. Ved bruk av inngangen varsler mottakeren «Barnet har stått opp».

4. I daglig bruk

Lysdiodene

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

Slukket Stand-by
Grønt Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt Bytt batteri



Viktig

Når systemet er koblet opp, må man ALLTID teste at barnevakten varsler som tiltenkt når barnet gråter.

På/Av-bryter

På bunnplaten er det en bryter. Med denne kan barnevakten enkelt slås på og av.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.

Hvor høyt gråter barnet?

Følsomheten på mikrofonen bør justeres til å passe til ditt barns gråt. Juster følsomheten (11) slik at BARN10-L reagerer på det nivået som passer dere. Følsomheten økes ved å skru med klokka. Bruk verktøyet i lokket.



Viktig

BARN10 skiller ikke mellom barnegråt og andre høye lyder

Hvor mye gråt må til?

BARN10-L har innstillinger for å tillate "små-lyder" uten å gi alarm. Det betyr at det må oppfattes gråt lenger enn angitt tidsforsinkelse. Tidsforsinkelse velges med Funksjonsvelgeren.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsler om	Tidsforsinkelse
0	Barnet gråter	0,5 s
1	Barn 1 gråter	0,5 s
2	Barn 2 gråter	0,5 s
3	Barn 3 gråter	0,5 s
4	Barnet gråter	1 s
5	Barn 1 gråter	1 s
6	Barn 2 gråter	1 s
7	Barn 3 gråter	1 s
8	Barnet gråter	2 s
9	Barn 1 gråter	2 s
A	Barn 2 gråter	2 s
B	Barn 3 gråter	2 s
C	Barnet gråter	3 s
D	Barn 1 gråter	3 s
E	Barn 2 gråter	3 s
F	Barn 3 gråter	3 s

Flere barn?

Har du flere barn du ønsker varsling om, kan du benytte flere BARN10-L. Senderne settes opp til å varsle hvert sitt barn. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer.

Benytt gjerne den korte enden på verktøyet som sitter i lokket



Tips

Hvis du har varslingsmottakeren IRIS LIFE, kan du selv legge inn navnene til barna og evt. foto av dem som vises ved varsling.

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrus fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	Bryteren er i Av-stilling	Sett bryteren i bunnlokket i På-stilling
	Enhetene er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
	Lyden er ikke høy nok	Juster opp følsomheten
	Lyden er ikke lang nok	Juster lyttetiden v.h.a. Funksjonsvelgeren
	Avstanden mellom BARN10-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i BARN10-L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	BARN10-L mangler batteri	Sett inn batteri.
	Kontakten er ikke korrekt tilkoblet	Kontrollert tilkobling av knapp eller sensor.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Oransje, korte blink i senderen når barnet gråter	Gråten er for lav	Juster opp følsomheten på senderen
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i BARN10-L	Batteriet i BARN10-L er snart tomt.	Bytt batteri
Det lyser ikke grønt når barnet gråter.	BARN10-L oppfatter ikke signalet.	Juster følsomheten og eventuelt tidsforsinkelsen
Det varsler selv om ikke barnet gråter	BARN10-L oppfatter andre lyder enn barnegråt	Fjern andre lydilder ved BARN10-L

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

Notater:



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

