

Varslingsmottaker IRIS LIFE m/ display, lys, lyd og tale. IRIS-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
I pakken	4
Utvendig	4
Baksiden	4
3. Komme i gang	5
Plassering	5
Tilkobling	5
Sammenkoble enheter	5
4. Daglig bruk	7
Varsling	7
Avbryte varsel	7
Justere volum	7
Klokke	7
Vekkerklokke	7
Nedtellingsur (Timer)	7
5. Innstillings-meny	8
Meny: Alarmklokke	8
Meny: Timer	8
Meny: Klokkeinnstillinger	8
Meny: Skjerminnstillinger	9
Meny: Funksjonsbryter	9
Meny: Justere klokke	9
Meny: Informasjon	9
6. Grunninnstillinger	9
Daglige signaler/ Kun alarmer– bryter 1	9
Nabovarsel - bryter 2	9
Tale – bryter 3	9
Velg sengevibrator – bryter 4	10
Skjermlås – bryter 5	10
7. Avansert kontrollpanel	10
Åpne avansert kontrollpanel	10
Meny: Innstillinger	11
Meny: Tilpasse	11
Meny: Nabovarsel	13
Meny: Motta fra nabo	14
Meny: Avslutte Nabovarsling	14
Meny: Logg	14
Meny: Funksjonsbryter	14
Meny: Informasjon	14

Meny: Vedlikehold	15
Meny: Konfigurer FBUT/ Konfigurer ARM-L	15
Meny: LIFE Sammenkobling	17
8. Viktig informasjon	18
Bruksbegrensninger:	18
9. Resirkulering	18
10. Sikkerhet	18
11. Tekniske data	18
12. Samsvarserklæring	18
13. Feilsøking	19

1. Innledning

Varslingsmottakeren IRIS LIFE (IRIS-L) er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE detektorer/sendere montert i boligen din.

FlexiBlink LIFE benyttes for å varsle om alvorlige hendelser som brannalarm og komfyrvakt så vel som daglige hendelser som dørklokke, telefon og andre relevante hendelser.

Varsling blir utløst når en Røykvarsler LIFE detekterer røyk eller en Telefonsender LIFE oppfatter at det ringer. Senderne varsler da trådløst til alle varslingsmottakere i boligen. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sender som du trenger for sikkerhet og dagligliv.

IRIS kan også melde fra hvor brannalarmen er utløst. Det er viktig hvis du har flere røykvarslere i huset. Den gir også beskjed om hvilken røykvarsler som trenger batteribytte.

IRIS har også en avansert nabovarslings-funksjon, som muliggjør brann- og innbruddsikkerhet mellom boenheter.

I tillegg til å fungere som en varslingsmottaker kan IRIS benyttes som talende klokke, vekkerklokke og nedtellingsur/timer.


IRIS LIFE benyttes også for å endre varslings-innstillinger på produktene ARM-L, ELLA-L og FBUT-L.

2. Oversikt

I pakken




IRIS-L
Med avtakbar fot og
festebrakett for vegg

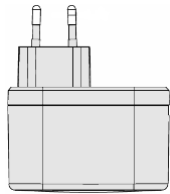

Strømforsyning


Utvendig

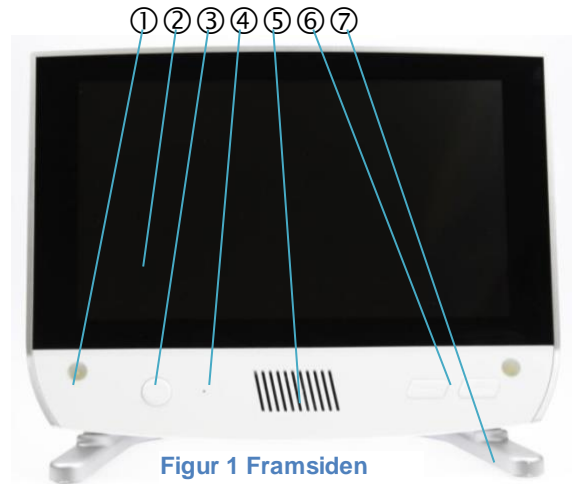

Figur 1 Framsiden

- ① Lys (Høyre og venstre side)
- ② Skjerm med touch
- ③ HJEM knapp
- ④ Mikrofon for taleinnspilling
- ⑤ Høyttaler
- ⑥ Volum opp/ned
- ⑦ Avtakbar fot

Baksiden

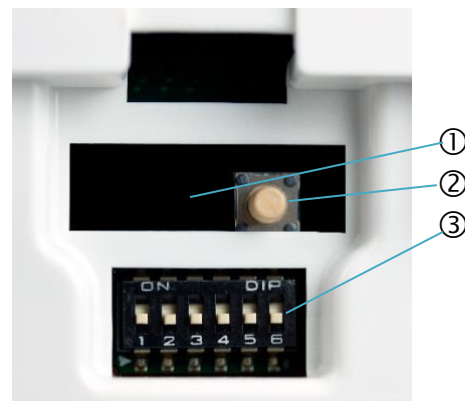

Figur 2 Baksiden

- ① Lysindikator
- ② LIFE-knapp
- ③ Funksjonsbrytere

3. Komme i gang

Plassering

IRIS kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller skrues opp på vegg med den medfølgende braketten.



Tips

Ikke monter braketten før du har kontrollert at strømledningen er lang nok

Tilkobling

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn i IRIS. Du vil nå se at skjermen starter.

IRIS er nå klar til bruk, men først må den sammenkobles med resten av FlexiBlink LIFE produktene dine.

Dersom du ønsker å gjøre endringer på oppsett, stille klokke og lignende – se kapittel 5.


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


LIFE-knappen finnes under baklokket på IRIS.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

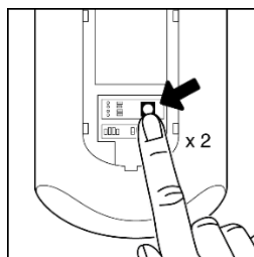

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

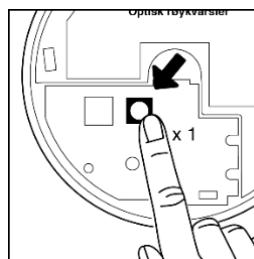

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

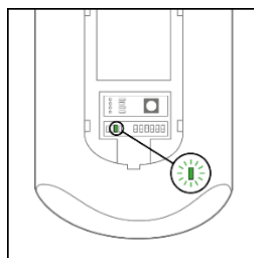

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får grønt og deretter rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den. Vennligst nullstill enheten.

Hvis indikatorlampen lyser fast rødt, betyr det at enheten allerede er koblet til et annet nett. Vennligst nullstill enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

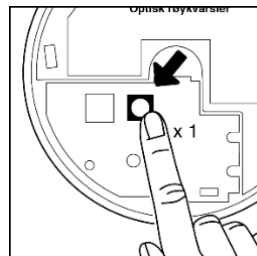

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se kapittel 6.

4. Daglig bruk

Varsling

IRIS fungerer som varslingsmottaker uten noen som helst aktiv bruk. Hendelser som oppstår i boligens FlexiBlink LIFE-anlegg varsles automatisk med lyd, lys og bilde – samt tale dersom dette er aktivert.

IRIS husker siste varsel en tid. Ved å ta på skjermen innen to minutter etter at varslingen er ferdig, vil du se hvilket varsel som ble vist. Ønsker du å se på klokken i denne perioden – trykk på HJEM knappen.

Avbryte varsel

Dersom man ønsker å stoppe et pågående varsel, kan man berøre skjermen eller trykke på HJEM-knappen. Varselet vil nå stoppe umiddelbart. Dersom en brannalarm stoppes på denne måten, vil kommende, nye, alarmer innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

Justere volum

Benytt volumbryter (pluss/minus) på høyre framside av IRIS for å justere lydstyrke på daglige varslinger. Alarmer varsles alltid med full styrke.

Klokke

Dersom klokken er stilt og aktivert (se kapittel 6), vises klokke og dato når skjermen berøres eller HJEM-knappen trykkes.

Ved aktivert talende klokke, vil også tidspunkt og dag leses opp automatisk.

Vekkerklokke



IRIS har en innebygget vekkerklokke. Trykk på klokkesymbolet nede i høyre hjørne for å slå av/på alarmen, samt velge tidspunkt. Det kan også velges om man ønsker slumre-funksjon og om man ønsker alarm på faste dager. Trykk på tilbake-pilen på skjermen eller HJEM-knapp når innstillingen er ferdig.

Alarmtidspunktet vil nå vises ved siden av klokkesymbolet nederst til høyre på skjermen.

Vekkerklokken varsler med lyd og lys på skjermen. Den kan også varsle trådløst til sengevibrator.

Nedtellingsur (Timer)



IRIS har et praktisk nedtellingsur. Dette vises med gjenstående tid på skjermen når timeren er startet.

5. Innstillings-meny

IRIS har en innstillings-meny for å stille vekkerklokke, justere dato/tid, starte nedtelling/timer, lysstyrke, samt se informasjon om produktet og hvilke funksjoner som er valgt.

Trykk og hold HJEM-knappen inne i 2 sekunder.

Innstillings-menyen vil nå vises. Menyene kan ha flere sider med undermenyer. Du kan bla igjennom sidene ved å trykke på pilene nederst på skjermen.

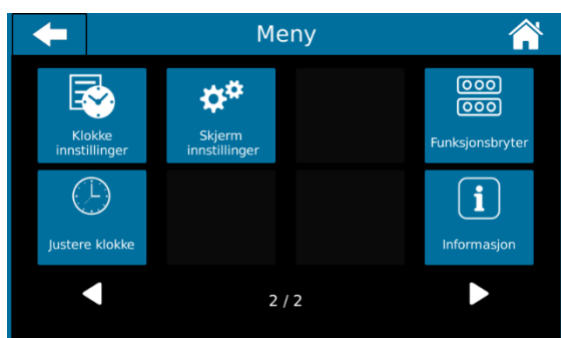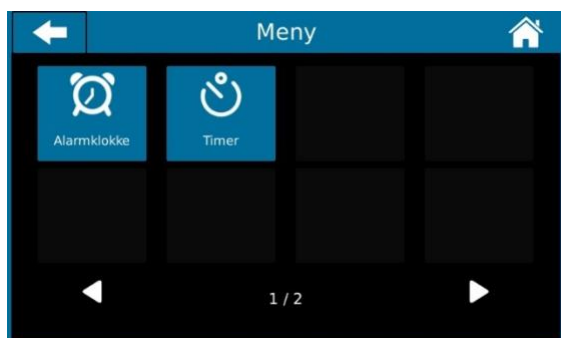

Viktig

Når meny og innstillinger vises på skjerm mottas ikke varslinger. Dette gjelder også for vekkerklokke og timer/nedtelling.

Meny: Alarmløkke

Her velges alarmtidspunkt samt om alarmen skal være aktiv eller ikke. Det kan også velges om man ønsker slumre-funksjon og om man ønsker alarm på faste dager. Dette er samme side som åpnes om man trykker på vekkerklokkesymbolet nederst til høyre på skjermen. Ved aktivering av vekkerklokke aktiveres også klokkevisning automatisk.

Meny: Timer

Velg Timer i menyen, sett nedtellingstid og trykk START.

For å avbryte en pågående nedtelling, trykk på visningen av nedtellingsuret og deretter «STOPP».

Meny: Klokkeinnstillinger

Her kan man velge om klokke skal være aktivert, og hva slags type klokke som skal vises (digital/analog). Man kan også slå talende klokke av/på samt velge om den skal fortelle hvilken ukedag det er. Det kan også aktiveres mulighet for visning av tid på døgnet (morgen/kveld/natt o.l.).

Meny: Skjerminnstillinger

Her justeres lysstyrke på skjermen og om du vil ha klokke som skjerm-sparer. Her kan det også velges lysstyrke på denne.



Meny: Funksjonsbryter

Her vises funksjonsbryterens innstillinger. Det er ikke mulig å endre innstillinger her. Bryterne betjenes bak på IRIS.

Meny: Justere klokke

Her stilles klokke og dato. Velg korrekt dato og tidspunkt – trykk deretter «Endre» for å stille til valgt tid.

Meny: Informasjon

Her vises programvareversjon og lignende.

Benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS.

6. Grunninnstillinger

Med funksjonsbryterne på baksiden av IRIS kan du endre noen grunnleggende innstillinger.

Funksjonene kan kombineres fritt etter behov med bryter 1, 3, 4 og 5. Bryter 2 og 6 er reservert for fremtidige behov.

Daglige signaler/

Kun alarmer– bryter 1



Med bryter 1 ON (opp) varsler IRIS kun *alarmer* – som for eksempel komfyrvakt, røykvarsler/brannalarm, o.l.

Nabovarsel - bryter 2



Nabovarsling – bryter 2

For å få nabovarsling i FlexiBlink LIFE-systemet, må det benyttes en IRIS LIFE for oppsett. Da settes varslingsmottakerne opp til å varsle ved brann eller innbrudd hos aktuelle naboer.

Dersom du **ikke** ønsker at denne IRIS skal varsle fra naboer, kan du skyve *bryter 2* opp. IRIS blir da koblet fra nabovarsling.

NB! *Nabovarsling* går kun på alarmsignaler, og ikke for daglige signaler som for eksempel telefon og dørklokke.

Tale – bryter 3



Med bryter 3 ned slås talefunksjonen PÅ. Da får man varsling med både varslingslyd og beskrivende tale. Tale er som standard deaktivert. *Brannvarsel* spilles alltid av med tale.

Velg sengevibrator – bryter 4



IRIS vekkerklokke kan styres til å vekke i en av flere sengevibratorene i boligen. Bryter 4 er for å velge hvilken sengevibrator-kanal IRIS skal starte. Kanel A (ned) er standard kanal og opp er kanal B. Tilsvarende valg av kanal gjøres i sengevibratoren(e). (se brukerhåndbok for sengevibrator)

Skjermlås – bryter 5



Med bryter 5 opp (ON) låses volumknapper og menyer. Ved å skyve bryter 5 opp, låses volum til gjeldende nivå. Denne innstillingen holdes selv etter strømbrytning, og ved forsøk på volumjustering vil det komme beskjed på skjermen at skjermen er låst. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer på oppsettet i skjermen når låsen er på.

7. Avansert kontrollpanel

IRIS har en rekke muligheter for tilpasning, som brukeren ikke benytter i det daglige. Avansert kontrollpanel benyttes ved installasjon og behov for tilpasninger til brukeren og til oppsett av nabovarsling.


Hvis man har en Armbåndsender (ARM-L), en smykkesender (ELLA-L) eller en mottaker med signalutganger (FBUT-L), kan disse tilpasses fra en meny her.

Åpne avansert kontrollpanel


Gjør slik:

1. Trykk på HJEM-knappen for å vekke skjermen hvis den er slukket.
2. Trykk og hold HJEM-knappen inne.
3. Trykk samtidig og straks én gang på VOLUM NED og én gang på VOLUM OPP i en rask og jevn sekvens.
4. Fortsett å holde HJEM-knappen inne til avansert kontrollpanel vises.

Avansert kontrollpanel består av to sider, og man kan enkelt hoppe mellom disse ved å trykke på pilene i bunnen av bildet.

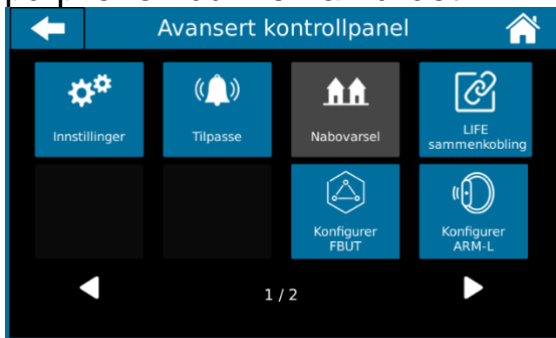

Side 1

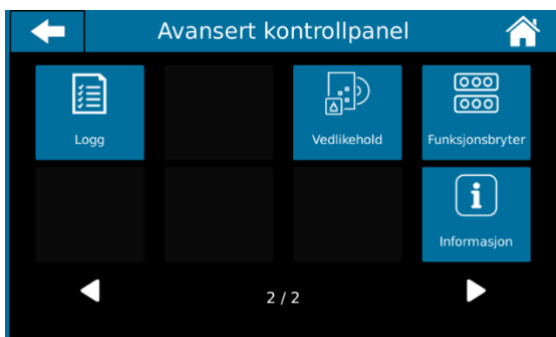

Side 2

Viktig

Når kontrollpanel og innstillinger vises på skjerm mottas ikke varslinger

På hver side finnes knapper (ikoner) for tilgang til underliggende menyer (sider) med avanserte funksjoner, som beskrevet i det følgende.

Meny: Innstillinger

Her kan man slå av/på følgende:

- Lysvarsel
Blinkende lys i front
- Synsforsterket modus
Økt tydelighet på symboler

Her justeres også styrken på skjermens baklys og styrken på blinkende varslingslys. Dette kan være nyttig for eksempel ved bruk på soverom.

Meny: Tilpasse

På denne siden(e) listes alle mottatte varslinger - altså alle sendere i systemet som har sendt et varsel. (Aktiver en ny sender for å få den i listen.)

Første gang varslinger mottas, vises de med fabrikkinnstilt tekst, talemelding og symbol. Om ønskelig kan denne informasjonen tilpasses for hver enkelt type varsling. Trykk på den varslingen du ønsker å tilpasse og følg prosedyrene under:



Endre varslingsteksten

Det er 3 linjer med tekst som kan angi hva varselet gjelder:

Varslingstekst

Standard tekster som angir overordnet varsling, som for eksempel BRANNALARM.

Lokasjonstekst

Brukes for ekstra informasjon, som for eksempel hvor brannalarm er utløst (eks. 1. ETASJE.)

Tilleggstekst

Brukes for å ytterligere spesifisere varslingen, som for eksempel ROM 102.

For å endre, gjør slik:

1. Trykk på den varslingen du skal endre.
2. Trykk i tekstlinjen du vil endre/skrive.
3. Skriv inn tekst og trykk «Enter».


Endre varslingsikon

IRIS har en rekke ikoner innebygget, som man kan velge fra, eller du kan hente egne bilder fra en USB-minnepinne satt inn i USB-kontakten.

Trykk på pilene for å bla igjennom ikonene. Valget lagres automatisk når du går ut av bildet.

Lage en talemelding

Trykk på "Taleopptak", og du kommer til denne siden.

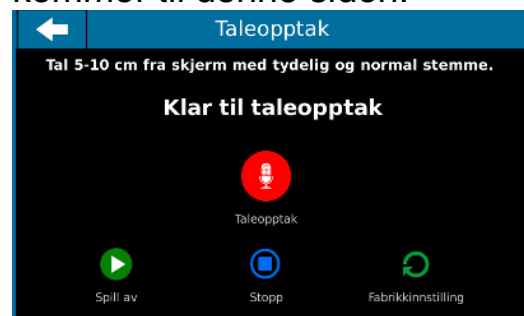

Trykk på den røde knappen for å starte opptaket. IRIS teller ned og opptaket starter. Du kan legge inne en melding på opptil 10 sekunders lengde.

Prat inn i mikrofonen med normal stemme på 5-10 cm avstand.

Opptaket stopper når 10 sekunder har gått eller du trykker på "Stopp".

Trykk på grønn "Spill av" knapp for å lytte til opptaket. Hvis du ikke er fornøyd kan du gjenta.

Alternativt kan du trykke på "Fabrikkinnstilling" for å slette talemeldingen.

Meny: Nabovarsel

Nabovarslings-funksjonen åpner for å motta ALARMER fra et annet FlexiBlink LIFE-system og for å dele varsler i ditt FlexiBlink LIFE-system til et annet system.



Viktig


Nabovarslingsfunksjonen krever at det er installert minst en FlexiBlink LIFE REPEATER-L i systemet!



Viktig

Sammenkoble LIFE-systemet i hver bolig med REPEATER-L, ved å trykke 2 ganger på LIFE-knappen på IRIS LIFE og en gang på LIFE-knappen på REPEATER-L.

Når sammenkoblingen med Repeateren er utført, åpnes tilgangen til Nabovarslingssiden. (ikonet på siden går fra grått til blått.)

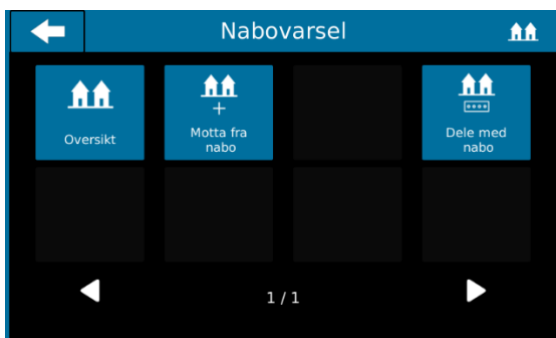

Av sikkerhetsmessige grunner, for å sikre at ingen "tyvlytter" på dine varslinger, må det utføres en verifikasjon med "PIN"-kode i hvert system.

Meny: Oversikt

Her finnes en liste over de naboene du har valgt å MOTTA alarmer fra. Du kan legge inn navn og informasjon, pause mottak og slette mottak.

Meny: Dele med nabo

For å dele ut og tillate et annet system å få dine alarmer, gjør du slik:

1. Trykk på "Dele med nabo"
2. Nå kommer det fram en side med en 4-sifret kode.

Eksempel:



3. På nabovarslingssiden på naboens (mottakerens) IRIS, trykker naboen på "Motta fra nabo".
4. Naboen får nå opp en side og skriver inn den 4-sifrede koden fra din IRIS.
5. Når alle 4 tall er skrevet inn, søker FlexiBlink LIFE-systemene etter kontakt.
6. Hvis kontakt opprettes, får du og naboen beskjed om at sammenkobling / nabovarsel er klart.
7. Hvis systemene ikke finner hverandre, blir man bedt om å prøve igjen.

Meny: Motta fra nabo



For å godta å ta imot alarmer fra en nabo, gjør du slik:

1. På nabovarslingssiden trykker du på "Motta fra nabo".
2. Skriver inn den 4-sifrede koden du fikk av naboen.



3. Du får varsel på skjermen når nabovarslingen er opprettet.
4. Om du ønsker, kan du gå inn i «Oversikt» og legge inn navn.

Meny: Avslutte Nabovarsling

Hvis du ikke lenger ønsker å dele varslinger med andre, må alle enheter i ditt FlexiBlink LIFE-system nullstilles og sammenkobles på nytt for å avslutte utsending av nabovarsler.

Som mottaker av ALARMER fra en nabo, kan du avslutte nabovarselmottaket fra hver enkelt nabo på siden "Rediger kontakter".

Meny: Logg


Her vises en liste over mottatte varslinger den siste tiden. Dette er praktisk informasjon ved installasjon og feilsøking.

Meny: Funksjonsbryter

Her vises valgt huskode samt grunninnstillinger fra funksjonsbryteren. Det er ikke mulig å endre innstillinger her, kun vise hvilke valg som er gjort på bryterne bak.

Meny: Informasjon

Her vises programversjon og informasjon om tilknytning.

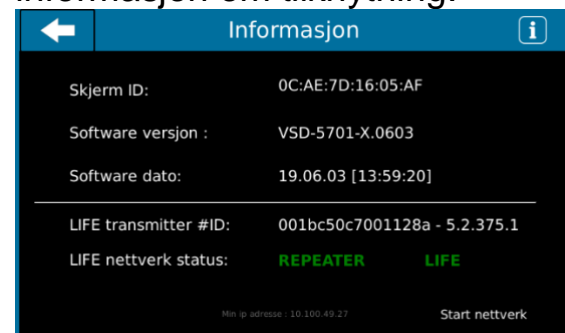

Nederste linje forteller om IRIS er sammenkoblet med andre FlexiBlink LIFE enheter i systemet.

Når en repeater er tilkoblet systemet, blir «REPEATER»-teksten grønn. Mister IRIS-L kontakt med repeatersystemet, skifter «REPEATER» farge til rød.

Meny: Vedlikehold



Her kan oppsettet man ha gjort kopieres til minnepenn som en sikkerhetskopi.

Man kan også gjenopprette oppsettet fra en minnepenn. Dette er praktisk for å kopiere egne tekster og lyder til flere IRIS.

Her finnes også mulighet for å legge inn ny programvare (software) i IRIS. Programvare kan hentes fra internett eller fra en minnepinne. Kontakt Vestfold Audio AS ved behov for hjelp.

IRIS kan også tilbakestilles til fabrikkinnstilling her. Da blir alle lyder og tilpasninger slik de leveres originalt.

Meny: Konfigurer FBUT/ Konfigurer ARM-L


På disse sidene finnes funksjoner for å tilpasse FBUT-L, ARM-L og ELLA-L produkter som er sammenkoblet i systemet.

Du kan:

- Legge til et individuelt visningsnavn på en enhet.
- Endre funksjonalitet i FBUT-L, ELLA-L eller ARM-L. Disse produktene er fabrikkinnstilt til å sende/motta bestemte varslinger, som kan endres herfra.

Enhetene som er sammenkoblet med IRIS, vises i en liste med produktnavn.

Legge til/endre et navn

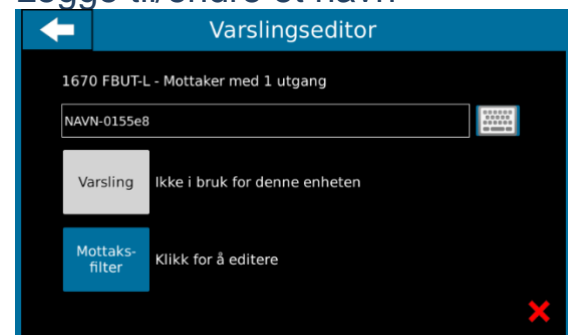


1. Klikk på linjen for den enheten du vil gi et visningsnavn.
2. Skriv inn navnet
3. Trykk "Enter".

Endre funksjon i en enhet

1. Trykk på linjen for det produktet du vil endre.
2. Trykk på «Varsling» eller «Mottaksfilter» for å komme inn i endringsmenyen.
3. Du får nå opp en side med valg som er tilpasset produktet, som for eksempel:
 - a. Endre varsel sendt fra ELLA-L.
 - b. Endre varsel sendt fra ARM-L.
 - c. Velge hvilke varsler ARM-L skal motta og hvordan de skal varsles.
 - d. Velge hvilke varsler som skal gi signal på FBUT-L og hvor lenge de skal vare.
4. Trykk på pil tilbake for å sende innstillingene til valgt enhet.

Endre funksjon i FBUT-L

Finn enheten du vil endre funksjon for i lista og trykk på navnet.

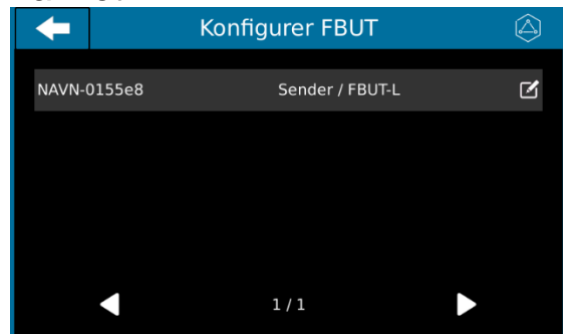

Trykk «Mottaksfilter».




Trykk på varslingen du vil endre.



Velg ønsket type varsling i menyen og trykk «Lagre».

Meny: LIFE Sammenkobling

Herfra kan man starte sammenkobling med en annen FlexiBlink LIFE enhet i stedet for å bruke LIFE-knappen. Se kap. *Sammenkoble enheter*.

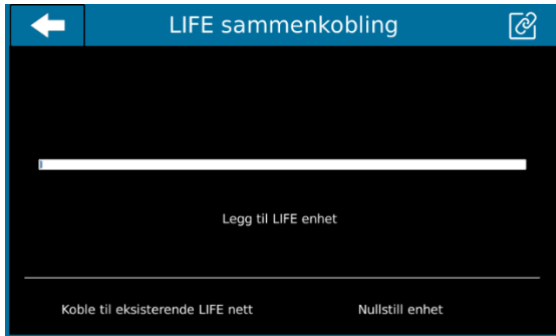

Legg til LIFE enhet

Tilsvaret er 2 trykk på LIFE-knappen.

Koble til eksisterende LIFE nett

Tilsvaret er 1 trykk på LIFE-knappen.

Nullstill enhet

Tilsvaret er 5 trykk på LIFE-knappen.

8. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

9. Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



10. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrus fra hverandre.

11. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 218x165x40mm
(uten veggfeste og fot)

Vekt u/strømforsyning: 800 g

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

12. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

13. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Får ikke sammenkoblet	Indikatorlampe lyser rødt etter sammenkoblingsforsøk	Enheter er allerede sammenkoblet med andre enheter. Nullstill sammenkobling.
	Indikatorlampe blinker rødt etter sammenkoblingsforsøk	Sammenkobling mislykkes. Vennligst prøv igjen.
	Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling	Leter fortsatt etter nye enheter. Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheter er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Varsling mottas ikke	Ikke sammenkoblet	Koble ut siste enhet og koble sammen igjen
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre
	Manglende dekning	Sett opp en REPEATER-L
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
Varsling mottas, men ingen lyd	Volum justert ned	Forsøk å justere opp volum
	Lyd avslått	Kontroller at lyd ikke er avslått i avansert kontrollpanel. Se kapittel 7
Varsling mottas med lyd, men ingen tale	Tale avslått	Kontroller at tale ikke er avslått (funksjonsbryter 3)
Varsling mottas, men ingen lysblink	Lys avslått	Kontroller at lys ikke er avslått eller justert for lavt i avansert kontrollpanel. Se kapittel 7
Klokken viser feil tidspunkt eller dato		Still klokken. Se kapittel 5
Klokken viser feil tidspunkt etter strømbrudd	Klokkebatteriet er tomt for strøm	Klokkebatteriet lades opp over lang tid. Batteriet bør lade i minst 4 dager før man tar ut strømmen

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Hvordan slette innspillinger og tilbakestille innstillinger?		Se kapittel 7
IRIS varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen.	Enheten er sammenkoblet feil.	Nullstill sammenkoblingen på enheten og legg til igjen.
	Nabovarsel	Kontroller at funksjonsbryteren for nabovarsel står korrekt.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
 Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47

