

Timer med sender

TIMER-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	3
<u>3. Komme i gang</u>	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	4
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Montering	5
<u>4. Daglig bruk</u>	5
Funksjonskontroll	5
Nullstilling(reset)	5
Valg av tid:	5
Start / Stopp	5
Bytte batteriet	5
<u>5. Viktig informasjon</u>	6
<u>6. Resirkulering</u>	6
<u>7. Tekniske data</u>	6
<u>8. Resirkulering</u>	6
<u>9. Sikkerhet</u>	6
<u>10. Samsvarserklæring</u>	6
<u>11. Feilsøking</u>	7


1. Innledning

Den digitale timeren TIMER-L er en del av FlexiBlink LIFE systemet. Når den innstilte tiden er utløpt, vil TIMER-L sende signal til FlexiBlink LIFE mottakere.

FlexiBlinks LIFE mottakere AURORA LIFE og IRIS LIFE viser timer-symbolet, samtidig som de varsler med lys, lyd og eventuelt tale.

TIMER -L kan også benyttes til å gi påminnelser om andre hendelser fram i tid, som for eksempel beskjed om at kaffen er klar eller at du har en avtale.

2. Oversikt

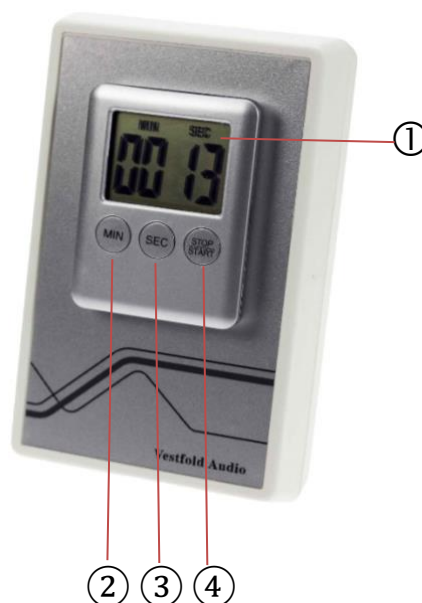

- ① Display
- ② Innstilling av minutter
- ③ Innstilling av sekunder
- ④ Start / Stopp

Under lokket på baksiden finnes:



- ⑤ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑥ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑦ Lysindikator for sammenkobling.

3. Komme i gang


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket bak på TIMER-L.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

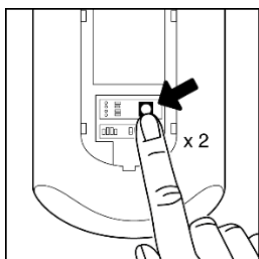

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

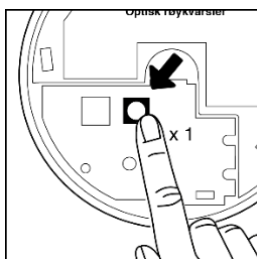

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

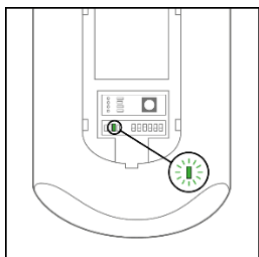

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

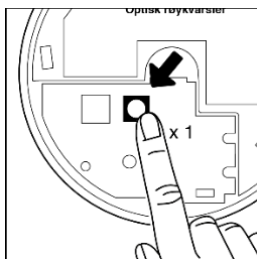

Velg funksjon (ID-velger)

Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer best til det som skal varsles i varslingsmottakerne.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Varsler om
0	Timer alarm
1	Timer alarm nr. 2
2	Timer daglig
3	Generell daglig
4	Generell alarm
5	Ta medisinen din
6	Kaffen er klar
7	<i>Les opp klokken</i>
8	<i>Se på kalenderen</i>
9	<i>Se på skjermen</i>
A	<i>Påminnelse</i>
B	<i>Du har en avtale</i>
C	<i>God morgen, på tide å stå opp</i>

Montering

TIMER-L ligger greit på kjøkkenbenken, men den kan også monteres på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Bruk da spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

4. Daglig bruk

Funksjonskontroll

Nullstilling(reset)

Trykk samtidig på MIN og SEC

Valg av tid:

MIN øker antall minutter. SEC øker antall sekunder.

Start / Stopp

For å starte og stoppe timeren, trykkes start/stopp-knappen.

Bytte batteriet

Ved leveranse er batteriet montert i timeren. Når batteriet begynner å bli dårlig, vil dette varsles i FlexiBlink LIFE mottakere med skjerm. Batteriet kan byttes etter å ha skrudd opp de fire skruene baklokket er festet med.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	90x145x31mm
Vekt m/ batteri:	205 g
Batteri:	Litium 3 V
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1–869.85 MHz

8. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

9. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

10. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

11. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	Batteriet i TIMER-L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	Avstanden mellom TIMER-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge rødt	Enheten er ikke sammenkoblet med noen	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

