

## **Ella Smykkesender ELLA-L**



# **Brukerhåndbok**

---

# Innholdsfortegnelse

---

<b>1. Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2. Oversikt</b>	<b>3</b>
I pakken	3
<b>3. Komme i gang</b>	<b>4</b>
Lading	4
Sette inn ELLA-L	4
Ta ut ELLA-L	4
Sikkerhetssnoren	4
Lysdiodene og vibrasjoner	4
Sammenkoble enheter	5
Klargjør ELLA-L	5
Sammenkoble første gang	5
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	5
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Nullstille sammenkoblingen	5
Velg funksjon (ID-velger)	6
Forleng rekkevidden	6
<b>4. Daglig bruk</b>	<b>6</b>
Sende et varsel	6
<b>5. Viktig informasjon</b>	<b>6</b>
Bruksbegrensninger:	6
<b>6. Resirkulering</b>	<b>6</b>
<b>7. Tekniske data</b>	<b>6</b>
<b>8. Feilsøking</b>	<b>7</b>

## 1. Innledning

---

Smykkesenderen ELLA-L er en assistansealarm for personer som har behov for å kunne tilkalle assistanse eller sende varslinger til andre. Den bæres i halssnor.

ELLA-L sender varsling til ELLA-L og FlexiBlink LIFE mottakere.

ELLA-L kan også tilpasses for å starte fjernstyrt opplasing av klokke på produktene IRIS LIFE, MÅNE LIFE og SOL LIFE, og for en rekke andre varslinger.

ELLA-L vil vibrere når den sender varslinger.

### Nøkkeldata

- Enkel installasjon og bruk.
- Sprutsikker (dusj - ikke bad)
- Signalrekkevidde innen normal husstand
- Veldig god batterilevetid
- Oppladbar


## 2. Oversikt

---

### I pakken



Figur 1  
ELLA-L, holder med sikkerhetssnor,  
armbånd, lader og ladekabel

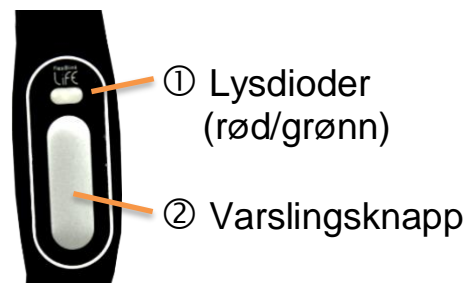

Figur 2 Knapp og lys

### 3. Komme i gang

#### Lading

Før du begynner å bruke ELLA-L, bør den lades helt opp.

En fullt oppladet enhet har batterilevetid på uker avhengig av bruken.

Press ELLA-L ut av holderen og sett den inn i ladekontakten, som igjen settes inn i den medfølgende laderen.

Lysdioden blinker rødt så lenge ladingen pågår.

**NB!** Du kan ikke sende varslinger når enheten lades.



#### Sette inn ELLA-L

ELLA-L settes inn i holderen "nedenfra" - altså trykkes ned mot bunnen først..



#### Ta ut ELLA-L

ELLA-L tas ut ved å presse den opp gjennom holderen som vist på figuren over.

#### Sikkerhetssnoren



Halsnoren til ELLA-L har sikkerhets-fester i form av små metallkuler som passer inn i hullene i holderen. Hvis snoren trekkes ut, er det bare å dytte kulene på plass igjen.

#### Lysdiodene og vibrasjoner



① Lysdioder

② Varslingsknapp / LIFE-knapp

ELLA-L har to lysdioder, en grønn og en rød, og en vibrator som sammen gir informasjon:

Grønn blink + vibrasjon	Sender varsel
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Varslingen kom ikke fram.
Rød og grønn blink	Lavt batteri.
Rød blink	Enheteren lades

## Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles med noen enkle knappetrykk.



## Klargjør ELLA-L

Gjør slik:

1. Trykk og hold knappen inne i 10 sekunder til du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Nå er det klart for å velge sammenkobling.

## Sammenkoble første gang

1. Klargjør ELLA-L.
2. Trykk **én** gang på ELLA-L varslingsknappen.
3. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene som skal kobles til. (Kan også være en ELLA-L)
4. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.
5. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene i begge enheter lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
6. Enhetene er klare til bruk. Trykk på varslingsknappen for å teste sammenkoblingen.

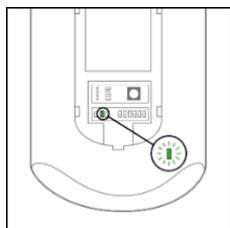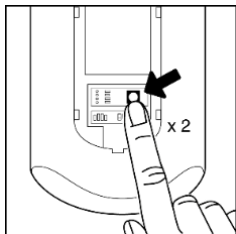

## Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Klargjør ELLA-L.
2. Trykk **to** ganger på varslingsknappen på ELLA-L.
3. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten eller på varslingsknappen til ny ELLA-L.
4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på varslingsknappen for å teste sammenkoblingen.

## Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

## Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen / varslingsknappen på ELLA-L.

## Nullstille sammenkoblingen

1. Klargjør ELLA-L.
2. Trykk **fem** ganger på varslingsknappen på ELLA-L.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

## Velg funksjon (ID-velger)

ELLA-L kan settes opp til å sende andre varslinger enn "Assistanse ønskes".

Dette må gjøres ved hjelp av en IRIS LIFE varslingsmottaker. Vennligst se brukerhåndboken til IRIS LIFE eller ved bestilling fra Vestfold Audio AS.

## Forlenge rekkevidden

I større bygg eller institusjoner hvor man har behov å forlenge rekkevidden mellom en ELLA-L og andre FlexiBlink LIFE produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER-L.

## 4. Daglig bruk

---

### Sende et varsel

Når du trykker på varslingsknappen, sendes varsel til alle mottakere som er sammenkoblet din ELLA-L. Det lyser grønt og gis en vibrasjon på at varslingen er sendt.

Standard varslingsmelding er: "Assistanse ønskes!"

**NB!** Hvis det blinker rødt og vibreres 10 ganger tett, betyr det at ingen mottakere har oppfattet varslingen. Om mulig, flytt deg og prøv på nytt!

## 5. Viktig informasjon

---

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

### Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

## 6. Resirkulering

---

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 7. Tekniske data

---

Dim. (lxb): 235x10mm

Vekt m/ batteri: 40 g

Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Ladespenning: 5VDC (USB)

## 8. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	Avstanden mellom ELLA-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	ELLA-L er tom for strøm.	Lad opp ELLA-L.
	ELLA-L og mottakere er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling. Se kap. 3
	Feil på mottaker	Se bruksanvisning for mottakeren.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Nullstill sammenkobling. Se kap. 3
Det lyser ikke grønt når knappen trykkes.	ELLA-L er tom for strøm.	Lad opp ELLA-L.
Det blinker rødt/grønt	ELLA-L er nesten tom for strøm.	Lad opp ELLA-L.
Det varsles med feil signal i mottakere.	ELLA-L er satt til å sende et "feil" varsel.	Bruk en IRIS LIFE for å sette riktig varsling i ELLA-L. Se brukerhåndbok for IRIS-L.
Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og etter at grønt lys for sending har slukket.	Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater
		Utfør sammenkobling med mottakere.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

