

Bruker manual SARA CE



- helping people

Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
<http://www.FreedomScientific.com>

Information in this document is subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Freedom Scientific.

Copyright © 2008 Freedom Scientific, All Rights Reserved.

Dette utstyret er testet og funnet å være i henhold til del 15 i FCC-reglene, for en Klasse B digital enhet. Disse reglene er for å gi rimelig en beskyttelse mot skadelig forstyrrelser. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelser med annen radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Skulle det forårsakes skadelig forstyrrelser med ev. radio- eller fjernsynsmottakere, og som kan hindres ved å slå utstyret av og på, oppfordrer vi til å sjekke følgende:

- **Juster eller flytt mottakanten.**
- **Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.**
- **Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet til.**
- **Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp.**

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	3
Introduksjon	1
Velkommen til SARA CE !	1
Egenskaper	2
Innholdet i esken	3
Hva SARA CE ikke kan lese	4
Hvordan installere SARA CE	4
Skanning og lesing med SARA CE	5
Slå SARA CE på og av	5
Skanning og lesing med SARA CE	6
Justere volum og lesehastighet	7
Få hjelp	7

Velkommen til SARA CE !

SARA CE (Scanning and Reading Applian Camera Edition) er en frittstående enhet utviklet for å hjelpe blinde og svaksynte å lese trykt tekst. Du kan bruke SARA CE til å lese nesten hva som helst; post, viktige dokumenter, bøker, pocketbøker og så videre. SARA CE bruker det siste innen teknologi for optisk tegngjenkjenning for å skanne sider og deretter lese innholdet på siden med en klar og naturlig stemme. SARA CE inneholder en mengde funksjoner som lar deg tilpasse måten den lese på. En innbygget CD-stasjon gir deg anledning til å lese dine favorittbøker på CD. SARA CE gir deg til og med mulighet til å lese bøker i DAISY-format (Digital Accessible Information System).

Denne brukerveiledningen har som hensikt å vise deg hvor enkelt det er å skanne og lese med SARA CE. Den inneholder informasjon om SARA CE og tastaturet, så vel som et par taster for å komme i gang. Ikke bare kan du enkelt installere SARA CE og koble til en hodetelefon, men du kan også koble den til en dataskjerm.

For avanserte brukere finnes det menyer som kan brukes til å angi en rekke valg som lese- og menystemmer, språk, visuelle innstillinger, og håndtering av et nesten ubegrenset antall filer.

Egenskaper

SARA CE er så enkel i bruk at den virker uten noe om og men. De viktigste av SARA CE s egenskaper omfatter:

- Lese bøker, magasiner, aviser, regninger og mer.
- Lese DAISY lydbøker.
- Lese spalter og tekst i margin så vel som tekst.
- Manuell og automatisk skannemodus.
- Store knapper som utfører alle de grunnfunksjoner brukeren har behov for.
- Et fargerikt tastatur med taktile symboler og former angir hensikten med hver knapp.
- Trykk tasten Hjelp etterfulgt av en av de andre tastene for å finne ut deres funksjon.
- Menyer, som er enkel i bruk, kan også brukes til å kontrollere skanning og lesing.
- Stereo høyttalere i fronten på enheten, gjør at SARA CE er lett å høre på.
- RealSpeak™ Solo stemmen kan endres for å passe dine preferanser, for eksempel lesehastighet og volum.
- Stav ord for å få en bedre forståelse av det som leses. (SARA CE X
- SARA CE husker hundretusener av sider.

- Hente fram og lese dokumenter lagret på USB enhet, som f.eks USB minnepinne eller ekstern harddisk. Bøker kan også lagres på USB enhet.
- Koble enheten til en dataskjerm for å få fargerik, stor skrift i tillegg til talen.

Innholdet i esken

- SARA CE skanne- og leseenheter
- Kamera og kamera arm
- Strømkabel (110 eller 220 V)
- Strømadapter
- Brukerveiledning med stor skrift.
- Lydinnspilling for grunnleggende opplæring
- Hodetelefon
- Testside for skanning

Hva SARA CE ikke kan lese

SARA CE kan ikke lese håndskrevet eller håndtrykt materiale. Hvis det står en underskrift på et trykt brev, leser SARA CE brevet men ikke underskriften. Hvis signaturen er skrevet oppå andre trykte ord, for eksempel det avsluttende "Med hilsen", vil ikke bokstavene som står under underskriften leses korrekt.

SARA CE kan ha vanskeligheter med å lese noen trykte skjemaer fordi kantlinjer ofte brukes til å omgi teksten. SARA CE ser noen ganger bort fra tekst som er nær vertikale eller horisontale linjer eller som er omgitt av en ramme. Du vil for eksempel ha vanskeligheter med å bruke SARA CE til å lese poengsummer eller børnoteringer i en avis. Selv om SARA CE leser mesteparten av teksten korrekt, kan det være vanskelig å forstå meningen.

Hvordan installere SARA CE

Når du skal montere SARA CE, koble først den firkantede enden av strømkabelen inn i strømadapteren (den sorte rektangulære boksen). Koble deretter den lille, runde enden av strømkabelen inn på baksiden av SARA CE . Den riktige kontakten finnes lengst ut på høyre side når du har baksiden av enheten mot deg. Sett til slutt kontakten på strømkabelen inn i støpselet. Enheten er nå klar til bruk.

Hvis du vil bruke hodetelefonen som leveres med SARA CE , plugg den inn i hodetelefonkontakten nederst til høyre på frontpanelet.

Skanning og lesing med SARA CE

Slå SARA CE på og av



Strømbryteren er den lille, runde, grønne knappen helt nederst til venstre på den vertikale flaten på fronten av SARA CE. Trykk denne knappen en gang for å slå på.

Mens SARA CE varmes opp, høres en lyd med jevne mellomrom som indikerer at den er aktiv. Når enheten er klar, sier den "Velkommen til SARA CE. Lesestemmen er nå satt til Nora. Trykk den røde skannetasten for å skanne. Trykk den grønne lesetasten for å begynne å lese. Trykk den gule hjelpetasten, etterfulgt av en hvilken som helst annen tast for å lære hva den gjør." Dette er SARA CE s standard oppstartsmelding. Hvis du har endret lesestemmen, vil du høre et annet navn blir lest opp. Se "Annonsering av taster" på side 29 for informasjon om hvordan du kan tilpasse oppstartsmeldingen.

Advarsel: Du må ikke koble fra strømkabelen eller koble fra SARA CE når enheten er i ferd med å slås av.

Trykk **strømbryteren** for å slå av SARA CE. SARA CE vil be deg trykke **strømbryteren** på nytt for å slå av eller en hvilken som helst annen tast for å avbryte. Hvis du ikke trykker noen tast innen 30 sekunder, vil SARA CE automatisk avbryte prosessen med å slå av.

Skanning og lesing med SARA CE

1. Legg lesestoffet rett på platen med den trykte teksten opp.
2. Trekk unna dine hender, og SARA CE vil begynne å lese automatsik.
3. Trykk **skannetasten**, som er den røde, ovale tasten med en hevet sirkel øverst til venstre på tastaturet. SARA CE sier, "*Skanner*" når den begynner å skanne og spiller av en lyd mens den skanner og gjenkjenner tekst. Når SARA CE er ferdig med å analysere siden, begynner lesingen automatisk.



Tips: Hvis du vil avbryte skanningen, trykk **skannetasten** på nytt.

4. For å stoppe lesingen trykk **lesetasten**, som er den grønne tasten med et hevet Spill- og Pausesymbol under **skannetasten**. Trykk lesetasten på nytt for å gjenoppta lesingen.



Justere stemmевolumet



Til høyre for strømbryteren på frontpanelet er det en oransje vippestast merket med en hevet høyttaler som kontrollerer lydstyrken på SARA CE S tale. Denne blir kalt **Volumtasten**. Trykk på venstre side av tasten for å senke volumet og på høyre side for å heve volumet. SARA CE sier “svakere” eller “høyere” slik at du kan justere volumet til ditt ønskede nivå.

Justere lese hastighet



SARA CE har en annen oransje vippestast på fronten, rett til venstre for høretelefonkontakten på høyre side. Den er merket med et hevet kaninsymbol for å representere hastighet. Dette er **tasten for Stemme hastighet**. Hvis du trykker på venstre side av tasten, hører du SARA CE si “saktere” hver gang du trykker den. Trykk på høyre side av tasten øker stemme hastigheten og du hører SARA CE si “raskere”.

Trykk **stemme hastighetstasten** til du finner en komfortabel lese hastighet.

Få hjelp



Trykk **hjelpetasten** etterfulgt av en av de andre tastene for å få en forklaring på tastenes funksjon.

Bruk av hodetelefon eller høyttalere på SARA CE

- Det er et uttak for hodetelefon lengst til høyre på frontpanelet. Plugg inn hodetelefonen som leveres med SARA CE for å kunne lytte til SARA CE uten å forstyrre andre i nærheten. Når hodetelefonen er pluggert inn, er høyttalerne slått av. Du kan også koble eksterne høyttalere til kontakten Audio ut på høyre side av bakpanelet på SARA CE , ved siden av strømkontakten.



- helping people

Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

post@cantec.no

www.cantec.no