

RECARO Monza Nova 2 Reha

 **Bruksanvisning** – Reha-bilsete RECARO Monza Nova 2 Reha

CE


Thomashilfen



1



2



3



4



5




6



7



8

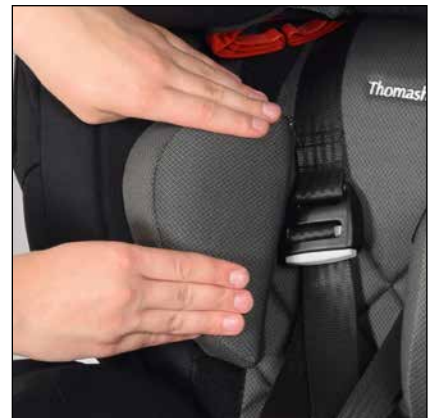

9



10




11



12



13

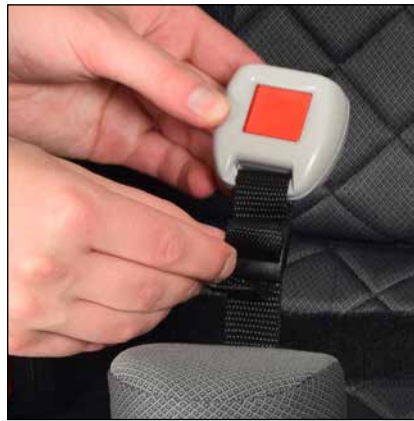

14



15




16



17



18

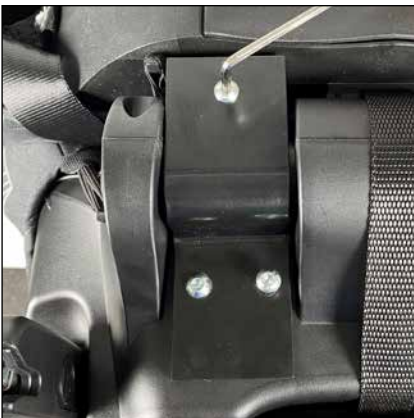

19



20



21



22



23



24



25




26



27



28

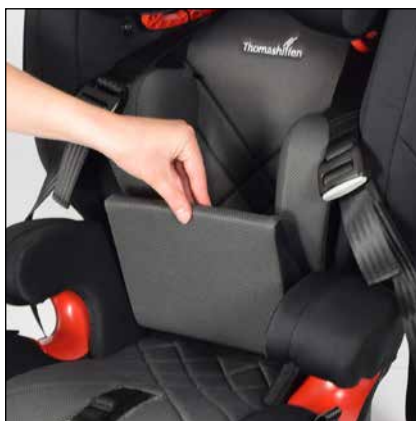

29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

Kjære kunde

Du har valgt vårt produkt, og vi takker for tilliten. For at håndteringen av det nye produktet skal være sikkert, praktisk og komfortabelt for både deg og brukeren, må du lese denne bruksanvisningen først. På denne måten kan du unngå skader og feil betjening. Sørg for at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet og er tilgjengelig for alle brukere.

Denne bruksanvisningen er et tillegg til den originale bruksanvisningen for RECARO. Med tilpasningen av Reha-bilsetet er håndteringen av bilsetet endret på noen punkter. Endringene er beskrevet i denne tilleggs-bruksanvisningen.

Ved spørsmål kontakter du ansvarlig faghandel eller oss direkte.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG







Walkmühlenstraße 1
27432 Bremervörde / Tyskland
Telefon: +49 (0) 4761 8860
www.thomashilfen.de

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer. Dette kan føre til avvik mellom produktet ditt og visningen i mediene.

Innholdsfortegnelse

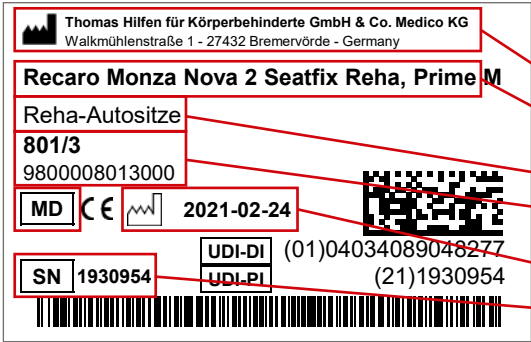Bilder	2
Forord / Produsent	6
Markeringer / Modellidentifikasjoner	7
Generelle henvisninger / Sikkerhetshenvisninger	7
Fastsetting av formål og brukssteder	8
– Riktig bruk / Bruksområder	8
– Indikasjon / Pasientmålgruppe, planlagte brukere.	8
– Risiko ved bruk og kontraindikasjoner	9
Produktbeskrivelse	9
– Leveringsomfang / Standardversjon	9
– Igangkjøring	9
– Opplæring i bruk	9
Innstillingsmuligheter / Ytelseskaraktistikker	9
– Tilbehør	11
– Tekniske data	13
– Materialinformasjon	13
Rengjøring, ettersyn og reparasjon	14
– Rengjøring, pleiehenviisninger og desinfisering i hverdagen	14
– Vedlikehold og inspeksjon utført av faghandelen / Vedlikeholdsplan	14
– Reservedeler	14
– Lagring / Kassering	15
EU-samsvarserklæring	15
Garanti	15
Brukstid / Levetid	16
Ny bruk	16
Forhandlere	16

Markeringer / Modellidentifikasjoner

Markering	Betydning
 <p> Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG Walkmühlenstraße 1 - 27432 Bremervörde - Germany Recaro Monza Nova 2 Seatfix Reha, Prime M Reha-Autositze 801/3 9800008013000 MD   2021-02-24 SN 1930954 UDI-DI (01)04034089048277 UDI-PI (21)1930954 </p>	<p>Streckcodeetikett</p> <p>Posisjon på produktet (Bilde 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsent - Produktnavn - Produktgruppe - Artikkelnummer kort / lang - MD = Medisinsk utstyr - Produksjonsdato - Serienummer
 <p> Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde Germany RECARO Monza Nova Reha Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen <i>restraint system</i> <i>for special needs</i> S 15 – 50 kg 33.1 – 110.2 lbs   </p>	<p>Typeskilt</p> <p>Posisjon på produktet (Bilde 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsent - Produktnavn - Brukervekt - CE-merke - Følg bruksanvisningen

Henvisning

Generelle henvisninger

- Før første bruk må du lese bruksanvisningen nøye eller få den lest for deg hvis du har lesevansker. Hvis bruksanvisningen mangler, kan du laste den ned fra www.thomashilfen.de. Innholdet i den digitale bruksanvisningen kan vises forstørret.
- Kontroller om emballasjen er skadet og om produktet er i feilfri stand.
- Endringer på produktet er bare tillatt innenfor rammen av spesifiserte innstillingsmuligheter.
- Daglig rengjøring og pleie kan utføres av pårørende og pleiere. Vedlikehold og inspeksjon skal utføres av faghandelen.
- I noen land er det påbudt å bringe med seg en legeerklæring.
- Reha-bilsetet kan brukes på en av baksetene og på passasjeret foran. Bilsetet som er valgt, MÅ vende forover.
- Alle markeringer må bli på produktet og kan ikke manipuleres.

Sikkerhets henvisninger

- Kontroller om innstillingene for produktet fremdeles passer med brukerens aktuelle kroppsmål minst hver 3. måned. Få innstillingene justert av en faghandler/ortopeditekniker.
- Kontroller regelmessig (ukentlig) at innstillingsmulighetene for produktet fungerer.
- Ikke overbelast produktet, og ta hensyn til maksimal brukervekt eller maksimal bæreevne (se tekniske data).
- Brukeren må aldri være alene med produktet.
- Produktet skal bare brukes av én bruker i gangen. Det skal ikke plasseres andre personer i eller på produktet.
- Alle brukere må ha fått opplæring i produktets funksjoner. På denne måten kan brukeren fjernes raskt fra produktet i en nødsituasjon.
- La brukeren stige inn og ut av produktet uten tilsyn. Ved for stor belastning på fotstøtten er det fare for å skli eller velte.
- Brukeren skal alltid være posisjonert med 5-punkts-posisjoneringsbeltet (basisutstyr). Setet og brukeren må alltid være sikret med 3-punkts-sikkerhetsbeltet i bilen.
- Ved kraftig sollys og sterk varme kan det oppstå høye overflatetemperaturer på produktet. Da er det fare for skader ved berøring. Bruk produktet igjen først når det er tilstrekkelig avkjølt. Beskytt produktet mot direkte sollys.
- Følg sikkerhetsnormene som gjelder for bilen din for å garantere brukerens sikkerhet. Du finner dem i bruksanvisningen for bilen.
- Bruksanvisningen må oppbevares ved produktet.
- Dersom det mot formodning skulle oppstå en alvorlig hendelse med produktet, må du omgående melde fra om dette til vårt foretak og til ansvarlig myndighet.

Egner seg for en kroppsvekt på opptil 50 kg:

Bilsetet RECARO Monza Nova 2 Reha har på grunnlag av ECE R 44/04 kravene bestått en overbelastningstest utført av Dekra i Klettwitz (Tyskland). RECARO Monza Nova 2 Reha er dermed godkjent som setebelteinnretning for spesielle krav ("S").

Fastsetting av formål og brukssteder

Riktig bruk / Bruksområder

Reha-bilsetet RECARO Monza Nova 2 Reha er et medisinsk produkt i klasse 1.

Det er utformet for handicapvennlig transport og overholdelse av sikret sitteposisjon for barn i kjøretøyer. Setet sikres med bilens egne 3-punkts sikkerhetsbelte. 5-Punkts-beltet for Reha-bilsetet brukes til å posisjonere og støtte en rett sitteposisjon for barnet.

Reha-bilsetet gir ekstra hold ved sikre seter, stabiliserer hodet og gir ekstra feste rundt bekkenet samt en støtte for føtterne. I tillegg har produktet et omfattende tilbehør for individuell tilpasning.

All annen bruk er feil.

Indikasjon / Pasientmålgruppe, planlagte brukere

Reha-bilsetet brukes for barn med strukturelle og/eller funksjonelle begrensninger eller feil holdning i området ved hode og torso. Det sørger for en stabil og fysiologisk posisjonering når et vanlig barnesete ikke er tilstrekkelig for stabil sitteposisjon i bilen.

Risiko ved bruk og kontraindikasjoner

Ved riktig bruk kan risiko ved bruk utelukkes. Kontraindikasjoner er ikke kjent.

Produktbeskrivelse

Leveringsomfang

Produktet leveres forhåndsmontert i standardversjonen. Eventuelt bestilt tilbehør følger med produktet og må ettermonteres. Det følger en bruksanvisning med produktet.

Standardversjon

Sete og rygg med integrert 11-veis høydejusterbar hodestøtte; inkludert integrerte låsearmar for forankring av setet i Isofix-festepunktene til passende utstyrte kjøretøy; trinnløs nakkestøtte av hodestøtten med integrert luftpute i hodestøtten; Sidekollisjonsbeskyttelse gjennom energiabsorberende elementer; avtakbare hode-, thorax- og setesideputer; faste armlener; 5-punkts posisjoningsbelte; Belte skjold pads; flyttbar bortføringsblokk; integrert høyttaler i hodestøtte for mp3-spillertilkobling; mp3-spillerlomme på setet; RECARO luftsirkulasjonssystem for optimal luftsirkulasjon; ventilert støpt skum; avtagbare deksler

Igangkjøring

- Fjern transportsikringer og emballasje forsiktig.
- Pass på at barn ikke får tak i emballasjematerial og smådeler for å unngå fare for svelging og ev. kvelning.

Opplæring i bruk

Brukeren får opplæring i bruken av dette hjelpemiddelet av autorisert fagpersonale, som også benytter denne bruksanvisningen.

Fagrådgiveren skal montere setet i bilen sammen med brukeren, og setet skal stilles inn til målene for den aktuelle passasjerer.

Det må sørges for at brukeren har fått opplæring i alle funksjonene til produktet, samt montering og demontering i bilen.

Innstillingsmuligheter / Ytelseskarakteristikker

Fempunkts sikkerhetsbelte

Vær oppmerksom på følgende:

Fempunktsbeltet sørger for at barnet sitter ordentlig i setet, det beskytter ikke barnet ved en ulykke. For å sikre barnet som sitter i setet må det alltid brukes et trepunktsbelte som befinner seg i bilen. 5-punktsbeltet må ikke føres gjennom de røde beltestyrene på nakkestøtten. Disse er kun ment for 3-punktsbelte.

Endring av beltelengden:

Dra i de løse beltebåndene for å få en kortere beltelengde og strammere belte. For å forlenge beltet, trykk på utløserknappen for justeringspennen og trekk beltet til ønsket lengde.

I tillegg kan beltelengden ved behov forandres på seteryggen, ved hjelp av begge de fastskrudde beltefestene.

Bilde 3: Forandre beltets lengde

Beltets lukkemekanisme:

Trykk på den røde fordypningen i lukkemekanismen for å åpne denne. Skill deretter begge beltefestene fra hverandre. For å låse beltets lukkemekanisme fører du begge de øvre beltefestene sammen igjen, for så å stikke disse inn på lukkemekanismens overside. Deretter presser du til beltet låses, dvs. til du hører et "klikk".

Vennligst åpne også glidelåsen på det nedre beltepolsteret for å enkelt kunne fjerne trekket.

Bilde 4: Åpne beltets lukkemekanisme ("klikk")

Hodeputer

For å montere hodeputen i hodestøtten velges den høyeste posisjonen. Trekk trekket på puten over sidene på hodestøtten og fest det med en trykknapp øverst. På undersiden festes putene med et elastisk bånd til hodestøtten.

Bilde 5: Fest putene / Bilde 6: Festes under

Bilde 7: Festes over

Bryststøtte

Bryststøtten kan festes i ryggen ved hjelp av trykknapper og borrelås i tre forskjellige høyder. Begynn med å feste trykknappen.

Ved å trykke på de flecestripene som finnes i ryggpartiet oppnår du bedre feste.

Bilde 8: Trykknapp / Bilde 9: Borrelås

Sidestøtter på sete

For å montere sideputene legges rygglenet vannrett. Trekk trekkene til sideputene over sidedelene på sitteflaten og fest dem bak med trykknappen.

Bilde 10: Trekk over putene / Bilde 11: Trykknapp bak

Abuksjonsblokk

Abuksjonsblokken kan skyves innover. Den må først frigjøres fra skrittbeltet. Fjern sluttstykket på beltet fra den løse enden av skrittbeltet, trekk ut beltet fra glidespennen og fest. Dra abuksjonsblokken opp og bort fra skrittbeltet.

Trekk i glidespennen og fest på skrittbeltet igjen ved å feste den løse enden av beltet med endestykket. Plasser abuksjonsblokken ved hjelp av borrelåsen på setet.

For å kunne ta av trekket, må du først løsne abuksjonsblokken fra skrittbeltet slik det er beskrevet ovenfor.

Bilde 12: Endestykket på beltet / Bilde 13: Fjerne endestykket på beltet

Bilde 14: Trekke ut skyveblokken og lås / Bilde 15: Fjerne abuksjonsblokken

For de følgende innstillingsalternativene / ytelsesfunksjonene, se den separate RECARO Monza Nova 2-bruksanvisningen.

Seatfix-modell (Bilde 16)

Isofix er et internasjonalt, anerkjent festesystem for barneseter. I bilen finnes det tilsvarende Isofix-fester festet til karosseriet. Disse festene gjør det enkelt og raskt å feste et barnesete med Isofix. Setet er dermed også godt sikret uten barn, og det er ikke lenger nødvendig å feste setet med bilens 3-punkts sikkerhetsbelte. Husk å kontrollere om bilen din har Isofix-fester.

Sete og rygg med integrert 11-veis høydejusterbar nakkestøtte**Trinnløs nakkestøtte av nakkestøtten med integrert luftpute i nakkestøtten****Beskyttelse mot sidekollisjon****Faste armlener****Belteskjoldputer****Integrert høyttaler i nakkestøtte for tilkobling til mp3-spiller****Avtakbare deksler****Tilbehør**

Henvisning: Informasjon om montering finner du i den aktuelle bruksanvisningen som følger med tilbehøret. Hvis bruksanvisningen mangler, kan du laste den ned fra www.thomashilfen.de. Tilbehøret monteres/demonteres med vanlig verktøy.

Adapterplate (Bilde 17)

Adapterplaten er en forutsetning for bruk av videre tilbehør. Den plasseres foran på seteflaten for Reha-bilsetet.

Dreieplate med adapter (Bilde 18)

Med dreiefunksjonen kan Reha-bilsetet dreies mot døren på kjøretøyet. For pleieren letter dette overføringen av brukeren og tilgangen til 5-punkts-posisjoneringbeltet for setet. For brukeren blir det lettere å stige inn og ut selv. På adapteren kan det samtidig plasseres videre tilbehør foran på Reha-bilsetet.

Ryggstabilisator (Bilde 19)

Ryggstabilisatoren fester den bevegelige ryggen på Reha-setet. Når du bruker dreiefunksjonen, forhindrer du at bilseteryggen klapper ukontrollert bakover.

Seatfix-adapter (Bilde 20)

Med Seatfix-adapteren kan ISOFIX brukes i kjøretøyet, og dette øker Reha-bilsetets stabilitet. Denne ekstra stabiliseringen er spesielt nødvendig når det i tillegg brukes en dreiefunksjon (og/eller hellingsfunksjon). Seatfix-adapteren sikrer også setet i kjøretøyet når det er tomt.

Stabiliseringsbøyle (Bilde 21)

Stabiliseringsbøylene plasseres bak på Reha-bilsetet og skyves inn i spalten mellom seteflaten og seteryggen på kjøretøyet. Den er egnet når det ikke kan brukes ISOFIX. Denne ekstra stabiliseringen er spesielt nødvendig når det i tillegg brukes en dreiefunksjon (og/eller hellingsfunksjon).

Støttefot (Bilde 22)

Støttefoten sørger for stabilisering av Reha-bilsetet. Denne ekstra stabiliseringen er spesielt nødvendig når det i tillegg brukes en dreiefunksjon (og/eller hellingsfunksjon).

Settekile, nede (Bilde 23)

Settekilen (nede) legges på kjøretøyet under Reha-bilsetet for å lage en setekant. Helling av setet bakover brukes for barn med liten kroppsspenning og/eller svak hodekontroll.

Sittekilen plasseres sentrert under bilsetet. Den høye kanten skal være forrest for å gi barnet en optimal hvilestilling.

Pass på: Bruk av sittekile sammen med svingskiven fører til en betraktelig minskning av svingskivens funksjon. Vi anbefaler derfor ikke å bruke sittekile og svingskive samtidig.

Bilde 24: Sett setet oppå sittekilen / Bilde 25: Endeposisjon

Setekile, innvendig (Bilde 26)

Setekilen (innvendig) legges på seteflaten eller på den nedre delen av ryggen i Reha-bilsetet. Med denne kan brukers sitteposisjon endres raskt og variabelt, f.eks. for aktiv eller passiv sitteposisjon, redusert sittedybde eller en mer stabil sitteposisjon.

Setekilen (innvendig) kan festes i tre ulike posisjoner på seteflaten:

1. Du oppnår en aktiv sittestilling dersom setekilens høye side peker bakover.
2. Fest setekilen med den flate siden bakover dersom du ønsker en mer passiv og roligere sittestilling.
3. For å forkorte sittedybden eller for å få en større sittevinkel, kan setekilen også festes oppreist med den brede siden pekende nedover mot den bakre delen av seteflaten.

De to ytre polstringen som tilbyr ekstra beskyttelse festes på sidene med borrelås.

Bilde 27: Aktiv / Bilde 28: Passiv

Bilde 29: Rygg / Bilde 30: Med sidepolstring

Bord (Bilde 31)

Bordet plasseres foran brukers mage. Det gir brukeren stabilitet og sikkerhet, brukeren kan støtte seg på det og holde seg bedre oppreist. Som visuell sperre mot beltelåsen avleder den fra løsning, og brukeren kan bruke flaten aktivt.

Skyv bordet på setets to sidedeler. Bordet festes på begge sider med borrelåser. Dra bordets borrelåser gjennom plastringene på setet / seteryggen (bekkenbeltet).

Bilde 32: Fest bordet / Bilde 33: Fest borrelåsbeltene på setet

Belte med myk (Bilde 34)

Den myke beltepostringen beskytter brukeren i skulderområdet mot smertefullt press og belter som skjærer seg inn.

Belteforbinder (Bilde 35)

Med belteforbinderen forbindes skulderbeltene for Reha-bilsetet (beltelås). På denne måten forhindres det at beltene vrir seg eller sklir. Beltene ligger tett an mot kroppen til brukeren og forhindrer at brukeren kan sno seg ut av beltet.

Fotstøtte (Bilde 36)

Med fotstøtten sitter brukeren stabilt i Reha-bilsetet, da han/hun har god støtte for beina. Det forhindres at brukeren sklir ut av setet og ned på gulvet i kjøretøyet. Fotstøtten kan vippe opp for å lette inn- og utstigning. Med fotstøtten er det mulig å trene på egen innstigning i og utstigning av av setet.

Hvis det brukes en svingskive må fotstøtten festes i fotstøtteadapteren som tilhører denne. Sikre fotstøtten i dette tilfellet alltid med den stjerneskrue som er vedlagt bruksanvisningen for å unngå at den faller av. Festet til dette (metallblokk med gjenger) finner du på fotstøtteadapterens venstre rør.

For å stabilisere fotstøtten på fartøyets gulv tilpasser du høyden på støttestengene ved å vri innover eller utover, slik at stengene får bakkekontakt (med gulvet). Fest deretter støttestengene med stjernehandtakene, for å unngå at disse vrir seg ut utilsiktet. Dette gjøres ved å dreie stjernegrepskrueene så langt som mulig oppover, og ved å stramme dem ordentlig.

Legglengde: Tilpassing av legglengden gjøres ved å stille inn høyden på fotstøtten. Dette gjøres ved å løsne begge fingerskrueene, og ved å stramme disse tilstrekkelig igjen etterpå.

Fotvinkel: Fest de fire skrueene på fotstøttens underside (høyre og venstre side) for å kunne stille inn den ønskede fotvinkelen ved hjelp av skinnene. Til slutt må skrueene skrues fast igjen.

Vær oppmerksom på følgende: Fotstøtten kan ikke brukes sammen med setedybdeforlengelsen.

Bilde 37: Føre inn fotstøtte / Bilde 38: Lås

Bilde 39: Høydejustering kjøretøy

Setedybdeforlengelse (Bilde 40)

Med setedybdeforlengelsen forstørres seteflaten for Reha-bilsetet. Lange lår hos større brukere er bedre beskyttet for en stabil sitteposisjon.

Hvis det brukes en svingskive må sittedybdeforlengeren festes i fotstøtteadapteren som tilhører denne. Sikre sittedybdeforlengeren i dette tilfellet alltid med den stjerneskruen som er vedlagt bruksanvisningen for å unngå at den faller av. Festet til dette (metallblokk med gjenger) finner du på fotstøtteadapterens venstre rør.

Vær oppmerksom på følgende: Setedybdeforlengelsen kan ikke brukes sammen med fotstøtten.

Bilde 41: Føre inn sittedybdeforlengeren / Bilde 42: Lås

Fluktsikre vester (Bilde 43)

De fluktsikre vestene forhindrer at barnet kan vri seg ut av bilsetet. Farlige åpninger mellom beltet og barnet, som barnet ellers bruker for skyve beltet fra skuldrene, dekkes til.

Bilsetebeskyttelse med rygg (Bilde 44)

Bilsetebeskyttelsen ligger under barnesetet på kjøretøysetet og seteryggen. Den beskytter seteflaten og seteryggen mot skader. I de fremre lommene kan det oppbevares små gjenstander.

Tekniske data

RECARO Monza Nova 2 Reha

Setedybde	30 cm
med setedybdeforlengelseg	43 cm
Setebredde foran	29 cm
Baksetebredde (med setekile, innvendig)	24 cm (20 cm)
Rygghøyde (sete)	60 - 77 cm
Skulderhøyde (belteføring)	33 - 48 cm
Nedre benlengde (fotstøtte på dreieplate)	23 - 42 cm
Totale dimensjoner (B x H x D)	54 x 66 x 42 cm
Vekt på setet	7 kg
Brukervekt	15 - 50 kg

Materialinformasjon

Polstring: Polyester - Trevira CS / 100% Polyester - RECARO Prime

Polstringsmaterialet er "tungt antennelig", testet iht. DIN EN 1021-1 og DIN EN 1021-2.

Omfanget av mostandsdyktigheten mot antenning ved materialer og komponentgrupper ble testet iht. normer, og vurdert som ufarlig.

Stoffet av 100 % Trevira CS / RECARO Prime er et pusteaktivt stoff av høy kvalitet, og er har positivt for biokompatibilitet. (DIN EN ISO 10993-5 og 10993-10 Trevira CS sort)

Rengjøring, ettersyn og reparasjon

Rengjøring, pleiehenvvisninger og desinfisering i hverdagen

Polstring

Polstringene kan lett tas av i få håndvendinger, og kan vaskes separat. De består av et stofftrekk og ev. innlegg av skumstoff. Kontroller om polstringen har glidelås eller borrelås. Hvis ja, åpner du polstringen og tar ut skumstoffinnlegget før vask. Ta også hensyn til følgende pleiehenvvisninger.

RECARO Prime:



Trevira CS:



Vi viser til at også stoffer av høy kvalitet kan blekes ved langvarig og intenst sollys eller hyppig vasking.

Borrelås

For å opprettholde borrelåsenes funksjon må de av og til børstes av med en børste. Under vask må borrelåsene alltid låses eller dekkes til.

Kunststoffdeler

Kunststoffdeler på produktet kan rengjøres og desinfiseres med vanlig såpe (nøytral såpe).

Metalldeler

Metalldeler på produktet kan rengjøres og desinfiseres med vanlig såpe (nøytral såpe).

Desinfisering

Før desinfisering må du rengjøre polstringer, kunststoffdeler og metalldeler.

Tørk av alle kunststoff- og metalldeler på produktet med en klut fuktet med desinfeksjonsmiddel. Det skal kun brukes vannbaserte midler. Ved desinfisering må du følge bruksinformasjonen fra den aktuelle produsenten. Polstringer og trekk må desinfiseres før hver ny bruk.

Vedlikehold og inspeksjon utført av faghandelen

Forberedelse

Det må følge en bruksanvisning med produktet. Dersom denne mangler, må du bestille den fra produsenten. Gjør deg kjent med produktets funksjoner. Hvis du ikke kjenner produktet, må du lese bruksanvisningen før kontrollen. Rengjør produktet før kontrollen påbegynnes. Følg pleiehenvvisningene og de produktspesifikke kontrollinstruksjonene i bruksanvisningen. Ved videre spørsmål kontakter du en utdannet fagrådgiver eller Thomashilfen direkte.

Service og reparasjon på produktet skal kun utføres av fagpersonale. Brukeren av dette produktet må passe på at foreskrevne inspeksjoner og foreskrevet vedlikehold utføres regelmessig og til riktig tid. Dersom det oppdages skader, må brukeren informere aktivt og få skaden utbedret omgående av fagpersonale.

Vedlikeholdsplan – Årlig inspeksjon

	Område	Funksjon	Skade	Skift ut
1	Kunststoffmateriale	👁	👁	
2	Reguleringsmuligheter	👁	👁	
3	Polstring		👁	
4	Belter	👁	👁	
5	Kunststoffdeler	👁	👁	
6	Skruer og muttere	👁	👁	
7	Markeringer		👁	
Utstyr				
8	Polstring		👁	
9	Belter	👁	👁	
10	Reguleringsmuligheter	👁	👁	
11	Kunststoffdeler	👁	👁	
12	Metalldeler	👁	👁	
13	Skruer og muttere	👁	👁	
utført av:			den:	
👁 = Inspeksjon ✓ = Kontroll utført				

Reservedeler

Til reparasjoner skal det kun brukes originale reservedeler. En liste over reservedeler finner du på internett på www.thomashilfen.de. For å få riktige reservedeler eller for mulige tekniske tilbakekallinger trenger i prinsippet at du oppgir serienummeret / UDI-PI og nøyaktig UDI-DI.

Demontering/montering av reservedeler skal i prinsippet kun utføres av fagpersonale! Ved nødvendige returer må du passe på at produktet pakkes trafiksikkert.

Lagring

Oppbevar produktet på et sikkert sted når det ikke brukes. Ikke sett eller legg tunge gjenstander på produktet når det lagres. Beskytt produktet mot værforhold slik som regn, kraftig sollys og frost. Hvis produktet er vått, må du tørke av metall- og kunststoffdeler og tørke polstringer før du lagrer produktet.

Kassering

Hvis produktet er i en slik stand at det ikke lenger kan brukes eller det har nådd slutten av levetiden, kan det resirkuleres hos det lokale gjenvinningsforetaket. Følg lokale bestemmelser om resirkulering og kassering.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette, med enevansvar, at dette produktet og ev. varianter og tilbehør stemmer overens med grunnleggende bestemmelser. En aktuell EU-samsvarserklæring kan lastes ned fra internett på www.thomashilfen.de eller bestilles direkte fra oss.

Garanti

Thomashilfen gir 2 års lovfestet garanti på dette produktet. Garantitiden begynner å løpe på tidspunktet for overlevering av varen. Garantien omfatter alle krav som påvirker funksjoner. Unntak er skader som oppstår på grunn av feil bruk (f.eks. overbelastning) og naturlig slitasje.



Brukstid

Produktet har en brukstid på opp til 6 år ved riktig og regelmessig vedlikehold på grunnlag av opplysninger fra produsenten. Produktet kan brukes utover dette tidsrommet hvis det er i sikker og teknisk feilfri stand.

Den teoretiske brukstiden er ingen garantert brukstid. Den avhenger av brukshyppigheten og er alltid underlagt enkeltkontroller av utført av faghandelen.

Brukstiden ender før oppgitt tidsrom hvis brukeren har nådd maksimal kroppsvekt eller kroppsstørrelse for sikker bruk av produktet.

Brukstiden gjelder ikke for slidedeler som polstringer, trekk osv.

Levetid

Produktet har en levetid på 8 år hvis forutsetningene som er oppgitt for brukstid er oppfylt. Levetiden er sammensatt av brukstid og lagringstid.

Ny bruk

Dette produktet er ikke egnet for ny bruk. Ved teoretisk brukerskift kan det ikke garanteres at barneseter fungerer som de skal. Det kan ikke finnes synlige skader på produktet som utelukker videre, sikker bruk. Kjøp og salg av brukte barneseter utelukkes derfor av produsenten.

Forhandlere



Hjelpemiddelspecialisten as

Rosenholmveien 22

1252 Oslo

Phone: +47-40626847

jorgen@hm-spes.no

www.hm-spes.no









Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de