



**Bruksanvisning**  
Puls NAV trykkfordelende madrass

**BANO LIFE**



## GRATULERER

-med valget av en Puls NAV madrass.

Madrassen er utviklet for å gi trykkavlastning til personer som risikerer å utvikle trykksår.

Skulle det mot formodning oppstå problemer med produktet, vennligst kontakt Bano Life AS på 64 91 80 60 eller e-post: [post@banolife.com](mailto:post@banolife.com)

### Kvalitet

I utviklingen av disse madrassene har vi lagt vekt på å lage madrasser med høy liggekomfort og lang brukstid.

Vi har i tillegg hatt fokus på miljø og det å bruke materialer som tilfredsstillir dagens strengeste krav. Alle innsatsvarer er testet i henhold til gjeldende normer, Norsk Standard.

Alle produktene følger garantibestemmelsene i Norsk kjøpslov.

Alle våre madrasser er CE-merket.

Alle madrasser er testet og sertifisert mot brannkravene

NS-EN 597-1 (Ulmende sigarett) og NS-EN 597-2 (flammetest).

### Produktbeskrivelse

Puls NAV madrasser er spesielt utviklet med tanke på trykksårforebygging (antidekubitus).

Ved at kroppsvekten fordeles minsker man risikoen for trykksår på spesielt utsatte steder.

Madrassene er trykktestet og har meget gode antidekubitus-egenskaper.

Anbefales til alle brukergrupper.

Puls NAV: Maksimum brukervekt 120 kg

Puls NAV XL: Maksimum brukervekt 185 kg

## Bruks-/monteringsanvisning

Fjern all emballasje før du tar produktet i bruk.

Madrassen er vendbar.

Madrassen er rullkomprimert for å lette håndtering og transport.

Dette forringer ikke madrassens kvalitet eller levetid.

Det vil derfor ta et døgnns tid etter åpning før den oppnår sin opprinnelige form og mål.

Det anbefales at madrassene benyttes med trekk. Dette beskytter skummet og forlenger både madrassens yteevne og levetid.

Trekket er elastisk og gir brukeren økt komfort samt øker skumkjernens yteevne.

For å oppnå best mulig effekt av madrassen, anbefaler vi at det ikke brukes mer enn et vanlig laken.

Lakenet bør ligge "løst" på madrassen.

## Vedlikehold

Sjekk madrassen regelmessig. Hvis trekket blir ødelagt, bør ikke madrassen brukes før man legger på nytt trekk.

Når trekk legges på madrassen, sørg da for at hjørnene på madrassen passer i trekkets hjørner.

Bomullstrekk har glidelås på én side, og inkontinensstrekk har glidelås på tre sider.

## Ettersyn

Vi anbefaler at madrassen vendes med jevne mellomrom.

Selv om madrassen har trykksårforebyggende egenskaper er det fortsatt viktig at brukeren flyttes regelmessig hvis han/hun ikke er i stand til å flytte seg selv. Dette hjelper på trykkavlastningen og forebygger trykksår.

## Rengjøring trekk

Trekket kan vaskes på 60°C

Trekket skal være tørt før det legges på igjen. Må ikke tørkes i tørketrommel

## Rengjøring skumkjerne

Skummet kan vaskes på 60 °C, dog anbefaler vi en skånsom vask.

Drypptørres.

Sørg for at skummet er helt tørt før trekket legges på igjen.

-Lykke til med din Puls NAV madrass!!





# BANO LIFE

## **Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!**

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life  
Berghagan 7, 1405 Langhus  
post@banolife.com  
tlf. 64 91 80 60

**banolife.no**