

TV SoundBox - Trådløs TV høyttaler

Brukerveiledning




Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar TV SoundBox i bruk og spar den for fremtidig bruk. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt utleveringsstedet.

VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSJONER


Vennligst les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk TV SoundBox.

- Sørg for å holde anlegget tørt. Må ikke dyppes i vann.
- For din egen sikkerhet, ikke forsøk å åpne enheten eller batterikammeret. Forsøker du å åpne batterikammeret, vil produktgarantien ikke lenger være gyldig.
- TV SoundBox bruker litium ion batterier. Vær oppmerksom på bruk og håndteringsregler for litium ion batterier. Vennligst kast enheten/ brukte batterier i henholdt til lokale regler for spesialavfall. Kast ikke enheten/brukte batterier i husholdningsavfallet. Må heller ikke brennes. Ta utstyret med til nærmeste gjenvinningscenter.
- Ikke ta ut strømtilkoblingen ved å dra i ledningen, ta tak i støpselet. Strømtilkoblingen skal kobles fra når enheten ikke er i bruk og før vedlikehold eller rengjøring. Ikke bruk en enhet som har ødelagt ledning, støpsel, eller som ikke fungerer ordentlig. Lever enheten til utleveringsstedet for reparasjon eller retur.
- Produktet er kun beregnet for hjemme- og personlig bruk

PAKKEN INNEHOLDER

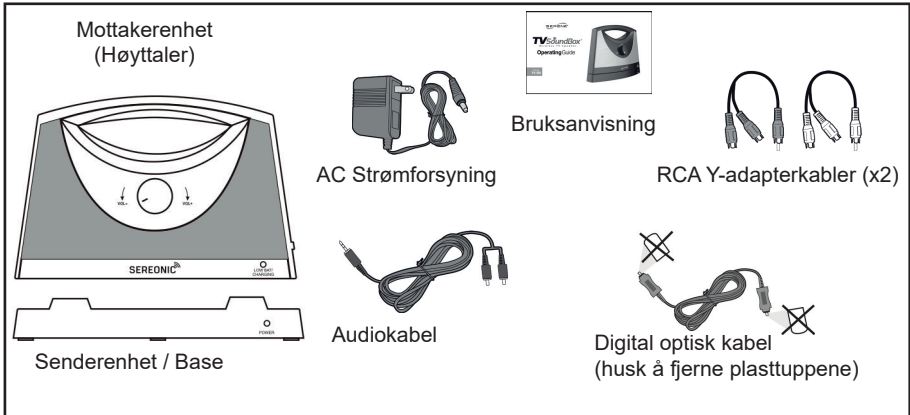


HOVEDFUNKSJONER

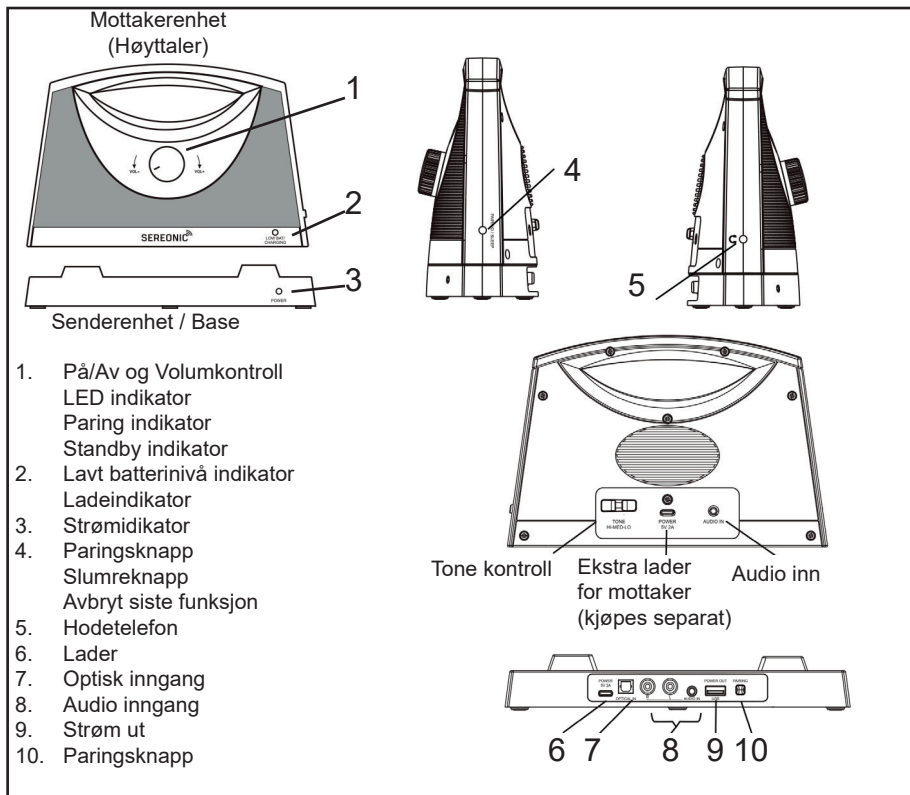

TILKOBLINGER

For TV med audioutgang


Hvis ditt TV har audioutgang (se på baksiden av TV) koble senderenheten til ditt TV som vist nedenfor

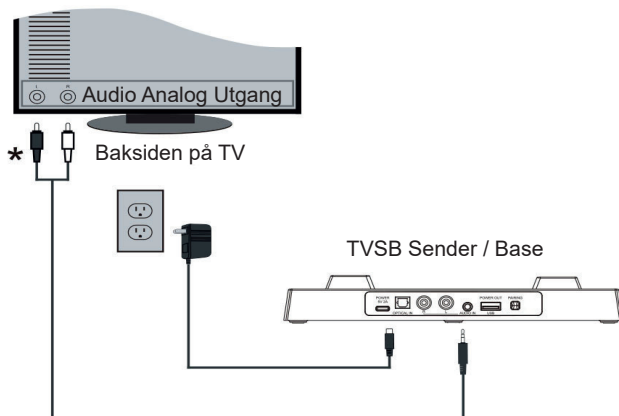

* Hvis Audio utgangene på TV er opptatt av en annen enhet, bruk Y adapterkablene (se side 2).

For TV med hodetelefonutgang

Hvis ditt TV ikke har audio analog utgang men har hodetelefonutgang, koble senderenheten til ditt TV som vist nedenfor.

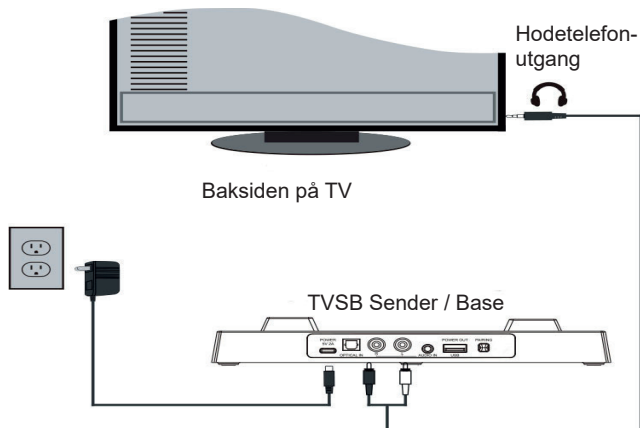


For TV med Digital Optisk Utgang

Hvis din TV har digital optisk utgang, koble til som vist på tegningen.

HUSK: Nyere TV-apparater fungerer både med Dolby og PCM


TV SoundBox fungerer **kun med PCM** audio format

(endringen gjøres i TV-apparatets oppsett meny)

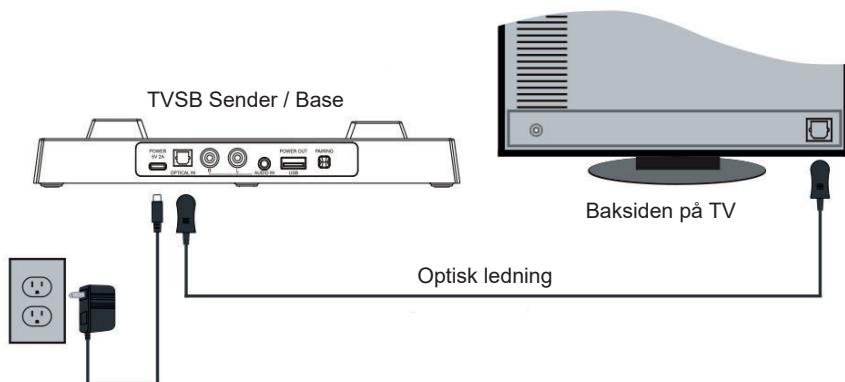

Tilkobling via satellitt- / kabelboks, Blu-Ray spiller, spillekonsol


Man kan også koble TVSB via satellitt-, kabelboks, Blu-Ray spiller eller spillkonsoll når TV ikke har audio analog utgang.

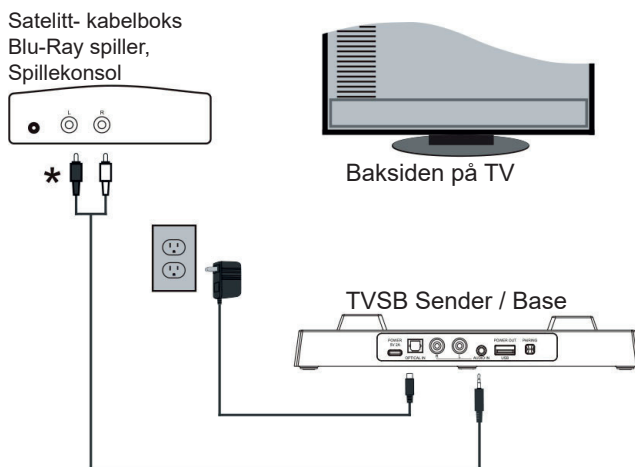

* Hvis Audio utgangene på TV er opptatt av en annen enhet, bruk Y adapterkablene (se side 2).

LADING AV BATTERI

- Plasser mottakerenheten på senderenheten som illustrert for ladning i minst 4 timer for første bruk.
- Under ladningen vil lavt batteri/ladeindikatoren blinke. Når fullt oppladet vil indikatoren stoppe å blinke og lyse konstant.
Et fullt oppladet batteri gir opptil 10 timer lyttetid ved 50 lydstyrke.
- Når mottakeren ikke er i bruk, eller lavt batteri indikatoren blinker, plasser mottakerenheten på senderenheten for ladning


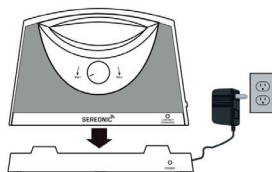


EKSTRA MOTTAKERENHETER

Opptil 10 mottakerenheter kan kobles til samme senderenhet.

Hver ny mottakerenhet må 'pares' med senderenheten på følgende måte:

1. Slå på ny mottaker.
2. Trykk og hold inne paringknappen på siden av mottakerenheten inntil lyset rundt styrkekontroll begynner å blinke.
3. Trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av senderenheten i minst 5 sekunder. Strømindikatoren vil starte å blinke. Tilkoblingen kan ta opp til 3 minutter.
4. Når enhetene er paret vil lyset rundt styrkekontrollen slutte å blinke og du vil høre lyd fra den nye høyttaleren.

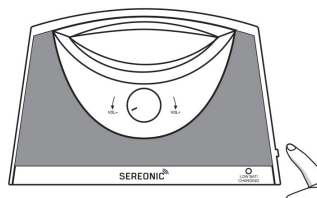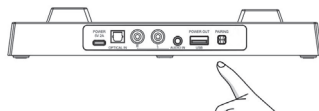

BRUK

På/Av, Volum og Tonekontroll

1. Skru på knappen for å slå mottakeren på eller av og for å justere lydstyrken. Lyset rundt styrkekontroll blir tent.
2. Du kan skru lyden på TV lavt eller helt av. På noen TVer er det mulig at du må bruke fjernkontrollen for å åpne menyen for så å velge innstillinger som gir optimal lyd/høytaler effekt. Vennligst sjekk bruksanvisningen for TV for mer informasjon.
3. For optimal batteribruk vil mottakerenheten automatisk skru seg av når den ikke har fått signaler fra baseenheten (etter at TV er skrudd av) for mer enn to minutter. For å skru mottakerenheten på igjen, skru volumknappen av og deretter på igjen. Senderenheten vil gå inn i hvilemodus når TV er slått av og lysringen slukkes.
4. Juster tonekontrollen slik at du best hører og forstår tale.



Tonekontroll

Plassering av Senderenheten

Plasser senderenheten ved siden av TV-apparatet.



MOTTAKERENS TIDSUR (NY FUNKSJON)

TVSB er forsynt med en 1 timers tidsur. Denne funksjonen går ut på at høyttaleren reduserer gradvis lydstyrken på høyttaleren så du kan søvne; etter 1 time slår høyttaleren seg av automatisk.

Slå på tidsuret


1. Trykk på SLEEP knappen en gang for å aktivere funksjonen. Ringen rundt styrkekontrollhjulet begynner å blinke.
2. Lydstyrken på høyttaleren vil bli redusert gradvis for å hjelpe deg å søvne.
3. Høyttaleren blir slått av automatisk etter en time
4. For å få lyden tilbake etter en time, slå av høyttaleren helt og så slå på den igjen på vanlig måte.

Slå av tidsuret

1. Man kan kun slå av tidsuret etter at den har blitt aktivert.
2. Trykk på SLEEP knappen en gang for å deaktivere tidsuret. Ringen rundt styrkekontrollhjulet vil slutte å blinke.


BRUK AV HODETELEFON ELLER HALSSLYNGE

Plugg inn hodetelefonen/halsslyngen. Lyd vil nå ikke lenger komme via høyttaleren, bare hodetelefonen/halsslyngen. Juster lydstyrken med volumkontrollen på mottakerenheten.

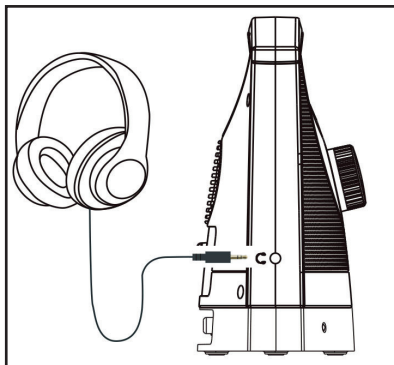

BRUK AV MOTTAKERENHETEN SOM FRITTSTÅENDE HØYTTALER

Plugg inn mobiltelefon, musikkspiller, radio eller annet via audioinngangen som vist på tegningen. Husk, sett styrken til maksimalt nivå på tilkoblet enhet.

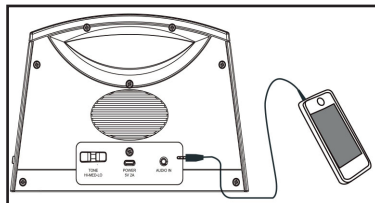


Baksiden på mottakeren

ALTERNATIV STRØMFORSYNING FOR MOTTAKERENHETEN

Kjøp en ekstra AC strømforsyning (bruk bare strømforsyning laget for TV SoundBox) og plugg den inn som vist på bildet.

Nå trenger du ikke lenger å flytte mottakerenheten for ladning.

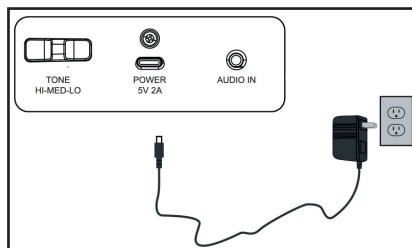

FEILSØKING OG TILTAK

Det kommer ikke lyd fra mottakerenheten: Sjekk at alle ledninger og tilkoblinger på senderenheten og TV. Pass også på at mottakerenheten ikke er mer enn 30 meter fra senderenheten.

Det kommer lyd fra TV høyttaleren men ikke fra mottakerenheten: Sjekk lydinnstillingen på TV via menyen ved å bruke fjernkontrollen. Påse at innstillingene er slik at TV sender lydsignaler til senderenheten.

Svakt batteri/ladeindikatoren på mottakerenheten blinker: Dette betyr at batteriet må lades. Plasser enheten på senderenheten for ladning. Etter 3 timer er enheten fullt ladet og blinkingen skal stoppe. Hvis blinkingen ikke stopper, sjekk om mottakerenheten står riktig plassert på senderenheten.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Ta ut AC strømforsyningen fra kontakten. Bruk så en tørr, myk klut til å fjerne støv fra enhetene. TV SoundBox må ikke dyppes i vann.

GARANTI OG SERVICE

Det gis 2 års garanti på tekniske feil fra kjøpsdatoen. Ta kontakt med utleveringsstedet ved feil og servicebehov.

SPESIFIKASJONER

Sender	: 2.4 GHz Radiofrekvens (smart code)
Høytaler	: 2x5W Klasse D
Frekvensrespons	: 20 Hz - 20 kHz
Høytalerbatteri	: Innebygget Lithium Ion batteri, 1 x 18650
Digital optisk kabel	: TOSLINK standard type
Audio format support	: LPCM 44kHz, 96kHz
Rekkevidde	: 30 meter i åpent område
AC Strømforsyning	: Inn 100-240VAC/50-60Hz, Ut 5VDC/2000 mA
Lyttetid	: Opptil 10 timer ved 50% lydstyrke og fullt oppladet
Mål	: 24 x 17 x 8 cm
Vekt	: 800 gram



A BELLMAN & SYMFON COMPANY

Aurismed AS

Postboks 294, 3201 Sandefjord, Norge

Tel: +47 33 42 72 50, Faks: +47 33 42 72 51

Epost: info@aurismed.no

Web: www.aurismed.no