





# Monteringsveiledning

## ProCare Auto/ProCare 3 Auto



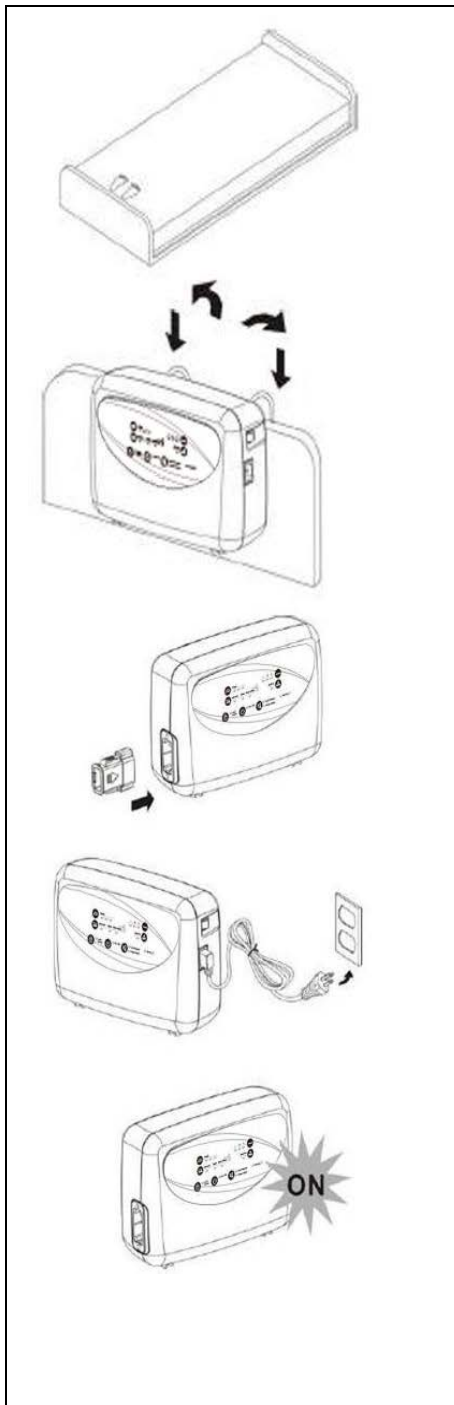

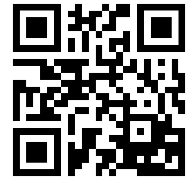


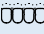




1. Plasser madrassen på sengebunnen. Fest madrassen til de *bevegelige* delene av sengeflaten. Vær oppmerksom på korrekt plassering av fotende, (se fot merket).  
*OBS: PoCare 3 Auto plasseres ovenpå skummadrass.*
2. Heng pumpen på sengegavlen (fotenden), eller plasser pumpen på et fast, rett underlag.
3. Sett slangene fra madrassen i pumpen. Når det høres et klikk, er slangen korrekt festet.
4. Fest ledningen i oppheng på siden av madrassen. Sett støpselet i stikkontakten og slå på.
5. Slå på pumpen både på hovedbryteren på siden av pumpen og på "power" knappen  foran på pumpen
6. Sjekk at CPR-ventilen på siden av madrassen, i hodeenden, er dreid til "close".  
Vent ca 20-30 minutter og madrassen er fylt med luft og klar til bruk
7. Trykk på AUTO knappen  - når pasienten ligger på madrassen. Trykket innstilles automatisk etter pasientens vekt, velg så behandlingsmodus (se quickguide)








## Quickguide

### ProCare Auto/ProCare 3 Auto

 <b>Power</b>	Slå pumpen Av/På
 <b>Lock/unlock - Låsefunksjon</b>	Når den grønne diode lyser er panelet låst. For å låse/låse opp, trykk på Lock/Unlock i 5 sek. til det grønne lys tenner/slukker. Panelet låses når det ikke har vært i bruk på 3 min.
 <b>Max Firm</b>	Funksjonen benyttes ved pleie/mobilisering. Madrassen blir hard/statisk. Slås automatisk av etter 20 minutter og vender tilbake til forrige innstilling. Funksjonen kan også slås av manuelt ved å Max Firm knappen igjen.
 <b>Trykindstilling</b>	Justere trykket i madrassen basert på pasientens vekt – trykk for rejustering ved ny pasient – når det kun er ett lys er trykket innstilt.
 <b>Tuning - Komfortinnstilling</b>	"0" er det trykk systemet automatisk finner. "+" er et litt høyere trykk = fastere madrass. "-" er et litt lavere trykk = bløtere madrass.
 <b>Terapi-valg</b>	<p> <b>Alternate:</b> Dynamisk funksjon. Systemet vil vekse trykket i cellene hvert 10. minutt.</p> <p> <b>Static:</b> Statisk funksjon. Madrassen er stillestående med samme trykk i alle celler.</p> <p> <b>Seat Inflation:</b> Sittefunksjon gir pasienten ytterligere støtte i sittende stilling (f.eks. spisesituasjoner).</p>
 <b>Alarm</b>	Ved trykk på alarmknappen, gjøres alarmer lydløse.

# Alarmer

## ProCare Auto/ProCare 3 Auto

<b>Low pressure</b> Lavt trykk	Low pressure lampe lyser ut for symbolet: 
<b>Årsak</b>	CPR-ventilen kan være utløst/dreiet eller det er en lekkasje i madrassen.
<b>Løsning</b>	Lukk CPR-ventilen eller sjekk mulig lekkasje i madrass eller utetthet i celle/luftslange. Sjekk at slangene er satt ordentlig fast inn i pumpen. Kontakt servicepersonell hvis problemet ikke kan løses.
<b>Power failure</b> Strømsvikt	Power failure lampe lyser ut for symbolet: 
<b>Årsak</b>	Feil i strømforsyningen, strømmen er slått av, ledningen er frakoblet eller, pumpen er slått av.
<b>Løsning</b>	Sett ledningen i stikkontakten eller pumpen. Kontroller at at pumpen er påslått.
<b>Service</b> Tid for serviceettersyn	Lampe lyser ut for  ved  symbolet
<b>Årsak</b>	Tilstoppet filter eller slitt pumpemembran.
<b>Løsning</b>	Kontakt servicetekniker for hjelp, eller kontakt leverandør.
<b>NØDSITUASJON</b> <b>HJERTESTOPP, CPR</b>	 Den røde CPR-ventil finnes på siden av madrassen i hodeenden.
<b>Løsning</b>	CPR-ventilen dreies, så luften tømmes hurtigt ut av madrassen. Slangene kan også frakobles pumpen for å tømme madrassen hurtig for luft.