

BRUKERMANUAL

Krykker fra Ossenberg

modell 220D/220DS-S10/230/241/320/321/332



BRUKERMANUAL

220D/220DS-S10/230/241/320/321/332

OBS! Les instruksjonene nøye før krykken tas i bruk.

FORMÅL

Albuekrykker er et hjelpemiddel for personer med nedsatt gå- og/eller ståfunksjon og skal ikke brukes til annet formål. Krykkene kan brukes både inne og ute.

Enkel høydejustering, høy materialkvalitet og refleks foran og bak sikrer økt sikkerhet og brukervennlighet.

Mellom rørene sitter en plastring som sikrer klikkfri gange på krykken. Materialet i underarmstøtten består av 15 % glassfiber som gjør plastdelen mer fleksibel ved temperaturforandringer samt minsker ubekvem trykk om brukeren har bredere underarmer eller tykkere klær som for eksempel vinterklær.

Doppskoene er produsert i naturgummi for et bedre grep og har et metallinnlegg slik at den blir mer slitesterk. Utprøving skal foregå i samråd med personer som har kunnskap om produktet og egenskapene det innehar.

Feil innstilt krykke kan føre til feilbelastninger og i verste fall være en sikkerhetsrisiko og føre til fall/skader.

For rett bruk av krykken skal den individuelt høydejusteres til brukeren av kvalifisert personell. Krykken justeres på følgende måte: Trykk in knappen som låser begge rørene, dra juster rørene til ønsket lengde. Lås deretter rørene igjen ved å matche høydejusteringshullene og se til at låseknappen ”knepper” på plass igjen.



OBS! Kontroller at begge rørene er låste og at trykknappen er på plass gjennom å dra og vri på begge rørene!

BRUKERMANUAL 220D/220DS-S10/230/241/320/321/332

Generell produktinformasjon

- Tåler høy brukervekt. OBS! Se maks. brukervekt innprentet på hver krykke.
- Produsert i materialer med høy kvalitet.
- Refleks foran og bak for økt sikkerhet.
- Doppsko med metallinnlegg for økt levetid og holdbarhet.
- Individuelt justerbare for tilpasning til de aller fleste brukere.
- Enkelt eller dobbelt justerbar med trykknapp eller klips.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hold krykken nær kroppen og så rett ned mot bakken som mulig.
- Det er ikke anbefalt å henge vesker, bager, poser, etc. på krykkene (fig. D).
- Det er ikke tillatt å gjøre mekaniske forandringer på krykkene. Det vil medføre fare for sikkerheten.
- Kun originale reservedeler/tilbehør skal benyttes.
- Godt underlag er essensielt for friksjonen mellom krykken og underlaget.
- Justeringshullene for høydejusteringen kan over tid bli utsatt for slitasje. Se til at disse ikke er slitte eller skadet.
- Krykkene kan kun bli brukt etter produsentens instruksjoner.
- Aldri overgå produktets maks brukervekt som er spesifisert på produktet.
- Skadede eller bøyd krykker skal ikke brukes.
- Bøyd krykke skal ikke bli forsøkt rettet ut, da de kan ha fått skade på konstruksjonen.
- Alle fester/skruer må sitte forsvarlig festet. Dette skal undersøkes før hver bruk av krykken.
- Doppskoen til krykken skal ikke bli for slitt. Da skal den byttes ut. Slitte doppsko reduserer sikkerheten.
- Ved synlige skader skal ikke krykken benyttes. Kontakt stedet der du fikk utlevert/kjøpt krykken.



Fig. D

BRUKERMANUAL 220D/220DS-S10/230/241/320/321/332

Lagring og vedlikehold

- Krykkene skal ikke utsettes for sterk varme, f.eks. inntil piper, ovner og lignende.
- Bytt ut slidedeler ved behov.
- Om krykkene ikke har vært benyttet på lenge, skal de undersøkes av kvalifisert personell før bruk.
- Det anbefales ikke å lagre krykkene mer enn 2 år.

ADVARSEL

- Aldri rengjør krykkene med oljebasert middel. Det oppstår fare for å gli og miste grepet.
- Ved behov, rengjør krykkene med et mildt rengjøringsmiddel og tørk av smuss og støv.

Merk

- Om bruk av desinfeksjon er nødvendig, bruk et passende desinfeksjonsmiddel. Se produsentens spesifikasjoner på www.ossenberg.com.

Produsent



Ossenberg GmbH

Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79

48432 Rheine
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0

Fax +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com

E-Mail info@ossenberg.com

From us you will receive only products in accordance with the guidelines of the Medicine Devices Act.
Of course, we are certified according to DIN EN ISO 13485 & 9001.



Distributør

Mediq Norge AS

Postboks 6608, Etterstad, 0607 Oslo
www.mediqnorge.no | T 67 02 43 00

