





6) Trykk på **VENSTRE FUNKSJONSTAST**  for å lagre.

## TALE-funksjonen

Du kan velge å aktivere eller deaktivere funksjonen Talende sifre

**Aktiver:** Denne funksjonen aktiverer sifferhjulet.

1) Trykk på **VENSTRE FUNKSJONSTAST**  og ▼/▲ for å velge

**TALESIFRE.**

2) Trykk på **VENSTRE FUNKSJONSTAST**  og ▼/▲ for å velge

**PA** eller **AV.**

3) Trykk på **VENSTRE FUNKSJONSTAST**  for å lagre.

## TEKNSIKE SPESIFIKASJONER

Grunnleggende informasjon	
Gyldig rekkevidde	Innendørs: 50m / Utendørs: 300m
Håndsettets driftstid	Standby-tid: 100 timer Taletid: Ca. 10 timer.
RF-parameter	
Frekvens	1,88 GHz til 1,9 GHz
Nb-kanaler	10
Strømforsyning	
Bunn	Inngangeffekt 100-240V 50/60Hz; Utgangseffekt 6V; 600mA adapter
Lader	Inngangeffekt 100-240V 50/60Hz; Utgangseffekt 6V; 450 mA adapter
Håndsett	3 oppladbare AAA 1,2V/600mAh batterier

## VEDLIKEHOLD

Rengjør husets overflate med en myk og lofri klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler.

## GARANI

Fra det øyeblikk du kjøper Geemarc-produktet, gjelder Geemarc-garantien i to år. I denne tidsperioden vil alt reparasjonsarbeid og bytte av produktet (etter vårt forgodtbefinnende) være gratis. Hvis du opplever et problem, kan du kontakte hjelpetelefonen vår eller gå til nettstedet **www.geemarc.com**.

Garantien dekker ikke ulykker, uaktsomhet eller brudd på deler. Produktet må ikke tukles med eller tas fra hverandre av andre enn autoriserte Geemarc-representanter.

Geemarcs garanti begrenser på ingen måte dine juridiske rettigheter.

**VIKTIG:** KVITTERINGEN UTGJØR EN DEL AV GARANTIEEN OG MÅ BEHLODES OG FREMVISES I HVIS DET FREMSETTES GARANTIKRAV.

**Merk:** Garantien gjelder bare i Storbritannia.



## Erklæringer:

### CE-direktiver

Geemarc Telecom SA erklærer herved at dette produktet samsvarer med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i EUs direktiv for radio- og telekommunikasjonsutstyr 2014/53/UE.

*CE-samsvarserklæringen finner du på **www.geemarc.com***

**Elektrisk kobling:** Dette apparatet er laget for å brukes utelukkende med en strømtilførsel på 230V 50Hz. (Klassifisert som farlig spenning iht. EN60950-standarden). Apparatet er ikke utstyrt med strømbryter. Slå av apparatet ved å trekke ut strømadapteren. Når du installerer apparatet, må du sikre at stikkkontakten er lett tilgjengelig.

**Telefonforbindelse:** Spenningene i telenettet er klassifisert som TNV-3 (nettverksspenning for telekommunikasjon) i henhold til EN60950-standarden.

## Gjenvinningsdirektiv

WEEE (EUs forskrifter for EE-avfall) er tatt i bruk for produktene for at de skal gjenvinnes på best måte ved slutten av levetiden.

Når du er ferdig med produktet, skal det ikke kastes i husholdningsavfallet. Bruk et av disse avhendingsalternativene:

- Ta ut batteriene og legg dem i en egnet EE-container.

Avhende produktene i en egnet EE-container.

- Eller gi det gamle produktet til forhandleren. Hvis du kjøper en ny, bør de godta det.

Hvis du respekterer disse anvisningene, bidrar du til å sikre miljøet og menneskers helse.



Du finner produktstøtte og hjelp på nettstedet vårt,

**www.geemarc.com**

Storbritannia: 5B Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB, Storbritannia

telefon **01707 387602**

eller sende en faks til **01707 832529**

QUGAMPLIDECT595-Photo\_N\_A3\_V1.1