



GEWA Maxi

Brukerveiledning

Art.nr: 461130

NO 6.0

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Om GEWA Maxi	3
Tiltentkt bruksformål	3
Om dette dokumentet	3
Oversikt over GEWA Maxi	4
Medfølgende deler	4
Medfølgende dokumenter	4
Komme i gang med GEWA Maxi	5
Generere overtrekk	5
Sette inn et overtrekk	5
Sette inn batterier	6
Endre grunninnstillinger	6
Sette inn plasthetter	8
Feste borrelåsbåndene	9
Program GEWA Maxi	10
Tilbakemeldingssignaler	11
Makroopptak	11
Ta opp et signal	12
Bruk GEWA Maxi	15
Vedlikehold	15
Lade batteriene	15
Rengjøre GEWA Maxi	16
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger	16
Feilsøking	17
Lagring og bortskaffelse	18
Oppbevaring	18
Kassering	18
Produktspesifikasjoner	19
Tilbehør	19
Viktig informasjon	20
Kontaktinformasjon	23

Innledning

Om GEWA Maxi

GEWA Maxi er en fjernkontroll med store knapper som kan belegges med bilder eller symboler for kognitiv støtte. En innebygd fingerstyring gjør det enkelt å trykke på riktig knapp.

Produktet brukes for dagligdagse oppgaver, f.eks.

- Styre infrarød hjemmeelektronikk.
- Styre lamper, vifter, gardiner, stikkontakter og dører med GEWA-LINK IR.
- Styre dører på en sikker måte via et 4096-kodet signal.

Tiltenkt bruksformål


GEWA Maxi er en stor, men brukervennlig fjernkontroll for personer som ikke kan bruke vanlig fjernkontroll på grunn av motoriske, kognitive eller visuelle svekkelser. Enheten kan hjelpe brukeren med å styre elektronisk utstyr hjemme, inkludert tv-apparater og belysning samt vindus- og døråpnere. Enheten er ment å brukes innendørs.

Om dette dokumentet

 Les den viktige informasjonen på side 20 før du tar i bruk produktet.

Denne bruksanvisningen beskriver oppsett og bruk av produktet. Den er ment for teknikere og støttepersoner som vil konfigurere produktet og lære brukeren å bruke det. Instruksjonene i denne bruksanvisningen forutsetter at leseren har kunnskap om konseptet infrarøde signaler.

Oversikt over GEWA Maxi

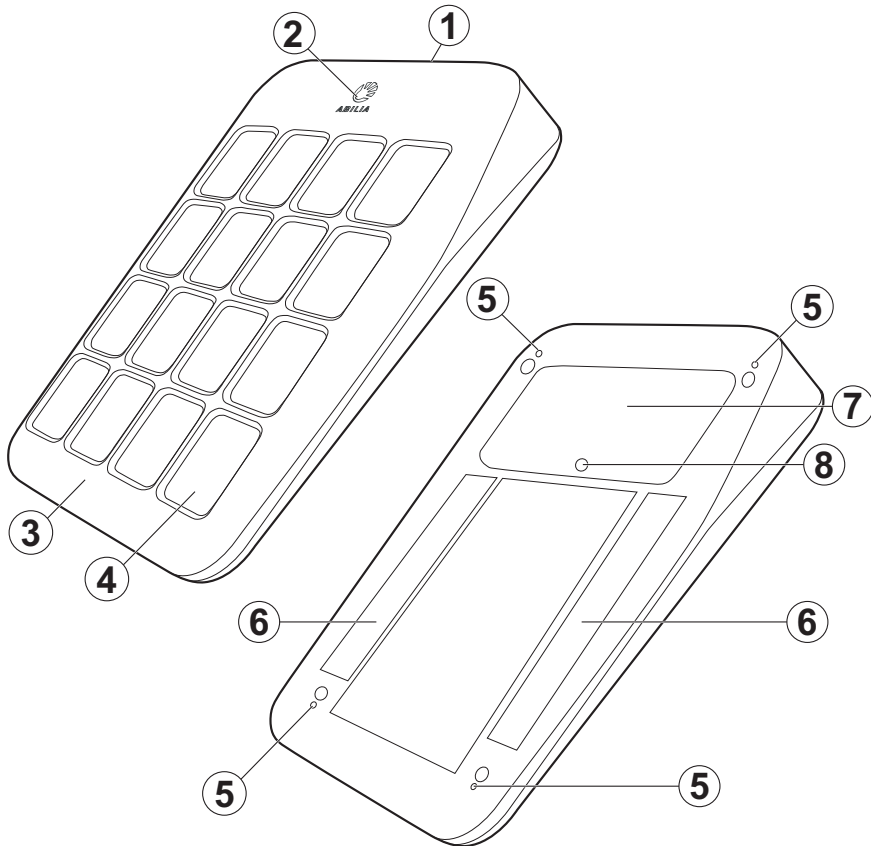

1. Infrarød mottaker
2. LED-indikator
3. Fingerstyring
4. 16 programmerbare knapper
5. Skruer for bakplate
6. Plassering av borrelåsbånd
7. Batterirom
8. Skruer for batterirom

Medfølgende deler

- GEWA Maxi
- Fire AA-batterier
- 16 plasthetter
- Åtte borrelåsbånd
- Én plasthylse

Medfølgende dokumenter

- Bruksanvisning (dette dokumentet)
- Trykt overtrekk

Komme i gang med GEWA Maxi


Generere overtrekk

Med et overtrekk kan du tilpasse GEWA Maxi-knappene for kognitiv støtte. Overtrekk kan genereres og skrives ut på www.gewa.se/overlay, eller du kan tegne et overtrekk.


Sette inn et overtrekk

Før du skifter overtrekk, må du sørge for at du har følgende for hånden:


- Et trykt overtrekk
- En flat skrutekker

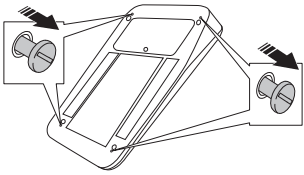


1. Løsne skruene helt, til du hører en klikkelyd.

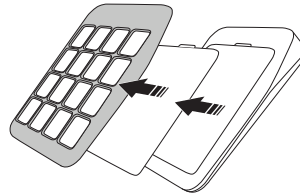


2. Fjern fronten og plashetten.

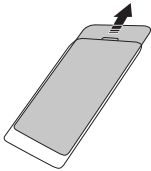


3. Tøm plashetten.

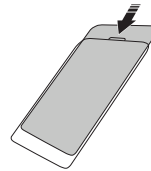

4. Sett det nye overtrekket inn i hylsen.

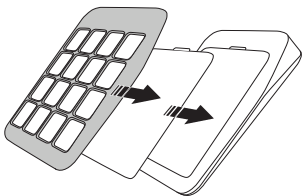

5. Sett hylsen og fronten tilbake på plass.

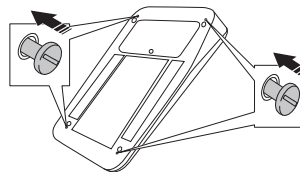

6. Stram skruene.

Sette inn batterier

Se *Lade batteriene* på side 15.

Endre grunninnstillinger

TIPS: Bruk det trykte overtrekket som følger med GEWA Maxi, for å se innstillingsknappene på enheten.

Det finnes fem grunninnstillinger for GEWA Maxi:


- **Volum:** Lydvolumet når du trykker på en knapp.
- **Tone:** Tonen for tilbakemeldingen fra GEWA Maxi.
- **Knappeforsinkelse:** Tiden du må holde en knapp nede for å utløse en handling.
- **LED-indikator:** LED-indikatorens lysstyrke.
- **Vibrasjon:** Vibrasjonsintensiteten når du trykker på en knapp.

Hver innstilling har fire verdier. Naviger gjennom verdiene ved å trykke flere ganger på innstillingsknappen. LED-indikatoren skifter farge for hver verdi som vist i tabellen. Standard innstillingsverdi vises i **fet skrift**.

Innstilling

Volum	Av	Lav	Normal	Høy
Tone	Lav	Middels	Høy	Høyeste
Knappeforsinkelse	Av	0,3 sekunder	0,6 sekunder	Ett sekund
Vibrasjon	Av	Lav	Normal	Høy



LED-indikatoren endrer lysstyrke fra lav til høy for LED-innstillingen. Lysstyrken kan stilles inn på Av, Lav, Normal (standard) eller Høy.

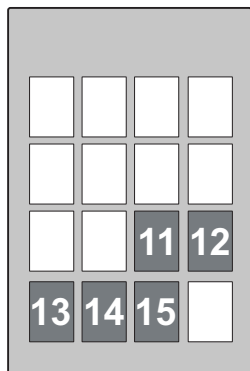

Innstillingsknapper

- 11 Volum
- 12 Tone
- 13 Knappeforsinkelse
- 14 LED-indikator
- 15 Vibrasjon



Gjør følgende for hver innstilling du vil endre:

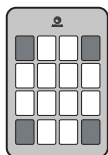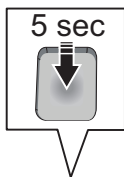

1. Hold alle fire knappene inne til LED-indikatoren blir hvitt.



2. Trykk flere ganger på innstillingsknappen for å navigere til ønsket verdi.

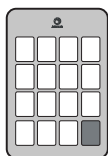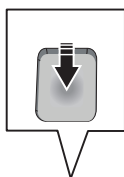


3. Trykk på Enter for å lagre.
LED-indikatoren blinker grønt.


Sette inn plasthetter

Dersom du ikke bruker alle knappene på overtrekket, kan du skjule de ubrukte knappene med de medfølgende *plasthettene*. Plasthettene gjør knappene usynlige, og overflaten føles glatt.


MERK: Kontroller de endrede innstillingene før plasthettene settes på. Plasthettene kan blokkere én eller flere innstillingsknapper.

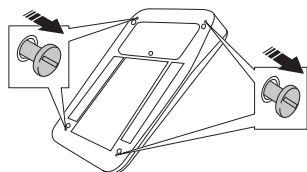


1. Løsne skruene helt, til du hører en klikkelyd.

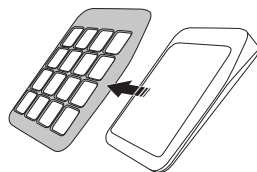


2. Fjern fronten.

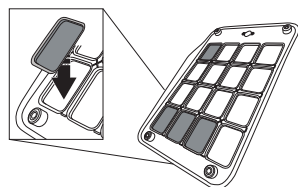

3. Snu fronten, og trykk plasthettene inn ved de ubrukte punktene.

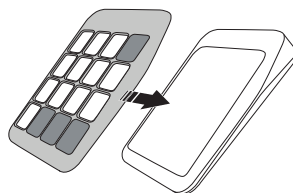


4. Sett fronten tilbake på plass.

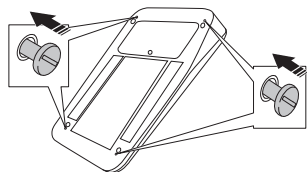


5. Stram skruene.

Feste borrelåsbåndene


GEWA Maxi leveres med åtte borrelåsbånd som du kan feste nederst for å sikre at produktet holder seg på bordet.

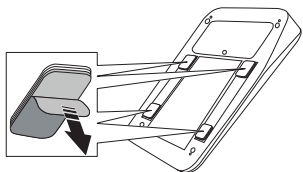

1. Bruk to og to bånd sammen. Trekk av en av plastrullene på båndet, og fest den på baksiden.

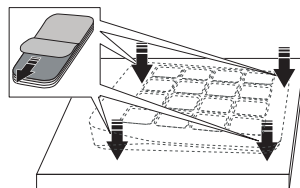

2. Trekk av de andre plastrullene, og fest GEWA Maxi på overflaten du vil bruke den på.

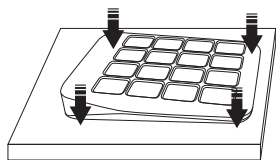

3. Trykk bestemt for å feste båndene, og vent i 30 minutter.

Program GEWA Maxi

⚠ FORSIKTIGHET: Ikke bruk GEWA Maxi i kombinasjon med medisinsk utstyr med høyere klasse enn klasse 1.

TIPS: Bruk det trykte overtrekket som følger med GEWA Maxi, for å se knappene som brukes til programmering på enheten.

De 16 knappene på GEWA Maxi er forhåndsprogrammert med GewaLink-kanalene 16–31: Første knapp er kanal 16, andre knapp er kanal 17 osv. Dette betyr at GEWA Maxi kan brukes direkte. Hver knapp kan imidlertid programmeres på nytt i henhold til brukerens behov.




GEWA Maxi kan programmeres for følgende inngangssignaler.

Signal	Bruk	Eksempel på bruk
IR	Alle typer IR-sendere.	Fjernkontroller for TV eller kabelboks.
GewaLink	Alle Abilias IR-mottakere.	Andromeda Socket eller vindusåpner.
4096	Fungerer med streng autorisasjon.	Dører til leilighet eller hus.

MERK: GEWA Maxi går automatisk ut av opptaksmodus etter 30 sekunder uten aktivitet. Feilsignalet spilles av, og endringene lagres ikke.

Tilbakemeldingssignaler

Under programmering gir GEWA Maxi tilbakemelding i form av LED-farge og ulike signaler for å indikere ulike meldinger.



Signaltype	Tone	Forklaring på tone
Innstilling		Tre økende toner
Utført		Tre positive toner
Feil		Åtte negative toner

Makroopptak



Hver knapp på GEWA Maxi kan programmeres til å utføre én handling eller en serie med flere handlinger for ett klikk (en makro). En serie med flere handlinger kan f.eks. være å slå på tv-en/kabelboksen, og deretter gå til kanal 4 med et tastetrykk.

I *Ta opp et signal* på side 12 finnes det et alternativ for å programmere en makro.

Ta opp et signal

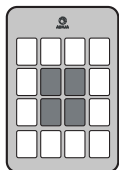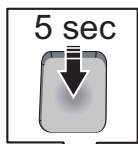


1. Hold de fire knappene inne til LED-indikatoren blinker grønt for å gå til optaksmodus.

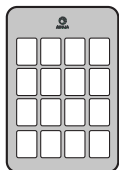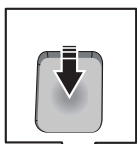

2. Trykk på knappen du vil ta opp til. LED-indikatoren lyser vedvarende grønt.





3±1 cm

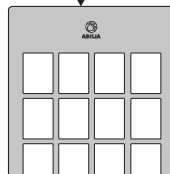

3. For IR:



Plasser senderen du vill ta opp, som en tv-fjernkontroll, ca. 3 cm fra IR-vinduet.

4. Velg en av følgende:

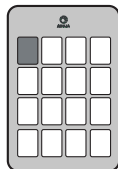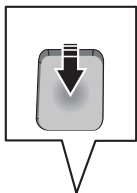



For IR input:

Trykk på knapp 1. En tone indikerer at GEWA Maxi er klar til opptak.

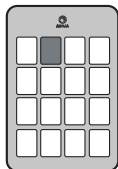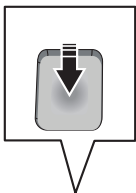

For GewaLink:

Trykk på knapp 2. Vent til LED-indikatoren lyser vedvarende hvitt.

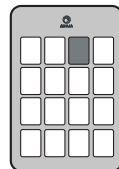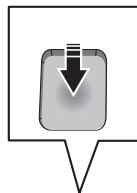

For 4096:

Trykk på knapp 3. Vent til LED-indikatoren lyser vedvarende blått.

5. Velg en av følgende:




For IR:

På senderen trykker du på og holder inne knappen du vil ta opp til.

Slipp knappen når LED-indikatoren blir rødt.


Gjenta til LED-indikatoren blinker gult.

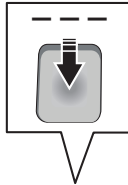

For GewaLink:

Angi den tresifrede koden, mellom 000 og 128, for enheten som skal tas opp.

Innstillingstonen spilles av, og LED-indikatoren blinker gult.

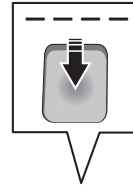



For 4096:

Angi den firesifrede koden, mellom 0000 og 4095, for enheten for å starte optak.

Innstillingstonen spilles av, og LED-indikatoren blinker gult.



TIPS: Hvis IR-opptaket mislykkes:

- Endre avstanden mellom fjernkontrollen og GEWA Maxi.
- Pass på at lys, for eksempel sterkt sollys, ikke forstyrrer GEWA Maxi.
- Utfør prosedyren på nytt, men trykk og slipp knappen på fjernkontrollen i stedet for å holde den inne.

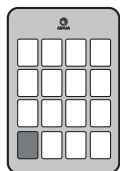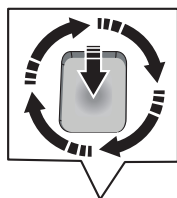

6. Velg en av følgende:

- Dersom du vil ta opp en ny handling:
 - a. Trykk på Forsinkelse gjentatte ganger for å stille inn forsinkelsen til neste handling. Det blinkende mønsteret til LED-indikatoren indikerer forsinkelsen til neste handling.
 - b. Trykk én gang på Enter for å lagre og fortsette til neste del av opptaket.
 - c. Gjenta trinn 3–6.
- Hvis du er ferdig med opptaket, gå til neste trinn.

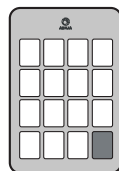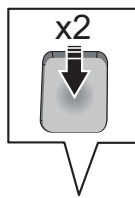

7. Trykk én gang på Enter for å lagre opptaket.

8. Trykk på Enter igjen for å gå ut av opptaksmodus.

Bruk GEWA Maxi


Bruk GEWA Maxi i samme rom som enheten du vil styre. GEWA Maxi er ikke følsom for pekeretning.

Vedlikehold


Lade batteriene

Når batteriene må skiftes, blinker LED-indikatoren rødt. Ett langt og tre korte pip gjentas to ganger.


Før du begynner, må du sørge for at du har følgende for hånden:

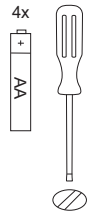

MERK: Bruk ikke-oppladbare alkaliske batterier i GEWA Maxi. Andre batterier er ikke kraftige nok for GEWA Maxi.

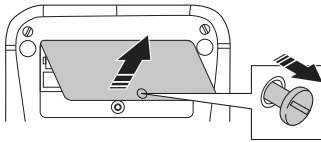


1. Løsne skruen, og åpne batterirommet.

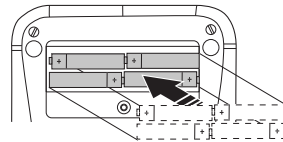

2. Fjern de gamle batteriene, og sett inn nye.

MERK: Vær oppmerksom på batteripolariteten (+- symbolene).

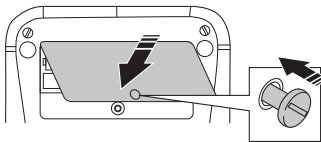





3. Lukk batterirommet, og stram skruen.

Rengjøre GEWA Maxi

Rengjør GEWA Maxi med en mikrofiberklut og litt vann. For å rengjøre plasthylsen som holder overtrekket, løsner du de bakre skruene og fjerner fronten.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Det kan hende du må tilbakestille GEWA Maxi ved renovering eller feilsøking. Ved tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjernes all programmering og alle innstillinger.

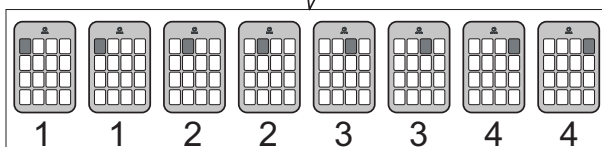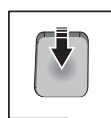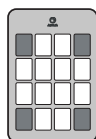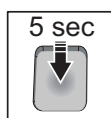

1. Hold de fire knappene inne til LED-indikatoren blir hvitt.

2. Trykk på knappesekvensen 11223344 for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

Resultat: LED-indikatoren blinker grønt i noen sekunder, og et signal lyder etter utført tilbakestilling.

Feilsøking

Dersom du trenger hjelp med GEWA Maxi, se *Kontaktinformasjon* på siste side i denne bruksanvisningen, eller gå til www.abilia.com.


Problem	Årsak	Løsning
GEWA Maxi kan ikke programmeres.	Batteriene i senderen er svake.	Skift batteriene i senderen.
	Batteriene i GEWA Maxi er (nesten) tomme.	Skift batteriene i GEWA Maxi, se <i>Lade batteriene</i> på side 15.
GEWA Maxi kan ikke programmeres for infrarøde signaler.	Senderen er for nær eller for langt unna den infrarøde mottakeren til GEWA Maxi.	Øk eller reduser avstanden mellom GEWA Maxi og senderen.
	GEWA Maxi registrerer eller mottar ikke sendersignalene.	Gjenta prosedyren i <i>Ta opp et signal</i> på side 12 på side 12, men trykk på knappen og slipp den i stedet for å holde den inne på trinn 5.
	Senderen bruker radio- eller Blåtann-signaler.	Kontroller at senderen ikke bruker radio- eller Blåtann-signaler. Bare infrarøde signaler kan programmeres.
	Eksterne kilder til infrarødt lys, f.eks. kraftig sollys, forstyrrer GEWA Maxi.	Skjerm GEWA Maxi mot eksterne kilder til infrarødt lys.
Fronten løsner ikke.	Skruene for bakplaten er ikke skrudd helt ut.	Fortsett å skru ut skruene for bakplaten til du hører et klikk.
Batterierommets plate løsner ikke.	Skruene for batterirommet er ikke skrudd helt ut.	Fortsett å skru ut skruene til batterirommet til du hører et klikk.

Lagring og bortskaffelse

Oppbevaring

Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur. Må ikke oppbevares i fuktige omgivelser.

Oppbevar produktet mellom -10 og 50 °C.

 **FORSIKTIGHET:** Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke produkten i en lengre periode.

Kassering



Produktet inneholder elektriske komponenter som skal resirkuleres. Kasser produktet på et egnet sted.

Produktspesifikasjoner

Dimensjoner, L × B × D	242 x 160 x 42 mm
Vekt	540 g
Temperatur (oppbevaring)	-10–50 °C
Temperatur (bruk)	5–40 °C
Batteritype	Fire uoppladbare alkaliske AA-batterier
Batteritid	To år ved 100 overføringer per dag
Infrarød rekkevidde	Maks 50 m
Omgivelsesstyring	GewaLink, GEWA 4096 og opptatte infrarøde signaler
Estimert levetid	5 år

Tilbehør

Dersom du vil ha mer informasjon om GEWA Maxi og tilbehøret, gå til www.abilia.com/nb/our-products/omgivelseskontroll/fjernkontroller/gewa-maxi, eller skann QR-koden.





Skann meg!

Viktig informasjon

Før du tar i bruk produktet, må du lese og sørge for å forstå innholdet i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsdefinisjoner

 **ADVARSEL:** Risiko for personskade eller dødsfall dersom instruksjonene ikke følges.

 **FORSIKTIGHET:** Risiko for skade på produktet dersom instruksjonene ikke følges.

MERK: Nødvendig informasjon i en gitt situasjon.

TIPS: Tilleggsinformasjon som kan forbedre bruken av produktet.

Alvorlige hendelser

Dersom det oppstår en alvorlig uønsket hendelse i tilknytning til produktet, skal dette rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter. En uønsket hendelse anses som alvorlig dersom den direkte eller indirekte kan ha ført til eller kan føre til dødsfall hos en pasient, bruker eller annen person, til midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av personer, brukerens eller andres helsetilstand eller til en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Samsvar med krav til medisinsk utstyr

GEWA Maxi markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med funksjonshemninger – og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinsk utstyr.

Produktansvar

Produktet er utviklet og risikovurdert i henhold til ISO 14971.

Bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene er utformet i samsvar med sikkerhetsvurderingen i risikoanalysen. Bruk alltid produktet sikkert. Abilia AB tar ikke ansvar for konsekvenser av feil bruk eller installasjon av produktet. Enhver form for manipulering av produktet ugyldiggjør garantien og vil medføre at produsenten fraskriver seg ethvert ansvar. Estimert levetid for produktet gjelder når det brukes i samsvar med relevante bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Kontaktinformasjon

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannia

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannia
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internasjonal

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

