

Micro Voice stemmeforsterker

Art. nr. 462230



Innledning

Micro Voice stemmeforsterker passer for personer med svak eller anstrengt stemme, eller personer som jevnlig bruker stemmen intensivt. Dette produktet er ment for bruk utendørs og innendørs i bolig-, skole- og arbeidsmiljø.

Micro Voice markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med funksjonshemninger, og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinskteknisk utstyr.

Denne brukerveiledningen er ment for brukere. I dette dokumentet lærer du hvordan du bruke Micro Voice.

Produktoversikt



Micro Voice



Lader



Midjereim



Headset



Volumkontroll Kontrollknapp



Mikrofoninngang Lydutgang LED-indikator Ladeport



LED-indikator for lading

Sikkerhet



ADVARSEL: Før du bruker produktet, må du lese og forstå innholdet i denne bruksanvisningen.

- Bare den tilhørende laderen, levert av Abilia, kan brukes til å lade Micro Voice. Hvis en annen lader brukes, kan produktet bli alvorlig skadet.
- Ikke legg mikrofonen og forsterkeren tett sammen. Dette gir en akustisk tilbakemelding som, når den er satt til høyt volum, kan forårsake hørselshemming.

Alvorlige hendelser

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til produsenten og myndighetene i ditt land. En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller indirekte kan ha ført til, eller kan føre til, en av disse situasjonene:

- Dødsfall til en pasient, bruker eller annen person.
- Midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av pasientens, brukerens eller andres helsetilstand.
- En alvorlig trussel mot folkehelsen.

Produktansvar

Abilia AB har analysert risikoene som er forbundet med produktet i samsvar med EN ISO14971. Brukerveiledningen og de tekniske spesifikasjonene er utført i samsvar med sikkerhetsvurderingene som er utført i risikoanalysen.

Ta alltid hensyn til sikkerheten ved førstegangs og påfølgende bruk av dette produktet. Det er ikke mulig å beskrive alle uriktige måter å bruke produktet på i dette dokumentet. Hvis du ikke er sikker på om du har satt opp eller startet å bruke produktet på riktig måte, anbefaler vi at du kontakter leverandøren.

Abilia AB er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av feilaktig bruk, mangel på oppfølging, feilaktig oppsett, feilaktig tilkobling eller lignende. Det økonomiske ansvaret til Abilia AB er alltid begrenset til verdien av selve produktet.

Forsøk på å få tilgang til eller på noen som helst måte misbruke elektroniske komponenter i produktet, ugyldiggjør garantien fra produsenten og fritar produsenten for ansvar.

Forberedelser

Lade Micro Voice



ADVARSEL: Bare den tilhørende laderen, levert av Abilia, kan brukes til å lade Micro Voice. Hvis en annen lader brukes, kan produktet bli alvorlig skadet.

1. Lade Micro Voice opp fullstendig før du bruker den for første gang.
2. Koble laderen til porten på siden av Micro Voice.
3. Kontroller at LED-indikatoren blinker grønt for å påse at den fungerer riktig.

Det tar seks timer å lade batteriet, og det varer i omtrent én uke med åtte timers daglig bruk. LED-indikatoren kan vise følgende farger:



Grønt – Batteriet er fulladet. Blinker grønt – Batteriet lades.

Blinker oransje – Batterinivået er lavt.

Blinker rødt – Du har kort tid før batteriet går tomt.

Bruk



ADVARSEL: Ikke legg mikrofonen og forsterkeren tett sammen. Dette gir en akustisk tilbakemelding som, når den er satt til høyt volum, kan forårsake hørselshemming.


1. Bestemme deg for hvordan du vil bære den. Du kan feste den til midjen ved hjelp av belteklipsen eller midjereimen.
2. Koble mikrofonen til inngangen.
3. Plasser mikrofonen:
 - a. Hvis du har Headset-mikrofon: Fest den rundt bakhodet, med bøylen over ørene, og flytt mikrofonen nær munnen.
 - b. Hvis du har Myggmikrofon: Fest den til klærne nær munnen.
 - c. Hvis du har Strupemikrofon: Påse at den er festet flatt mot huden øverst på halsen (over kragen).



Headset



Myggmikrofon

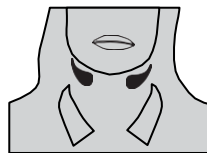

Strupemikrofon

TIPS! Strupemikrofon: Hvis du har en slank hals, kan du legge et tøyestykke imellom bak i nakken for å få bedre passform. Den bør ikke føles så stram at det er ubehagelig eller ubekvent.

Slå på (Strømsparingsmodus)

1. Trykk på Kontrollknappen én gang

Du kan begynne å snakke inn i mikrofonen. LED-indikatoren forblir grønn mens Micro Voice er slått på. Etter 15 minutters inaktivitet slås Micro Voice av.

Slå på (Ustanselig)

MERK! Denne funksjonen gjelder bare enheter med serienummer 02969 / VAMP, eller nyere.

1. Hold kontrollknappen nedtrykt.
LED-indikatoren blinker grønt og oransje noen få ganger og blir deretter rød. LED-indikatoren forblir deretter grønn mens Micro Voice er slått på. Den forblir på til den er slått av manuelt.

Slå av

1. Trykk og hold inne Kontrollknappen til LED-indikatoren blir rød.

Volum

1. Drei Volumkontrollen med klokken for å øke volumet
2. Drei Volumkontrollen mot klokken for å senke volumet.

Demp (Hvilemodus)

Hvis du vil ha en personlig samtale, kan du sette Micro Voice i hvilemodus.

1. Trykk én gang på Kontrollknappen.
LED-indikatoren blinker oransje for å indikere at Demp er aktivert.
2. Du går tilbake til normal modus ved å trykke én gang på Kontrollknappen. LED-indikatoren blir grønn.

Vedlikehold

Rengjør Micro Voice

Rengjør forsterkeren med en litt fuktig klut. Rengjør produktet når det er skittent eller når du forbereder for gjenbruk.

Feilsøking

Hvis du har spørsmål angående funksjonene eller innstillingene i produktet, snakk med produktleverandøren eller forhandleren.

Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du kontakte Abilias support, se *Kontaktinformasjon*.

Lagring og kassering

Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur og borte fra fuktighet.



Produktet inneholder elektriske komponenter som må resirkuleres.
Kasser produktet på et egnet sted.

Tekniske data

Mål, H x B x D	67 x 122 x 32 mm
Vekt	210 g
Batteri	Integrert ladbart batteri
Batteritid	200t (Hvilemodus) 40h (aktivmodus)
Inngang og utgang	3.5 mm, stereo og mono

Tilbehør

Det er mulig å bruke alternative mikrofoner for Micro Voice. De tilgjengelige mikrofonene er oppført som tilbehør til Micro Voice.

For mer informasjon om Micro Voice og tilbehør, gå til www.abilia.com/nb/our-products/kommunikasjon/stemmeforsterker/micro-voice-stemmeforsterker eller skann QR-koden.



Skann meg!

Kontaktinformasjon

Sverige:

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige

Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge:

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge

Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannia:

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckinghamway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannia

Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internasjonal:

www.abilia.com/intl/get-products/distributors



ABILIA

Kontaktinformasjon:



Abilia UK Ltd., Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB 24 4AE, Storbritannia
Telefon: +44 (0) 1954 281210 | info@abilia.com | www.abilia.com