

PPOD SITTEMØBEL



BRUKSANVISNING

Alle brukere av Ppod bør gjøre seg kjent med innholdet i denne bruksanvisningen.

Innholdsliste

	Side
Innhold	1
Sikkerhet og vedlikehold	1
Introduksjon	2
1. Montering av Ppod	3
2. Posisjonering av bruker i Ppod	4
3. Rengjøring av Ppod	5
4. Tilbehør Flip-over hodestøtte	6
5. Tilbehør PPod Mobile base	7
6. Tilbehør Frittstående bord	8
7. Tilbehør Fotstøtte	9
8. Tilbehør Bord på fanget	10
9. Tilbehør Aktivitetsbøyle	11
10. Feil og mangler	12
Spesifikasjoner	13
Kontakt oss	Bakside

Sikkerhet

- Forsikre deg om at setet er ordentlig festet til baseputen før bruk.
- Forsikre deg om at hoftebeltet og andre seler (hvis inkludert) er festet rundt bruker når de er i bruk.
- ALDRI la Ppod være i nærheten av en åpen ild.
- ALDRI ta ut polystyrenkulene fra den forseglede posen innendørs.
- ALDRI la noen være uten tilsyn i Ppod.
- Ppod skal alltid være festet mot Mobil base med de tiltenkte festestoppene for å sikre at Ppod henger fast.

Vedlikehold

En gang i uken: Fjern setet med trekk og liner, samt støtteputen fra baseputen.

- Rist baseputen og fordel polystyrenkulene som er inne for å få jevn fordeling og form.
- Kontrollerer med jevne mellomrom trekkene for slitasje.
- Kontrollerer med jevne mellomrom posene med kuler inni for eventuelle hull.

PPOD

CE, klasse 1

Introduksjon

- Denne bruksanvisningen er for Ppod og er ment å gi veiledning om bruk og vedlikehold.
- Ppod gir omsluttende støtte for kroppen, slik at brukers vekt blir jevnt fordelt over et stort område. Dette forbedrer komfort og avslapning.
- Det anbefales å være bevist på hvor lenge brukeren sitter i Ppod. Behovet for stillingsvariasjon er individuelt.
- Stillingsvariasjon bør også inneholde tiltak utenfor Ppod. Ved å gjøre dette vil du forbedre brukers toleranse for å sitte i Ppod hver dag.

Det finnes 2 typer Ppod:


Standard (symetrisk)

- Standard Ppod seter, liner og trekk, er tilgjengelige i forskjellige størrelser og kan brukes til forskjellige brukere når kroppsmålene er innenfor målene på de ulike størrelsene.
- Det anbefales at vurderinger for å finne rett Ppod størrelse gjøres av en kvalifisert person. Bruk målskjema for å finne rett størrelse.

Individuelt formet


- Den individuelt utformede Ppoden er skreddersydd for å passe til den enkelte brukers kropp.
- Utformingen blir gjort av Inpo AS.
- En individuelt utformet Ppod vil bare passe for den enkelte bruker den er laget til.

1. Montering av Ppod

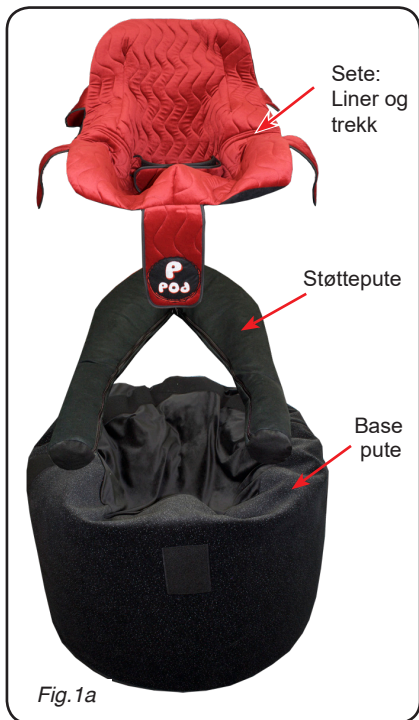

- Ppod kommer med tre grunnleggende deler: sete, liner og trekk, støttepute og basepute (Fig. 1a)
- Baseputen jevnes ut. Plassere støtteputen ned mot baseputen slik at borrelåsene festes mot hverandre. (Fig. 1b).

Setet plasseres på midten. Sjekk at midtstroppen på setet kommer midt framme på baseputen. (Fig. 1c). Fest alle de andre festestroppene til baseputen (Fig. 1c & 1d).

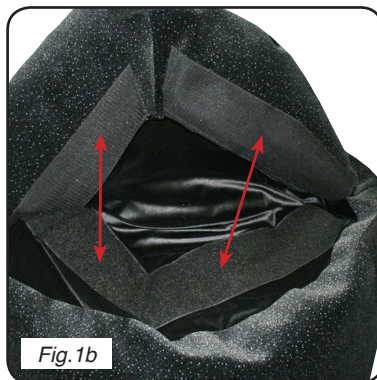


- Når Ppod er satt sammen, tilt setet bakover slik at det er klart for innsetting av bruker. (Fig. 2b).



2. Posisjonering av bruker i Ppod

- Det anbefales å bruke heis på brukere som er over 25 kg.
- Manuell løfting av tyngre brukere bør ikke skje.
- Det er viktig at hjelpepersonalet har kunnskap om løfteutstyret som skal brukes.
- Alle Ppod seter har en egen festestropp i trekket på hver side av setet. Her kan spennen på hoftebeltet stikkes under, slik at hoftebeltet ikke glir ned i setet når bruker skal plasseres i Ppoden. (Fig.1c).
- Tilt Ppod bakover før bruker blir senket ned i setet. (Fig.2b).
- Med en gang brukeren har blitt plassert i Ppod setet, festes vedkommende med hoftebeltet som er montert. (Fig.2a) Hoftebeltet bør være justert stramt inntil bekkenet til bruker.
- **VIKTIG:** Hoftebeltet skal alltid være festet til bruker når vedkommende sitter i Ppod.
- Se til at baken plasseres helt inntil ryggen når brukeren blir senket ned i Ppod-setet.
- I tillegg til hoftebelte er det mulighet for å bruke brystbelte, H-sele, vester eller skrittstropp. Fig.2c).
- Regulering av setet sin posisjon i forhold til baseputen kan gjøres før eller etter at bruker har blitt satt i setet. Små brukere kan tiltes sammen med setet. For større brukere, over ca 30 kg, bør tilten bestemmes før bruker komme ned i setet.
- **VIKTIG: Vær oppmerksom på at det viktigste for bruker er å få nødvendig støtte som blir jevnt fordelt slik at vedkommende får en komfortabel sittestilling.**

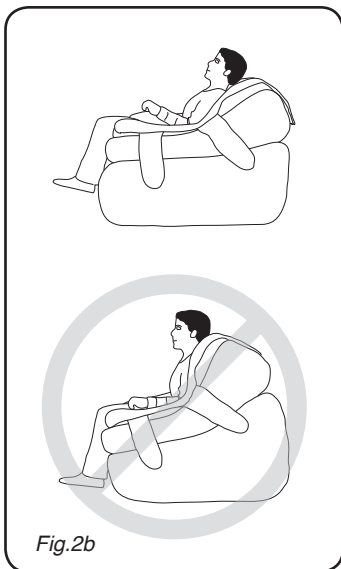

3.1 Rengjøring av Ppod

- Ved bruk av Ppod er det nødvendig med rengjøring og vask.
- Setetrekket er enkelt å ta av lineren. Press hoftebeltet gjennom hullet i trekket. Trekket kan vaskes i vaskemaskin på 40 grader eller renses med kjemisk rensedemidler.
- Ppod lineren som danner setet er laget av celleplast og er vannett. Vann etter vask kan tørkes av eller vent til det er fordampet fra overflaten.
- Ikke plassere Ppod setet for nært strålevarme eller utsett det for høy temperatur for tørking. Lineren er av celleplast og kan miste formen ved temperaturer over 80 grader.
- Ikke bruk skuremidler eller etsende stoffer for å rengjøre deler av Ppoden.

3.2 Rengjøring av Ppod trekket

- Les vaskeanvisningen på innsiden av trekket.
- Ta av setetrekket fra lineren
- Før vasking, brett tilbake borrelåsen slik at den harde delen på festestroppene er klebet mot det myke stoffet. (Fig.3.2a) Dette for å hindre at den harde borrelåsen fester seg mot stoffet i setetrekket.
- Hele Flip-over hodestøtten uten glidelås på baksiden kan vaskes i sin helhet i maskin.
- Flip Over hodestøtte med glidelås på baksiden indikerer at kun trekket skal vaskes.
- Ta av trekket på støtteputen, baseputen eller fotstøtten og vask det på 40 grader med mildt vaskemiddel. '
- **Innerputen med polystyrenkulene i baseputen og støtteputen MÅ tas ut FØR vask av yttertrekket. (Fig.3.2b).**
- **Dersom innertrekket som holder polystyrenkulene på plass må vaskes, MÅ ALLE KULENE TAS UT FØR VASK.**
- Når trekket til setet er vasket, skal vaskeanvisningen plasseres på toppen av seteryggen for at trekket skal bli riktig plassert på lineren.



3.3. Brannhemming

- Materialene i Ppod er brannhemmende og oppfyller NAV sine krav.
- Det er viktig at ingen ytre stoffer blir tilført Ppoden slik som hårspray, ikke godkjente rensedmidler, polish, osv. Dette kan påvirke den brannhemmende godkjennelsen.


4. Bruk av flipover hodestøtten

- Flipover hodestøtten henger over seteryggen i to avtakbare bånd. Målet med den er å gi variasjon i stillingen til hodet.
- Ved behov for hodestøtten vippes den fremover fra baksiden av Ppod (Fig.4a) og legger den i egnet posisjon. (Fig.4b).
- Dersom hodestøtten er for høy eller lav, kan høyden reguleres med strammebåndene.(Fig.4c)
- Hodestøtten kan fjernes fra Ppod ved å presse på sidene av spennen slik at den åpnes. (Fig.4d) og de to halvdelene kan trekkes fra hverandre.
- Montering skjer i motsatt rekkefølge.



5. Bruk av Ppod mobilbase

- Før Ppod blir plassert på mobil base skal fotbremsen aktiveres. Press bøylen nedover ved å trå på markert område. (Fig.5a).
- **Brukeren skal IKKE sitte oppi Ppod når Ppod blir montert på mobil base. Det samme gjelder når Ppod skal fjernes fra mobil base.**
- Plassere Ppod på mobil base.
- Klapp på sidene av baseputen slik at den kommer ned i mellom sidegrindene på mobil base. Trekk de to festebåndene over bakre del av rammen på mobil base(Fig.5b). Enden med borrelås festes mot baseputen.

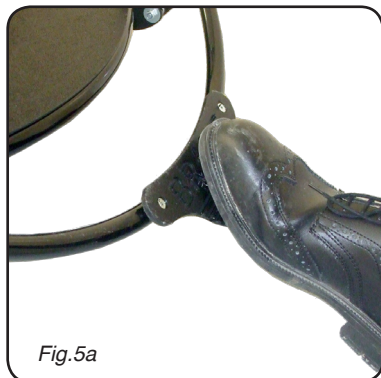

- Kjørebøylen bak kan reguleres i ønsket vinkel ved å løsne de to spakehåndtakene (Fig.5c) Plassere kjørebøylen og skru spakehåndtaket til slik at taggledet står stabilt.
- Brukeren kan nå plasseres i Ppod. (se side 4) Fotbremsen kan løsnes dersom det er nødvendig.
- **Mobil base er laget for å brukes innendørs og SKAL IKKE BRUKES UTENDØRS.**
- **Mobil base skal ALDRI transporteres i bil med bruker sittende i Ppod.**
- **Bremsen bør være aktivert når mobil base ikke er i bruk.**




6.1 Bruk av frittstående bord

- Når bruker sitter i Ppod, plasseres det frittstående bordet foran Ppod som vist på bildet (Fig.6.1a).
- Ved behov kan bordet heves, senkes og vinkles.
- For å heve eller senke bordet: åpne vingskruene mot klokken. Plasser bordet i ønsket høyde. Lås vingskruene ved å vri de med klokken. (Fig.6.1b)
- Vinkeljustering av bordet skjer ved å åpne umbracoskruene på hver side i taggledet. Still inn bordet i ønsket vinkel og stram til umbracoskruene. Pass på at taggene i leddet griper nøyaktig inn i hverandre. (Fig.6.1c)



6.2 Ekstrautstyr på mobilbase

- Ved å bruke ulike innfestninger på mobil base kan en gjøre tilpassninger for å få festet:
 - aktivitetsbøyle
 - sondematstativ
 - oksygenbeholder
 - bord
- - støtfanger

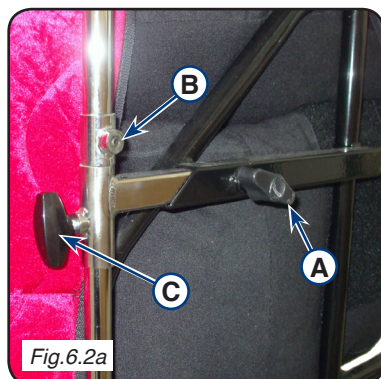

7.1 Bruk av fotstøtte

- Fjern sete og støttepute fra baseputen. Legg de to festebåndene til fotstøtten over toppen av baseputen. (Fig.7.1a) og fest bakre del av båndene med borrelås inn mot baseputen. (Fig.7.1b).
- Montør støttepute og setet til baseputen (se side 3). og klips på fotstøtten i spennene på de to båndene. (Fig.7.1c).
- Juster høyden på fotstøtten ved å stramme eller slakke båndene som er sydd inn i selve fotstøtten.(Fig.7.1e). Fotstøtten er i tillegg til de to båndene, festet mot baseputen med to striper av borrelås
- Fotstøtten er riktig montert. (Fig.7.1d)
- Demontering av fotstøtten skjer ved å klemme på sidene av festespennene. (Fig.7.1c).






8. BRUK AV BORD PÅ FANGET

- Bordet kan brukes med eller uten bordplaten i plast. Støtteputen under kan brukes for seg selv. (Fig.8a)
- Løft opp de to bakre festebåndene til Ppod-setet, plasser festebåndene til bordet mot baseputen. (Fig.8b), plasser de bakre festebåndene til ppor-setet tilbake på plass.
- Korrekt montert bord. (Fig.8c)
- Ved behov for vask kan bordflaten vaskes. Yttertrekket til støtteputen under bordet kan vaskes på 40 grader. **Innertrekket med polystyrenkuler må IKKE vaskes med kulene i puten.**



9. Bruk av aktivitetsbøyle

- Plassere baserammen på gulvet med de sorte distanseknottene vendt nedover. T-bar rørene skal vende oppover. (Fig.9a).
- Før bøylene ned i hvert sitt T-bar rør, og stram vingskruene til når bøylene er i ønsket høyde. (Fig.9b).
- Plassere aktivitetsbøylene over Ppod i ønsket posisjon. (Fig.9c.)
- Høyden på aktivitetsbøylene kan reguleres med de to vingskruene. (Fig.9b)
- Dybden reguleres trinnløst ved å føre T-bar rørene fram eller tilbake på baserammen. (Fig.9b)
- Opphengskrokene på aktivitetsbøylene kan plasseres trinnløst. Krokene har gjenger og fungerer som skruer som kan låses. (Fig.9d)

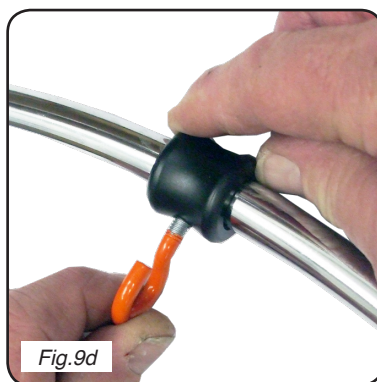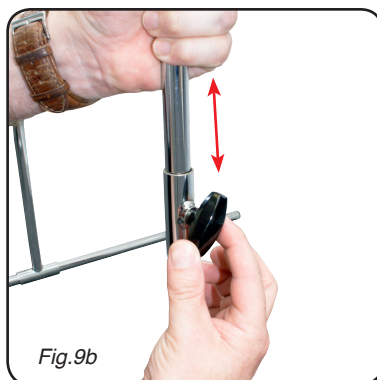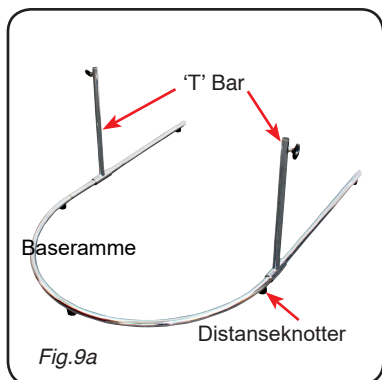

Feil eller mangler

Dersom det oppdages feil eller mangler skal dette rapporteres umiddelbart til eier av utstyret som er NAV Hjelpemiddelsentral.

Endring av utstyr skal kun utføres av kvalifisert personell.

Reparasjon og service

Garanti

Ppod og tilbehør har 2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Normal slitasje er ikke dekket av garanti.

Reparasjoner


Ved behov for reparasjoner og nye deler skal dette meldes til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket du tilhører.

Videre saksgang og utførelse av oppdrag blir besemt av NAV Hjelpemiddelsentral.


MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93 / 42 EEC

Spesifikasjoner

SYMETRISK PPOD DIMENSJONER i mm											
'P' Pod størrelse	Micro	1	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6
Hoftebredde	180	220	250	260	260	270	310	310	360	370	420
Brystvidde	160	190	220	240	250	240	270	270	320	330	340
Lårlengde	120	210	230	260	290	290	330	350	350	420	430
Rompe til armhule	140	220	260	260	290	290	320	330	380	360	420
Rygghøyde til over skulder	230	340	370	400	420	440	440	470	510	540	550
Rygghøyde til over hode	360	430	500	560	560	620	620	660	660	700	730

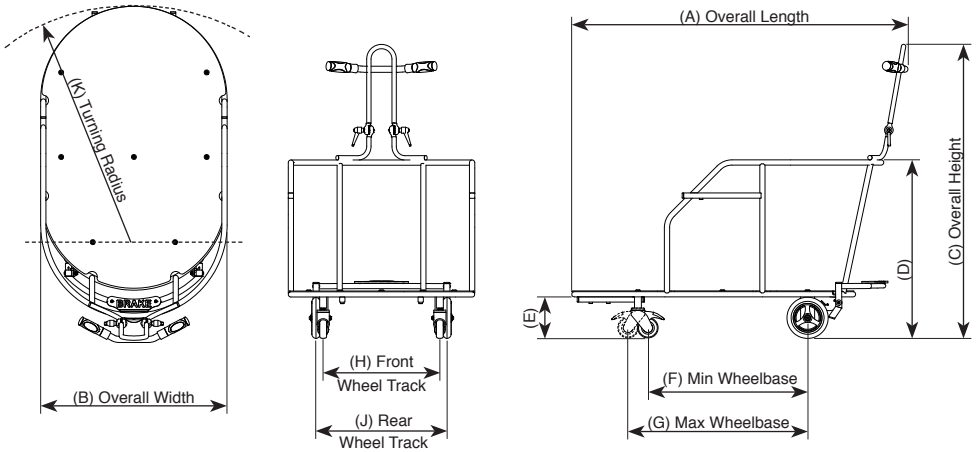


PPOD MOBILE BASE DIMENSJONER i mm										
STØRRELSE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Small	1030	580	1060	550	150	490	560	385	450	675
Medium	1120	680	1070	650	150	590	660	425	480	780
Large	1225	680	1070	650	150	590	660	425	480	860
Ex Large	1325	680	1070	650	150	690	760	425	480	960

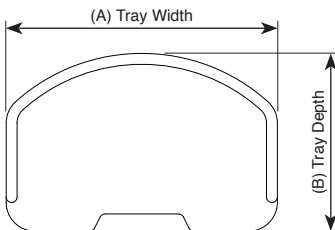


PPOD BORD PÅ FANGET DIMENSJONER i mm		
STØRRELSE	A	B
Small	523	390
Medium/Large	618	443

Spesifikasjoner

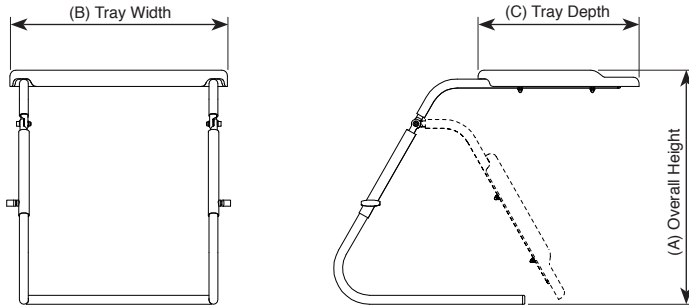

PPOD FRITTSTÅENDE BORD DIMENSJONER i mm			
STØRRELSE	A	B	C
Small	460 - 575	525	545
Medium	310 - 810	635	595
Large	760 - 1000	740	695

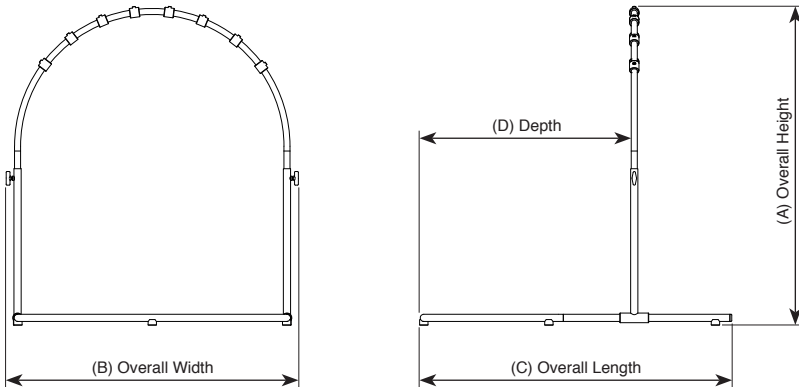

PPOD AKTIVITETSBOYLE DIMENSJONER i mm				
STØRRELSE	A	B	C	D
Small	790 - 1120	770	980	400 - 880
Medium	1170 - 1500	770	980	400 - 880



Dersom du trenger mer informasjon eller flere kopier av denne bruksanvisningen, vennligst ta kontakt:

Inpo AS

Stubberudveien 170, 2150 Årnes

Mobil: 92812190

E-post: post@inpo.no

Sollia 28, 5912 Seim

Mobil: 45637913

E-post: post@inpo.no