



2-punkts hoftebelte kulepennlås dobbelt regulerbart

Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70005.0	216499	XS
6.70005.1	216500	S
6.70005.2	216501	M
6.70005.3	216502	L
6.70005.4	216503	XL

Kinetic Balance

hoftebelte kulepennlås
dobbelt regulerbart

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB belte hofte, kulepennlås, 2 justeringer
6.70005

Innhold

4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 hoftebelte
1 bruksanvisning

Bruk

Sele for bekkenposisjonering. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer. Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av de 40 mm klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennen ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennen i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne spennen ved å trykke på den med en kulepenn eller en annet butt gjenstand som har en diameter på under 7 mm.

Advarsel

I nødstilfeller kan beltet fjernes raskt til enhver tid ved å åpne klemspennene på en eller to sider.

Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel. Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no