



4-punkts hoftebelte enkelt regulerbart		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70042.0	216508	XS
6.70042.1	216509	S
6.70042.2	216510	M
6.70042.3	216511	L
6.70042.4	216512	XL

# Kinetic Balance

## 4-punkts hoftebelte enkelt regulerbart

BRUKERVEILEDNING



**KINETIC BALANCE**

## Produkt

KB belte hofte 4 innfestinger, 1 justering  
# 6.70042

## Innhold

4 rørklemmer  
4 båndholdere  
4 klemspenner  
4 beltespenner  
1 hoftebelte  
1 bruksanvisning

## Bruk

Sele for bekkenposisjonering. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

## Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

## Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer. Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

## Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspenne.  
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.  
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspenne.
5. Fest klemspenne ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspenne i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspenne.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukers mages presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet samtidig som du trykker på det elastiske materialet på spennene med tommelen og pekefingeren.

## Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel. Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 VESTBY  
T: 66 96 38 00  
E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)